

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «СибАкадемТехнологии»
П.А. Самойлов
«10» апреля 2024 г.
"СибАкадемТехнологии" М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ПЕТЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ ПО ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Версия 1 от «10» апреля 2024 г.

1. Общие сведения: настоящая Инструкция по применению распространяется на медицинское изделие Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения (см. Приложение 1).

(далее по тексту – петля, или изделие)

2. Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СибАкадемТехнологии» (ООО «СибАкадемТехнологии»), 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16, офис 354-1.
Сайт: www.sovteh2012.ru; телефон: +7 (383) 363-77-10; адрес электронной почты: sat@sovteh2012.ru.

3. Назначение: для переноса и забора клинического образца человека (крови, мочи, мазков со слизистой носоглотки и/или ротоглотки, соскобов из урогенитального тракта) и/или взятия, переноса, посева, смешивания изолята чистой культуры в культуральную среду (например, агар или бульон) для последующей диагностической идентификации микроорганизмов и/или тестирования *in vitro*.

4. Функциональное назначение: вспомогательное медицинское изделие для диагностики *in vitro*.

5. Область применения: клиническая лабораторная диагностика, медицинская микробиология, бактериология

6. Предназначенные потребители медицинского изделия: сотрудники клинической лабораторной диагностики: врачи клинической лабораторной диагностики, медицинские микробиологи, бактериологи, биологи, медицинские лабораторные технологи, медицинские техники, лаборанты.

7. Показания к применению: для переноса и забора клинического образца человека (крови, мочи, мазков со слизистой носоглотки и/или ротоглотки, соскобов из урогенитального тракта) и/или взятия, переноса, посева, смешивания изолята чистой культуры в культуральную среду (например, агар или бульон) для последующей диагностической идентификации микроорганизмов и/или тестирования *in vitro*.

8. Противопоказания: при использовании специально обученным персоналом и с учетом применения по назначению противопоказания не выявлены.

9. Возможные побочные действия: не выявлены.

10. Описание и принцип действия медицинского изделия: петля представляет собой стерильное изделие, имеющее форму палочки, у которой:

- с одной стороны петля Ø 1 мм или Ø 5 мм, а с другой стороны круглое основание или игла для засева косога агара проколом;

- или с одной стороны петля Ø 1 мм, а с другой - Ø 5 мм.

При помощи петли можно производить посев исследуемого материала на скошенную, жидкую, плотную питательные среды, а также методом прокола.

Изделие только для однократного применения.

11. Класс потенциального риска применения медицинского изделия – 1 в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации.

12. Вид контакта: не контактирует с пациентом. Контакт с персоналом через средства индивидуальной защиты – перчатки.

13. Техническое обслуживание и ремонт: медицинское изделие для однократного применения и не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

14. Технические характеристики

Петля должна быть стерильной. Метод стерилизации радиационный.

Петля должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 – при транспортировании и хранении температура воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С. Относительная влажность воздуха до 80 %.

Петля должна быть устойчива к механическим воздействиям при транспортировании. Выдерживать при вибрационных нагрузках диапазон частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,15 мм.

Петля должна быть пригодна для применения в климатических условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

На поверхности петли допускаются неглубокие царапины, малозаметные риски, следы от выхода воздуха от формирующего инструмента. Не допускаются дефекты по ГОСТ 24105: заусенцы, вздутия, недопрессовка, раковины, трещины, сколы, следы течи, наплывы, искаженная геометрия или волнистость, отверстия, острые края, изломы, вмятины, царапины. Кромки должны быть ровными, без технологических дефектов и механических повреждений. Облой должен быть удален.

На поверхности петли не допускаются загрязнения, не смываемые водой.

Петля изготавливается из полимера бесцветной или в цвете в соответствии с указанным в наименовании варианта исполнения (см. Приложение 1).

Петля должна быть упакована в потребительскую упаковку в количестве 1/5/10/20 шт. в зависимости от варианта исполнения (см. Приложение 1).

Срок годности должен быть 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

15. Комплектность

Комплектность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 и условиями заказа.

Варианты комплекта поставки соответствуют приведенным в **Приложении 1**. Вариант комплекта поставки устанавливается по согласованию с заказчиком.

16. Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям ТУ 32.50.50-010-72241324-2023, ГОСТ Р ИСО 18113-1 и ГОСТ Р ИСО 18113-3, а применяемые символы – ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Маркировка наносится на этикетку или непосредственно на упаковку типографским способом, возможен комбинированный вариант.

Маркировка потребительской упаковки должна содержать:

	Графическое изображение символа
- наименование медицинского изделия	-
- наименование варианта исполнения	-
- номер и дата регистрационного удостоверения	-
- сведения об изготовителе: наименование юридического лица и адрес, с символом «Изготовитель»	
- количество петель	-
- дата изготовления в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год, с символом «Дата изготовления»	
- срок годности в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год	-
- код партии в формате ХХММГГ, где ХХ – внутренний порядковый номер партии, ММ – месяц, ГГ – последние цифры года производства, с символом «Код партии»	

- номер по каталогу, с символом «Номер по каталогу»	
- условия хранения	-
- символ «Радиационная стерилизация»	
- символ «Запрет на повторное применение»	
- символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»	
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»	
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»	
- логотип / товарный знак изготовителя (при наличии)	-

Маркировка транспортной упаковки должна содержать:

	Графическое изображение символа
- наименование медицинского изделия	-
- наименование варианта исполнения	-
- номер и дата регистрационного удостоверения	-
- сведения об изготовителе: наименование юридического лица и адрес, с символом «Изготовитель»	
- количество упаковок с петлями	-
- дата изготовления в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год, с символом «Дата изготовления»	
- срок годности в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год	-
- условия хранения и транспортирования	-
- код партии в формате ХХММГГ, где ХХ – внутренний порядковый номер партии, ММ – месяц, ГГ – последние цифры года производства, с символом «Код партии»	
- номер по каталогу, с символом «Номер по каталогу»	
- масса брутто	-
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»	
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»	
- символ «Не допускать воздействия влаги»	
- символ «Хрупкое, обращаться осторожно»	
- символ «Вверх»	
- логотип / товарный знак изготовителя (при наличии)	-

Примечание: Данные массы брутто допускается выполнять от руки или с помощью клише.

17. Упаковка

Упаковка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 и ГОСТ ISO 11607-1.

Упаковка должна защищать изделие от загрязнений, внешних механических и климатических воздействий при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении на протяжении всего срока годности. Изделие, перед тем как быть сгруппированным и упакованным в транспортную (групповую) упаковку, упаковывается в количестве 1/5/10/20 шт. в потребительскую упаковку, имеющую размеры согласно таблице 2 ТУ 32.50.50-010-72241324-2023. Потребительская упаковка должна быть запаяна со всех сторон. Количество изделий в потребительской и транспортной упаковках варьирует в зависимости от варианта исполнения и должно соответствовать указанному в Приложении 1.

Потребительская упаковка может быть двух видов: 1 – из пленки, 2 – комбинированная из пленки и бумаги. Потребительская упаковка должна быть запаяна таким образом, чтобы она не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.

Транспортная (групповая) упаковка представляет собой коробку из микрофроектона Т-24 Е ГОСТ 7376 / ГОСТ Р 52901 и (или) ящик из гофрированного картона производства ЗАО «Болотнинская гофротара» / ООО «ПромупакНовосибирск», Россия.

Транспортная (групповая) упаковка должна быть оклеена лентой по ГОСТ 20477 / ГОСТ 18251, чтобы она не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.

18. Транспортирование и хранение

Транспортирование должно проводиться всеми видами крытого транспорта с соблюдением температурного диапазона. Размещение коробок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств. Изделия должны отгружаться и перевозиться в оригинальной транспортной упаковке.

Хранение осуществляется в заводской упаковке в крытом вентилируемом сухом темном помещении на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В помещении не должно быть паров летучих веществ.

Транспортирование и хранение осуществляется при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %.

19. Указания по эксплуатации и утилизации

Перед применением медицинского изделия необходимо ознакомиться с **мерами предосторожности**:

- все работы должны производиться в средствах индивидуальной защиты;
- не использовать изделия после истечения срока годности;
- не использовать в случае повреждения упаковки и/или самого изделия;
- не использовать повторно – только для однократного применения;
- не использовать не по назначению. Запрещается использовать для любых других целей, кроме предусмотренных в инструкции по применению;
- не использовать не в заявленном производителем температурном режиме;
- использовать только для *in vitro* диагностики (в лабораторных условиях).

После ознакомления медицинское изделие необходимо освободить от упаковки и применить по назначению. При помощи петли можно производить посев исследуемого материала на скошенную, жидкую, плотную питательные среды, а также методом прокола.

Посев на скошенную и жидкую среды. Пробирку с жидкой чистой культурой бактерий и стерильной средой берут в левую руку и держат пальцами в наклонном положении так, чтобы их содержимое не проливалось. В правую руку, как писчее перо, берут петлю. Пробки из пробирок вынимают одновременно, зажимают их между мизинцем и ладонью правой руки и тотчас же обжигают края открытых пробирок. Петлю вводят в пробирку, прикасаются к культуре бактерий, быстро переносят ее в пробирку с незасеянной средой, ополаскивая петлю в бульоне, или же зигзагообразными движениями распределяют по поверхности скошенного агара. Петлю извлекают; обжигают края пробирок и закрывают проведенными через пламя горелки пробками, петлю выбрасывают в емкость для утилизации, пробирки ставят в штатив.

Посев на скошенный агар методом прокола. Столбики полутвердых сред насквозь прокалываются «штыком» или петлей, держа пробирку дном вверх. Посев применяют для выращивания бактерий-анаэробов, хранения культур, выявления протеолитических свойств.

Посев на плотную питательную среду. Исследуемый материал набирают петлей. Чашку Петри с агаризованной средой помещают на стол вверх дном. Донную часть чашки держат левой рукой вертикально, петлю – большим и указательным пальцами правой руки и легкими движениями наносят материал параллельными штрихами по всей поверхности среды.

Петля является одноразовым медицинским изделием и не подвергается повторному использованию, техническому обслуживанию, ремонту и должна утилизироваться надлежащим образом.

Неиспользованное, пришедшее в негодность, с истекшим сроком годности изделие утилизируется в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса А, установленными СанПиН 2.1.3684-21.

Использованное изделие утилизируется в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21.

Уничтожение осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральными законами, с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды, при использовании методов, согласованных с территориальными органами, ответственными за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

20. Гарантии производителя и сведения о рекламациях

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения на весь срок годности, при условии, что упаковка не повреждена.

Производитель гарантирует безопасность медицинского изделия, отсутствие недопустимого риска и причинения вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде при использовании изделия по назначению и при соблюдении мер безопасности, предусмотренных производителем.

Срок годности – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными в ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 / настоящей Инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества медицинского изделия, обращаться к изготовителю ООО «СибАкадемТехнологии» по адресу: 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16, офис 354-1; тел.: +7 (383) 363-77-10; e-mail: sat@sovteh2012.ru; сайт: www.sovteh2012.ru.

21. Перечень стандартов национальных и межгосударственный

ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015 Медицинские изделия для диагностики in vitro информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования

ГОСТ Р ИСО 18113-3-2015 Медицинские изделия для диагностики in vitro информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 3. Инструменты для диагностики in vitro для профессионального применения

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования

ГОСТ ISO 11607-1-2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам

Приложение 1

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Вариант исполнения 1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-1/S-W, в составе:

- 1.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-1/S-W – 1000 упаковок по 1 петле;
- 1.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 2. Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-5/S-W, в составе:

- 2.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-5/S-W – 200 упаковок по 5 петель;
- 2.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 3. Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-10/S-W, в составе:

- 3.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-10/S-W – 100 упаковок по 10 петель;
- 3.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 4. Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-20/S-W, в составе:

- 4.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-20/S-W – 100 упаковок по 20 петель;
- 4.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 5. Петля микробиологическая Ø 1 мм, синяя, артикул: LM-1-1/S-B, в составе:

- 5.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, синяя, артикул: LM-1-1/S-B – 1000 упаковок по 1 петле;
- 5.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 6. Петля микробиологическая Ø 1 мм, синяя, артикул: LM-1-5/S-B, в составе:

- 6.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, синяя, артикул: LM-1-5/S-B – 200 упаковок по 5 петель;
- 6.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 7. Петля микробиологическая Ø 1 мм, синяя, артикул: LM-1-10/S-B, в составе:

- 7.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, синяя, артикул: LM-1-10/S-B – 100 упаковок по 10 петель;
- 7.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 8. Петля микробиологическая Ø 1 мм, синяя, артикул: LM-1-20/S-B, в составе:

- 8.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, синяя, артикул: LM-1-20/S-B – 100 упаковок по 20 петель;
- 8.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 9. Петля микробиологическая Ø 1 мм, желтая, артикул: LM-1-1/S-Y, в составе:

- 9.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, желтая, артикул: LM-1-1/S-Y – 1000 упаковок по 1 петле;
- 9.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 10. Петля микробиологическая Ø 1 мм, желтая, артикул: LM-1-5/S-Y, в составе:

- 10.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, желтая, артикул: LM-1-5/S-Y – 200 упаковок по 5 петель;
- 10.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 11. Петля микробиологическая Ø 1 мм, желтая, артикул: LM-1-10/S-Y, в составе:

- 11.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, желтая, артикул: LM-1-10/S-Y – 100 упаковок по 10 петель;
- 11.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 12. Петля микробиологическая Ø 1 мм, желтая, артикул: LM-1-20/S-Y, в составе:

- 12.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, желтая, артикул: LM-1-20/S-Y – 100 упаковок по 20 петель;
- 12.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 13. Петля микробиологическая Ø 1 мм, красная, артикул: LM-1-1/S-R, в составе:

- 13.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, красная, артикул: LM-1-1/S-R – 100 упаковок по 1 петле;
- 13.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 14. Петля микробиологическая Ø 1 мм, красная, артикул: LM-1-5/S-R, в составе:

- 14.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, красная, артикул: LM-1-5/S-R – 200 упаковок по 5 петель;
- 14.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 15. Петля микробиологическая Ø 1 мм, красная, артикул: LM-1-10/S-R, в составе:

- 15.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, красная, артикул: LM-1-10/S-R – 100 упаковок по 10 петель;

15.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 16. Петля микробиологическая Ø 1 мм, красная, артикул: LM-1-20/S-R, в составе:

16.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, красная, артикул: LM-1-20/S-R – 100 упаковок по 20 петель;

16.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 17. Петля микробиологическая Ø 1 мм, зеленая, артикул: LM-1-1/S-G, в составе:

17.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, зеленая, артикул: LM-1-1/S-G – 1000 упаковок по 1 петле;

17.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 18. Петля микробиологическая Ø 1 мм, зеленая, артикул: LM-1-5/S-G, в составе:

18.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, зеленая, артикул: LM-1-5/S-G – 200 упаковок по 5 петель;

18.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 19. Петля микробиологическая Ø 1 мм, зеленая, артикул: LM-1-10/S-G, в составе:

19.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, зеленая, артикул: LM-1-10/S-G – 100 упаковок по 10 петель;

19.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 20. Петля микробиологическая Ø 1 мм, зеленая, артикул: LM-1-20/S-G, в составе:

20.1. Петля микробиологическая Ø 1 мм, зеленая, артикул: LM-1-20/S-G – 100 упаковок по 20 петель;

20.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 21. Петля микробиологическая Ø 5 мм, белая, артикул: LM-5-1/S-W, в составе:

21.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, белая, артикул: LM-5-1/S-W – 1000 упаковок по 1 петле;

21.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 22. Петля микробиологическая Ø 5 мм, белая, артикул: LM-5-5/S-W, в составе:

22.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, белая, артикул: LM-5-5/S-W – 200 упаковок по 5 петель;

22.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 23. Петля микробиологическая Ø 5 мм, белая, артикул: LM-5-10/S-W, в составе:

23.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, белая, артикул: LM-5-10/S-W – 100 упаковок по 10 петель;

23.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 24. Петля микробиологическая Ø 5 мм, белая, артикул: LM-5-20/S-W, в составе:

24.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, белая, артикул: LM-5-20/S-W – 100 упаковок по 20 петель;

24.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 25. Петля микробиологическая Ø 5 мм, синяя, артикул: LM-5-1/S-B, в составе:

25.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, синяя, артикул: LM-5-1/S-B – 1000 упаковок по 1 петле;

25.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 26. Петля микробиологическая Ø 5 мм, синяя, артикул: LM-5-5/S-B, в составе:

26.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, синяя, артикул: LM-5-5/S-B – 200 упаковок по 5 петель;

26.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 27. Петля микробиологическая Ø 5 мм, синяя, артикул: LM-5-10/S-B, в составе:

27.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, синяя, артикул: LM-5-10/S-B – 100 упаковок по 10 петель;

27.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 28. Петля микробиологическая Ø 5 мм, синяя, артикул: LM-5-20/S-B, в составе:

28.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, синяя, артикул: LM-5-20/S-B – 100 упаковок по 20 петель;

28.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 29. Петля микробиологическая Ø 5 мм, желтая, артикул: LM-5-1/S-Y, в составе:

29.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, желтая, артикул: LM-5-1/S-Y – 1000 упаковок по 1 петле;

29.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 30. Петля микробиологическая Ø 5 мм, желтая, артикул: LM-5-5/S-Y, в составе:

30.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, желтая, артикул: LM-5-5/S-Y – 200 упаковок по 5 петель;

30.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 31. Петля микробиологическая Ø 5 мм, желтая, артикул: LM-5-10/S-Y, в составе:

- 31.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, желтая, артикул: LM-5-10/S-Y – 100 упаковок по 10 петель;
31.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 32. Петля микробиологическая Ø 5 мм, желтая, артикул: LM-5-20/S-Y, в составе:

- 32.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, желтая, артикул: LM-5-20/S-Y – 100 упаковок по 20 петель;
32.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 33. Петля микробиологическая Ø 5 мм, красная, артикул: LM-5-1/S-R, в составе:

- 33.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, красная, артикул: LM-5-1/S-R – 1000 упаковок по 1 петле;
33.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 34. Петля микробиологическая Ø 5 мм, красная, артикул: LM-5-5/S-R, в составе:

- 34.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, красная, артикул: LM-5-5/S-R – 200 упаковок по 5 петель;
34.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 35. Петля микробиологическая Ø 5 мм, красная, артикул: LM-5-10/S-R, в составе:

- 35.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, красная, артикул: LM-5-10/S-R – 100 упаковок по 10 петель;
35.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 36. Петля микробиологическая Ø 5 мм, красная, артикул: LM-5-20/S-R, в составе:

- 36.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, красная, артикул: LM-5-20/S-R – 100 упаковок по 20 петель;
36.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 37. Петля микробиологическая Ø 5 мм, зеленая, артикул: LM-5-1/S-G, в составе:

- 37.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, зеленая, артикул: LM-5-1/S-G – 1000 упаковок по 1 петле;
37.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 38. Петля микробиологическая Ø 5 мм, зеленая, артикул: LM-5-5/S-G, в составе:

- 38.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, зеленая, артикул: LM-5-5/S-G – 200 упаковок по 5 петель;
38.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 39. Петля микробиологическая Ø 5 мм, зеленая, артикул: LM-5-10/S-G, в составе:

- 39.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, зеленая, артикул: LM-5-10/S-G – 100 упаковок по 10 петель;
39.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 40. Петля микробиологическая Ø 5 мм, зеленая, артикул: LM-5-20/S-G, в составе:

- 40.1. Петля микробиологическая Ø 5 мм, зеленая, артикул: LM-5-20/S-G – 100 упаковок по 20 петель;
40.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 41. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-1-1/S, в составе:

- 41.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-1-1/S – 1000 упаковок по 1 петле;
41.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 42. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-1-5/S, в составе:

- 42.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-1-5/S – 200 упаковок по 5 петель;
42.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 43. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-1-10/S, в составе:

- 43.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-1-10/S – 100 упаковок по 10 петель;
43.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 44. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-1-20/S, в составе:

- 44.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-1-20/S – 100 упаковок по 20 петель;
44.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 45. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, белая, артикул: LBS-1-1/S-W, в составе:

- 45.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, белая, артикул: LBS-1-1/S-W – 1000 упаковок по 1 петле;
45.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 46. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, белая, артикул: LBS-1-5/S-W, в составе:

46.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, белая, артикул: LBS-1-5/S-W – 200 упаковок по 5 петель;

46.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 47. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, белая, артикул: LBS-1-10/S-W, в составе:

47.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, белая, артикул: LBS-1-10/S-W – 100 упаковок по 10 петель;

47.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 48. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, белая, артикул: LBS-1-20/S-W, в составе:

48.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, белая, артикул: LBS-1-20/S-W – 100 упаковок по 20 петель;

48.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 49. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-1-1/S-B, в составе:

49.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-1-1/S-B – 1000 упаковок по 1 петле;

49.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 50. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-1-5/S-B, в составе:

50.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-1-5/S-B – 200 упаковок по 5 петель;

50.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 51. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-1-10/S-B, в составе:

51.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-1-10/S-B – 100 упаковок по 10 петель;

51.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 52. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-1-20/S-B, в составе:

52.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-1-20/S-B – 100 упаковок по 20 петель;

52.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 53. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-1-1/S-Y, в составе:

53.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-1-1/S-Y – 1000 упаковок по 1 петле;

53.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 54. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-1-5/S-Y, в составе:

54.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-1-5/S-Y – 200 упаковок по 5 петель;

54.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 55. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-1-10/S-Y, в составе:

55.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-1-10/S-Y – 100 упаковок по 10 петель;

55.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 56. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-1-20/S-Y, в составе:

56.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-1-20/S-Y – 100 упаковок по 20 петель;

56.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 57. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, красная, артикул: LBS-1-1/S-R, в составе:

57.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, красная, артикул: LBS-1-1/S-R – 1000 упаковок по 1 петле;

57.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 58. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, красная, артикул: LBS-1-5/S-R, в составе:

58.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, красная, артикул: LBS-1-5/S-R – 200 упаковок по 5 петель;
58.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 59. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, красная, артикул: LBS-1-10/S-R, в составе:

59.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, красная, артикул: LBS-1-10/S-R – 100 упаковок по 10 петель;
59.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 60. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, красная, артикул: LBS-1-20/S-R, в составе:

60.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, красная, артикул: LBS-1-20/S-R – 100 упаковок по 20 петель;
60.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 61. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-1-1/S-G, в составе:

61.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-1-1/S-G – 1000 упаковок по 1 петле;
61.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 62. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-1-5/S-G, в составе:

62.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-1-5/S-G – 200 упаковок по 1 петле;
62.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 63. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-1-10/S-G, в составе:

63.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-1-10/S-G – 100 упаковок по 10 петель;
63.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 64. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-1-20/S-G, в составе:

64.1. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-1-20/S-G – 100 упаковок по 20 петель;
64.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 65. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-5-1/S, в составе:

65.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-5-1/S – 1000 упаковок по 1 петле;
65.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 66. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-5-5/S, в составе:

66.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-5-5/S – 200 упаковок по 5 петель;
66.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 67. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-5-10/S, в составе:

67.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-5-10/S – 100 упаковок по 10 петель;
67.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 68. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-5-20/S, в составе:

68.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, бесцветная, артикул: LBS-5-20/S – 100 упаковок по 20 петель;
68.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 69. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, белая, артикул: LBS-5-1/S-W, в составе:

69.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, белая, артикул: LBS-5-1/S-W – 1000 упаковок по 1 петле;
69.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 70. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, белая, артикул: LBS-5-5/S-W, в составе:

70.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, белая, артикул: LBS-5-5/S-W – 200 упаковок по 5 петель;
70.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 71. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, белая, артикул: LBS-5-10/S-W, в составе:

- 71.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, белая, артикул: LBS-5-10/S-W – 100 упаковок по 10 петель;
- 71.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 72. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, белая, артикул: LBS-5-20/S-W, в составе:

- 72.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, белая, артикул: LBS-5-20/S-W – 100 упаковок по 20 петель;
- 72.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 73. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-5-1/S-B, в составе:

- 73.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-5-1/S-B – 1000 упаковок по 1 петле;
- 73.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 74. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-5-5/S-B, в составе:

- 74.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-5-5/S-B – 200 упаковок по 5 петель;
- 74.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 75. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-5-10/S-B, в составе:

- 75.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-5-10/S-B – 100 упаковок по 10 петель;
- 75.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 76. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-5-20/S-B, в составе:

- 76.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, голубая, артикул: LBS-5-20/S-B – 100 упаковок по 20 петель;
- 76.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 77. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-5-1/S-Y, в составе:

- 77.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-5-1/S-Y – 1000 упаковок по 1 петле;
- 77.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 78. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-5-5/S-Y, в составе:

- 78.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-5-5/S-Y – 200 упаковок по 5 петель;
- 78.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 79. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-5-10/S-Y, в составе:

- 79.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-5-10/S-Y – 100 упаковок по 10 петель;
- 79.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 80. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-5-20/S-Y, в составе:

- 80.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, желтая, артикул: LBS-5-20/S-Y – 100 упаковок по 20 петель;
- 80.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 81. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, красная, артикул: LBS-5-1/S-R, в составе:

- 81.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, красная, артикул: LBS-5-1/S-R – 1000 упаковок по 1 петле;
- 81.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 82. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, красная, артикул: LBS-5-5/S-R, в составе:

- 82.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, красная, артикул: LBS-5-5/S-R – 200 упаковок по 5 петель;
- 82.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 83. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, красная, артикул: LBS-5-10/S-R, в составе:

- 83.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, красная, артикул: LBS-5-10/S-R – 100 упаковок по 10 петель;

83.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 84. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, красная, артикул: LBS-5-20/S-R, в составе:

84.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, красная, артикул: LBS-5-20/S-R – 100 упаковок по 20 петель;

84.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 85. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-5-1/S-G, в составе:

85.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-5-1/S-G – 1000 упаковок по 1 петле;

85.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 86. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-5-5/S-G, в составе:

86.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-5-5/S-G – 200 упаковок по 5 петель;

86.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 87. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-5-10/S-G, в составе:

87.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-5-10/S-G – 100 упаковок по 10 петель;

87.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 88. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-5-20/S-G, в составе:

88.1. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой, зеленая, артикул: LBS-5-20/S-G – 100 упаковок по 20 петель;

88.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 89. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, бесцветная, артикул: LBS-1/5-1/S, в составе:

89.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, бесцветная, артикул: LBS-1/5-1/S – 1000 упаковок по 1 петле;

89.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 90. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, бесцветная, артикул: LBS-1/5-5/S, в составе:

90.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, бесцветная, артикул: LBS-1/5-5/S – 200 упаковок по 5 петель;

90.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 91. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, бесцветная, артикул: LBS-1/5-10/S, в составе:

91.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, бесцветная, артикул: LBS-1/5-10/S – 100 упаковок по 10 петель;

91.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 92. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, бесцветная, артикул: LBS-1/5-20/S, в составе:

92.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, бесцветная, артикул: LBS-1/5-20/S – 100 упаковок по 20 петель;

92.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 93. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, белая, артикул: LBS-1/5-1/S-W, в составе:

93.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, белая, артикул: LBS-1/5-1/S-W – 1000 упаковок по 1 петле;

93.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 94. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, белая, артикул: LBS-1/5-5/S-W, в составе:

94.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, белая, артикул: LBS-1/5-5/S-W – 200 упаковок по 5 петель;

94.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 95. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, белая, артикул: LBS-1/5-10/S-W, в составе:

95.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, белая, артикул: LBS-1/5-10/S-W – 100 упаковок по 10 петель;

95.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 96. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, белая, артикул: LBS-1/5-20/S-W, в составе:

96.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, белая, артикул: LBS-1/5-20/S-W – 100 упаковок по 20 петель;

96.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 97. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, голубая, артикул: LBS-1/5-1/S-B, в составе:
97.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, голубая, артикул: LBS-1/5-1/S-B – 1000 упаковок по 1 петле;
97.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 98. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, голубая, артикул: LBS-1/5-5/S-B, в составе:
98.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, голубая, артикул: LBS-1/5-5/S-B – 200 упаковок по 5 петель;
98.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 99. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, голубая, артикул: LBS-1/5-10/S-B, в составе:
99.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, голубая, артикул: LBS-1/5-10/S-B – 100 упаковок по 10 петель;
99.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 100. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, голубая, артикул: LBS-1/5-20/S-B, в составе:
100.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, голубая, артикул: LBS-1/5-20/S-B – 100 упаковок по 20 петель;
100.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 101. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, желтая, артикул: LBS-1/5-1/S-Y, в составе:
101.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, желтая, артикул: LBS-1/5-1/S-Y – 1000 упаковок по 1 петле;
101.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 102. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, желтая, артикул: LBS-1/5-5/S-Y, в составе:
102.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, желтая, артикул: LBS-1/5-5/S-Y – 200 упаковок по 5 петель;
102.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 103. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, желтая, артикул: LBS-1/5-10/S-Y, в составе:
103.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, желтая, артикул: LBS-1/5-10/S-Y – 100 упаковок по 10 петель;
103.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 104. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, желтая, артикул: LBS-1/5-20/S-Y, в составе:
104.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, желтая, артикул: LBS-1/5-20/S-Y – 100 упаковок по 20 петель;
104.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 105. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, красная, артикул: LBS-1/5-1/S-R, в составе:
105.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, красная, артикул: LBS-1/5-1/S-R – 100 упаковок по 1 петле;
105.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 106. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, красная, артикул: LBS-1/5-5/S-R, в составе:
106.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, красная, артикул: LBS-1/5-5/S-R – 200 упаковок по 5 петель;
106.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 107. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, красная, артикул: LBS-1/5-10/S-R, в составе:
107.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, красная, артикул: LBS-1/5-10/S-R – 100 упаковок по 10 петель;
107.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 108. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, красная, артикул: LBS-1/5-20/S-R, в составе:
108.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, красная, артикул: LBS-1/5-20/S-R – 100 упаковок по 20 петель;
108.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 109. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, зеленая, артикул: LBS-1/5-1/S-G, в составе:
109.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, зеленая, артикул: LBS-1/5-1/S-G – 1000 упаковок по 1 петле;
109.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 110. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, зеленая, артикул: LBS-1/5-5/S-G, в составе:

110.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, зеленая, артикул: LBS-1/5-5/S-G – 200 упаковок по 5 петель;
110.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 111. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, зеленая, артикул: LBS-1/5-10/S-G, в составе:

111.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, зеленая, артикул: LBS-1/5-10/S-G – 100 упаковок по 10 петель;
111.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 112. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, зеленая, артикул: LBS-1/5-20/S-G, в составе:

112.1. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм, зеленая, артикул: LBS-1/5-20/S-G – 100 упаковок по 20 петель;
112.2. Инструкция по применению – 1 шт.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 14 (*четырнадцать*) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»

П.А. Самойлов