



СТОЙКА ПЕРЕДВИЖНАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ СП - "ФОТЕК"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ШГИД.71.100.000РЭ

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	По.
424-15	20.10.16			

ШГИД.71.100.000РЭ

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	По.
424-15	20.10.16			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Койнов	24-17	20.02.17	
Пров.	Заболовский	3-	10.02.17	
Нач. отд.				
Н.контр.				
Утв.	Малеев		20.02.17	

Стойка передвижная
с принадлежностями СП-«ФОТЕК»
Руководство по эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
	1	23

Копировал

Формат А4

Настоящее руководство по эксплуатации распространяются на Стойку передвижную с принадлежностями СП-«ФОТЕК», ТУ 9452-001-41747567-2015 (далее по тексту – стойка).

Исполнения:

- Стойка передвижная с принадлежностями с одной колонной СП1-01-«ФОТЕК»;
- Стойка передвижная с принадлежностями с одной колонной СП1-02-«ФОТЕК»;
- Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-01-«ФОТЕК»;
- Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-02-«ФОТЕК»;
- Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-03-«ФОТЕК»;
- Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-04-«ФОТЕК»;
- Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-05-«ФОТЕК»;
- Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-06-«ФОТЕК»;
- Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-07-«ФОТЕК».

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для медицинского персонала, осуществляющего эксплуатацию медицинского оборудования.

Медицинский персонал перед началом работы должен ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации содержит описание изделия, указания по безопасности, методы дезинфекции.

Условия эксплуатации и хранения, сведения о материалах, гарантии изготовителя, указания по проведению ремонта и утилизации приводятся в паспорте.

Предприятие-изготовитель: ООО «ФОТЕК», Россия

Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 145а, литер А

Почтовый адрес: 620049 г. Екатеринбург, а/я 84, ООО «ФОТЕК»

Тел./факс. (343) 217-63-40 (многоканальный)

Электронный адрес fotek@fotek.ru

Сайт www.fotek.ru

Регистрационное удостоверение и декларацию о соответствии смотрите на сайте.

Имя, № подл. Подп. и дата
24-15 24-15 24-15 24-15 24-15
Имя, инд. № Подп. и дата
24-15 24-15 24-15 24-15 24-15
Имя, инд. № Подп. и дата
24-15 24-15 24-15 24-15 24-15

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

2

1 Назначение, состав и основные технические характеристики

Стойка предназначена для монтажа и упорядочивания медицинских устройств в медицинских учреждениях,

в том числе для размещения аппаратов и приборов или аппаратных и приборных комплексов для выполнения диагностических исследований и лечебных процедур, например:

- эндовидеохирургических комплексов для жёсткой эндоскопии;
- эндовидеохирургических комплексов для гибкой эндоскопии;
- аппаратов электрохирургических;
- аппаратов для аспирации и ирригации жидкости;
- аппаратов для аспирации дыма;
- аппаратов ультразвуковых кавитационных;
- аппаратов лазерных хирургических.

В состав стойки входят базовый модуль и принадлежности. Исполнение стойки определяется базовым модулем. Базовые модули отличаются типоразмерами, приведёнными в Таблице 1.1.

Принадлежности могут быть установлены на базовый модуль в соответствии с Таблицей 1.2.

Назначение принадлежностей определено в Таблице 1.3.

Внешний вид базовых модулей и принадлежностей представлен в Приложении А.

Варианты исполнения стойки и комплектация приведены в Приложении Г.

Принадлежности устанавливаются изготовителем. Кронштейн держателя монитора и кольцо держателя для банки устанавливаются заказчиком (Приложения Б и В).

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики базовых модулей

Наименование	Размеры, мм (ширина/глубина/высота)	Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	Масса, кг, не более
Модуль базовый СП1-01-«ФОТЕК»	450×530×800	53	20
Модуль базовый СП1-02-«ФОТЕК»	450×530×1030	67	21
Модуль базовый СП2-01-«ФОТЕК»	470×545×785	80	18
Модуль базовый СП2-02-«ФОТЕК»	700×675×785	101	26
Модуль базовый СП2-03-«ФОТЕК»	470×545×1105	110	22
Модуль базовый СП2-04-«ФОТЕК»	700×675×1105	134	29
Модуль базовый СП2-05-«ФОТЕК»	470×545×1400	130	25
Модуль базовый СП2-06-«ФОТЕК»	700×675×1400	156	31
Модуль базовый СП2-07-«ФОТЕК»	700×675×1700	172	33

Тормоза колес должны включаться при приложении на педаль усилия не более 150 Н (15 кгс)

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

3

Таблица 1.2 – Основные технические характеристики принадлежностей

Принадлежность	Масса, кг, не более	Размеры, мм (ширина/глубина/высота)	Характеристика	Базовые модули, на которые принадлежность может быть установлена
Полка для стойки с одной колонной	4,5	400x400x119	Номинальная нагрузка 10 кг	СП1-01, СП1-02
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 1	3,5	400x400x36	Номинальная нагрузка 10 кг	СП2-01, СП2-03, СП2-05
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2	5,5	630x480x36	Номинальная нагрузка 10 кг	СП2-02, СП2-04, СП2-06, СП2-07
Полка выдвижная для клавиатуры	8	630x480x70	Номинальная нагрузка 3 кг	
Держатель педалей	0,5	160x31x90	Номинальная нагрузка 5 кг	Базовые модули всех исполнений
Держатель эндоскопов	5	1500 (высота)	Номинальная нагрузка 2 кг	СП2-05, СП2-06, СП2-07
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки	1,5	184x67x100	Длина кабеля 5 м, Номинальный ток 16А Номинальное напряжение 250 В С заземлением и двухполюсным выключателем	Базовые модули всех исполнений
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток	3	315x67x100	Длина кабеля 5 м, Номинальный ток 16А Номинальное напряжение 250 В С заземлением и двухполюсным выключателем	СП2-03; СП2-04; СП2-05; СП2-06; СП2-07
Держатель для банки	0,5	161x136x53	Банка для аспирации 2 л	Базовые модули всех исполнений
Держатель периферийных устройств, исполнение 1	0,5	74x101x54	Номинальная нагрузка 0,5 кг	
Держатель периферийных устройств, исполнение 2	0,5	52x71x56	Номинальная нагрузка 0,5 кг	
Держатель периферийных устройств, исполнение 3	0,1	60x46x4	Номинальная нагрузка 0,5 кг	
Корзина	1,5	312x177x150	Номинальная нагрузка 3 кг	
Стойка инфузионная	5	900 - 2100 (высота)	Номинальная нагрузка 2 кг (не более 1 кг на плечо) Усилие выдвижения не более 30 Н (3кгс)	
Ящик, исполнение 1	10	400x400x185	Номинальная нагрузка 5 кг Усилие открытия не более 50 Н (5кгс)	СП2-01, СП2-03, СП2-05
Ящик, исполнение 2	16	630x480x185	Номинальная нагрузка 5 кг Усилие открытия не более 50 Н (5кгс)	СП2-02, СП2-04, СП2-06, СП2-07

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

4

Окончание Таблицы 1.2

Принадлежность	Масса, кг, не более	Размеры, мм (ширина/глубина/высота)	Характеристика	Базовые модули, на которые принадлежность может быть установлена
Держатель баллонов, исполнение 1	4	400x102x267	Установка двух баллонов 5-150У, ГОСТ 949	СП2-03, СП2-05
Держатель баллонов, исполнение 2	5	630x102x267	Установка двух баллонов 5-150У, ГОСТ 949	СП2-04, СП2-06, СП2-07
Держатель монитора, исполнение 1	3	400x150x220	Номинальная нагрузка 10 кг	СП2-03, СП2-05
Держатель монитора, исполнение 2	4	630x150x220	Номинальная нагрузка 10 кг	СП2-04, СП2-06, СП2-07
Шина	1,0	400x10x25	Номинальная нагрузка 3 кг	Базовые модули всех исполнений

Таблица 1.3 – Назначение принадлежностей

Принадлежность	Назначение
Полка для стойки с одной колонной	Установка и монтаж медицинских устройств
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 1	
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2	
Полка выдвижная для клавиатуры	Установка клавиатуры медицинских устройств
Держатель педалей	Размещение педалей в перерывах между применениями
Держатель эндоскопов	Размещение эндоскопов в перерывах между применениями
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки	Подключение медицинских электрических изделий к питающей сети, организация медицинской электрической системы
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток	
Держатель для банки	Установка банки для аспирации 2 л
Держатель периферийных устройств, исполнение 1	Фиксация рукоятки электрохирургического кабеля в перерывах между применениями
Держатель периферийных устройств, исполнение 2	Установка рукоятки ультразвукового инструмента в перерывах между применениями
Держатель периферийных устройств, исполнение 3	Фиксация эластичных шлангов аспирационных и аспиратора дыма внешним диаметром 9 – 12 мм
Корзина	Размещение медицинских принадлежностей и материалов
Стойка инфузионная	Установка ёмкости с раствором (мешок или банка) и инфузионной системы
Ящик, исполнение 1	Размещение медицинских принадлежностей и материалов
Ящик, исполнение 2	
Держатель баллонов, исполнение 1	Размещение двух баллонов 5-150У, ГОСТ 949
Держатель баллонов, исполнение 2	
Держатель монитора, исполнение 1	Установка монитора с присоединительными размерами по стандарту VESA 75x75 мм и 100x100 мм
Держатель монитора, исполнение 2	
Шина	Крепление медицинских принадлежностей

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

5

2 Указания по безопасности

Для исключения риска опрокидывания стойки, падения и повреждения оборудования, размещённого на стойке или расположенного в помещении, а также нанесения вреда персоналу

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать и перемещать стойку на наклонной плоскости;
- толкать стойку;
- перемещать стойку при заблокированных тормозах колёс;
- перемещать стойку, прикладывая усилие к принадлежности или размещённому оборудованию;
- отпускать рукоятки стойки во время её движения;
- устанавливать на модуль базовый и принадлежности оборудование массой, превышающей допустимую номинальную нагрузку;
- преодолевать препятствия (кабели, шланги, дверные пороги и т.п.) при перемещении стойки, если на стойке установлено оборудование;
- перемещать стойку со скоростью более 0,5 м/с;
- опираться, садиться и вставать на стойку;
- дорабатывать стойку и принадлежности;
- использовать держатель с соединителем сетевым многорозеточным без установленной крышки, фиксирующей сетевые вилки.

При перемещении стойки следует соблюдать рекомендации, приведённые в разделе «Подготовка к работе».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать к сетевому многорозеточному соединителю стойки электрическое оборудование, установленное не на стойке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать стойку при подсоединённом к сети кабеле многорозеточного соединителя, и с включёнными медицинскими электрическими изделиями, установленными на стойку.

3 Значение маркировки



Не толкать



Ознакомиться с требованиями по безопасности



Изготовитель



Дата изготовления

SN

Серийный номер

Вним. инст. № 100.100.000РЭ

Подп. и дата 24.11.15

Лист 6

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

6

4 Подготовка и работа

Стойка поставляется в собранном виде с установленными и собранными принадлежностями, кроме кольца держателя для банки и кронштейна держателя монитора.

Кольцо держателя для банки устанавливается в кронштейн (Приложение Б).

При поставке держателя монитора (исполнение 1 или 2) изготовитель устанавливает вместо верхней полки модуля базового с двумя колоннами основание держателя монитора, полка при этом устанавливается изготовителем в положение, определяемое заказчиком.

Порядок сборки держателя монитора и установки монитора в держатель приведен в Приложении В

Стойка поставляется недезинфицированной и перед использованием должна подвергаться дезинфекции.

Размещать оборудование следует с учетом номинальных нагрузок модуля базового и принадлежностей, приведённых в Таблице 1.2.

Для подключения вилок электрических медицинских изделий к розеткам соединителя сетевого многорозеточного:

- снять крышку держателя с помощью ключа торцового на 4;
- подключить сетевые вилки установленных на стойке медицинских электрических изделий к многорозеточному соединителю;
- установить крышку держателя на прежнее место с помощью ключа торцового на 4.

Перемещать стойку следует только за рукоятки при разблокированных тормозах колёс. При перемещениях следует опустить держатель эндоскопов и стойку инфузионную в нижнее положение и снять мешки (банки) с растворами с инфузионной стойки. Трассу движения следует расчистить от препятствий, в том числе от кабелей и шлангов. Если препятствие устранить невозможно, со стойки необходимо снять оборудование до начала движения.

Перемещать стойку допускается только при выключенном электрическом оборудовании, установленном на стойку, и отсоединённом от сети кабеле многорозеточного сетевого соединителя.

После установки стойки в рабочее положение следует заблокировать тормозами оба колеса, для предотвращения нежелательных и случайных перемещений.

Включать электрическое оборудование, установленное на стойку, допускается только после блокировки колёс тормозами.

5 Дезинфекция

Стойка подвергаются химической дезинфекции по МУ287-113 методом двукратного протирания отжатой салфеткой, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

Рекомендованные средства химической дезинфекции:

- «Лизоформин 3000» («Лизоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ», Германия);
- «Экодез» (ОАО НПО «Новодез», Россия);
- «Ника-амицид» (ООО НПФ «Геникс», Россия);
- «ГЕКСАНИОС Г+Р» («Лаборатория АНИОС», Франция).

Дезинфицирующие растворы следует готовить в соответствии с инструкцией к применяемому средству.

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

7

6 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание проводится внешним осмотром стойки и заключается в определении:

- отсутствия деформаций и/или разрушения стойки и принадлежностей;
- свободного вращения колес и срабатывания тормозов при нажатии;
- отсутствия нарушения покрытий и отсутствия коррозии.

Периодичность технического обслуживания не реже 1 раза в год и при монтаже/демонтаже медицинского оборудования.

2017-15 84 30.10.16

Приложение А
(Справочное)
Внешний вид модулей базовых и принадлежностей

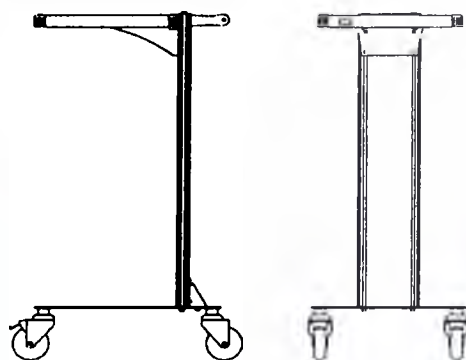


Рисунок А.1 - Модуль базовый СП1-01, СП1-02

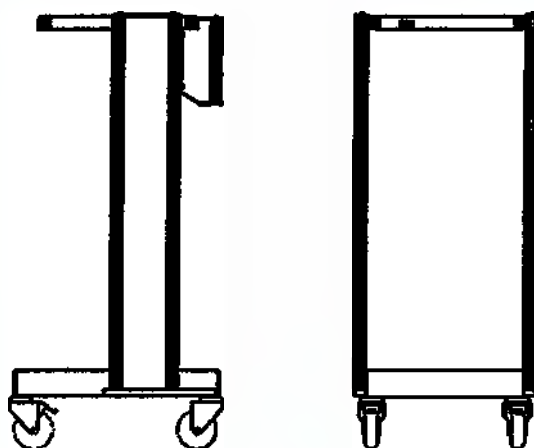


Рисунок А.2 - Модуль базовый СП2-01, СП2-02, СП2-03, СП2-04, СП2-05, СП2-06, СП2-07



Рисунок А.3 - Полка для стойки с одной колонной

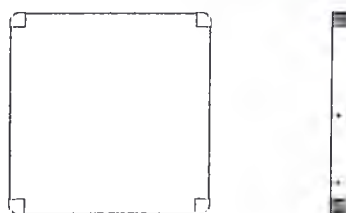


Рисунок А.4 - Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 1 и 2

1	Зач 24-07	Д. 2022
---	-----------	---------

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

9

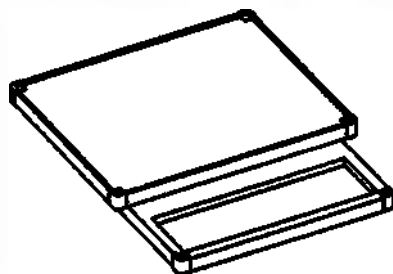


Рисунок А.5 - Полка выдвижная для клавиатуры

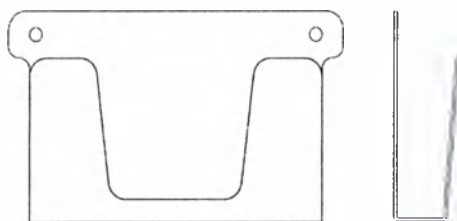


Рисунок А.6 - Держатель педалей



Рисунок А.7 - Держатель эндоскопов

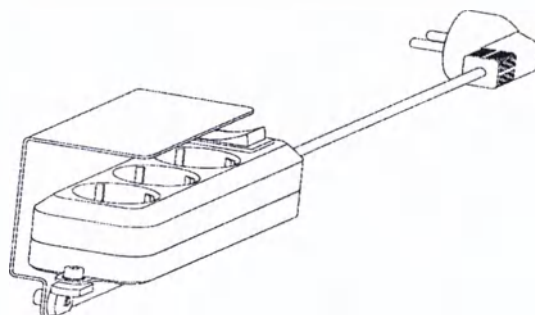


Рисунок А.8 - Держатель с соединителем сетевым многорозеточным

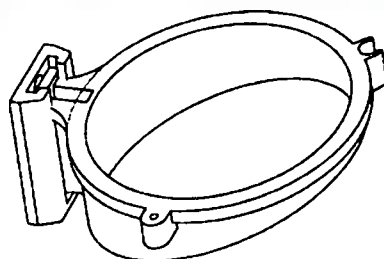


Рисунок А.9 – Держатель для банки

4.17-15 89 30.10.16

2 Зап. 24-17 89 30.10.16

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

10

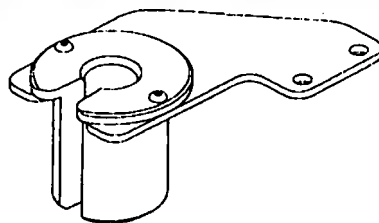


Рисунок А.10 - Держатель периферийных устройств, исполнение 1

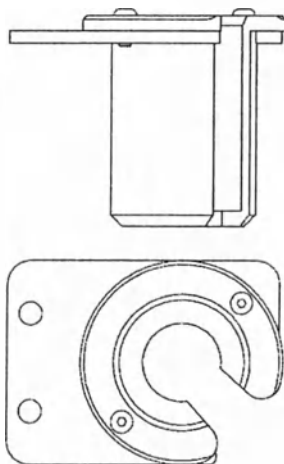


Рисунок А.11 - Держатель периферийных устройств, исполнение 2

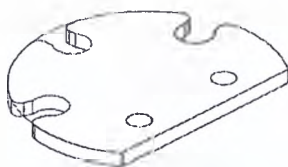


Рисунок А.12 - Держатель периферийных устройств, исполнение 3

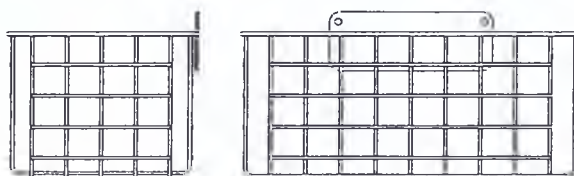


Рисунок А.13 - Корзина

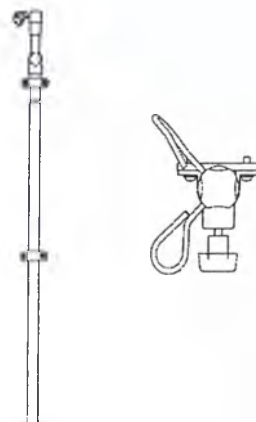


Рисунок А.14 - Стойка инфузионная

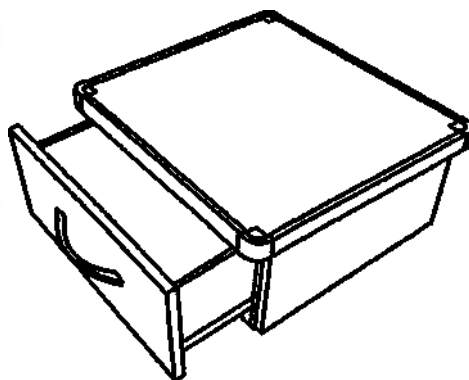


Рисунок А.15 – Ящик, исполнение 1 и 2

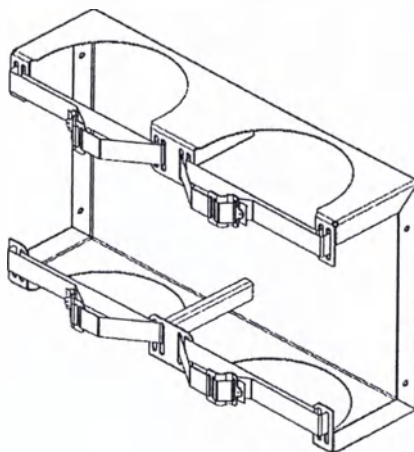


Рисунок А.16 - Держатель баллонов, исполнение 1 и 2

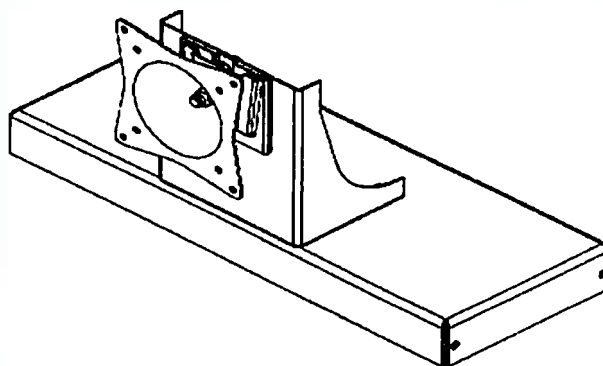


Рисунок А.17 - Держатель монитора, исполнение 1 и 2

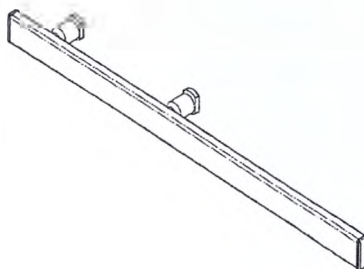


Рисунок А.18 - Шина

10.17-15 87 30.10.16

2 30.10.16 87 10.17

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

12

Приложение Б
(Рекомендуемое)
Установка кольца держателя для банки и банки

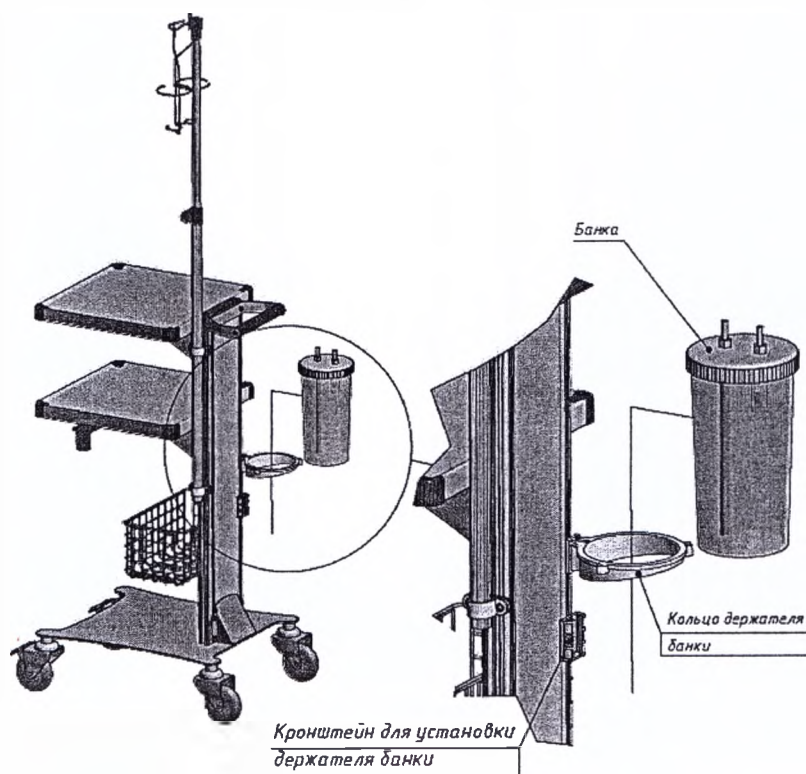


Рисунок Б.1 - Установка кольца держателя для банки в кронштейн

24-15 20 30 10 16

2 3см 24-17 20 30 10 16

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

13

Приложение В
(Рекомендуемое)
Сборка держателя монитора и установка монитора

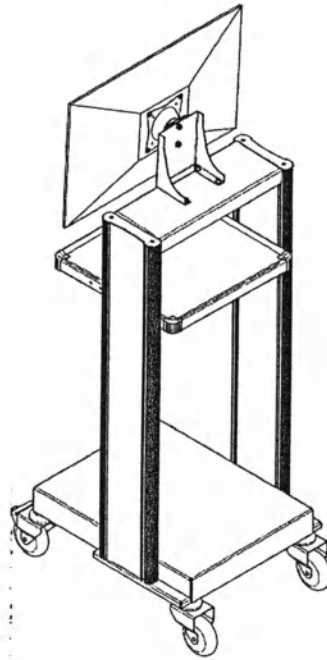


Рисунок В.1 – Общий вид стойки с установленным держателем монитора и монитором

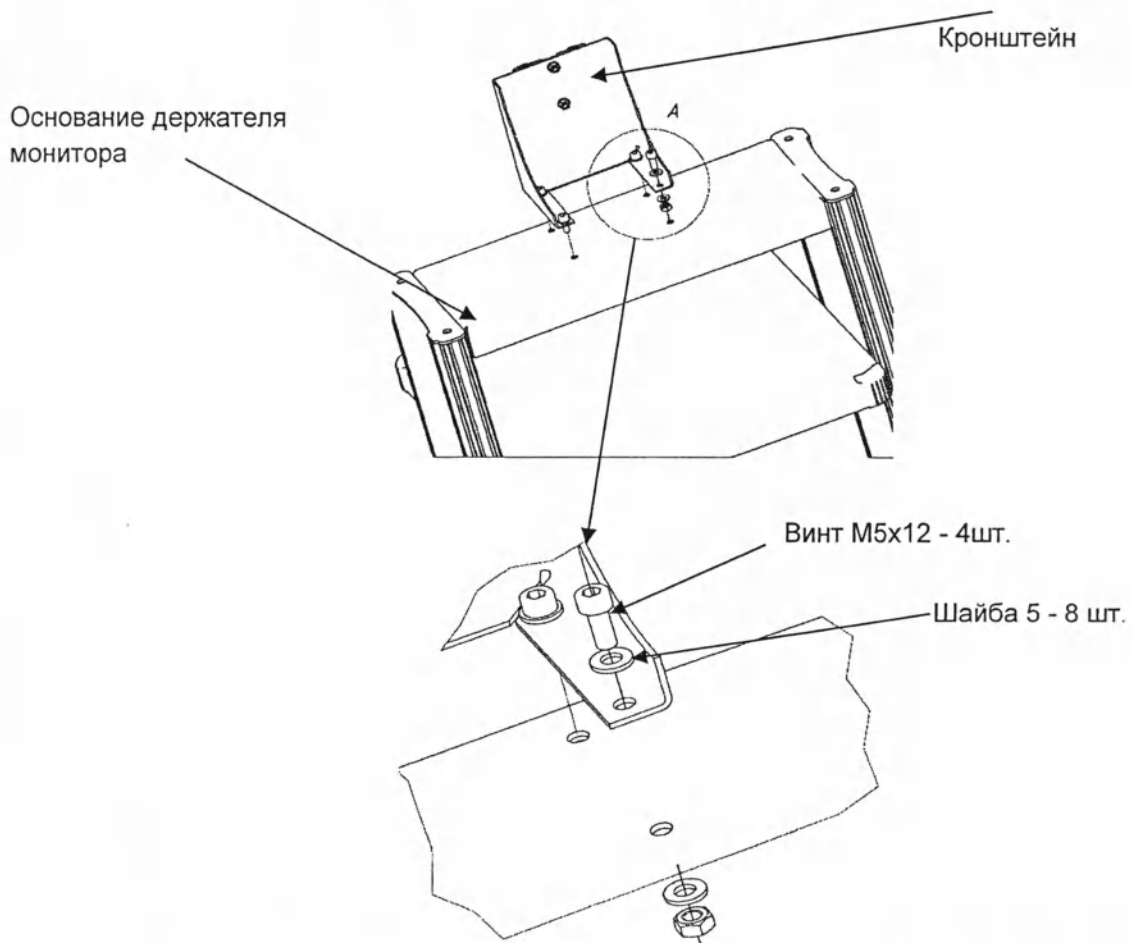


Рисунок В.2 - Установка кронштейна на основание держателя монитора

24-15 20.10.16

2	Зам	24-17	В	10.02.17
---	-----	-------	---	----------

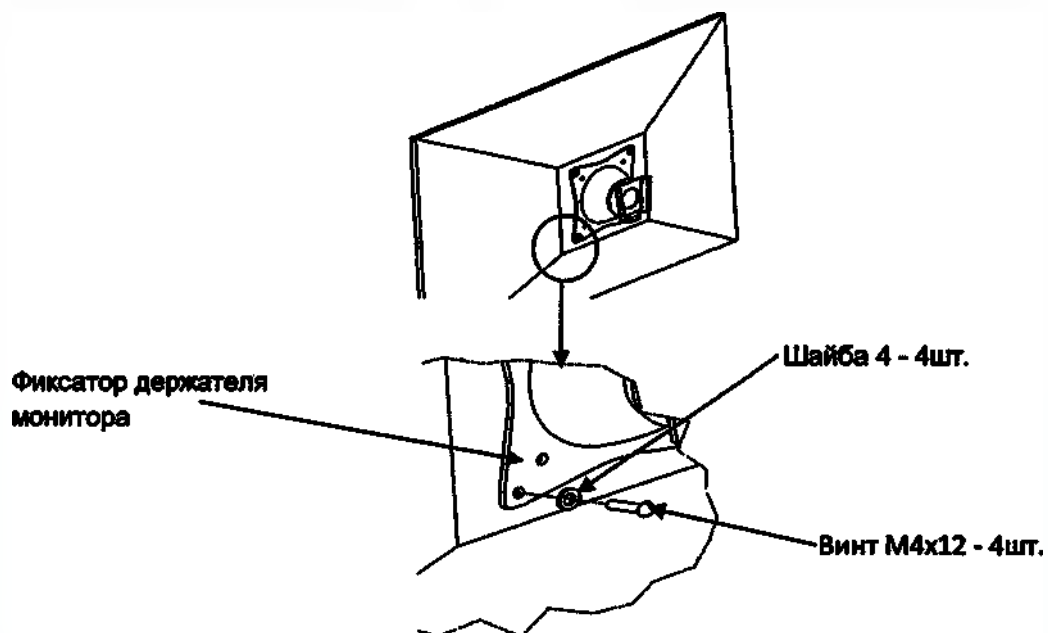


Рисунок В.3 – Установка фиксатора держателя монитора на монитор

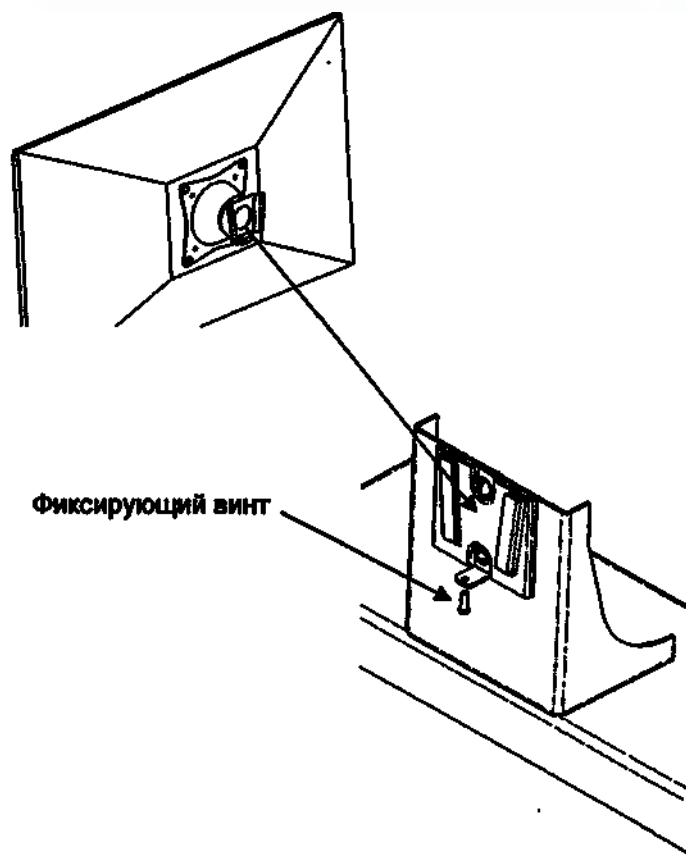


Рисунок В.4 – Установка монитора

Приложение Г
(Справочное)
Варианты исполнения
Стойки передвижной с принадлежностями СП-«ФОТЕК»
и комплектация

Таблица Г1

Стойка передвижная с принадлежностями СП-«ФОТЕК» в исполнении:	Артикул	Кол.
1	2	3
1. Стойка передвижная с принадлежностями с одной колонной СП1-01-«ФОТЕК» в составе:		1
Модуль базовый СП1-01-«ФОТЕК»		1
Принадлежности:		
Полка для стойки с одной колонной		1
Держатель педалей		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки		1
Держатель для банки		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 1		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 2		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 3		1
Корзина		1
Стойка инфузионная		1
Шина		1
Паспорт		1
Руководство по эксплуатации		1
2. Стойка передвижная с принадлежностями с одной колонной СП1-02-«ФОТЕК» в составе:		1
Модуль базовый СП1-02-«ФОТЕК»		1
Принадлежности:		
Полка для стойки с одной колонной		2
Держатель педалей		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки		1
Держатель для банки		1

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

16

Продолжение Таблицы Г.1

1	2	3
Держатель периферийных устройств, исполнение 1		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 2		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 3		1
Корзина		1
Стойка инфузионная		1
Шина		1
Паспорт		1
Руководство по эксплуатации		1
3.Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-01-«ФОТЕК» в составе:		1
Модуль базовый СП2-01-«ФОТЕК»		1
Принадлежности:		
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 1		2
Держатель педалей		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки		1
Держатель для банки		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 1		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 2		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 3		1
Корзина		1
Стойка инфузионная		1
Ящик, исполнение 1		1
Шина		1
Паспорт		1
Руководство по эксплуатации		1

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

17

Продолжение Таблицы Г.1

1	2	3
4.Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-02-«ФОТЕК» в составе:		1
Модуль базовый СП2-02-«ФОТЕК»		1
Принадлежности:		
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2		2
Полка выдвижная для клавиатуры		1
Держатель педалей		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки		1
Держатель для банки		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 1		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 2		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 3		1
Корзина		1
Стойка инфузионная		1
Ящик, исполнение 2		1
Шина		1
Паспорт		1
Руководство по эксплуатации		1
5.Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-03-«ФОТЕК» в составе:		1
Модуль базовый СП2-03-«ФОТЕК»		1
Принадлежности:		
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 1		3
Держатель педалей		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток		1
Держатель для банки		1

2	Нов	24-14	82	00.01.14
И.О.В.	В.О.В.	М.В.О.В.	П.В.О.В.	Л.В.О.В.

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

18

1	2	3
Держатель периферийных устройств, исполнение 1		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 2		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 3		1
Корзина		1
Стойка инфузионная		1
Ящик, исполнение 1 или Держатель баллонов, исполнение 1		1
Держатель монитора, исполнение 1		1
Шина		1
Паспорт		1
Руководство по эксплуатации		1
6.Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-04-«ФОТЕК» в составе:		1
Модуль базовый СП2-04-«ФОТЕК»		1
Принадлежности:		
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2		3
Полка выдвижная для клавиатуры		1
Держатель педалей		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток		1
Держатель для банки		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 1		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 2		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 3		1
Корзина		1
Стойка инфузионная		1

127-15 82 30.10.16

Продолжение Таблицы Г.1

1	2	3
Ящик, исполнение 2		1
или		
Держатель баллонов, исполнение 2		1
Держатель монитора, исполнение 2		1
Шина		1
Паспорт		1
Руководство по эксплуатации		1
7.Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-05-«ФОТЕК» в составе:		1
Модуль базовый СП2-05-«ФОТЕК»		1
Принадлежности:		
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 1		4
Держатель педалей		1
Держатель эндоскопов		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток		1
Держатель для банки		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 1		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 2		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 3		1
Корзина		1
Стойка инфузионная		1
Ящик, исполнение 1		1
или		
Держатель баллонов, исполнение 1		1
Держатель монитора, исполнение 1		1
Шина		1
Паспорт		1

447-15 30.10.16

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

20

Имя Лист № Докум. Подп Дата

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Копировал

Формат А4

Продолжение Таблицы Г.1

1	2	3
Руководство по эксплуатации		1
8.Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-06-«ФОТЕК» в составе:		1
Модуль базовый СП2-06-«ФОТЕК»		1
Принадлежности:		
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2		4
Полка выдвижная для клавиатуры		1
Держатель педалей		1
Держатель эндоскопов		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток		1
Держатель для банки		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 1		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 2		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 3		1
Корзина		1
Стойка инфузионная		1
Ящик, исполнение 2 или Держатель баллонов, исполнение 2		1
Держатель монитора, исполнение 2		1
Шина		1
Паспорт		1
Руководство по эксплуатации		1

424-15 30.10.14

2 Нов 24-17 30 0.014

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист
21

1	2	3
9. Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-07-«ФОТЕК» в составе:		1
Модуль базовый СП2-07-«ФОТЕК»		1
Принадлежности:		
Полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2		5
Полка выдвижная для клавиатуры		1
Держатель педалей		1
Держатель эндоскопов		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки		1
Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток		1
Держатель для банки		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 1		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 2		1
Держатель периферийных устройств, исполнение 3		1
Корзина		1
Стойка инфузионная		1
Ящик, исполнение 2 или Держатель баллонов, исполнение 2		1
Держатель монитора, исполнение 2		1
Шина		1
Паспорт		1
Руководство по эксплуатации		1

417-15 82 30.10.16

ШГИД.71.100.000РЭ

Лист

22

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Прошито и пронумеровано 23
(двадцать три) листов.
Директор ООО "ФОТЕК"
_____ А.В.Малеев
М.П. _____



Образец маркировки на МИ

Стойка передвижная с принадлежностями
СП-"ФОТЕК" по ТУ 9452-001-41747567-2015
в исполнении:
Стойка передвижная
с принадлежностями с одной колонной

СП1--"ФОТЕК" SN

 ООО "ФОТЕК"
Россия, 620049,
г. Екатеринбург, а/я 84
www.fotek.ru




Стойка передвижная с принадлежностями
СП-"ФОТЕК" по ТУ 9452-001-41747567-2015
в исполнении:
Стойка передвижная
с принадлежностями с двумя колоннами

СП2--"ФОТЕК" SN

 ООО "ФОТЕК"
Россия, 620049,
г. Екатеринбург, а/я 84
www.fotek.ru




Образец маркировки МИ на упаковке

Стойка передвижная с принадлежностями СП-"ФОТЕК" по ТУ 9452-001-41747567-2015
в исполнении: Стойка передвижная с принадлежностями с одной колонной СП1-02-"ФОТЕК"

Упаковано _____ число _____ месяц _____ год _____

REF		SN	158369-1
Место/Мест Colli		Вес брутто Brutto	

Директор ООО «ФОТЕК» Малеев Александр Владимирович

"12" апреля 2017 г.



(Подпись)