

Инструкция
по медицинскому применению
Пакеты перевязочные индивидуальные (ППИ) стерильные
Описание

Пакеты перевязочные индивидуальные далее по тексту **ППИ АВ-3** стерильные **состоят** из одной подушечки (неподвижной) или из 2-х подушечек (подвижной и неподвижной) и фиксирующего марлевого или эластичного бинта.

Подушечки ППИ АВ-3 имеют три слоя:

- атравматический, обеспечивающий минимальную *адгезию* к ране на основе трикотажной сетки;
- сорбционный (впитывающий) на основе отбеленных вискозных волокон;
- защитный (влагонепроницаемый) на основе нетканого полипропиленового полотна.

ППИ АВ-3 упакованы в наружную оболочку многослойный комбинированный материал: лавсан-фольга-полиэтилен и внутреннюю оболочку -полиэтилен (для пневмоторакса).

ППИ АВ-3 **создают** условия, необходимые для профилактики осложнений первичных травм:

- **не травмируют** при снятии подлежащие ткани;
- **не вызывают** болевого синдрома у пациентов;
- **предотвращают** инфицирование раны извне;
- **не имеют** противопоказаний к применению.

Свойства

Пакеты предназначены для оказания экстренной первой медицинской само-и взаимопомощи при ранениях, ожогах на первых этапах эвакуации, а также в случае бытовой производственной и автодорожной травм для лечения ран, ожогов, пролежней, трофических язв и др.

Показания к применению

Используются в качестве первичной перевязки. Применяются в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту.

Способ применения

- 1.Разорвать наружную оболочку по надрезу.
- 2.Снять внутреннюю оболочку.
- 3.Развернуть подушечки, наложить их на рану стороной, прошитой белой ниткой, прибинтовать и закрепить.

Противопоказания - Противопоказаний нет.

Форма выпуска

Пакет в упаковке из многослойного комбинированного материала имеет следующие размеры:

-длина - не более 18,5 см.; - ширина - не более 10,5 см.; - толщина – не более 5,5 см.

Условия хранения и срок годности

Пакеты хранят в сухих и неотапливаемых складских помещениях при температуре от -50°C до +42°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня стерилизации.

ТУ 9393-001-17777359-98

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08170 от 07 июля 2010г.

Производитель: ООО «Предприятие «ВЛАДЕКС» г.Москва.



Стацюк А.В.