

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ****«Маски медицинские из нетканых материалов, нестерильные, одноразовые «ЧИСТОВЬЕ»® по ТУ 32.50.50-002-17135767-2019»****Версия 4**

Разработал:	Согласовано:	Утверждаю:
Представитель руководства по качеству  Тихомирова И.А.	Начальник производства  Мамонтов А.В.	Генеральный Директор  Артюшин В.А. Дата: 15.03.2024

**г. Ногинск, 2024г.**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

благодарим Вас за приобретение продукции, изготовленной нашим предприятием!

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей Инструкцией по применению, проверить целостность упаковки и изделия «Маски медицинские из нетканых материалов, нестерильные, одноразовые «ЧИСТОВЬЕ»® по ТУ 32.50.50-002-17135767-2019», обеспечив их применение в соответствии с целевым назначением и установленными требованиями.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению качественных характеристик и товарного вида изделия «Маски медицинские из нетканых материалов, нестерильные, одноразовые «ЧИСТОВЬЕ»® по ТУ 32.50.50-002-17135767-2019».

Юридический адрес:

Акционерное общество «Чистовье» (АО «Чистовье»)

Россия, 142438, Московская область, г.о. Богородский, п. Затишье, территория Технопарк
Успенский, дом 11, помещ. 7

тел.: 8 800 2002 876

эл. почта: info@chistovie.ru

сайт: <https://chistovie.ru/>

Наименование медицинского изделия

«Маски медицинские из нетканых материалов, нестерильные, одноразовые «ЧИСТОВЬЕ»® по ТУ 32.50.50-002-17135767-2019»

Варианты исполнения

Маски выпускается в следующих вариантах исполнения:

- Маска медицинская из нетканых материалов, нестерильная, одноразовая «ЧИСТОВЬЕ» (трехслойная, на резинках, белая), артикул 602-745 - 100 шт/упак;
- Маска медицинская из нетканых материалов, нестерильная, одноразовая «ЧИСТОВЬЕ» (трехслойная, на резинках, голубая), артикул 602-708 - 100 шт/упак;
- Маска медицинская из нетканых материалов, нестерильная, одноразовая «ЧИСТОВЬЕ» (трехслойная, на резинках, розовая), артикул 602-809 - 100 шт/упак;
- Маска медицинская из нетканых материалов, нестерильная, одноразовая «ЧИСТОВЬЕ» (трехслойная, на резинках, черная), артикул 602-858 - 100 шт/упак.

Сведения о производителе медицинского изделия**Разработчик:**

Акционерное общество «Чистовье» (АО «Чистовье»),
Россия, 142438, Московская область, г.о. Богородский, п. Затишье, территория Технопарк Успенский, дом 11, помещ.7
Телефон: 8 (800) 2002-876
Адрес электронной почты: info@chistovie.ru

Производитель:

Акционерное общество «Чистовье» (АО «Чистовье»),
Россия, 142438, Московская область, г.о. Богородский, п. Затишье, территория Технопарк Успенский, дом 11, помещ.7
Телефон: 8 (800) 2002-876
Адрес электронной почты: info@chistovie.ru

Адрес производственной площадки:

Россия, 142438, Московская область, г.о. Богородский, п. Затишье, территория Технопарк Успенский, дом 11, помещ.7

Общие сведения

Маски представляют собой изделия прямоугольной формы, которое имеет по центру три односторонние складки и носовой фиксатор для обеспечения и подбора индивидуальной формы и лучшего прилегания к лицу.

Назначение медицинского изделия, установленное производителем

Изделие предназначено для защиты органов дыхания медицинских работников и пациентов от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, в том числе больницы, поликлиники, родильные дома, стоматологические клиники, косметологические салоны, индивидуальное использование.

Состав и описание изделия

Маски представляют собой изделие прямоугольной формы, которое имеет по центру три односторонние складки и носовой фиксатор для обеспечения и подбора индивидуальной формы и лучшего прилегания к лицу.

Технические характеристики медицинского изделия

Материалы и сырье применяемые, при производстве изделия, приведены в таблице 1, технические характеристики указаны в таблице 2.

Внешний вид изделия должен соответствовать рисунку 1.

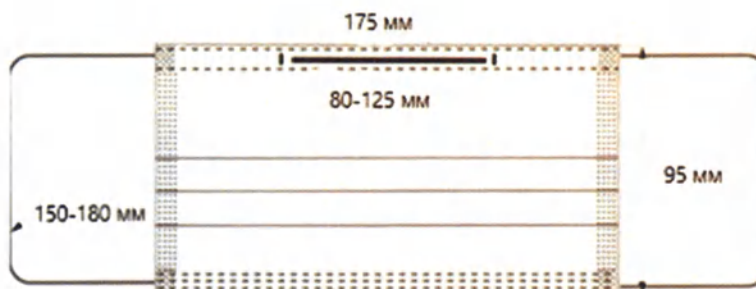


Рисунок 1 – Маска. Чертеж изделия (внешний вид)
Длина изделия - 175мм (±5) ширина 95 мм (±5)
длина резинки 150 - 180 мм
длина нового фиксатора 80-125 мм

Состав изделия

Материалы и сырье, применяемые при производстве изделия.

Таблица 1.

Название материала	Цвет материала	Состав *	Производитель
Материалы			
Нетканый материал “Спанбонд” Плотность 15 г/м ²	Белый, черный, голубой, розовый.	Полипропилен	ООО "Нетканика" (Россия)
Нетканый материал “Спанбонд” Плотность 15 г/м ²	Белый, черный, голубой, розовый.	Полипропилен	АО "Полиматиз" (Россия)
Нетканый материал “Спанбонд” Плотность 15 г/м ²	Белый, черный, голубой, розовый.	Полипропилен	ООО “Лента” (Беларусь, Россия)
Нетканый материал “СМС” (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) Плотность 15 г/м ²	Белый, голубой, розовый.	Полипропилен	ООО "Нетканика" (Россия)
Нетканый материал “СМС” (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) Плотность 20 г/м ²	Черный	Полипропилен	АО "Полиматиз" (Россия)
Резинка			
Резинка для маски	Белый, черный.	Полиэфир (нить полиэфирная сорт АА – поставщики АО «Ин-	АО «Чистовье» (Россия)

		теграция и развитие», ООО «ПКФ Тринити», ООО «РХТ групп») Эластан (нить эластановая Сорт АА – поставщик ООО “ИНТЕКС” (Россия))	
Носовой фиксатор (лента пластиковая для производства медицинских масок)	Белый, черный.	Полипропилен Полиэтилен	ООО “Ко. “Глобл Партнер”, (Россия)
Носовой фиксатор (лента пластиковая для производства медицинских масок)	Белый, черный.	Полипропилен Полиэтилен	ООО «Элегрин», (Россия)
Носовой фиксатор (лента пластиковая для производства медицинских масок)	Белый, черный.	Полипропилен Полиэтилен	ООО «Компания Клип Лента», (Россия)
Потребительская упаковка			
Материал, марка		Производитель	
Картон мелованный, Simcote		ООО “ВГ Остпринт”, Россия	
Транспортная упаковка:			
Гофрированный картон, Т-23		ООО “Павло-Посадский гофрокомбинат”, Россия ООО «ЯрГофроСервис». Россия	

Технические характеристики

Таблица 2

Технические характеристики	Значения
Размер изделия, мм	длина x ширина 175 (± 5)мм x 95 (± 5)мм
Закрепление слоев и ширина шва, см	Закрепление слоев маски между собой должно быть выполнено с помощью ультразвукового шва. Прочность продольного ультразвукового шва должна быть не менее 10 Н. Прочность поперечного ультразвукового шва должна быть не менее 50 Н. Ширина ультразвукового шва на горизонтальных сторонах маски 0,5-2,5 см, ширина ультразвукового шва на вертикальных сторонах маски 0,5-2,5 см.
Линейные размеры резинки, мм	- длина 150 – 180 мм - диаметр (резинки круглого сечения) 2,0 (± 1)мм.
Носовой фиксатор	Имеется гибкий носовой фиксатор для обеспечения и подбора индивидуальной формы и лучшего прилегания маски к лицу. Линейные размеры носового фиксатора должны соответствовать следующим данным: - длина 80-125 мм; - ширина фиксатора 4,0 (±1)мм. Носовой фиксатор должен выдерживать изгиб на 180°.
Цвет изделий	Белый, черный, голубой, розовый

Текстура	Гладкая, с тиснением, с перфорацией «сетка», без ворса
Поверхность	Поверхность изделий не имеет разрывов, порезов, загрязненных участков и прочих дефектов. Срезы не обметывают.
Биологическая безопасность	Соответствие серия стандартов ISO 10993
Масса изделия, г	2,0 (±1)
Плотность, г/м ²	См. таблицу 1
Логотип	Допускается наличие логотипа, в левом верхнем углу на поверхности маски

Комплектность

Комплектация изделий по цвету определяется при заказе по требованию заказчика.

В комплект поставки масок должно входить:

- маска медицинская одного цвета в потребительской упаковке - 100 шт./упак;
- инструкция по применению (нанесена на потребительскую упаковку);
- потребительская упаковка-1 шт



Перед применением необходимо проверить комплектацию и срок хранения на упаковке!

Маски являются одноразовым изделием, технического обслуживания не требуется.

Информация о стерильном состоянии медицинского изделия

Изделие не стерильно, предназначено для однократного применения и не подлежит стерилизации, не требует дезинфекции и повторной очистки. Изделие безопасно в соответствии с требованиями серии стандартов биологической безопасности ГОСТ ISO 10993.

Способ применения

1. Распакуйте изделие, освободив его от упаковочного материала.
2. Проверьте целостность изделия методом визуального осмотра.
3. Разверните изделие и используйте его по назначению.
4. В случае попадания на изделие крови или другой биологической жидкости его следует заменить на другое. В случае прикосновения к участкам изделия, загрязненным кровью или другой биологической жидкостью следует произвести гигиеническую антисептику рук.
5. Сразу после использования изделия следует поместить в емкость для соответствующих отходов.
6. После использования изделия проводится гигиеническая антисептика рук.

Срок хранения 5 лет, с даты изготовления.

Маркировка

Маркировка изделий должна быть выполнена в соответствии с требованиями настоящих ТУ. На этикетках могут быть использованы необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15233-1.

Маркировку потребительской упаковки осуществляют непосредственно на потребительской упаковке. Маркировку транспортной упаковки осуществляют на этикетках. Допускается нанесение маркировки непосредственно на транспортную упаковку.

Маркировку номера партии и срока хранения указывают арабскими цифрами.

Маркировку потребительской и транспортной упаковки наносят типографским (печатным) способом. Маркировка должна быть четкой и легко читаемой.

Маркировка потребительской упаковки должна содержать следующую информацию:

- Наименование медицинского изделия и артикул;
- Наименование предприятия-изготовителя;
- Адрес предприятия-изготовителя, номер телефона, сайт;
- Номер настоящих технических условий;
- Символ или надпись: «Номер партии»;
- Символ или надпись: «Условия хранения»;
- Обозначение материала и основных размеров, характеризующих конкретную продукцию (при необходимости);
- Количество изделий в потребительской упаковке;
- Символ или надпись: «Нестерильно»;
- Символ: «Запрет на повторное применение» или надпись «Однократное применение»;
- Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
- Дата изготовления (дата/месяц/год);
- Срок хранения;
- Штрих-код;
- Условный номер упаковщика
- Знак вторичной переработки.

Допускается нанесение маркировки на нескольких языках.

Допускается выполнение маркировки на казахском языке , содержащую следующую информацию:

- Наименование медицинского изделия и артикул;
- Наименование предприятия-изготовителя;
- Адрес предприятия-изготовителя, номер телефона, сайт;
- Номер настоящих технических условий;
- Символы или надписи: «Номер партии»;
- Символ или надпись «Условия хранения»;
- Обозначение материала и основных размеров, характеризующих конкретную продукцию (при необходимости);
- Дата изготовления (дата/месяц/год);
- Условный номер упаковщика;
- Срок хранения;
- Назначение медицинского изделия;
- Способ применения.

На этикетке транспортной упаковки должна быть нанесена следующая информация:

- Наименование предприятия-изготовителя
- Адрес предприятия-изготовителя, номер телефона, сайт;
- Наименование медицинского изделия и артикул;
- Дата изготовления (дата/месяц/год);
- Количество изделий в потребительской упаковке
- Количество потребительских упаковок;
- Обозначение материала и основных размеров, характеризующих конкретную продукцию;
- Номер настоящих технических условий;
- Надпись «Сделано в России»;
- Обозначение экспортера;
- Условия хранения;
- Знак вторичной переработки;
- Манипуляционные знаки: «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Верх».

Упаковка

Упаковка должна быть выполнена в соответствии с требованиями настоящих ТУ.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Упаковка изделия, предназначенного для экспорта, должна соответствовать требованиям настоящих технических условий на изделие.

Изделия должны быть упакованы в потребительскую упаковку – коробку картонную. Потребительскую упаковку заклеивают пломбировочной лентой сверху и снизу.

Продукция, упакованная в потребительскую упаковку, укладывается в транспортную упаковку – ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142, 13511. В одну транспортную упаковку помещается 18 потребительских упаковок.

При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковку продукции производят в соответствии с ГОСТ 15846.

Параметры ящика из гофрированного картона, мм - 600x250x300± 5%.

Масса брутто транспортной упаковки должна быть не более 15 кг.

Транспортную упаковку оклеивают липкой лентой. Перед употреблением транспортная упаковка должна быть проверена на чистоту и отсутствие дефектов.

Условия применения

Температура воздуха от +10 до +35 °С,

Относительная влажность воздуха от 40 до 80%,

Атмосферное давление от 84,00 до 106,70 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

Условия транспортирования и хранения

Готовые изделия транспортируют в упаковке любым видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования готовой продукции в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Температурные условия транспортирования: температура воздуха от -20°С до +40°С, влажность воздуха не более 90% при 25°С без образования конденсации на упаковке.

Условия хранения: температура воздуха от - 20°С до + 40°С, влажность воздуха не более 90% при 25°С, без образования конденсации, исключающие воздействие влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия

Изделия после выполнения процедуры, а также загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются как медицинские отходы класса «Б» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 – инфицированные и потенциально инфицированные отходы: материалы и инструменты, предметы загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями.

Упаковка, изделия с истекшим сроком хранения, изделия с нарушенной целостностью, а также бракованные изделия - относятся к эпидемиологически безопасным отходам, приближенным по составу к твердым бытовым отходам (далее - ТБО), не имеющим контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, и должны быть утилизированы по ГОСТ 30772 или как медицинские отходы класса «А» в соответствии СанПин 2.1.3684-21, или как ТБО.

Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий параметрам, указанным в настоящей инструкции по применению в течение срока хранения, при условии соблюдения потребителем правил применения, транспортирования и хранения.

Все дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, влекущие нарушение характеристик продукции при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования устраняются предприятием-изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделия при транспортировании и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими и механическими воздействиями, не оговоренными в настоящей инструкции;
- доработка изделия потребителем (изменение конструкции).

Качество применяемых материалов подтверждено соответствующими документами о качестве (сертификатами или декларациями соответствия, паспортами, формулярами).

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без извещения вносить в конструкцию изделия незначительные изменения (доработки), не влияющие на их работоспособность в целом.

Сведения о производителе медицинского изделия или уполномоченного лица для принятия претензий.

Производитель: Акционерное Общество «Чистовье» (АО «Чистовье»)

Адрес (местонахождение) юридического лица:

Россия, 142438, Московская область, г.о. Богородский, п. Затишье, территория Технопарк Успенский, дом 11, помещ.7

Телефон: 8 800 2002 876

Адрес электронной почты: info@chistovie.ru

Символы на упаковке и их обозначение

	Запрет на повторное применение
	Не стерильно
Гофрированный картон (РАР, РСВ (ПАП)) 	Переработка
	Знак «Не допускать воздействия источников тепла»
	Знак «Беречь от дождя»



Знак «Верх»

СПИСОК СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Обозначение документа	Наименование документа
1	2
ГОСТ 2.114-2016	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)
ГОСТ Р 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
ГОСТ 15846-2002	Продукция отравляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка и хранение.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
Серия стандартов ГОСТ ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.
ГОСТ 25051.3-83	Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации.
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Общие технические условия.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия». Предел измерения 1000 мм. Цена деления 1 мм.
ГОСТ OIML R 76-1-2011	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания (с Поправкой)
ГОСТ 8.423-81	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Секундомеры механические. Методы и средства поверки.
ГОСТ 1770-74	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.4.021-75	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования.

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 12.2.049-80	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие эргономические требования.
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.
СП 60.13330.2012	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
ГОСТ 12.2.032-78	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.033-78	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 28840-90	Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования.
ГОСТ Р 55710-2013	Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений.
МУ 2.1.7.730-99	Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест
ГОСТ Р 52108-2003	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.
СанПиН 2.1.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999	«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998	«Об отходах производства и потребления»
Приказ МЗ РФ от 06.06.2012г. №4	«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
Постановление правительства № 644 от 29.07.2013	"Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
ГОСТ 3282-74	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов. Технические условия.
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 34033-2016	Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 13511-2006	Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия
ГОСТ Р 52901-2014	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия.
ГОСТ 2226-2013	Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.010-76	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.044-2018	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 17.2.3.01-86	Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов
СанПин 2.1.3684-21	Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ 3813-72	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

Обозначение документа	Наименование документа
РД 50-707-91	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности
ГОСТ 20435-75	Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия
МУ 25.1-001-86	Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ ISO 14971-2011	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 4204-77	Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная. Технические условия

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 (тринадцать) лист 6

Генеральный директор АО «Чистовье»
В.А. Артюшин

