

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Интмед»
Сюй Чжаоцзюнь

«__» _____ 2010г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

**«Пробирки для взятия, хранения и анализа крови разных размеров и
объемов, вакуумные и не вакуумные, с реагентами и без реагентов, в
наборах и отдельных упаковках.»**

производства

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd., Китай.

1. Назначение.
2. Особые технические характеристики.
3. Противопоказания к применению.
4. Порядок работы аппарата.
5. Использование мини-пробирок.
6. Упаковка.
7. Хранение и срок годности.
8. Транспортирование.

2010г.

1 Назначение

Пробирки применяются для безопасного и быстрого отбора крови .

Изделие относится к 26 классу потенциального риска

КОД ОКП 94 6166

Качество продукции подтверждено следующими сертификатами: EN ISO 13485:2009+ AC:2077; EN ISO 9001:2000

Поставляются в Австрию, США, Европу и т.д.

2 Особые технические характеристики.

№ п/п	Наименование параметра	Описание
1	Общая характеристика	Предназначены для: • Химических анализов крови в целом; • Исследования плазмы и содержания глюкозы; • Исследования Сыворотки; • Исследования коагуляции; • Определения скорости оседания эритроцитов; • Экспресс-диагностики в клинической химии, серологии и иммунологии.
2	Материал	Полиэтилентерефталат, полипропилен.
3	Способы стерилизации и обработки	Стерильно, только однократного применения.
4	Технические характеристики	Размеры: 13x75 мм, 13x100мм, 16x100мм, 13x75мм, 8x120мм 10.25x47мм, 10.25x64мм Сухой объем: 1-10мл Мини-пробирки: Размеры: диаметр верхний – 10мм, диаметр нижний – 8мм, длина – 45мм Сухой объем: 0,2 – 1,0 мл Максимальная степень погрешности ±10% при герметизации
5	Соответствие стандартам	
6	Методы утилизации	Сжигание в высокотемпературных печах.
7	Количество штук в упаковке	Зависит от типа изделия.

Состав материала	Полиэтилентерефталат, полипропилен
------------------	------------------------------------

Токсичность	2а класса
Потенциальный риск применения	Нарушения методики работы может привести к расстройству местного кровообращения.
Способы стерилизации и обработки	Стерильно, только однократного применения.
Условия и сроки хранения	Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, при температуре 4-30⁰С (39⁰ – 82⁰ F). Хранение пробирок с кровью при температуре 0⁰ С и ниже может привести к их разрушению.Срок хранения 18 месяцев.
Методы утилизации	Сжигание в высокотемпературных печах.
Упаковка изделия	Упакованы в полимерную пленку и гофрокартон.

1. Пробирки, выполненные из полиэтилентерифталата.

2. Переполнение и не заполнение пробирок приводит к неправильному соотношению крови с дополнительным веществом и может негативно повлиять на результаты анализов.

3.Противопоказания к применению.

Противопоказаний к применению нет.

4.Порядок работы изделия.

Подготовка к работе изделия:

Как открывать вакуумную пробирку для сбора крови?

1.Одной рукой взять пробирку, другой оттянуть пробку вверх. (Одна рука подцепляет основание пробки и подталкивает ее, другая рука тянет пробку вверх).

2.Уберите большой палец прежде, чем вытянуть пробку.

3.Аккуратно вытяните пробку.

Как закрыть вакуумную пробирку для сбора крови?

1.Поместите пробку прямо над пробиркой.

2.Ввинчивая, одновременно введите пробку в пробирку.

3.Используйте перчатки, нарукавники, защиту для глаз и другие методы защиты, чтобы избежать контакта с кровью и не получить связанные с этим заболевания

5.Использование пробирок.

Процедура забора крови .

Взятие крови производится в горизонтальном положении, заполнение происходит под действием капиллярного эффекта. В большинстве случаев не требуется дополнительное выдавливание крови из пальца, что позволяет не вызывать боли и неприятных ощущений у пациента.

После заполнения капилляра или воронки пробирка переворачивается в вертикальное положение, кровь под собственным весом полностью стекает в пробирку. После этого капилляр или воронку удаляют из пробирки.

6. Упаковка.

«Пробирки для взятия, хранения и анализа крови разных размеров и объемов, вакуумные и не вакуумные, с реагентами и без реагентов, в наборах и отдельных упаковках.»

Производства Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd., упакованы в картонные коробки. Коробка(тара) маркируется в соответствии с национальными нормами Китая.

6. Хранени и срок годности

Упакованные пробирки должны храниться в упаковках изготовителя в сухом помещении в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150-69;

Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, при температуре от 4⁰-30⁰ С (39-82F).

Хранение пробирок с кровью при температуре 0⁰ С и ниже может привести к разрушению. Срок хранения 18 месяцев .

7. Транспортирование.

Транспортирование должно проводиться всеми видами закрытого транспорта (в железнодорожных вагонах, контейнерах, отопляемых герметизированных отсеках, на самолетах, закрытых автомашинах, трюмах и т д.) в соответствии правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида и условиями хранения по ГОСТ 15150-69

Генеральный директор



Сюй Чжаоцзюнь