

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»



А.В.Лаврентьев

2023 г.

**СТАНОК ДВУХЪЯРУСНЫЙ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ
СКЛАДНОЙ СДЧ**

ПО ТУ 32.50.30-010-09442403-2023

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВТГ 942868.001 РЭ

**ООО «Омнимед-НН»
г. Нижний Новгород
Россия**

1	Основные сведения и технические данные.....	4
1.1	Наименование изделий в зависимости от исполнения.....	4
1.2	Назначение.....	4
1.3	Область применения	4
1.4	Условия применения.....	4
1.5	Потенциальный потребитель	4
1.6	Показания к применению	4
1.7	Противопоказания к применению	4
1.8	Побочные эффекты	4
2	Основные технические характеристики.....	5
3	Комплектность.....	5
4	Варианты исполнения изделий	6
5	Меры безопасности	11
6	Указания по эксплуатации.....	11
7	Техническое обслуживание	11
8	Транспортирование и хранение	11
9	Сведения о маркировке.....	12
10	Упаковка.....	13
11	Утилизация.....	14
12	Гарантии изготовителя.....	14
13	Послегарантийное техническое обслуживание.....	14
	Приложение А (справочное) Перечень ссылочных документов.....	15
	Приложение Б (справочное) Устройство и внешний вид изделий	16

Руководство по эксплуатации, далее – РЭ, предназначено для ознакомления с медицинским изделием «**Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ** по ТУ 32.50.30-010-09442403-2023», далее – станок:

Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ, в составе:

- Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ – 1 шт.
- Сумка транспортировочная СУ-53 – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Информация о производителе

Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

РЭ содержит описание изделий, их устройство, принцип работы, и устанавливает правила эксплуатации (транспортирования и хранения, применения, утилизации и пр.).

ВНИМАНИЕ!



- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией.
- Медицинские работники должны работать в перчатках в соответствии с СанПиН 2.1.3678.

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Наименование изделий в зависимости от исполнения

Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ по ТУ 32.50.30-010-09442403-2023

1.2 Назначение

Станок предназначен для установки четырёх носилок с пациентами на высоте, удобной для оказания помощи при оснащении медицинских объектов в полевых условиях.

1.3 Область применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Условия применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.5 Потенциальный потребитель

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.6 Показания к применению

Для установки четырёх носилок с пациентами на высоте, удобной для оказания помощи при оснащении медицинских объектов в полевых условиях.

1.7 Противопоказания к применению

Противопоказания не выявлены.

Не применять не по назначению.

1.8 Побочные эффекты

При правильном использовании станка побочные эффекты не выявлены.

В зависимости от степени потенциального риска применения изделие относится к классу — 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2012 года №4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий — 370520 (Станок складной для установки носилок с пациентами для оснащения медицинских объектов в полевых условиях).

Вид климатического исполнения – У категории 1 по ГОСТ 15150.

Станок в зависимости от воспринимаемых механических воздействий относится к группе 5 по ГОСТ Р 50444.

2 Основные технические характеристики

- 2.1 Станок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации БВТГ 942868.001.
- 2.2 Технические характеристики станка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 и приложению Б.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
2.2.1 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	(1815x1270x1200) ±20
2.2.2 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	(1200x195x310) ±20
2.2.3 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-53	(1250x350x200) ±20
2.2.4 Максимально равномерно распределенная нагрузка (на каждое место), кг:	170
2.2.5 Материал	Сталь
2.2.6 Условия эксплуатации (температура)	от минус 50 до плюс 45 °С
2.2.7 Средний срок службы, лет	5
2.2.8 Масса, кг	23,0±1,0
<i>в том числе:</i>	
2.2.9 Масса сумки транспортировочной СУ-53, кг	1,0±0,2

3 Комплектность

- 3.1 Комплектность должна соответствовать приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол. шт.
Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ	БВТГ 942868.001	1
Сумка транспортировочная СУ-53	БВТГ 6.830.111-31	1
Паспорт	БВТГ 942868.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942868.001 РЭ	1

4 Варианты исполнения изделий

4.1 Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ по ТУ 32.50.30-010-09442403-2023:

Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ, далее – станок, предназначен для установки четырёх носилок с пациентами на высоте, удобной для оказания помощи при оснащении медицинских объектов в полевых условиях.

4.1.1 Устройство

Общий вид станка приведен на рисунке 1.

Станок состоит из двух стоек (1), соединенных между собой стяжками (2, 3). Стойки в рабочем положении фиксируются распорками (4).


На стойках размещены верхние (5) и нижние (6) переключатели, служащие для установки носилок.

Верхние переключатели (5) в рабочем положении удерживаются распорками (7).

Нижние переключатели (6) опираются на ножки (8) с опорами (13) и фиксируются в рабочем положении распорками (9).

Для фиксации распорок (4, 7, 9) в рабочем положении на кронштейнах стоек (1) предусмотрены пружинные фиксаторы (10, 11, 12).

Станок в сложенном виде приведен на рисунке 2.

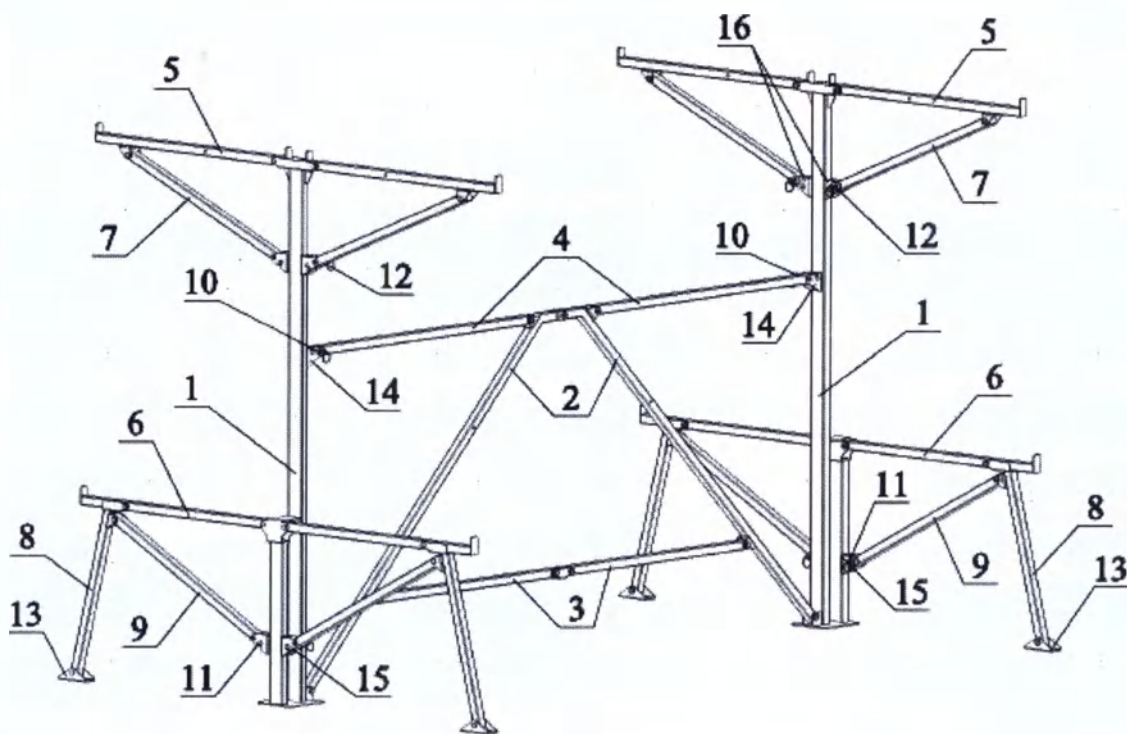

1 – стойка; 2, 3 – стяжки; 4, 7, 9 – распорки; 5 – переключатель верхний; 6 – переключатель нижний; 8 – ножка; 10, 11, 12 – фиксаторы; 13 – опоры; 14, 15, 16 – кронштейны стоек

Рисунок 1

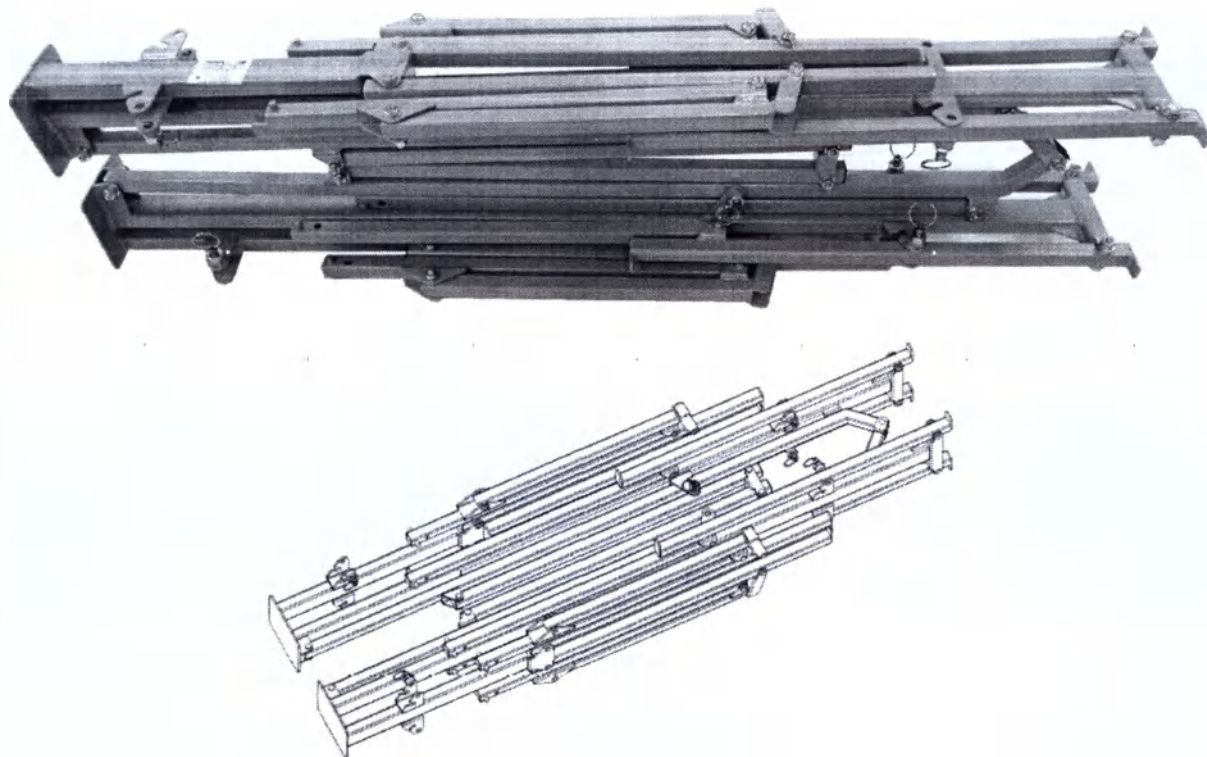


Рисунок 2

4.1.2 Порядок работы

Установку станка в рабочее положение (рисунок 3) производить в следующей последовательности:

- извлечь станок из сумки транспортировочной;

I

- оттянув штоки фиксаторов (10) освободить стяжки (2) от закрепления их в кронштейнах (14) стоек (1);

- растянуть стойки (1), отклонив их от вертикали и поднять распорки (4) таким образом, чтобы их свободные концы были несколько выше кронштейнов (14) стоек (1);

- установить стойки (1) в вертикальное положение;


- распорки (4) вставить в кронштейны (14), зафиксировав их в рабочем положении фиксаторами (10);

II

- привести нижние перекладины (6) в рабочее положение для чего, повернув перекладины (6) в горизонтальное положение - развернуть до упора ножки (8) перевести в рабочее положение опоры (13) и, вставив распорки (9) в кронштейны (15), зафиксировать их фиксаторами (11);

III

- установить в рабочее положение перекладины верхние (5) для чего, оттянув штоки фиксаторов (12) повернуть перекладины верхние (5) в горизонтальное положение, установить распорки (7) в кронштейны (16) и зафиксировать их в рабочем положении фиксаторами (12).

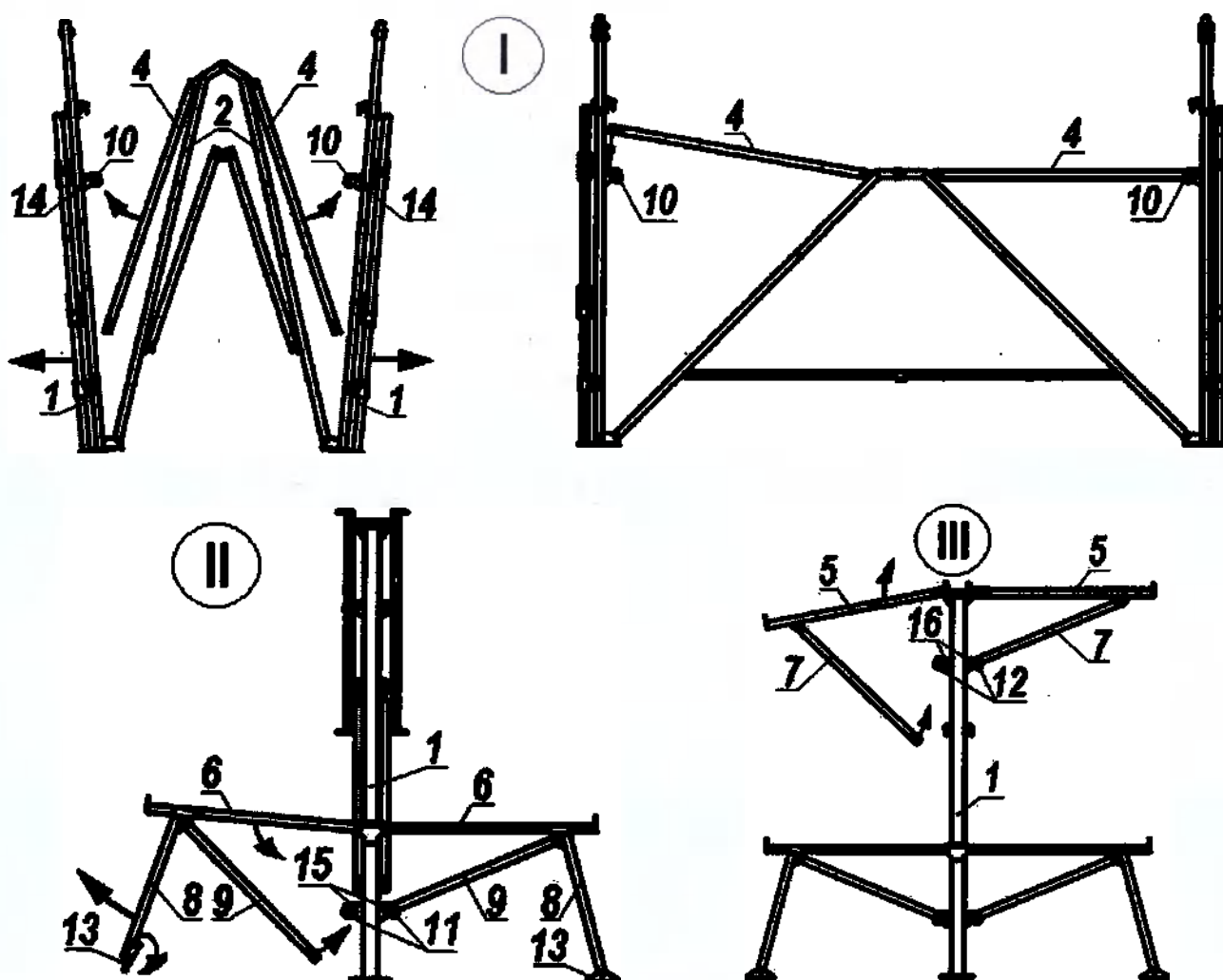

1 – стойка; 2 – стяжки; 4, 7, 9 – распорки; 5 – перекладина верхняя; 6 – перекладина нижняя; 8 – ножка; 10, 11, 12 – фиксаторы; 13 – опоры; 14, 15, 16 – кронштейны стоек

Рисунок 3 – Установка станка в рабочее положение

Перевод станка из рабочего положения в сложенное (рисунок 4) производить в следующей последовательности:

I

- для каждой перекладины верхней (5), оттянуть шток фиксатора (12) и повернуть распорку (7), установив ее вдоль перекладины (5);
- повернуть распорку (7) вместе с перекладиной (5) в вертикальное положение вдоль стойки (1) и зафиксировать их в кронштейне (16) штоком фиксатора (12);

II

- поочередно оттянуть шток фиксатора (11) и освободить распорку (9) из кронштейна (15);
- повернуть перекладину (6) до установки ее в положение вдоль стойки (1);
- опоры (13) и распорку (9) уложить вдоль ножки (8) и повернуть их вверх в положение вдоль перекладины (6);

III

- оттянуть штоки фиксаторов (10) и приподнять распорки (4);
- отклонить наружу на небольшой угол стойки (1) и уложить распорки (4) на стяжки (2);

IV - приподнять вверх шарнирный узел, расположенный между стяжками (3), и сдвинуть стойки 1;

- уложить станок в сумку транспортировочную.


Станок с установленными носилками приведен на рисунке 4.

Размещение пациентов в два яруса без развертывания одной из сторон станка – рисунок 5.



ВНИМАНИЕ:

При переводе станка в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления

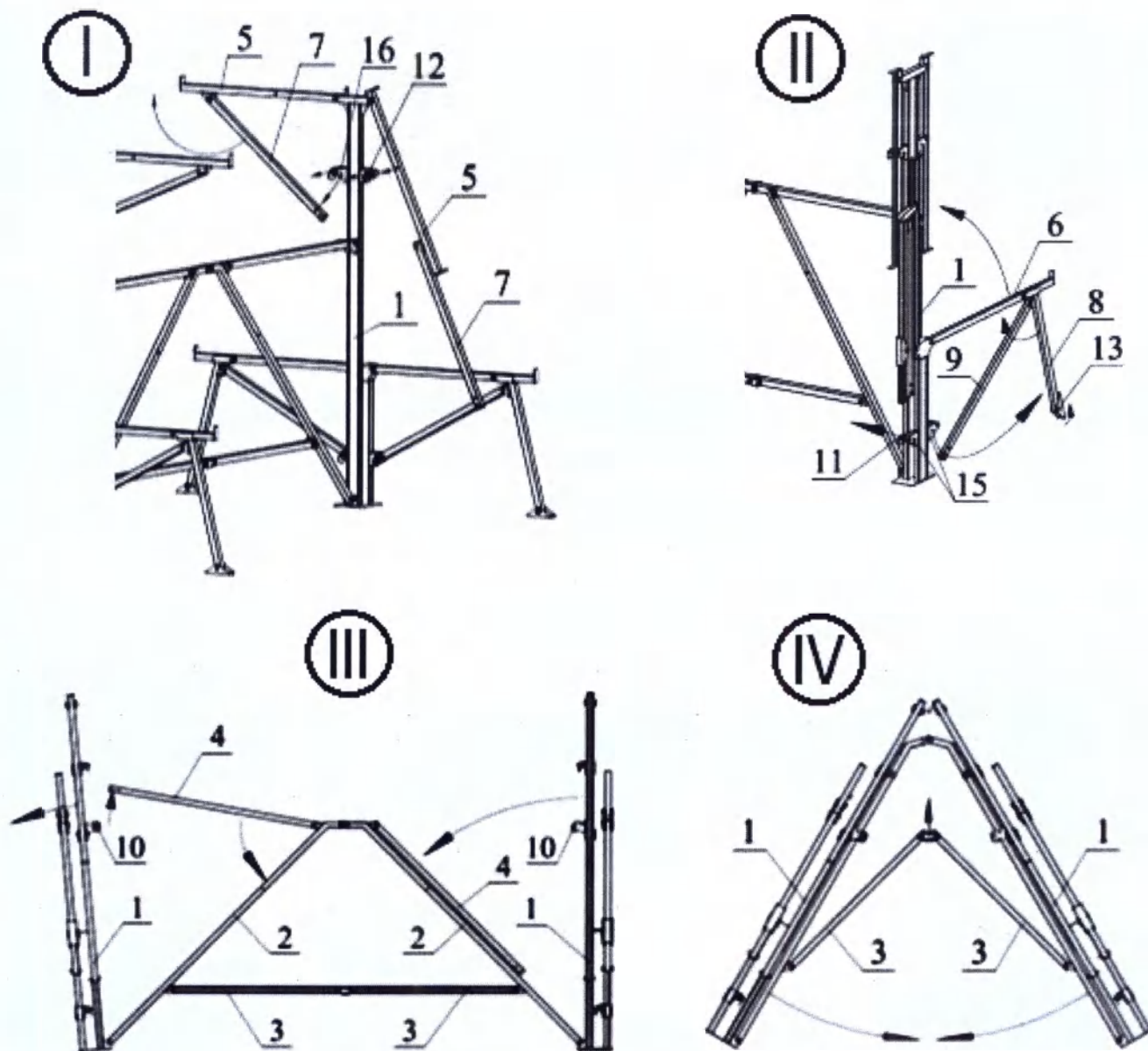

1 – стойка; 2, 3 – стяжки; 4, 7, 9 – распорки; 5 – перекладина верхняя; 6 – перекладина нижняя;
8 – ножка; 10, 11, 12 – фиксаторы; 13 – опоры; 14, 15, 16 – кронштейны стоек

Рисунок 4 – Перевод станка из рабочего положения в сложенное



Рисунок 5
Станок с установленными носилками

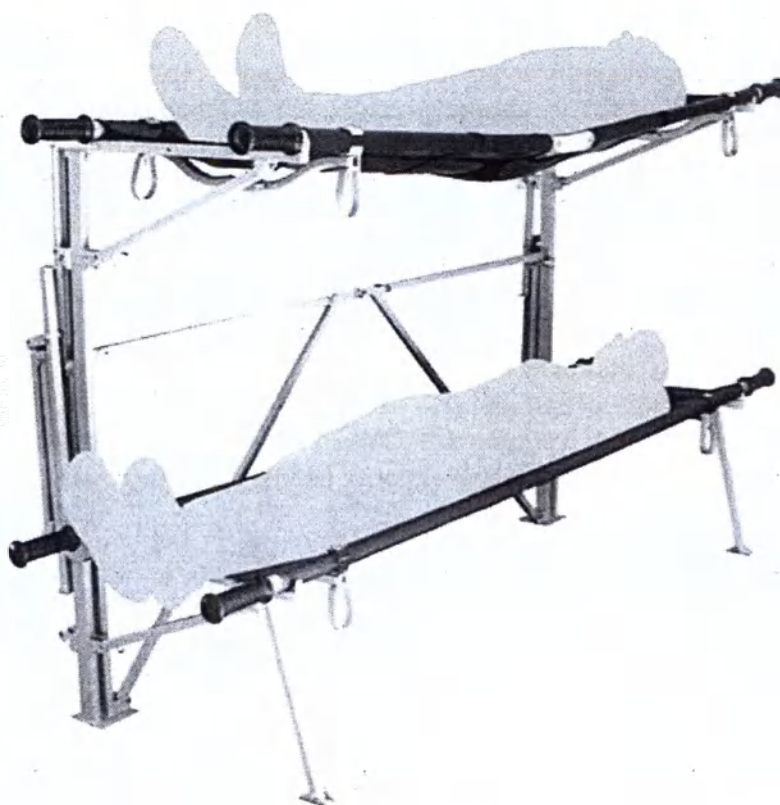


Рисунок 6
Размещение пациентов в два яруса без разворачивания одной из сторон станка

5 Меры безопасности

- 5.1 Станок в зависимости от степени потенциального риска применения относится к классу 1 согласно ГОСТ 31508 и Приказу МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г.
- 5.2 Станок предназначен для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации. При работе со станком соблюдайте правила транспортировки пациента, принятые в медицине.
- 5.3 Перед началом работы со станком внимательно ознакомьтесь с настоящим РЭ.
- 5.4 При транспортировке станка и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделия.
- 5.5 Не нагружайте каждый ярус станка более, чем на 170 кг.
- 5.6 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего РЭ.
- 5.7 Убирайте изделия в сумки только после их обработки и сушки.

Запрещается:



- Эксплуатировать изделия без ознакомления с эксплуатационной документацией;
- Использовать изделия не по назначению.

6 Указания по эксплуатации

- 6.1 При эксплуатации станка должны соблюдаться правила безопасности, изложенные в разделе 5 настоящего РЭ.
- 6.2 К эксплуатации допускаются медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.
- 6.3 Медицинские работники должны работать в перчатках, в соответствии с СанПиН 2.1.3678.

7 Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.
- 7.2 Перед применением изделий должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий.
- 7.3 Дезинфекция осуществляется химическим методом по МУ-287-113 путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177 с 0,5% добавлением моющего средства ГОСТ 25644. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки поверхностей не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции изделия необходимо тщательно просушить.

8 Транспортирование и хранение

- 8.1 Транспортирование изделий может производиться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.2 Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов по ГОСТ Р 50444, должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

8.3 Изделия могут храниться на складах по ГОСТ Р 50444, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован)

При хранении изделий допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

9.1 При маркировании станков (на изделия, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
	Код партии (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		Изготовитель (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		Дата изготовления (ГОСТ Р ИСО 15223-1)
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)			Диапазон влажности. Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)	
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны. (ГОСТ Р ИСО 15223-1)				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги (ГОСТ 14192)		Верх Указывает правильное вертикальное положение груза (ГОСТ 14192)		Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом (ГОСТ 14192)
					Предел по количеству ярусов в штабеле Штабелировать не более 2 ярусов (ГОСТ 14192)

9.2 Внешний вид маркировки изделий приведен на рисунке 7

9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 8.



Рисунок 7

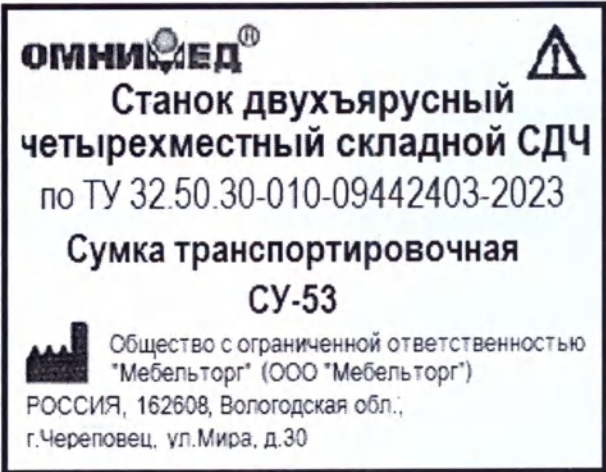


Рисунок 8

9.4 Внешний вид маркировки на сумке транспортировочной приведен на рисунке 9.

ОМНИМЕД®		Станок двухъярусный четырёхместный складной СДЧ			
по ТУ 32.50.30-010-09442403-2023					
Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20650 от 19.07.2023 года					
Условия транспортирования		Условия хранения			
					
Масса _____ кг		Штамп ОТК _____		LOT _____	
Число изделий _____ шт.				 _____	
Дата упаковывания _____					
		Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг») РОССИЯ, 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30 Тел.: 8 (8202) 54-10-54			

Рисунок 9

10 Упаковка

- 10.1 В качестве упаковки используются сумки транспортировочные, изготовленные в соответствии с комплектом конструкторской документации.
- 10.2 Изделия помещаются в сумки транспортировочные.
- 10.3 Каждая сумка имеет ярлык (рисунок 9), на котором указаны:
- наименование предприятия-изготовителя;
 - адрес и номер телефона предприятия-изготовителя;
 - товарный знак уполномоченного представителя производителя;
 - обозначение технических условий;
 - наименование изделия;
 - номер регистрационного удостоверения;
 - масса;
 - число изделий в упаковке;
 - месяц и год упаковывания;
 - штамп ОТК;
 - знаки и символы, приведенные в таблице в таблице 3.

11 Утилизация

- 11.1 Станок не содержит в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.
- 11.2 При нормальной эксплуатации станок не оказывает негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе станки не содержат драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.
- 11.3 Утилизация станков осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Станки после окончания использования могут утилизироваться как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов
- 11.4 Неиспользованные станки специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Изделия не взрывоопасны, не способны самовозгораться, при поднесении открытого огня горят без взрыва.

12 Гарантии изготовителя

- 12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
- 12.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 12.3 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
- 12.4 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.
- 12.5 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.
- 12.6 Гарантийные требования реализуются при предъявлении эксплуатационной документации, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.
- 12.7 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

13 Послегарантийное техническое обслуживание

- 13.1 Послегарантийное техническое обслуживание проводится производителем или обслуживающими организациями, уполномоченными на это производителем (имеющими письменное разрешение).


Приложение А
(справочное)
Перечень ссылочных документов

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
Приказ МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ТУ 32.50.30-010-09442403-2023	Станок двухъярусный четырехместный складной. Технические условия

Приложение Б (справочное)

Устройство и внешний вид изделий

Б.1 Устройство и внешний вид станка приведен на рисунке Б.1.

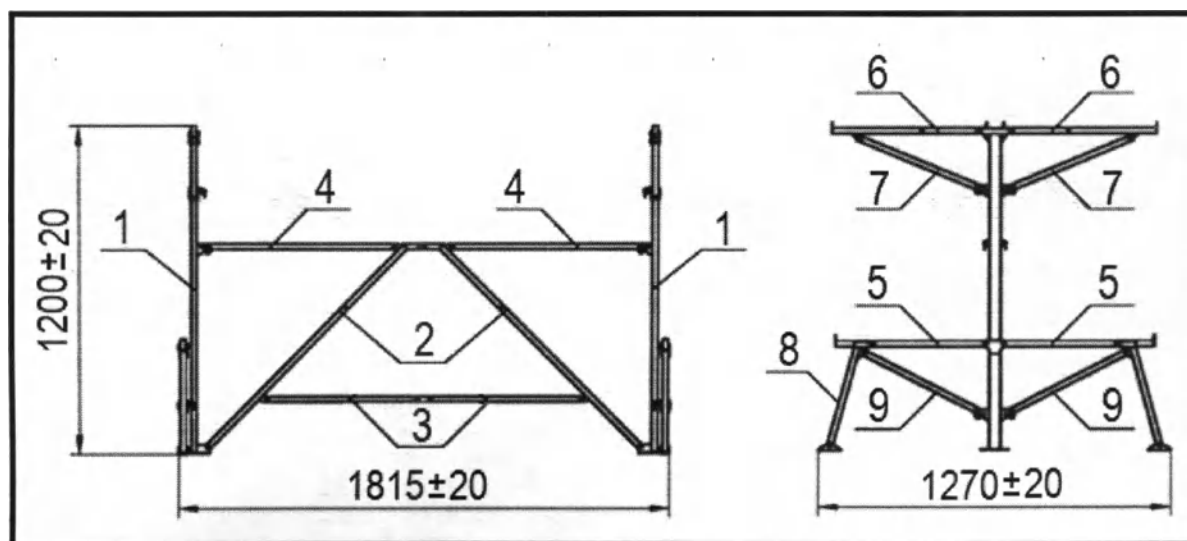

1 – стойка; 2, 3 – стяжки; 4, 7, 9 – распорки;
5 – перекладина верхняя; 6 – перекладина нижняя; 8 – ножка

Рисунок Б.1

Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ по ТУ 32.50.30-010-09442403-2023
БВТГ 942868.001

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 16 листов.

Генеральный директор
ООО «Омни-мед-НН»



А.В. Лаврентьев

УТВЕРЖДАЮ



СТАНОК ДВУХЪЯРУСНЫЙ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ СКЛАДНОЙ СДЧ ПО ТУ 32.50.30-010-09442403-2023

ПАСПОРТ

БВТГ 942868.001 ПС

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20650 от 19.07.2023 года



Внимание!

Перед началом эксплуатации необходимо
внимательно ознакомиться с настоящим паспортом

г. Нижний Новгород
Россия

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики медицинского изделия: Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ по ТУ 32.50.30-010-09442403-2023:

Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ, далее – станок.

Паспорт предназначен для ознакомления с устройством станка и его правильной эксплуатации.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение изделия

Станок предназначен для установки четырех носилок с пациентами на высоте, удобной для оказания помощи при оснащении медицинских объектов в полевых условиях.

1.2 Область применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.3 Условия применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Потенциальный потребитель:

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.5 Показания к применению:

Для установки четырех носилок с пациентами на высоте, удобной для оказания помощи при оснащении медицинских объектов в полевых условиях.

1.6 Противопоказания к применению:

Противопоказания не выявлены.
Не применять не по назначению.

1.7 Побочные эффекты:

При правильном использовании станка побочные эффекты не выявлены.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики станка приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
2.1.1 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	(1815x1270x1200) ±20
2.1.2 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	(1200x195x310) ±20
2.1.3 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-53	(1250x350x200) ±20
2.1.4 Максимально равномерно распределенная нагрузка (на каждое место), кг:	170
2.1.5 Материал	сталь
2.1.6 Условия эксплуатации (температура)	от минус 50 до плюс 45 °С
2.1.7 Средний срок службы, лет	5
2.1.8 Масса, кг	23,0±1,0
в том числе:	
2.1.9 Масса сумки транспортировочной СУ-53, кг	1,0±0,2

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Количество
Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ	БВТГ 942868.001	1
Сумка транспортировочная СУ-53	БВТГ 6.830.111-31	1
Паспорт	БВТГ 942868.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942868.001 РЭ	1

4 Устройство

4.1 Общий вид станка приведен на рисунке 1.

4.2 Станок состоит из двух стоек (1), соединенных между собой стяжками (2, 3). Стойки в рабочем положении фиксируются распорками (4).

4.3 На стойках размещены верхние (5) и нижние (6) перекладки, служащие для установки носилок.

4.4 Верхние перекладки (5) в рабочем положении удерживаются распорками (7).

4.5 Нижние перекладки (6) опираются на ножки (8) с опорами (13) и фиксируются в рабочем положении распорками (9).

4.6 Для фиксации распорок (4, 7, 9) в рабочем положении на кронштейнах стоек (1) предусмотрены пружинные фиксаторы (10, 11, 12).

4.7 Станок в сложенном виде приведен на рисунке 2.

5 Порядок работы

5.1 Установку станка в рабочее положение (рисунок 3) производить в следующей последовательности:

- извлечь станок из сумки транспортировочной;

I

- оттянув штоки фиксаторов (10) освободить стяжки (2) от закрепления их в кронштейнах (14) стоек (1);

- растянуть стойки (1), отклонив их от вертикали и поднять распорки (4) таким образом, чтобы их свободные концы были несколько выше кронштейнов (14) стоек (1);

- установить стойки (1) в вертикальное положение;


- распорки (4) вставить в кронштейны (14), зафиксировав их в рабочем положении фиксаторами (10);

II

- привести нижние переключатели (6) в рабочее положение для чего, повернув переключатели (6) в горизонтальное положение - развернуть до упора ножки (8) перевести в рабочее положение опоры (13) и, вставив распорки (9) в кронштейны (15), зафиксировать их фиксаторами (11);

III

- установить в рабочее положение переключатели верхние (5) для чего, оттянув штоки фиксаторов (12) повернуть переключатели верхние (5) в горизонтальное положение, установить распорки (7) в кронштейны (16) и зафиксировать их в рабочем положении фиксаторами (12).

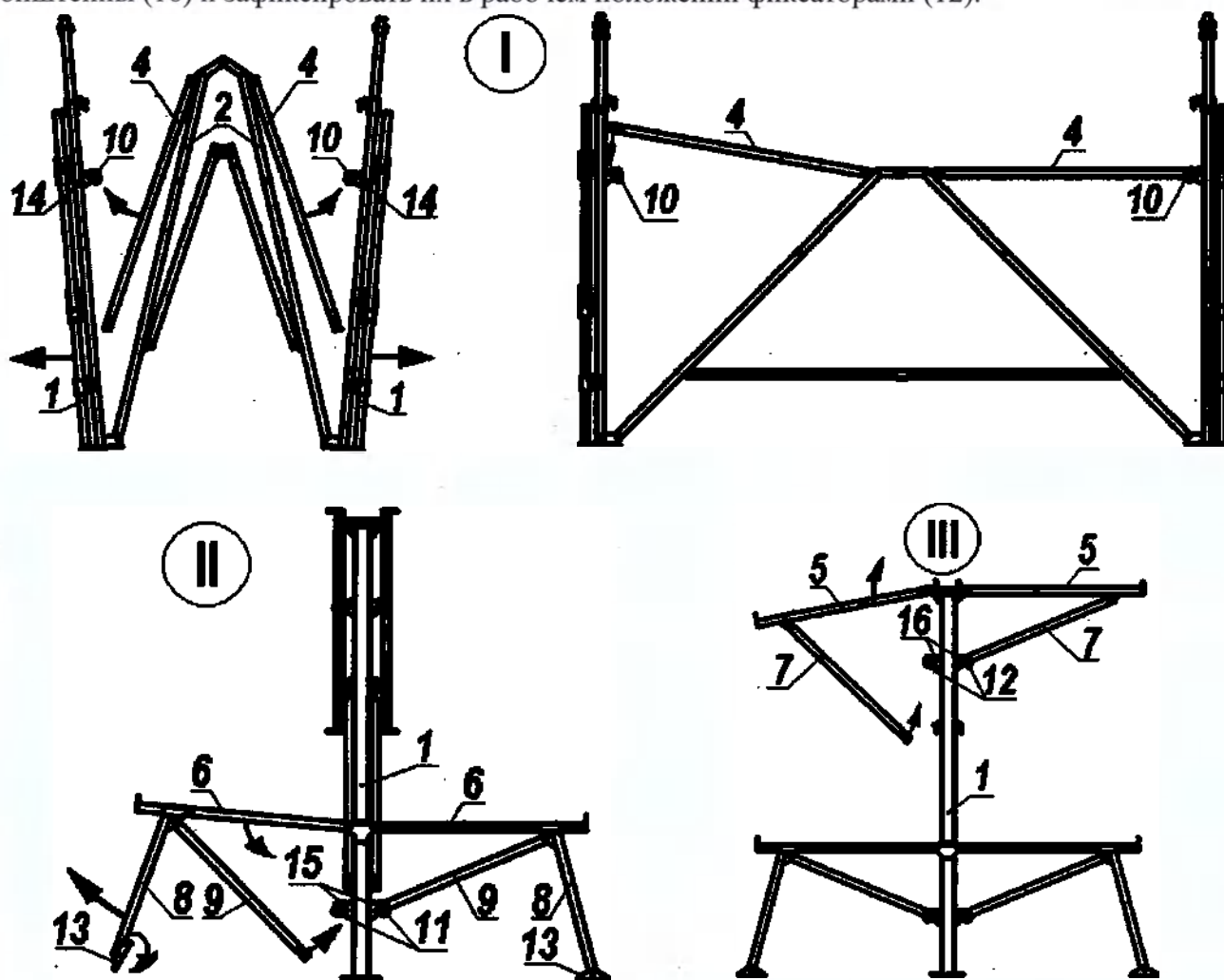

1 – стойка; 2 – стяжки; 4, 7, 9 – распорки; 5 – переключатель верхний; 6 – переключатель нижний;
8 – ножка; 10, 11, 12 – фиксаторы; 13 – опоры; 14, 15, 16 – кронштейны стоек

Рисунок 3 – Установка станка в рабочее положение

5.2 Перевод станка из рабочего положения в сложенное (рисунок 4) производить в следующей последовательности:

I

- для каждой перекладки верхней (5), оттянуть шток фиксатора (12) и повернуть распорку (7), установив ее вдоль перекладки (5);
- повернуть распорку (7) вместе с перекладкой (5) в вертикальное положение вдоль стойки (1) и зафиксировать их в кронштейне (16) штоком фиксатора (12);

II

- поочередно оттянуть шток фиксатора (11) и освободить распорку (9) из кронштейна (15);
- повернуть перекладку (6) до установки ее в положение вдоль стойки (1);
- опору (13) и распорку (9) уложить вдоль ножки (8) и повернуть их вверх в положение вдоль перекладки (6);

III

- оттянуть штоки фиксаторов (10) и приподнять распорки (4);
- отклонить наружу на небольшой угол стойки (1) и уложить распорки (4) на стяжки (2);
- IV - приподнять вверх шарнирный узел, расположенный между стяжками (3), и сдвинуть стойки 1;
- уложить станок в сумку транспортировочную.


5.3 Станок с установленными носилками приведен на рисунке 5.

5.4 Размещение пациентов в два яруса без разворачивания одной из сторон станка – рисунок 6.



ВНИМАНИЕ:

При переводе станка в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь ручки от защемления.

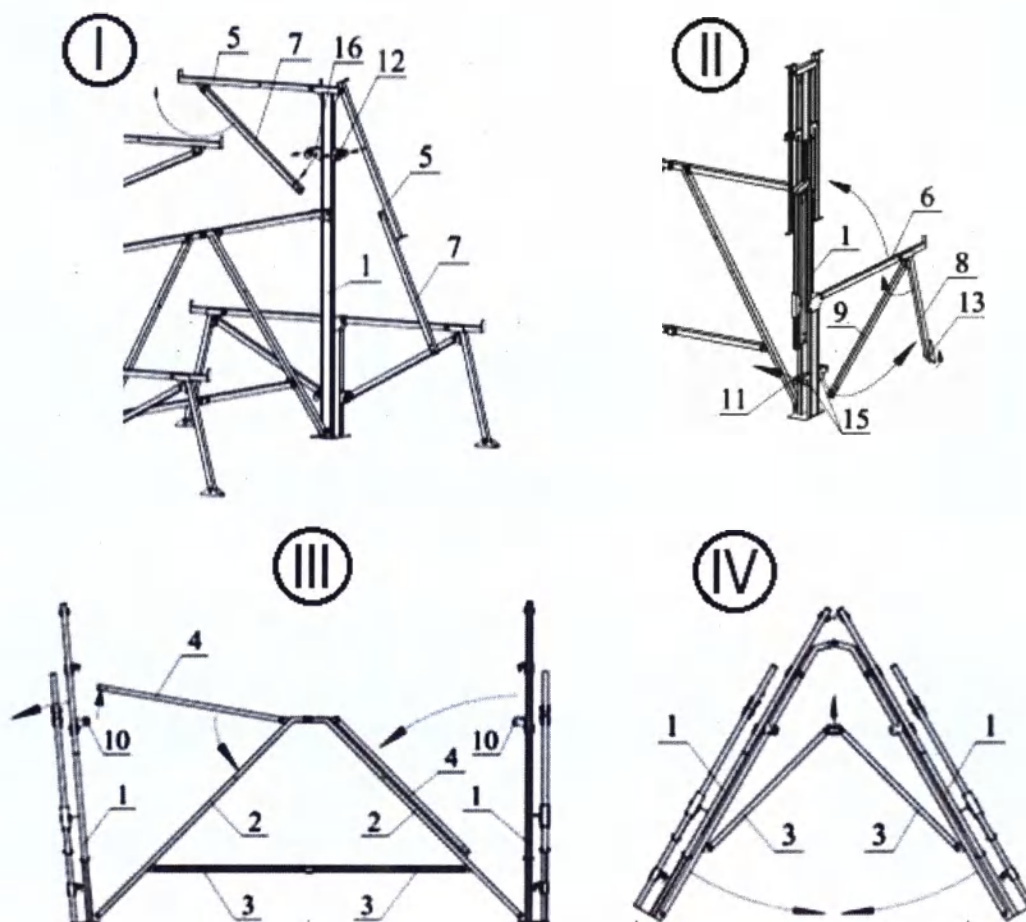

1 – стойка; 2, 3 – стяжки; 4, 7, 9 – распорки; 5 – перекладка верхняя; 6 – перекладка нижняя;
8 – ножка; 10, 11, 12 – фиксаторы; 13 – опоры; 14, 15, 16 – кронштейны стоек

Рисунок 4 – Перевод станка из рабочего положения в сложенное



Рисунок 5
Станок с установленными носилками

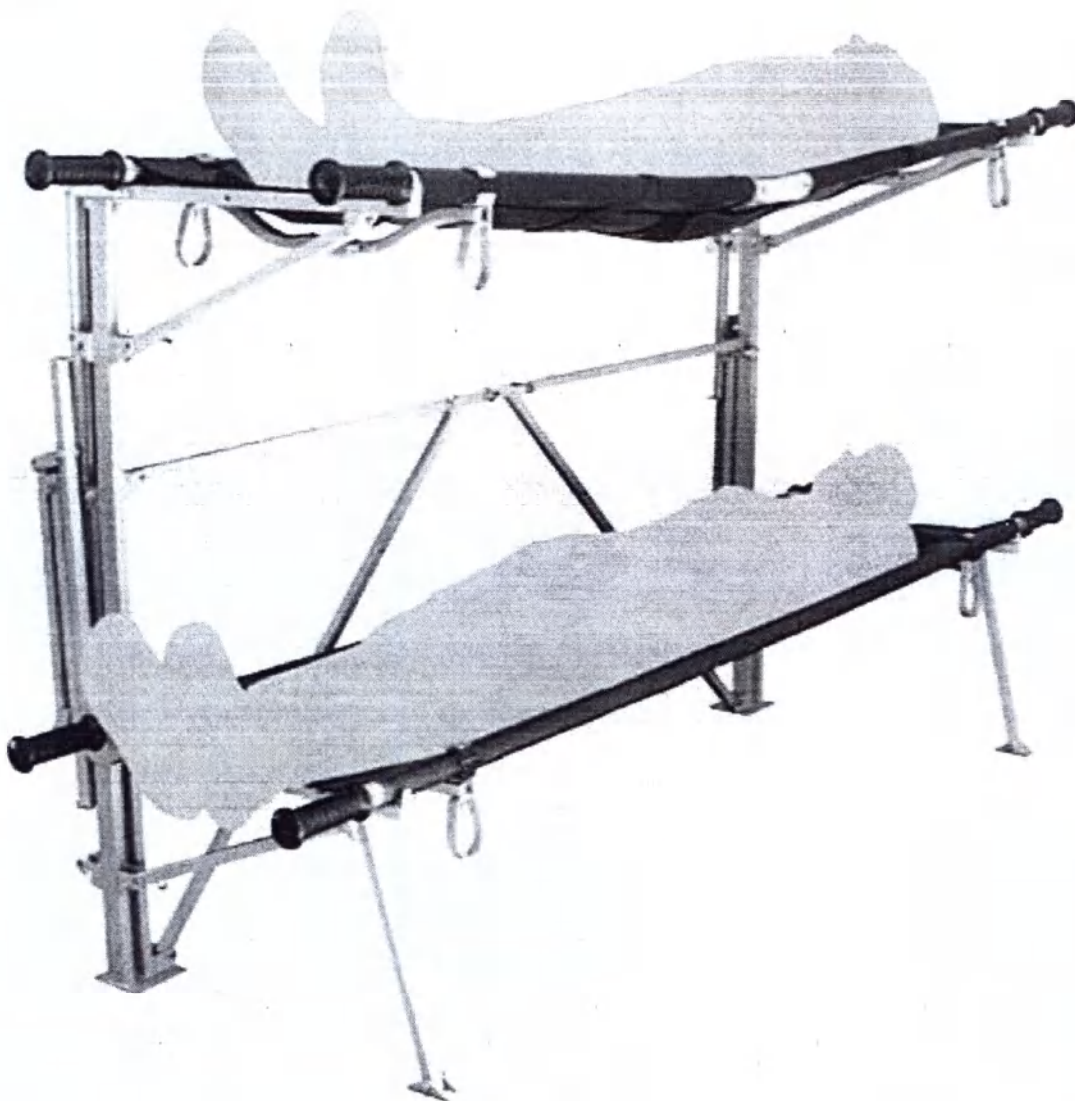


Рисунок 6

Размещение пациентов в два яруса без разворачивания одной из сторон станка

6 Меры безопасности

- 6.1 Станки предназначены для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации.
- 6.2 Медицинские работники должны работать в перчатках.
- 6.3 При транспортировке станка и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделия.
- 6.4 Не нагружайте каждую сторону одного яруса станка более, чем на 170 кг.
- 6.5 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего паспорта.

Внимание! Запрещается:



- Эксплуатировать изделие с видимыми дефектами, а также с нарушениями структуры материалов;
- Использовать изделие не по назначению.

7 Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.
- 7.2 Перед применением изделий должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий.
- 7.3 Дезинфекция осуществляется химическим методом путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции необходимо тщательно просушить.

8 Транспортирование и хранение

- 8.1 Транспортирование станков может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.
- 8.2 Станки могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован).
- 8.3 При хранении станков допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

- 9.1 При маркировании станка (на изделии, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
	Код партии		Изготовитель		Дата изготовления
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз			Диапазон влажности Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз	
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны.				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги		Верх Указывает правильное вертикальное положение груза		Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
					Предел по количеству ярусов в штабеле Штабелировать не более 2 ярусов

- 9.2 Внешний вид маркировки станка приведен на рисунке 7.
- 9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 8.
- 9.4 Маркировка на сумке транспортировочной – рисунок 9.



Рисунок 7

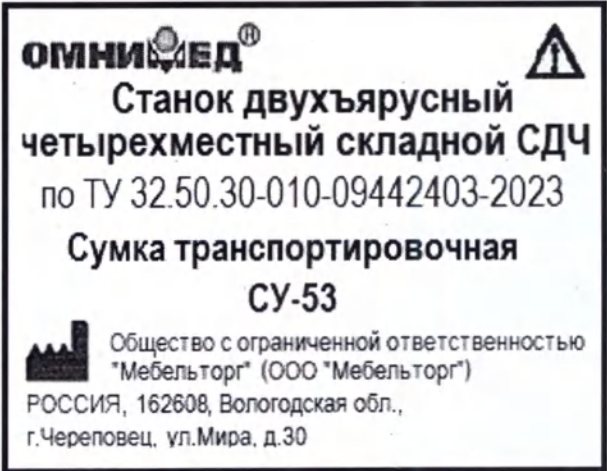


Рисунок 8

ОМНИЭД

Станок двухъярусный

четырёхместный складной СДЧ

по ТУ 32.50.30-010-09442403-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20650 от 19 07 2023 года

Условия транспортирования

+50°C

-50°C

100%

Условия хранения

+40°C

-50°C

98%

↑↑

☂

🍷

📦 2

LOT

Масса _____ кг

Число изделий _____ шт.

Дата упаковывания _____

Штамп ОТК

Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)

РОССИЯ, 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30

Тел.: 8 (8202) 54-10-54

Рисунок 8

10 Утилизация

- 10.1 Станки не содержат в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.
- 10.2 При нормальной эксплуатации изделия не оказывают негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе изделие не содержат драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.
- 10.3 Утилизация станков и их частей осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Изделие после окончания использования может утилизироваться как отходы класса А в соответствии с действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов.
- 10.4 Неиспользованные станки специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Станок не взрывоопасен, не способен самовозгораться, при поднесении открытого огня горит без взрыва.

11 Гарантии изготовителя

- 11.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 11.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
- 11.3 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.
- 11.4 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.
- 11.5 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего паспорта, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.
- 11.6 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12 Информация о производителе

12.1 Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

13 Свидетельство о приемке

13.1 Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ

Код партии _____

соответствует ТУ 32.50.30-010-09442403-2023 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Начальник ОТК _____
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Штамп ОТК

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 12 листов.
Генеральный директор
ООО «Омнимед-НН»

А.В. Лаврентьев

