

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»

А.В.Лаврентьев



25 апреля 2023 г.

**ТУМБОЧКА СКЛАДНАЯ Тм
ПО ТУ 32.50.30-014-09442403-2023**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВТГ 942866.001 РЭ

**ООО «Омнимед-НН»
г. Нижний Новгород
Россия**

Содержание

1	Основные сведения и технические данные.....	4
1.1	Наименование изделий в зависимости от исполнения.....	4
1.2	Назначение.....	4
1.3	Область применения.....	4
1.4	Условия применения.....	4
1.5	Потенциальный потребитель.....	4
1.6	Показания к применению.....	4
1.7	Противопоказания к применению.....	4
1.8	Побочные эффекты.....	4
2	Основные технические характеристики.....	5
3	Комплектность.....	5
4	Варианты исполнения изделий.....	6
5	Меры безопасности.....	8
6	Указания по эксплуатации.....	8
7	Техническое обслуживание.....	8
8	Транспортирование и хранение.....	8
9	Сведения о маркировке.....	9
10	Упаковка.....	10
11	Утилизация.....	11
12	Гарантии изготовителя.....	11
13	Послегарантийное техническое обслуживание.....	11
	Приложение А (справочное) Перечень ссылочных документов.....	12
	Приложение Б (справочное) Устройство и внешний вид изделий.....	13

Руководство по эксплуатации, далее – РЭ, предназначено для ознакомления с медицинским изделием «Тумбочка складная Тм по ТУ 32.50.30-014-09442403-2023», далее – тумбочка:

Тумбочка складная Тм, в составе:

- Тумбочка складная Тм – 1 шт.
- Сумка транспортировочная СУ-49 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Информация о производителе

Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

РЭ содержит описание изделий, их устройство, принцип работы, и устанавливает правила эксплуатации (транспортирования и хранения, применения, утилизации и пр.).

ВНИМАНИЕ!



- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией.

- При эксплуатации тумбочки необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.

- Медицинские работники должны работать в перчатках в соответствии с СанПиН 2.1.3678.

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Наименование изделий в зависимости от исполнения

Тумбочка складная Тм по ТУ 32.50.30-014-09442403-2023

1.2 Назначение

Тумбочка предназначена для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала и медицинской посуды, в мобильных и стационарных медицинских комплексах различного профиля.

1.3 Область применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Условия применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.5 Потенциальный потребитель

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.6 Показания к применению

Предназначена для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала и медицинской посуды, в мобильных и стационарных медицинских комплексах различного профиля.

1.7 Противопоказания к применению

Противопоказания не выявлены.

Не применять не по назначению.

1.8 Побочные эффекты

При правильном использовании изделий побочные эффекты не выявлены.

В зависимости от степени потенциального риска применения изделие относится к классу — 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2012 года №4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий — 370490 (Тумбочка складная для оснащения медицинских объектов в полевых условиях).

Вид климатического исполнения – У категории 1 по ГОСТ 15150.

2 Основные технические характеристики

2.1 Тумбочка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящих технических условий, комплекту конструкторской документации **БВТГ 942866.001**.

2.2 Технические характеристики тумбочки должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 и приложению Б

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	(505x450x680) ±10
Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	(680x165x505) ±10
Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-49, мм	(690x180x520) ±20
Допустимая нагрузка на полку, кг	10
Материал	сплав алюминиевый
Условия эксплуатации (температура)	от минус 50 до плюс 45 °С
Средний срок службы, лет:	5
Масса, кг	12,0±1,0
в том числе:	
Масса сумки транспортировочной СУ-49, кг	1,0±0,2

3 Комплектность

3.1 Комплектность должна соответствовать приведенной в таблице 2.

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол. шт.
Тумбочка складная Тм		
Тумбочка складная Тм	БВТГ 942866.001	1
Сумка транспортировочная СУ-49	БВТГ 6.830.111-27	1
Паспорт	БВТГ 942866.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942866.001 РЭ	1

4 Варианты исполнения изделий

4.1 Тумбочка складная ТМ по ТУ 32.50.30-014-09442403-2023:

Тумбочка складная ТМ, далее – тумбочка, предназначена для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала и медицинской посуды, в мобильных и стационарных медицинских комплексах различного профиля.

4.1.1 Устройство

Общий вид тумбочки приведен на рисунке 1.

Тумбочка состоит из передней стенки (1), крышки (2), задней стенки (3), четырех створок (4) и дна (5). Рабочее положение тумбочки фиксируется съемной полкой (6).

Стенка передняя (1) представляет собой раму с закрепленными на ней на рояльных петлях дверцами.

Стенка задняя (3) является основанием, к которому крепятся на рояльных петлях крышка (2), дно (5) и створки (4).

Створки (4) крепятся на рояльных петлях между собой и к раме передней стенки (1).

В нижней части задней стенки (3) и на дне (5) установлены четыре регулируемые опоры (8).

Полка (6) может быть установлена на одном из двух уровней.

На дверце передней стенки (1) установлен замок (7). Тумбочка запирается на ключ.



Рисунок 1

4.1.2 Порядок работы

Установку тумбочки в рабочее положение (рисунок 2) производить в следующей последовательности:

- извлечь тумбочку из сумки транспортировочной;
- поставить тумбочку в сложенном виде на нижнюю часть задней стенки;
- опустить дно, поднять крышку (по стрелкам А и Б) и вынуть полку;
- придерживая крышку параллельно дну, выдвинуть вперед, избегая перекоса, стенку переднюю с дверцами (по стрелке В), при этом створки развернутся на рояльных петлях;
- установить полку на одном из двух уровней;
- проверить устойчивость тумбочки, отрегулировав при необходимости высоту регулируемых опор (8).

Перевод тумбочки из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- приподнять крышку (2) и, нажав на створки (4), сложить их вместе с дверцами на заднюю стенку (3);
- уложить на дверцы полку (6);
- сложить дно (5) и крышку (2), уложив их на дверцы;
- уложить тумбочку в сумку транспортировочную.

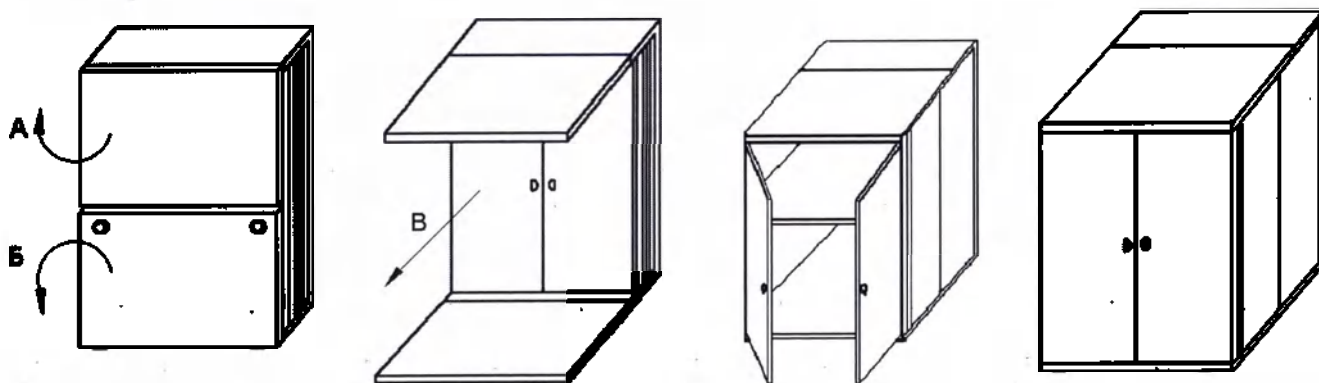


Рисунок 2



ВНИМАНИЕ:

При переводе тумбочки в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления

5 Меры безопасности

- 5.1 Тумбочка в зависимости от степени потенциального риска применения относится к классу 1 согласно ГОСТ 31508 и Приказу МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г.
- 5.2 Тумбочки предназначены для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации. При работе с тумбочкой соблюдайте правила транспортировки пациента, принятые в медицине.
- 5.3 Перед началом работы с тумбочкой внимательно ознакомьтесь с настоящим РЭ.
- 5.4 При транспортировке тумбочек и работе с ними избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделия.
- 5.5 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего РЭ.
- 5.6 Убирайте изделия в сумки только после их обработки и сушки.

Запрещается:



- Эксплуатировать изделия без ознакомления с эксплуатационной документацией;
- Использовать изделия не по назначению.

6 Указания по эксплуатации

- 6.1 При эксплуатации тумбочки должны соблюдаться правила безопасности, изложенные в разделе 5 настоящего РЭ.
- 6.2 К эксплуатации допускаются медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.
- 6.3 Медицинские работники должны работать в перчатках с СанПиН 2.1.3678.

7 Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.
- 7.2 Перед применением изделий должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий
- 7.3 Дезинфекция осуществляется химическим методом по МУ 287-113 путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177 с 0,5% добавлением моющего средства ГОСТ 25644. Протрите поверхности изделий марлевым тампоном или губкой. Для очистки изделий не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции изделия необходимо тщательно просушить.

8 Транспортирование и хранение

- 8.1 Транспортирование изделий может производиться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.2 Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов по ГОСТ Р 50444, должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.).

8.3 Изделия могут храниться на складах по ГОСТ Р 50444, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С). Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован). При хранении изделий допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

9.1 При маркировании изделий (на изделии, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
	Код партии (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		Изготовитель (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		Дата изготовления (ГОСТ Р ИСО 15223-1)
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)			Диапазон влажности. Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)	
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны. (ГОСТ Р ИСО 15223-1)				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги (ГОСТ 14192)		Верх Указывает правильное вертикальное положение груза (ГОСТ 14192)		Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом (ГОСТ 14192)
					Предел по количеству ярусов в штабеле Штабелировать не более 2 ярусов (ГОСТ 14192)

9.2 Внешний вид маркировки тумбочки приведен на рисунке 3.

9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 4.



Рисунок 3



Рисунок 4

ОМНИМЕД

⚠

Тумбочка складная Тм

по ТУ 32.50.30-014-09442403-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20648 от 19.07.2023 года

Условия транспортирования

 -50°C / +50°C

Условия хранения

 -50°C / +40°C

Масса _____ кг

Число изделий _____ шт.

Дата упаковки _____

Штамп
ОТК

LOT _____

Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
 РОССИЯ, 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
 Тел. 8 (8202) 64-10-54

Рисунок 5

10 Упаковка

10.1 В качестве упаковки используются сумки транспортировочные, изготовленные в соответствии с комплектом конструкторской документации.

10.2 Изделия помещаются в сумки транспортировочные.

10.3 Каждая сумка имеет ярлык (рисунок 5), на котором указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;
- адрес и номер телефона предприятия-изготовителя;
- товарный знак уполномоченного представителя производителя;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименование изделия;
- номер регистрационного удостоверения;
- масса;
- число изделий в упаковке;
- месяц и год упаковки;
- штамп ОТК;
- знаки и символы, приведенные в таблице 3.

11 Утилизация

- 11.1 Тумбочка не содержит в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.
- 11.2 При нормальной эксплуатации тумбочка не оказывает негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе тумбочки не содержат драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.
- 11.3 Утилизация тумбочек осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Тумбочки после окончания использования могут утилизироваться как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов
- 11.4 Неиспользованные тумбочки специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Изделия не взрывоопасны, не способны самовозгораться, при поднесении открытого огня горят без взрыва.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

12.4 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.

12.5 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.

12.6 Гарантийные требования реализуются при предъявлении эксплуатационной документации, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.

12.7 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

13 Послегарантийное техническое обслуживание


Послегарантийное техническое обслуживание проводится производителем или обслуживающими организациями, уполномоченными на это производителем (имеющими письменное разрешение).

Приложение А
(справочное)
Перечень ссылочных документов

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
Приказ МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ТУ 32.50.30-014-09442403-2023	Тумбочка складная Тм. Технические условия

Приложение Б
(справочное)
Устройство и внешний вид изделия

Б.1 Внешний вид тумбочки приведен на рисунке Б.1

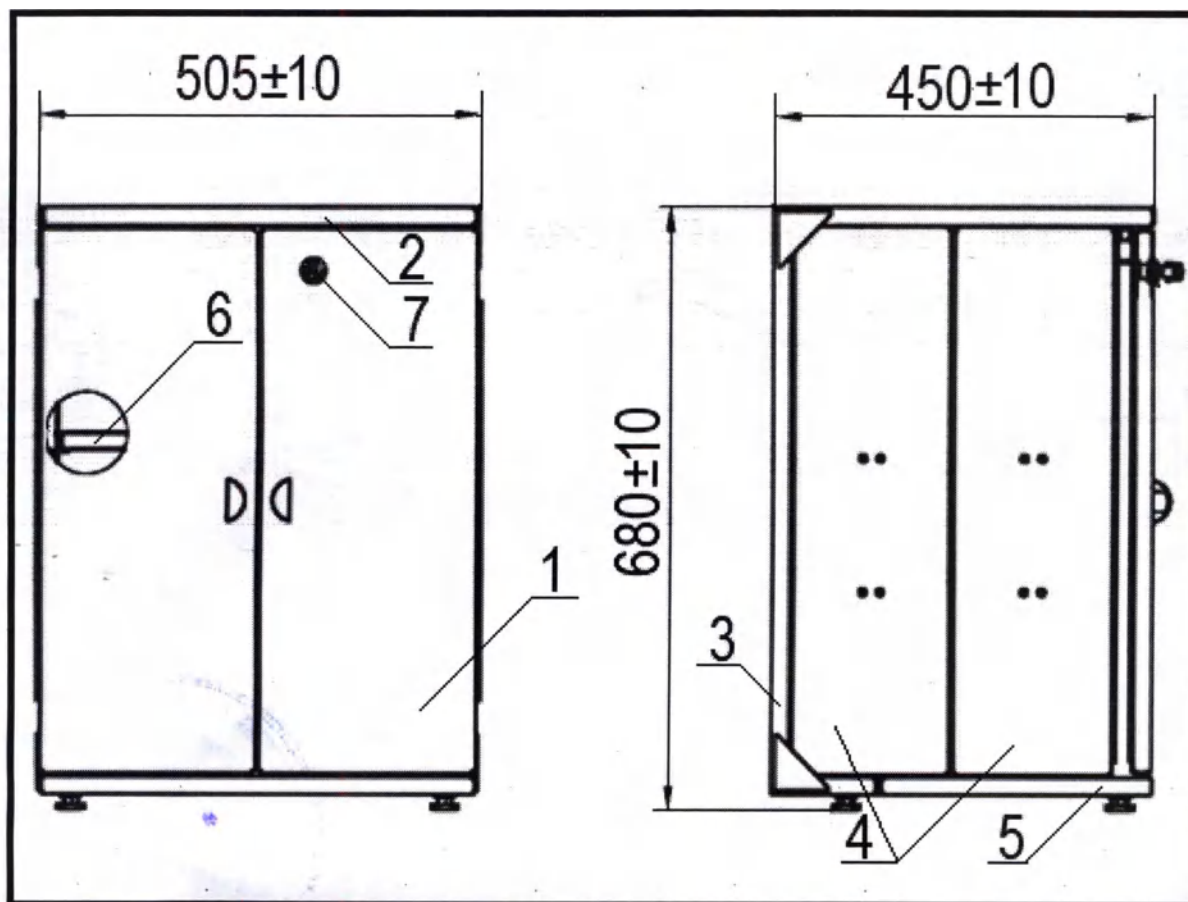

1 – стенка передняя; 2 – крышка; 3 – стенка задняя; 4 – створки;

5 – дно; 6 – полка; 7 – замок

Рисунок Б.1

Тумбочка складная Тм по ТУ 32.50.30-014-09442403-2023, БВТГ 942866.001

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 13 листов.
Генеральный директор
ООО «Омнимед-НН»

А.В. Лаврентьев



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»

А.В.Лаврентьев



2023 г.

**ТУМБОЧКА СКЛАДНАЯ Тм
ПО ТУ 32.50.30-014-09442403-2023**

ПАСПОРТ

БВТГ 942866.001 ПС

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20648 от 19.07.2023 года



Внимание!

Перед началом эксплуатации необходимо
внимательно ознакомиться с настоящим паспортом

г. Нижний Новгород
Россия

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием основные характеристики медицинского изделия: «Тумбочка складная Тм по ТУ 32.50.30-014-09442403-2023», далее – тумбочка.

Паспорт предназначен для ознакомления с устройством тумбочки и ее правильной эксплуатацией.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение изделия

Тумбочка предназначена для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала и медицинской посуды, в мобильных и стационарных медицинских комплексах различного профиля.

1.2 Область применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.3 Условия применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Потенциальный потребитель:

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.5 Показания к применению:

Предназначена для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала и медицинской посуды, в мобильных и стационарных медицинских комплексах различного профиля.

1.6 Противопоказания к применению:

Противопоказания не выявлены.
Не применять не по назначению.

1.7 Побочные эффекты:

При правильном использовании тумбочки побочные эффекты не выявлены.

Технические характеристики

2.1 Технические характеристики тумбочки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
2.1.1 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	(505x450x680) ±10
2.1.2 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	(680x165x505) ±10
2.1.3 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-49, мм	(690x180x520) ±20
2.1.4 Допустимая нагрузка на полку, кг	10
2.1.5 Материал	сплав алюминиевый
2.1.6 Условия эксплуатации (температура)	от минус 50 до плюс 45 °С
2.1.7 Средний срок службы, лет:	5
2.1.8 Масса, кг	12,0±1,0
в том числе:	
2.1.9 Масса сумки транспортировочной СУ-49, кг	1,0±0,2

3 Комплектность


3.1 Комплект поставки должен соответствовать приведенному в таблице 2.

Таблица 2


Наименование и условное обозначение	Обозначение	Количество
Тумбочка складная Тм	БВТГ 942866.001	1
Сумка транспортировочная СУ-49	БВТГ 6.830.111-27	1
Паспорт	БВТГ 942866.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942866.001 РЭ	1

4 Устройство

- 4.1 Общий вид тумбочки приведен на рисунке 1.
- 4.2 Тумбочка состоит из передней стенки (1), крышки (2), задней стенки (3), четырех створок (4) и дна (5). Рабочее положение тумбочки фиксируется съемной полкой (6).
- 4.3 Стенка передняя (1) представляет собой раму с закрепленными на ней на рояльных петлях дверцами.
- 4.4 Стенка задняя (3) является основанием, к которому крепятся на рояльных петлях крышка (2), дно (5) и створки (4).
- 4.5 Створки (4) крепятся на рояльных петлях между собой и к раме передней стенки (1).
- 4.6 В нижней части задней стенки (3) и на дне (5) установлены четыре регулируемые опоры (8).
- 4.7 Полка (6) может быть установлена на одном из двух уровней.
- 4.8 На дверце передней стенки (1) установлен замок (7). Тумбочка запирается на ключ.

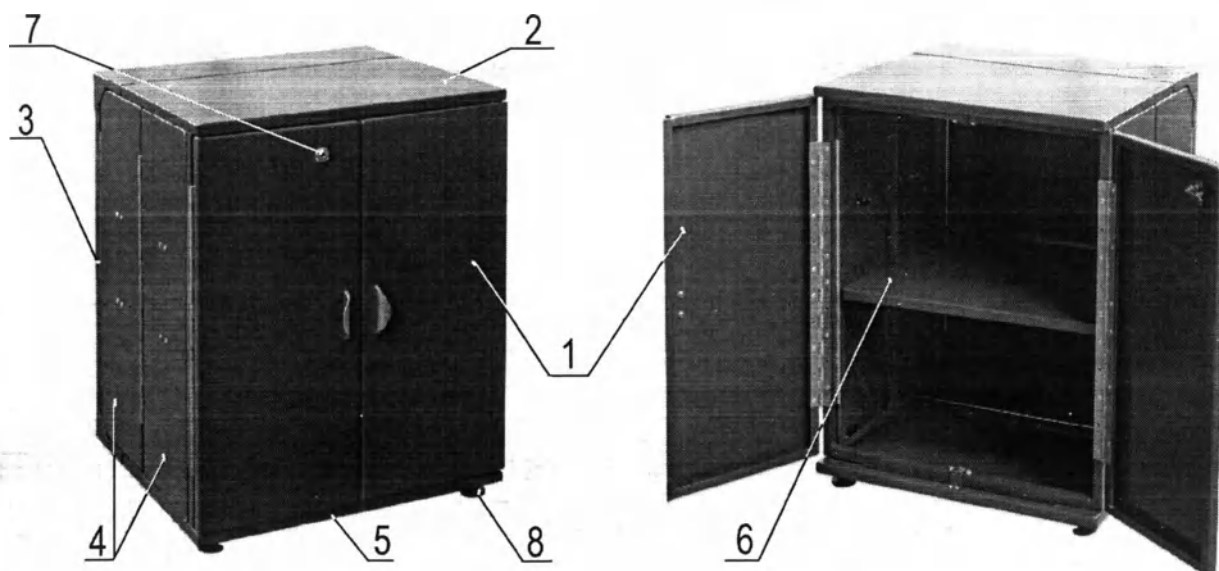

Тумбочка в сложенном виде

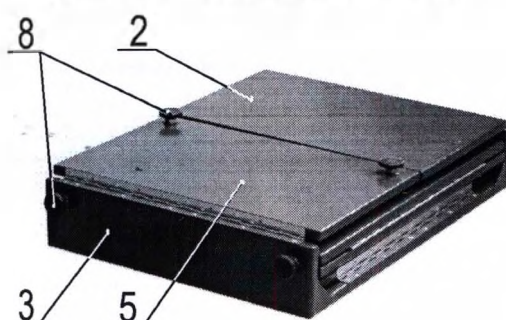

- 1 – стенка передняя;
- 2 – крышка;
- 3 – стенка задняя;
- 4 – створки;
- 5 – дно;
- 6 – полка;
- 7 – замок;
- 8 – регулируемые опоры

Рисунок 1

5 Порядок работы

5.1 Установку тумбочки в рабочее положение (рисунок 2) производить в следующей последовательности:

- извлечь тумбочку из сумки транспортировочной;
- поставить тумбочку в сложенном виде на нижнюю часть задней стенки;
- опустить дно, поднять крышку (по стрелкам А и Б) и вынуть полку;
- придерживая крышку параллельно дну, выдвинуть вперед, избегая перекоса, стенку переднюю с дверцами (по стрелке В), при этом створки развернутся на рояльных петлях;
- установить полку на одном из двух уровней;
- проверить устойчивость тумбочки, отрегулировав при необходимости высоту регулируемых опор (8).

5.2 Перевод тумбочки из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- приподнять крышку (2) и, нажав на створки (4), сложить их вместе с дверцами на заднюю стенку (3);
- уложить на дверцы полку (6);
- сложить дно (5) и крышку (2), уложив их на дверцы;
- уложить тумбочку в сумку транспортировочную.



ВНИМАНИЕ:

При переводе тумбочки в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь ручки от защемления.

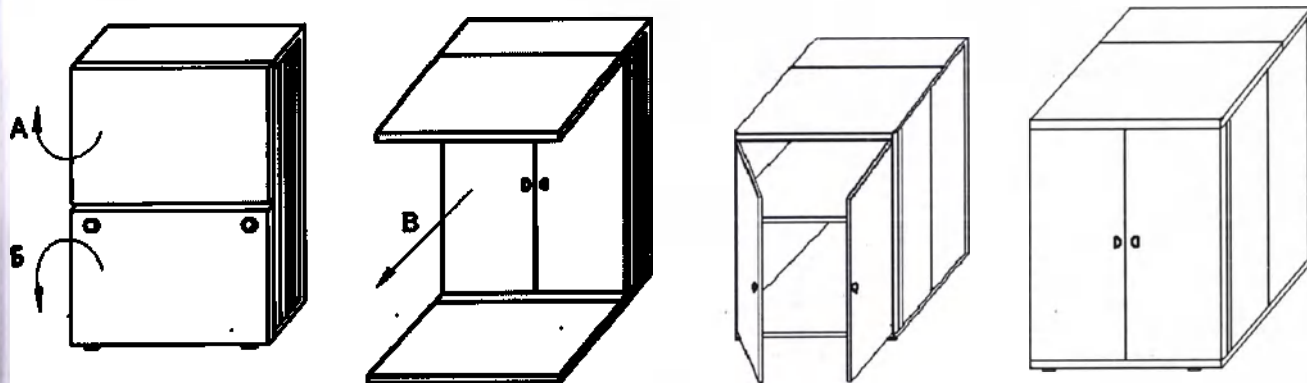


Рисунок 2

6 Меры безопасности

- 6.1 Тумбочка предназначена для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации.
- 6.2 Медицинские работники должны работать в перчатках.
- 6.3 При транспортировке тумбочки и работе с ней избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделия.
- 6.4 Не нагружайте крышку и полку тумбочки более, чем на 10 кг.
- 6.5 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего паспорта.

Внимание! Запрещается:



- Эксплуатировать тумбочку с видимыми дефектами, а также с нарушениями структуры материалов;
- Использовать тумбочку не по назначению.

7 Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.
- 7.2 Перед применением изделий должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий.
- 7.3 В случае загрязнения проведите дезинфекцию. Дезинфекция осуществляется химическим методом путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции необходимо тщательно просушить.

- 8.1 Транспортирование тумбочек может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.
- 8.2 Тумбочки могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован).
- 8.3 При хранении тумбочек допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

- 9.1 При маркировании тумбочки (на изделии, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
	Код партии		Изготовитель		Дата изготовления
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз			Диапазон влажности Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз	
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны.				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги		Верх Указывает правильное вертикальное положение груза		Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
					Предел по количеству ярусов в штабеле Штабелировать не более 2 ярусов

- 9.2 Внешний вид маркировки тумбочки приведен на рисунке 3.
- 9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 4.
- 9.4 Маркировка на сумке транспортировочной – рисунок 5

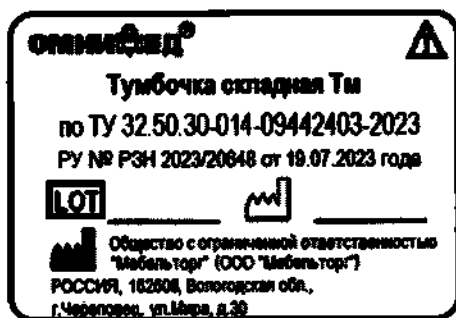


Рисунок 3

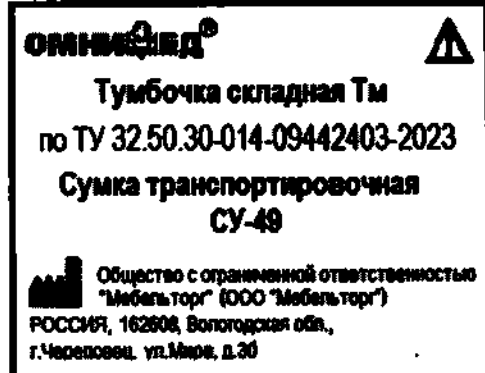


Рисунок 4



Рисунок 5

10 Утилизация

- 10.1 Тумбочки не содержат в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.
- 10.2 При нормальной эксплуатации тумбочки не оказывают негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе тумбочка не содержит драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.
- 10.3 Утилизация тумбочки и ее частей осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Тумбочка после окончания использования может утилизироваться как отходы класса А в соответствии с действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов.
- 10.4 Неиспользованные тумбочки специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Тумбочка не взрывоопасна, не способна самовозгораться, при поднесении открытого огня горит без взрыва.

11 Гарантии изготовителя

- 11.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 11.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
- 11.3 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.
- 11.4 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.

- 11.5 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего паспорта, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.
- 11.6 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

12 Информация о производителе

12.1 Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

3 Свидетельство о приемке

13.1 Тумбочка складная Тм

Код партии _____

соответствует ТУ 32.50.30-014-09442403-2023 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Начальник ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Штамп ОТК

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 8 листов.
Генеральный директор
ООО «Оптимед-НН»

А.В. Лаврентьев

