

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»



А.В.Лаврентьев

2023 г.

**СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ СИ
ПО ТУ 32.50.30-011-09442403-2023**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВТГ 942813.001 РЭ

**ООО «Омнимед-НН»
г. Нижний Новгород
Россия**

Содержание

1	Основные сведения и технические данные.....	3
1.1	Наименование изделий в зависимости от исполнения.....	4
1.2	Назначение.....	4
1.3	Область применения	4
1.4	Условия применения.....	4
1.5	Потенциальный потребитель	4
1.6	Показания к применению	4
1.7	Противопоказания к применению	4
1.8	Побочные эффекты	4
2	Основные технические характеристики.....	5
3	Комплектность.....	5
4	Варианты исполнения изделий	6
5	Меры безопасности	7
6	Указания по эксплуатации.....	8
7	Техническое обслуживание.....	8
8	Транспортирование и хранение	8
9	Сведения о маркировке.....	9
10	Упаковка.....	10
11	Утилизация.....	11
12	Гарантии изготовителя.....	11
13	Послегарантийное техническое обслуживание.....	11
	Приложение А (справочное) Перечень ссылочных документов.....	12
	Приложение Б (справочное) Устройство и внешний вид изделий	13

Руководство по эксплуатации, далее – РЭ, предназначено для ознакомления с медицинским изделием «Столик инструментальный складной СИ по ТУ 32.50.30-011-09442403-2023», далее – столик:

Столик инструментальный складной СИ, в составе:

- Столик инструментальный складной СИ – 1 шт.
- Сумка транспортировочная СУ-29 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Информация о производителе

Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

РЭ содержит описание изделий, их устройство, принцип работы, и устанавливает правила эксплуатации (транспортирования и хранения, применения, утилизации и пр.).

ВНИМАНИЕ!



- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией.
- При эксплуатации столиков необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.
- Медицинские работники должны работать в перчатках в соответствии с СанПиН 2.1.3678.

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Наименование изделий в зависимости от исполнения

Столик инструментальный складной СИ по ТУ 32.50.30-011-09442403-2023

1.2 Назначение

Столик предназначен для размещения хирургического инструмента, перевязочного материала и лечебных средств во время проведения медицинских мероприятий.

1.3 Область применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Условия применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.5 Потенциальный потребитель

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.6 Показания к применению

Для размещения хирургического инструмента, перевязочного материала и лечебных средств во время проведения медицинских мероприятий.

1.7 Противопоказания к применению

Противопоказания не выявлены.
Не применять не по назначению.

1.8 Побочные эффекты

При правильном использовании столика побочные действия не выявлены.

Климатическое исполнение У категории 1 по ГОСТ 15150.

Столик в зависимости от потенциального риска применения относится к классу 1 по ГОСТ 31508 и Приказу МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г.

Вид медицинского изделия 370510 «Стол для инструментов складной для оснащения медицинских объектов в полевых условиях»

Столик в зависимости от воспринимаемых механических воздействий относится к группе 5 по ГОСТ Р 50444.

2 Основные технические характеристики

- 2.1 Столик должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации БВТГ 942813.001.
- 2.2 Технические характеристики столика должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 и приложению Б.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
2.2.1 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	$(600 \times 465) \pm 10$ $\times (820 \dots 1200) \pm 10$
2.2.2 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	$(700 \times 465 \times 260) \pm 10$
2.2.3 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-29:	$(720 \times 250 \times 460) \pm 20$
2.2.4 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг:	15
2.2.5 Материал:	сталь, нержавеющая сталь
2.2.6 Условия эксплуатации (температура):	от минус 50 до плюс 45 °С
2.2.7 Средний срок службы, лет:	5
2.2.8 Масса, кг:	$11,5 \pm 1,0$
в том числе:	
2.2.9 Масса сумки транспортировочной СУ-29, кг:	$1,2 \pm 0,2$

3 Комплектность

- 3.1 Комплектность должна соответствовать приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол. шт.
Столик инструментальный складной СИ		
Столик инструментальный складной СИ	БВТГ 942813.001	1
Сумка транспортировочная СУ-29	БВТГ 6.830.111-10	1
Паспорт	БВТГ 942813.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942813.001 РЭ	1

4 Варианты исполнения изделий


4.1 Столик инструментальный складной СИ по ТУ 32.50.30-011-09442403-2023:

Столик инструментальный складной СИ, далее – столик, предназначен для размещения хирургического инструмента, перевязочного материала и лечебных средств во время проведения медицинских мероприятий.


4.1.1 Устройство

Общий вид столика приведен на рисунке 1.

Столик состоит из основания (1), двух роликовых опор, оснащенных тормозами, столешницы (2), закрепленной на складывающейся телескопической стойке (3), фиксаторов (4, 5, 6), жестко скрепляющих складную конструкцию в рабочем положении.

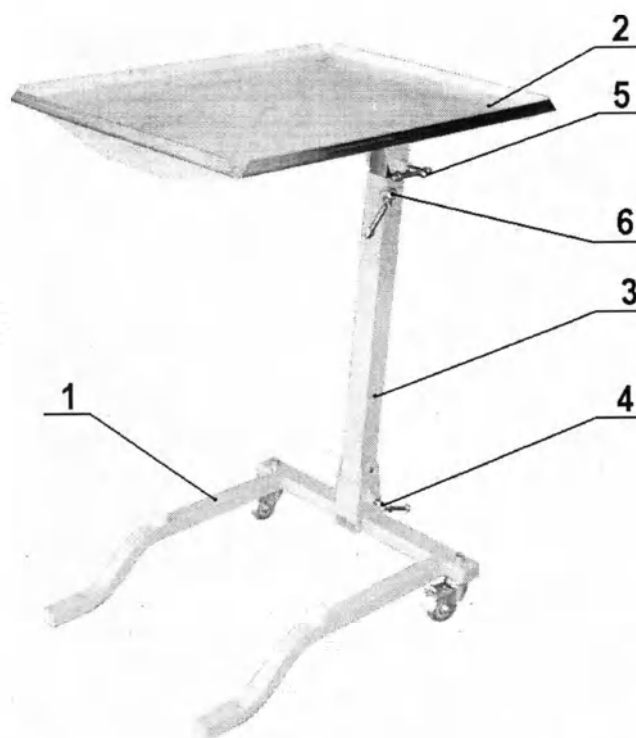

Столик в сложенном виде

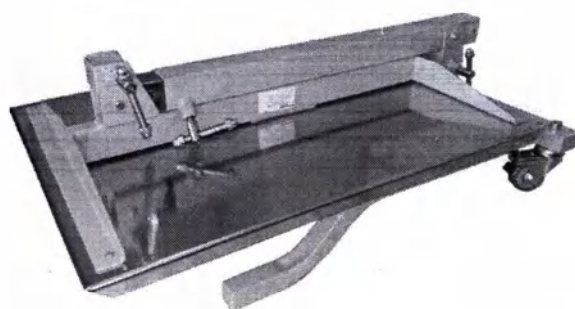

- 1 – основание;
- 2 – столешница;
- 3 – стойка телескопическая;
- 4, 5, 6 – фиксаторы

Рисунок 1

4.1.2 Порядок работы

Установку столика в рабочее положение (рисунок 2) производить в следующей последовательности:

- извлечь столик из сумки транспортировочной;
- удерживая основание (1), установить стойку (3) в вертикальное положение, зафиксировав с помощью фиксатора (4);
- установить столешницу (2) в горизонтальное положение, зафиксировав с помощью фиксатора (5);
- установить столешницу (2) на необходимую высоту, зафиксировав с помощью фиксатора (6);
- удалить с рабочей поверхности столешницы (2) защитную пленку.

Перевод столика из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- отпустить фиксатор (6) и опустить столешницу (2) в крайнее нижнее положение;
- отпустить фиксатор (5) и перевести столешницу (2) в положение вдоль стойки (3);
- отпустить фиксатор (4) и уложить стойку (3) вместе со столешницей (2) на основание (1) в горизонтальное положение;
- уложить столик в сумку транспортировочную.



ВНИМАНИЕ:

При переводе столика в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления



1 – основание; 2 – столешница; 3 – стойка телескопическая; 4, 5, 6 – фиксаторы

Рисунок 2

5 Меры безопасности

- 5.1 Столик в зависимости от степени потенциального риска применения относится к классу 1 согласно ГОСТ 31508 и Приказу МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г.
- 5.2 Столики предназначены для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации. При работе со столиком соблюдайте правила транспортировки пациента, принятые в медицине.
- 5.3 Перед началом работы со столиком внимательно ознакомьтесь с настоящим РЭ.
- 5.4 При транспортировке столиков и работе с ними избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделия.
- 5.5 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего РЭ.
- 5.6 Убирайте изделия в сумки только после их обработки и сушки.

Запрещается:



- Эксплуатировать изделия без ознакомления с эксплуатационной документацией;
- Использовать изделия не по назначению.

6 Указания по эксплуатации

- 6.1 При эксплуатации изделий должны учитываться эксплуатационные ограничения и соблюдаться правила безопасности, изложенные в эксплуатационной документации.
- 6.2 К эксплуатации допускаются медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации
- 6.3 При эксплуатации столиков необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке
- 6.4 Медицинские работники должны работать в перчатках в соответствии с СанПиН 2.1.3678

7 Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.
- 7.2 Перед применением изделий должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий.
- 7.3 Дезинфекция осуществляется химическим методом по МУ-287-113 путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177 с 0,5% добавлением моющего средства ГОСТ 25644. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки поверхностей не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции изделия необходимо тщательно просушить.

8 Транспортирование и хранение

- 8.1 Транспортирование изделий может производиться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
 - 8.2 Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
 - 8.3 Изделия могут храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован)
- При хранении изделий допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

9.1 При маркировании изделий (на изделии, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
	Код партии (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		Изготовитель (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		Дата изготовления (ГОСТ Р ИСО 15223-1)
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)			Диапазон влажности. Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)	
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны.				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги (ГОСТ 14192)		Верх Указывает правильное вертикальное положение груза (ГОСТ 14192)		Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом (ГОСТ 14192)
					Предел по количеству ярусов в штабеле Штабелировать не более 2 ярусов (ГОСТ 14192)

9.2 Внешний вид маркировки столика приведен на рисунке 3

9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 4.



Рисунок 3

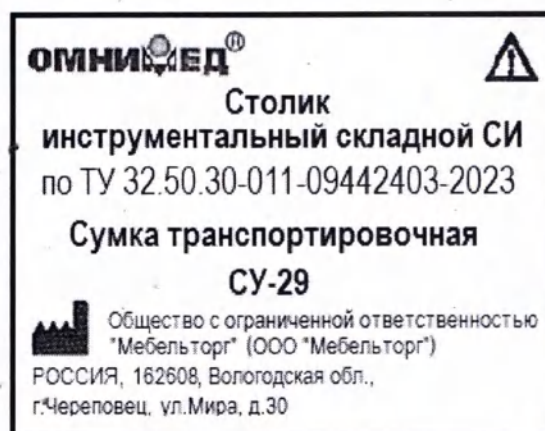


Рисунок 4

ОМНИМЕД

Столик
инструментальный складной СИ
 по ТУ 32.50.30-011-09442403-2023
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20 647 от 19.07.2023 года

Условия транспортировки

Условия хранения

Масса _____ кг
 Число изделий _____ шт.
 Дата упаковки _____

Штамп
ОТК

LOT

Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
 РОССИЯ, 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
 Тел. 8 (8202) 54-10-54

Рисунок 5

10 Упаковка

10.1 В качестве упаковки используются сумки транспортировочные, изготовленные в соответствии с комплектом конструкторской документации.

10.2 Изделия помещаются в сумки транспортировочные.

10.3 Каждая сумка имеет ярлык (рисунок 4), на котором указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- товарный знак уполномоченного представителя производителя;
- обозначение технических условий;
- наименование изделия;
- номер регистрационного удостоверения;
- масса;
- число изделий в упаковке;
- месяц и год упаковки;
- штамп ОТК;
- знаки и символы, приведенные в таблице 3.

11 Утилизация

- 11.1 Столик не содержит в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.
- 11.2 При нормальной эксплуатации столик не оказывает негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе столики не содержат драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.
- 11.3 Утилизация столиков осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Столики после окончания использования могут утилизироваться как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов
- 11.4 Неиспользованные столики специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Изделия не взрывоопасны, не способны самовозгораться, при поднесении открытого огня горят без взрыва.

12 Гарантии изготовителя

- 12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
- 12.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 12.3 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
- 12.4 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.
- 12.5 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.
- 12.6 Гарантийные требования реализуются при предъявлении эксплуатационной документации, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.
- 12.7 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

13 Послегарантийное техническое обслуживание


- 13.1 Послегарантийное техническое обслуживание проводится производителем или обслуживающими организациями, уполномоченными на это производителем (имеющими письменное разрешение).

Приложение А
(справочное)
Перечень ссылочных документов

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
Приказ МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ТУ 32.50.30-011-09442403-2023	Столик инструментальный складной СИ Технические условия

Устройство и внешний вид изделий

Б.1 Устройство и внешний вид столика приведен на рисунке Б.1.

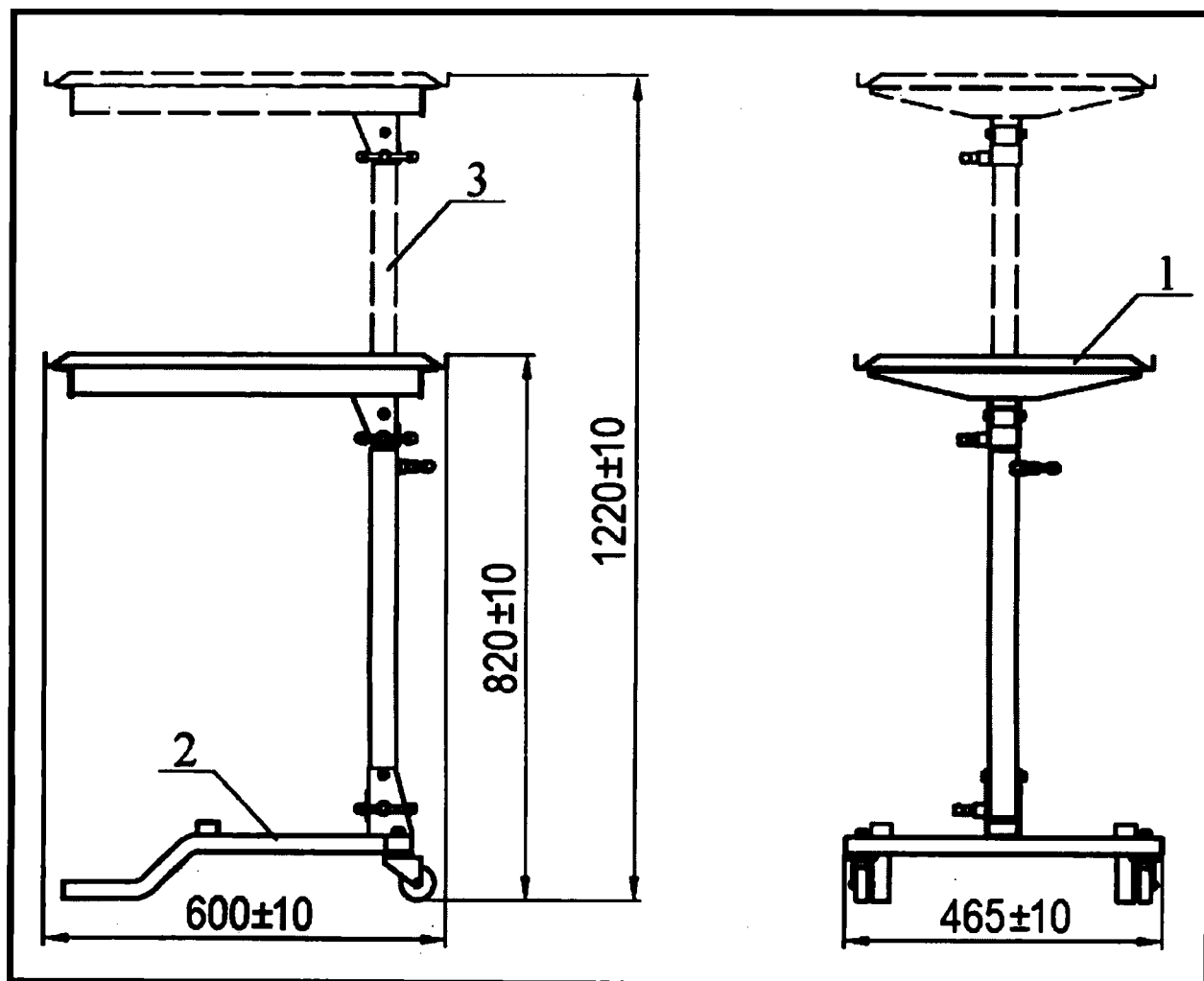

1 – столешница; 2 – основание; 3 – стойка телескопическая

Рисунок Б.1

Столик инструментальный складной СИ по ТУ 32.50.30-011-09442403-2023,
БВТГ 942813.001

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 13 листов.
Генеральный директор
ООО «Омнимед-ИН»

А.В. Лаврентьев



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»



А.В.Лаврентьев

2023 г.

**СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ СИ
ПО ТУ 32.50.30-011-09442403-2023**

ПАСПОРТ

БВТГ 942813.001 ПС

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20647 от 19.07.2023 года



Внимание!

Перед началом эксплуатации необходимо
внимательно ознакомиться с настоящим паспортом

г. Нижний Новгород
Россия

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики медицинского изделия: **Столик инструментальный складной СИ** по ТУ 32.50.30-1-09442403-2023:

Столик инструментальный складной СИ, далее – столик.

Паспорт предназначен для ознакомления с устройством столика и его правильной эксплуатации.

Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение изделия

Столик предназначен для размещения хирургического инструмента, перевязочного материала и лечебных средств во время проведения медицинских мероприятий.

1.2 Область применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.3 Условия применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Потенциальный потребитель:

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с настоящим паспортом, освоившие правила эксплуатации.

1.5 Показания к применению:

Для размещения хирургического инструмента, перевязочного материала и лечебных средств во время проведения медицинских мероприятий.

1.6 Противопоказания к применению:

Противопоказания не выявлены.
Не применять не по назначению.

1.7 Побочные эффекты:

При правильном использовании столика побочные эффекты не выявлены.

Технические характеристики

1 Технические характеристики столика приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
2.1.1 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	$(600 \times 465) \pm 10$ $\times (820 \dots 1200) \pm 10$
2.1.2 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	$(700 \times 465 \times 260) \pm 10$
2.1.3 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-29	$(720 \times 250 \times 460) \pm 20$
2.1.4 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	15
2.1.5 Материал	сталь, нержавеющая сталь
2.1.6 Условия эксплуатации (температура)	от минус 50 до плюс 45 °С
2.1.7 Средний срок службы, лет	5
2.1.8 Масса, кг	$11,5 \pm 1,0$
в том числе:	
2.1.9 Масса сумки транспортировочной СУ-29, кг	$1,2 \pm 0,2$

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.


Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Количество
Столик инструментальный складной СИ	БВТГ 942813.001	1
Сумка транспортировочная СУ-29	БВТГ 6.830.111-10	1
Паспорт	БВТГ 942813.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942813.001 РЭ	1


4 Устройство

4.1 Общий вид столика приведен на рисунке 1.

4.2 Столик состоит из основания (1), двух роликовых опор, оснащенных тормозами, столешницы (2), закрепленной на складывающейся телескопической стойке (3), фиксаторов (4, 5, 6), жестко скрепляющих складную конструкцию в рабочем положении.

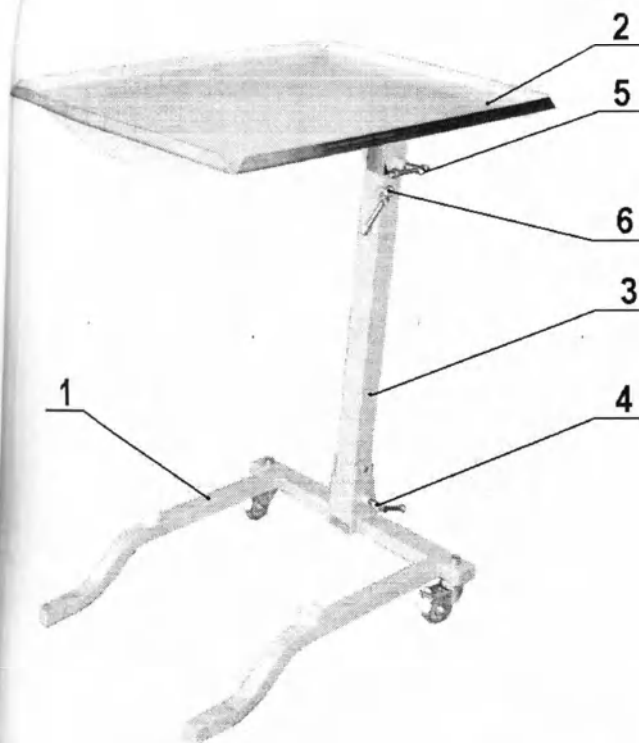

Столик в сложенном виде

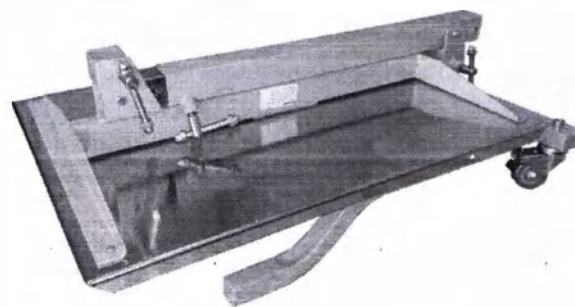

- 1 – основание;
2 – столешница;
3 – стойка телескопическая;
4, 5, 6 – фиксаторы

Рисунок 1

5 Порядок работы

5.1 Установку столика в рабочее положение (рисунок 2) производить в следующей последовательности:

- извлечь столик из сумки транспортировочной;
- удерживая основание (1), установить стойку (3) в вертикальное положение, зафиксировав с помощью фиксатора (4);
- установить столешницу (2) в горизонтальное положение, зафиксировав с помощью фиксатора (5);
- установить столешницу (2) на необходимую высоту, зафиксировав с помощью фиксатора (6);
- удалить с рабочей поверхности столешницы (2) защитную пленку.

5.2 Перевод столика из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- отпустить фиксатор (6) и опустить столешницу (2) в крайнее нижнее положение;
- отпустить фиксатор (5) и перевести столешницу (2) в положение вдоль стойки (3);
- отпустить фиксатор (4) и уложить стойку (3) вместе со столешницей (2) на основание (1) в горизонтальное положение;
- уложить столик в сумку транспортировочную.



ВНИМАНИЕ:

При переводе столика в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления.



1 – основание; 2 – столешница; 3 – стойка телескопическая; 4, 5, 6 – фиксаторы

Рисунок 2

6 Меры безопасности

- 6.1 Столик предназначен для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации.
- 6.2 Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.
- 6.3 При эксплуатации столика необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.
- 6.4 Медицинские работники должны работать в перчатках.
- 6.5 При транспортировке столика и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделия.
- 6.6 Не нагружайте столешницу столика более, чем на 15 кг.
- 6.7 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего паспорта.

Внимание! Запрещается:



- Эксплуатировать изделие с видимыми дефектами, а также с нарушениями структуры материалов;
- Использовать изделие не по назначению.

7 Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.
- 7.2 Перед применением изделий должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий.
- 7.3 В случае загрязнения проведите дезинфекцию. Дезинфекция осуществляется химическим методом путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции необходимо тщательно просушить.

Транспортирование и хранение

- 1 Транспортирование столиков может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.
- 2 Столик может храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован).
- 3 При хранении столиков допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

- 9.1 При маркировании столика (на изделии, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
	Код партии		Изготовитель		Дата изготовления
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз			Диапазон влажности Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз	
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны.				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги		Верх Указывает правильное вертикальное положение груза		Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
					Предел по количеству ярусов в штабеле Штабелировать не более 2 ярусов

- 9.2 Внешний вид маркировки столика приведен на рисунке 3
- 9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 4.



Рисунок 3



Рисунок 4

ОМНИМЕД®		Столик			
инструментальный складной СИ					
по ТУ 32.50.30-011-09442403-2023					
Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20 647 от 19.07.2023 года					
					
Масса _____ кг		Штамп ОТК _____		LOT _____	
Число изделий _____ шт.				 _____	
Дата упаковки _____					
		Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг») РОССИЯ, 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30 Тел.: 8 (8202) 54-10-54			

Рисунок 5

10 Утилизация

- 10.1 Столики не содержат в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.
- 10.2 При нормальной эксплуатации изделия не оказывают негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе изделие не содержит драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.
- 10.3 Утилизация столиков и их частей осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Изделие после окончания использования может утилизироваться как отходы класса А в соответствии с действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов.
- 10.4 Неиспользованные столики специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Столик не взрывоопасен, не способен самовозгораться, при поднесении открытого огня горит без взрыва.

11 Гарантии изготовителя

- 11.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 11.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
- 11.3 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.
- 11.4 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.
- 11.5 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего паспорта, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.
- 11.6 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

12 Информация о производителе

12.1 Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

13 Свидетельство о приемке

13.1 Столик инструментальный складной СИ

Код партии _____

, соответствует ТУ 32.50.30-011-09442403-2023 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Начальник ОТК _____
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Штамп ОТК

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 8 листов.
Генеральный директор
ООО «Омнимед-НН»

А.В. Лаврентьев