

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»

А.В.Лаврентьев



**КРОВАТИ СКЛАДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-013-09442403-2023**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВТГ 942810.003 РЭ

**ООО «Омнимед-НН»
г. Нижний Новгород
Россия**

Содержание

1	Основные сведения и технические данные.....	5
1.1	Наименование изделий в зависимости от исполнения.....	5
1.2	Назначение.....	5
1.3	Область применения	5
1.4	Условия применения.....	5
1.5	Потенциальный потребитель	5
1.6	Показания к применению.....	5
1.7	Противопоказания к применению	5
1.8	Побочные эффекты	5
2	Основные технические характеристики.....	6
3	Комплектность.....	8
4	Варианты исполнения изделий	10
5	Меры безопасности	39
6	Указания по эксплуатации.....	39
7	Техническое обслуживание.....	39
8	Транспортирование и хранение	39
9	Сведения о маркировке.....	40
10	Упаковка.....	41
11	Утилизация.....	42
12	Гарантии изготовителя.....	42
13	Послегарантийное техническое обслуживание.....	42
	Приложение А (справочное) Перечень ссылочных документов.....	43
	Приложение Б (справочное) Устройство и внешний вид изделий	44

Руководство по эксплуатации, далее – РЭ, предназначено для ознакомления с медицинским изделием «Кровати складные медицинские по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023», далее – кровати, варианты исполнения:

Кровать госпитальная складная КГ-01, в составе:

Кровать госпитальная складная КГ-01 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Кровать госпитальная складная КГ-01.1, в составе:

Кровать госпитальная складная КГ-01 – 1 шт.

Матрас М1 – 1 шт.

Матрас М2 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Кровать реанимационная складная КР-01, в составе:

Кровать реанимационная складная КР-01 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Кровать реанимационная складная КР-01.1, в составе:

Кровать реанимационная складная КР-01 – 1 шт.

Матрас М1 – 1 шт.

Матрас М2 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Кровать реанимационная складная КР-02, в составе:

Кровать реанимационная складная КР-02 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Кровать реанимационная складная КР-02.1, в составе:

Кровать реанимационная складная КР-02 – 1 шт.

Матрас М1 – 1 шт.

Матрас М2 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Кровать реанимационная складная КР-03, в составе:

Кровать реанимационная складная КР-03 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Кровать реанимационная складная КР-03.1, в составе:

Кровать реанимационная складная КР-03 – 1 шт.

Матрас М1 – 1 шт.

Матрас М2 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Кровать функциональная складная КФ-01, в составе:

Кровать функциональная складная КФ-01 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Кровать функциональная складная КФ-01.1, в составе:

Кровать функциональная складная КФ-01 – 1 шт.

Матрас М1 – 1 шт.

Матрас М2 – 1 шт.

Сумка транспортировочная СУ-42 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Информация о производителе

Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

РЭ содержит описание изделий, их устройство, принцип работы, и устанавливает правила эксплуатации (транспортирования и хранения, применения, утилизации и пр.).

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией.

- При эксплуатации кроватей необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.

- Медицинские работники должны работать в перчатках в соответствии с СанПиН 2.1.3678.

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Наименование изделий в зависимости от исполнения

Кровать госпитальная складная КГ-01 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
Кровать госпитальная складная КГ-01.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
Кровать реанимационная складная КР-01 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
Кровать реанимационная складная КР-01.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
Кровать реанимационная складная КР-02 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
Кровать реанимационная складная КР-02.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
Кровать реанимационная складная КР-03 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
Кровать реанимационная складная КР-03.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
Кровать функциональная складная КФ-01 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
Кровать функциональная складная КФ-01.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023

1.2 Назначение

Кровати предназначены для размещения пациентов в период лечения, диагностики, реабилитации и профилактики, а также для пациентов, нуждающихся в постельном режиме и тяжело больных. Могут применяться в стационарных и в полевых условиях во всех типах больниц, медицинских учреждениях, лечебно-профилактических центрах.

1.3 Область применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Условия применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.5 Потенциальный потребитель

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.6 Показания к применению

Предназначены для размещения пациентов в период лечения, диагностики, реабилитации и профилактики, а также для пациентов, нуждающихся в постельном режиме и тяжело больных. Могут применяться в стационарных и в полевых условиях во всех типах больниц, медицинских учреждениях, лечебно-профилактических центрах.

1.7 Противопоказания к применению

Противопоказания не выявлены.

Не применять не по назначению.

1.8 Побочные эффекты

При правильном использовании кроватей побочные эффекты не выявлены.

Климатическое исполнение У категории 1 по ГОСТ 15150.

Кровати в зависимости от потенциального риска применения относятся к классу 1 по ГОСТ 31508 и Приказу МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 370480 (Кровать складная для оснащения медицинских объектов в полевых условиях).

Изделия в зависимости от воспринимаемых механических воздействий относятся к группе 5 по ГОСТ Р 50444.

2 Основные технические характеристики

2.1 Кровати должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации, приведенному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование и условное обозначение	Обозначение документа
Кровать госпитальная складная КГ-01	БВТГ 942811.001
Кровать госпитальная складная КГ-01.1	БВТГ 942811.001-01
Кровать реанимационная складная КР-01	БВТГ 942811.002
Кровать реанимационная складная КР-01.1	БВТГ 942811.002-01
Кровать реанимационная складная КР-02	БВТГ 942811.003
Кровать реанимационная складная КР-02.1	БВТГ 942811.003-01
Кровать реанимационная складная КР-03	БВТГ 942811.004
Кровать реанимационная складная КР-03.1	БВТГ 942811.004-01
Кровать функциональная складная КФ-01	БВТГ 942855.001
Кровать функциональная складная КФ-01.1	БВТГ 942855.001-01

2.1.1 Габаритные размеры:

- кроватей в рабочем положении должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2 и приложению Б;
- кроватей в сложенном виде должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3;
- матраса М1, матраса М2, мм: (970х690х60) ±10;
- сумки транспортировочной, мм: (1020х720х320) ±20.

2.1.2 Масса кроватей (в том числе матраса и сумки транспортировочной) – должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.

2.1.3 Максимальная равномерно распределенная нагрузка на ложе кровати – 250 кг.

2.1.4 Материал кроватей: сталь; материал чехлов матрасов – клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием, внутренний состав – пенополиуретан.

2.1.5 Средний срок службы – пять лет. Критерием предельного состояния изделий является технико-экономическая нецелесообразность их восстановления.

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Габаритные размеры в рабочем положении, мм			Высота ложа, мм
	Длина	Ширина	Высота	
Кровать госпитальная складная КГ-01	2040±20	700±10	910±10	585±10
Кровать госпитальная складная КГ-01.1	2040±20	700±10	910±10	645±10
Кровать реанимационная складная КР-01	2000±10	700±10	485±10	485±10
Кровать реанимационная складная КР-01.1	2000±10	700±10	545±10	545±10
Кровать реанимационная складная КР-02	2040±20	700±10	910±10	585±10
Кровать реанимационная складная КР-02.1	2040±20	700±10	910±10	645±10
Кровать реанимационная складная КР-03	2040±20	740±15	910±10	585±10
Кровать реанимационная складная КР-03.1	2040±20	740±15	910±10	645±10
Кровать функциональная складная КФ-01	2040±20	740±15	910±10	585±10
Кровать функциональная складная КФ-01.1	2040±20	740±15	910±10	645±10

Таблица 3

Наименование и условное обозначение	Габаритные размеры в сложенном виде, мм	Масса, кг		
		Кровати	в том числе масса, кг:	
			Матраса М1/М2	Сумки СУ-42
Кровать госпитальная складная КГ-01	(1000x180x700) ±10	30,0±1,3	—	2,0±0,3
Кровать госпитальная складная КГ-01.1	(1000x300x700) ±10	32,7±1,6	1,3±0,15/ 1,4±0,15	2,0±0,3
Кровать реанимационная складная КР-01	(1000x180x700) ±10	27,3±1,3	—	2,0±0,3
Кровать реанимационная складная КР-01.1	(1000x300x700) ±10	30,0±1,6	1,3±0,15/ 1,4±0,15	2,0±0,3
Кровать реанимационная складная КР-02	(1000x180x700) ±10	30,5±1,3	—	2,0±0,3
Кровать реанимационная складная КР-02.1	(1000x300x700) ±10	33,2±1,6	1,3±0,15/ 1,4±0,15	2,0±0,3
Кровать реанимационная складная КР-03	(1000x180x700) ±10	34,5±1,3	—	2,0±0,3
Кровать реанимационная складная КР-03.1	(1000x300x700) ±10	37,2±1,6	1,3±0,15/ 1,4±0,15	2,0±0,3
Кровать функциональная складная КФ-01	(1000x180x700) ±10	35,0±1,3	—	2,0±0,3
Кровать функциональная складная КФ-01.1	(1000x300x700) ±10	37,7±1,6	1,3±0,15/ 1,4±0,15	2,0±0,3

3 Комплектность

3.1 Комплектность кроватей должна соответствовать приведенной в таблице 4.

Таблица 4

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол. шт.
Кровать госпитальная складная КГ-01 БВТГ 942811.001		
Кровать госпитальная складная КГ-01	БВТГ 942811.001	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942811.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1
Кровать госпитальная складная КГ-01.1 БВТГ 942811.001-01		
Кровать госпитальная складная КГ-01	БВТГ 942811.001	1
Матрас М1	БВТГ 6.832.032	1
Матрас М2	БВТГ 6.832.032-01	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942811.001-01 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1
Кровать реанимационная складная КР-01 БВТГ 942811.002		
Кровать реанимационная складная КР-01	БВТГ 942811.002	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942811.002 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1
Кровать реанимационная складная КР-01.1 БВТГ 942811.002-01		
Кровать реанимационная складная КР-01	БВТГ 942811.002	1
Матрас М1	БВТГ 6.832.032	1
Матрас М2	БВТГ 6.832.032-01	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942811.002-01 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1
Кровать реанимационная складная КР-02 БВТГ 942811.003		
Кровать реанимационная складная КР-02	БВТГ 942811.003	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942811.003 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1
Кровать реанимационная складная КР-02.1 БВТГ 942811.003-01		
Кровать реанимационная складная КР-02	БВТГ 942811.003	1
Матрас М1	БВТГ 6.832.032	1
Матрас М2	БВТГ 6.832.032-01	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942811.003-01 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1
Кровать реанимационная складная КР-03 БВТГ 942811.004		
Кровать реанимационная складная КР-03	БВТГ 942811.004	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942811.004 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол. шт.
Кровать реанимационная складная КР-03.1 БВТГ 942811.004-01		
Кровать реанимационная складная КР-03	БВТГ 942811.004	1
Матрас М1	БВТГ 6.832.032	1
Матрас М2	БВТГ 6.832.032-01	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942811.004-01 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1
Кровать функциональная складная КФ-01 БВТГ 942855.001		
Кровать функциональная складная КФ-01	БВТГ 942855.001	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942855.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1
Кровать функциональная складная КФ-01.1 БВТГ 942855.001-01		
Кровать функциональная складная КФ-01	БВТГ 942855.001	1
Матрас М1	БВТГ 6.832.032	1
Матрас М2	БВТГ 6.832.032-01	1
Сумка транспортировочная СУ-42	БВТГ 6.830.111-21	1
Паспорт	БВТГ 942855.001-01 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.003 РЭ	1

4 Варианты исполнения изделий

4.1 Кровать госпитальная складная КГ-01 по ТУ 32.50.30-004-09442403-2021,
Кровать госпитальная складная КГ-01.1 по ТУ 32.50.30-004-09442403-2021,
Кровать реанимационная складная КР-01 по ТУ 32.50.30-004-09442403-2021,
Кровать реанимационная складная КР-01.1 по ТУ 32.50.30-004-09442403-2021,
Кровать реанимационная складная КР-02 по ТУ 32.50.30-004-09442403-2021,
Кровать реанимационная складная КР-02.1 по ТУ 32.50.30-004-09442403-2021,
Кровать реанимационная складная КР-03 по ТУ 32.50.30-004-09442403-2021,
Кровать реанимационная складная КР-03.1 по ТУ 32.50.30-004-09442403-2021,
Кровать функциональная складная КФ-01 по ТУ 32.50.30-004-09442403-2021,
Кровать функциональная складная КФ-01.1 по ТУ 32.50.30-004-9442403-2021

Кровать госпитальная складная КГ-01;
Кровать госпитальная складная КГ-01.1;
Кровать реанимационная складная КР-01;
Кровать реанимационная складная КР-01.1;
Кровать реанимационная складная КР-02;
Кровать реанимационная складная КР-02.1;
Кровать реанимационная складная КР-03;
Кровать реанимационная складная КР-03.1;
Кровать функциональная складная КФ-01;
Кровать функциональная складная КФ-01.1,

далее – кровать, предназначена для размещения пациентов в период лечения, диагностики, реабилитации и профилактики, а также для пациентов, нуждающихся в постельном режиме и тяжелобольных. Может применяться в стационарных и в полевых условиях во всех типах больниц, медицинских учреждениях, лечебно-профилактических центрах.


4.1.1 Устройство

Общий вид кроватей приведен на рисунках 2, 4, 6, 8, 10.


Кровать госпитальная складная КГ-01.1, Кровать реанимационная складная КР-01.1, Кровать реанимационная складная КР-02.1, Кровать реанимационная складная КР-03.1, Кровать функциональная складная КФ-01.1

– оснащены матрасами М1 и М2 (рисунок 1).

Матрасы крепятся на секциях кровати с помощью застёжек текстильных (на рисунках 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 матрасы условно не показаны).

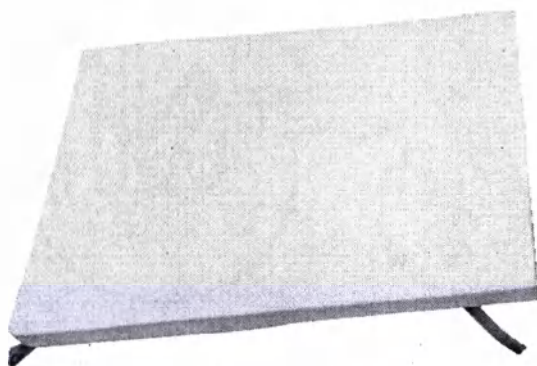

Матрас М1

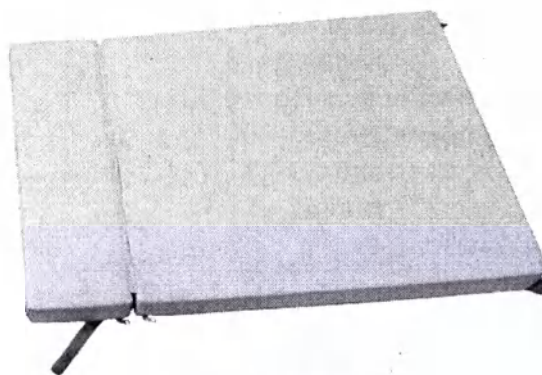

Матрас М2

Рисунок 1

Общий вид кровати приведен на рисунке 2.

Кровать состоит из складной рамы (1) и трех опор – одной средней (2) и двух крайних (3).

Опоры (2 и 3) снабжены регулируемыми по высоте шарнирными опорами (5).

На раме (1) установлены: секция ложа спинная (10) и секция ложа ножная (11).

Настил секций ложа (10, 11) выполнен из стального перфорированного листа.

Спинки (12) шарнирно закреплены к раме (1). Фиксация спинок (12) в рабочем и сложенном положениях обеспечиваются фиксаторами с флажками или пружинными фиксаторами (6).

Для фиксации опор (3) в рабочем положении предусмотрены ручки-фиксаторы (9) – по одной с каждой стороны, расположенные по диагонали.

Для фиксации кровати в сложенном виде секции ложа (10, 11) снабжены ремнями (4) с застежками текстильными.

Кровать в сложенном виде приведена на рисунке 3.


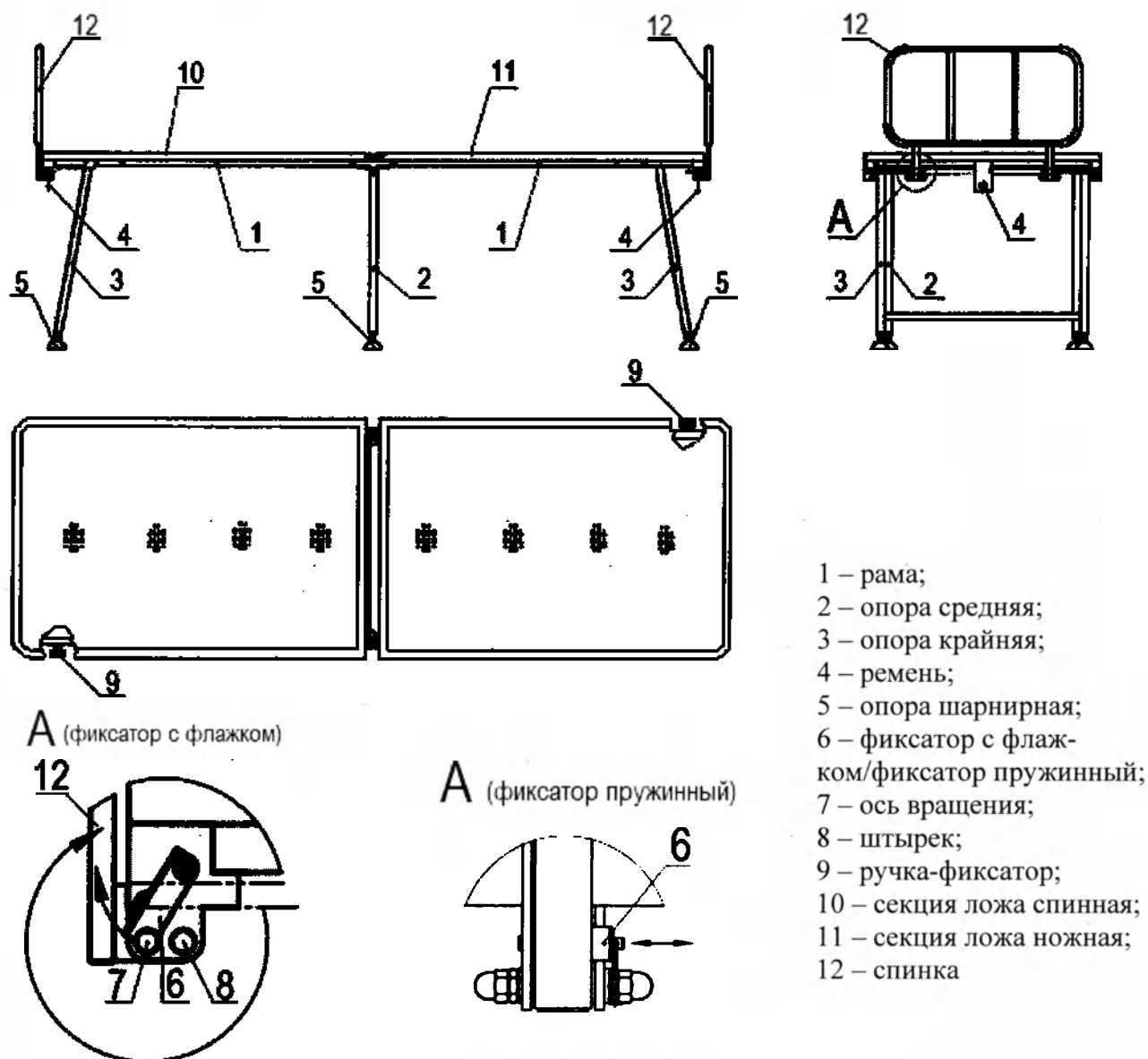


Рисунок 2


Кровать госпитальная складная КГ-01
 Кровать госпитальная складная КГ-01.1



2 – опора средняя;
3 – опора крайняя;
4 – ремень

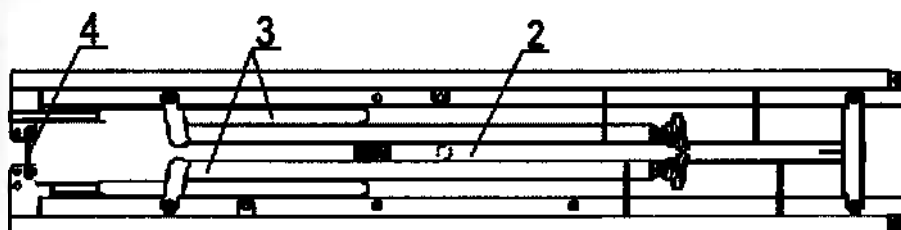

Кровать госпитальная складная КГ-01

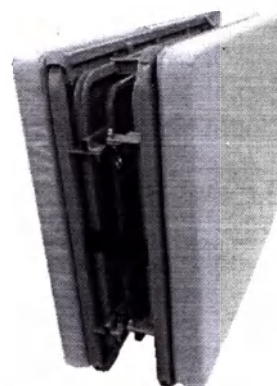

Кровать госпитальная складная КГ-01.1

Рисунок 3 – Кровать в сложенном виде

Общий вид кровати приведен на рисунке 4.

Кровать состоит из складной рамы (1) и трех опор – одной средней (2) и двух крайних (3).

Опоры (2 и 3) снабжены регулируемыми по высоте шарнирными опорами (5).

На раме (1) установлены три секции: секция ложа средняя (6); секция ложа спинная (7) и секция ложа ножная (8). Секции ложа (6, 8) – неподвижные, секция ложа спинная (7) – шарнирно закреплена к раме (1) и имеет регулируемый угол наклона. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи механизмов (10) ступенчатого изменения угла наклона секций.

Настил секций ложа (6, 7, 8) выполнен из стального перфорированного листа.

Для фиксации опор (3) в рабочем положении предусмотрены ручки-фиксаторы (9) – по одной с каждой стороны, расположенные по диагонали.

Для фиксации кровати в сложенном виде секции ложа (7, 8) снабжены ремнями (4) с застежками текстильными.

Кровать в сложенном виде приведена на рисунке 5.



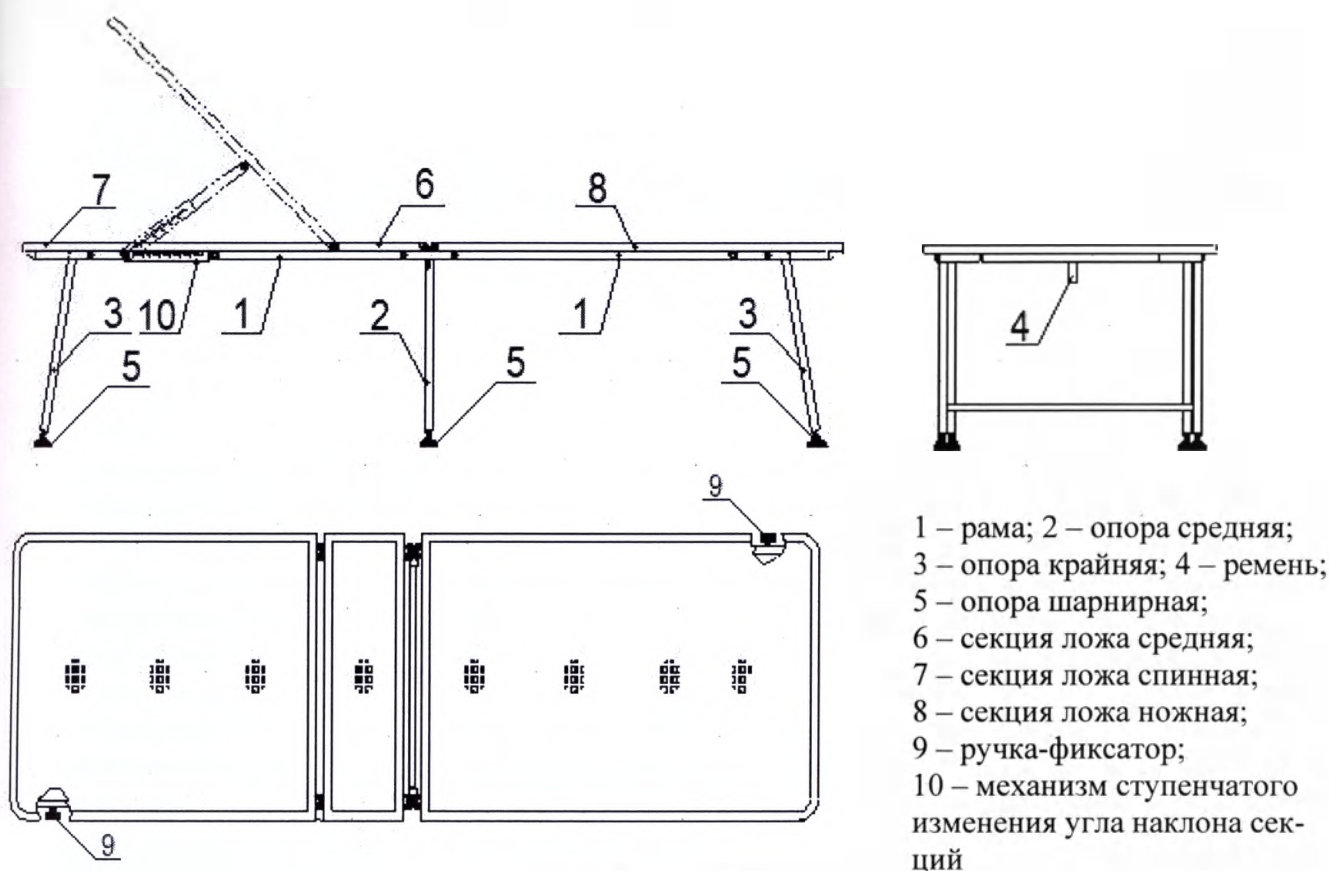


Рисунок 4


Кровать реанимационная складная КР-01
Кровать реанимационная складная КР-01.1

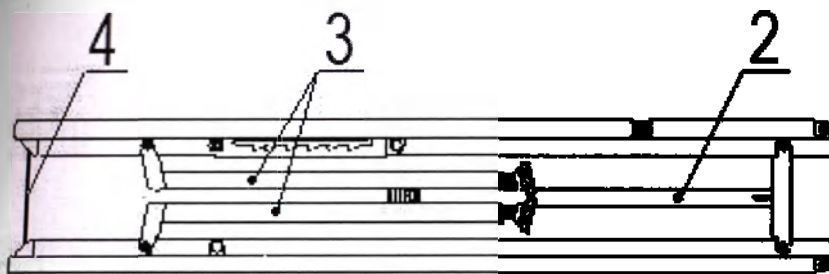

- 2 – опора средняя;
3 – опора крайняя;
4 – ремень

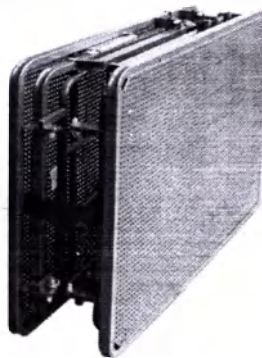

Кровать реанимационная складная КР-01

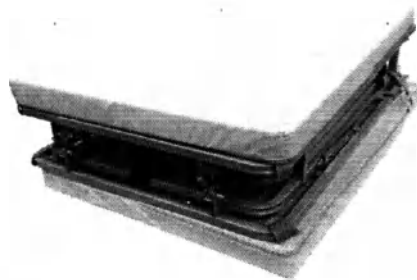

Кровать реанимационная складная КР-01.1

Рисунок 5 – Кровать в сложенном виде

Кровать реанимационная складная КР-02, Кровать реанимационная складная КР-02.1

Общий вид кровати приведен на рисунке 6.

Кровать состоит из складной рамы (1) и трех опор – одной средней (2) и двух крайних (3).

Опоры (2 и 3) снабжены регулируемыми по высоте шарнирными опорами (5).

На раме (1) установлены три секции: секция ложа средняя (12); секция ложа спинная (10) и секция ложа ножная (11). Секции ложа (11, 12) – неподвижные, секция ложа спинная (10) – шарнирно закреплена к раме (1) и имеет регулируемый угол наклона. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи механизмов (13) ступенчатого изменения угла наклона секций.




Настил секций ложа (10, 11, 12) выполнен из стального перфорированного листа.

Спинки (14) шарнирно закреплены к раме (1). Фиксация спинок (14) в рабочем и сложенном положениях обеспечиваются фиксаторами с флажками или пружинными фиксаторами (6).


Для фиксации опор (3) в рабочем положении предусмотрены ручки-фиксаторы (9) – по одной с каждой стороны, расположенные по диагонали.

Для фиксации кровати в сложенном виде секции ложа (10, 11) снабжены ремнями (4) с застежками текстильными.


Кровать в сложенном виде приведена на рисунке 7.

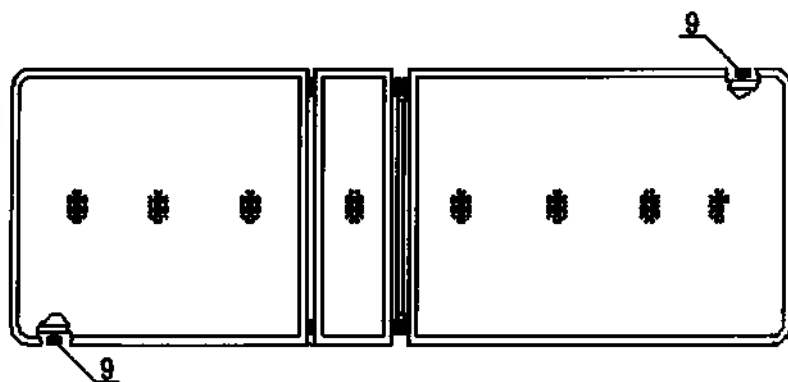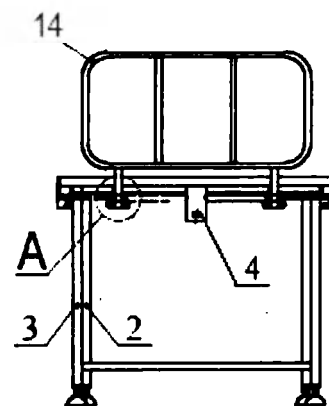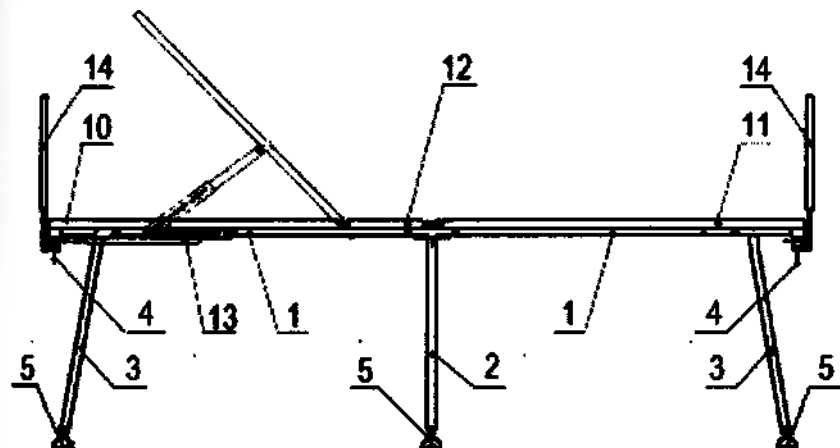

A (фиксатор с флажком)

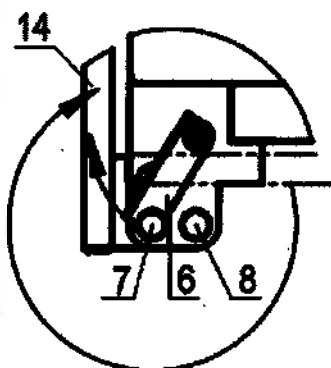


A (фиксатор пружинный)

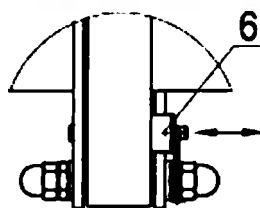


- 1 – рама;
- 2 – опора средняя;
- 3 – опора крайняя;
- 4 – ремень;
- 5 – опора шарнирная;
- 6 – фиксатор с флажком/фиксатор пружинный;
- 7 – ось вращения;
- 8 – штырек;
- 9 – ручка-фиксатор;
- 10 – секция ложа спинная;
- 11 – секция ложа ножная;
- 12 – секция ложа средняя;
- 13 – механизм ступенчатого изменения угла наклона секций;
- 14 – спинка

Рисунок 6


Кровать реанимационная складная КР-02
Кровать реанимационная складная КР-02.1

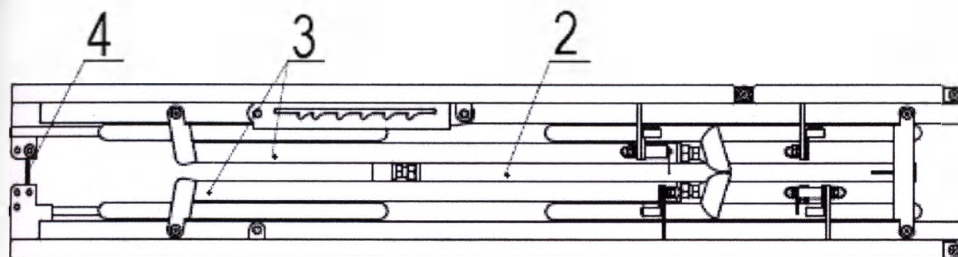

- 2 – опора средняя;
3 – опора крайняя;
4 – ремень

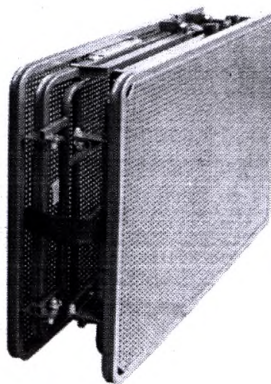

Кровать реанимационная складная КР-02

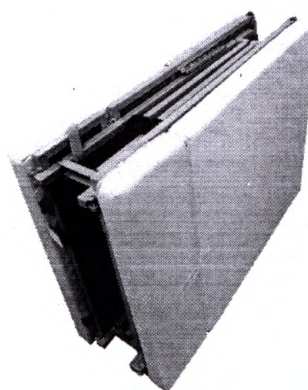

Кровать реанимационная складная КР-02.1

Рисунок 7 – Кровать в сложенном виде

Кровать реанимационная складная КР-03, Кровать реанимационная складная КР-03.1

Общий вид кровати приведен на рисунке 8.

Кровать состоит из складной рамы (1) и трех опор – одной средней (2) и двух крайних (3).

Опоры (2 и 3) снабжены регулируемыми по высоте шарнирными опорами (5).

На раме (1) установлены три секции: секция ложа средняя (12); секция ложа спинная (10) и секция ложа ножная (11). Секции ложа (11, 12) – неподвижные, секция ложа спинная (10) – шарнирно закреплена к раме (1) и имеет регулируемый угол наклона. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи механизмов (13) ступенчатого изменения угла наклона секций.

Настил секций ложа (10, 11, 12) выполнен из стального перфорированного листа.

Спинки (14) и ограждения (15) шарнирно закреплены к раме (1). Фиксация спинок (14) и ограждений (15) в рабочем и сложенном положениях обеспечиваются фиксаторами с флажками или пружинными фиксаторами (6).

Для фиксации опор (3) в рабочем положении предусмотрены ручки-фиксаторы (9) – по одной с каждой стороны, расположенные по диагонали.

Для фиксации кровати в сложенном виде секции ложа (10, 11) снабжены ремнями (4) с застежками текстильными.

Кровать в сложенном виде приведена на рисунке 9.



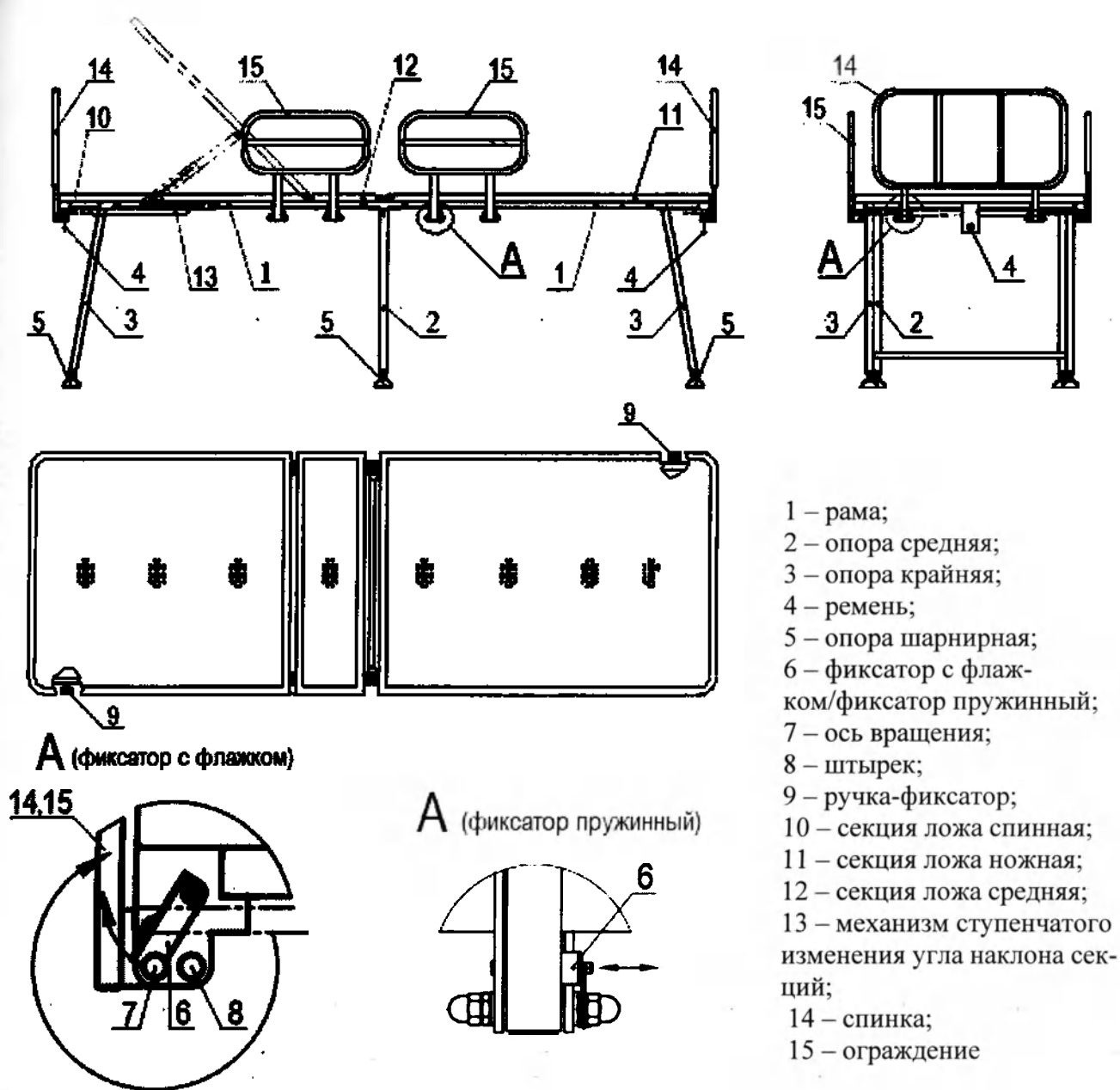


Рисунок 8

Кровать реанимационная складная КР-03
 Кровать реанимационная складная КР-03.1

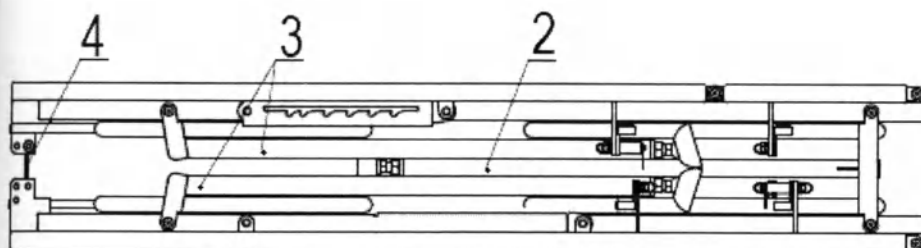

- 2 – опора средняя;
- 3 – опора крайняя;
- 4 – ремень

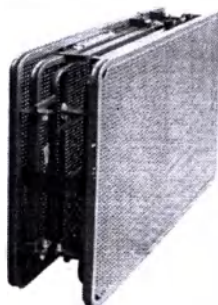

Кровать реанимационная складная КР-03



Кровать реанимационная складная КР-03.1

Рисунок 9 – Кровать в сложенном виде

Кровать функциональная складная КФ-01, Кровать функциональная складная КФ-01.1

Общий вид кровати приведен на рисунке 10.

Кровать состоит из складной рамы (1) и трех опор – одной средней (2) и двух крайних (3).

Опоры (2 и 3) снабжены регулируемыми по высоте шарнирными опорами (5).

На раме (1) установлены три секции: секция ложа средняя (12); секция ложа спинная (10) и секция ложа ножная (11). Секция ложа (12) – неподвижная, секции ложа спинная (10) и ножная (11) – шарнирно закреплены к раме (1) и имеют регулируемый угол наклона. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи механизмов (13) ступенчатого изменения угла наклона секций.

Настил секций ложа (10, 11, 12) выполнен из стального перфорированного листа.

Спинки (14) и ограждения (15) шарнирно закреплены к раме (1). Фиксация спинок (14) и ограждений (15) в рабочем и сложенном положениях обеспечиваются фиксаторами с флажками или пружинными фиксаторами (6).

Для фиксации опор (3) в рабочем положении предусмотрены ручки-фиксаторы (9) – по одной с каждой стороны, расположенные по диагонали.

Для фиксации кровати в сложенном виде секции ложа (10, 11) снабжены ремнями (4) с застежками текстильными.

Кровать в сложенном виде приведена на рисунке 11.



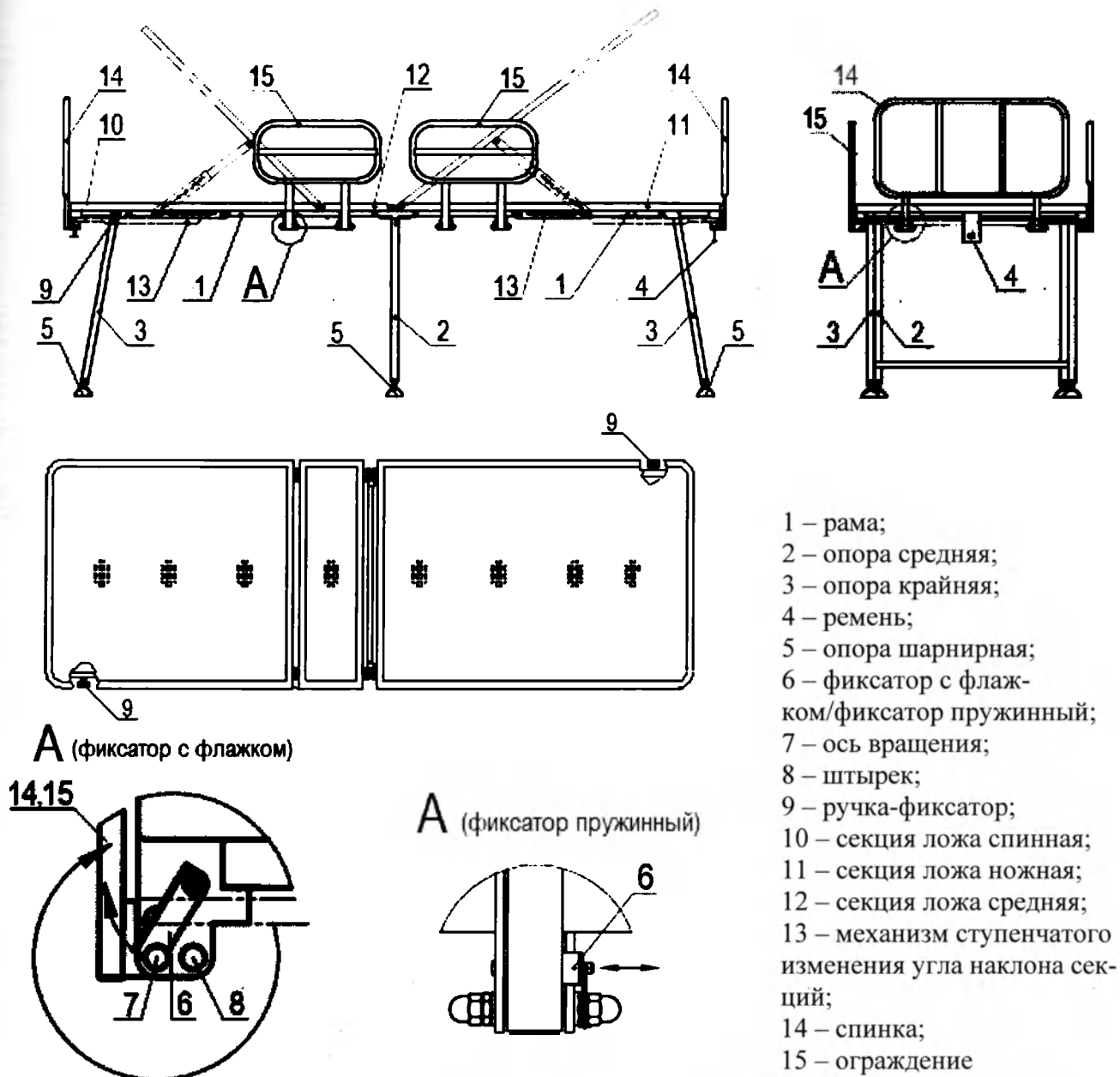


Рисунок 10


Кровать функциональная складная КФ-01
 Кровать функциональная складная КФ-01.1

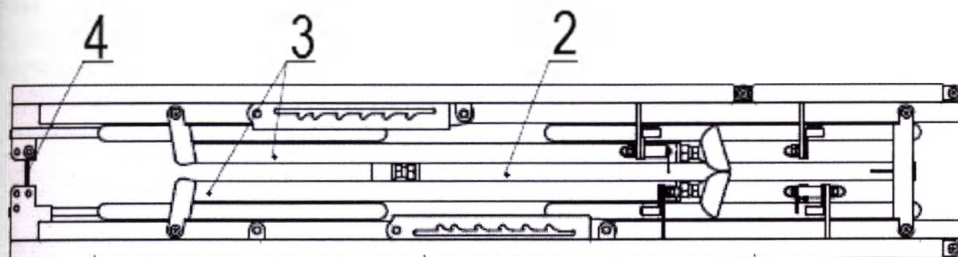

2 – опора средняя;
3 – опора крайняя;
4 – ремень

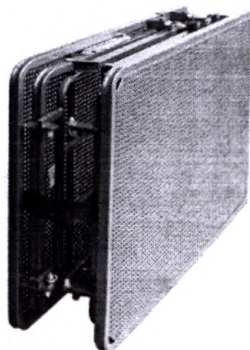

Кровать функциональная складная КФ-01

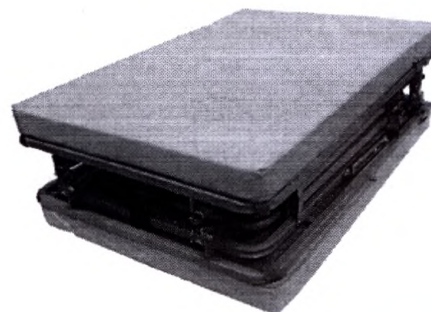

Кровать функциональная складная КФ-01.1

Рисунок 11 – Кровать в сложенном виде

Установку кровати в рабочее положение (рисунки 12, 14, 16, 18, 20) производить в следующей последовательности:

- I – извлечь кровать из сумки транспортировочной и разъединить ремни (4);
- II – убедившись, что ручки-фиксаторы (9) ослаблены – развернуть обе части рамы (1) перпендикулярно относительно опоры средней (2);
- III – развернуть опоры крайние (3) до их предельного положения, установить кровать на опоры в горизонтальное положение и **затянуть ручки-фиксаторы (9)**;

Кровать госпитальная складная КГ-01 и Кровать госпитальная складная КГ-01.1 (рисунок 12):

IV – установить спинки (12) в рабочее положение (А – рисунок 2):

Для кроватей с фиксатором с флажком:

- поочередно, для каждой спинки (12), приподнять флажок фиксатора (6), выведя его из канавки, расположенной на оси вращения (7), сдвинуть спинку (12) до упора влево – привести спинку (12) в вертикальное (рабочее) положение, повернув ее вокруг оси (7) на 270 градусов до совпадения штырька (8), установленного на пластине спинки, с отверстием в пластине рамы, сдвинуть спинку (12) вправо и опустить фиксатор (6) в канавку оси вращения (7);

Для кроватей с пружинным фиксатором:

- поочередно, оттянув шток пружинного фиксатора (6) каждой спинки (12) – привести спинку (12) в вертикальное (рабочее) положение и застопорить ее в рабочем положении фиксатором (6);
- проверить устойчивость кровати, отрегулировав при необходимости высоту шарнирных опор (5).

Кровать в рабочем положении приведена на рисунке 13.

Перевод кровати из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- сложить спинки (12):

Для кроватей с фиксатором с флажком:


- поочередно приподняв фиксаторы (6) спинок, сдвинуть спинки (12) влево и опустить их в горизонтальное положение под раму (1), сдвинуть вправо и опустить фиксатор (6) в канавку оси вращения (7);

Для кроватей с пружинным фиксатором:

- поочередно оттянув шток пружинного фиксатора (6) каждой спинки (12) – опустить ее в горизонтальное положение под раму (1) и застопорить фиксатором (6).

Ослабить ручки-фиксаторы (9);


- опоры крайние (3) сложить под раму (1);
- повернуть части рамы (1) в положение параллельно опоры средней (2);
- кровать в сложенном виде зафиксировать ремнями (4);
- уложить кровать в сумку транспортировочную.

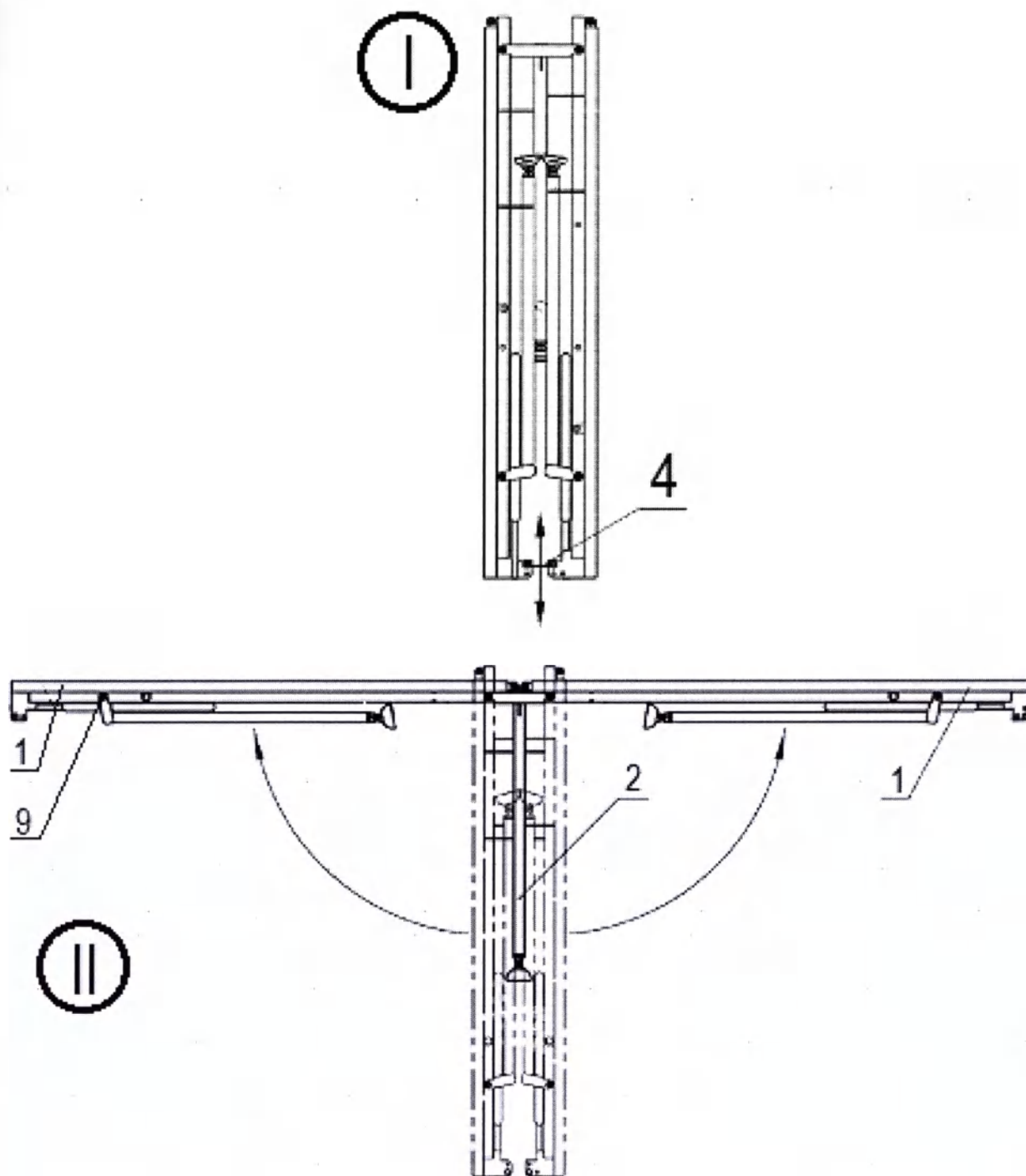


1 – рама; 2 – опора средняя; 4 – ремень; 9 – ручка-фиксатор

Рисунок 12 (лист 1 из 2)

III

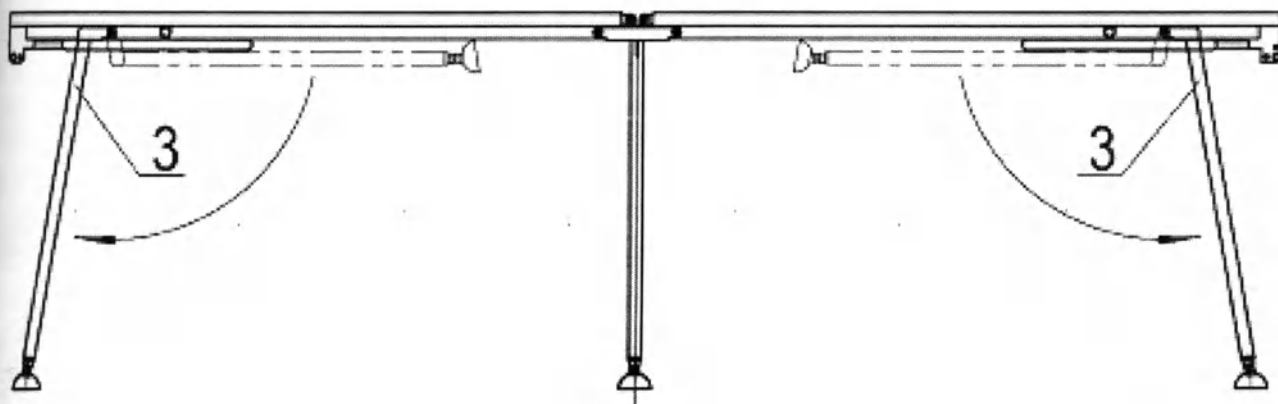

IV

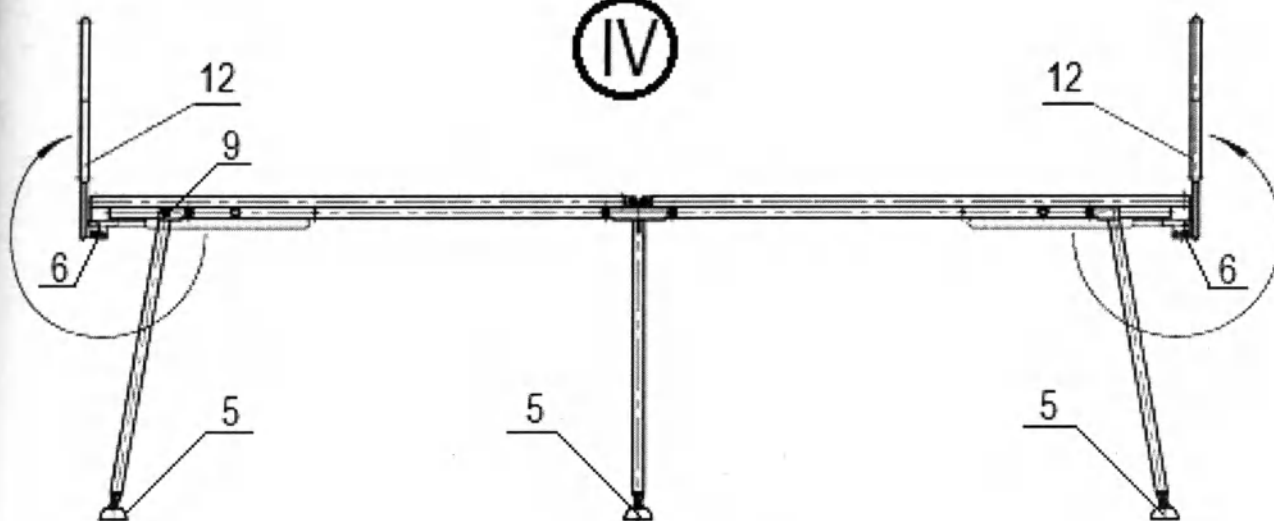

3 – опора крайняя; 5 – опора шарнирная;
6 – фиксатор с флажком/фиксатор пружинный; 9 – ручка-фиксатор; 12 – спинка

Рисунок 12 (лист 2 из 2)



Кровать госпитальная складная КГ-01



Кровать госпитальная складная КГ-01.1

Рисунок 13 – Кровать в рабочем положении

- проверить устойчивость кровати, отрегулировав при необходимости высоту шарнирных опор (5).

IV – для установки необходимого угла наклона (45...40...35...30...20...20...15...0) ° секции ложа спинной (7) – поднять секцию вручную до требуемого (фиксированного) положения.


Для изменения угла наклона секции ложа (7) необходимо поднять секцию до крайнего верхнего положения, опустить ее до горизонтального положения и вновь поднять на нужную высоту.

Для перевода секции ложа (7) в горизонтальное положение необходимо поднять секцию до крайнего верхнего положения и плавно опустить до горизонтального положения.

Кровать в рабочем положении приведена на рисунке 15.


Перевод кровати из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- привести секцию ложа спинную (7) в горизонтальное положение;
- **ослабить ручки-фиксаторы (9);**
- опоры крайние (3) сложить под раму (1);
- повернуть части рамы (1) в положение параллельно опоры средней (2);
- кровать в сложенном виде зафиксировать ремнями (4);
- уложить кровать в сумку транспортировочную.

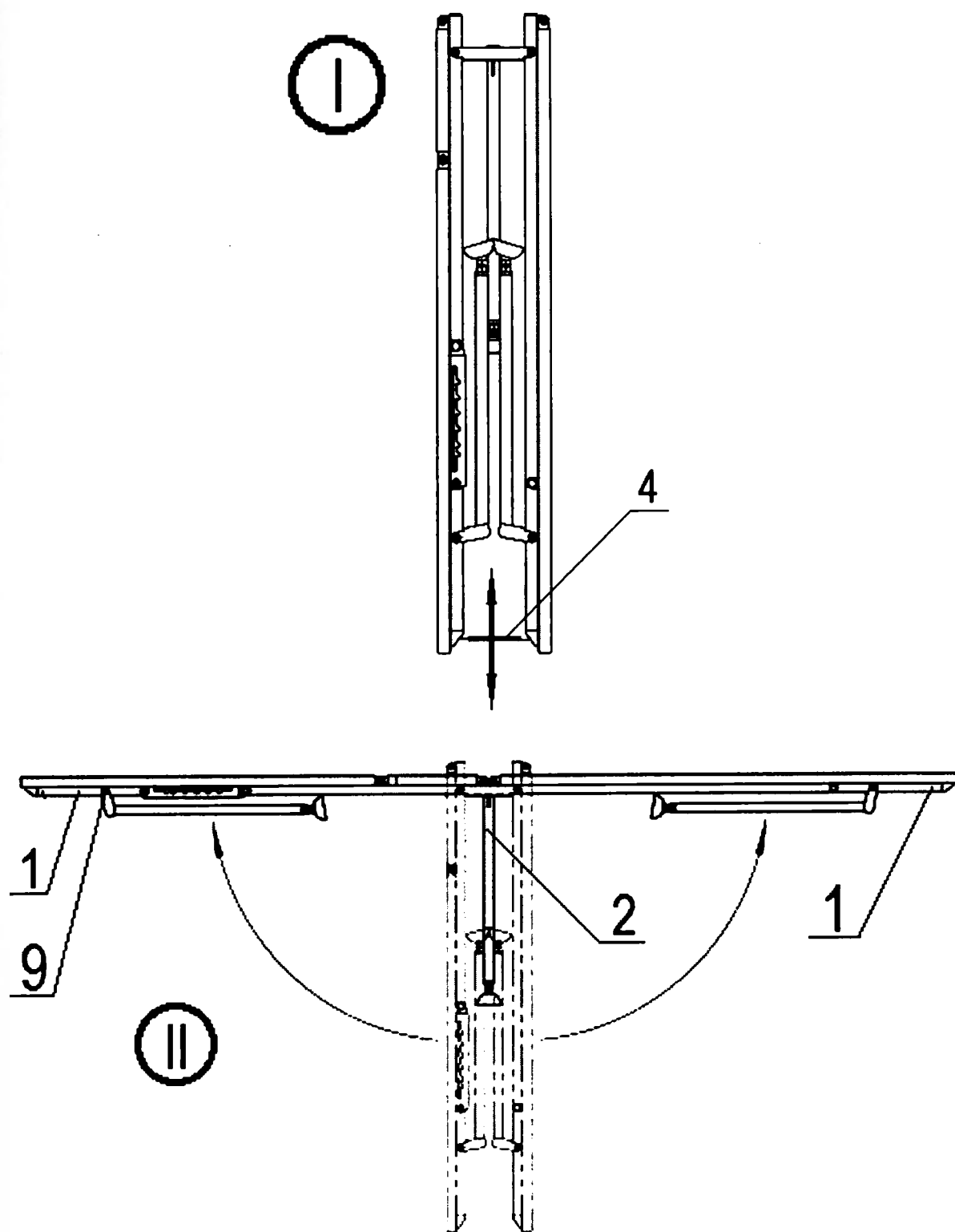

1 – рама; 2 – опора средняя; 4 – ремень; 9 – ручка-фиксатор

Рисунок 14 (лист 1 из 2)

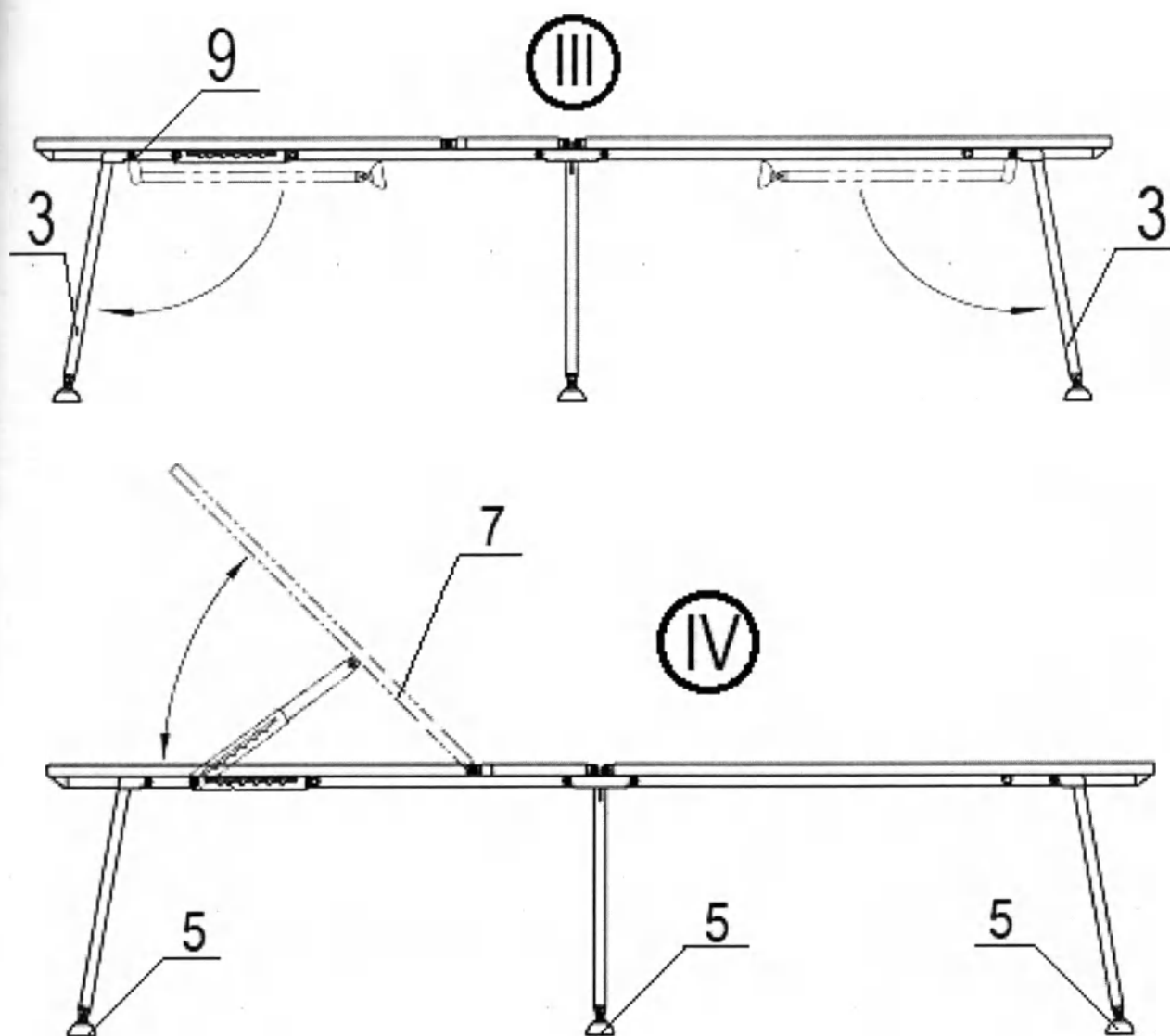

3 – опора крайняя; 5 – опора шарнирная; 7 – секция ложа спинная; 9 – ручка-фиксатор

Рисунок 14 (лист 2 из 2)



Кровать реанимационная складная КР-01



Кровать реанимационная складная КР-01.1

Рисунок 15 – Кровать в рабочем положении

Кровать реанимационная складная КР-02, Кровать реанимационная складная КР-02.1 (рисунк 16):

IV – установить спинки (14) в рабочее положение (А – рисунок 6):

Для кроватей с фиксатором с флажком:

- поочередно, для каждой спинки (14) приподнять флажок фиксатора (6), выведя его из канавки, расположенной на оси вращения (7), сдвинуть спинку (14) до упора влево – привести спинку (14) в вертикальное (рабочее) положение, повернув вокруг оси (7) на 270 градусов до совпадения штырька (8), установленного на пластине спинки, с отверстием в пластине рамы, сдвинуть спинку (14) вправо и опустить фиксатор (6) в канавку оси вращения (7);

Для кроватей с пружинным фиксатором:

- поочередно, оттянув шток пружинного фиксатора (6) каждой спинки (14) – привести спинку (14) в вертикальное (рабочее) положение и застопорить в рабочем положении фиксатором (6);
- проверить устойчивость кровати, отрегулировав при необходимости высоту шарнирных опор (5).

V – для установки необходимого угла наклона (45...40...35...30...20...20...15...0) ° секции ложа спинной (10) – поднять секцию вручную до требуемого (фиксированного) положения.

Для изменения угла наклона секции ложа (10) необходимо поднять секцию до крайнего верхнего положения, опустить ее до горизонтального положения и вновь поднять на нужную высоту.

Для перевода секции ложа (10) в горизонтальное положение необходимо поднять секцию до крайнего верхнего положения и плавно опустить до горизонтального положения.

Кровать в рабочем положении приведена на рисунке 17.

Перевод кровати из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- привести секцию ложа спинную (10) в горизонтальное положение;
- сложить спинки (14):

Для кроватей с фиксаторами с флажками:


- поочередно, для каждой спинки (14), приподнять флажок фиксатора (6), выведя его из канавки, расположенной на оси вращения (7), сдвинуть спинку (14) до упора вправо привести спинку (14) в горизонтальное (сложенное) положение, повернув вокруг оси (7) на 270 градусов под раму (1) до совпадения штырька (8), установленного на пластине спинки, с отверстием в пластине рамы, сдвинуть спинку (14) влево и опустить фиксатор (6) в канавку оси вращения (7).

Для кроватей с пружинными фиксаторами:

- поочередно, оттянув шток фиксатора (6) каждой спинки (14) – опустить спинку (14) в горизонтальное положение под раму (1) и застопорить фиксатором (6);


Ослабить ручки-фиксаторы (9);

- опоры крайние (3) сложить под раму (1);
- повернуть части рамы (1) в положение параллельно опоры средней (2);
- кровать в сложенном виде зафиксировать ремнями (4);
- уложить кровать в сумку транспортировочную.

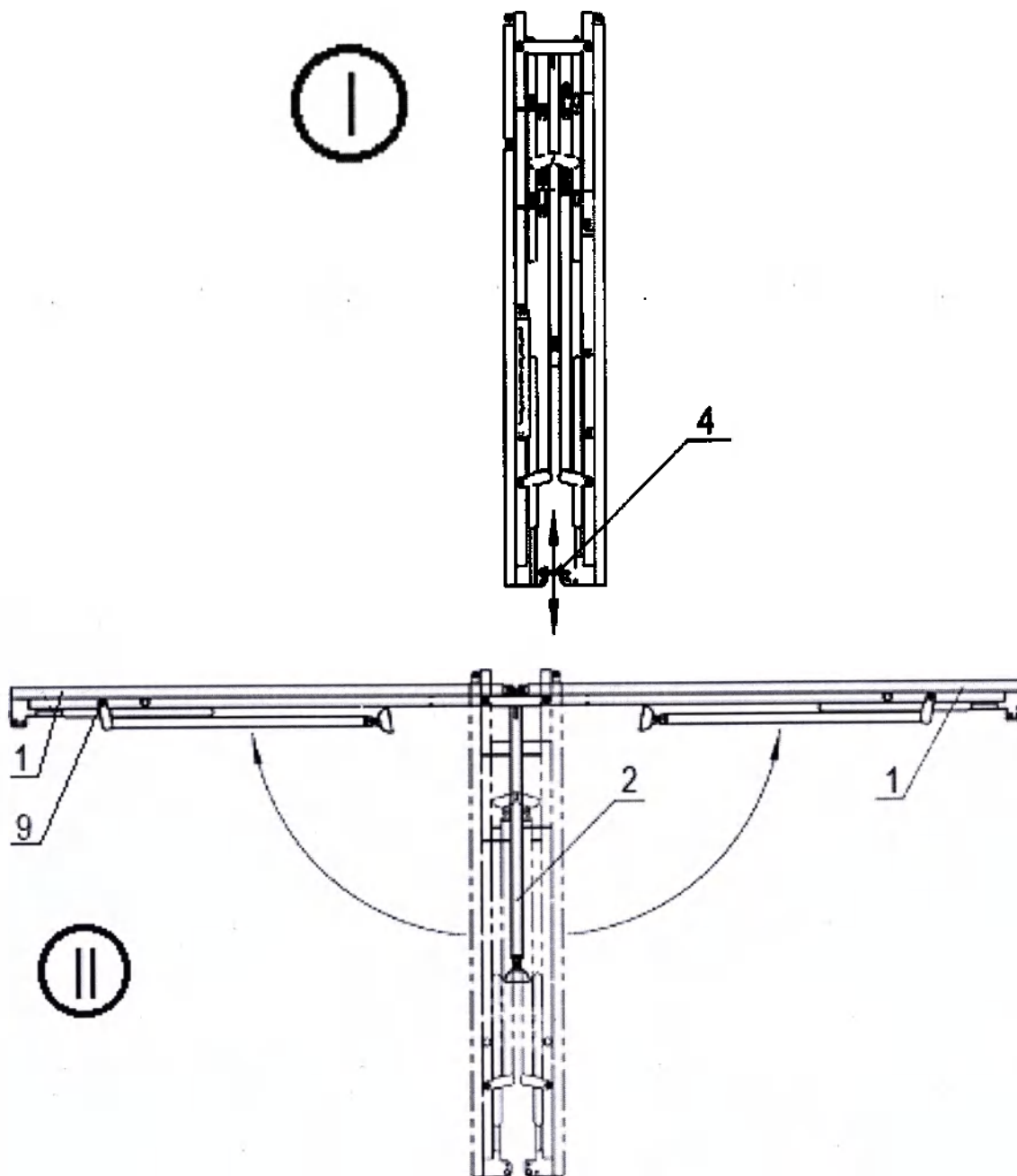


1 – рама; 2 – опора средняя; 4 – ремень; 9 – ручка-фиксатор

Рисунок 16 (лист 1 из 2)

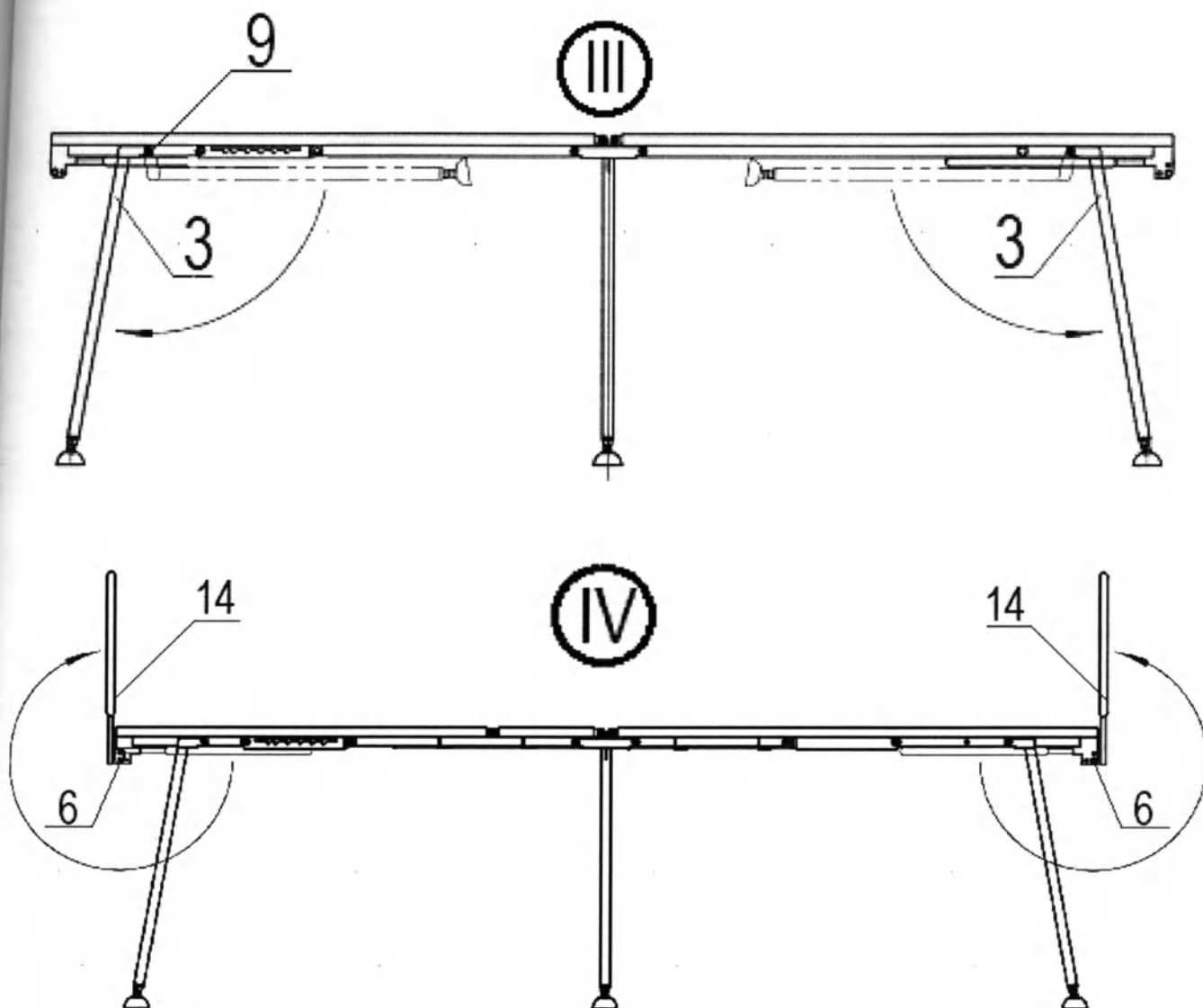


3 – опора крайняя; 6 – фиксатор с флажком/фиксатор пружинный;
9 – ручка-фиксатор; 14 – спинка

Рисунок 16 (лист 2 из 3)

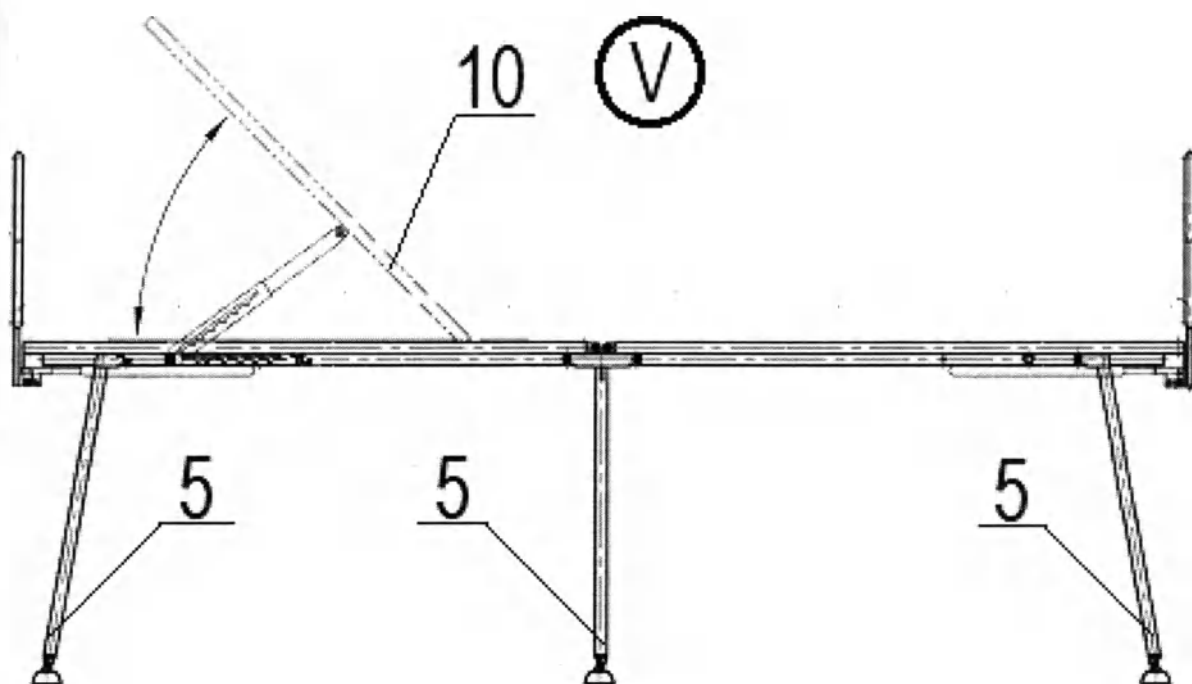

5 – опора шарнирная; 10 – секция ложа спинная

Рисунок 16 (лист 3 из 3)

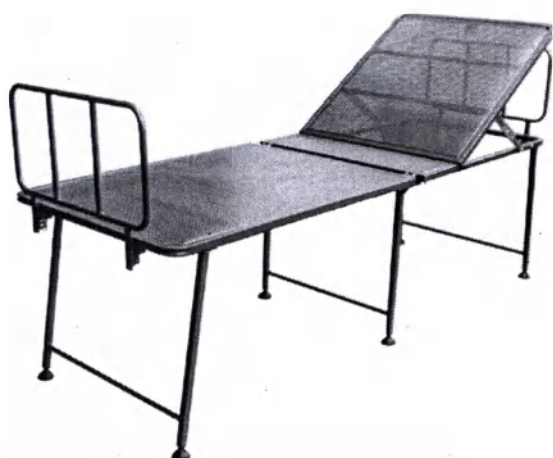

Кровать реанимационная складная КР-02



Кровать реанимационная складная КР-02.1

Рисунок 17 – Кровать в рабочем положении

Кровать реанимационная складная КР-03, Кровать реанимационная складная КР-03.1 (рисунок 18):

IV; V – установить спинки (14) и ограждения (15) в рабочее положение (А – рисунок 8):

Для кроватей с фиксатором с флажком:

- поочередно, для каждой спинки (14)/каждого ограждения (15), приподнять флажок фиксатора (6), выведя его из канавки, расположенной на оси вращения (7), сдвинуть спинку (14)/ограждение (15) до упора влево – привести спинку (14)/ограждение (15) в вертикальное (рабочее) положение, повернув вокруг оси (7) на 270 градусов до совпадения штырька (8), установленного на пластине спинки/ограждения, с отверстием в пластине рамы, сдвинуть спинку (14)/ограждение (15) вправо и опустить фиксатор (6) в канавку оси вращения (7);

Для кроватей с пружинным фиксатором:

- поочередно, оттянув шток пружинного фиксатора (6) каждой спинки (14)/каждого ограждения (15) – привести спинку (14)/ограждение (15) в вертикальное (рабочее) положение и застопорить в рабочем положении фиксатором (6);
- проверить устойчивость кровати, отрегулировав при необходимости высоту шарнирных опор (5).

VI – для установки необходимого угла наклона (45...40...35...30...20...20...15...0) ° секции лежа спинной (10) – поднять секцию вручную до требуемого (фиксированного) положения.

Для изменения угла наклона секции лежа (10) необходимо поднять секцию до крайнего верхнего положения, опустить ее до горизонтального положения и вновь поднять на нужную высоту.

Для перевода секции лежа (10) в горизонтальное положение необходимо поднять секцию до крайнего верхнего положения и плавно опустить до горизонтального положения.

Кровать в рабочем положении приведена на рисунке 19.

Перевод кровати из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- привести секцию лежа спинную (10) в горизонтальное положение;
- сложить ограждения (15) и спинки (14):

Для кроватей с фиксаторами с флажками:


- поочередно, для каждого ограждения (15)/каждой спинки (14), приподнять флажок фиксатора (6), выведя его из канавки, расположенной на оси вращения (7), сдвинуть ограждение (15)/спинку (14) до упора вправо привести ограждение (15)/спинку (14) в горизонтальное (сложенное) положение, повернув вокруг оси (7) на 270 градусов под раму (1) до совпадения штырька (8), установленного на пластине ограждения/спинки, с отверстием в пластине рамы, сдвинуть ограждение (15)/спинку (14) влево и опустить фиксатор (6) в канавку оси вращения (7).

Для кроватей с пружинными фиксаторами:

- поочередно, оттянув шток фиксатора (6) каждого ограждения (15)/спинки (14) – опустить ограждение (15)/спинку (14) в горизонтальное положение под раму (1) и застопорить фиксатором (6);


Ослабить ручки-фиксаторы (9);

- опоры крайние (3) сложить под раму (1);
- повернуть части рамы (1) в положение параллельно опоры средней (2);
- кровать в сложенном виде зафиксировать ремнями (4);
- уложить кровать в сумку транспортировочную.

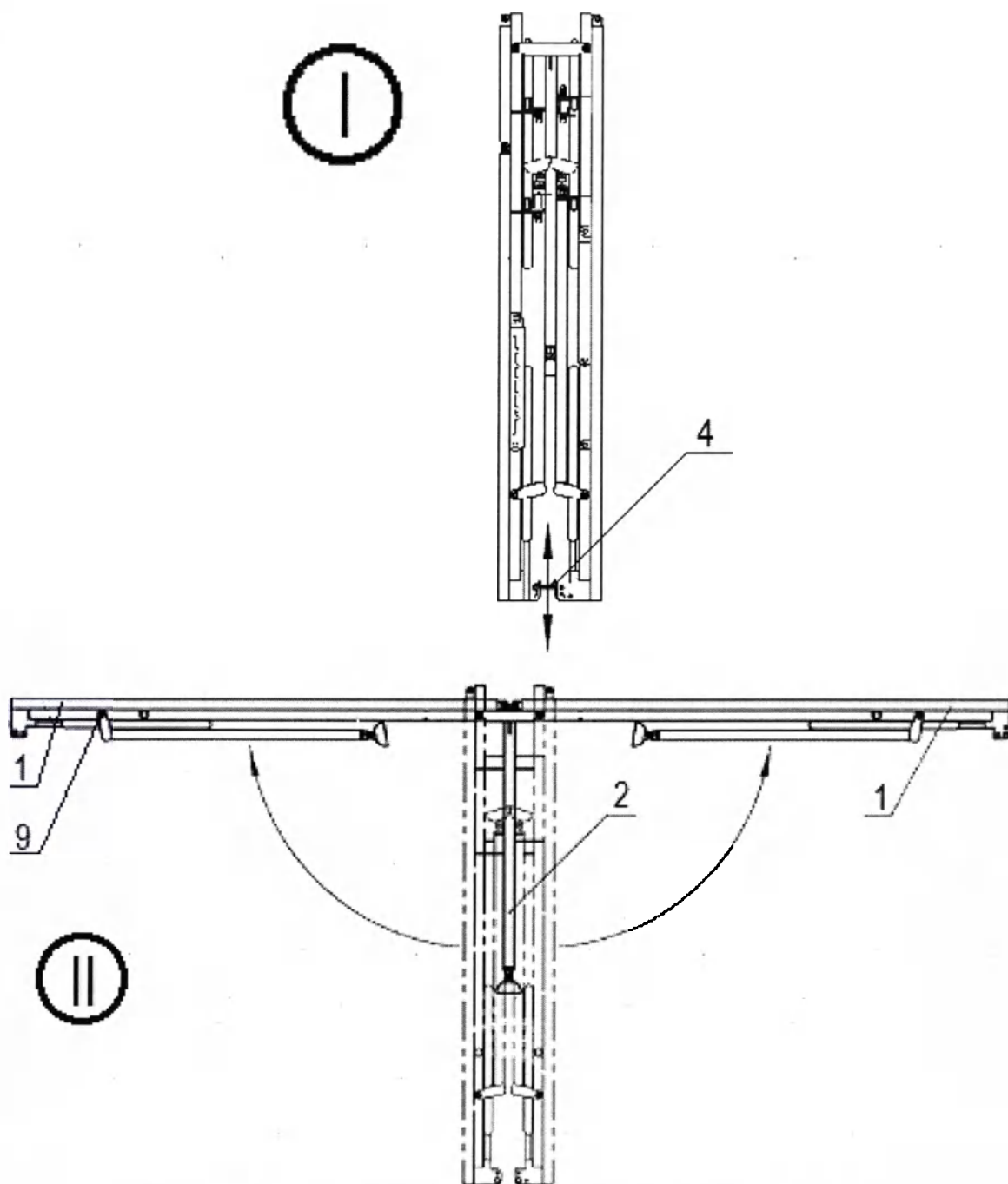


1 – рама; 2 – опора средняя; 4 – ремень; 9 – ручка-фиксатор

Рисунок 18 (лист 1 из 3)

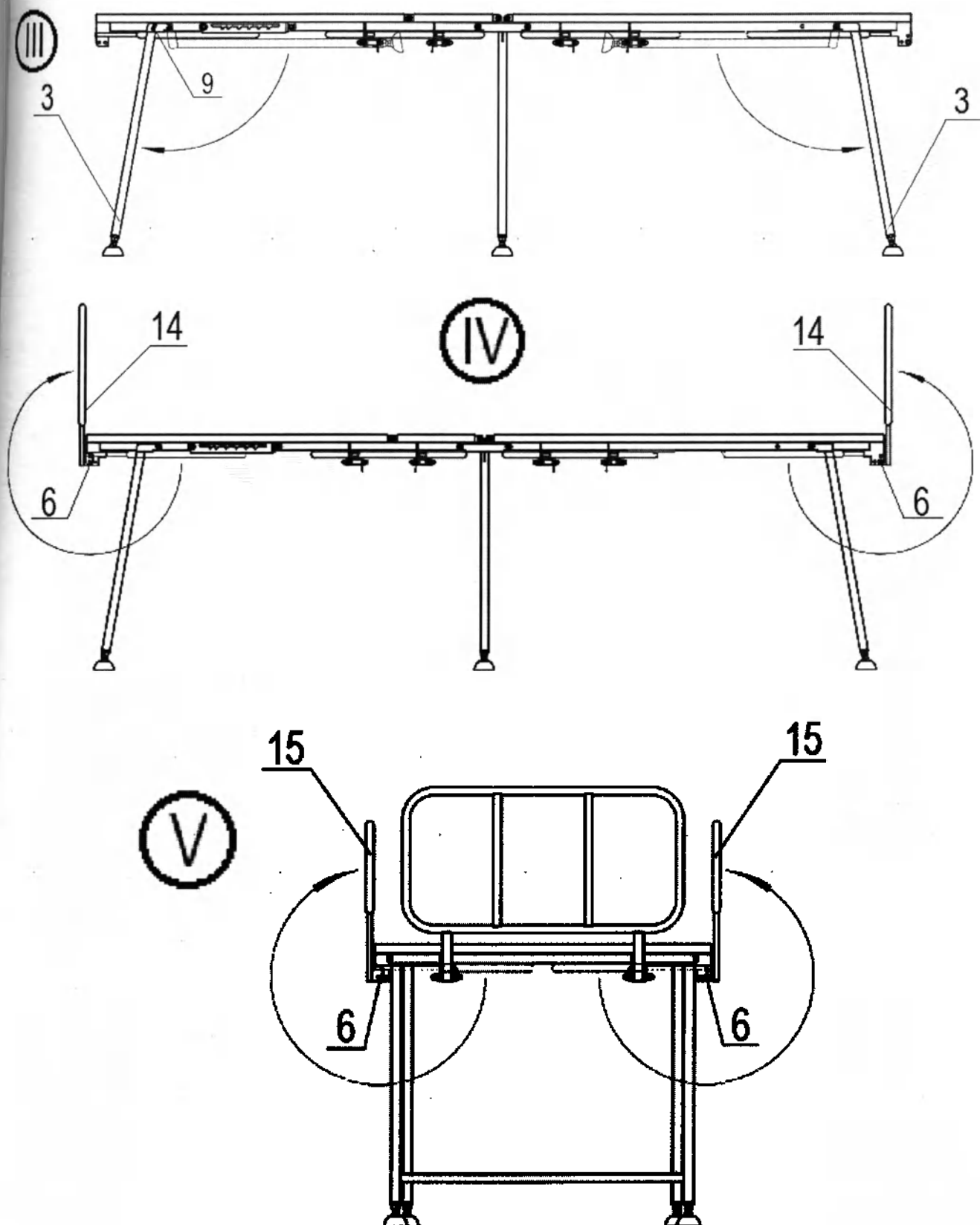


3 – опора крайняя; 6 – фиксатор с флажком/фиксатор пружинный; 9 – ручка-фиксатор;
14 – спинка; 15 – ограждение

Рисунок 18 (лист 2 из 3)

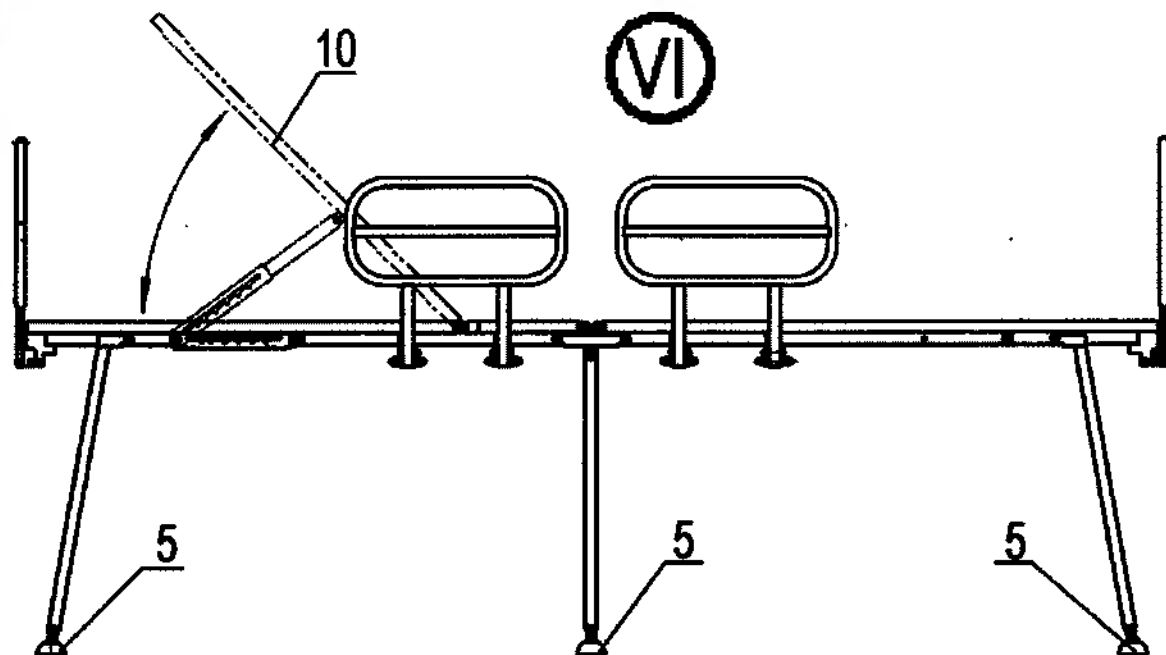


5 – опора шарнирная; 10 – секция ложа спинная

Рисунок 18 (лист 3 из 3)

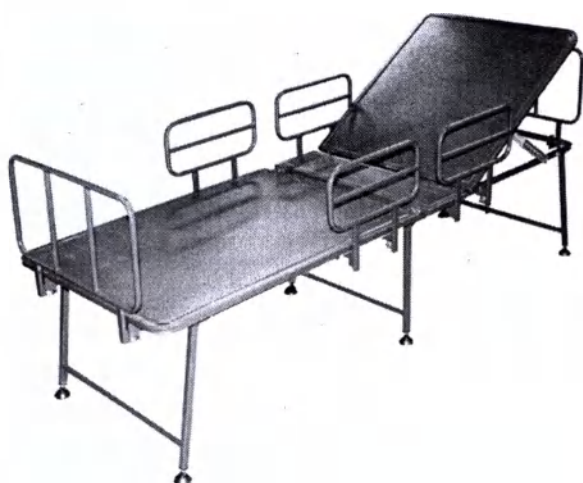

Кровать реанимационная складная КР-03

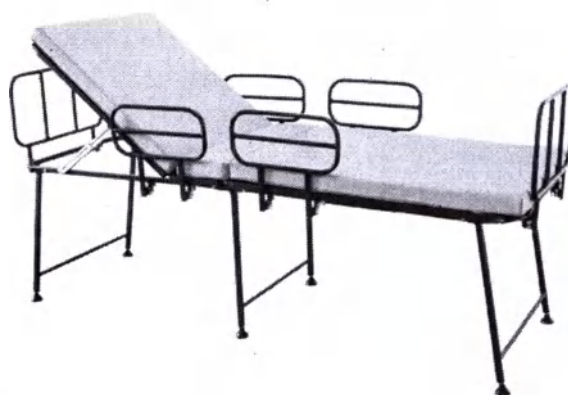

Кровать реанимационная складная КР-03.1

Рисунок 19 – Кровать в рабочем положении

IV; V – установить спинки (14) и ограждения (15) в рабочее положение (А – рисунок 10):

Для кроватей с фиксатором с флажком:

- поочередно, для каждой спинки (14)/каждого ограждения (15), приподнять флажок фиксатора (6), выведя его из канавки, расположенной на оси вращения (7), сдвинуть спинку (14)/ограждение (15) до упора влево – привести спинку (14)/ограждение (15) в вертикальное (рабочее) положение, повернув вокруг оси (7) на 270 градусов до совпадения штырька (8), установленного на пластине спинки/ограждения, с отверстием в пластине рамы, сдвинуть спинку (14)/ограждение (15) вправо и опустить фиксатор (6) в канавку оси вращения (7);

Для кроватей с пружинным фиксатором:

- поочередно, оттянув шток пружинного фиксатора (6) каждой спинки (14)/каждого ограждения (15) – привести спинку (14)/ограждение (15) в вертикальное (рабочее) положение и застопорить в рабочем положении фиксатором (6);

- проверить устойчивость кровати, отрегулировав при необходимости высоту шарнирных опор (5).

VI – для установки необходимого угла наклона (45...40...35...30...20...20...15...0) ° секции ложа спинной (10) и угла наклона (37...30...25...20...15...10...0) ° секции ложа ножной (11) – поднять секцию вручную до требуемого (фиксированного) положения.

Для изменения угла наклона секций ложа (10, 11) необходимо поднять секцию до крайнего верхнего положения, опустить ее до горизонтального положения и вновь поднять на нужную высоту.

Для перевода секций ложа (10, 11) в горизонтальное положение необходимо поднять секцию до крайнего верхнего положения и плавно опустить до горизонтального положения.

Кровать в рабочем положении приведена на рисунке 21.

5.3 Перевод кровати из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- привести секции ложа спинную (10) и ножную (11) в горизонтальное положение;
- сложить ограждения (15) и спинки (14):

Для кроватей с фиксаторами с флажками:


- поочередно, для каждого ограждения (15)/каждой спинки (14), приподнять флажок фиксатора (6), выведя его из канавки, расположенной на оси вращения (7), сдвинуть ограждение (15)/спинку (14) до упора вправо привести ограждение (15)/спинку (14) в горизонтальное (сложенное) положение, повернув вокруг оси (7) на 270 градусов под раму (1) до совпадения штырька (8), установленного на пластине ограждения/спинки, с отверстием в пластине рамы, сдвинуть ограждение (15)/спинку (14) влево и опустить фиксатор (6) в канавку оси вращения (7).

Для кроватей с пружинными фиксаторами:

- поочередно, оттянув шток фиксатора (6) каждого ограждения (15)/спинки (14) – опустить ограждение (15)/спинку (14) в горизонтальное положение под раму (1) и застопорить фиксатором (6);


Ослабить ручки-фиксаторы (9);

- опоры крайние (3) сложить под раму (1);
- повернуть части рамы (1) в положение параллельно опоры средней (2);
- кровать в сложенном виде зафиксировать ремнями (4);
- уложить кровать в сумку транспортировочную.

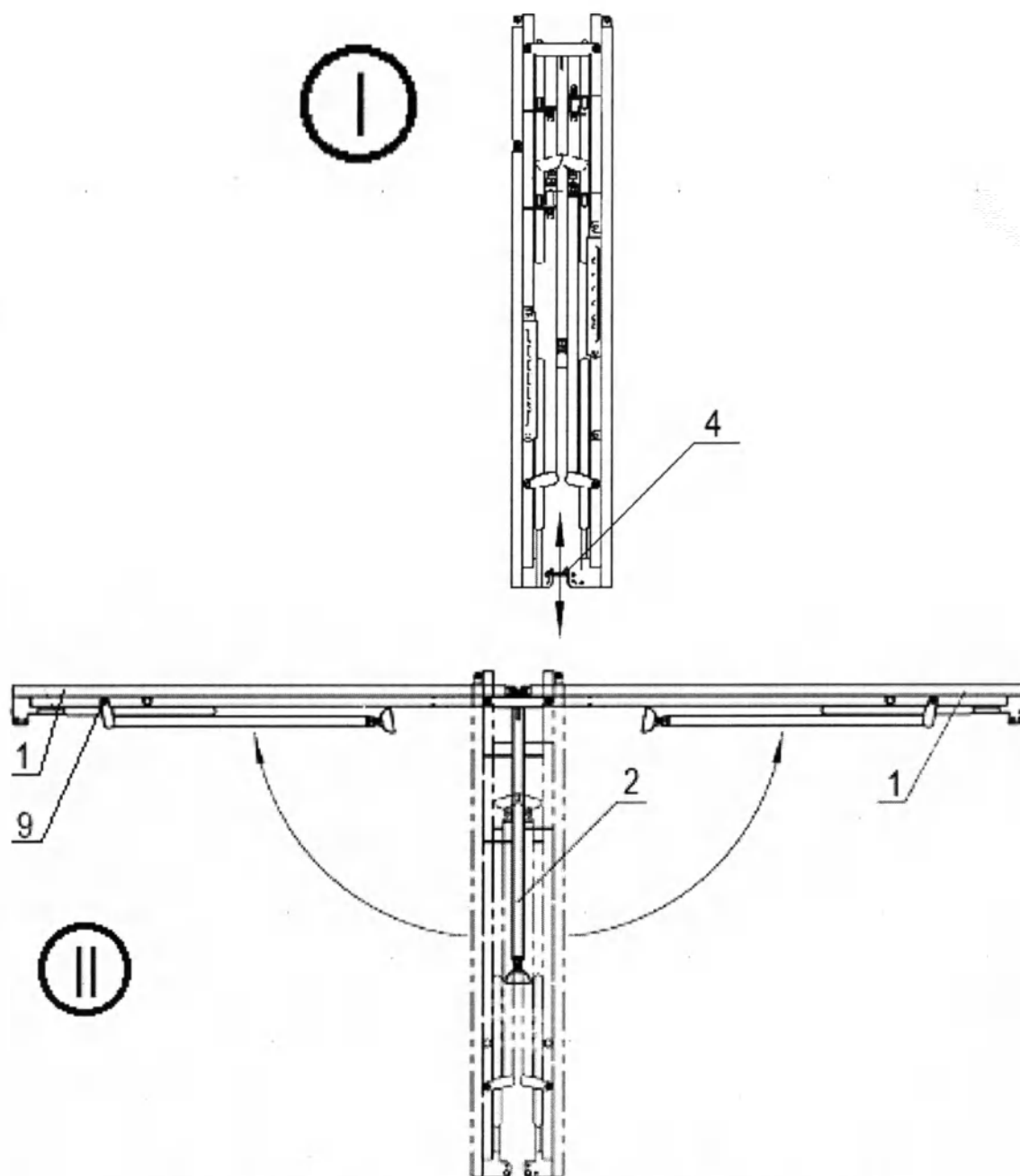


1 – рама; 2 – опора средняя; 4 – ремень; 9 – ручка-фиксатор

Рисунок 20 (лист 1 из 3)

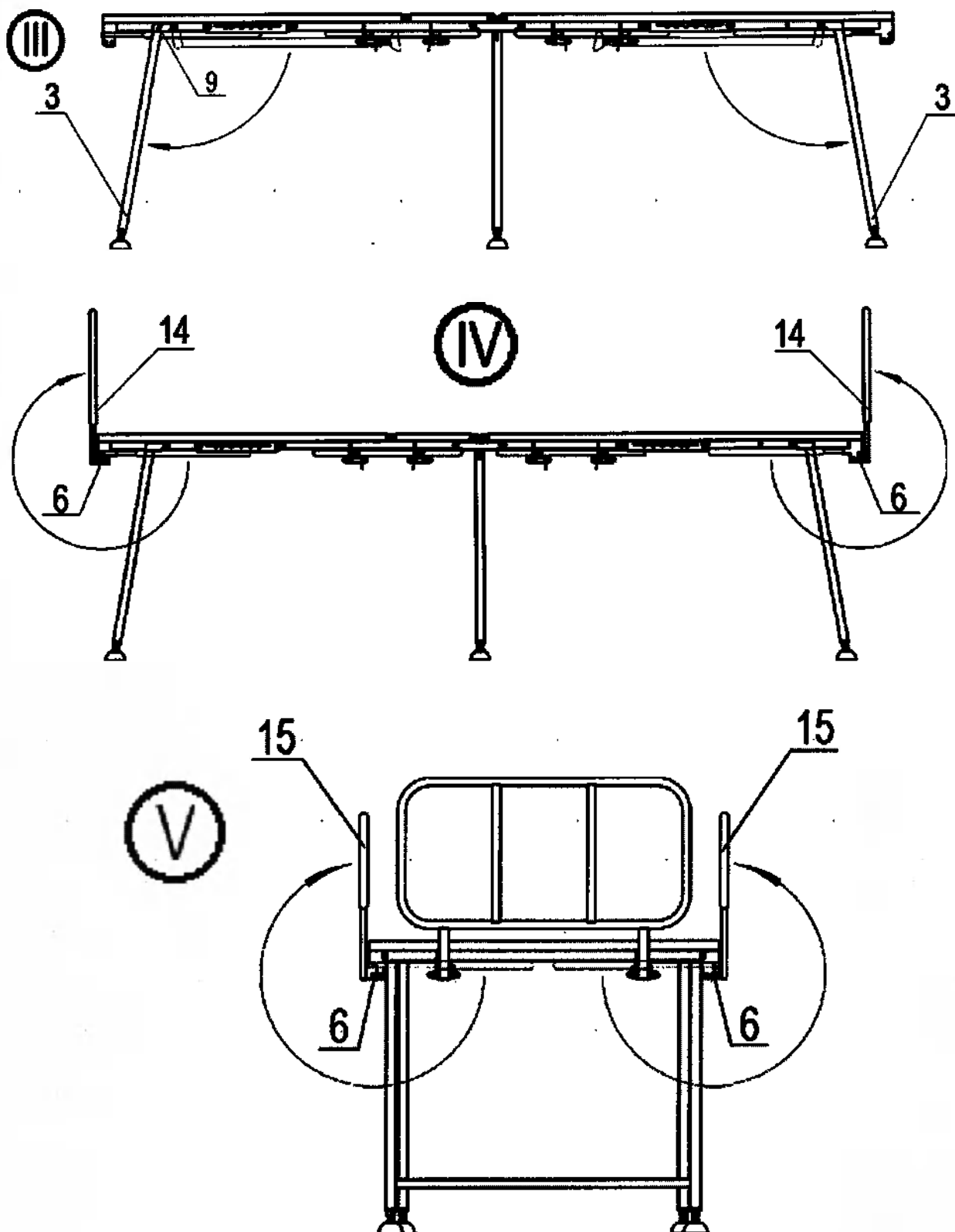

3 – опора крайняя; 6 – фиксатор с флажком/фиксатор пружинный; 9 – ручка-фиксатор;
 14 – спинка; 15 – ограждение

Рисунок 20 (лист 2 из 3)

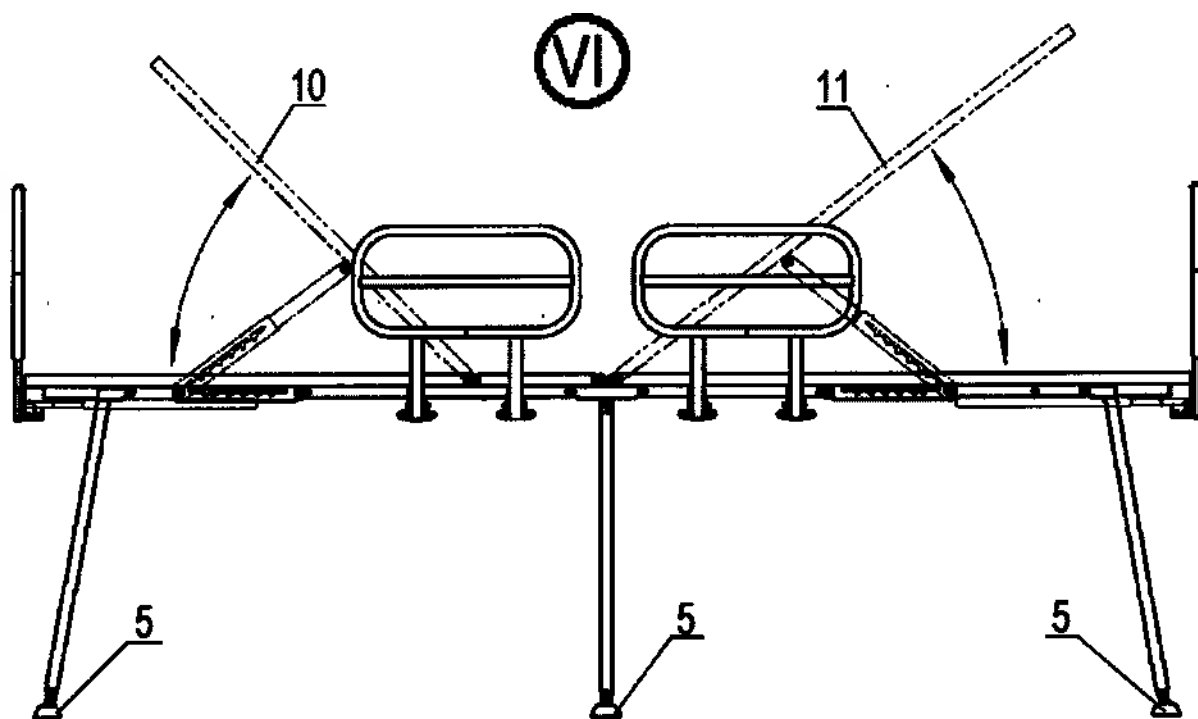

5 – опора шарнирная; 10 – секция ложа спинная; 11 – секция ложа ножная

Рисунок 20 (лист 3 из 3)



Кровать функциональная складная КФ-01



Кровать функциональная складная КФ-01.1

Рисунок 21 – Кровать в рабочем положении



ВНИМАНИЕ:

При переводе кроватей в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления.

5 Меры безопасности

- 5.1 Кровати в зависимости от степени потенциального риска применения относятся к классу 1 согласно ГОСТ 31508 и Приказу МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г.
- 5.2 Кровати предназначены для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации. При работе с кроватями соблюдайте правила транспортировки пациента, принятые в медицине.
- 5.3 Перед началом работы с изделиями внимательно ознакомьтесь с настоящим РЭ.
- 5.4 Медицинские работники должны работать в перчатках.
- 5.5 При транспортировке кроватей и работе с ними избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделий.
- 5.6 Не нагружайте кровать более, чем на 250 кг.
- 5.7 Производите дезинфекцию изделий в соответствии с пунктом 7.1 настоящего РЭ.
- 5.8 Убирайте изделия в сумки только после их обработки и сушки.

6 Указания по эксплуатации

- 6.1 При эксплуатации кроватей должны соблюдаться правила безопасности, изложенные в разделе 5 настоящего РЭ.
- 6.2 К эксплуатации допускаются медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.
- 6.3 При эксплуатации кровати необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.
- 6.4 Медицинские работники должны работать в перчатках, в соответствии с СанПиН 2.1.3678.

Запрещается:



- Эксплуатировать кровати без ознакомления с эксплуатационной документацией;
- Использовать кровати не по назначению.

7 Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.
- 7.2 Перед применением изделий должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий.
- 7.3 Дезинфекция осуществляется химическим методом по МУ-287-113 путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177 с 0,5% добавлением моющего средства ГОСТ 25644. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки поверхностей не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции изделия необходимо тщательно просушить.

8 Транспортирование и хранение

- 8.1 Транспортирование кроватей может производиться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.2 Условия транспортирования кроватей в части воздействия климатических факторов, по ГОСТ Р 50444, должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

8.3 Кровати могут храниться на складах по ГОСТ Р 50444, условия хранения 2 по ГОСТ 15150. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован).

8.4 При хранении кроватей допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

9.1 При маркировании кроватей и матрасов (на изделия, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 5.

Таблица 5

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
	Код партии (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		Изготовитель (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		Дата изготовления (ГОСТ Р ИСО 15223-1)
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)			Диапазон влажности. Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)	
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны. (ГОСТ Р ИСО 15223-1)				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги (ГОСТ 14192)		Верх Указывает правильное вертикальное положение груза (ГОСТ 14192)		Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом (ГОСТ 14192)
					Предел по количеству ярусов в штабеле Штабелировать не более 2 ярусов (ГОСТ 14192)

9.2 Внешний вид маркировки кроватей приведен на рисунке 22.

9.3 Внешний вид маркировки матрасов приведен на рисунке 23.

9.4 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 24.

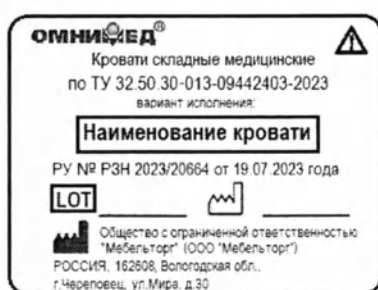


Рисунок 22

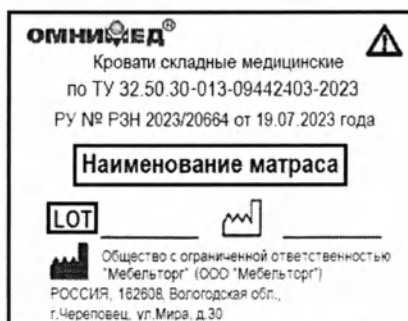


Рисунок 23



Рисунок 24

9.5 Внешний вид маркировки на сумке транспортировочной приведен на рисунке 25.

ОМНИМЕД®		Кровати складные медицинские по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023 вариант исполнения:			
Наименование изделия					
Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20664 от 19.07.2023 года					
Условия транспортирования +50°C -50°C 		Условия хранения +40°C -50°C 		 	
Масса _____ кг		Штамп ОТК		LOT _____	
Число изделий _____ шт.				_____	
Дата упаковывания _____					
		Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг») РОССИЯ, 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30 Тел.: 8 (8202) 54-10-54			

Рисунок 25

10 Упаковка

- 10.1 В качестве упаковки используются сумки транспортировочные, изготовленные в соответствии с комплектом конструкторской документации (таблица 1).
- 10.2 Изделия помещаются в сумки транспортировочные
- 10.3 Каждая сумка имеет ярлык (рисунок 23), на котором указаны:
- наименование предприятия-изготовителя;
 - адрес и номер телефона предприятия-изготовителя;
 - товарный знак уполномоченного представителя производителя;
 - обозначение технических условий;
 - наименование изделия;
 - номер регистрационного удостоверения;
 - масса;
 - число изделий в упаковке;
 - месяц и год упаковывания;
 - штамп ОТК;
 - знаки и символы, приведенные в таблице 5.

11 Утилизация

- 11.1 Кровати не содержат в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.
- 11.2 При нормальной эксплуатации кровати не оказывают негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе кровати не содержат драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.
- 11.3 Утилизация кроватей осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Кровати после окончания использования могут утилизироваться как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов.
- 11.4 Неиспользованные Кровати специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Кровати не взрывоопасны, не способны самовозгораться, при поднесении открытого огня горят без взрыва.

12 Гарантии изготовителя

- 12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
- 12.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 12.3 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
- 12.4 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.
- 12.5 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.
- 12.6 Гарантийные требования реализуются при предъявлении эксплуатационной документации, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.
- 12.7 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

13 Послегарантийное техническое обслуживание

- 13.1 Послегарантийное техническое обслуживание проводится производителем или обслуживающими организациями, уполномоченными на это производителем (имеющими письменное разрешение).

Приложение А
(справочное)

Перечень ссылочных документов

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
Приказ МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ТУ 32.50.30-013-09442403-2023	Кровати складные медицинские. Технические условия

Приложение Б

(справочное)

Устройство и внешний вид изделий

Б.1 Устройство и внешний вид кроватей приведены на рисунках Б.1 – Б.10.

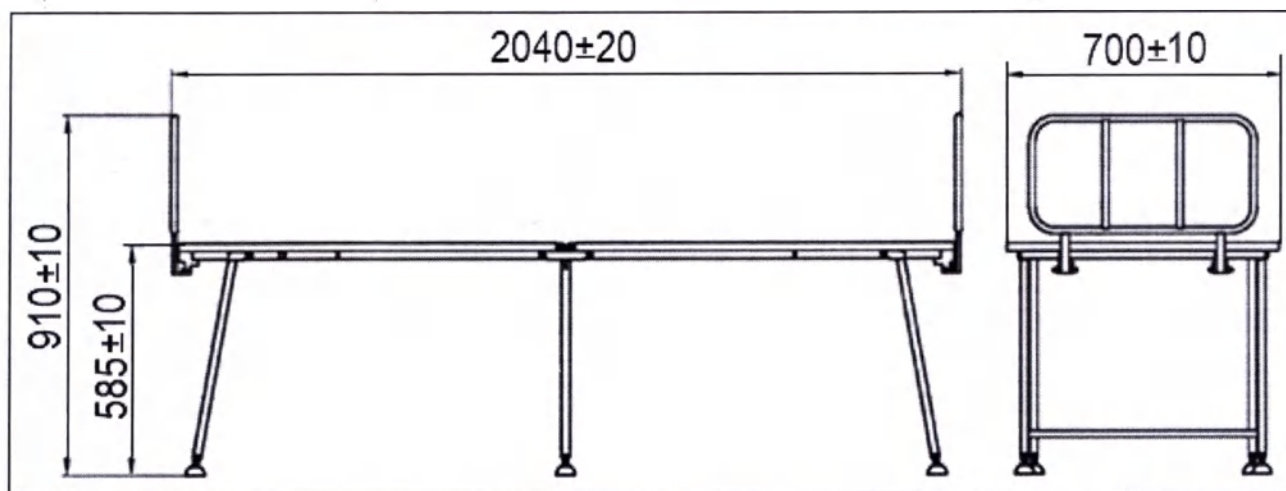


Рисунок Б.1

Кровать госпитальная складная КГ-01 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942811.001

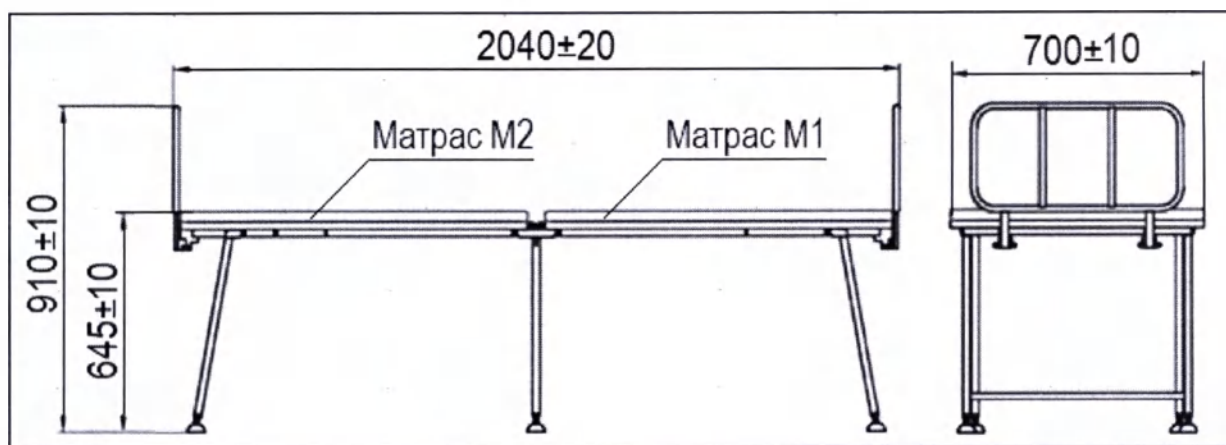


Рисунок Б.2

Кровать госпитальная складная КГ-01.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942811.001-01

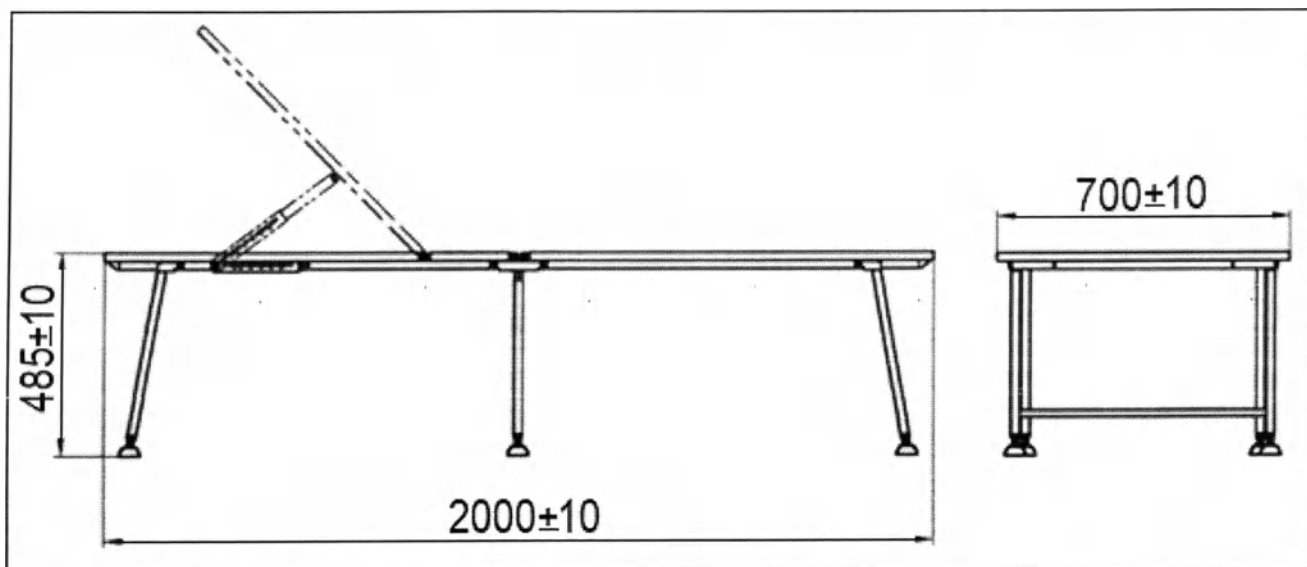


Рисунок Б.3

Кровать реанимационная складная КР-01 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942811.002

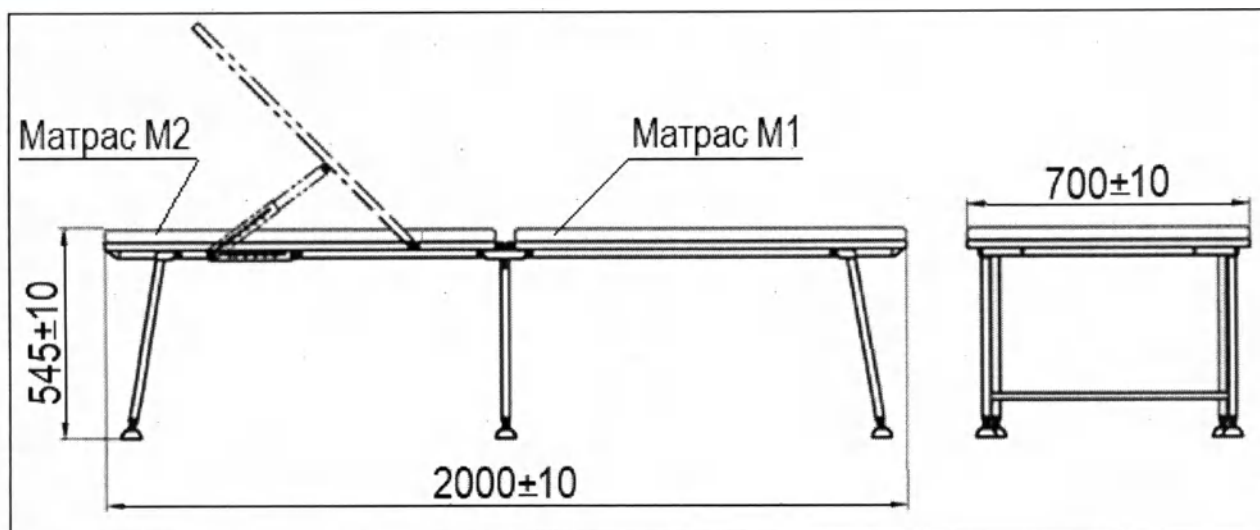


Рисунок Б.4

Кровать реанимационная складная КР-01.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942811.002-01

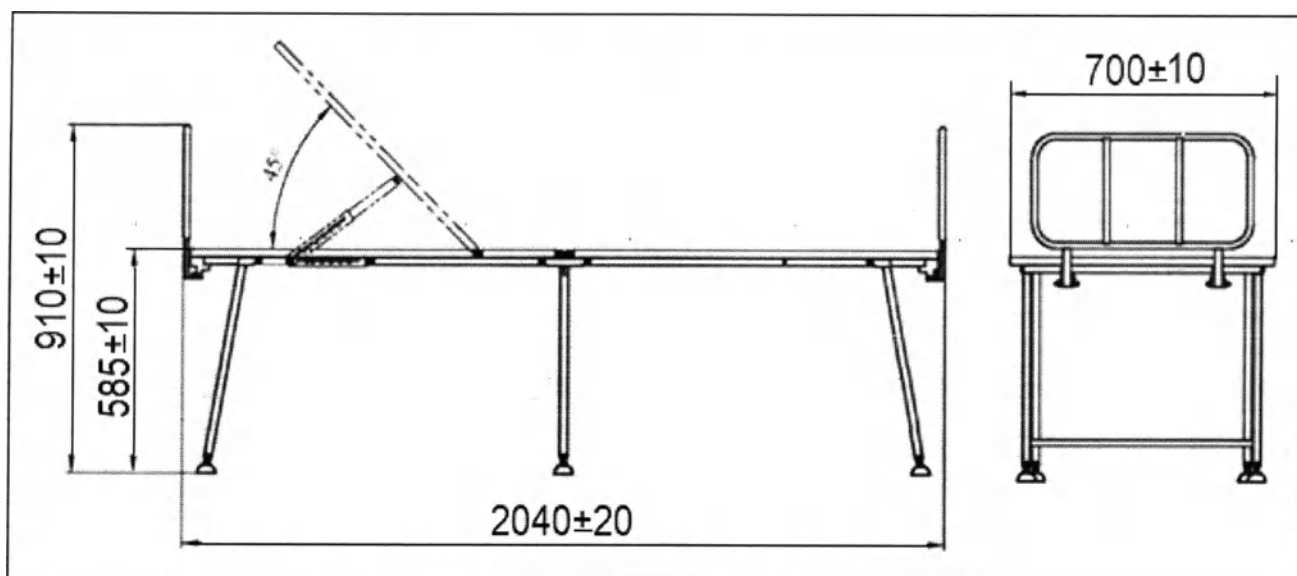


Рисунок Б.5

Кровать реанимационная складная КР-02 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942811.003

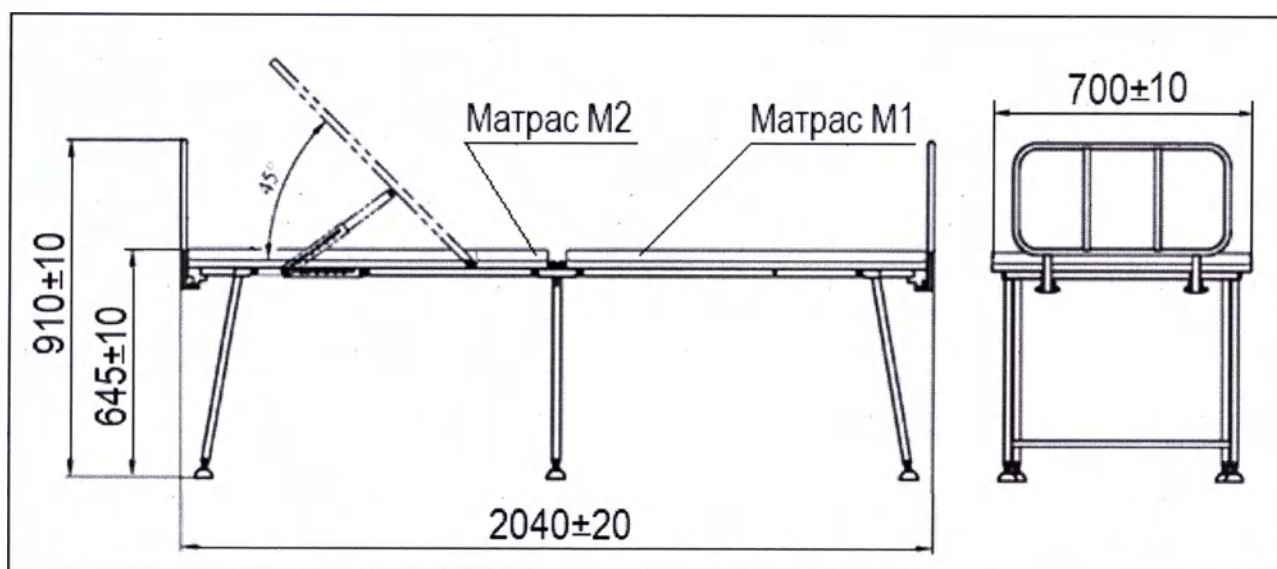


Рисунок Б.6

Кровать реанимационная складная КР-02.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942811.003-01

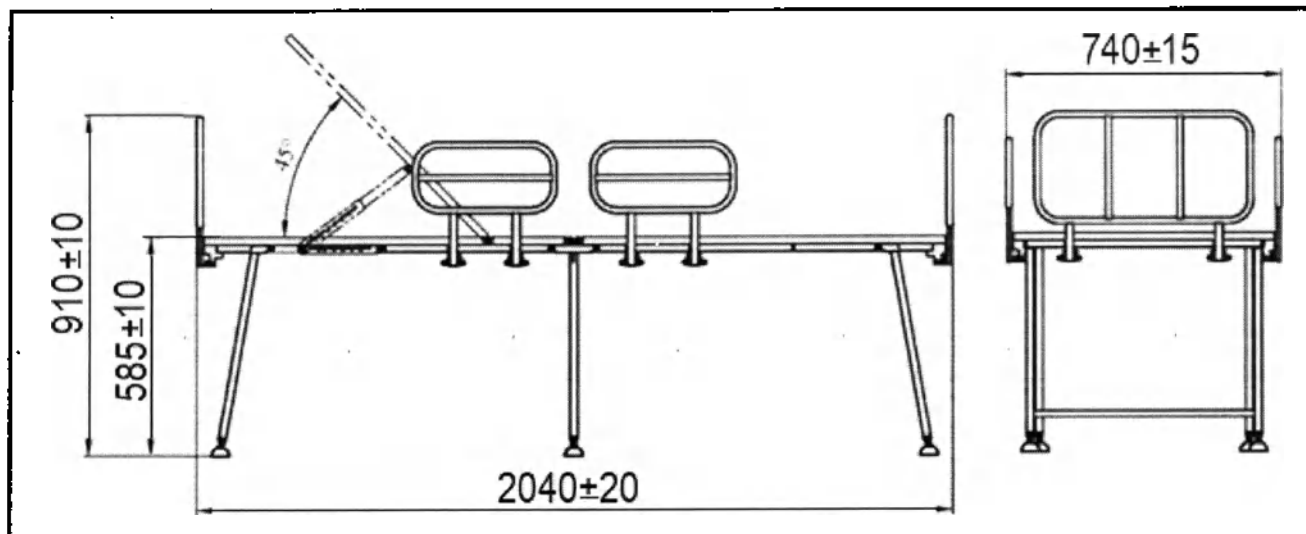


Рисунок Б.7

**Кровать реанимационная складная КР-03 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942811.004**

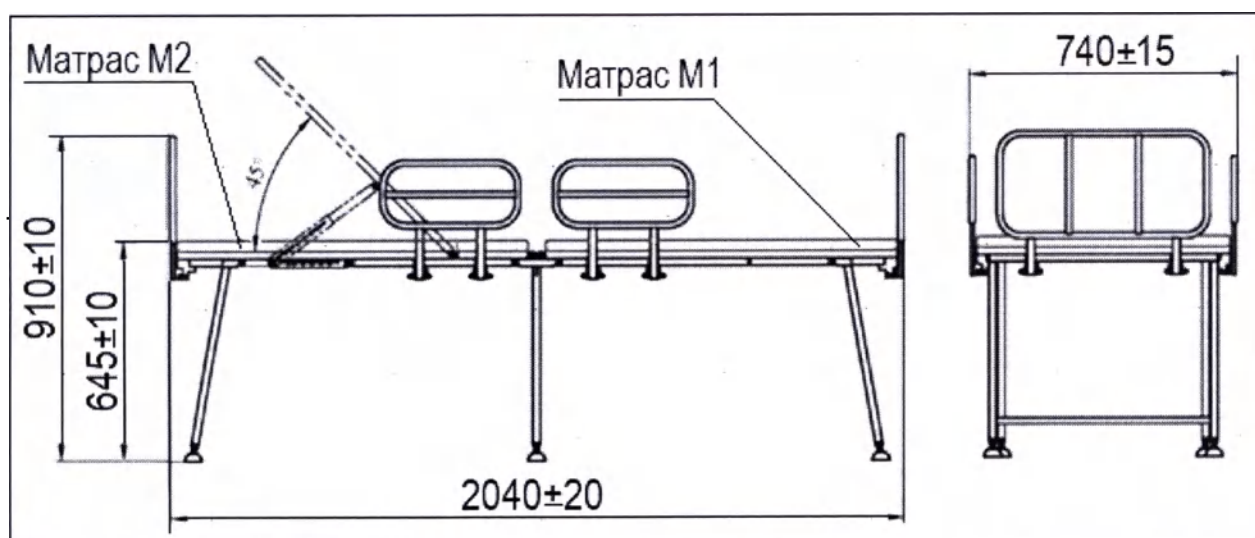


Рисунок Б.8

**Кровать реанимационная складная КР-03.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942811.004-01**

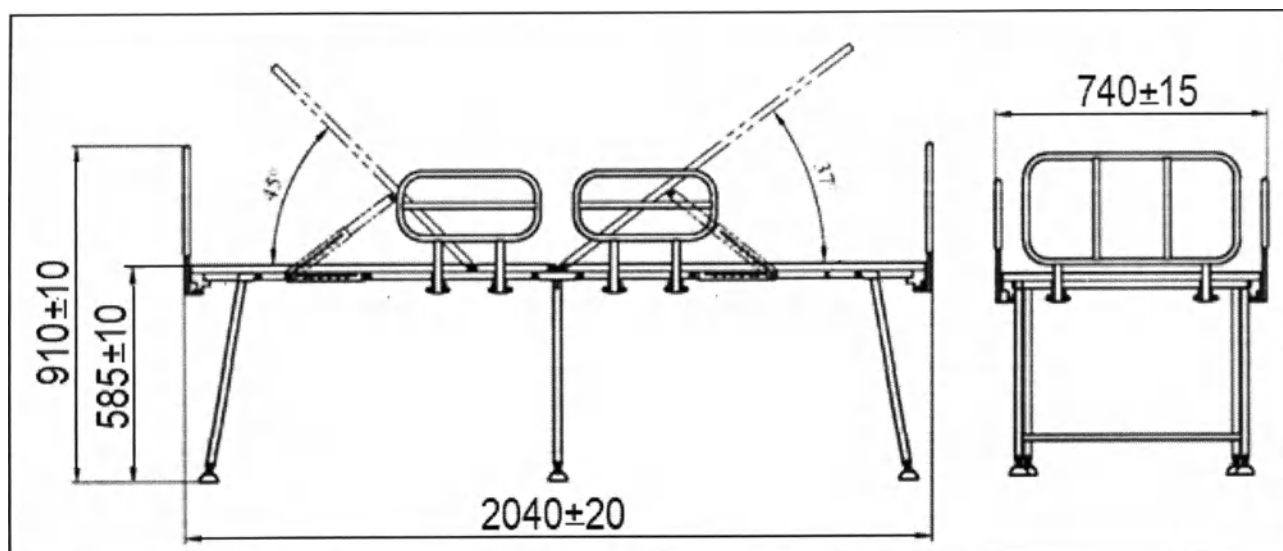


Рисунок Б.9

Кровать функциональная складная КФ-01 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942855.001

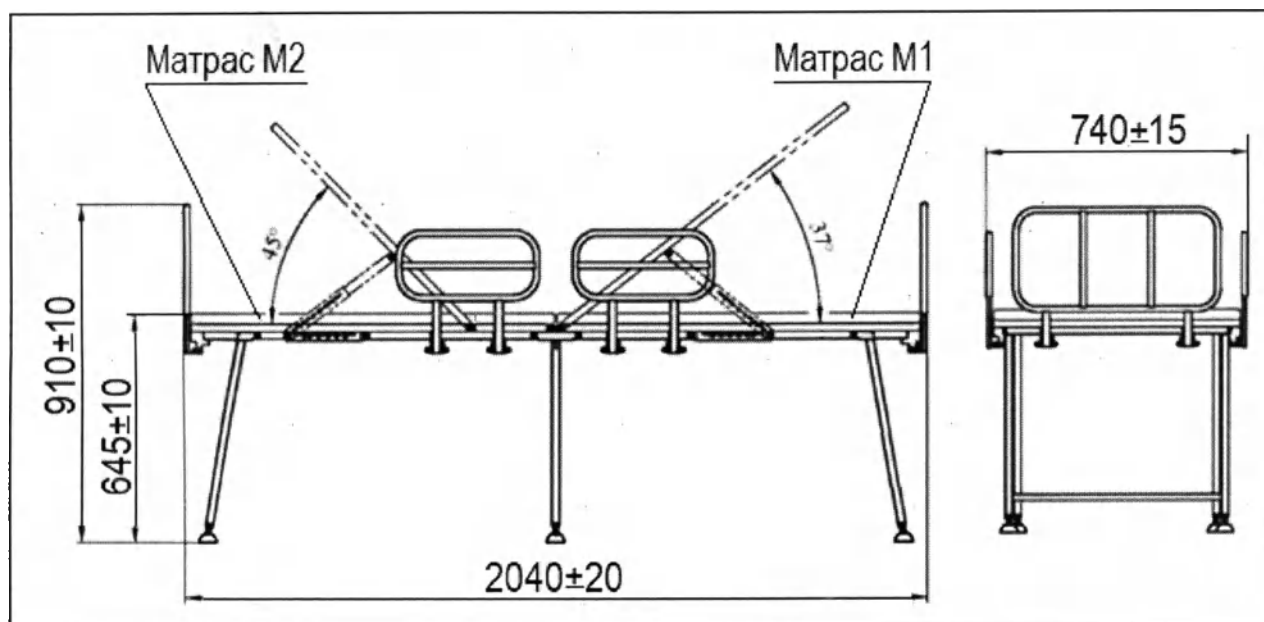


Рисунок Б.10

Кровать функциональная складная КФ-01.1 по ТУ 32.50.30-013-09442403-2023
БВТГ 942855.001-01

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 48 листов.
Генеральный директор
ООО «Смимел-НН»


А.В. Лаврентьев

