

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ДОКТОР МЕБЕЛЬ»

Смолькина М.С.

2023 г.



СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ

по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021

в вариантах исполнения

Руководство по эксплуатации

ДМ.69573749.009.РЭ

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	28
3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	29
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	31
5 УТИЛИЗАЦИЯ	34
6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ	35
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	36
8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	37
9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	36
ПРИЛОЖЕНИЕ А	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	38
ПРИЛОЖЕНИЕ В	39
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	41
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	48
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	51

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 в вариантах исполнения» (далее по тексту – стол), предназначенный для размещения лекарственных препаратов, медицинских инструментов, медицинского оборудования, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Назначение стола: Для размещения лекарственных препаратов, медицинских инструментов, медицинского оборудования, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения.

Область применения: Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например, помещение для ректороманоскопии (колоноскопии), процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии, перевязочный кабинет, малая операционная и операционной).

Стол предназначен для использования квалифицированным медицинским и лабораторным персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Показания к применению стола:

Для размещения и перемещения лекарственных средств, расходных материалов, медицинских инструментов, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения.

Противопоказания к применению стола: Не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением стола по назначению: Не выявлены.

Риски применения стола: Анализ рисков применения был произведен ООО «Доктор мебель» в полном объеме и представлен в Файле менеджмента риска. Меры по снижению рисков применения стола приведены в мерах предосторожности.

Стол выпускается в ряде конструктивных вариантов, в сериях ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3, ДМ-6 в зависимости от используемых материалов.

Столы ДМ-х-106 выпускаются в сериях ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3, ДМ-6, представляют собой жесткую каркасную конструкцию со столешницей и /или ящиками выдвижными и/или полками и/или распашными дверями. Столы серий ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3, ДМ-6 оснащены опорами регулируемые неподвижными. Стол артикула ДМ-6-106-47 оснащен опорами колесными. Столы ДМ-1-106-01, ДМ-1-106-02, ДМ-1-106-03, ДМ-1-106-04, ДМ-1-106-05, ДМ-1-106-06, ДМ-1-106-07, ДМ-1-106-08, ДМ-1-106-09, ДМ-1-106-10, ДМ-2-106-01, ДМ-2-106-02, ДМ-2-106-03, ДМ-2-106-04, ДМ-2-106-05, ДМ-2-106-06, ДМ-2-106-07, ДМ-2-106-08, ДМ-2-106-09, ДМ-2-106-10, ДМ-3-106-01, ДМ-3-106-02, ДМ-3-106-03, ДМ-3-106-07 и ДМ-3-106-09, выпускаются без тумб. Столы ДМ-1-106-11, ДМ-1-106-12, ДМ-1-106-13, ДМ-1-106-14, ДМ-1-106-15, ДМ-1-106-16, ДМ-1-106-17, ДМ-1-106-18, ДМ-1-106-19, ДМ-1-106-20, ДМ-1-106-21, ДМ-1-106-22, ДМ-2-106-11, ДМ-2-106-12, ДМ-2-106-13, ДМ-2-106-14, ДМ-2-106-15, ДМ-2-106-16, ДМ-2-106-17, ДМ-2-106-18, ДМ-2-106-19, ДМ-2-106-20, ДМ-2-106-21, ДМ-2-106-22, ДМ-3-106-11, ДМ-3-106-13, ДМ-3-106-15, ДМ-3-106-17, ДМ-3-106-19, ДМ-3-106-21 выпускаются с одной встроенной тумбой. Столы ДМ-1-106-23, ДМ-1-106-24, ДМ-1-106-25, ДМ-1-106-26, ДМ-1-106-27, ДМ-1-106-28, ДМ-2-106-23, ДМ-2-106-24, ДМ-2-106-25, ДМ-2-106-26, ДМ-2-106-27, ДМ-2-106-28, ДМ-3-106-23, ДМ-3-106-25, ДМ-3-106-27 выпускаются с двумя встроенными тумбами. Столы ДМ-1-106-29, ДМ-1-106-30, ДМ-1-106-31, ДМ-1-106-32, ДМ-1-106-33, ДМ-1-106-34, ДМ-2-106-29, ДМ-2-106-30, ДМ-2-106-31, ДМ-2-106-32, ДМ-2-106-33, ДМ-2-106-34, ДМ-3-106-29, ДМ-3-106-31, ДМ-3-106-33 выпускаются с тремя встроенными тумбами.

Окончательное наполнение и конструктивное исполнение варианта исполнения стола определяет заказчик из ассортимента в соответствии с артикулом, формируемого согласно приложению Б.

Стол является неинвазивным медицинским изделием и не контактирует с телом человека.

Перечень документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Принцип формирования артикулов для конкретизированного заказа стола приведен в Приложении Б.

Материалы, используемые при изготовлении стола одной серии, и обозначение серии для формирования артикула конкретизированного заказа приведены в Приложении В.

Внешний вид вариантов исполнения стола приведен в Приложении Г.

Список вариантов исполнения стола приведен в Приложении Д.

Расшифровка символов приведена в Приложении Е.

Для записи обозначения стола при заказе и/или в документации указывают название изделия, артикул, сформированный согласно приложению Б.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Внешний вид стола приведен в Приложении Г. Корпус изготавливается серого цвета. Наружная сторона дверей распашных и фасадов ящиков выдвижных изготавливается зеленого, оранжевого, голубого или синего цвета.

1.1.2 Количество полок, ящиков выдвижных, функциональные размеры стола приведены ниже. Допустимое отклонение линейных размеров ± 4 мм.

Стол ДМ-1-106-01, ДМ-2-106-01:

Столешница размером по ширине и глубине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-02, ДМ-2-106-02:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-03, ДМ-2-106-03:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-04, ДМ-2-106-04:

Столешница размером по ширине и глубине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-05, ДМ-2-106-05:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-06, ДМ-2-106-06:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-07, ДМ-2-106-07:

Столешница размером по ширине и глубине 1584 мм х 1254 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-08, ДМ-2-106-08:

Столешница размером по ширине и глубине 1584 мм х 1254 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-09, ДМ-2-106-09:

Столешница размером по ширине и глубине 1254 мм х 1584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-10, ДМ-2-106-10:

Столешница размером по ширине и глубине 1254 мм х 1584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-11, ДМ-1-106-17, ДМ-2-106-11, ДМ-2-106-17:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 560мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 286 мм.

Высота отделения над полкой 260 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-12, ДМ-1-106-18, ДМ-2-106-12, ДМ-2-106-18:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 660мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 330 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-13, ДМ-1-106-19, ДМ-2-106-13, ДМ-2-106-19:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 214 мм.

Высота отделения над полкой 214 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 432мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-14, ДМ-1-106-20, ДМ-2-106-14, ДМ-2-106-20:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 264 мм.

Высота отделения над полкой 264 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70 мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346мм х 532мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-15, ДМ-1-106-21, ДМ-2-106-15, ДМ-2-106-21:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 3 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-16, ДМ-1-106-22, ДМ-2-106-16, ДМ-2-106-22:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 151мм – 3 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-23, ДМ-2-106-23:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 560мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 278 мм.

Высота отделения над полкой 278 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-24, ДМ-2-106-24:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 660мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 328 мм.

Высота отделения над полкой 328 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-25, ДМ-2-106-25:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 214 мм.

Высота отделения над полкой 214 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 432мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-26, ДМ-2-106-26:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 264 мм.

Высота отделения над полкой 264 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70 мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346мм x 532мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-27, ДМ-2-106-27:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм x 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм x 426 мм x 102 мм – 6 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-28, ДМ-2-106-28:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм x 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм x 426 мм x 151мм – 6 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-29, ДМ-2-106-29:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм x 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм x 470 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм x 560мм – 3 шт.

Высота отделения под полкой 286 мм.

Высота отделения над полкой 260 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-30, ДМ-2-106-30:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм x 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм x 470 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм x 660мм – 3 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 330 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-31, ДМ-2-106-31:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 214 мм.

Высота отделения над полкой 214 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 319 мм х 447 мм х 70мм – 2 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 432мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-32, ДМ-2-106-32:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 264 мм.

Высота отделения над полкой 264 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 2 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 307 мм х 425 мм х 147 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 532мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-33, ДМ-2-106-33:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 9 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-34, ДМ-2-106-34:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 151мм – 9 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-3-106-01:

Столешница размером по ширине и глубине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-02:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-03:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-07:

Столешница размером по ширине и глубине 1584 мм х 1284 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-09:

Столешница размером по ширине и глубине 1284 мм х 1584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-11. ДМ-3-106-17:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 580мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 284 мм.

Высота отделения над полкой 284 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-13, ДМ-3-106-19:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 220 мм.

Высота отделения над полкой 220 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 450мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-15, ДМ-3-106-21:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 3 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-23:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 560мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 284 мм.

Высота отделения над полкой 284 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-25:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 220 мм.

Высота отделения над полкой 220 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 450 мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-27:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 6 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-29:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 580мм – 3 шт.

Высота отделения под полкой 284 мм.

Высота отделения над полкой 284 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-31:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 220 мм.

Высота отделения над полкой 220 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 2 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 450мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-33:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм x 426 мм x 102 мм – 9 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-6-106-05:

Столешница размером по ширине и глубине 1086 мм x 643 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик высотой 70 мм – 3 шт

Стол ДМ-6-106-06:

Столешница размером по ширине и глубине 1686 мм x 643 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик высотой 70 мм – 3 шт

Стол ДМ-6-106-17:

Столешница размером по ширине и глубине 800 мм x 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 730 мм x 480 мм – 1шт.

Стол ДМ-6-106-19:

Столешница размером по ширине и глубине 1000 мм x 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 930 мм x 480 мм – 1шт.

Стол ДМ-6-106-21:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм x 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 1130 мм x 480 мм – 1шт.

Стол ДМ-6-106-23:

Столешница размером по ширине и глубине 1400 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 1330 мм х 480 мм – 1шт.

Стол ДМ-6-106-25:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 1430 мм х 480 мм – 1шт.

Стол ДМ-6-106-37:

Столешница размером по ширине и глубине 800 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Стол ДМ-6-106-39:

Столешница размером по ширине и глубине 1000 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Стол ДМ-6-106-41:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Стол ДМ-6-106-43:

Столешница размером по ширине и глубине 1400 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Стол ДМ-6-106-45:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Стол ДМ-6-106-47:

Столешница размером по ширине и глубине 1900 мм х 550 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 870 мм.

Допустимое отклонение линейных размеров в п. 1.1.3 ± 4 мм, отклонение размеров между полками ± 12 мм.

1.1.3 Габаритные размеры и масса мебели в сборе приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Габаритные размеры, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса, кг, $\pm 10\%$
Стол серии ДМ-1-106		
ДМ-1-106-01	900 х 600 х 820	34,4
ДМ-1-106-02	1200 х 600 х 820	37,2
ДМ-1-106-03	1500 х 600 х 820	44,3
ДМ-1-106-04	900 х 600 х 920	32,5
ДМ-1-106-05	1200 х 600 х 920	39,9
ДМ-1-106-06	1500 х 600 х 920	47,4
ДМ-1-106-07	1600 х 1270 х 820	83,3
ДМ-1-106-08	1600 х 1270 х 920	71,1
ДМ-1-106-09	1270 х 1600 х 820	83,3
ДМ-1-106-10	1270 х 1600 х 920	83,3
ДМ-1-106-11	1200 х 600 х 820	51,2
ДМ-1-106-12	1200 х 600 х 920	58,7
ДМ-1-106-13	1200 х 600 х 820	55
ДМ-1-106-14	1200 х 600 х 920	58,9
ДМ-1-106-15	1200 х 600 х 820	59,5
ДМ-1-106-16	1200 х 600 х 920	64,9

Артикул	Габаритные размеры, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса, кг, ± 10%
ДМ-1-106-17	1200 x 600 x 820	51,2
ДМ-1-106-18	1200 x 600 x 920	55,1
ДМ-1-106-19	1200 x 600 x 820	55
ДМ-1-106-20	1200 x 600 x 920	58,9
ДМ-1-106-21	1200 x 600 x 820	59,5
ДМ-1-106-22	1200 x 600 x 920	64,9
ДМ-1-106-23	1500 x 600 x 820	67
ДМ-1-106-24	1500 x 600 x 920	71,6
ДМ-1-106-25	1500 x 600 x 820	75
ДМ-1-106-26	1500 x 600 x 920	80
ДМ-1-106-27	1500 x 600 x 820	84
ДМ-1-106-28	1500 x 600 x 920	92
ДМ-1-106-29	2700 x 600 x 820	108
ДМ-1-106-30	2700 x 600 x 920	115
ДМ-1-106-31	2700 x 600 x 820	124
ДМ-1-106-32	2700 x 600 x 920	132
ДМ-1-106-33	2700 x 600 x 820	133
ДМ-1-106-34	2700 x 600 x 920	144
Стол серии ДМ-2-106		
ДМ-2-106-01	900 x 600 x 820	23,6
ДМ-2-106-02	1200 x 600 x 820	28,7
ДМ-2-106-03	1500 x 600 x 820	33,8
ДМ-2-106-04	900 x 600 x 920	25,8
ДМ-2-106-05	1200 x 600 x 920	31,2
ДМ-2-106-06	1500 x 600 x 920	36,6
ДМ-2-106-07	1600 x 1270 x 820	65
ДМ-2-106-08	1600 x 1270 x 920	65
ДМ-2-106-09	1270 x 1600 x 820	65
ДМ-2-106-10	1270 x 1600 x 920	65
ДМ-2-106-11	1200 x 600 x 820	40,9
ДМ-2-106-12	1200 x 600 x 920	44,7
ДМ-2-106-13	1200 x 600 x 820	44,4
ДМ-2-106-14	1200 x 600 x 920	48,2

Артикул	Габаритные размеры, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса, кг, ± 10%
ДМ-2-106-15	1200 x 600 x 820	50,3
ДМ-2-106-16	1200 x 600 x 920	55,5
ДМ-2-106-17	1200 x 600 x 820	40,9
ДМ-2-106-18	1200 x 600 x 920	44,7
ДМ-2-106-19	1200 x 600 x 820	44,4
ДМ-2-106-20	1200 x 600 x 920	48,2
ДМ-2-106-21	1200 x 600 x 820	50,3
ДМ-2-106-22	1200 x 600 x 920	62,9
ДМ-2-106-23	1500 x 600 x 820	54
ДМ-2-106-24	1500 x 600 x 920	58
ДМ-2-106-25	1500 x 600 x 820	61
ДМ-2-106-26	1500 x 600 x 920	65
ДМ-2-106-27	1500 x 600 x 820	72
ДМ-2-106-28	1500 x 600 x 920	80
ДМ-2-106-29	2700 x 600 x 820	85
ДМ-2-106-30	2700 x 600 x 920	91
ДМ-2-106-31	2700 x 600 x 820	119
ДМ-2-106-32	2700 x 600 x 920	121
ДМ-2-106-33	2700 x 600 x 820	112
ДМ-2-106-34	2700 x 600 x 920	123
Стол серии ДМ-3-106		
ДМ-3-106-01	900 x 600 x 820	22,6
ДМ-3-106-02	1200 x 600 x 820	26,8
ДМ-3-106-03	1500 x 600 x 820	30,9
ДМ-3-106-07	1600 x 1300 x 820	53,4
ДМ-3-106-09	1300 x 1600 x 820	53,4
ДМ-3-106-11	1200 x 600 x 820	38,2
ДМ-3-106-13	1200 x 600 x 820	41,7
ДМ-3-106-15	1200 x 600 x 820	47,6
ДМ-3-106-17	1200 x 600 x 820	38,2
ДМ-3-106-19	1200 x 600 x 820	41,7
ДМ-3-106-21	1200 x 600 x 820	47,6
ДМ-3-106-23	1500 x 600 x 820	52

Артикул	Габаритные размеры, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса, кг, ± 10%
ДМ-3-106-25	1500 x 600 x 820	59
ДМ-3-106-27	1500 x 600 x 820	71
ДМ-3-106-29	2700 x 600 x 820	82
ДМ-3-106-31	2700 x 600 x 820	98
ДМ-3-106-33	2700 x 600 x 820	110
Стол серии ДМ-6		
ДМ-6-106-05	1100x650x920	32
ДМ-6-106-06	1700x650x920	45
ДМ-6-106-17	800x600x920	25
ДМ-6-106-19	1000x600x920	30
ДМ-6-106-21	1200x600x920	35
ДМ-6-106-23	1400x600x920	39
ДМ-6-106-25	1500x600x920	42
ДМ-6-106-37	800x600x920	23
ДМ-6-106-39	1000x600x920	27
ДМ-6-106-41	1200x600x920	31
ДМ-6-106-43	1400x600x920	35
ДМ-6-106-45	1500x600x920	37
ДМ-6-106-47	1900x550x870	39

1.1.4 Столешница выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку ($60 \pm 1,0$) кг.

1.1.5 Полки и дно ящиков выдвижных выдерживают предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку ($15 \pm 1,0$) кг.

1.1.6 Стол выдерживает совокупную предельную рабочую нагрузку с учетом предельной равномерно распределенной нагрузки на каждую полку, на дно ящика выдвижного и столешницу:

- Для стола артикулов ДМ-1-106-01 – ДМ-1-106-10, ДМ-2-106-01 – ДМ-2-106-10, ДМ-3-106-01 – ДМ-3-106-09, ДМ-6-106-05, ДМ-6-106-06, ДМ-6-106-37- ДМ-6-106-47 не более 60 кг;

- Для стола артикулов ДМ-6-106-17 - ДМ-6-106-25 не более 75 кг;

- Для стола артикулов ДМ-1-106-11, ДМ-1-106-12, ДМ-1-106-17, ДМ-1-106-18 и ДМ-2-106-11, ДМ-2-106-12, ДМ-2-106-17, ДМ-2-106-18, ДМ-3-106-11, ДМ-3-106-17 не более 90 кг;

- Для стола артикулов ДМ-1-106-13 - ДМ-1-106-16 и ДМ-1-106-19 - ДМ-1-106-22, ДМ-2-106-13 - ДМ-2-106-16 и ДМ-2-106-19 - ДМ-2-106-22, ДМ-3-106-13, ДМ-3-106-15, ДМ-3-106-19, ДМ-3-106-21 не более 105 кг.

- Для стола артикулов ДМ-1-106-23, ДМ-1-106-24, ДМ-2-106-23, ДМ-2-106-24, ДМ-3-106-23 не более 120 кг.

- Для стола артикулов ДМ-1-106-25, ДМ-1-106-26, ДМ-1-106-27, ДМ-1-106-28, ДМ-1-106-29, ДМ-1-106-30, ДМ-2-106-25, ДМ-2-106-26, ДМ-2-106-27, ДМ-2-106-28, ДМ-2-106-29, ДМ-2-106-30, ДМ-3-106-25, ДМ-3-106-27, ДМ-3-106-29 не более 150 кг.

- Для стола артикулов ДМ-1-106-31, ДМ-1-106-32, ДМ-1-106-33, ДМ-1-106-34, ДМ-2-106-31, ДМ-2-106-32, ДМ-2-106-33, ДМ-2-106-34, ДМ-3-106-31, ДМ-3-106-33 не более 195 кг.

1.1.7 Столы серий ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3, ДМ-6 за исключением стола артикул ДМ-6-106-47 (см. приложение Б) оснащены опорами регулируемые.

1.1.8 Стол на опорах колесных соответствуют следующим требованиям:

1.1.9 Зазор между поверхностью пола и одной из колесных опор составляет не более 3 мм.

1.1.10 Установленные опоры колесные снабжены тормозами, при включении которых не должно происходить непредусмотренного перемещения стола в положении эксплуатации по поверхности с углом наклона 5° относительно горизонтальной плоскости.

Тормозами оборудованы две колесные опоры из четырех.

1.1.11 Усилие перемещения стола на опорах колесных с отключенными тормозами без нагрузки и с нагрузкой по твердой плоской поверхности значениям, приведенным в таблице 3:

Таблица 2

Артикул	Усилие перемещения без нагрузки, Не более Н (кгс)	Усилие перемещения с нагрузкой, Не более Н (кгс)
Стол серии ДМ-6		
ДМ-6-106-47	50 Н (5,1 кгс)	131 Н (13,4 кгс)

1.1.12 Зазоры в проемах дверей на сторону не превышают 4 мм.

1.1.13 Двери распашные имеют механизм фиксации, предотвращающий их самопроизвольное открывание.

1.1.14 Двери распашные установлены на петли, обеспечивающие их плавное, без перекосов, открывание и закрывание с усилием не более 22 Н (2,2 кгс).

1.1.15 Зазоры в проемах между фасадом ящика выдвижного и проемом корпуса ящика выдвижного не превышают 4 мм.

1.1.16 Ящик выдвижной выдвигается по направляющим частичного выдвижения.

1.1.17 Ящик выдвижной имеет свободный ход без заеданий и перекосов. Усилие выдвигания ящика без нагрузки составляет не более 35+/-5 Н (3,5+/-0,5 кгс).

1.1.18 Цвет лакокрасочных покрытий стола, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда.

1.1.19 Наружные и внутренние поверхности стола устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

1.1.20 Средний срок службы стола до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы стола.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

1.2 Сведения о материалах и покупных изделиях

1.2.1 Опора регулируемая имеет диапазон регулировки не менее 10 мм.

1.2.2 Стол изготовлен из материалов в соответствии с Приложением В. Материалы стола имеют обозначение, отображаемое в артикуле в соответствии с Приложением Б.

1.3 Комплектность

1.3.1 Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 в вариантах

исполнения:

№ п.п.	Вариант исполнения
1.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-01.К2.
2.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-02.К2.
3.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-03.К2.
4.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-04.К2.
5.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-05.К2.
6.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-06.К2.
7.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-07.К2.
8.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-08.К2.
9.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-09.К2.
10.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-10.К2.
11.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-11.К2.Ф2
12.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-12.К2.Ф2
13.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-13.К2.Ф2
14.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-14.К2.Ф2
15.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-15.К2.Ф2
16.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-16.К2.Ф2
17.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-17.К2.Ф2
18.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-18.К2.Ф2
19.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-19.К2.Ф2
20.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-20.К2.Ф2
21.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-21.К2.Ф2
22.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-22.К2.Ф2
23.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-23.К2.Ф2
24.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-24.К2.Ф2
25.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-25.К2.Ф2
26.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-26.К2.Ф2
27.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-27.К2.Ф2
28.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-28.К2.Ф2
29.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-29.К2.Ф2
30.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-30.К2.Ф2
31.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-31.К2.Ф2
32.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-32.К2.Ф2
33.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-33.К2.Ф2
34.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-34.К2.Ф2
35.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-01.К2.
36.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-02.К2.
37.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-03.К2.
38.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-07.К2.
39.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-09.К2.
40.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-11.К2.Ф3

[illegible]

88.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-17
89.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-19
90.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-21
91.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-23
92.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-25
93.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-37
94.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-39
95.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-41
96.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-43
97.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-45
98.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-47

1.3.2 Руководство по эксплуатации.

1.3.3 При заказе стола необходимо указывать:

- название варианта исполнения,
- артикул, сформированный согласно приложению В,
- цвет корпуса и двери распашной и/или фасадов выдвижных ящиков,
- количество изделий, которое необходимо отгрузить потребителю.

1.3.4 Стол поставляется в собранном виде.

1.3 Маркировка

1.4.1 Маркировка стола должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, допускается использование символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1

На каждом столе на задней стороне сверху или на нижней полке снизу справа или на столешнице снизу справа должна быть прикреплена бумажная этикетка, на которой должно быть указано:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;**
- адрес изготовителя;**
- контактные данные изготовителя;**
- наименование стола;**
- наименование варианта исполнения и/или артикул данного варианта исполнения;**
- обозначение настоящих технических условий;**
- код партии (идентификационный номер);**
- дата изготовления и упаковывания;**
- гарантийный срок;**
- срок службы;**
- знак соответствия при добровольной сертификации (при наличии);**
- штамп ОТК.**
- номер и дата регистрационного удостоверения.**

1.4.2 На транспортную и/или потребительскую упаковку должен быть наклеен бумажный ярлык, содержащий:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;**
- адрес предприятия-изготовителя;**
- адрес места производства;**
- обозначение настоящих технических условий;**
- номер и дата регистрационного удостоверения;**
- № заказа;**
- число мест;**

- № места;
- штрих-код;
- штамп ОТК;
- наименование и адрес грузополучателя;
- наименование стола;
- наименование варианта исполнения или артикул данного варианта исполнения;
- условия хранения и транспортирования.

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 «Осторожно, хрупкое», «Верх», «Беречь от влаги». Манипуляционные знаки должны наноситься по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской.

1.4 Упаковка

1.4.1 Перед упаковкой металлические части стола подвергаются обезжириванию и консервированию по группе II-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

1.4.2 Потребительская упаковка должна представлять собой ящик из гофрированного картона, оклеенный клейкой лентой. Фасадные части стола укрываются воздушно-пузырчатой плёнкой из полиэтилена, стол оборачивается стрейч-плёнкой из полиэтилена, на углах устанавливаются уголки из полиуретана либо трубка из пенополиэтилена, затем стол укладывается в ящик. Изнутри ящик выложен упаковочной бумагой или гофрированным картоном для предотвращения самопроизвольного перемещения стола внутри упаковки при транспортировании.

1.4.3 Не установленные на стол детали (механизмы, крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация упаковываются в пакет из полиэтилена, а затем помещаются в потребительскую упаковку вместе со столом.

1.4.4 Для транспортирования стола в потребительских упаковках помещают в деревянный ящик, выложенный внутри упаковочной бумагой или древесноволокнистой плитой. Для фиксации может быть использован шпагат и уголки.

1.4.5 Стол может транспортироваться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

1.4.6 В транспортную упаковку вложен упаковочный лист, на котором указано:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование стола;
- наименование варианта исполнения стола;
- количество мест;
- условные номер упаковщика;
- контролер ОТК;
- дата упаковывания.

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1 Транспортирование стола должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

2.1.1 Размещение и крепление упаковок со столами в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

2.1.2 Транспортирование стола крытыми транспортными средствами должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от минус 50 до плюс 50 °С;

Относительная влажность до 100 % при температуре плюс 25 °С.

2.2 Стол должен храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

2.2.1 Хранение стола должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 5 до плюс 40 °С;

Относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2.2.2 Хранение стола в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Стол предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях специализированных медицинских помещений с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (помещение для ректороманоскопии (колонскопии), процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии, перевязочный кабинет, малая операционная и операционной) в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Поверхности стола не предназначены для контакта с телом человека для достижения заявленной эффективности в рамках установленного производителем специфичного медицинского назначения.

3.2 Эксплуатация стола должна осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С;

Относительная влажность до 80 % при плюс 25°С.

3.3 Меры предосторожности при применении стола

3.4 Стол предназначен для применения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20, при обращении со столом необходимо пользоваться защитными медицинскими перчатками.

3.5 Стол должен быть использован только по прямому назначению.

3.6 Стол должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности с перепадом высот не более 10 мм.

3.7 Предельная максимальная равномерная нагрузка на горизонтальные поверхности не должны превышать значений, указанных в п.п. 1.1.4-1.1.6 для каждой из поверхностей.

3.8 Предельная максимальная равномерная нагрузка на стол не должна превышать значений, указанных в п. 1.1.6.

- Запрещается неравномерное нагружение полок и ящика выдвижного.

- Запрещается вставать и/или садиться на стол.

- Запрещается использовать стол, если имеются механические повреждения таких частей стола, как опоры регулируемые, опоры колесные, направляющие ящика выдвижного, петли дверей, механизмы фиксации ящика выдвижного и дверей.

- При задвигании ящика выдвижного и закрывании двери необходимо соблюдать осторожность во избежание защемления рук.

3.9 Меры предосторожности при обнаружении неисправностей

При обнаружении в ходе назначенного применения неисправностей (например, при возникновении потрескивания горизонтальных поверхностей или регулируемых опор) и/или механических повреждений частей стола, способных снизить устойчивость стола к нагружению, способных вызвать нарушение устойчивости стола, падение или опрокидывание, необходимо освободить стол от нагрузки и обратиться к предприятию-изготовителю.

При возникновении вопросов, связанных с безопасным применением стола, необходимо обращаться к предприятию-изготовителю.

3.10 Порядок установки стола

Стол поставляется в собранном виде. Сборка стола осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Очистка стола

Перед применением стола его поверхности должны быть подвергнуты предварительной дезинфекции и высушены.

Уход за столом заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5 % раствор моющего средства по ГОСТ 25644.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки стола следует насухо протереть.

4.2 Дезинфекция стола

Дезинфекцию наружных поверхностей стола проводят путем однократного протирания поверхностей 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Дезинфекцию стола следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей стола биологическими жидкостями и потенциально контаминированными веществами.

Стол является нестерильным и не предназначен для стерилизации.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Стол подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

5.2 Стол, не имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически безопасным медицинским отходам и должен утилизироваться совместно с твердыми коммунальными отходами.

5.3 Стол, имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически опасным медицинским отходам класса Б и перед утилизацией должен быть подвергнут обеззараживанию по СанПиН 2.1.3684-21. После соответствующего обеззараживания стол может быть утилизирован совместно с твердыми коммунальными отходами.

**6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ**

**ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские.
Общие технические условия» (п.п. 4.3, 4.4, 6.4, 6.9, 6.10, 7, 8, 11, 12, 15);**

**ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» (пп. 5.2.1,
5.2.2, 5.2.4 - 5.2.7, 5.2.24, 5.2.28, 5.2.29, 5.4, 5.5).**

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и соблюдении мер предосторожности.

7.2 При нарушении мер предосторожности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации стола составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.4 Гарантийный срок хранения стола составлять 5 лет.

7.5 Средний срок службы стола до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы стола.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Российская Федерация, Смоленская область, городской округ
город Десногорск, город Десногорск, территория Коммунально-складская
зона, строение 82.

Рекламации, касающиеся качества стола, отправлять по адресу:

info@doctormebel.ru

9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сервисное обслуживание и ремонт стола осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки данным
руководстве по эксплуатации

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принцип формирования артикула для конкретизированного заказа

Артикул варианта исполнения стола формируется в виде:

серия-AAA-XX,

где:

серия - обозначает материалы стола в соответствии с Приложением В Таблицами В.1, В.2, В.3, В.4.

AAA – признак вида стола.

XX – признак конструктивного решения стола по внешнему виду в соответствии с Приложением Г и функциональными размерами в соответствии с требованиями п. 1.1.2 данного руководства по эксплуатации.

Kx – признак цвета корпуса:

Номер обозначения цвета корпуса в соответствии с Таблицей Б.1;

Фхх – признак цвета фасада ящика выдвижного и/или цвета двери.

Номер обозначения цвета фасада ящика выдвижного и/или цвета двери в соответствии с Таблицей Б.1

При отсутствии возможности реализации какого-либо исполнения в артикул буква признака не добавляется.

Таблица Б.1 – Таблица идентификации сокращений обозначений цвета корпуса, цвета фасада ящика выдвижного и/или цвета двери

Признак	Значение признака	Аббревиатура обозначения в артикуле
Цвет корпуса	Серый	K2
Цвет фасада ящика выдвижного и/или цвет двери	Зеленый	Ф1
	Оранжевый	Ф2
	Голубой	Ф3
	Синий	Ф4

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Используемые при изготовлении стола материалы

Таблица В.1 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-1
для формирования артикула

Материалы стола
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием, скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика;
Корпус: Панель толщиной 16 мм из полипропилена
Фасады ящика выдвижного: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением панели толщиной 16 мм из полипропилена.
Дверь распашная: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с шумопоглощающим материалом - базальтовые маты
Дно и корпус ящика выдвижного: Панель толщиной 16 мм из полипропилена
Полки: Панель из декоративно-бумажного слоистого пластика толщиной 8 мм (HPL-HighPressureLaminate)
Столешница: Панель из декоративно-бумажного слоистого пластика толщиной 16 мм (HPL-HighPressureLaminate)

Таблица В.2 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-2
для формирования артикула

Материалы стола
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием, скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика;
Корпус: Плита ЛДСП 16 мм
Фасады ящика выдвижного и/или двери: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением из плиты ЛДСП 16мм
Дно и корпус ящика:

Плита ЛДСП 16мм с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.

Полки:

Плита ЛДСП 16мм, облицованная по трем сторонам кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, по передней стороне кромкой ПВХ толщиной 2мм

Столешница:

Плита МДФ толщиной 16 мм, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 0,5мм (HPL) с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм

Таблица В.3 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-3
для формирования артикула

Материалы стола
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием
Корпус: Плита ЛДСП 16мм (верхний и нижний горизонты облицованы по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм).
Фасады ящика выдвижного и/или двери: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением из плиты ЛДСП 16 мм
Дно и корпус ящика: Плита ЛДСП 16мм с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.
Полки: Плита ЛДСП 16мм, облицованная по трем сторонам кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, по передней стороне кромкой ПВХ толщиной 2мм
Столешница: Плита ЛДСП 26мм, облицованная кромкой ПВХ толщиной 2мм

Таблица В.4 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-6
для формирования артикула

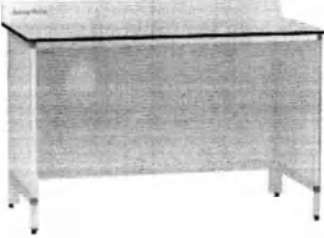
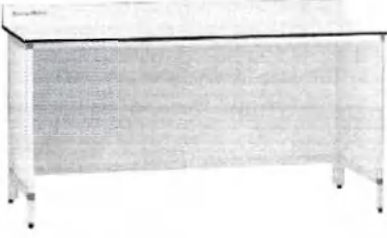
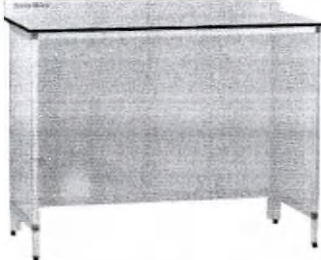
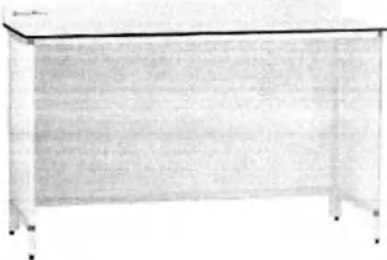
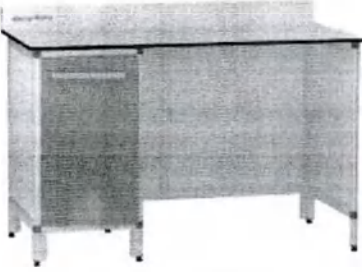
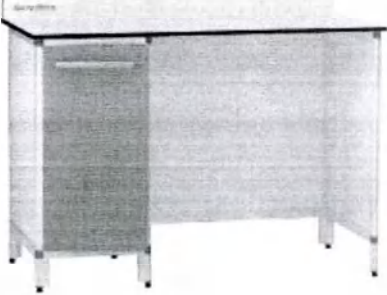
Материалы стола
Каркас и корпус: Металлический профиль высоколегированной нержавеющей стали марки AISI 304 или стали коррозионностойкой, жаропрочной, марки 08X18H10 профильным сечением 25x25, 20x20.
Столешница: Высоколегированная нержавеющая сталь марки AISI 304 или стали коррозионностойкой, жаропрочной, марки 08X18H10.

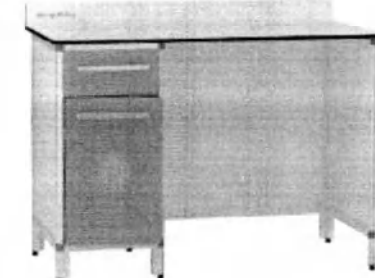
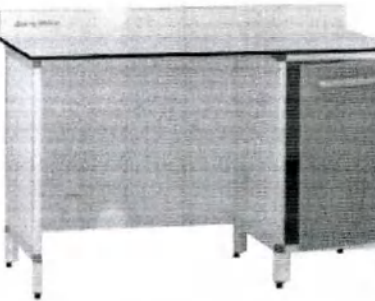
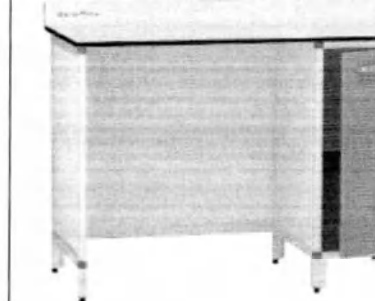
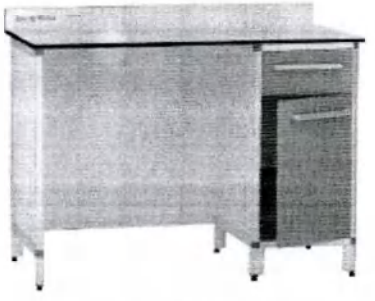
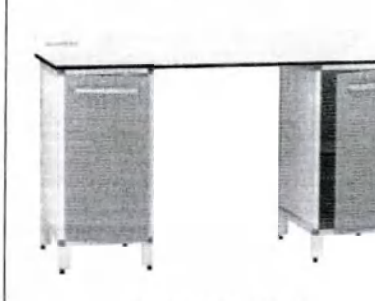
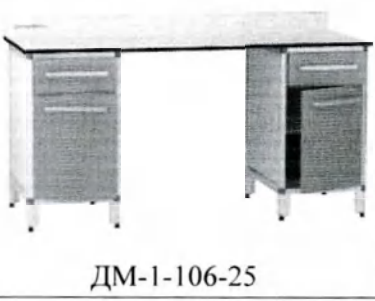
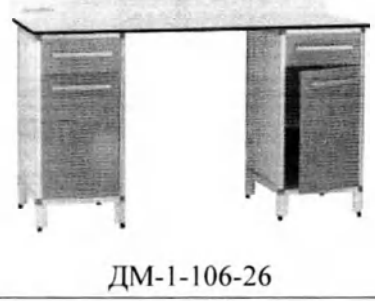
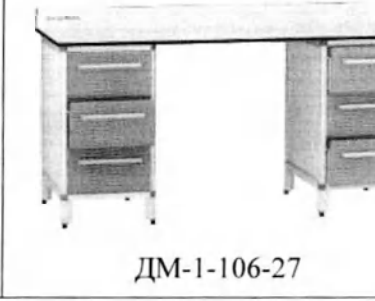
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

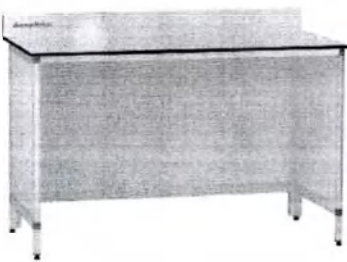
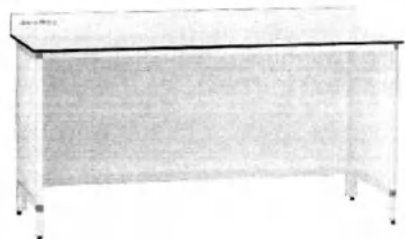
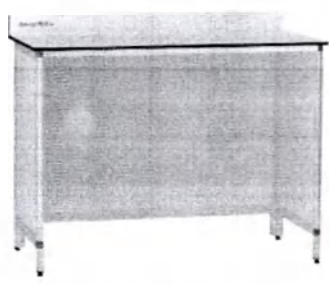
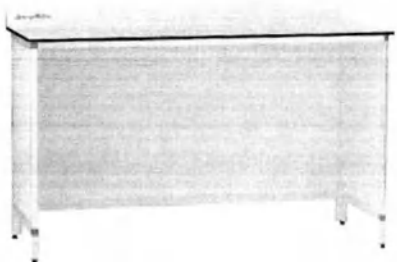
(обязательное)

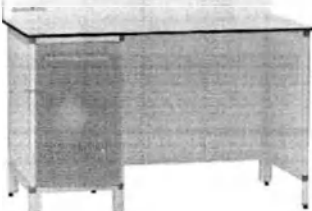
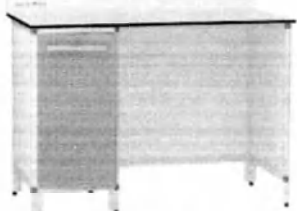
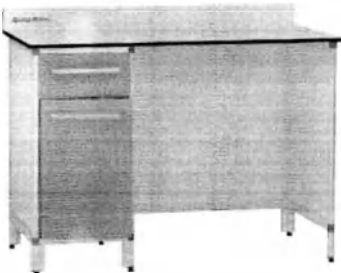
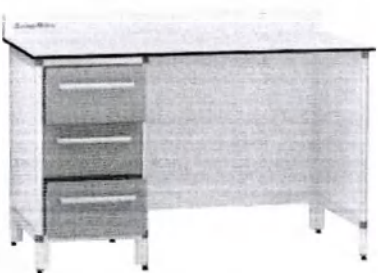
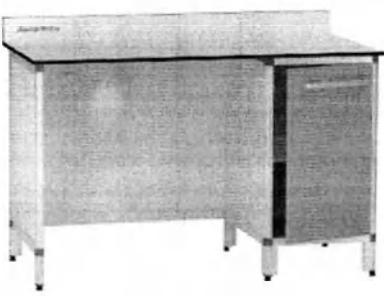
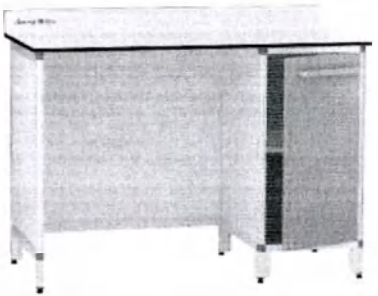
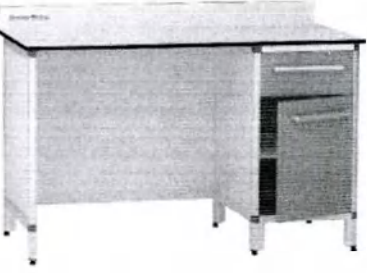
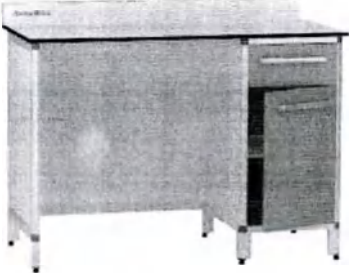
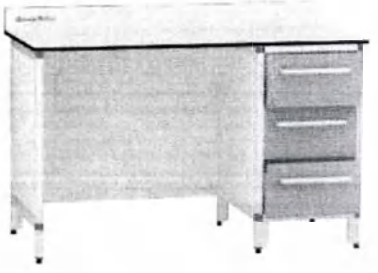
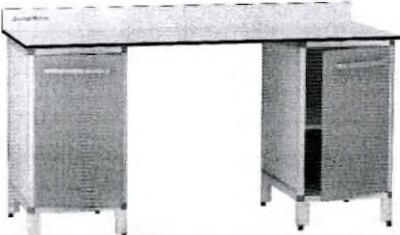
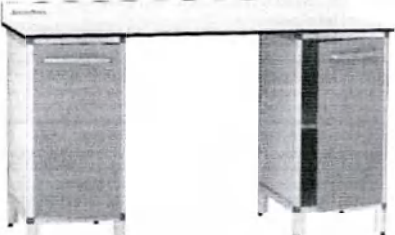
Внешний вид вариантов исполнения стола

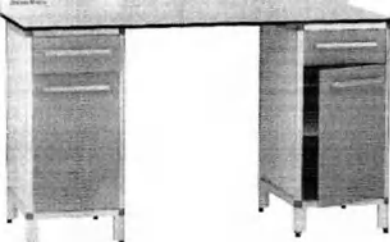
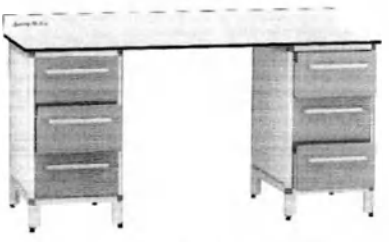
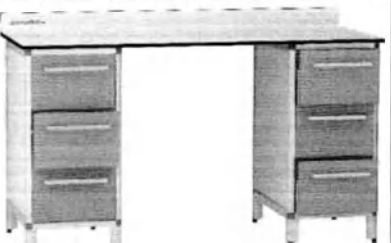
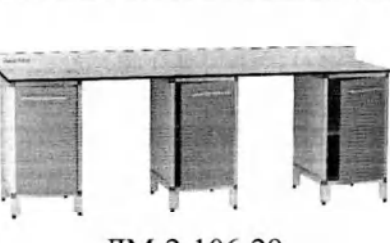
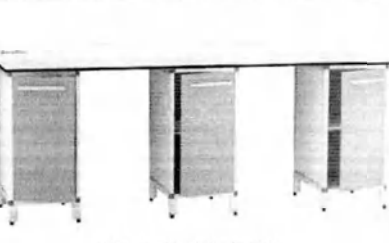
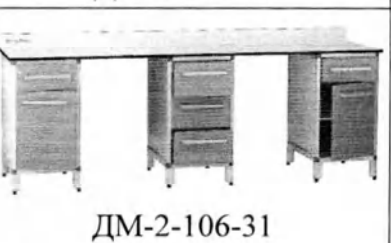
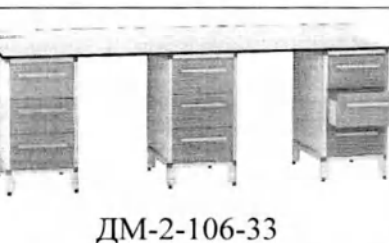
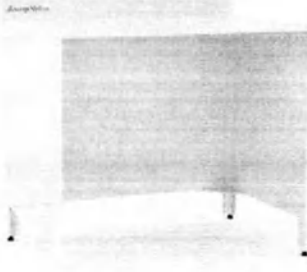
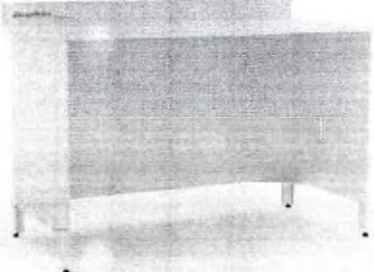
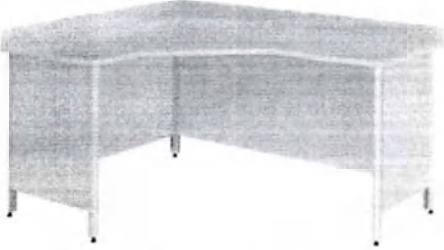
Рисунки определяют внешний вид в одном из возможных цветовых решений для каждой серии стола, конструктивные особенности заданы отдельно.

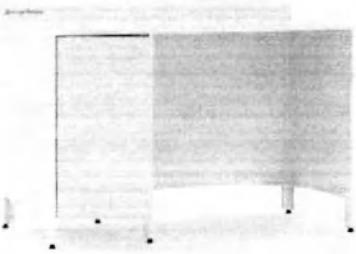
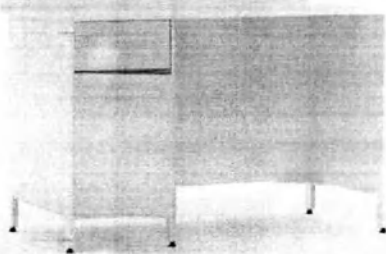
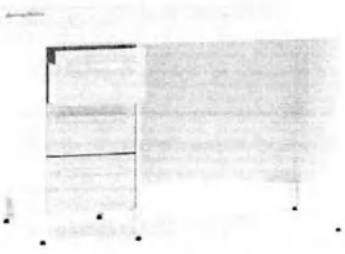
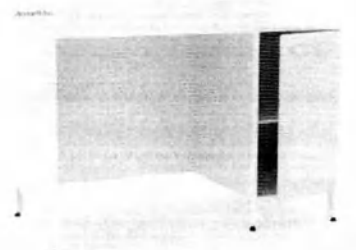
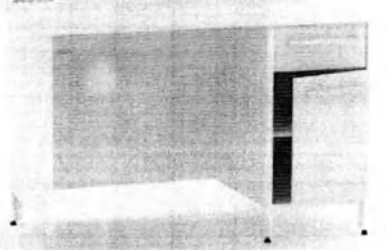
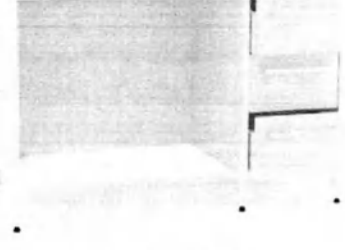
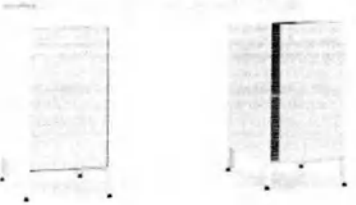
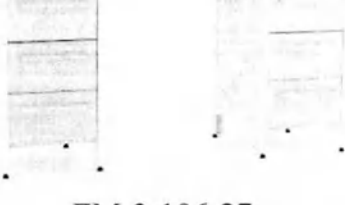
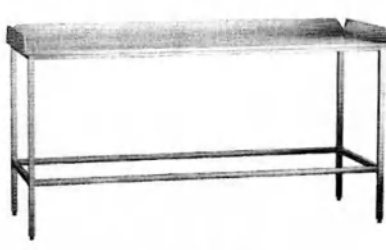
Стол серии ДМ-1		
		
ДМ-1-106-01	ДМ-1-106-02	ДМ-1-106-03
		
ДМ-1-106-04	ДМ-1-106-05	ДМ-1-106-06
		
ДМ-1-106-07	ДМ-1-106-08	ДМ-1-106-09
		
ДМ-1-106-10	ДМ-1-106-11	ДМ-1-106-12

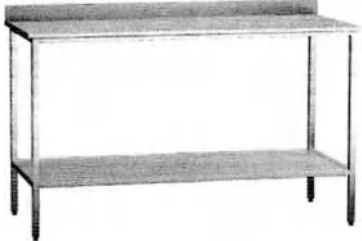
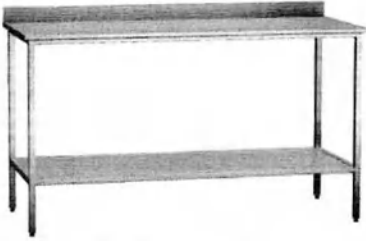
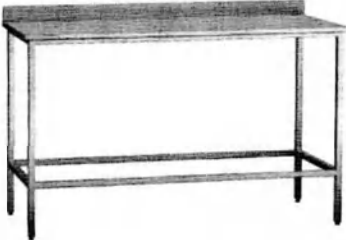
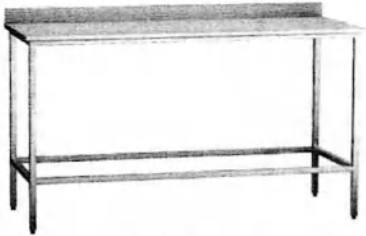
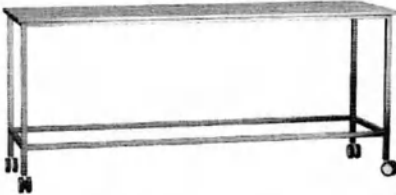
		
ДМ-1-106-13	ДМ-1-106-14	ДМ-1-106-15
		
ДМ-1-106-16	ДМ-1-106-17	ДМ-1-106-18
		
ДМ-1-106-19	ДМ-1-106-20	ДМ-1-106-21
		
ДМ-1-106-22	ДМ-1-106-23	ДМ-1-106-24
		
ДМ-1-106-25	ДМ-1-106-26	ДМ-1-106-27

	 ДМ-1-106-29	 ДМ-1-106-30
 ДМ-1-106-31	 ДМ-1-106-32	 ДМ-1-106-33
 ДМ-1-106-34		
Стол серии ДМ-2		
 ДМ-2-106-01	 ДМ-2-106-02	 ДМ-2-106-03
 ДМ-2-106-04	 ДМ-2-106-05	 ДМ-2-106-06
 ДМ-2-106-07	 ДМ-2-106-08	 ДМ-2-106-09

		
ДМ-2-106-10	ДМ-2-106-11	ДМ-2-106-12
		
ДМ-2-106-13	ДМ-2-106-14	ДМ-2-106-15
		
ДМ-2-106-16	ДМ-2-106-17	ДМ-2-106-18
		
ДМ-2-106-19	ДМ-2-106-20	ДМ-2-106-21
		
ДМ-2-106-22	ДМ-2-106-23	ДМ-2-106-24

		
ДМ-2-106-25	ДМ-2-106-26	ДМ-2-106-27
		
ДМ-2-106-28	ДМ-2-106-29	ДМ-2-106-30
		
ДМ-2-106-31	ДМ-2-106-32	ДМ-2-106-33
		
ДМ-2-106-34		
Стол серии ДМ-3		
		
ДМ-3-106-01	ДМ-3-106-02	ДМ-3-106-03
		
ДМ-3-106-07	ДМ-3-106-09	

		
ДМ-3-106-11	ДМ-3-106-13	ДМ-3-106-15
		
ДМ-3-106-17	ДМ-3-106-19	ДМ-3-106-21
		
ДМ-3-106-23	ДМ-3-106-25	ДМ-3-106-27
		
ДМ-3-106-29	ДМ-3-106-31	ДМ-3-106-33
Стол серии ДМ-6		
		
ДМ-6-106-05	ДМ-6-106-06	ДМ-6-106-17

		
ДМ-6-106-19	ДМ-6-106-21	ДМ-6-106-23
		
ДМ-6-106-25	ДМ-6-106-37	ДМ-6-106-39
		
ДМ-6-106-41	ДМ-6-106-43	ДМ-6-106-45
		
ДМ-6-106-47		

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Перечень вариантов исполнения стола

№ п.п.	Артикул	Обозначение конструкторского документа
1	Стол медицинский ДМ-2-106-01.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.01
2	Стол медицинский ДМ-2-106-02.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.02
3	Стол медицинский ДМ-2-106-03.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.03
4	Стол медицинский ДМ-2-106-04.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.04
35	Стол медицинский ДМ-2-106-05.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.05
6	Стол медицинский ДМ-2-106-06.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.06
7	Стол медицинский ДМ-2-106-07.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.07
8	Стол медицинский ДМ-2-106-08.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.08
9	Стол медицинский ДМ-2-106-09.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.09
10	Стол медицинский ДМ-2-106-10.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.10
11	Стол медицинский ДМ-2-106-11.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.11
12	Стол медицинский ДМ-2-106-12.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.12
13	Стол медицинский ДМ-2-106-13.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.13
14	Стол медицинский ДМ-2-106-14.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.14
15	Стол медицинский ДМ-2-106-15.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.15
16	Стол медицинский ДМ-2-106-16.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.16
17	Стол медицинский ДМ-2-106-17.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.17
18	Стол медицинский ДМ-2-106-18.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.18
19	Стол медицинский ДМ-2-106-19.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.19
20	Стол медицинский ДМ-2-106-20.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.20
21	Стол медицинский ДМ-2-106-21.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.21
22	Стол медицинский ДМ-2-106-22.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.22
23	Стол медицинский ДМ-2-106-23.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.23
24	Стол медицинский ДМ-2-106-24.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.24
25	Стол медицинский ДМ-2-106-25.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.25

26	Стол медицинский	ДМ-2-106-26.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.26
27	Стол медицинский	ДМ-2-106-27.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.27
28	Стол медицинский	ДМ-2-106-28.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.28
29	Стол медицинский	ДМ-2-106-29.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.29
30	Стол медицинский	ДМ-2-106-30.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.30
31	Стол медицинский	ДМ-2-106-31.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.31
32	Стол медицинский	ДМ-2-106-32.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.32
33	Стол медицинский	ДМ-2-106-33.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.33
34	Стол медицинский	ДМ-2-106-34.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.34
35	Стол медицинский	ДМ-3-106-01.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.01
36	Стол медицинский	ДМ-3-106-02.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.02
37	Стол медицинский	ДМ-3-106-03.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.03
38	Стол медицинский	ДМ-3-106-07.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.07
39	Стол медицинский	ДМ-3-106-09.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.09
40	Стол медицинский	ДМ-3-106-11.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.11
41	Стол медицинский	ДМ-3-106-13.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.13
42	Стол медицинский	ДМ-3-106-15.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.15
43	Стол медицинский	ДМ-3-106-17.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.17
44	Стол медицинский	ДМ-3-106-19.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.19
45	Стол медицинский	ДМ-3-106-21.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.21
46	Стол медицинский	ДМ-3-106-23.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.23
47	Стол медицинский	ДМ-3-106-25.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.25
48	Стол медицинский	ДМ-3-106-27.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.27
49	Стол медицинский	ДМ-3-106-29.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.29
50	Стол медицинский	ДМ-3-106-31.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.31
51	Стол медицинский	ДМ-3-106-33.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.33
52	Стол медицинский	ДМ-1-106-01.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.01
53	Стол медицинский	ДМ-1-106-02.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.02

54	Стол медицинский ДМ-1-106-03.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.03
55	Стол медицинский ДМ-1-106-04.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.04
56	Стол медицинский ДМ-1-106-05.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.05
57	Стол медицинский ДМ-1-106-06.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.06
58	Стол медицинский ДМ-1-106-07.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.07
59	Стол медицинский ДМ-1-106-08.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.08
60	Стол медицинский ДМ-1-106-09.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.09
61	Стол медицинский ДМ-1-106-10.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.10
62	Стол медицинский ДМ-1-106-11.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.11
63	Стол медицинский ДМ-1-106-12.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.12
64	Стол медицинский ДМ-1-106-13.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.13
65	Стол медицинский ДМ-1-106-14.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.14
66	Стол медицинский ДМ-1-106-15.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.15
67	Стол медицинский ДМ-1-106-16.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.16
68	Стол медицинский ДМ-1-106-17.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.17
69	Стол медицинский ДМ-1-106-18.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.18
70	Стол медицинский ДМ-1-106-19.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.19
71	Стол медицинский ДМ-1-106-20.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.20
72	Стол медицинский ДМ-1-106-21.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.21
73	Стол медицинский ДМ-1-106-22.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.22
74	Стол медицинский ДМ-1-106-23.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.23
75	Стол медицинский ДМ-1-106-24.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.24
76	Стол медицинский ДМ-1-106-25.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.25
77	Стол медицинский ДМ-1-106-26.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.26
78	Стол медицинский ДМ-1-106-27.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.27
79	Стол медицинский ДМ-1-106-28.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.28
80	Стол медицинский ДМ-1-106-29.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.29
81	Стол медицинский ДМ-1-106-30.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.30

82	Стол медицинский ДМ-1-106-31.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.31
83	Стол медицинский ДМ-1-106-32.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.32
84	Стол медицинский ДМ-1-106-33.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.33
85	Стол медицинский ДМ-1-106-34.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.34
86	Стол медицинский ДМ-6-106-05	ДМ-6.СТ.69573749.009.05
87	Стол медицинский ДМ-6-106-06	ДМ-6.СТ.69573749.009.06
88	Стол медицинский ДМ-6-106-17	ДМ-6.СТ.69573749.009.17
89	Стол медицинский ДМ-6-106-19	ДМ-6.СТ.69573749.009.19
90	Стол медицинский ДМ-6-106-21	ДМ-6.СТ.69573749.009.21
91	Стол медицинский ДМ-6-106-23	ДМ-6.СТ.69573749.009.23
92	Стол медицинский ДМ-6-106-25	ДМ-6.СТ.69573749.009.25
93	Стол медицинский ДМ-6-106-37	ДМ-6.СТ.69573749.009.37
94	Стол медицинский ДМ-6-106-39	ДМ-6.СТ.69573749.009.39
95	Стол медицинский ДМ-6-106-41	ДМ-6.СТ.69573749.009.41
96	Стол медицинский ДМ-6-106-43	ДМ-6.СТ.69573749.009.43
97	Стол медицинский ДМ-6-106-45	ДМ-6.СТ.69573749.009.45
98	Стол медицинский ДМ-6-106-47	ДМ-6.СТ.69573749.009.47

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Символы, применяемые в маркировке

Символ	Обозначение
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Знак соответствия при добровольной сертификации

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

54/1818 десяти *четыре* листов

Генеральный директор
ООО «Доктор Мебель»
Смолькина М.С.

