

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МВ Пауер Лимитед»

В.Н.Маврин

«08» апреля 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

по применению медицинского изделия

ТЕЛЕЖКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ПО ТУ 30.99.10-002-38736713-2023

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Редакция от «08» апреля 2024 г.

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Тележка внутрибольничная по ТУ 30.99.10-002-38736713-2023, в вариантах исполнения»

Варианты исполнения:

1. СТТ-МО-П-1 – Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью, в составе:

- 1.1 СТТ-МО-П-1 – Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью – 1 шт.
- 1.2 Фиксатор одноразовых пакетов – не более 4 шт. (при необходимости).
- 1.3 Корзина для белья – 1 шт. (при необходимости).
- 1.4 Инструкция по применению – 1 шт.

2. СТТ-МО-П-2 – Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью, в составе:

- 2.1 СТТ-МО-П-2 – Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью – 1 шт.
- 2.2 Фиксатор одноразовых пакетов – не более 8 шт. (при необходимости)
- 2.3 Корзина для белья – не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.4 Инструкция по применению – 1 шт.

3. СТТ-МО-П-3 – Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью, в составе:

- 3.1 СТТ-МО-П-3 – Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью – 1 шт.
- 3.2 Фиксатор одноразовых пакетов – не более 12 шт. (при необходимости).
- 3.3 Корзина для белья – не более 3 шт. (при необходимости).
- 3.4 Инструкция по применению – 1 шт.

4. СТТ-КО-1 – Колесная опора для транспортировки медицинских отходов, в составе:

- 4.1 СТТ-КО-1 – Колесная опора для транспортировки медицинских отходов – 1 шт.
- 4.2 Бак с прессом, объемом 20,0 л белого, жёлтого или красного цвета – 1 шт. (при необходимости).
- 4.3 Бак с прессом, объемом 35,0 л белого, жёлтого или красного цвета – 1 шт. (при необходимости).
- 4.4 Инструкция по применению – 1 шт.

5. СТТ-КО-2 – Колесная опора для транспортировки медицинских отходов, в составе:

- 5.1 СТТ-КО-2 – Колесная опора для транспортировки медицинских отходов – 1 шт.
- 5.2 Бак с прессом, объемом 12,0 л белого, жёлтого или красного цвета – 1 шт. (при необходимости).
- 5.3 Инструкция по применению – 1 шт.

6. СТТ-УИМ-П – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью, в составе:

- 6.1 СТТ-УИМ-П – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью – 1 шт.
- 6.2 КО-7.5 – Контейнер, объемом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 2 шт. (при необходимости).

6.3 Корзина для белья – 1 шт. (при необходимости).

6.4 Инструкция по применению – 1 шт.

7. СТТ-УИМ-П-1 – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью, в составе:

7.1 СТТ-УИМ-П-1 – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью – 1 шт.

7.2 КО-7.5 – Контейнер, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 8 шт. (при необходимости).

7.3 Корзина для белья – 1 шт. (при необходимости).

7.4 Инструкция по применению – 1 шт.

8. СТТ-УИМ-П-2 – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью, в составе:

8.1 СТТ-УИМ-П-2 – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью – 1 шт.

8.2 КО-7.5 – Контейнер, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 4 шт. (при необходимости).

8.3 Корзина для белья – 1 шт. (при необходимости).

8.4 Инструкция по применению – 1 шт.

9. СТТ-УИМ-3 – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, в составе:

9.1 СТТ-УИМ-3 – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин – 1 шт.

9.2 КО-7.5 – Контейнер, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 2 шт. (при необходимости).

9.3 Корзина для белья – 1 шт. (при необходимости).

9.4 Инструкция по применению – 1 шт.

10. СТТ-К-1 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов, в составе:

10.1 СТТ-К-1 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов – 1 шт.

10.2 КО-12 – Контейнер, объёмом 12,0 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 3 шт. (при необходимости).

10.3 КО-20 – Контейнер, объёмом 20,0 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 3 шт. (при необходимости).

10.4 ПО-01 – Полка – 3 шт. (при необходимости).

10.5 ПО-02 – Полка – 3 шт. (при необходимости).

10.6 Инструкция по применению – 1 шт.

11. СТТ-К-2 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов, в составе:

11.1 СТТ-К-2 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов – 1 шт.

11.2 КО-12 – Контейнер, объёмом 12,0 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 6 шт. (при необходимости).

11.3 КО-20 – Контейнер, объёмом 20,0 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 6 шт. (при необходимости).

11.4 ПО-01 – Полка – 6 шт. (при необходимости).

11.5 ПО-02 – Полка – 6 шт. (при необходимости).

11.6 Инструкция по применению – 1 шт.

12. СТТ-К-3 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов, в составе:

12.1 СТТ-К-3 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов – 1 шт.

12.2 КО-7.5 – Контейнер, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 4 шт. (при необходимости).

12.3 Инструкция по применению – 1 шт.

13. СТТ-К-4 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов, в составе:

13.1 СТТ-К-4 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов – 1 шт.

13.2 КО-7.5 – Контейнер, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 8 шт. (при

13.3 Инструкция по применению – 1 шт.

14. СТТ-К-5 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов, в составе:

14.1 СТТ-К-5 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов – 1 шт.

14.2 КО-4.5 – Контейнер, объёмом 4,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 3 шт. (при необходимости).

14.3 КО-7.5 – Контейнер, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 3 шт. (при необходимости).

14.4 КО-12 – Контейнер, объёмом 12,0 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 3 шт. (при необходимости).

14.5 КО-20 – Контейнер, объёмом 20,0 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 3 шт. (при необходимости).

14.6 ПО-01 – Полка – 3 шт. (при необходимости).

14.7 Инструкция по применению – 1 шт.

15. СТТ-К-6 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов, в составе:

15.1 СТТ-К-6 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов – 1 шт.

15.2 КО-4.5 – Контейнер, объёмом 4,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 3 шт. (при необходимости).

15.3 КО-7.5 – Контейнер, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета – не более 3 шт. (при необходимости).

15.4 ПО-01 – Полка – 2 шт. (при необходимости).

15.5 ПО-02 – Полка – 1 шт. (при необходимости).

15.6 ПО-03 – Полка – 1 шт. (при необходимости).

15.7 Инструкция по применению – 1 шт.

16. СТТ-ИМ-01-4 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами, в составе:

16.1 СТТ-ИМ-01-4 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами – 1 шт.

16.2 КЭ-14 – Контейнер, объёмом 14,0 л чёрного или белого цвета – не более 4 шт. (при необходимости).

16.3 КЭ-28 – Контейнер, объёмом 28,0 л чёрного или белого цвета – не более 2 шт. (при необходимости).

16.4 Инструкция по применению – 1 шт.

17. СТТ-ИМ-01-6 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами, в составе:

17.1 СТТ-ИМ-01-6 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами – 1 шт.

17.2 КЭ-14 – Контейнер, объёмом 14,0 л чёрного или белого цвета – не более 6 шт. (при необходимости).

17.3 КЭ-28 – Контейнер, объёмом 28,0 л чёрного или белого цвета – не более 3 шт. (при необходимости).

17.4 Инструкция по применению – 1 шт.

18. СТТ-ИМ-01-8 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами, в составе:

18.1 СТТ-ИМ-01-8 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами – 1 шт.

18.2 КЭ-14 – Контейнер, объёмом 14,0 л чёрного или белого цвета – не более 8 шт. (при необходимости).

18.3 КЭ-28 – Контейнер, объёмом 28,0 л чёрного или белого цвета – не более 4 шт. (при необходимости).

18.4 Инструкция по применению – 1 шт.

19. СТТ-ИМ-02 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и

19.1 СТТ-ИМ-02 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами – 1 шт.

19.2 КЭ-1i – Контейнер, объемом 11,0 л чёрного или белого цвета – не более 5 шт. (при необходимости).

19.3 Инструкция по применению – 1 шт.

2 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «МВ Пауер Лимитед» (ООО «МВ Пауер Лимитед»)

Юридический адрес: Россия, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 30, каб. 401

Место производства: ООО «МВ Пауер Лимитед», Россия, 454119, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2, ком. 422

Телефон: +7 (843) 202-31-18

e-mail: info@mvpower.ru

3 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Для сбора отработанных материалов и медицинских отходов, транспортировки/подачи медицинских инструментов, медикаментов, медицинского оборудования или расходных материалов в пределах отделения или реабилитационных, лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реабилитационные, лечебные и лечебно-профилактические учреждения.

5 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Тележки используются медицинским персоналом в реабилитационных, лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

6 ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Технические характеристики

6.1.1 Тележки соответствуют требованиям, ГОСТ Р 50444-2020, ТУ 30.99.10-002-38736713-2023 и изготавливаются по конструкторской и технологической документации, утверждённой в установленном порядке.

6.1.2 Габаритные размеры, масса, максимальная нагрузка Тележек представлены на рисунках 1-19.

6.1.3 Габаритные размеры, масса, объем, максимальная нагрузка, номинальная высота свободного падения комплектующих изделий представлены на рисунках 20-31.

6.1.4 Ручки Контейнеров КО-4.5, КО-7.5, КО-12, КО-20 выдерживают полуторакратную номинальную нагрузку, указанную на рисунках 25-28.

6.1.5 Баки и Контейнеры выдерживают удар при свободном падении с высоты, указанной в таблицах на рисунках 24-31

6.1.6 Крышка Баков и Контейнеров плотно прилегают к емкости по всему периметру. Зазор между стенкой крышки и емкости, смещение крышки относительно емкости не допускается.

6.1.7 Тележки и полки выдерживают нагрузку, указанную на рисунках 1-19, 22, 23. Прогиб съёмных полок не более 3 мм.


6.1.8 Тележки стоят на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, при этом зазор между одним из колес и полом не превышает 2 мм.

6.1.9 Усилие, необходимое для перемещения Тележек с равномерно распределенной максимальной нагрузкой по твёрдой плоской поверхности, не превышает:

- 100 Н (10 кгс) - для тележек массой до 50 кг;
- 120 Н (12 кгс) - для тележек массой до 80 кг;
- от 120 Н (12 кгс) - для тележек массой от 80 кг.

6.1.10 Колёса с поворотным кронштейном вращаются на горизонтальной оси свободно, без заедания от усилия не более 0,35 Н (0,035 кгс).


6.1.11 Колёса вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания.

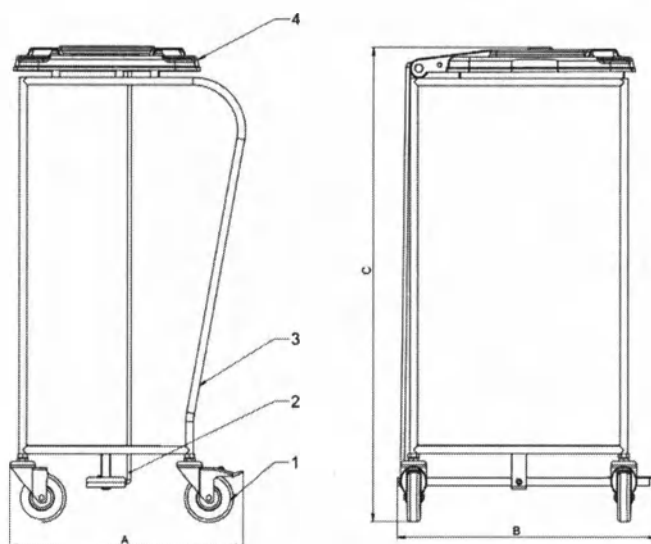

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 2 – педаль;
3 – каркас; 4 – крышка.

Вариант исполнения	длина (A), мм	ширина (B), мм	высота (C), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-МО-П-1	470±15%	540±15%	970±15%	6,5±2,5	40


Рисунок 1 – СТТ-МО-П-1 – Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью

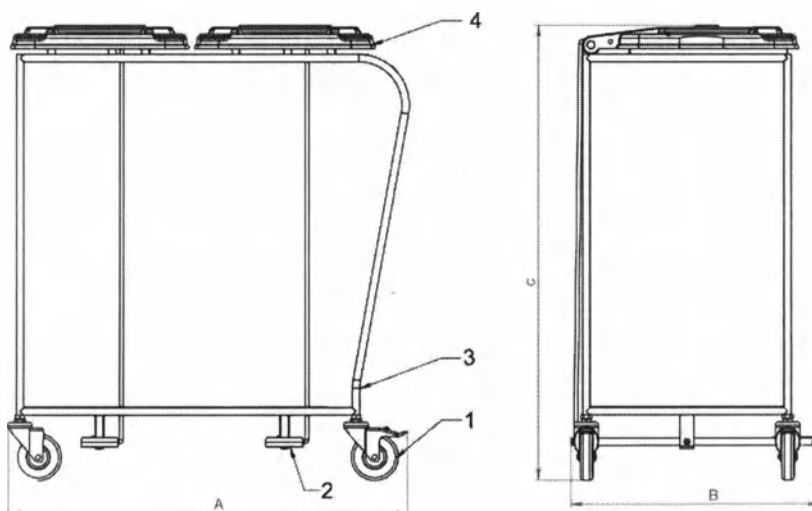

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 2 – педаль;
3 – каркас; 4 – крышка.

Вариант исполнения	длина (A), мм	ширина (B), мм	высота (C), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-МО-П-2	860±15%	535±15%	970±15%	7,5±2,5	60


Рисунок 2 – СТТ-МО-П-2 – Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью

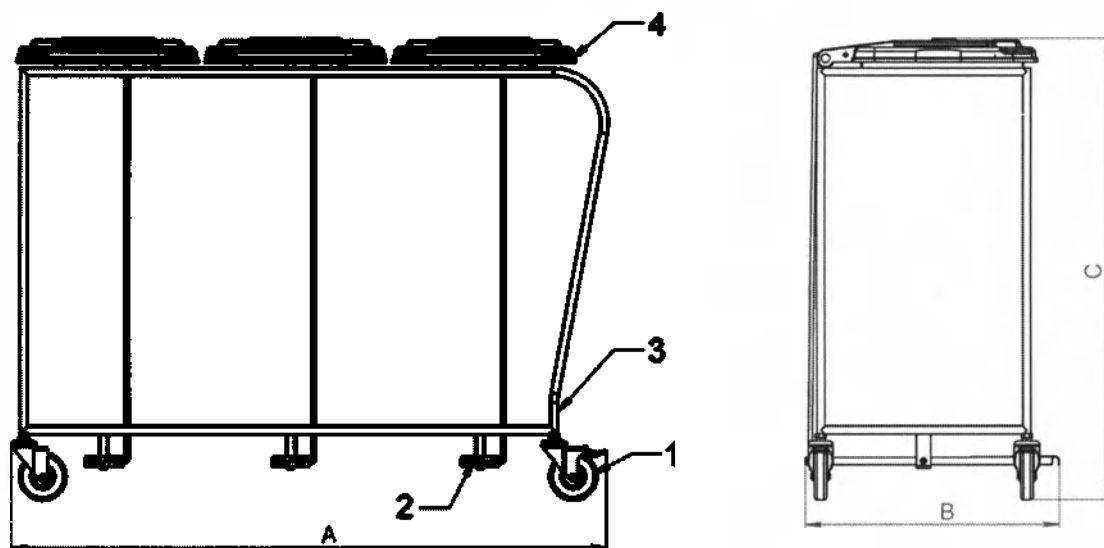

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 2 – педаль;
3 – каркас; 4 – крышка.

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-МО-П-3	1260±15%	535±15%	970±15%	12,0±2,5	90


Рисунок 3 – СТТ-МО-П-3 – Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью

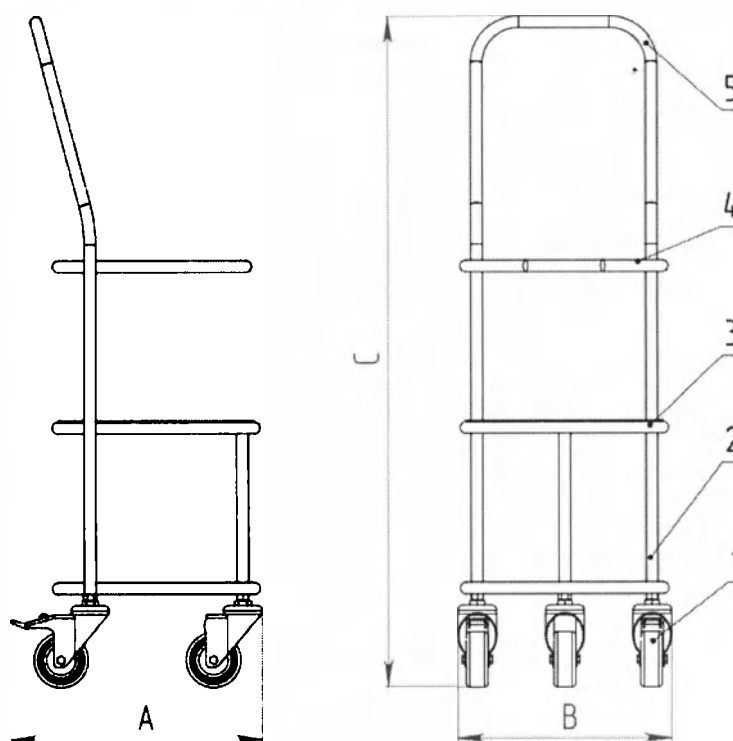

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 2 – каркас,
3 – площадка, 4 – обод, 5 – ручка.

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-КО-1	395±15%	360±15%	900±15%	3,5±1,0	50


Рисунок 4 – СТТ-КО-1 – Колёсная опора для транспортировки медицинских отходов

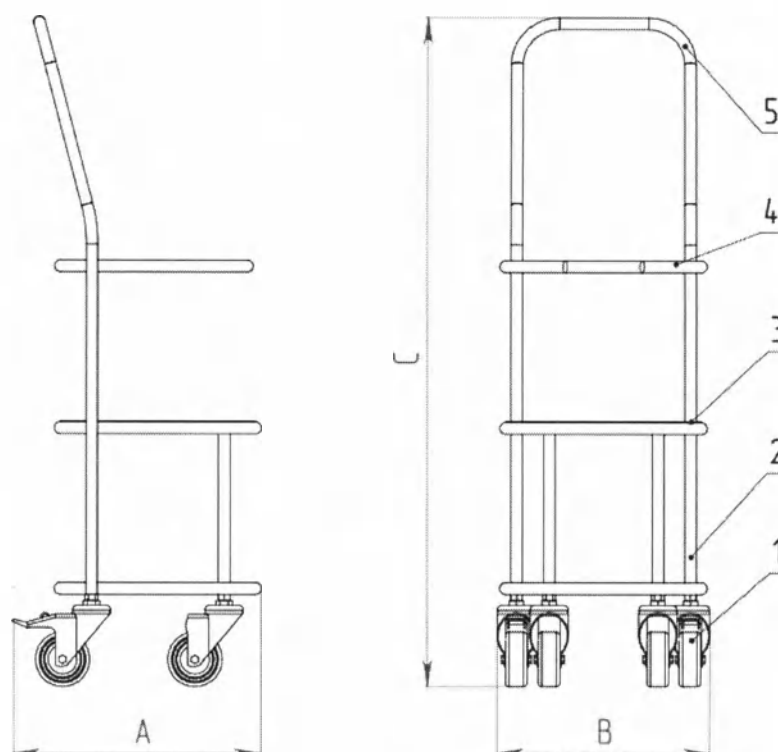

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 2 – каркас,
3 – площадка, 4 – обод, 5 – ручка.

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-КО-2	320±15%	280±15%	895±15%	3,5±1,0	70


Рисунок 5 – СТТ-КО-2 – Колёсная опора для транспортировки медицинских отходов

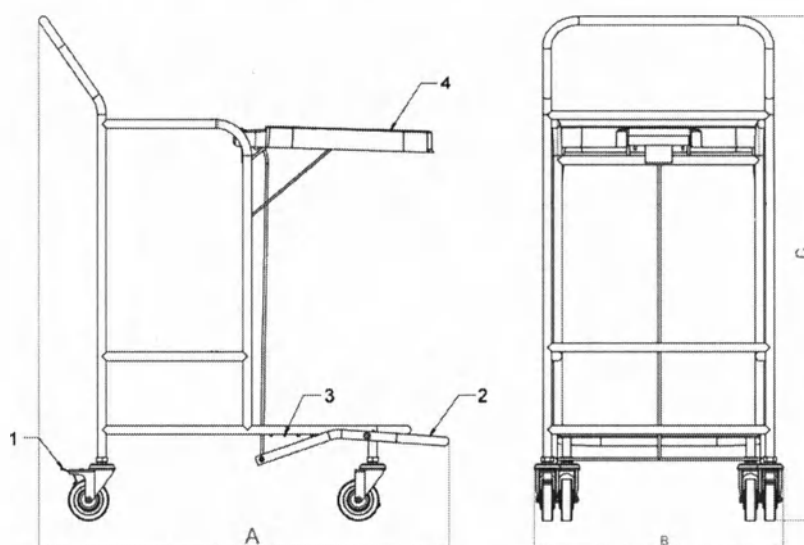

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 2 – педаль; 3 – каркас; 4 – крышка.

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-УИМ-П	745±15%	460±15%	970±15%	6,0±1,5	85


Рисунок 6 – СТТ-УИМ-П – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью

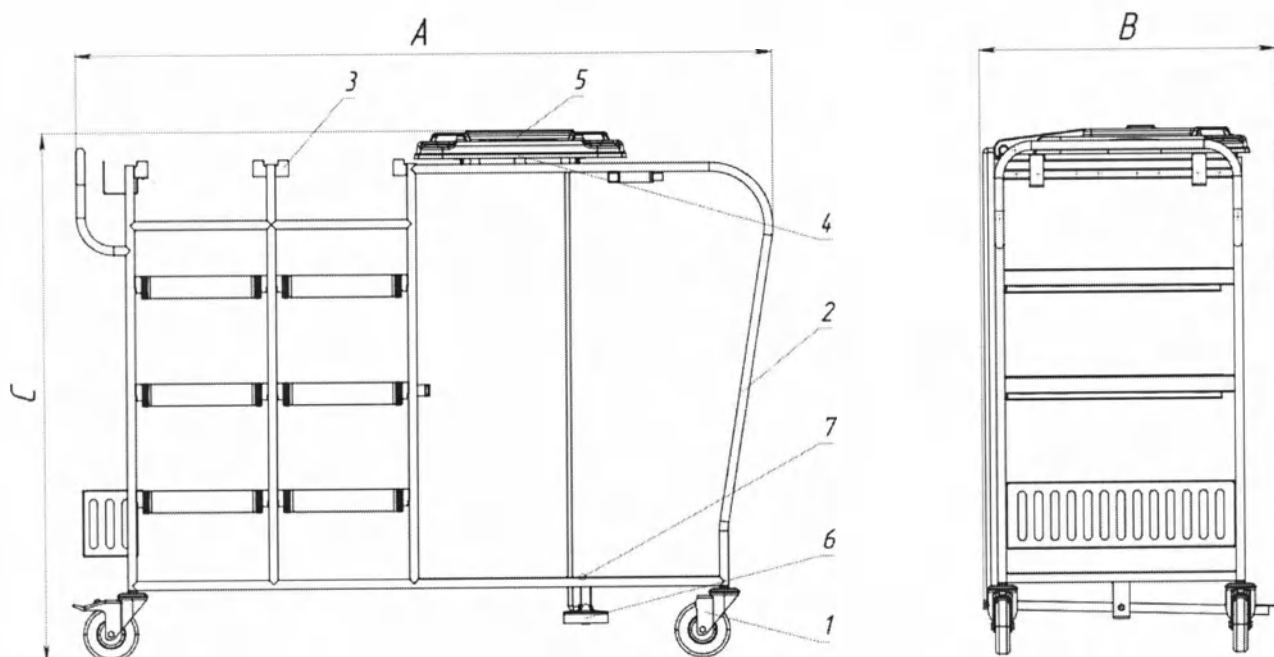

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения, 2 – каркас, 3 – направляющие, 4 – рамка для пакетов, 5 – крышка, 6 – педаль, 7 – площадка

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-УИМ-П-1	1300±15%	535±15%	970±15%	30,5±4,5	140


Рисунок 7 – СТТ-УИМ-П-1 – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью

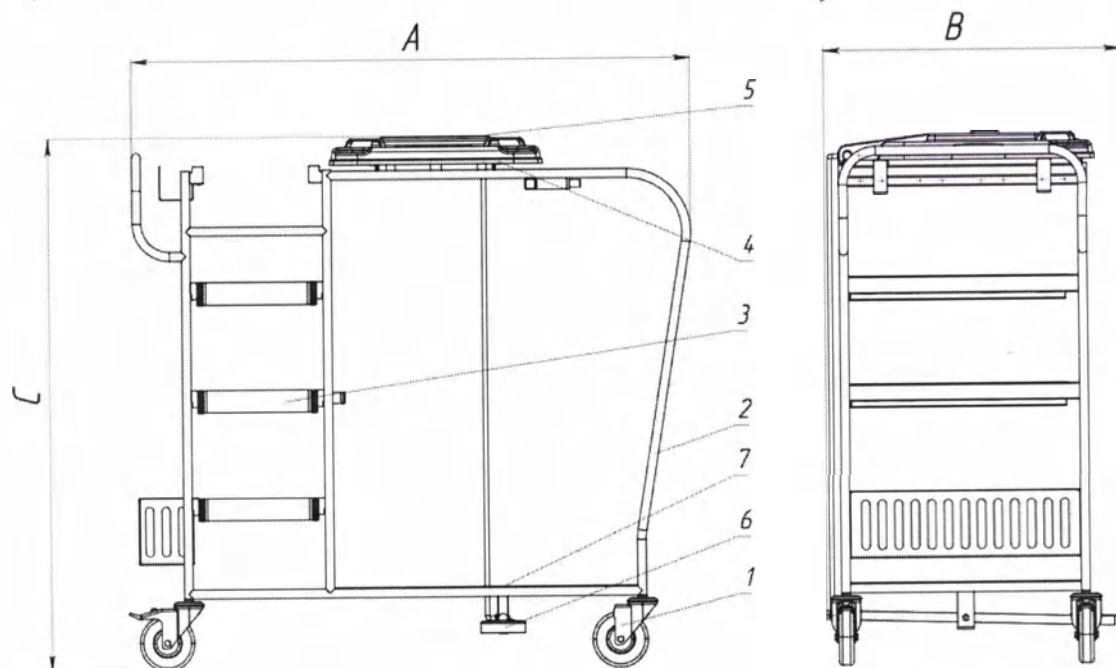

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения, 2 – каркас, 3 – направляющие, 4 – рамка для пакетов, 5 – крышка, 6 – педаль, 7 – площадка

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-УИМ-П-2	1040±15%	525±15%	975±15%	12,5±3,5	110


Рисунок 8 – СТТ-УИМ-П-2 – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью

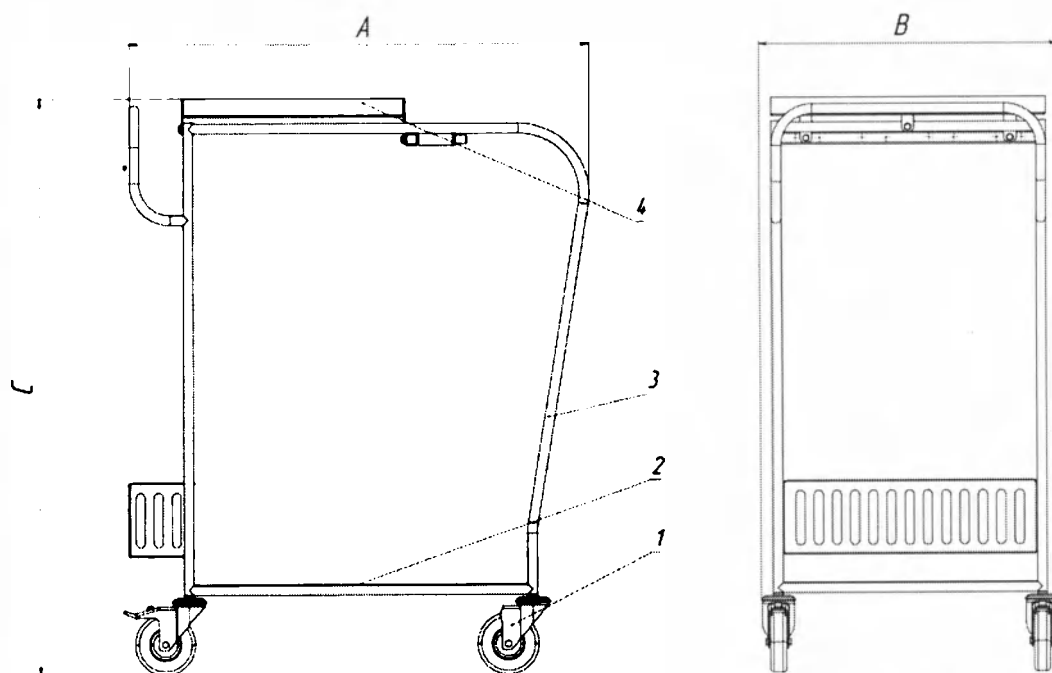

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 2 – площадка; 3 – каркас; 4 – крышка

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-УИМ-3	795±15%	490±15%	945±15%	8,0±2,5	80


Рисунок 9 – СТТ-УИМ-3 – Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин

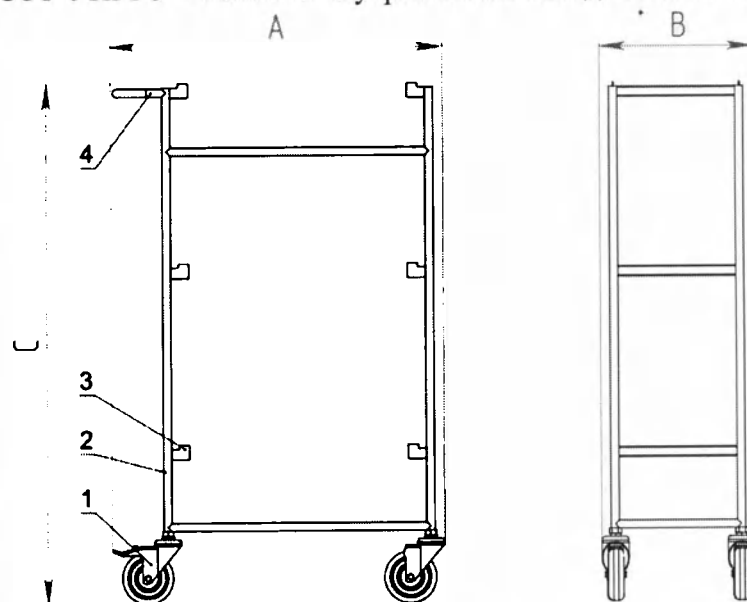

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения, 2 – каркас, 3 – торцевой ограничитель перемещения, 4 – ручка

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-К-1	660±15%	305±15%	1005±15%	5,3±2,0	50


Рисунок 10 – СТТ-К-1 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов

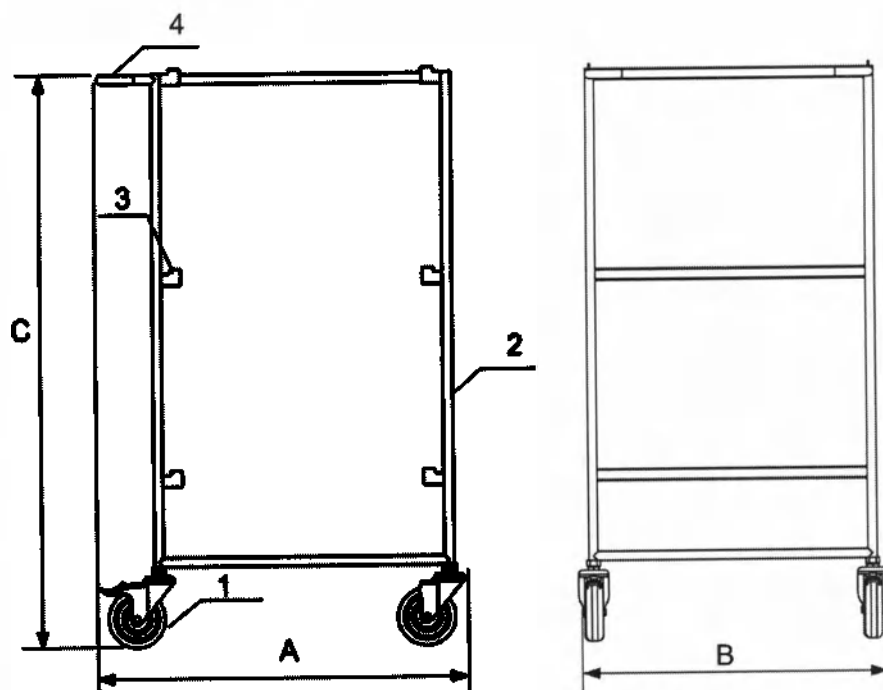

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения, 2 – каркас, 3 – торцевой ограничитель перемещения, 4 – ручка

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-К-2	700±15%	700±15%	1180±15%	5,5±2,0	140


Рисунок 11 – СТТ-К-2 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов

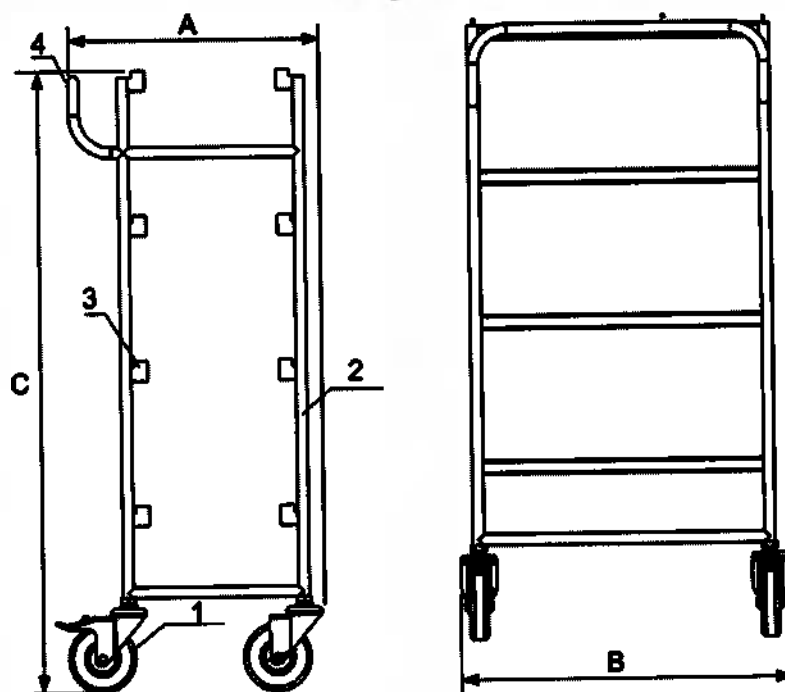

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения, 2 – каркас, 3 – торцевой ограничитель перемещения, 4 – ручка

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-К-3	380±15%	490±15%	975±15%	5,5±2,0	80


Рисунок 12 – СТТ-К-3 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов

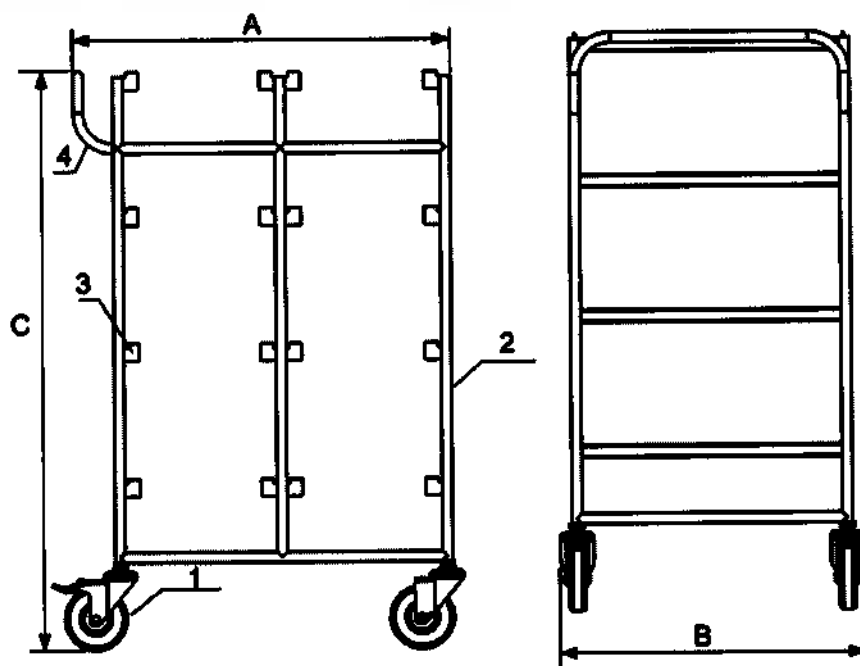

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения, 2 – каркас, 3 – торцевой ограничитель перемещения, 4 – ручка

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-К-4	655±15%	485±15%	940±15%	10,0±2,5	160


Рисунок 13 – СТТ-К-4 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов

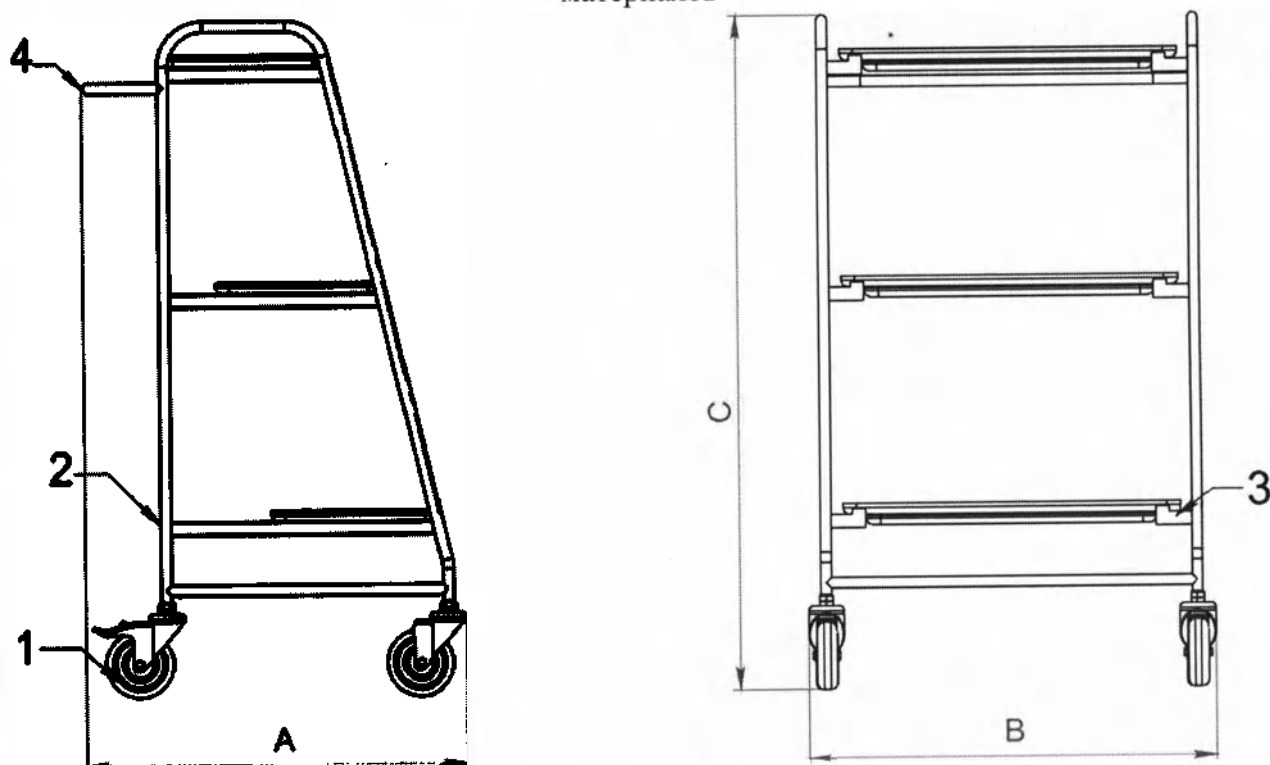

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения, 2 – каркас, 3 – торцевой ограничитель перемещения, 4 – ручка

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-К-5	560±15%	600±15%	1000±15%	5,5±2,0	100


Рисунок 14 – СТТ-К-5– Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов

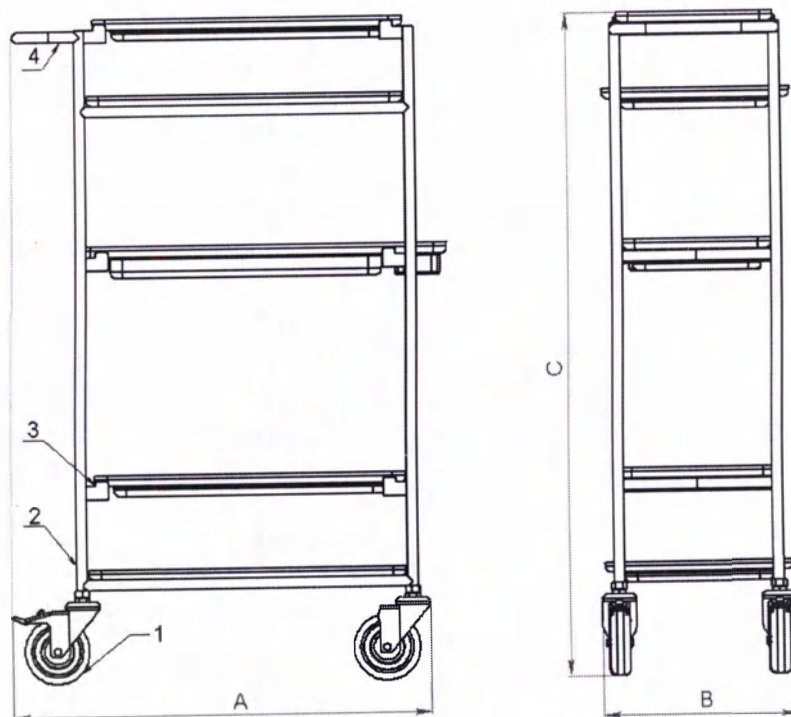

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 2 – каркас 3 – торцевой ограничитель перемещения, 4 – ручка

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-К-6	615±15%	300±15%	1110±15%	5,5±1,5	130


Рисунок 15 – СТТ-К-6 – Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов

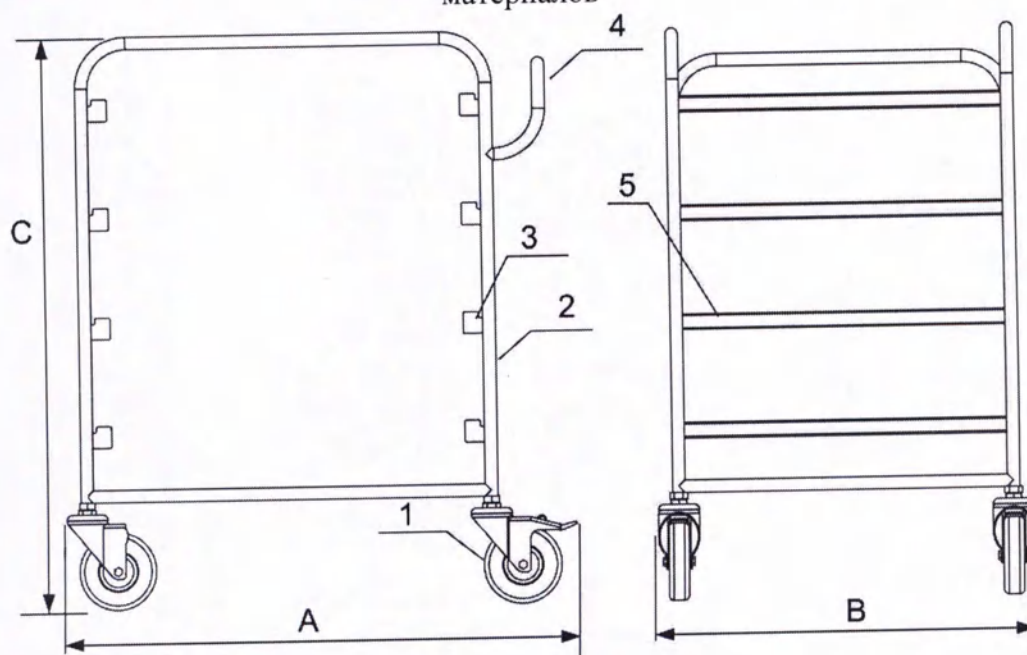

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 2 – каркас;
3, 5 – направляющие для контейнеров; 4 – ручка;

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-ИМ-01-4	660±15%	490±15%	740±15%	6,5±2,0	90


Рисунок 16 – СТТ-ИМ-01-4 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами

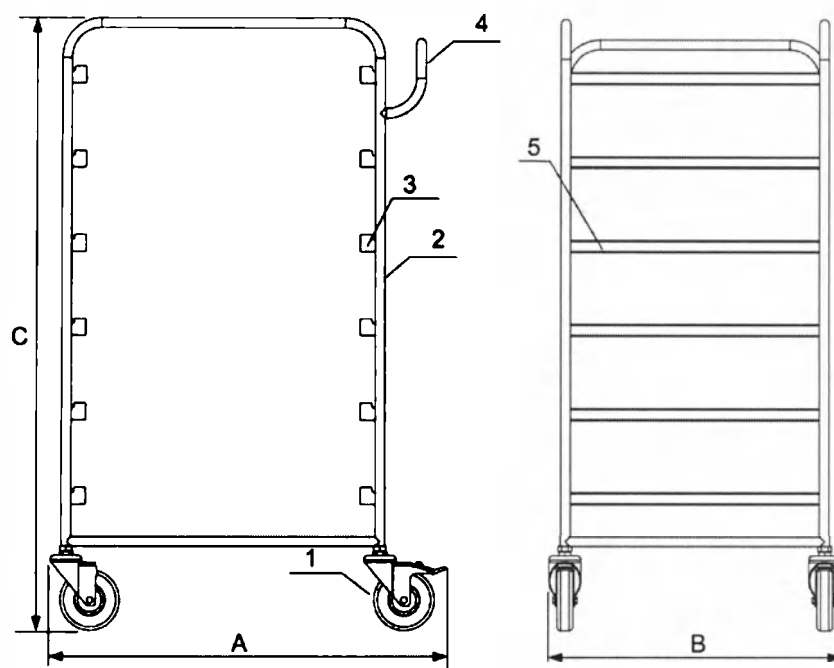

1 – каркас; 2 – колесо с поворотным кронштейном; 3 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения; 4 – ручка; 5 – направляющие для контейнеров.

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-ИМ-01-6	752±15%	600±15%	1025±15%	9,5±2,5	120


Рисунок 17 – СТТ-ИМ-01-6 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами

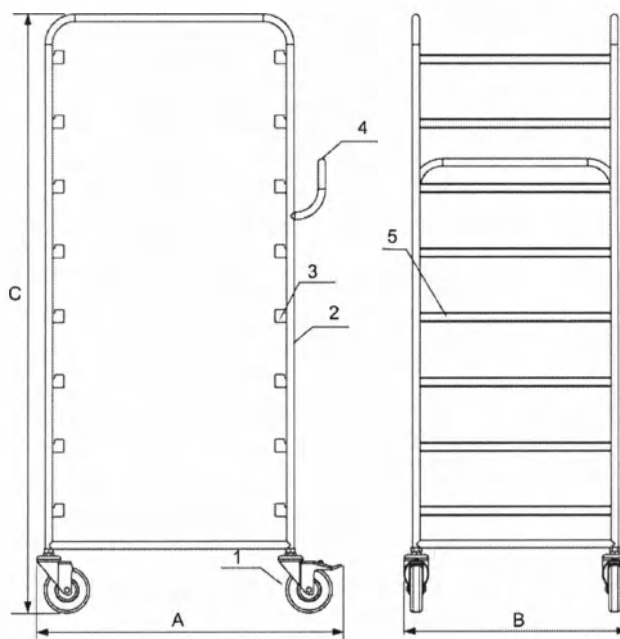

1 – колесо с поворотным кронштейном; 2 – каркас; 3, 5 – направляющие для контейнеров; 4 – ручка.

Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-ИМ-01-8	660±15%	490±15%	1300±15%	13,5±3,0	120


Рисунок 18 – СТТ-ИМ-01-8 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами

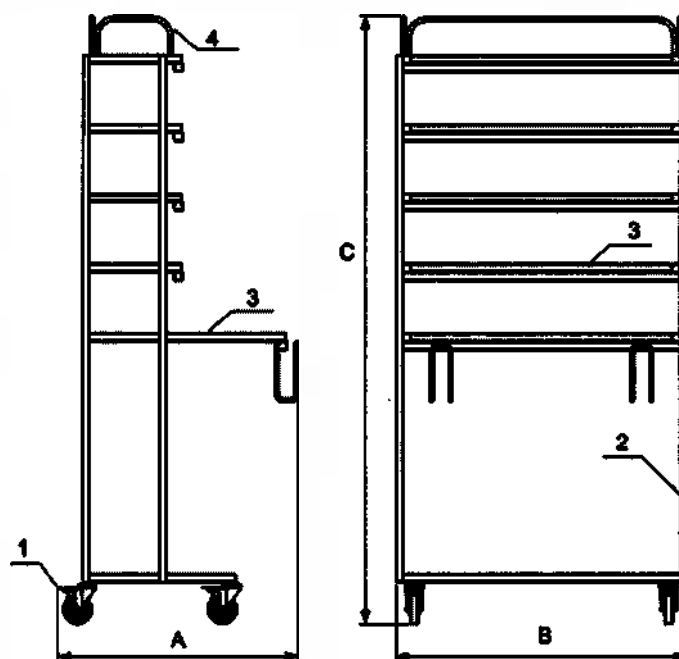

1 – колесо с поворотным кронштейном и стояночной системой торможения, 2 – каркас, 3 – полка, 4 – ручка.


Вариант исполнения	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
СТТ-ИМ-02	670±15%	760±15%	1640±15%	23,5±4,0	100

Рисунок 19 – СТТ-ИМ-02 – Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами

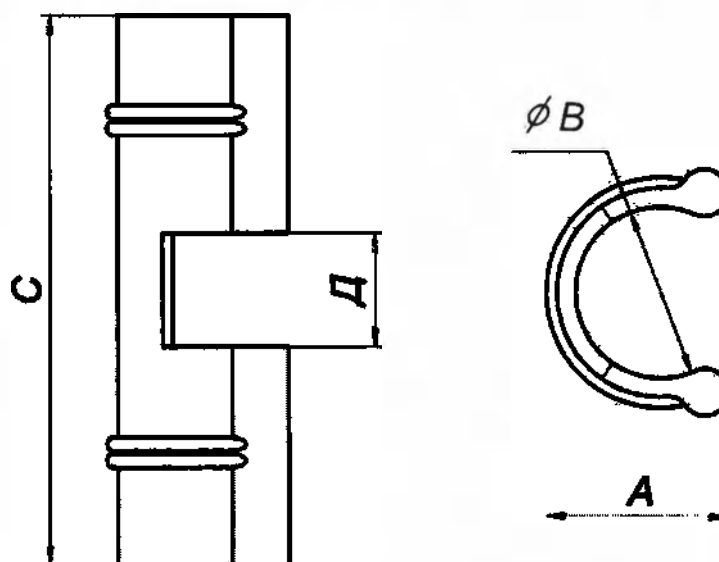

ширина (А), мм	Внутренний диаметр (В), мм	высота (С), мм	Расстояние между захватами (Д), мм	Масса, кг
24±5%	18±5%	58±5%	12±5%	0,12±0,08


Рисунок 20 – Фиксатор одноразовых пакетов

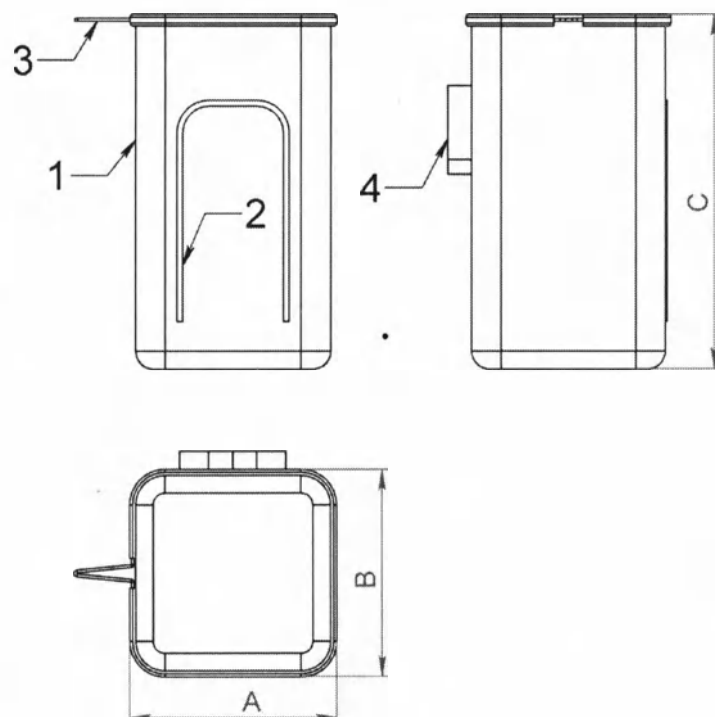

1 – Корзина для белья, 2 – застежка-молния, 3 – утяжка, 4 – карман малый


длина (A), мм	ширина (B), мм	высота (C), мм	Масса, кг
400±15%	350±15%	700±20%	0,55±0,2

Рисунок 21 – Корзина для белья

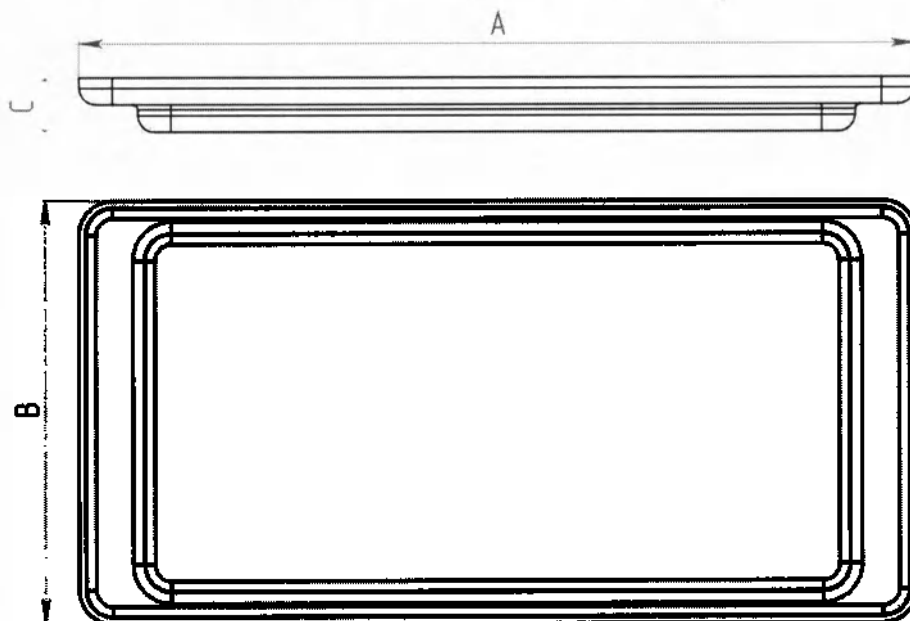


Вариант исполнения	длина (A), мм	ширина (B), мм	высота (C), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
ПО-01	485±15%	240±15%	30±15%	0,40±0,15	15,0
ПО-02	485±15%	282±15%	30±15%	0,45±0,15	12,0

Рисунок 22 – Полка

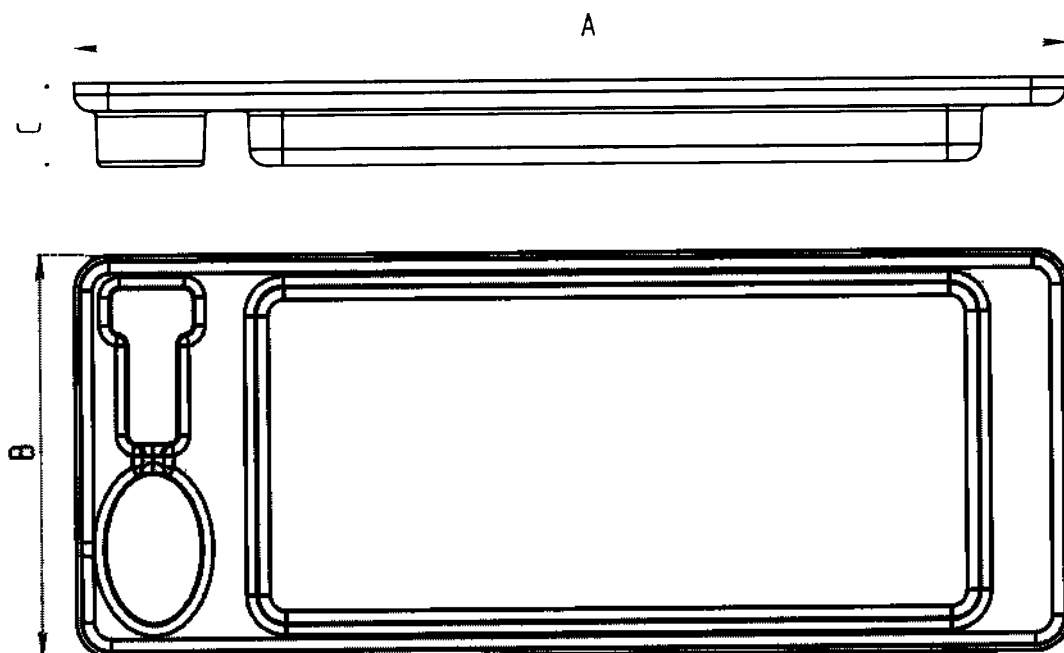


длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
570±15%	230±15%	45±15%	0,40±0,15	15,0

Рисунок 23 – ПО-03 – Полка

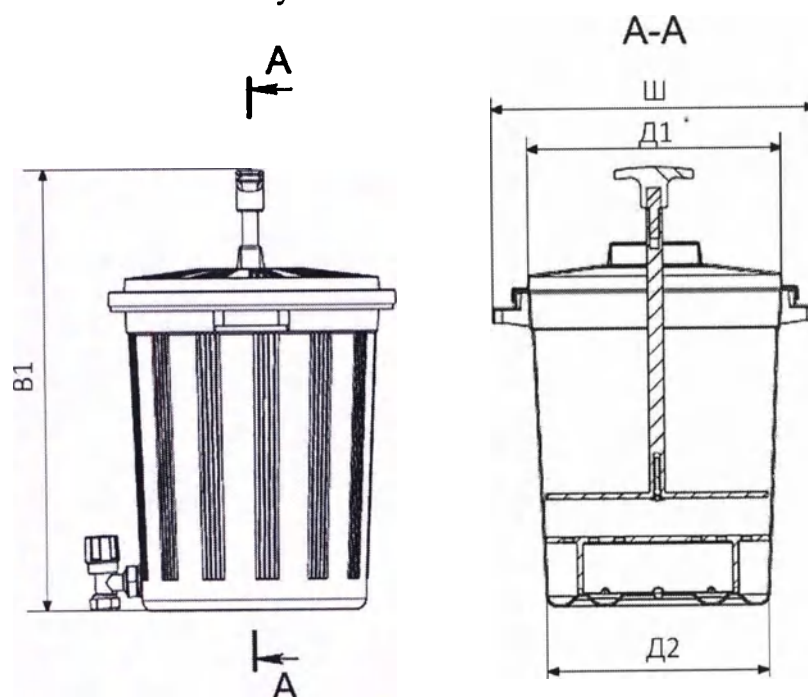

Наименование параметра	Значение параметров контейнера		
Объем, л, ±10%	12	20	35
Масса, кг	1,3±0,5	1,8±0,5	2,7±0,7
Номинальная нагрузка, кг	4±0,5	6±0,5	8±0,5
Номинальная высота свободного падения, не менее, м	0,6	0,6	0,6
Габаритные размеры контейнера в сборе:			
Высота (В1), мм	400±50	435±50	535±50
Диаметр верхний (Д1), мм	280±30	327±30	397±30
Ширина (Ш), с ручками, мм	320±30	365±30	425±30
Нижний диаметр (Д2), мм	220±30	260±30	420±30


Рисунок 24 – Бак с прессом

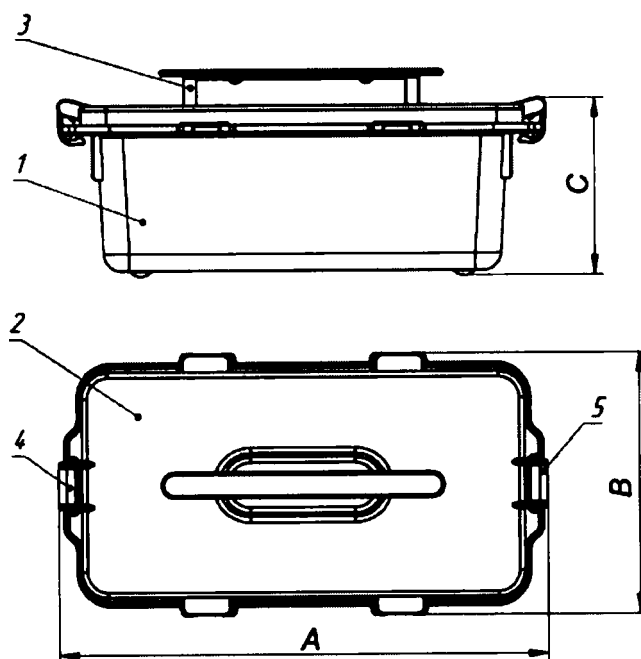

1 – ёмкость, 2 – крышка, 3 – ручка, 4, 5 – фиксатор крышки

Объем, л,	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Номинальн ая нагрузка, кг	Номинальная высота свободного падения, не менее, м
4,5±10%	375±15%	200±15%	138±15%	0,7±0,2	6,0±0,5	0,8


Рисунок 25 – КО-4.5 – Контейнер, объёмом 4,5 л

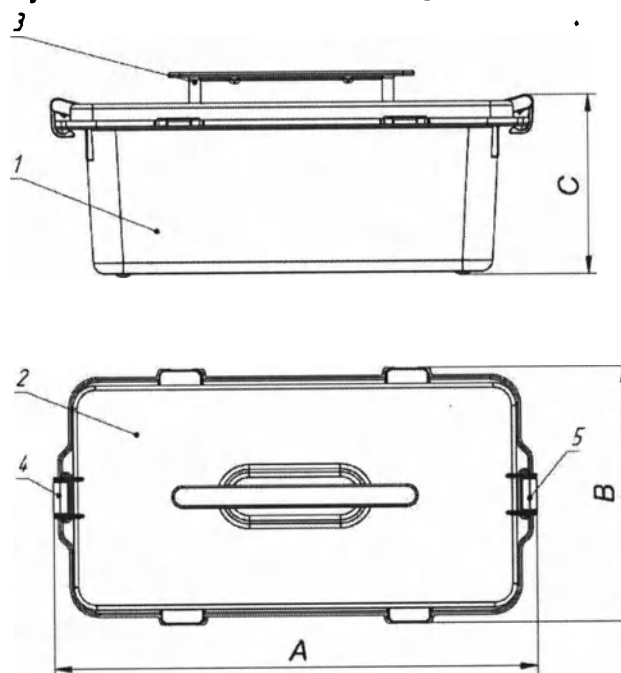

1 – ёмкость, 2 – крышка, 3 – ручка, 4, 5 – фиксатор крышки

Объем, л,	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Номинальн ая нагрузка, кг	Номинальная высота свободного падения, не менее, м
7,5±10%	430±15%	230±15%	160±15%	0,75±0,25	10,5±0,5	0,8


Рисунок 26 – КО-7.5 – Контейнер, объёмом 7,5 л

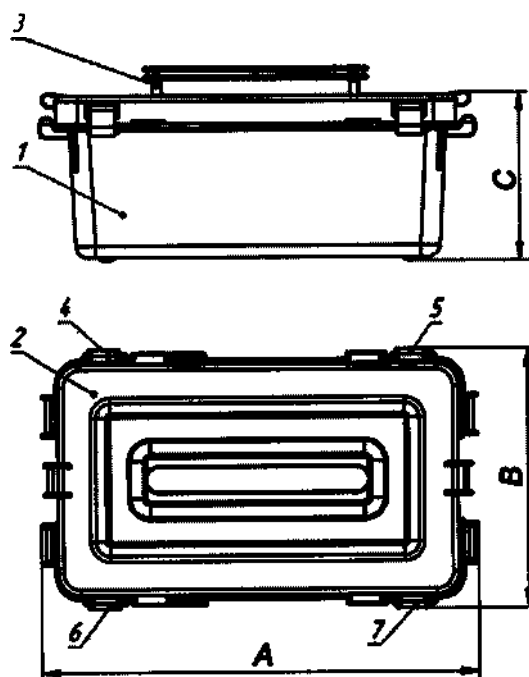

1 – ёмкость, 2 – крышка, 3 – ручка, 4, 5, 6, 7 – фиксатор крышки

Объем, л,	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг	Номинальная высота свободного падения, не менее, м
12±10%	490±15%	290±15%	190±15%	1,7±0,5	14,0±0,5	0,8


Рисунок 27 – КО-12 – Контейнер, объёмом 12,0 л

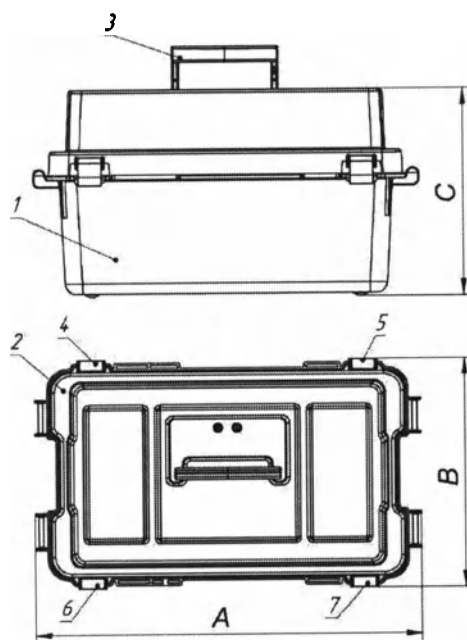

1 – ёмкость, 2 – крышка, 3 – ручка, 4, 5, 6, 7 – фиксатор крышки

Объем, л,	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг	Номинальная высота свободного падения, не менее, м
20±10%	490±15%	290±15%	262±15%	1,5±0,5	12,0±0,5	0,8


Рисунок 28 – КО-20 – Контейнер, объёмом 20,0 л

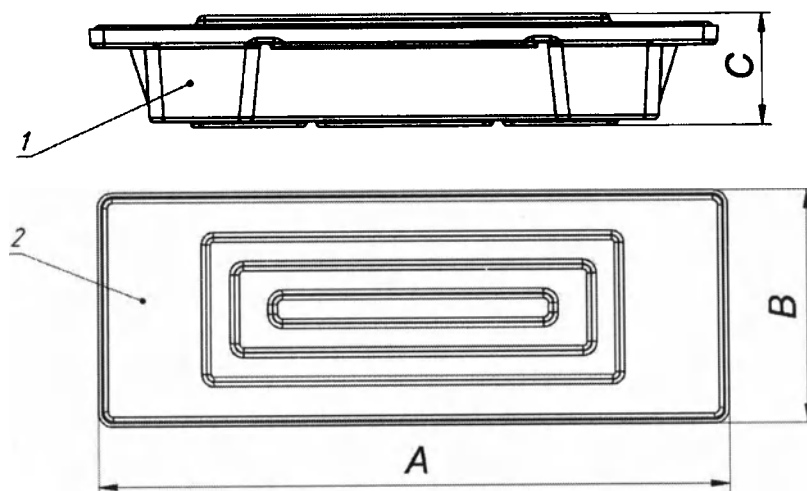

1 – ёмкость, 2 – крышка

Объем, л,	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг	Номинальная высота свободного падения, не менее, м
11±10%	680±15%	245±15%	120±15%	2,2±0,8	15,0±0,5	0,8


Рисунок 29 – КЭ-11 – Контейнер, объёмом 11,0 л

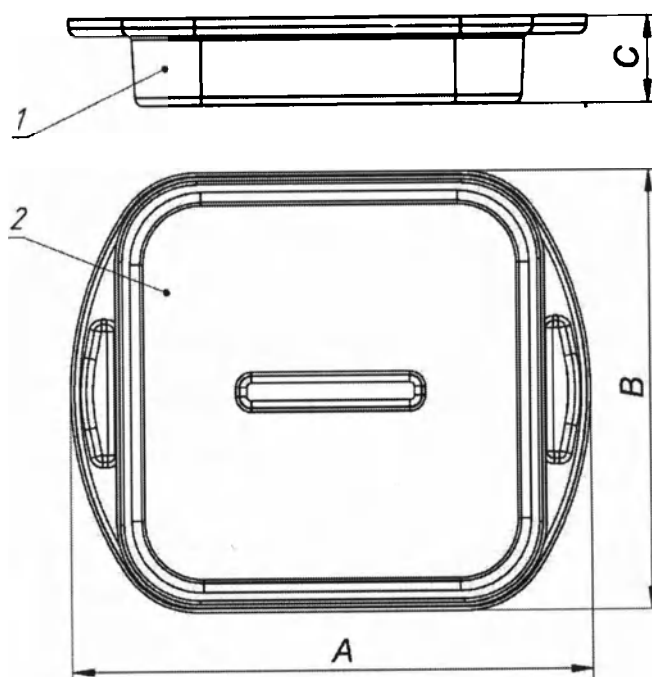

1 – ёмкость, 2 – крышка

Объем, л,	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг	Номинальная высота свободного падения, не менее, м
14±10%	587±15%	495±15%	100±15%	2,0±0,5	15,5±0,5	0,8

Рисунок 30 – КЭ-14 – Контейнер, объёмом 14,0 л

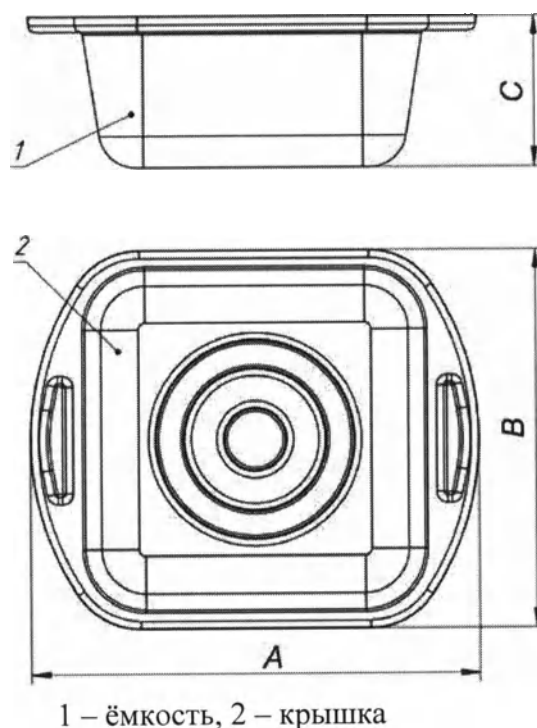

Объем, л,	длина (А), мм	ширина (В), мм	высота (С), мм	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг	Номинальная высота свободного падения, не менее, м
28±10%	595±15%	500±15%	200±15%	2,0±0,5	15,5±0,5	0,8

Рисунок 31 – КЭ-28 – Контейнер, объемом 28,0 л

6.1.12 Тележки оборудованы стояночной системой торможения. Стояночная система торможения легко управляется пользователем и обеспечивает удержание тележки под максимальной нагрузкой в неподвижном состоянии.

6.1.13 Тормоза колес включаются при приложении усилия на стояночную систему торможения не более 100 Н (10 кгс).

6.1.14 Тележки и комплектующие изделия устойчивы к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

6.1.15 Тележки и комплектующие изделия при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

6.1.16 Тележки и комплектующие изделия при транспортировании устойчивы к воздействию климатических факторов по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150; при хранении – по группе 2(С) ГОСТ 15150.

6.1.17 Тележки и комплектующие изделия при эксплуатации устойчивы к воздействию механических факторов для изделий группы 3 по ГОСТ Р 50444.

6.1.18 Тележки и комплектующие изделия, упакованные в транспортную тару устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, и обладать вибропрочностью и ударпрочностью для изделий группы 3 по ГОСТ Р 50444.

6.1.19 Тележки и комплектующие изделия обеспечивают непрерывный режим работы в течение времени, необходимого для выполнения одного или нескольких полных циклов обслуживания пациента или группы пациентов. Изделия многократного использования. Для повторного цикла применения подготовка не требуется.

6.2 Описание и принцип работы

6.2.1 Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью СТТ-МО-П-1, СТТ-МО-П-2, СТТ-МО-П-3 предназначена для использования в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной) для сбора медицинских отходов, образующихся при проведении медицинских процедур, и транспортировки от мест первичного сбора к месту хранения

Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью СТТ-МО-П-1 при необходимости может быть укомплектована фиксатором одноразовых пакетов (не более 4 шт.), корзиной для белья (1 шт.)

Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью СТТ-МО-П-2 при необходимости может быть укомплектована фиксатором одноразовых пакетов (не более 8 шт.), корзиной для белья (не более 2 шт.)

Тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью СТТ-МО-П-3 при необходимости может быть укомплектована фиксатором одноразовых пакетов (не более 12 шт.), корзиной для белья (не более 3 шт.)

Устойчивость Изделия гарантируется основанием с 4-мя колесами диаметром 75 мм, два из которых имеют тормозные устройства. Для облегчения работы предусмотрена педаль для открытия крышки ногой.

Порядок работы с Тележкой для транспортировки медицинских отходов, с педалью СТТ-МО-П-1, СТТ-МО-П-2, СТТ-МО-П-3:

- перед эксплуатацией проверить работоспособность тележки: крепление крышки; работу педали и крышки; устойчивость тележки на горизонтальной плоскости;
- вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки);
- закрепить пакет для сбора отходов в прямоугольном ободе тележки (при наличии дополнительно закрепить одноразовые пакеты на Тележке фиксаторами);
- осуществить сбор отходов в одноразовые пакеты;
- транспортировать тележку к месту установки межкорпусных контейнеров и отходы перегрузить в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса;
- вымыть, продезинфицировать и вытереть насухо тележку после использования и закрепить новый пакет.

6.2.2 Колесная опора для транспортировки медицинских отходов СТТ-КО-1, СТТ-КО-2 предназначена для транспортировки медицинских отходов в баках к местам временного хранения на территории медицинской организации. Колесная опора СТТ-КО-1 при необходимости может быть укомплектована баком с прессом, объемом 20,0 л или 35,0 л, белого, жёлтого или красного цвета, СТТ-КО-2 может быть укомплектована баком с прессом, объемом 12,0 л, белого, жёлтого или красного цвета.

Устойчивость изделия гарантируется основанием с 3-мя (СТТ-КО-1)/ 4-мя (СТТ-КО-2) колесами диаметром 75 мм, два из которых имеют тормозные устройства.

Бак с прессом предназначен для сбора, хранения, предварительной дезинфекции и обеззараживания, транспортирования и утилизации медицинских отходов

Порядок работы с Колесной опорой для транспортировки медицинских отходов СТТ-КО-1, СТТ-КО-2:

- перед эксплуатацией проверить работоспособность колесной опоры: крепление колес, работу педали, устойчивость колесной опоры на горизонтальной плоскости;
- вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки);
- установить бак на колесную опору;
- заполненные баки с помощью колесной опоры транспортировать к месту расположения межкорпусных контейнеров
- вымыть, продезинфицировать и вытереть насухо колесную опору после использования.

6.2.3 Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью СТТ-УИМ-П предназначена для транспортировки инвентаря и расходных материалов к месту проведения гигиенических процедур лежащим больным, с последующим сбором и транспортировкой отработанных материалов, медицинских отходов, образующихся при проведении гигиенических процедур, в пакетах, к местам временного хранения на территории медицинских организаций. Тележка при необходимости может быть укомплектована КО-7.5 – Контейнером, объемом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 2 шт.), корзиной для белья (1 шт.)

Контейнер предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и эксплуатации (предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания) медицинских изделий и расходных материалов в лечебно-профилактических учреждениях.

Порядок работы с Тележкой внутрибольничной для контейнеров и корзин, с педалью СТТ-УИМ-П:

- перед эксплуатацией проверить работоспособность тележки: крепление крышки и колес, работу педали, устойчивость колесной опоры на горизонтальной плоскости;
- вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки);
- установить и разместить на тележке все необходимые емкости (контейнеры), подлежащие транспортировке, закрепить корзину для белья (при наличии) или пакет для сбора отходов на рамке.
- транспортировать весь подготовленный инвентарь при помощи тележки к месту проведения гигиенических процедур.
- провести гигиенические процедуры в соответствии с установленным в медицинской организации порядком.
- провести сбор использованного инструментария, медицинских изделий и расходных материалов в соответствующие контейнеры, грязное белье пациента – в корзину для белья / пакет для медицинских отходов и транспортировку к местам их хранения, дезинфекции и стерилизации или утилизации, в зависимости от типа их использования.
- вымыть, продезинфицировать и вытереть насухо тележку после использования.

6.2.4 Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью СТТ-УИМ-П-1, СТТ-УИМ-П-2, СТТ-УИМ-3 предназначена для транспортировки инвентаря и расходных материалов к месту проведения гигиенических процедур лежачим больным, с последующим сбором и транспортировкой отработанных материалов, медицинских отходов, образующихся при проведении гигиенических процедур, в пакетах, к местам временного хранения на территории медицинских организаций.

Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью СТТ-УИМ-П-1 при необходимости может быть укомплектована КО-7.5 – Контейнером, объемом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 8 шт.), корзиной для белья (1 шт.)

Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью СТТ-УИМ-П-2 при необходимости может быть укомплектована КО-7.5 – Контейнером, объемом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 4 шт.), корзиной для белья (1 шт.)

Тележка внутрибольничная для контейнеров и корзин, с педалью СТТ-УИМ-3 при необходимости может быть укомплектована КО-7.5 – Контейнером, объемом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 2 шт.), корзиной для белья (1 шт.)

Контейнеры предназначены для транспортировки, кратковременного хранения и эксплуатации (предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания) медицинских изделий и расходных материалов в лечебно-профилактических учреждениях.

Порядок работы с Тележкой внутрибольничной для контейнеров и корзин, с педалью СТТ-УИМ-П-1, СТТ-УИМ-П-2, СТТ-УИМ-3:

- перед эксплуатацией проверить работоспособность тележки: крепление крышки и колес, работу педали, устойчивость колесной опоры на горизонтальной плоскости;
- вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки);
- установить и разместить на тележку все необходимые емкости (контейнеры), подлежащие транспортировке, закрепить корзину для белья (при наличии).
- транспортировать весь подготовленный инвентарь при помощи тележки к месту проведения гигиенических процедур.
- провести гигиенические процедуры в соответствии с установленным в медицинской организации порядком.
- провести сбор использованного инструментария, медицинских изделий и расходных материалов в соответствующие контейнеры, грязное белье пациента – в корзину для белья и транспортировку к местам их хранения, дезинфекции и стерилизации или утилизации, в зависимости от типа их использования.
- вымыть, продезинфицировать и вытереть насухо тележку после использования.

6.2.5 Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов СТТ-К-1, СТТ-К-2, СТТ-К-3, СТТ-К-4, СТТ-К-5, СТТ-К-6 предназначена для

размещения и транспортировки медицинских инструментов, медикаментов, расходных и перевязочных материалов, аппаратов и приборов в пределах лечебного учреждения.

Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов СТТ-К-1 при необходимости может быть укомплектована КО-12 – Контейнером, объёмом 12,0 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 3 шт.), КО-20 – Контейнером, объёмом 20,0 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 3 шт.), ПО-01 – Полкой (3 шт.), ПО-02 – Полкой (3 шт.).

Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов СТТ-К-2 при необходимости может быть укомплектована КО-12 – Контейнером, объёмом 12,0 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 6 шт.), КО-20 – Контейнером, объёмом 20,0 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 6 шт.), ПО-01 – Полкой (6 шт.), ПО-02 – Полкой (6 шт.).

Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов СТТ-К-3 при необходимости может быть укомплектована КО-7.5 – Контейнером, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 4 шт.).

Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов СТТ-К-4 при необходимости может быть укомплектована КО-7.5 – Контейнером, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 8 шт.).

Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов СТТ-К-5 при необходимости может быть укомплектована КО-4.5 – Контейнером, объёмом 4,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 3 шт.), КО-7.5 – Контейнером, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 3 шт.), КО-12 – Контейнером, объёмом 12,0 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 3 шт.), КО-20 – Контейнером, объёмом 20,0 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 3 шт.), ПО-01 – Полкой (3 шт.).

Тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов СТТ-К-6 при необходимости может быть укомплектована КО-4.5 – Контейнером, объёмом 4,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 3 шт.), КО-7.5 – Контейнером, объёмом 7,5 л белого, бирюзового или красного цвета (не более 3 шт.), ПО-01 – Полкой (2 шт.), ПО-02 – Полкой (1 шт.), ПО-03 – Полкой (1 шт.).

Контейнеры предназначены для транспортировки, кратковременного хранения и эксплуатации (предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания) медицинских изделий и расходных материалов в лечебно-профилактических учреждениях.

Порядок работы с Тележкой для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов СТТ-К-1, СТТ-К-2, СТТ-К-3, СТТ-К-4, СТТ-К-5, СТТ-К-6:

- перед эксплуатацией проверить работоспособность тележки: крепление колес, работу педали, устойчивость колесной опоры на горизонтальной плоскости

- вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки);

- установить все необходимые контейнеры, полки (при наличии) на тележке;

- разместить на тележке весь подготовленный для транспортировки инвентарь (медицинские инструменты, медикаменты, расходные и перевязочные материалы, аппараты и приборы) и транспортировать к месту назначения;

- вымыть, продезинфицировать и вытереть насухо тележку, полки и контейнеры после использования.

6.2.6 Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами СТТ-ИМ-01-4, СТТ-ИМ-01-6, СТТ-ИМ-01-8, СТТ-ИМ-02 предназначена для размещения и транспортировки медицинских инструментов, медикаментов, расходных и перевязочных материалов, аппаратов и приборов в пределах лечебного учреждения.

Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами СТТ-ИМ-01-4 при необходимости может быть укомплектована КЭ-14 – Контейнером, объёмом 14,0 л чёрного или белого цвета (не более 4 шт.), КЭ-28 – Контейнером, объёмом 28,0 л чёрного или белого цвета (не более 2 шт.).

Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами СТТ-ИМ-01-6 при необходимости может быть укомплектована КЭ-14 – Контейнером, объёмом 14,0 л чёрного или белого цвета (не более 6 шт.), КЭ-28 – Контейнером, объёмом 28,0 л чёрного или белого цвета (не более 3 шт.).

Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами СТТ-ИМ-01-8 при необходимости может быть укомплектована КЭ-14 – Контейнером, объемом 14,0 л чёрного или белого цвета (не более 8 шт.), КЭ-28 – Контейнером, объемом 28,0 л чёрного или белого цвета (не более 4 шт.).

Тележка для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами СТТ-ИМ-02 при необходимости может быть укомплектована КЭ-11 – Контейнером, объемом 11,0 л чёрного или белого цвета (не более 5 шт.).

Контейнеры предназначены для транспортировки, кратковременного хранения и эксплуатации (предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания) медицинских изделий и расходных материалов в лечебно-профилактических учреждениях.

Порядок работы с Тележкой для транспортировки контейнеров с медицинскими инструментами и расходными материалами СТТ-ИМ-01-4, СТТ-ИМ-01-6, СТТ-ИМ-01-8, СТТ-ИМ-02:

- перед эксплуатацией проверить работоспособность тележки: крепление крышки и колес, работу педали, устойчивость колесной опоры на горизонтальной плоскости
- вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки);
- установить все необходимые контейнеры (при наличии) на тележке;
- разместить на тележке весь подготовленный для транспортировки инвентарь (медицинские инструменты, медикаменты, расходные и перевязочные материалы, аппараты и приборы) и транспортировать к месту назначения;
- вымыть, продезинфицировать и вытереть насухо тележку и контейнеры после использования.

7 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7.1 Перед использованием прочесть инструкцию по применению.

7.2 К эксплуатации Изделия допускаются лица, знающие правила его эксплуатации.

7.3 Перед эксплуатацией убедитесь в технической исправности тележки: крепление крышки и колес, работу педали, устойчивость колесной опоры на горизонтальной плоскости;

7.4 Вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки);

7.5 Установить все необходимые комплектующие изделия (при наличии) на тележке;

7.6 Разместить на тележке весь подготовленный для транспортировки инвентарь (медицинские инструменты, медикаменты, расходные и перевязочные материалы, аппараты и приборы) и транспортировать к месту назначения;

7.7 Погрузку и разгрузку груза с Изделия выполняйте на ровной поверхности

7.8 Тележки и комплектующие изделия многоразового использования. Вымыть, продезинфицировать и вытереть насухо после каждого использования.

7.9 Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде;
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку ОТ загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размешено изделие.

9 ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА

Тележки и комплектующие изделия устойчивы к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96.

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен соответствовать п.1

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

Показание к применению – использовать Тележки в соответствии с их назначением.

Противопоказание – Тележки не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Возможные побочные эффекты – отсутствуют.

12 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

12.1 При работе следует соблюдать меры предосторожности (не ронять, не бросать во избежание поломок, повреждений, механических разрушений поверхностей).

12.2 Эксплуатация Тележек должна проводиться в соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения.

12.3 Тележки следует эксплуатировать внутри помещения, в местах, где оно будет защищено от воздействия сырости и конденсации влаги.

12.4 Во избежание возможного инфицирования в процессе эксплуатации Тележек, персонал, занятый транспортировкой должен быть обеспечен комплектами специальной защитной одежды и средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение тележек с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать тележки без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

Заполнять контейнеры и баки более чем на 3/4 от объема.

ВНИМАНИЕ! Масса содержимого контейнеров и баков в кг не должна превышать заявленную номинальную нагрузку более чем в 1,5 раза

13 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

13.1 Тележки и комплектующие изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

13.2 Условия транспортирования Тележек и комплектующих изделий – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150:

– температура от минус 50°C до плюс 50°C;

– относительная влажность от 75% при 15°C до 100 % при 25°C;

13.3 Хранение Тележек и комплектующих изделий должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских вентилируемых помещениях с исключением воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков и агрессивных сред.

13.4 Условия хранения Тележек и комплектующих изделий – по группе 2 (С) ГОСТ 15150:

– температура от минус 50°C до плюс 40°C;

– относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ (УНИЧТОЖЕНИИ)

14.1 Тележки и комплектующие изделия подлежат утилизации (уничтожению) в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

14.2 Тележки и комплектующие изделия, не поступившие в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежат вторичной переработке, либо подлежат утилизации (уничтожению) как твердые бытовые отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

15 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

15.1 В процессе изготовления Тележек и комплектующих изделий исключена возможность загрязнения окружающей среды отходами производства. Отходы, образующиеся при производстве продукции, утилизируются или перерабатываются во вторичное сырье на предприятии.

15.3 Производственные помещения, где ведутся работы, оснащены местной вытяжной вентиляцией, а помещения – общеобменной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021-75.

15.4 Технологический режим производства осуществляется соблюдением правил пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

15.5 При работе с Тележками специальных мер по защите природной среды от вредных воздействий не требуется.

16 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

– ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования»

– ГОСТ 177-88 «Водорода перекись. Технические условия»;

– ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования»;

– ГОСТ 9941-2022 «Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойких высоколегированных сталей. Технические условия»;

– ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия»;

– ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия»;

– ГОСТ 30736-2001 «Фурнитура для изделий легкой промышленности. Застежки-молнии пластмассовые. Общие технические условия»;

– ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;

– ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;

– ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия»;

– ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»;

– ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования»;

– ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

– ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения»;

– ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;

– ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»;

– ГОСТ 13837-79 «Динамометры общего назначения. Технические условия»;

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

17 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17.1 Изготовитель гарантирует соответствие Тележек и комплектующих изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

17.2 Гарантийный срок эксплуатации Тележек и комплектующих изделий – три года со дня ввода в эксплуатацию.

17.3 Гарантийный срок хранения Тележек и комплектующих изделий – три года со дня

18 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Тележки соответствуют ТУ 30.99.10-002-38736713-2023 и признаны годным для эксплуатации.

ОТК _____

Дата изготовления _____

19 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламация и информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) необходимо направить по адресу предприятия-изготовителя:

ООО «МВ Пауер Лимитед», Россия, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 30, каб. 401, тел: +7 843 202-31-18, e-mail: info@mvpower.ru

ООО «МВ Пауэр Лимитед»

В данном документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

_____ листа (ов)
Директор _____ **В.Н.Маврин**

