

01818620

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE




243301A0/002969

号码 No.

兹证明：在所附文件上的杭州昂升齿科材料有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of HANGZHOU ANGSHENG ORTHODONTIC PRODUCTS CO.,LTD on the annexed DOCUMENT is genuine.

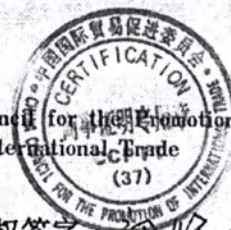China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字: 郭晓夫

Authorized
Signature: Guo Xiaofu日期: 2024年02月28日
(Date: Feb. 28, 2024)证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Инструкция по применению

На медицинское изделие

«Система брекетов и приспособлений для формирования ортодонтических аппаратов»»

Производитель:

«Ханчжоу Ангшенг Ортодонтик Продактс Ко.Лтд.» (Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd., Китай, провинция Чжэцзян, город Ханчжоу, район Юйхан, квартал Чунсянь, ул. Юньхэ, дом 31-1, корпус 6, этаж 4 (4th Floor, Building 6, No. 31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China)

Подпись
Печать



Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Назначение изделия:

«Система брекетов и приспособлений для формирования ортодонтических аппаратов», в составе:

Брекеты в необходимом варианте исполнения:

1.1 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), комплект, в упаковке 20 шт. в составе:

- Брекет UR1 -1шт.
- Брекет UR2-1шт.
- Брекет UR3-1шт.
- Брекет UR4-1шт.
- Брекет UR5-1шт.
- Брекет UL1-1шт.
- Брекет UL2-1шт.
- Брекет UL3-1шт.
- Брекет UL4-1шт.
- Брекет UL5-1шт.
- Брекет LR1-1шт.
- Брекет LR2-1шт.
- Брекет LR3-1шт.
- Брекет LR4-1шт.
- Брекет LR5-1шт.
- Брекет LL1-1шт.
- Брекет LL2-1шт.
- Брекет LL3-1шт.
- Брекет LL4-1шт.
- Брекет LL5-1шт.

1.2 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UR1, в упаковке 50шт.

1.3 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UR2, в упаковке 50шт.

1.4 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UR3, в упаковке 50шт.

1.5 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UR4, в упаковке 50шт.

1.6 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UR5, в упаковке 50шт.

1.7 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UL1, в упаковке 50шт.

1.8 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UL2, в упаковке 50шт.

1.9 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UL3, в упаковке 50шт.

1.10 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UL4, в упаковке 50шт.

1.11 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), UL5, в упаковке 50шт.

1.12 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LR1, в упаковке 50шт.

1.13 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LR2, в упаковке 50шт.

1.14 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LR3, в упаковке 50шт.

1.15 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LR4, в упаковке 50шт.

1.16 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LR5, в упаковке 50шт.

1.17 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LL1, в упаковке 50шт.

1.18 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LL2, в упаковке 50шт.

1.19 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LL3, в упаковке 50шт.

1.20 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LL4, в упаковке 50шт.

1.21 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series), LL5, в упаковке 50шт.

1.22 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), комплект, в упаковке 20 шт. в составе:

- Брекет UR1 -1шт.
- Брекет UR2-1шт.
- Брекет UR3-1шт.

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

- Брекеты LR4-1 шт.
- Брекеты UR5-1 шт.
- Брекеты UL1-1 шт.
- Брекеты UL2-1 шт.
- Брекеты UL3-1 шт.
- Брекеты UL4-1 шт.
- Брекеты UL5-1 шт.
- Брекеты LR1-1 шт.
- Брекеты LR2-1 шт.
- Брекеты LR3-1 шт.
- Брекеты LR4-1 шт.
- Брекеты LR5-1 шт.
- Брекеты LL1-1 шт.
- Брекеты LL2-1 шт.
- Брекеты LL3-1 шт.
- Брекеты LL4-1 шт.
- Брекеты LL5-1 шт.

1.23 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UR1, в упаковке 50 шт.

1.24 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UR2, в упаковке 50 шт.

1.25 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UR3, в упаковке 50 шт.

1.26 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UR4, в упаковке 50 шт.

1.27 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UR5, в упаковке 50 шт.

1.28 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UL1, в упаковке 50 шт.

1.29 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UL2, в упаковке 50 шт.

1.30 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UL3, в упаковке 50 шт.

1.31 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UL4, в упаковке 50 шт.

1.32 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), UL5, в упаковке 50 шт.

1.33 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LR1, в упаковке 50 шт.

1.34 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LR2, в упаковке 50 шт.

1.35 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LR3, в упаковке 50 шт.

1.36 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LR4, в упаковке 50 шт.

1.37 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LR5, в упаковке 50 шт.

1.38 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LL1, в упаковке 50 шт.

1.39 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LL2, в упаковке 50 шт.

1.40 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LL3, в упаковке 50 шт.

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LL4, в упаковке 50 шт.

1.42 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series), LL5, в упаковке 50 шт.

1.43 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), комплект, в упаковке 20 шт, в составе:

- Брекет UR1 -1шт.
- Брекет UR2-1шт.
- Брекет UR3-1шт.
- Брекет UR4-1шт.
- Брекет UR5-1шт.
- Брекет UL1-1шт.
- Брекет UL2-1шт.
- Брекет UL3-1шт.
- Брекет UL4-1шт.
- Брекет UL5-1шт.
- Брекет LR1-1шт.
- Брекет LR2-1шт.
- Брекет LR3-1шт.
- Брекет LR4-1шт.
- Брекет LR5-1шт.
- Брекет LL1-1шт.
- Брекет LL2-1шт.
- Брекет LL3-1шт.
- Брекет LL4-1шт.
- Брекет LL5-1шт.

1.44 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UR1, в упаковке 50шт.

1.45 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UR2, в упаковке 50шт.

1.46 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UR3, в упаковке 50шт.

1.47 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UR4, в упаковке 50шт.

1.48 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UR5, в упаковке 50шт.

1.49 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UL1, в упаковке 50шт.

1.50 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UL2, в упаковке 50шт.

1.51 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UL3, в упаковке 50шт.

1.52 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UL4, в упаковке 50шт.

1.53 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), UL5, в упаковке 50шт.

1.54 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LR1, в упаковке 50шт.

1.55 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LR2, в упаковке 50шт.

1.56 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LR3, в упаковке 50шт.

1.57 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LR4, в упаковке 50шт.

1.58 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LR5, в упаковке 50шт.

1.59 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LL1, в упаковке 50шт.

1.60 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LL2, в упаковке 50шт.

1.61 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LL3, в упаковке 50шт.

1.62 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LL4, в упаковке 50шт.

1.63 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series), LL5, в упаковке 50шт.

1.64 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series), комплект, в упаковке 20 шт, в составе:

- Брекет UR1 -1шт.
- Брекет UR2-1шт.
- Брекет UR3-1шт.

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

- Брекеты UR4-1шт.
- Брекеты UR5-1шт.
- Брекеты UL1-1шт.
- Брекеты UL2-1шт.
- Брекеты UL3-1шт.
- Брекеты UL4-1шт.
- Брекеты UL5-1шт.
- Брекеты LR1-1шт.
- Брекеты LR2-1шт.
- Брекеты LR3-1шт.
- Брекеты LR4-1шт.
- Брекеты LR5-1шт.
- Брекеты LL1-1шт.
- Брекеты LL2-1шт.
- Брекеты LL3-1шт.
- Брекеты LL4-1шт.
- Брекеты LL5-1шт.

- 1.65 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UR1, в упаковке 10шт.
- 1.66 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UR2, в упаковке 10шт.
- 1.67 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UR3, в упаковке 10шт.
- 1.68 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UR4, в упаковке 10шт.
- 1.69 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UR5, в упаковке 10шт.
- 1.70 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UL1, в упаковке 10шт.
- 1.71 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UL2, в упаковке 10шт.
- 1.72 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UL3, в упаковке 10шт.
- 1.73 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UL4, в упаковке 10шт.
- 1.74 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). UL5, в упаковке 10шт.
- 1.75 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LR1, в упаковке 10шт.
- 1.76 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LR2, в упаковке 10шт.
- 1.77 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LR3, в упаковке 10шт.
- 1.78 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LR4, в упаковке 10шт.
- 1.79 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LR5, в упаковке 10шт.
- 1.80 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LL1, в упаковке 10шт.
- 1.81 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LL2, в упаковке 10шт.
- 1.82 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LL3, в упаковке 10шт.
- 1.83 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LL4, в упаковке 10шт.
- 1.84 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series). LL5, в упаковке 10шт.
- 1.85 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series). комплект, в упаковке 20 шт, в составе:
- Брекеты UR1 -1шт.
 - Брекеты UR2-1шт.
 - Брекеты UR3-1шт.

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

- Брекеты UL4-1 шт.
- Брекеты UR5-1 шт.
- Брекеты UL1-1 шт.
- Брекеты UL2-1 шт.
- Брекеты UL3-1 шт.
- Брекеты UL4-1 шт.
- Брекеты UL5-1 шт.
- Брекеты LR1-1 шт.
- Брекеты LR2-1 шт.
- Брекеты LR3-1 шт.
- Брекеты LR4-1 шт.
- Брекеты LR5-1 шт.
- Брекеты LL1-1 шт.
- Брекеты LL2-1 шт.
- Брекеты LL3-1 шт.
- Брекеты LL4-1 шт.
- Брекеты LL5-1 шт.

- 1.86 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UR1, в упаковке 10 шт.
- 1.87 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UR2, в упаковке 10 шт.
- 1.88 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UR3, в упаковке 10 шт.
- 1.89 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UR4, в упаковке 10 шт.
- 1.90 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UR5, в упаковке 10 шт.
- 1.91 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UL1, в упаковке 10 шт.
- 1.92 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UL2, в упаковке 10 шт.
- 1.93 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UL3, в упаковке 10 шт.
- 1.94 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UL4, в упаковке 10 шт.
- 1.95 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), UL5, в упаковке 10 шт.
- 1.96 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LR1, в упаковке 10 шт.
- 1.97 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LR2, в упаковке 10 шт.
- 1.98 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LR3, в упаковке 10 шт.
- 1.99 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LR4, в упаковке 10 шт.
- 1.100 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LR5, в упаковке 10 шт.
- 1.101 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LL1, в упаковке 10 шт.
- 1.102 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LL2, в упаковке 10 шт.
- 1.103 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LL3, в упаковке 10 шт.
- 1.104 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LL4, в упаковке 10 шт.
- 1.105 Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series), LL5, в упаковке 10 шт.

1.106 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series), комплект, в упаковке 20 шт. в составе:

- Брекеты UR1 -1 шт.
- Брекеты UR2-1 шт.
- Брекеты UR3-1 шт.
- Брекеты UR4-1 шт.
- Брекеты UR5-1 шт.
- Брекеты UL1-1 шт.
- Брекеты UL2-1 шт.
- Брекеты UL3-1 шт.
- Брекеты UL4-1 шт.
- Брекеты UL5-1 шт.
- Брекеты LR1-1 шт.
- Брекеты LR2-1 шт.
- Брекеты LR3-1 шт.

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

- Брекеты LL4-1шт.
- Брекеты LL5-1шт.
- Брекеты LL1-1шт.
- Брекеты LL2-1шт.
- Брекеты LL3-1шт.
- Брекеты LL4-1шт.
- Брекеты LL5-1шт.

- 1.107 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UR1. в упаковке 10шт.
- 1.108 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UR2. в упаковке 10шт.
- 1.109 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UR3. в упаковке 10шт.
- 1.110 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UR4. в упаковке 10шт.
- 1.111 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UR5. в упаковке 10шт.
- 1.112 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UL1. в упаковке 10шт.
- 1.113 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UL2. в упаковке 10шт.
- 1.114 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UL3. в упаковке 10шт.
- 1.115 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UL4. в упаковке 10шт.

- 1.116 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). UL5. в упаковке 10шт.
- 1.117 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LR1. в упаковке 10шт.
- 1.118 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LR2. в упаковке 10шт.
- 1.119 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LR3. в упаковке 10шт.
- 1.120 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LR4. в упаковке 10шт.
- 1.121 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LR5. в упаковке 10шт.
- 1.122 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LL1. в упаковке 10шт.
- 1.123 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LL2. в упаковке 10шт.
- 1.124 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LL3. в упаковке 10шт.
- 1.125 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LL4. в упаковке 10шт.
- 1.126 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series). LL5. в упаковке 10шт.

- 1.127 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series). комплект.
в упаковке 20 шт., в составе:

- Брекеты UR1 -1шт.
- Брекеты UR2-1шт.
- Брекеты UR3-1шт.
- Брекеты UR4-1шт.
- Брекеты UR5-1шт.
- Брекеты UL1-1шт.
- Брекеты UL2-1шт.
- Брекеты UL3-1шт.
- Брекеты UL4-1шт.
- Брекеты UL5-1шт.
- Брекеты LR1-1шт.
- Брекеты LR2-1шт.
- Брекеты LR3-1шт.
- Брекеты LR4-1шт.
- Брекеты LR5-1шт.
- Брекеты LL1-1шт.
- Брекеты LL2-1шт.
- Брекеты LL3-1шт.
- Брекеты LL4-1шт.
- Брекеты LL5-1шт.

- 1.128 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series). UR1. в упаковке 10шт.

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), UR2, в упаковке 10шт.
Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), UR3, в упаковке 10шт.
Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), UR4, в упаковке 10шт.
Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), UR5, в упаковке 10шт.
1.132 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), UL1, в упаковке 10шт.
1.133 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), UL2, в упаковке 10шт.
1.134 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), UL3, в упаковке 10шт.
1.135 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), UL4, в упаковке 10шт.
1.136 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), UL5, в упаковке 10шт.
1.137 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LR1, в упаковке 10шт.
1.138 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LR2, в упаковке 10шт.
1.139 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LR3, в упаковке 10шт.
1.140 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LR4, в упаковке 10шт.
1.141 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LR5, в упаковке 10шт.
1.142 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LL1, в упаковке 10шт.
1.143 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LL2, в упаковке 10шт.
1.144 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LL3, в упаковке 10шт.
1.145 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LL4, в упаковке 10шт.
1.146 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series), LL5, в упаковке 10шт.

2. Замки в необходимом варианте исполнения:

2.1 Замки трубки для приклеивания на 1-й моляр конвертируемые (Buccal Tubes 1st Molar Bondable Convertible) комплект поставки №1, в упаковке 4 шт., в составе:

Замок UR-1шт.

Замок UL-1шт.

Замок LR-1шт.

Замок LL-1шт.

2.2 Замки трубки для приклеивания на 1-й моляр конвертируемые (Buccal Tubes 1st Molar Bondable Convertible) комплект поставки №2, в упаковке 200 шт., в составе:

Замок UR-50 шт.

Замок UL- 50шт.

Замок LR- 50 шт.

Замок LL-50 шт.

2.3 Замки трубки для приклеивания на 1-й моляр неконвертируемые (Buccal Tubes 1st Molar Bondable No-Convertible), комплект поставки №1, в упаковке 4 шт., в составе:

Замок UR-1шт.

Замок UL-1шт.

Замок LR-1шт.

Замок LL-1шт.

2.4 Замки трубки для приклеивания на 1-й моляр неконвертируемые (Buccal Tubes 1st Molar Bondable No-Convertible), комплект поставки №2, в упаковке 200 шт., в составе:

Замок UR-50 шт.

Замок UL- 50шт.

Замок LR- 50 шт.

Замок LL-50 шт.

2.5 Замки трубки для приклеивания на 2-ой моляр неконвертируемые (Buccal Tubes 2nd Molar Bondable No-Convertible), комплект поставки №1, в упаковке 4 шт., в составе:

Замок UR-1шт.

Замок UL-1шт.

Замок LR-1шт.

Замок LL-1шт.

2.6 Замки трубки для приклеивания на 2-ой моляр неконвертируемые (Buccal Tubes 2nd Molar Bondable No-Convertible), комплект поставки №2, в упаковке 200 шт., в составе:

Замок UR-50 шт.

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

0 шт.
50 шт.
LL-50 шт.
Замки ножны лингвальные (Lingual Sheath), в упаковке 10 шт.

3. Кольца бандажные в необходимом варианте исполнения (при необходимости):

3.1 Кольца бандажные на 1-й моляр (Bands 1st Molar), комплект, в упаковке 4 шт., в составе:

Кольцо UR-1шт.

Кольцо UL-1шт.

Кольцо LR-1шт.

Кольцо LL-1шт.

3.2 Кольца бандажные на 2-й моляр (Bands 2nd Molar) комплект, в упаковке 4 шт., в составе:

Кольцо UR-1шт.

Кольцо UL-1шт.

Кольцо LR-1шт.

Кольцо LL-1шт.

4. Дуги в необходимом варианте исполнения (при необходимости):

4.1 Дуги нитиноловые круглые (NiTi Arch Wires), в упаковке 10 шт.

4.2 Дуги нитиноловые прямоугольные (NiTi Arch Wires), в упаковке 10 шт.

4.3 Дуги стальные круглые (Stainless Steel Wires), в упаковке 10 шт.

4.4 Дуги стальные прямоугольные (Stainless Steel Wires), в упаковке 10 шт.

5. Тяги эластичные в необходимом варианте исполнения (при необходимости):

5.1 Лигатуры эластичные (Ligature Ties), в упаковке 1040 шт.

5.2 Цепочки эластичные (Power Chain), в упаковке 15 шт.

5.3 Кольца эластичные (O-ring), в упаковке 5000 шт.

5.4 Сепараторы эластичные (Separators), в упаковке 700 шт.

6. Пружины в необходимом варианте исполнения (при необходимости):

6.1 Пружины открывающие (Open Coil Spring), в упаковке 2 шт.

6.2 Пружины закрывающие (Closed Coil Spring), в упаковке 10 шт.

6.3 Пружины торковые Niti (Niti Torquing Spring), в упаковке 10 шт.

7. Кнопки, крючки, брекеты накусочные, стопоры, трубки зажимные в необходимом варианте исполнения (при необходимости):

7.1 Кнопки лингвальные (Lingual Buttons), в упаковке 10 шт.

7.2 Кнопки лингвальные с петлей (Direct Bond Eyelet), в упаковке 10 шт.

7.3 Кнопки с цепочкой (Button chain), в упаковке 10 шт.

7.4 Крючки лингвальные (Lingual Cleat), в упаковке 10 шт.

7.5 Крючки лингвальные с петлей (Traction Hooks), в упаковке 10 шт.

7.6 Брекет накусочный (Bite Opener), в упаковке 10 шт.

7.7 Стопоры зажимные (Crimpable Stops), в упаковке 10 шт.

7.8 Стопоры зажимные с крючками (Crimpable Hooks), в упаковке 10 шт.

7.9 Трубки зажимные (Crimpable Tubes), в упаковке 10 шт.

8. Ретейнеры, лигатуры стальные, дуги небные (при необходимости):

8.1 Лигатуры стальные (Stainless Steel Ties), в упаковке 10 шт.

8.2 Ретейнеры лингвальные (Lingual Retainers), в упаковке 2 шт.

8.3 Дуги небные (Palatal Bar), в упаковке 2 шт.

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Применение: Ортодонтические изделия относятся к несъемным ортопедическим приспособлениям для приращения к зубам с целью воздействия на форму и/или функцию зубочелюстной системы для исправления аномалий прикуса и зубочелюстных деформаций.

Показания к применению

Ортодонтический брекет относится к несъемным приспособлениям для исправления аномалии прикуса и зубочелюстной деформации.

Все ортодонтические брекеты используются в ортодонтическом лечении для принятия и передачи силы дуги. В ходе клинических процедур ортодонтические брекеты прикрепляются к поверхности зуба, помогая исправить деформацию зубов и выровнять зубной ряд. Цель - выравнивание зубного ряда. Ортодонтические замки трубки приклеиваются к поверхности зуба. Затем с конца замка трубки в них вставляется ортодонтическая дуга для фиксации. Замок трубка имеет небольшой крючок, который можно использовать для сцепления на челюсти или между челюстями, например, для подвешивания эластичных колец. Способствует смещению зуба.

Кольца бандажные ортодонтические - ортодонтический замок трубка прикрепляется к боковой стороне ортодонтического бандажного кольца. В зависимости от размера зубов выбирайте бандажные кольца разного размера и закрепляйте их на зубах. С конца замка трубки вставляется ортодонтическая дуга для фиксации. Замок трубка имеет небольшой крючок, который можно использовать для сцепления на челюсти или между челюстями, например, для подвешивания эластичных колец. Способствует смещению зуба.

Дуги нитиноловые и стальные - ортодонтическая нитиноловая дуга используется вместе с брекетами и замками трубками. Сначала к зубам прикрепляют брекеты и замок трубку. Вставляют ортодонтическую дугу в паз брекета и замка трубки и фиксируют с помощью эластичных колец. Это позволяет поддерживать зубы, нуждающиеся в ортодонтическом лечении, и выравнивать зубной ряд.

Тяги эластичные используют вместе с брекетами, трубками, бандажными кольцами, дугами и другими принадлежностями.

Лигатуры эластичные: Растяните эластичные лигатуры и вставьте их в брекеты. Эластичные лигатуры фиксируют брекет и дугу.

Цепочки эластичные: выберите длину цепочки и наденьте цепочку на брекеты, трубки или бандажные кольца. Цепочка способствует смещению зубов.

Кольца эластичные: выберите эластичные кольца разных размеров, наденьте на трубки или брекеты. Кольца способствуют смещению зубов.

Сепараторы эластичные: поместите между двумя зубами, чтобы увеличить промежуток между зубами.

Пружины, кнопки, брекеты накусочные, трубки зажимные, ретейнеры, лигатуры стальные и дуги небные используют совместно с брекетом, замками-трубками, тягами эластичными и бандажными кольцами. Для смещения зубов в каждом отдельном случае выбирают разные приспособления. Их используют для сцепления с зубами и стягивание зубов в процессе ортодонтического лечения для смещения зубов. В ходе ортодонтического лечения взаимодействуют с брекетами и подбираются индивидуально в зависимости от состояния пациентов.

Противопоказания:

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Пит, гингивит.

остав нержавеющей стали входят хром и никель. У некоторых пациентов может быть аллергия на эти компоненты. Просим применять изделие с осторожностью. Если в процессе использования появилась аллергия, немедленно обратитесь к врачу. С осторожностью применяйте изделие у пациентов с пародонтитом. Кроме того, коррекцию зубов обычно не осуществляют пациентам с системными заболеваниями, такими как гипертиреоз, диабет, туберкулез и психические заболевания, а также людям с большим дефицитом веса и беременным женщинам.

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия:

Потенциальными потребителями являются только профессионально подготовленный медицинский персонал, имеющий соответствующую квалификацию - стоматологи, использующие ортодонтические изделия для лечения зубов (исправления аномалий прикуса и зубочелюстных деформаций).

Данные изделия не предназначены для использования в бытовых целях.

Целевая группа пациентов - взрослые и дети. Для ортодонтических процедур не существует строгих возрастных ограничений. После того, как в возрасте 12 - 13 лет молочные зубы полностью заменяются постоянными зубами, расположение и положение зубов является относительно стабильным и поддается исправлению.

Описание

Ортодонтический брекет относится к несъемным приспособлениям для исправления аномалии прикуса и зубочелюстной деформации. Приспособления используются для сцепления с зубами и стягивание зубов в процессе ортодонтического лечения для смещения зубов.

Взаимодействие с брекетами: В ходе ортодонтического лечения принадлежности к брекетам и брекеты взаимодействуют друг с другом. Приспособления подбираются индивидуально в зависимости от состояния пациентов.

Структура:


Изделие	состоит	из	четырёх	частей:
1) Рабочий паз: выбор размера 0.022"*0.025" или 0.018"*0.022" отсылает к аналогичным изделиям в Китае (China) и за рубежом, а также к клиническому применению теоретических знаний и особенностей пациента.				
2) Лигатурные крылья: для фиксации ортодонтической дуги с помощью лигатур.				
3) Основание: конструкция основания ортодонтического брекета должна обеспечивать функцию механической фиксации основания брекета на клей. В настоящее время двумя основными конструкциями основы являются «ласточкин хвост» и сетка.				
4) Конструкция в виде двойных крыльев с обеих сторон: внешний край лигатурных крыльев закруглен для уменьшения стимуляции десневой ткани и повышения комфорта пациента.				

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司 Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

самортизирующие металлические

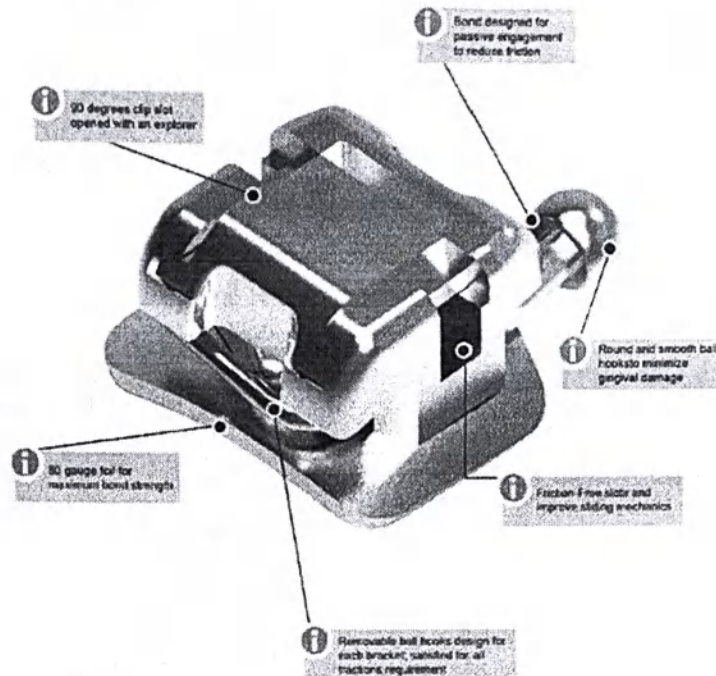



<u>90 degrees clip slot opened with an explorer</u>	Паз для зажима под углом 90°, открываемый с помощью зонда
<u>Bond designed for passive engagement to reduce friction</u>	Крепление, разработанное для пассивного сцепления и уменьшения трения
<u>Round and smooth ball hooksto minimize gingival damage</u>	Круглые гладкие шаровидные крючки для минимизации повреждения десен
<u>80 gauge foil for maximum bond strength</u>	Фольга толщиной 80 для максимальной прочности крепления
<u>Friction-Free slots and improve sliding mechanics</u>	Пазы, не создающие трения, и улучшенная механика скольжения
<u>Removable ball hooks design for each bracket: satisfied for all tractions requirement</u>	Съемные шаровидные крючки для каждого брекета: соответствуют всем требованиям к сцеплению

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Аппарат
лигатурные металлические

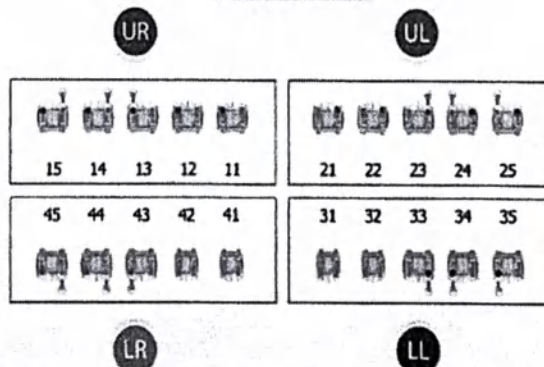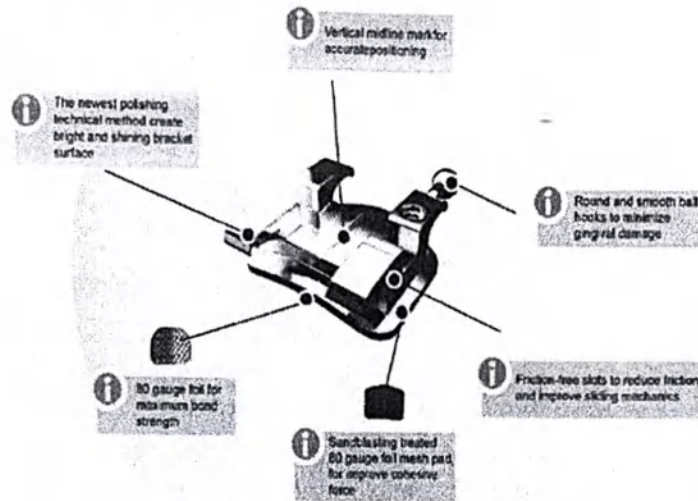

<u>Vertical midline mark for accurate positioning</u>	Вертикальная линия в центре для точного размещения
<u>The newest polishing technical method create bright and shining bracket surface</u>	Новейшая технология полировки позволяет создать светлую блестящую поверхность брекета
<u>Round and smooth ball hooks to minimize gingival damage</u>	Круглые гладкие шаровидные крючки для минимизации повреждения десен
<u>80 gauge foil for maximum bond strength</u>	Фольга толщиной 80 для максимальной прочности крепления
<u>Friction-free slots to reduce friction and improve sliding mechanics</u>	Пазы, не создающие трения, для уменьшения трения и улучшения механики скольжения
<u>Sandblasting treated 80 gauge foil mesh pad for improve cohesive force</u>	Пескоструйная обработка сетки из фольги толщиной 80 для улучшения когезионной прочности

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China


杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

ы на 1-й моляр

/Логотип: ОРТОДОНТИЯ/



ORTHODONTICS

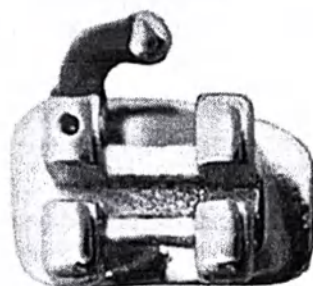

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Физические и технические характеристики

Поверхность гладкая: при нормальном использовании не происходит обесцвечивания и эрозии; хорошая жесткость: прочность фиксации на поверхностном слое $>25\text{N}$. Биологические характеристики: отсутствие раздражения слизистой оболочки полости рта, цитотоксичности, гиперчувствительности замедленного типа, острой системной токсичности (пероральный путь), отсутствие анализа на обратную мутацию *salmonella typhimurium*; твердость по Виккерсу 220 Hv - 333 Hv (для продуктов: Liberty Series - Metal Self Ligating Bracket: Rainbow Series - Standard Metal Bracket; Rainbow Series - Mini Metal Bracket tube: Orthodontic Buccal Tubes 1st Molar Bondable No-Convertible; Orthodontic Buccal Tubes 1st Molar Bondable Convertible; Orthodontic Buccal Tubes 2nd Molar Bondable No-Convertible).

Материалы изготовления:

Материалы, контактирующие с организмом человека:

- 1) Нержавеющая сталь марки SUS630 - Брекеты ортодонтические металлические: Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series); Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт и мини (Standard Metal Bracket, Mini Metal Bracket Rainbow Series); приспособления ортодонтические: Замки трубки для приклеивания на 1-й моляр конвертируемые (Buccal Tubes 1st Molar Bondable Convertible), Замки трубки для приклеивания на 1-й моляр неконвертируемые (Buccal Tubes 1st Molar Bondable No-Convertible), Замки трубки для приклеивания на 2-ой моляр неконвертируемые (Buccal Tubes 2nd Molar Bondable No-Convertible).
- 2) Алюминий АО-3 100% - Брекеты ортодонтические керамические: Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series); Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series); Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series); Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series).
- 3) Нержавеющая сталь, марка SUS304 - Кольца бандажные (Orthodontic Bands) на 1-й моляр (1st Molar), Кольца бандажные на 2-й моляр (Bands 2nd Molar), Дуги стальные (круглые, прямоугольные) (Orthodontic Stainless Steel Wire (Round Wire, Rectangular Wire)), Лигатуры стальные (Stainless Steel Ties), Кнопки лингвальные (Lingual Buttons), Крючки лингвальные (Lingual Cleat), Крючки лингвальные с петлей (Traction Hook), Кнопки лингвальные с петлей (Direct bond eyelet), Брекеты накусочные (Bite opener), Кнопки с цепочкой (Button chain), Замки-ножны лингвальные (Lingual sheath), Стопоры зажимные (Crimpable stops), Стопоры зажимные с крючками (Crimpable Hooks), Трубки зажимные (Crimpable tubes), Ретейнеры лингвальные (Lingual retainers), Дуги небные (Palatal Bar).
- 4) Сплав никель-титановый марки Af30 - Дуги нитиноловые (Orthodontic Niti Wire): Круглые (Round Wire), прямоугольные (Rectangular Wire), Пружины открывающие (Open Coil Spring), Пружины торковые Niti (Niti Torquing Spring), Пружины закрывающие (Closed Coil Spring).
- 5) Медицинская резина, марка TPU 1485A - Ортодонтический эластомер (Orthodontic Elastomer), Лигатуры эластичные (Ligature Ties), Цепочки эластичные (Power Chain), Кольца эластичные (O-ring), Сепараторы эластичные (Separator).

Лигатуры имеют 10 цветов: Прозрачный (без номера CAS) Серии: 877C Красный: 1797C Оранжевый: 1645C Желтый: 123C Зеленый: 7733C Синий: 655C Небесно-голубой: 298C Черный: 6C Фиолетовый: 2354C. Цепочки имеют 10 цветов: Прозрачный: (без номера CAS) Серии: 877C Красный: 1797C Оранжевый: 1645C Желтый: 123C Зеленый: 7733C Синий: 655C Небесно-голубой: 298C Черный: 6C Фиолетовый: 2354C.

Меры предосторожности:

Изделия необходимо полностью продезинфицировать перед использованием. Запрещается снимать брекеты в процессе светотверждения или приклеивания, либо воздействовать на прочность крепления. Ортодонтические

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

являются одноразовыми изделиями.
не допускается повторное применение использованных брекетов другому пациенту. В аустенитной нержавеющей стали присутствуют хром и никель, некоторые пациенты чувствительны к данным элементам. Просим немедленно связаться со стоматологом, если это произошло.
Ортодонтические брекеты должны устанавливаться только профессиональными ортодонтами.

Нежелательные явления:

Побочных эффектов или нежелательных реакций в ходе лечения не выявлено.

Характеристики:

Длина дуг составляет 150мм ±10мм

Угол наклона ортодонтических брекетов: (допуск ±0,5°):

1 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket):

Roth

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	5°	9°	11°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

Угол наклона (Angulation)

MBT

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	4°	8°	0°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°

Угол наклона (Angulation)

2 Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series):

Roth

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	5°	9°	11°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

Угол наклона (Angulation)

MBT

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	4°	8°	8°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°

Угол наклона (Angulation)

3 Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series):

Roth

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	5°	9°	11°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

Угол наклона (Angulation)

MBT

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	4°	8°	9°	0°	0°	0°	0°	4°	0°	0°

Угол наклона (Angulation)

4. Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series)

Roth

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

No.)

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Угол наклона (Angulation)	5°	9°	11°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	4°	8°	8°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°

5 Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series)

Roth

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	5°	9°	11°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

MBT

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	4°	8°	8°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°

6 Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series):

Roth

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	5°	9°	11°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

MBT

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	4°	8°	8°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	2°

7 Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series)

Roth

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	5°	9°	11°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°

MBT

№ зуба (Teeth No.)	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Угол наклона (Angulation)	4°	8°	8°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

технической характеристики «Торк» – крутящего момента ((torque):

допуск крутящего момента составляет $\pm 2^\circ$ (torque)										
Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, стандарт (Standard Metal Bracket Rainbow Series)										
№.зуба	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Roth	12°	8°	-2°	-7°	-7°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
MBT	17°	10°	0°	-7°	-7°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Брекеты лигатурные металлические серия Rainbow, мини (Mini Metal Bracket Rainbow Series)										
№.зуба	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Roth	12°	8°	-2°	-7°	-7°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
MBT	17°	10°	-8°	-7°	-7°	-6°	-6°	-3°	-12°	-17°
Брекеты самолигирующие металлические серия Liberty (Metal Self Ligating Bracket Liberty Series)										
№.зуба	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Roth	12°	8°	-2°	-7°	-7°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
MBT	17°	9°	-8°	-7°	-7°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Брекеты лигатурные сапфировые серия Christal (Sapphire Bracket Christal Series)										
№.зуба	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Roth	12°	8°	-2°	-7°	-7°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
MBT	17°	10°	0°	-7°	-7°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Брекеты самолигирующие сапфировые серия Elegant (Sapphire Self Ligating Bracket Elegant Series)										
№.зуба	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Roth	12°	8°	-2°	-7°	-7°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
MBT	17°	10°	0°	-7°	-7°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Брекеты самолигирующие керамические серия Eros (Ceramic Self Ligating Bracket Eros Series)										
№.зуба	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Roth	12°	8°	-2°	-7°	-7°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
MBT	17°	10°	-7°	-7°	-7°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Брекеты лигатурные керамические серия Snowy (Ceramic Bracket Snowy Series)										
№.зуба	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Roth	12°	8°	-2°	-7°	-7°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
MBT	17°	10°	-7°	-7°	-7°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°

Стерильность.

Не стерильно, не стерилизуемо. Однократного применения. Необходима перед применением дезинфекция.

Дезинфицируется врачом перед использованием.

В составе данного медицинского изделия отсутствуют лекарственные средства.

Изделие не требует технической поддержки или калибровки.

При обнаружении дефектов верните изделие производителю или утилизируйте.

Компоненты, предоставляемые компанией, можно использовать с брекетами, в зависимости от потребностей врача.

Меры предосторожности

- Брекеты должен устанавливать квалифицированный врач-ортодонт.

К сведению врача:

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Используйте соответствующий брекет для каждого зуба.

Проверяйте гигиеническое состояние изделия и наличие повреждений на изделии перед каждым использованием.

- Не прикасайтесь к брекетам руками, не допускайте контакта основания брекетов с маслом или влагой перед нанесением адгезивного материала.
- Во избежание поломки изделия, не прилагайте чрезмерных усилий и не допускайте избыточно высокого крутящего момента.
- При поломке брекетов утилизируйте их и используйте новое изделие.
- Не используйте повторно поврежденные брекеты или брекеты, снятые после проведения лечения.
- При снятии брекетов не прикладывайте чрезмерных усилий во избежание повреждения зубов пациента.
- Данное изделие представляет собой брекет стандартного типа. Он может использоваться непосредственно с другими применимыми компонентами, включая дуги, адгезивный материал и пинцет.
- Предназначенными для применения с брекетами.
- После завершения лечения удалите брекеты, скручивая их в направлении окклюзионной поверхности или десны с помощью специальных щипцов для снятия брекетов. Не прикладывайте чрезмерных усилий для снятия брекета.
- После удаления брекета утилизируйте его и никогда не используйте повторно.

К сведению пациента:

- При любом повреждении брекета немедленно обратитесь к врачу.
- Не удаляйте брекет или проволоку во время лечения.
- Не рекомендуется употреблять жевательную резинку или любые вязкие/клейкие продукты питания.
- Чистите зубы после еды.

Потенциальные потребители (в отношении возраста, диагноза и т.п.)

- Наши потенциальные потребители – пациенты с аномалией прикуса.
- Потребители, желающие улучшить свою внешность.
- Потребители, желающие излечить мешающую аномалию прикуса.
- Потребители с нарушением артикуляции
- Пациенты с повреждениями/сколами зубов в результате несчастного случая.
- Возрастных ограничений нет. Учитывается состояние зубов и кости пациента.

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Установка:

Брекеты крепятся с помощью всех стандартных ортодонтических клеев. Допускается смешивание и несмешивание клеев.

2. Снятие и обращение

Захватите брекет гемостатическими щипцами или пинцетом для брекетов за мезиально-дистальные поверхности или за дистальное и мезиальное крыло брекета и извлеките из упаковки. Берегите основание брекета от загрязнения, это может отрицательно повлиять на качество крепления.

3. Подготовка зубов

Тщательно проверьте каждый зуб на наличие/отсутствие повреждений эмали, чтобы убедиться в отсутствии «сюрпризов» в виде повреждения зуба при снятии брекета.

Соблюдайте инструкции производителя ортодонтического клея для сохранения хорошего состояния зубов.

4. Нанесение ортодонтического клея

Подготовьте ортодонтический клей в соответствии с инструкциями производителя. Нанесите немного клея в центр основания брекета. Этого количества должно быть достаточно, чтобы покрыть поверхность для приклеивания.

Это обеспечит оптимальную прочность склеивания.

5. Размещение брекетов

После нанесения клея установите брекет на зуб обычным способом, выровняйте брекет и прижмите его к зубу. До затвердевания клея (время затвердевания в соответствии с инструкциями производителя клея) полностью удалите выступающие излишки клея вокруг основания брекета. Это особенно важно для упрощения снятия брекетов в конце лечения.

6. Установка дуги и лигирование

Лигирование можно выполнить обычным способом после затвердевания клея.

7. Снятие брекетов

Брекеты можно отсоединить с помощью инструмента для удаления. Возьмитесь за брекет мезиально и дистально и осторожно отсоедините основание брекета от зуба, закрывая плоскогубцы и сгибая брекет. Затем, при необходимости, снимите брекет с зуба. Не тяните брекет, а быстро поворачивайте его вправо или влево.

8. Общая информация

Техническую информацию см. на соответствующей этикетке изделия или в технических характеристиках в каталоге, например: крутящий момент, угол наклона, размер и т.д.

Предупреждение:

Перед использованием совместно с ортодонтическими брекетами таких принадлежностей, как ортодонтические трубки, ортодонтические бандажные кольца, адгезивные материалы, дуги и другие вспомогательные материалы, убедитесь, что они находятся в хорошем состоянии и с неиспущенным сроком годности.

Не рекомендуется есть твердую или вязкую пищу, жевать жевательную резинку.

Упаковка:

Каждый комплект брекетов (для верхней и нижней челюсти, верхние и нижние, по 5 шт. в каждом квадранте, всего 20 шт.) упаковывают в отдельную коробку, имеющую идентификационную маркировку для каждого зуба. Каждый брекет имеет отдельное место для хранения, никогда не смешиваясь с другими брекетами. Кроме того, на этикетке коробки указана следующая информация: название изделия, модель, количество штук и бренд.

Метод эксплуатации до применения:

Соблюдайте методы эксплуатации своей страны.

Дезинфекция:

Настоятельно рекомендуется применять методы дезинфекции перед использованием.

Изделие поставляется в нестерильном виде. Перед применением - дезинфекция перед применением:

Дезинфицируется врачом перед использованием (Перед использованием врач должен поместить ортодонтические брекет в медицинский спирт для дезинфекции в течение 20-30 минут, и только потом использовать)

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Условия хранения, эксплуатации, транспортировки:

Ортодонтические изделия хранят при относительной влажности до 80 %, в хорошо вентилируемом чистом помещении при отсутствии в воздухе коррозирующих газов. Изделие может храниться до 5 лет.

Условия эксплуатации: Ортодонтические изделия используют при относительной влажности до 80 %, в хорошо вентилируемом чистом помещении при отсутствии в воздухе коррозирующих газов.

Чтобы изделие оставалось чистым, сухим и готовым к работе, храните упакованное изделие в сухом месте при умеренных условиях в соответствии с рекомендациями лечебного учреждения.

Температура хранения от 2 до 25 °C.

Другие особые требования к хранению отсутствуют.

Относительная влажность составляет до 80 % при температуре 25 °C.

Атмосферное давление должно составлять 106,7 кПа.

Хранить вдали от источников влаги. Опасные материалы отсутствуют.

Условия транспортировки: Поместите ортодонтические изделия в картонную коробку; заполните коробку защитным материалом. Хранить в оригинальной упаковке в сухом и чистом помещении при температуре окружающей среды. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и других источников тепла. Особых требований к транспортировке нет.

Гарантия

Компания, производящая ортодонтические изделия, несет ответственность за замену изделий, если брекеты и принадлежности к брекетам не использовались обычным образом из-за проблем с качеством изделий в течение двух лет с даты отгрузки; при этом изделия хранились и использовались надлежащим образом.

Утилизация после использования:

Следует соблюдать местные нормы и регламенты. Не опасные отходы, класс А.

Срок службы: 5 лет

Данные о маркировке и упаковке:

Брекеты в комплекте поставляются в полипропиленовой (ПП) –экологически чистой герметичной пластиковой упаковке по 20 шт.. Отдельные брекеты упакованы в прозрачный полиэтиленовый (ПЭ) пакетафутляр по 50 или 10 шт. Замки в комплекте по 200шт. упакованы в полипропиленовую (ПП) экологически чистую пластиковую герметичную упаковку. Замки в комплекте по 4 шт. или 10 шт. упакованы в прозрачного полиэтиленового (ПЭ) пакетафутляр. Дуги по 10 шт. и кольца эластичные упакованы по 5000 шт. в бумажную упаковку. Пружины открывающие по 2шт.. Сепараторы эластичные по 700шт.. Цепочки эластичные по 15шт. поставляются в полипропиленовой (ПП) –экологически чистой герметичной пластиковой упаковке. Остальные изделия: Кольца бандажные по 4 шт., Лигатуры эластичные по 1040шт., Пружины торковые Nitī по 10шт., Пружины закрывающие по 10 шт., Кнопки лингвальные по 10шт., Кнопки лингвальные с петлей по 10шт., Кнопки с цепочкой по 10шт., Крючки лингвальные по 10шт., Крючки лингвальные с петлей по 10шт., Брекеты накусочные по 10шт., Стопоры зажимные по 10шт., Стопоры зажимные с крючками по 10шт., Трубки зажимные по 10шт., Лигатуры стальные по 10 шт., Ретейнеры лингвальные по 2 шт., Дуги небные по 2 шт. поставляются в прозрачном полиэтиленовом (ПЭ) пакетафутляре.

На русской этикетке указывают:

Наименование производителя

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

杭州昂升齿科材料有限公司
Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Наименование уполномоченного представителя в РФ _____
 Наименование изделия _____ (Roth _____ Крючок _____ /номер зуба/(для брекетов))
 Дата изготовления _____ Партия _____ Количество _____ шт.
 Не стерильно, не стерилизуемо. Однократного применения. см. инструкцию по применению.
 Регистрационное удостоверение в РФ _____

Символы, указываемые на упаковке:

символ	описание	символ	описание
	Дата производства		Номер по каталогу или название модели
	Не используйте повторно	LOT	Партия

Уполномоченный представитель в РФ ООО «Дентаурум», 117485, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.88/20, эт.А1, пом.І, ком.1. тел +7 (495) 109-51-04. e-mail: info@dentaurnum.ru

Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd

Add: 4th Floor, Building 6, No.31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

/Логотип: КССРМТ (ССРИТ)/

Китайский Совет по содействию развитию международной торговли
(China Council for the Promotion of International Trade)
Международная торговая палата Китая (China Chamber of International Commerce)

01818620

СВИДЕТЕЛЬСТВО

/QR-код/
№ 243301A0/002969

НАСТОЯЩИМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ, ЧТО печать компании «Ханчжоу Ангшенг Ортодонтик Продактс Ко.Лтд.» (Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd), проставленная в прилагаемом ДОКУМЕНТЕ, является подлинной.

Китайский Совет по содействию развитию международной торговли

/Круглая печать (повторяется на странице 2 раза):
СЕРТИФИКАЦИЯ КССРМТ (ССРИТ) *

Китайский Совет по содействию развитию международной торговли * (37)/

/Круглая рельефная печать:
СЕРТИФИКАЦИЯ
КССРМТ (ССРИТ)/

/подпись/
Подпись уполномоченного лица:
Го Сяофу (Guo Xiaofu)
(Дата: 28 февраля 2024 г.)

/Водяной знак: КССРМТ (ССРИТ) / МТПК (ССОИС) /

Веб-сайт для проверки подлинности свидетельства: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

**«Ханчжоу Ангшенг Ортодонтик Продактс Ко.Лтд.»
(Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd)**

Текст документа составлен на русском языке

Инструкция по применению

На медицинское изделие

«Система брекетов и приспособлений для формирования ортодонтических аппаратов»

Производитель:

«Ханчжоу Ангшенг Ортодонтик Продактс Ко.Лтд.» (Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd, Китай, провинция Чжэцзян, город Ханчжоу, район Юйхан, квартал Чунсянь, ул. Юньхэ, дом 31-1, корпус 6, этаж 4 (4th Floor, Building 6, No. 31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China)

Подпись /подпись/

Печать

/Круглая печать:

«Ханчжоу Ангшенг Ортодонтик Продактс Ко.Лтд.» (Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd) * 3301100106066/

«Ханчжоу Ангшенг Ортодонтик Продактс Ко.Лтд.» (Hangzhou Angsheng Orthodontic Products Co., Ltd)

Адрес: Китай, провинция Чжэцзян, город Ханчжоу, район Юйхан, квартал Чунсянь, ул. Юньхэ, дом 31-1, корпус 6, этаж 4 (4th Floor, Building 6, No. 31-1 Yunhe Road, Chongxian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China)

/Круглая печать (повторяется в документе 22 раза):

СЕРТИФИКАЦИЯ КССРМТ (ССРИТ) *

Китайский Совет по содействию развитию международной торговли * (37)//

Перевод данного текста выполнен переводчиком Зотовой Светланой Игоревной.



Российская Федерация

Город Москва.

Пятого марта две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Рак Евгения Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Зотовой Светланы Игоревны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.


Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2024-9 2590

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Е.С. Рак

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 25. лист(-а,-ов).

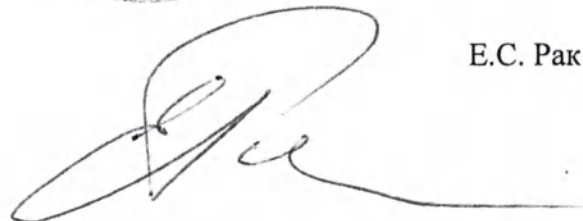

Е.С. Рак

Российская Федерация

Город Москва.

Шестого марта две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Рак Евгения Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2024- 70-5265

Уплачено за совершение нотариального действия: 2600 руб. 00 коп.



Е.С. Рак

Проставлено, пронумеровано и скреплено печатью 15 лист(-а,-ов).



Е.С. Рак