

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际贸易商会
China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

02164137

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 241100B0/H02311

兹证明：在所附文件上的东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司的印章属实。

To see the Russian witness on the next page.



China Council for the Promotion
of International Trade



签证员：

Authorized
Official: Lyu Cuilian

日期：2024年01月18日
(Date: Jan. 18, 2024)

证明 网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Настоящим удостоверяем подлинность печати Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd. на прилагаемом документе.



ПОДТВЕРЖДАЮ
точность, достоверность
и правильность

Вице-президент

Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd.

Ли Чуньхуай

Инструкция по применению

Презервативы из натурального латекса марки LUXE, LUXE ROYAL, DOMINO в
вариантах исполнения



2023 г.

енование.

резервативы из натурального латекса марки LUXE, LUXE ROYAL, DOMINO в вариантах
нения:

резервативы из натурального латекса марки LUXE (Презервативов в пачке – 3. Пачек в
блоке – 48. Блоков в ящике - 30). (В пачке=блоке – 100. Пачек=блоков в ящике - 30):

1. Презерватив гладкий «ЗОЛОТОЙ КАДИЛЛАК»
2. Презерватив текстурированный с рифленой поверхностью «АВСТРАЛИЙСКИЙ БУМЕРАНГ»
3. Презерватив текстурированный с точечной поверхностью «13 РАУНД»
4. Презерватив текстурированный комбинированный (точечная и рифленая поверхность) «ВОСКРЕШАЮЩИЙ МЕРТВЕЦА»
5. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом клубники) «КРАСНОГОЛОВЫЙ МЕКСИКАНЕЦ»
6. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом банана) «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ИЗ АЛАБАМЫ»
7. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом шоколада) «ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ»
8. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом тропических фруктов) «ТРОПИЧЕСКИЙ ШТОРМ»
9. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом яблока) «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
10. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом персика) «СЕКСПЕАНИМАТОР»

Презервативы из натурального латекса марки LUXE ROYAL (Презервативов в пачке – 3, 12. Пачек в блоке – 24, 12. Блоков в ящике - 30):

11. Презерватив гладкий «CLASSIC»
12. Презерватив гладкий цветной (черный) «BLACK COLLECTION»
13. Презерватив гладкий (увеличенного размера) «XXL SIZE»
14. Презерватив текстурированный с рифленой поверхностью «SEX MACHINE»
15. Презерватив гладкий продлевающий с добавлением анестетика «LONG LOVE»
16. Презерватив текстурированный с точечной поверхностью «EXOTICA»
17. Презерватив текстурированный с точечной и рифленой поверхностью «EXTREME»
18. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом вишни) «CHERRY COLLECTION»
19. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом клубники) «STRAWBERRY COLLECTION»
20. Презерватив гладкий с увеличенным количеством силиконовой смазки «NIRVANA»

Презервативы из натурального латекса марки DOMINO (Презервативов в пачке – 6. Пачек в блоке – 24. Блоков в ящике - 30):

- 21 Презерватив гладкий «HARMONY»
- 22 Презерватив гладкий «COLOR BEAUTY» , цвета: фиолетовый, золотой, черный

- Презерватив гладкий (увеличенного размера) "KING SIZE"
- Презерватив текстурированный с рифленой поверхностью "NICE CONTOUR"
- Презерватив текстурированный комбинированный (точечная и рифленая поверхность) "XTASE"
- 26 Презерватив гладкий продлевающий с добавлением анестетика "LONG ACTION"
- 27 Презерватив текстурированный с точечной поверхностью "FUN BUMPS"
- 28 Презерватив гладкий ультратонкий "ULTRA LIGHT"
- 29 Презерватив гладкий особопрочный "EXTRA STRONG"
- 30 Презерватив гладкий с увеличенным количеством силиконовой смазки "EASY ENTRY"

Презервативы из натурального латекса марки DOMINO (Презервативов в пачке – 3. Пачек в блоке – 12. Блоков в ящике - 60):

31. Презерватив гладкий светящийся зеленого цвета «NEON GREEN»
32. Презерватив гладкий светящийся сиреневого цвета «NEON VIOLET»
33. Презерватив гладкий светящийся золотого цвета «NEON GOLD»

Презервативы из натурального латекса марки DOMINO (Презервативов в пачке – 3. Пачек в блоке – 12. Блоков в ящике - 60):

34. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом тропических фруктов) «SWEET SEX TROPICANA»
35. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом шоколада) «SWEET SEX CHOCOLATE MOUSSE»
36. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом мороженого) «SWEET SEX ICE CREAM»
37. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом манго) «SWEET SEX MANGO»
38. Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом клубники) «SWEET SEX STRAWBERRY COCKTAIL»

2. Назначение.

Для применения в качестве контрацептива барьерного типа, а также для профилактики заболеваний, передающихся половым путем

Показания:

Данный продукт предназначен для предотвращения беременности, главным образом, используется во время полового акта, чтобы не допустить попадания сперматозоидов в яйцеклетку, уменьшает вероятность зачатия. Также помогает снизить риск заболеваний, передающихся половым путём.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материала.

3. Класс потенциального риска

26



с организмом человека.

енно контактирующие со слизистой оболочкой и кожным покровом

3. Устойчивость к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении.

Транспортировка:

при температуре

от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха до 80% °С при атмосферном давлении 760±10мм рт.ст.

Хранение:

при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при атмосферном давлении 760±10мм рт.ст.

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

6. Условия применения:

Для индивидуального применения.

7. Комплект поставки и упаковка.

Упаковка изделий должна обеспечивать их защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Каждый презерватив упаковывается в индивидуальную (первичную) упаковку. Первичная (индивидуальная) упаковка имеет следующее исполнение: алюминиевая фольга и полиэтилен. Первичная (индивидуальная) упаковка может иметь следующие формы: квадратная, прямоугольная. Индивидуальная упаковка является герметичной. Каждая первичная (индивидуальная) упаковка с изделием должна быть упакована во вторичную (потребительскую) упаковку. Вторичная (потребительская) упаковка имеет следующие виды исполнения: картонные коробки. Первичная (индивидуальная) упаковка размещается во вторичной по 3, 6, 12 и 100 шт.

Презервативы из натурального латекса марки LUXE (Презервативов в пачке – 3. Пачек в блоке – 48. Блоков в ящике - 30). (В пачке=блоке – 100. Пачек=блоков в ящике - 30).

Презервативы из натурального латекса марки LUXE ROYAL (Презервативов в пачке – 3, 12. Пачек в блоке – 24, 12. Блоков в ящике - 30).


Презервативы из натурального латекса марки DOMINO (Презервативов в пачке – 6. Пачек в блоке – 24. Блоков в ящике - 30).

Презервативы из натурального латекса марки DOMINO (Презервативов в пачке – 3. Пачек в блоке – 12. Блоков в ящике - 60).

Дополнительно, вторичная (потребительская) упаковка может быть запечатана в полиэтиленовую пленку с отрывной лентой методом «конверт». Для транспортировки изделия одного вида в потребительской упаковке укладывают в ящики из гофрированного картона. Ящики из гофрированного картона с изделиями оклеивают клеевой лентой на бумажной основе, полиэтиленовой лентой с липким слоем или пропиленовой лентой по действующей нормативной и технической документации. Масса брутто транспортной тары не должна превышать 30 кг. Упакованные изделия могут поставляться в виде транспортных пакетов.

8. Описание принципа действия медицинского изделия.

Принципы действия барьерных контрацептивов заключаются в блокировании проникновения спермы в шейную слизь. Преимущества барьерных методов контрацепции следующие: они

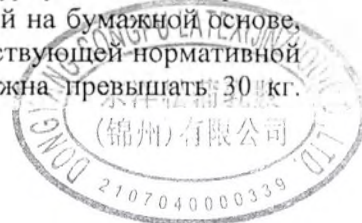

действуют только местно, не вызывая системных изменений; они имеют мало побочных эффектов; они в значительной степени предохраняют от болезней, передающихся половым путем, кроме того, они не требуют привлечения квалифицированного медицинского персонала.

Способ применения:

Применяется как гигиеническое средство индивидуального назначения для профилактики венерических заболеваний и нежелательной беременности.

Порядок применения:

Инструкция по применению и графические изображения:



- Пользуйтесь новым презервативом при каждом половом акте.
- При вскрытии упаковки не применяйте острые предметы.
- Откройте упаковку, извлеките презерватив.
- Надевайте презерватив на половой член до начала полового акта.
- Расположите свернутый презерватив на головке полового эрегированного члена. Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы вытеснить воздух. Сделайте это обязательно, так как оставшийся воздух в резервуаре может стать причиной разрыва презерватива. Расправьте презерватив вниз до основания полового члена.
- После эякуляции извлеките половой член, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул. Аккуратно снимите презерватив.
- Сверните использованный презерватив и поместите в емкость для отходов.

Презерватив в случае правильного использования является надежной защитой от нежелательной беременности и снижают вероятность заражения заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ-инфекций.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Надевайте презерватив до начала полового акта.
- Не используйте презерватив, если его упаковка повреждена или поврежден сам презерватив.
- При необходимости используйте смазку только на водной основе.
- Не пользуйтесь в качестве дополнительной смазки растительными, животными и любыми другими жирами, а также лосьонами и вазелином.
- Не касайтесь презервативом или половым членом влагалища после того, как сняли презерватив.
- Не выбрасывайте использованные презервативы в унитаз.

9. Состав медицинского изделия.

Презервативы сформированы из натурального латекса с добавлением вспомогательных веществ, смазки и красителей.

№	Наименование сырья	%
1	Натуральный латекс	96,49%
2	Диспергирующий агент NF (метиленис нафталинсульфонат натрия)	0.15%

	0.28%
	0.85%
Соль цинка	1,15
Катализатор Рх	0,78%
(цинковая соль этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты)	
Антиоксидант 264 (дитретичный бутил-крезол)	0,30%



...онение фактического содержания каждого вещества в изделии не более чем на
...ески указанной нормы в таблице.

	Химическое вещество	Анализ токсичности
	Сера	сера является добавкой, используемой при вулканизации, может иметь обеззараживающие, инсектицидные свойства, может быть использована для профилактики грибковых заболеваний растений и т.п. В дерматологии сера используется для смягчения кожного покрова и как препарат для лечения чесотки. Токсичность серы чрезвычайно мала, в процессе производства она никак не может привести к отравлению, сера в больших количествах (10-20гр) может вызвать отравление сероводородом, при длительном вдыхании порошка серы может возникнуть невыраженная токсикация. Серный порошок иногда может вызывать конъюнктивит. У аллергиков может привести к экземе. При взаимодействии с секретами, выделяемыми кожными железами, может образовать сероводород и сернистую кислоту, а потому привести к слабому раздражению, но также может впитаться, не причиняя вреда коже.
2	Окись цинка	Цинк, содержащийся в окиси цинка, и его соединения в зависимости от каналов попадания в организм классифицируются от малотоксичных до среднетоксичных веществ, при испытаниях на кошках была выявлена слабость после вдыхания 110-660мг/м³ на протяжении 15 минут. После 45 минут - затруднённое дыхание, после 8 месяцев в стенках бронхов образуются лимфоидные клетки, среди которых много образований из волокон соединительной ткани. Цинк имеет особое негативное воздействие на лёгкие, вызывая медленно прогрессирующий фиброз.
3	Катализатор РХ (цинковая соль этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты)	Катализатор РХ (цинковая соль этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты) относится к веществам с очень малой токсичностью, раздражает кожу и конъюнктиву, может вызвать аллергическую реакцию на коже, при длительном контакте может привести к разрастанию щитовидной железы, смертельная доза для человека - 5-15гр/кг.
4	Антиоксидант 264 (дитретичный бутил-крезол)	антиоксидант 264 (дитретичный бутил-крезол) часто используется в качестве антиокислителя симптомы острого отравления у животных: слюноотделение, незначительное сужение

		зрачков, беспокойство. На основании наблюдений за собаками и крысами можно сделать вывод, что при хронической интоксикации является относительно безопасным соединением.
	Казеин	казеин — это фосфоросодержащий белок, получаемый из бобов и молока, гигроскопичен, после поглощения влаги происходит его стремительная модификация, является нетоксичным веществом
6	Диспергирующий агент NF (метиленбис нафталинсульфонат натрия)	(не найден в материалах по промышленной токсикологии)
7	Смазка силиконовое масло	абсолютно нетоксичное и безвредное вещество (не найдено в материалах по промышленной токсикологии) следует обратить внимание: все указанные выше данные взяты из материалов по промышленной токсикологии.

Изделие представляет собой непроницаемый для спермы чехол, изготовленный из натурального латекса, который надевается на эрегированный половой член.

Герметично упакован в первичную (индивидуальную) упаковку и содержит не менее 20 мг силиконового масла.

Силиконовое масло CAS: 63148-62-9

Состав продукта:

Название	Действующий стандарт	Номер CAS	Процентное содержание
Диметилциклосилоксан	HG/T 2366-92	9016-00-6	99,78%
Катализатор	HG/T 2366-92	75-59-2	0,0022%


Производитель. Пекинская торгово-промышленная компания «Дин Е Кемикалс Ко., Лтд.»


Презерватив гладкий с увеличенным количеством силиконовой смазки упакован в первичную (индивидуальную) упаковку и содержит не менее 35 мг силиконового масла. Каждое изделие имеет резервуар для спермы.

Состав упаковки:

Индивидуальная упаковка.

Материал: Алюминиевая фольга, алюминизированная пленка. Фольга: D8019788-(PET/AL FOIL/LDPE) Полимерная пленка/Алюминиевая фольга Фольга/полиэтилен низкой плотности. Изделия герметично упаковано в первичную (индивидуальную) упаковку и содержит не менее 20 мг силиконового масла.

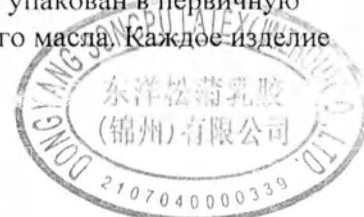

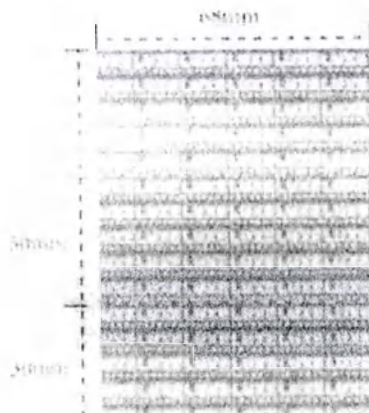

Вторичная упаковка (FOLDING BOX BOARD GC1, Bohui)

Материал: серая бумага, белая бумага, картон.

Марки LUXE 3 презерватива:

Ширина: 62 ± 2 мм;

Высота: 80 ± 2 мм;

Плотность картона: от 300 г/м².

LUXE ROYAL 3 презерватива:

Ширина: 60 ± 2 мм;

Высота: 80 ± 2 мм;

Плотность картона: от 300 г/м².

LUXE ROYAL 6 презервативов:

Ширина: 60 ± 2 мм;

Высота: 110 ± 2 мм;

Плотность картона: от 300 г/м².

Марки DOMINO 3 презерватива:

Ширина: 62 ± 2 мм;

Высота: 68 ± 2 мм;

Марки DOMINO 6 презервативов:

Ширина: 60 ± 2 мм;

Высота: 110 ± 2 мм;

Плотность картона: от 300 г/м².

DOMINO 12 презервативов:

Ширина: 62 ± 2 мм;

Высота: 120 ± 2 мм;

Плотность картона: от 300 г/м².

Ящик из гофрированного картона (Grade A Cardboard Paper FD1, Bohui):

Ширина: 240 мм x высота 380 мм x глубина 540 мм



Состав бананового ароматизатора.

	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	GB2760	№ FEMA 2360
2	GB2760	№ FEMA 2427
3	GB2760	№ FEMA 2439
4	GB2760	№ FEMA 2440
5	GB2760	№ FEMA 3174
6	GB2760	№ FEMA 3487
7	GB2760	№ FEMA 2006
8	GB2760	—

Производитель: Чарминг Фрэгрэнсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд

Состав бананового ароматизатора.

№	Название	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Изоамил н-Бутират	GB2760	№ CAS: 106-27-4
2	Изоамил ацетат	GB2760	№ CAS: 123-92-2
3	Цис-Гексан-3-ол	GB2760	—
4	Этил ванилин	GB2760	№ FEMA 2464
5	Ванилин	GB2760	№ FEMA 3107
6	Эвгенол	GB2760	№ CAS: 97-53-0
7	Растительное масло	GB2760	

Производитель: Чарминг Фрэгрэнсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд



...ного ароматизатора.

№	Название	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Сенил-этиловый спирт	GB2760	—
2	Изоамиловый спирт	GB2760	№ FEMA 2057
3	Изобутиральдегид	GB2760	—
4	Этил ванилин	GB2760	№ FEMA 2464
5	Ванилин	GB2760	№ FEMA 3107
6	Этил мальтол	GB2760	№ FEMA 3487
7	Растительное масло	GB2760	—

Производитель: Чарминг Фрэгрэнсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд
Состав ароматизатора тропических фруктов.

№	Название	Стандарт соответствия	№ FEMA
1	Бензиобензоат	GB2760	№ FEMA 2138
2	Циннамилацетат	GB2760	№ FEMA 2293
3	Терпинилацетат	GB2760	№ FEMA 3047
4	Бензальдегид	GB2760	№ FEMA 2127
5	Циннамальдегид	GB2760	№ FEMA 2286
6	Гелиотропин (пиперонал)	GB2760	№ FEMA 2911
7	Коричный спирт	GB2760	№ FEMA 2294
8	Ванилин	GB2760	№ FEMA 3107
9	Этил мальтол	GB2760	№ FEMA 3487
10	Этилванилин	GR2760	№ FEMA 2464

Производитель: Шуангма Сянцзин Сянляяо Ко., Лтд (Тяньцзинь)

Состав ароматизатора яблока.

№	Название	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Амилвалерат	GB2760	—
2	Амил бутират	GB2760	№ FEMA 2059
3	Этил ацетат	GB2760	№ FEMA 2414
4	Этил бутират	GB2760	№ FEMA 2427
5	Растительное масло	GB2760	—



Ароматизатора персика.

№	Название	Стандарт соответствия	№ FEMA
1	Бензилбензоат	GB2760	№ FEMA 2138
2	Гамма-декалктон	GB2760	№ FEMA 2360
3	Аллил 3-циклогексилпропионат	GB2760	№ FEMA 2026
4	Этил бутират	GB2760	№ FEMA 2427
5	Метил дигидрожасмонат	GB2760	№ FEMA 3408
6	Карвакрол	GB2760	№ FEMA 2055
7	Геранил ацетат	GB2760	№ FEMA 2509
8	Этил 2-метилбутират	GB2760	№ FEMA 2443
9	Гексил ацетат	GB2760	№ FEMA 2565
10	Нерил ацетат	GB2760	№ FEMA 2773
И	Изопентилизобутират	GB2760	№ FEMA 3507
12	Октаналь	GB2760	№ FEMA 2797
13	2-Метилундеканаль	GB2760	№ FEMA 2749
14	Нераль	GB2760	№ FEMA 2303
15	Альдегид С-16	GB2760	№ FEMA 2444

Производитель: Шуангма Сянцзин Сянляо Ко., Лтд (Тяньцзинь)

Состав вишневого ароматизатора.

№	Название	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Гаммадекалктон	GB2760	№ FEMA 2360
2	Этил бутират	GB2760	№ FEMA 2427
3	Бутират гексановой кислоты	GB2760	№ FEMA 2439
4	Этиллактат	GB2760	№ FEMA 2440
5	Фуранеол	GB2760	№ FEMA 3174
6	Этил мальтол	GB2760	№ FEMA 3487
7	Уксусная кислота	GB2760	№ FEMA 2006
8	Триацетил глицерин	GB2760	

Производитель: Чарминг Фрэгрэнсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд. Состав ароматизатора мороженное




	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
Альдегид С-14	GB2760	№ FEMA 2763
Молочный лактон	GB2760	№ FEMA 3742
3 Каприновая кислота	GB2760	№ FEMA 2364
4 Гуммиарабик	GB2760	№ FEMA 2001
5 Масляные кислоты	GB2760	№ FEMA 2171
6 Растительное масло	GB2760	—
7 Пропиленгликоль	GB2760	—
8 Дистиллированная вода	GB2760	—

Производитель: Чарминг Фрэгрэнсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд

Состав манго ароматизатора.

№	Название	Стандарт соответствия	№ FEMA
1	Гамма-декалактон	GB2760	№ FEMA 2360
2	Дельта-декалактон	GB2760	№ FEMA 2361
3	Метил дигидрожасмонат	GB2760	№ FEMA 3408
4	Метил антранилат	GB2760	№ FEMA 2682
5	Гекс-3-цис-1-ил ацетат	GB2760	№ FEMA 3171
6	Бензил ацетат	GB2760	№ FEMA 2135
7	Глицерил триацетат	GB2760	№ FEMA 2007
8	Бензил диметилкарбинил бутират	GB2760	№ FEMA 2394
9	Гамма-додекалактон	GB2760	№ FEMA 2400
10	Бензальдегид	GB2760	№ FEMA 2127
11	Альфа-гексилкоричный альдегид	GB2760	№ FEMA 2569
12	Гамма-ноналактон	GB2760	№ FEMA 2781
13	Альдегид С-14	GB2760	№ FEMA 3091
14	Карвон	GB2760	№ FEMA 2249
15	Цис-3-гексен-1-ол	GB2760	№ FEMA 2563

Производитель: Шуангма Сьянцзин Сьянльяо Ко., Лтд (Тяньцзинь)

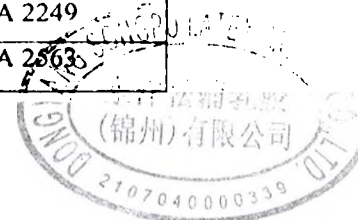

Состав золотого цвета TSE L360:

Химическое название	Номер CAS	Содержание
Деионизированная вода	7732-18-5	30,0-50,0%
Концентрат 7 на (перодной сажи краситель)	1333-86-4	34,0%
Высокомолекулярное ПАВ	Нет данных	17,0-34,0%

Производитель: «Сучжоу Сунмун Текнолоджи» Ко., Лтд»

Состав золотого красителя TSE L362:

Химическое название	Номер CAS	Содержание
Деионизированная вода	7732-18-5	25,0-35,0%
Пигмент желтый (P.Y. 12)	6358-31-2	45,0%
Высокомолекулярное ПАВ	Нет данных	17,0-34,0%

Производитель: «Сучжоу Сунмун Текнолоджи» Ко., Лтд»

Состав фиолетового красителя TSE L365:

Химическое название	Номер CAS	Содержание
Деионизированная вода	7732-18-5	25,0-40,0%
Пигмент фиолетовый (P.V. 23)	6358-30-1	36,0%
Высокомолекулярное ПАВ	Нет данных	17,0-34,0%

Производитель «Сучжоу Сунмун Текнолоджи» Ко., Лтд»

Состав светящегося вещества:

Наименование компонента	Регистрационный номер CAS	Номер ЕС веществ)	Массовая доля (%)
Алюминат стронция	12004-37-4	234-455-3	98
Европий	7440-53-1	231-161-7	1
Диспрозий	7429-91-6	231-073-9	1

Производитель: «Шэньчжэнь Сити Цзин Лян Цай Текнолоджи Ко., Лтд»


Состав анестетика:

Полиэтиленгликоль	96%
Бензокаин*	4%

*Содержание в 20 мг силиконового маслабензокаина -37,5%



Формула

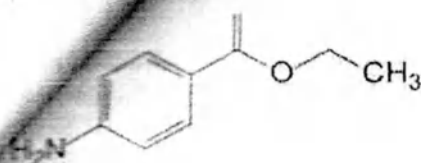

Русское название
Бензокаин

Латинское название вещества Бензокаин
Benzocainum (род. Benzocaini)

Химическое название

4-Аминобензойной кислоты этиловый эфир

Брутто-формула
 $C_9H_{11}NO_2$

Фармакологическая группа вещества Бензокаин

Местные анестетики

Код CAS

94-09-7

Параметр	Показатель	Результат
1. Внешний вид	Белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы	Белый кристаллический порошок
2. Идентификация	А: Поглощение в инфракрасной области спектра <197К> В: Поглощение в ультрафиолетовой области спектра <197У>	Соответствует



99,0% до 101%	99,56%
89°C до 92°C	89°C до 91°C
Чистый	Соответствует
Не более 0.5%	0,27%
Потери при высушивании	
7. Хлорид:	Соответствует
	Соответствует
8. Легко карбонизируемые вещества:	
9. Тяжелые металлы:	Соответствует
10. Типичные примеси:	Соответствует
11. Остаток при сжигании:	0,04%
12. Кислотность:	Соответствует
Указанный выше продукт отвечает требованиям стандарта BP2002/USP26.	

10. Технические характеристики, требования и нормы, определяющие показатели качества, функциональные и эксплуатационные характеристики МИ и принадлежностей.

Презервативиз натурального латекса марки LUXE:

Презервативгладкий "ЗОЛОТОЙ КАДИЛЛАК"

Размеры

Длина: 180 ± 5 мм

Диаметр: 52 ± 2 мм

Длина накопителя: 13 ± 3 мм

Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$


Масса: $1,4 \pm 0,3$ г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.

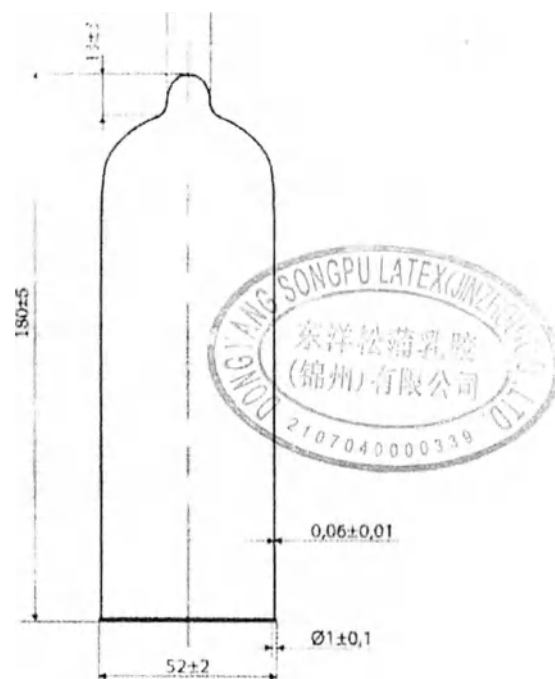


Поверхность - гладкая		
Смазка - силиконовое масло		
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная		
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.		
	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE:
Презерватив текстурированный с рифленой поверхностью "АВСТРАЛИЙСКИЙ БУМЕРАНГ"

Размеры:

Длина: 180±5 мм
Диаметр. 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Расстояние между текстурой: 2,6±0,3 мм
Длина текстуры: 64±3мм
Длина от текстуры до конца презерватива: 26±3мм
Толщина:
Манжет: 1±0,1 мм
Презерватив: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 1,5±0,3 г.
Рифление: 0,5 ±0,1 мм
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура - рифленая
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

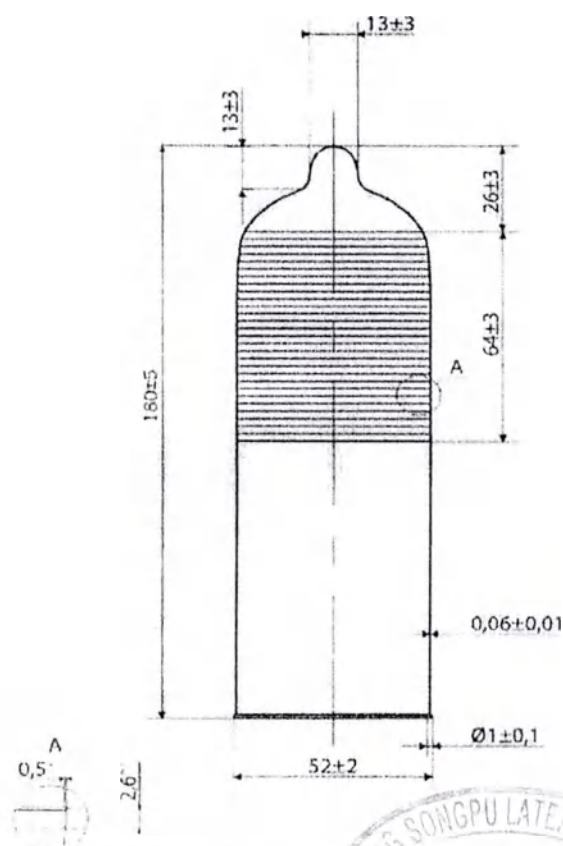

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении. МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

...затекса марки LUXE:
...с точечной поверхностью "13 РАУНД"

Диаметр 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3 мм
Расстояние между точками:
горизонтально 7±1 мм
вертикально 3 ±30,3 мм

Длина текстуры: 64 ±3 мм

Длина от текстуры до конца презерватива:
30±3 мм

Толщина:

Манжет: 1±0,1 мм

Презерватив: 0,06 мм ±0,01 мм

Масса: 1,5±0,3 г.

Точка: 0,5±0,1 мм

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива
закатан в венчик


Поверхность: текстура - точечная

Аромат: без запаха


Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки:
квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки:
алюминиевая фольга.

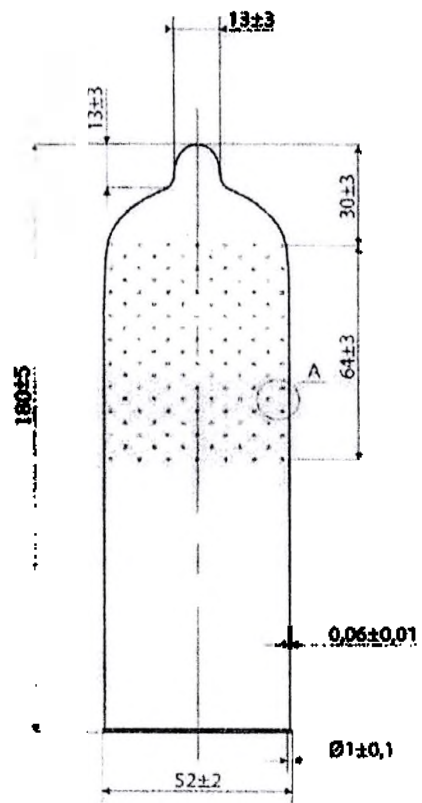


Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

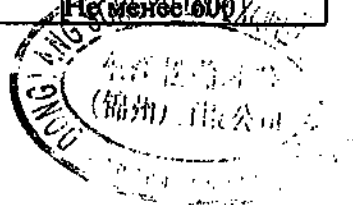

презерватива марки LUXE:
 комбинированный (точечная и рифленая поверхность)
 "МЕРТВЕЦА"

Диаметр 180 ± 5 мм
 Диаметр 52 ± 2 мм
 Длина накопителя: 13 ± 3 мм
 Ширина накопителя 13 ± 3 мм
 Расстояние между точками:
 горизонтально 7 ± 1 мм
 вертикально $3 \pm 0,3$ мм
 Длина покрытия точек: 18 ± 3 мм
 Расстояние между рифлением: $2,6 \pm 0,3$ мм
 Длина текстуры: 43 ± 3 мм
 Длина от точек до конца презерватива: 26 ± 3 мм
 Расстояние от точечной до рифленой поверхности:
 31 ± 3 мм
 Толщина:
 Манжет: $1 \pm 0,1$ мм
 Презерватив: $0,06$ мм $\pm 0,01$ мм
 Масса: $1,5 \pm 0,3$ г.
 Точка: $0,5 \pm 0,1$ мм
 Физико-механические показатели:
 Цвет: бесцветный
 Форма выпуска: с накопителем
 Манжета: открытый конец презерватива закатан в
 венчик
 Поверхность: текстура – точечная и рифленая
 Аромат: без запаха
 Смазка: силиконовое масло
 Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная
 Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

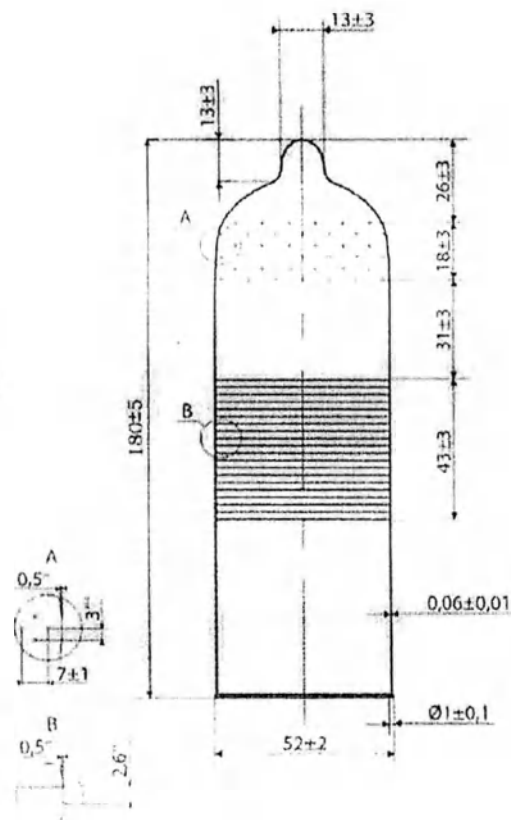

Показатели	До теплового	После теплового
	Старения	старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



...латекса марки LUXE:
...ароматизированный (с ароматом клубники) " КРАСНОГОЛОВЫЙ

Длина накопителя: 13±3 мм

Ширина накопителя 13±3мм

Толщина:

Манжет: 1±0.1 мм

Презерватив: 0,06 мм ±0,01 мм

Масса: 1,4±0,3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец

презерватива закатан в венчик.

Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: с ароматом клубники


Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной)

упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки:

алюминиевая фольга.

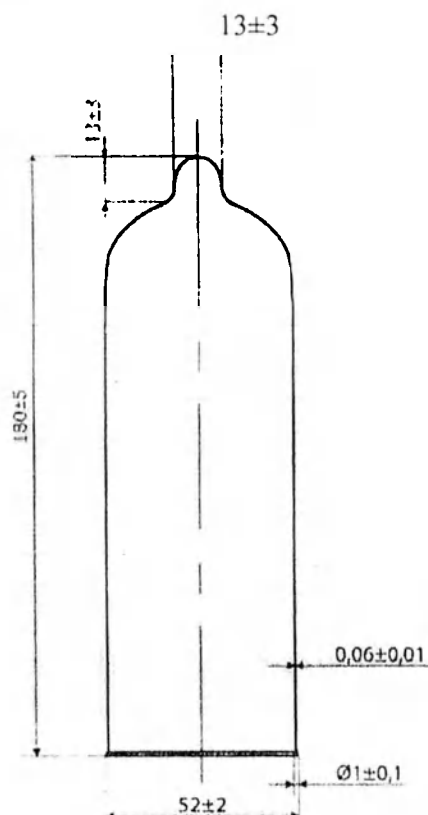

Состав клубничного ароматизатора.

№	Название (на русском языке)	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Гаммадекалактон	GB2760	№ FEMA 2360
2	Этил бутират	GB2760	№ FEMA 2427
3	Бутират гексановой кислоты	GB2760	№ FEMA 2439
4	Этиллактат	GB2760	№ FEMA 2440
5	Фуранеол	GB2760	№ FEMA 3174
6	Этил мальтол	GB2760	№ FEMA 3487
7	Уксусная кислота	GB2760	№ FEMA 2006
8	Триацетил глицерин	GB2760	—

Производитель: Чарминг Фрэгренсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)




Удлинение при разрыве, % Не менее 700 Не менее 600

натурального латекса марки LUXE:
 жидкий ароматизированный (с ароматом банана)
 "ЧАРМИНГ ИЗ АЛАБАМЫ"

Длина: 180 ± 5 мм
 Диаметр: 52 ± 2 мм
 Длина накопителя: 13 ± 3 мм
 Ширина накопителя 13 ± 3 мм
 Толщина:
 Манжет: 1 ± 0.1 мм
 Презерватив: $0.06 \text{ мм} \pm 0.01 \text{ мм}$
 Масса: 1.4 ± 0.3 г.
 Физико-механические показатели:
 Цвет: бесцветный
 Форма выпуска: с накопителем
 Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
 Поверхность: текстура - гладкая
 Аромат: с ароматом банана
 Смазка: силиконовое масло
 Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная
 Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая

Состав бананового ароматизатора.

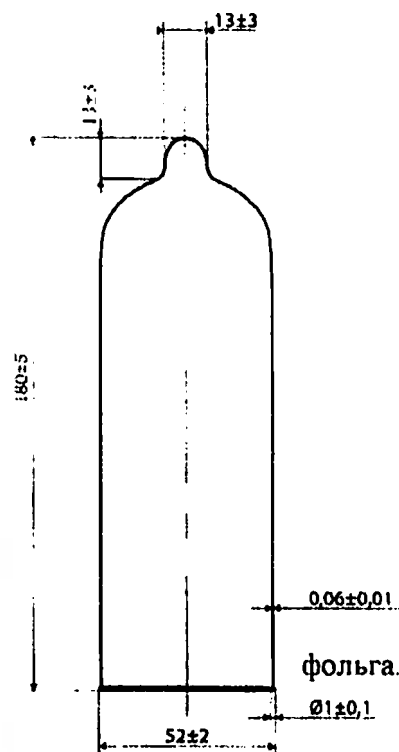

№	Название	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Изоамил н-Бутират	GB2760	№ CAS: 106-27-4
2	Изоамил ацетат	GB2760	№ CAS: 123-92-2
3	Цис-Гексан-3-ол	GB2760	—
4	Этил ванилин	GB2760	№ FEMA 2464
5	Ванилин	GB2760	№ FEMA 3107
6	Эвгенол	GB2760	№ CAS: 97-53-0
7	Растительное масло	GB2760	—

Производитель: Чарминг Фрэгренсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



латекса марки LUXE:
ароматизированный (с ароматом шоколад)
ПАТ

Диаметр: 52 ± 2 мм
Высота накопителя: 13 ± 3 мм
Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$

Масса: $1,4 \pm 0,3$ г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: с ароматом шоколад

Смазка: силиконовое масло


Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

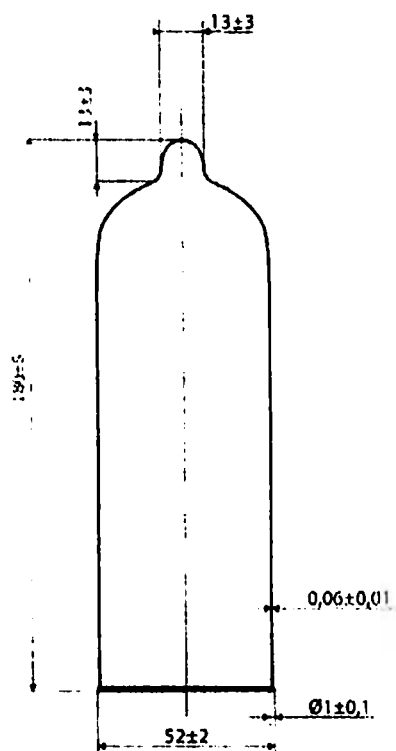

Состав шоколадного ароматизатора.

Компонент	Количество/грамм	Компонент	Количество/грамм
Этилацетат	25	Ментан шоколада	3
Изоамилацетат	2,5	Шоколадный альдегид	0,2
Этилбутират	3	Бурбонал (этилванилин)	0,3
Изоамил бутират	5,5	Мальтол	0,1
Этилбензоат	3	Гераниевое масло	0,7
Метилсалицилат	3	Петигреновое масло	3
Лауриновая кислота	1,5	Гвоздичное масло	0,7
Метил орто-аминобензоат	22,5	Растительное масло	25,7
Метилионон	0,3		

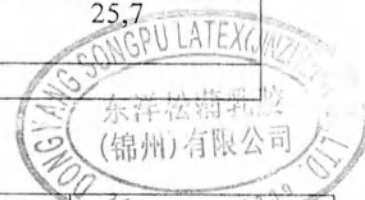

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

...латекса марки LUXE:
...ароматизированный (с ароматом тропических
...ПРОПИЩЕСКИЙ ШТОРМ"

... 180 ± 5 мм
... 52 ± 2 мм
...накопителя: 13 ± 3 мм
...накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0.06 \text{ мм} \pm 0.01 \text{ мм}$

Масса: 1.4 ± 0.3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: с ароматом тропических фруктов

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная,
прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

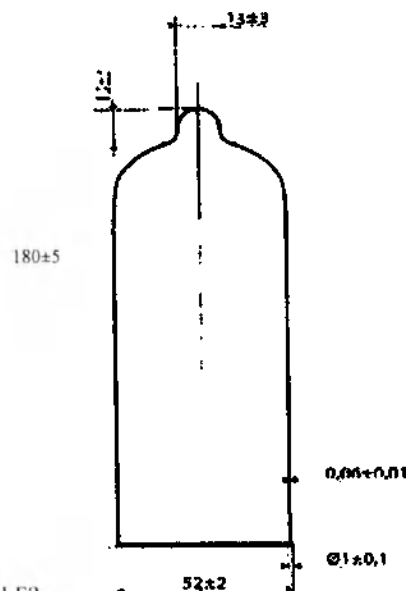

Состав ароматизатора тропических фруктов.

№	Название	Стандарт соответствия	№ FEMA
1	Бензиобензоат	GB2760	№FEMA 2138
2	Циннамилацетат	GB2760	№ FEMA 2293
3	Терпинилацетат	GB2760	№ FEMA 3047
4	Бензальдегид	GB2760	№ FEMA 2127
5	Циннамальдсгид	GB2760	№ FEMA 2286
6	Гелиотропин (пиперонал)	GB2760	№ FEMA 2911
7	Коричный спирт	GB2760	№ FEMA 2294
8	Ванилин	GB2760	№ FEMA 3107
9	Этил мальтол	GB2760	№ FEMA 3487
10	Этилванилин	GB2760	№ FEMA 2464

Производитель: Шуангма Сьянцзин Сьянляо Ко., Лтд (Тяньцзинь)

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

презекса марки LUXE:
ароматизированный (с ароматом яблока) "БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК"

Диаметр: 13 ± 3 мм

Диаметр накопителя: 13 ± 3 мм

Толщина: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$

Масса: $1,4 \pm 0,3$ г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик:

Поверхность: текстура - гладкая


Аромат: с ароматом яблока

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

Состав ароматизатора яблока.

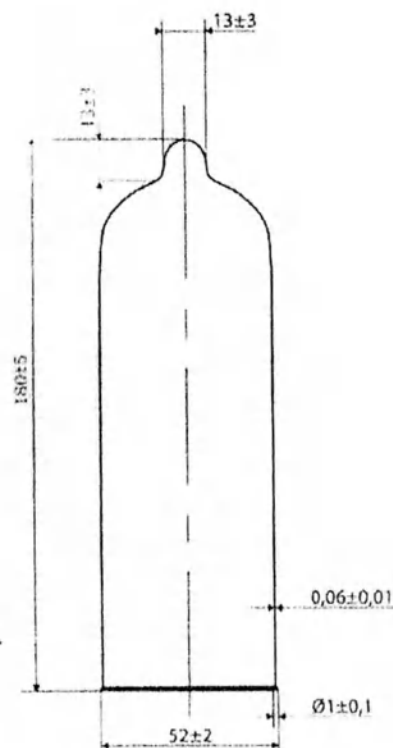

№	Название	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Амилвалерат	GB2760	—
	Амил бутират	GB2760	№ FEMA 2059
3	Этил ацетат	GB2760	№ FEMA 2414
4	Этил бутират	GB2760	№ FEMA 2427
5	Растительное масло	GB2760	—

Производитель: Чарминг Фрэгрэнсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



презерватива марки LUXE:

ароматизированный (с ароматом персика) "СЕКСПЕАНИМАТОР

13±3 мм

накопителя 13±3мм

1±0.1 мм

презерватив: 0,06 мм ±0,01 мм

Масса: 1,4±0,3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: с ароматом персика

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

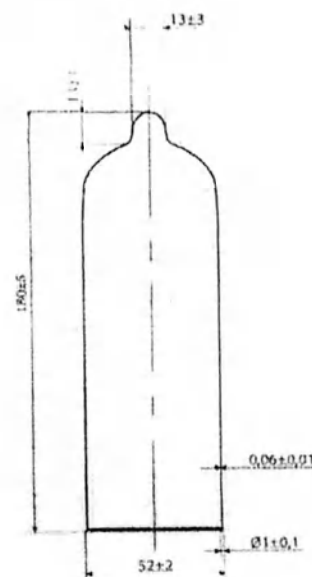

Состав ароматизатора персика.

№	Название	Стандарт соответствия	№ FEMA
1	Бензилбензоат	GB2760	№ FEMA 2138
2	Гамма-декалактон	GB2760	№ FEMA 2360
3	Аллил 3 -циклогексилпропионат	GB2760	№ FEMA 2026
4	Этил бутират	GB2760	№ FEMA 2427
5	Метил дигидрожасмонат	GB2760	№ FEMA 3408
6	Карвакрол	GB2760	№ FEMA 2055
7	Геранил ацетат	GB2760	№ FEMA 2509
8	Этил 2-метилбутират	GB2760	№ FEMA 2443
9	Гексил ацетат	GB2760	№ FEMA 2565
К)	Нерил ацетат	GB2760	№ FEMA 2773
11	Изопентилизобутират	GB2760	№ FEMA 3507
12	Октаналь	GB2760	№ FEMA 2797
13	2-Метилундеканаль	GB2760	№ FEMA 2749
14	Нераль	GB2760	№ FEMA 2303
15	Альдегид С-16	GB2760	№ FEMA 2444

Производитель: Шуангма Сянцзин Сянляо Ко., Лтд (Тяньцзинь)



LUXE ROYAL:

Длина накопителя: 13 ± 3 мм
Диаметр: 52 ± 2 мм

Длина накопителя: 13 ± 3 мм

Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0.06 \text{ мм} \pm 0.01 \text{ мм}$

Масса: 1.4 ± 0.3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

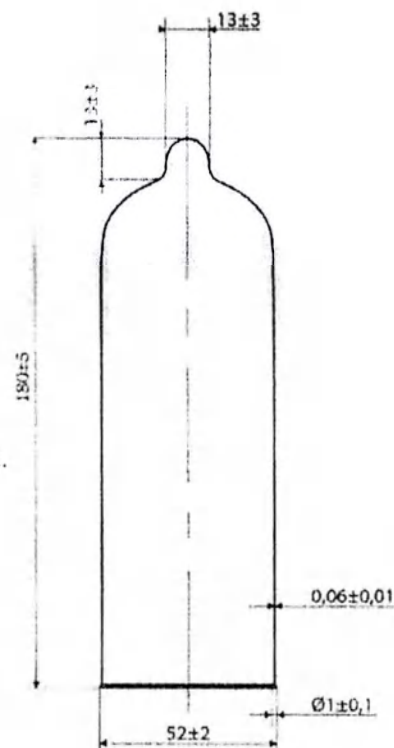

Показатели	До теплового старения		После теплового старения
	Не менее 20(200)		Не менее 17(170)
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)		Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700		Не менее 600



презерватива марки LUXE ROYAL:
 (черный) "BLACK COLLECTION"

Диаметр: 13 ± 3 мм
 Диаметр накопителя 13 ± 3 мм

Свойства:

Манжета: $1 \pm 0,1$ мм

Презерватив: $0,06$ мм $\pm 0,01$ мм

Масса: $1,4 \pm 0,3$ г.

Физико-механические показатели:

Цвет: черный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.

Поверхность: текстура - гладкая


Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

Состав красителя черного цвета TSE L360:

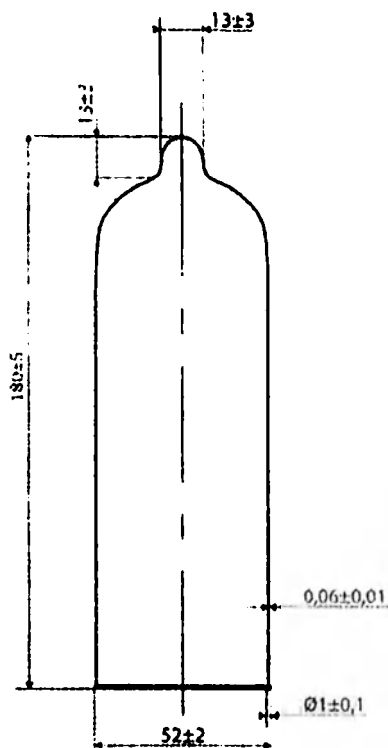

Химическое название	Номер CAS	Содержание
Деионизированная вода	7732-18-5	30,0-50,0%
Пигментный концентрат 7 на основе углеродной сажи (черный краситель)	1333-86-4	34,0%
Высокомолекулярное ПАВ	Нет данных	17,0-34,0%

Производитель: «Сучжоу Сунмун Текнолоджи» Ко., Лтд»

Показатели	До теплового старения	После теплового старения
	До теплового старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



...марки LUXE ROYAL:
...размера) "XXL SIZE"

Диаметр: 13 ± 3 мм
Диаметр: 13 ± 3 мм

Толщина: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0.06 \text{ мм} \pm 0.01 \text{ мм}$

Масса: 1.7 ± 0.3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки:
квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки:
алюминиевая фольга.

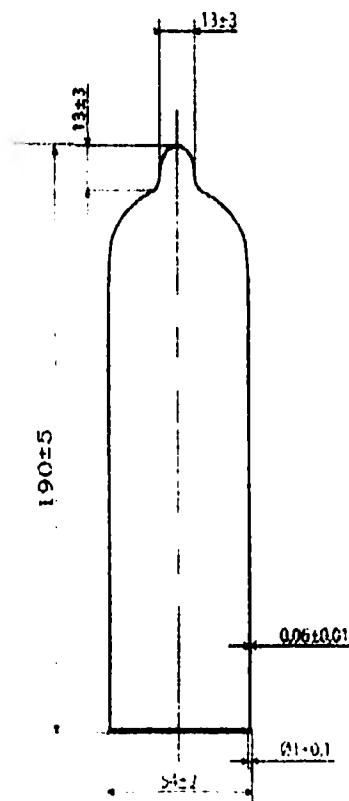

Показатели	До теплового старения		После теплового старения
	Старения		
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)		Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700		Не менее 600



Рифленая поверхность LUXE ROYAL:

Рифленая поверхность "SEX MACHINE"

Диаметр: 13 ± 3 мм
 Диаметр: 13 ± 3 мм
 Толщина между текстурой: $2,6 \pm 0,3$ мм
 Длина текстуры: 64 ± 3 мм
 Длина от текстуры до конца презерватива:
 26 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: $1 \pm 0,1$ мм

Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$

Масса: $1,5 \pm 0,3$ г.

Рифление: $0,5 \pm 0,1$ мм

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец
 презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - рифленая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки:
 квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки:
 алюминиевая фольга.

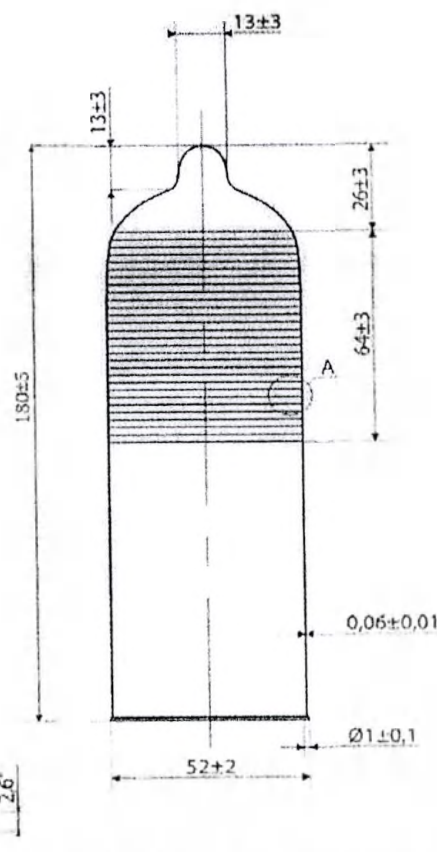

Показатели	До теплового Старения	
	После теплового старения	
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



LUXE ROYAL:

с добавлением анестетика "LONG LOVE"

Диаметр: 13 ± 3 мм
Диаметр: 13 ± 3 мм

Толщина: $1 \pm 0,1$ мм

Презерватив: $0,06$ мм $\pm 0,01$ мм

Масса: $1,4 \pm 0,3$ г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.

Поверхность: текстура - гладкая


Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

Состав анестетика:

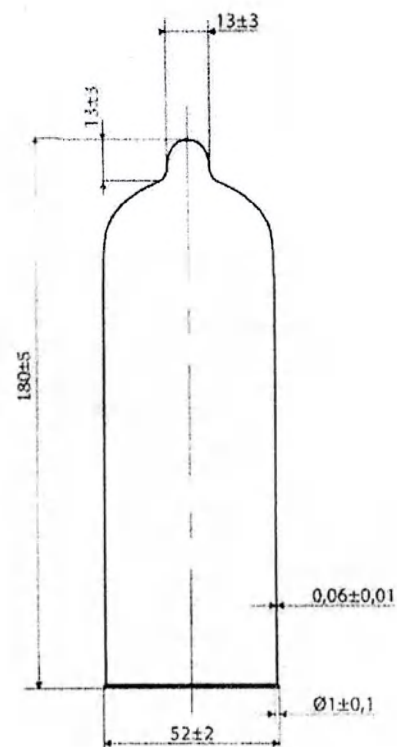

Полиэтиленгликоль	96%
Бензокаин*	4%



* Содержание в 20 мг силиконового масла бензокаина -37,5%

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 700	Не менее 600
Относительное удлинение при разрыве, %		



Марки LUXE ROYAL:
с точечной поверхностью "EXOTICA"

Диаметр: 13 ± 3 мм
 Диаметр накопителя: 13 ± 3 мм
 Расстояние между точками:
 горизонтально 7 ± 1 мм
 вертикально $3 \pm 30,3$ мм
 Длина текстуры: 64 ± 3 мм
 Длина от текстуры до конца презерватива:
 30 ± 3 мм
 Толщина:
 Манжет: $1 \pm 0,1$ мм
 Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$
 Масса: $1,5 \pm 0,3$ г.
 Точка: $0,5 \text{ мм} \pm 0,1 \text{ мм}$
 Физико-механические показатели:
 Цвет: бесцветный
 Форма выпуска: с накопителем
 Манжета: открытый конец презерватива закатан
 в венчик.
 Поверхность: текстура - точечная
 Аромат: без запаха
 Смазка: силиконовое масло
 Форма первичной (индивидуальной)
 упаковки: квадратная, прямоугольная
 Тип первичной (индивидуальной) упаковки:
 алюминиевая фольга.

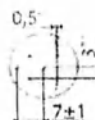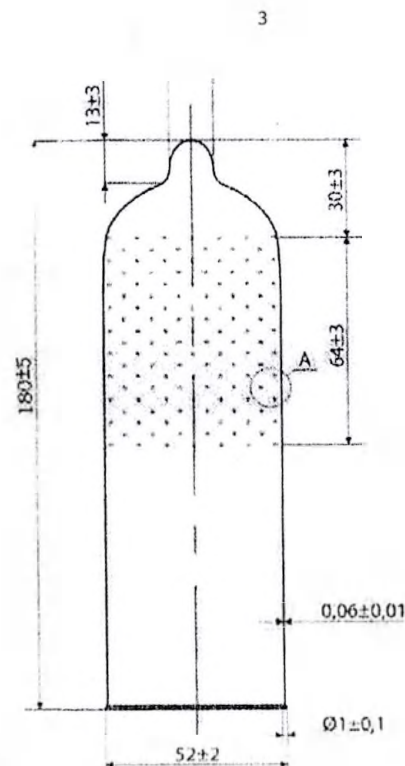


Показатели	До теплового	После теплового
	Старения	старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



LUXE ROYAL:
с точечной и рифленой поверхностью "EXTREME"

Диаметр: 13 ± 3 мм
 Диаметр: 13 ± 3 мм
 Расстояние между точками:
 Диаметр: 7 ± 1 мм
 Диаметр: $3 \pm 0,3$ мм
 Длина покрытия точек: 18 ± 3 мм
 Расстояние между рифлением: $2,6 \pm 0,3$ мм
 Длина текстуры: 43 ± 3 мм
 Длина от точек до конца презерватива: 26 ± 3 мм
 Расстояние от точечной до рифленой поверхности:
 31 ± 3 мм
 Толщина:
 Манжет: $1 \pm 0,1$ мм
 Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$
 Масса: $1,5 \pm 0,3$ г.
 Точка: $0,5 \pm 0,1$ мм
 Рифление: $0,5 \pm 0,1$ мм
 Физико-механические показатели:
 Цвет: бесцветный
 Форма выпуска: с накопителем
 Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
 Поверхность: текстура - точечная и рифленая
 Аромат: без запаха
 Смазка: силиконовое масло
 Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

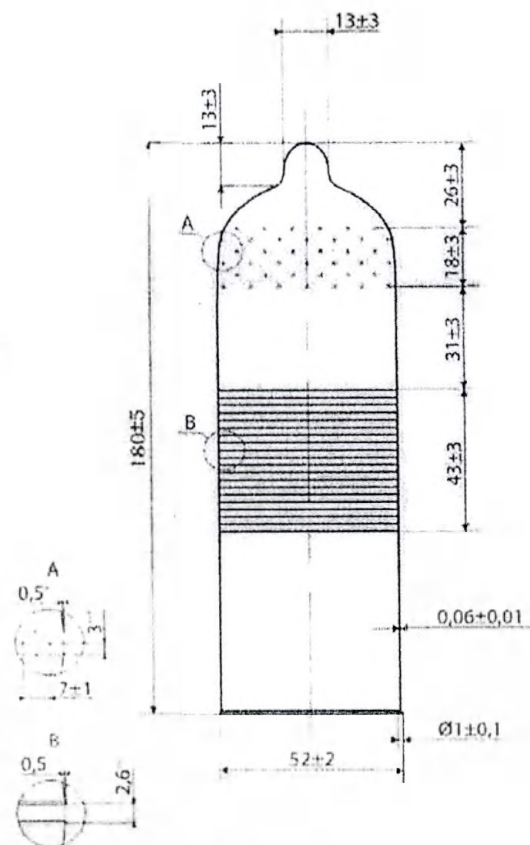

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



Толщина: 0,06 мм ± 0,01 мм

Вес: 1,4 ± 0,3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.

Поверхность: текстура - гладкая


Аромат: с ароматом вишни

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

Состав вишневого ароматизатора.

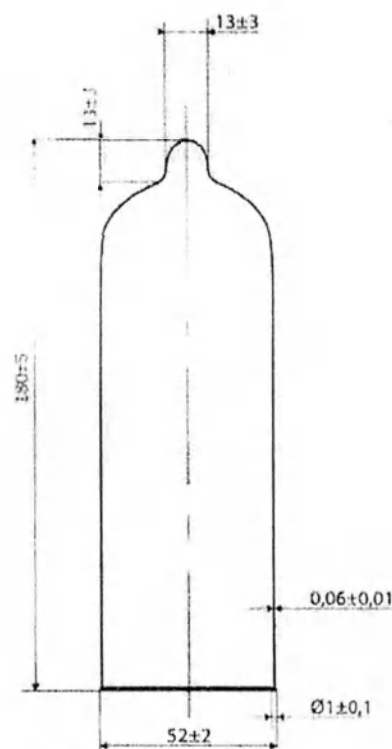

№	Название	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Гаммадекалактон	GB2760	№ FEMA 2360
2	Этил бутират	GB2760	№ FEMA 2427
3	Бутират гексановой кислоты	GB2760	№ FEMA 2439
4	Этиллактат	GB2760	№ FEMA 2440
5	Фуранеол	GB2760	№ FEMA 3174
6	Этил мальтол	GB2760	№ FEMA 3487
7	Уксусная кислота	GB2760	№ FEMA 2006
8	Триацетил глицерин	GB2760	—



Производитель: Чарминг Фрэгренсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

LINE ROYAL

ароматизатор (с ароматом клубники) "STREWBERRY COLLECTION"

Масса нетто: 13±3 мм
Масса нетто: 13±3 мм

Масса нетто: 1±0,1 мм

Продолжительность: 0,06 мм ±0,01 мм

Масса: 1,4±0,3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: с ароматом клубники

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

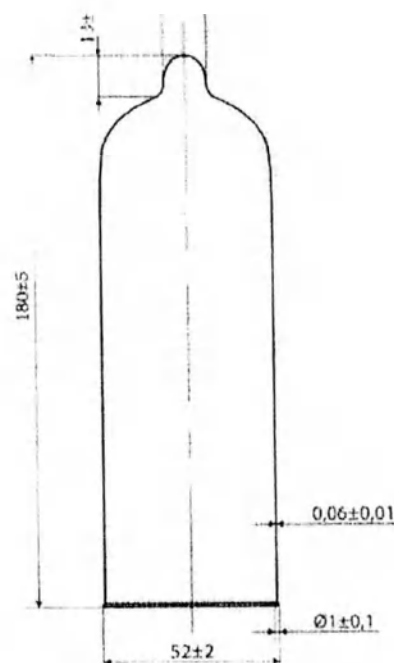

Состав клубничного ароматизатора.

№	Название (на русском языке)	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Гаммадекалактон	GB2760	№ FEMA 2360
2	Этил бутират	GB2760	№ FEMA 2427
3	Бутират гексановой кислоты	GB2760	№ FEMA 2439
4	Этиллактат	GB2760	№ FEMA 2440
5	Фуранеол	GB2760	№ FEMA 3174
6	Этил мальтол	GB2760	№ FEMA 3487
7	Уксусная кислота	GB2760	№ FEMA 2006
8	Триацетил глицерин	GB2760	—



Производитель: Чарминг Фрэгрэнсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд

	До теплового Старения	После теплового старения
Прочность при растяжении, МПа	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Изготовлен из натурального латекса марки LUXE ROYAL:

Смазка: гладкий с увеличенным количеством силиконовой смазки "NIRVANA "

Размеры:

Длина: 180 ± 5 мм

Диаметр: 52 ± 2 мм

Длина накопителя: 13 ± 3 мм

Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0,06$ мм $\pm 0,01$ мм

Масса: $1,4 \pm 0,3$ г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

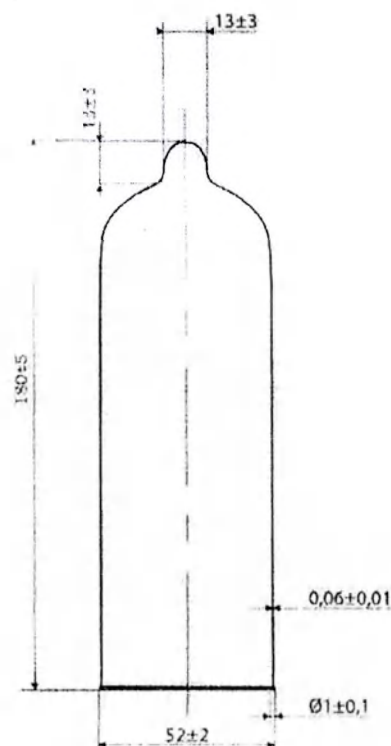

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



марки DOMINO:

Диаметр накопителя: 13 ± 3 мм

Диаметр накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0.06 \text{ мм} \pm 0.01 \text{ мм}$

Масса: 1.4 ± 0.3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

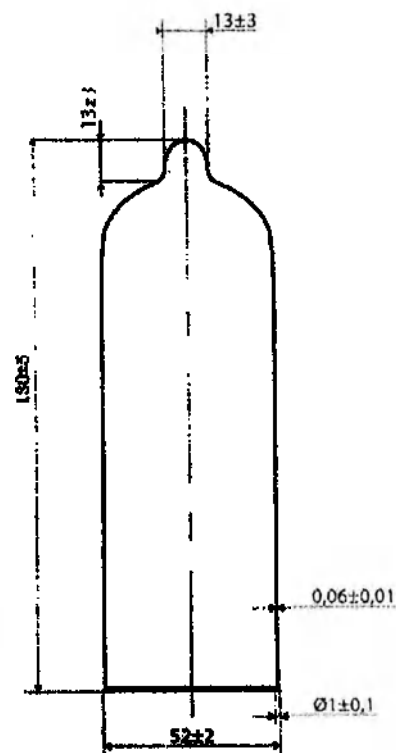

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



ДОНЕВО
"COLOR BEAUTY"

Химические показатели:

Цвет: фиолетовый

Содержит: с накопителем

Конструкция: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Содержит: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

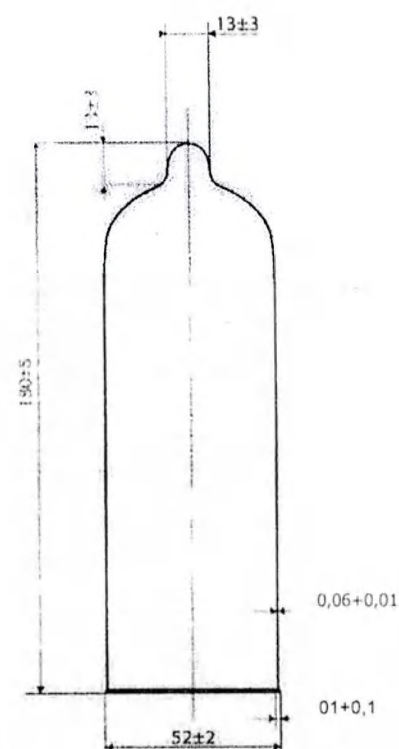

Состав фиолетового красителя TSE L365:

Химическое название	Номер CAS	Содержание
Деионизированная вода	7732-18-5	25,0-40,0%
Пигмент фиолетовый (P.V. 23)	6358-30-1	36,0%
Высокомолекулярное ПАВ	Нет данных	17,0-34,0%

Производитель: «Сучжоу Сунмун Текнолоджи» Ко., Лтд»

Состав золотого красителя TSE L362:

Химическое название	Номер CAS	Содержание
Деионизированная вода	7732-18-5	25,0-35,0%
Пигмент желтый (P.Y. 12)	6358-31-2	45,0%
Высокомолекулярное ПАВ	Нет данных	17,0-34,0%

Производитель: «Сучжоу Сунмун Текнолоджи» Ко., Лтд»



Содержание CAS	Содержание
732-18-5	30,0-50,0%
1333-86-4	34,0%
1333-86-4 (черный)	
Пав	Нет данных
Пав	17,0-34,0%

«Сучжоу Сунмун Текнолоджи» Ко., Лтд»

Презерватив из натурального латекса марки DOMINO:

Презерватив гладкий (увеличенного размера) "KING SIZE"

Размеры:

Длина без накопителя: 190 ± 5 мм

Диаметр: 54 ± 2 мм

Длина накопителя: 13 ± 3 мм

Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0.06 \text{ мм} \pm 0.01 \text{ мм}$

Масса: 1.7 ± 0.3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Хромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

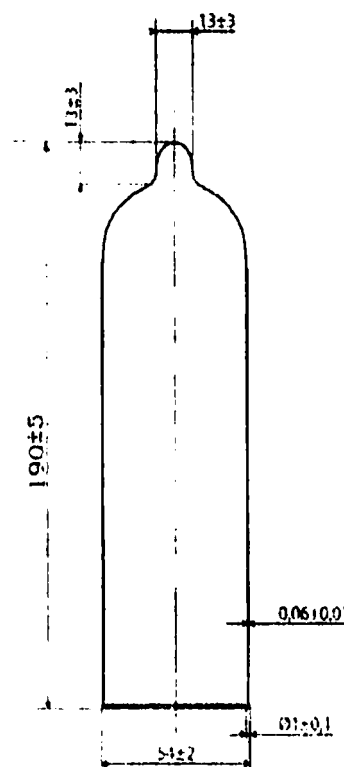


Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве. %	Не менее 700	Не менее 600



... марки DOMINO:
... с рифленой поверхностью "NICE CONTOUR"

Диаметр: 13 ± 3 мм
 Диаметр: 13 ± 3 мм
 Расстояние между текстурой: $2,6 \pm 0,3$ мм
 Длина текстуры: 64 ± 3 мм
 Длина от текстуры до конца презерватива:
 ...
 Толщина:
 Манжет: $1 \pm 0,1$ мм
 Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$
 Масса: $1,5 \pm 0,3$ г.
 Текстура: $0,5 \pm 0,1$ мм
 Физико-механические показатели:
 Цвет: бесцветный
 Форма выпуска: с накопителем
 Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
 Поверхность: текстура - рифленая
 Аромат: без запаха
 Смазка: силиконовое масло
 Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная
 Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

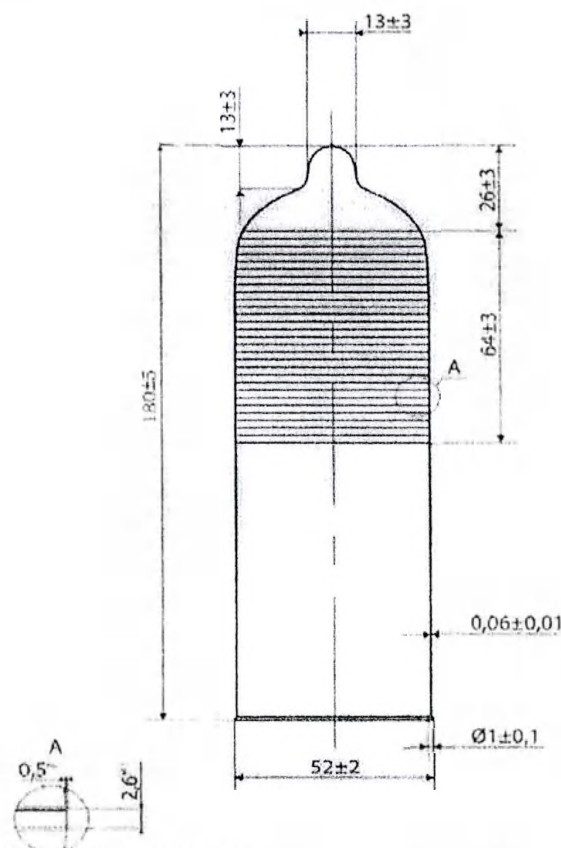


Показатели	Показатели	
	До теплового старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



марки DOMINO:
комбинированный (точечная и рифленая поверхность)

Диаметр: 13 ± 3 мм
 Диаметр накопителя: 13 ± 3 мм
 Расстояние между точками:
 горизонтально 7 ± 1 мм
 вертикально $3 \pm 0,3$ мм
 Длина покрытия точек: 18 ± 3 мм
 Расстояние между рифлением: $2,6 \pm 0,3$ мм
 Длина текстуры: 43 ± 3 мм
 Длина от точек до конца презерватива: 26 ± 3 мм
 Расстояние от точечной до рифленой поверхности: 31 ± 3 мм
 Толщина:
 Манжет: $1 \pm 0,1$ мм
 Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$
 Масса: $1,5 \pm 0,3$ г.
 Точка: $0,5 \pm 0,1$ мм
 Рифление: $0,5 \pm 0,1$ мм
 Физико-механические показатели:
 Цвет: бесцветный
 Форма выпуска: с накопителем
 Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
 Поверхность:
 текстура - точечная и рифленая
 Аромат: без запаха
 Смазка: силиконовое масло
 Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

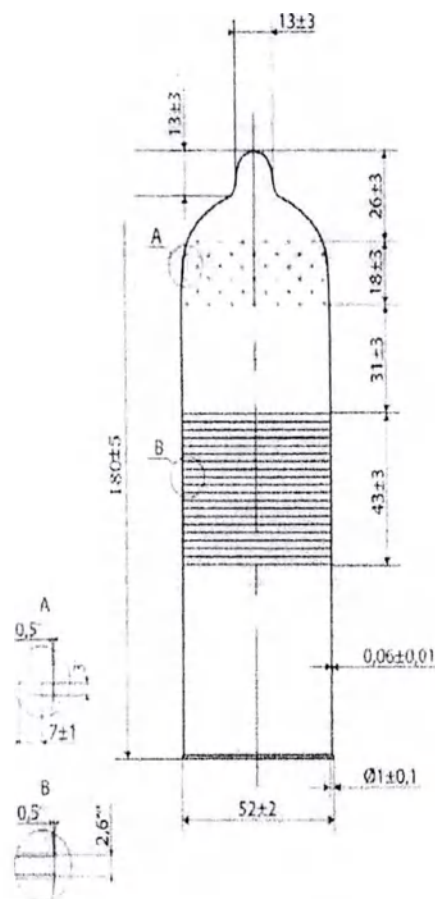

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



марки DOMINO:

с добавлением анестетика "LONG ACTION"

13±3 мм

13±3 мм

13±3 мм

0,06 мм ±0,01 мм

1,4±0,3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Механизм: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга

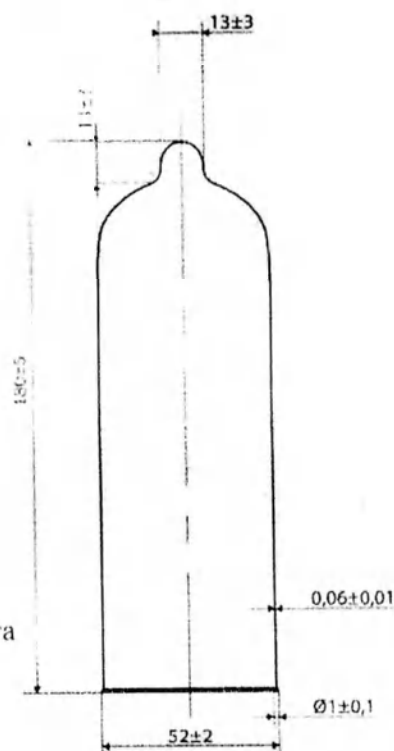

Состав анестетика:

Полиэтиленгликоль	96%
Бензокаин	4%



Показатели	До теплового старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



латекса марки DOMINO:
с точечной поверхностью "FUN BUMPS"

Диаметр накопителя: 13 ± 3 мм
 Диаметр накопителя: 13 ± 3 мм
 Расстояние между точками:
 Горизонтально 7 ± 1 мм
 Вертикально $3 \pm 30,3$ мм
 Длина текстуры: 64 ± 3 мм
 Длина от текстуры до конца презерватива: 30 ± 3 мм
 Толщина:
 Манжет: $1 \pm 0,1$ мм
 Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$
 Масса: $1,5 \pm 0,3$ г.
 Точка: $0,5$ мм
 Физико-механические показатели:
 Цвет: бесцветный
 Форма выпуска: с накопителем
 Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик
 Поверхность: текстура - точечная
 Аромат: без запаха
 Смазка: силиконовое масло
 Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки:
 алюминиевая фольга.

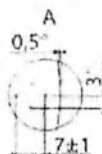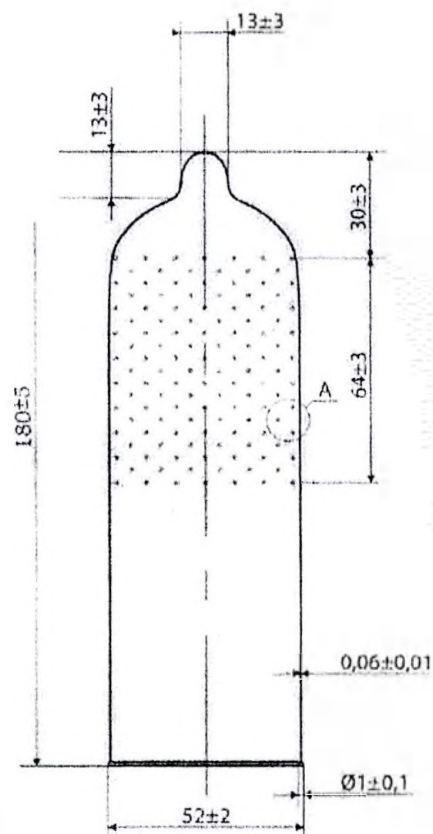

Показатели	До теплового	После теплового
	Старения	старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



Диаметр: 13 ± 3 мм

Диаметр накопителя: 13 ± 3 мм

Толщина: $0,1$ мм

Толщина: $0,05$ мм $\pm 0,015$ мм

Вес: $1,2 \pm 0,5$ г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

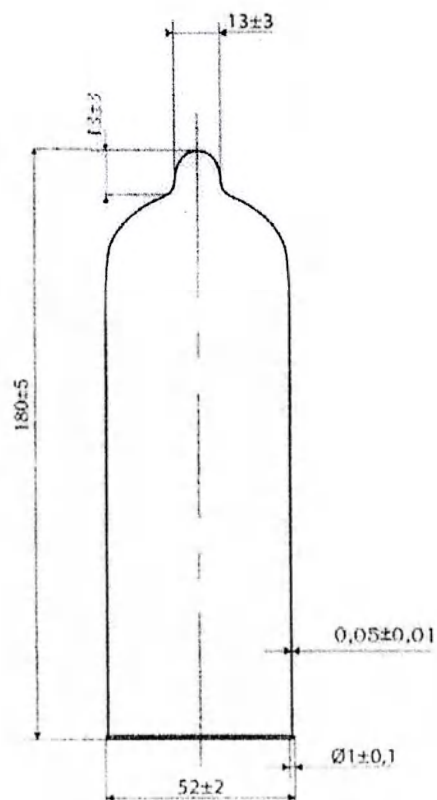

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



латекса марки DOMING:
"EXTRA STRONG"

Диаметр: 52 ± 2 мм

Диаметр: 52 ± 2 мм

Диаметр накопителя: 13 ± 3 мм

Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: 0.09 мм ± 0.01 мм

Масса: 1.6 ± 0.3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки:
квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки:
алюминиевая фольга.

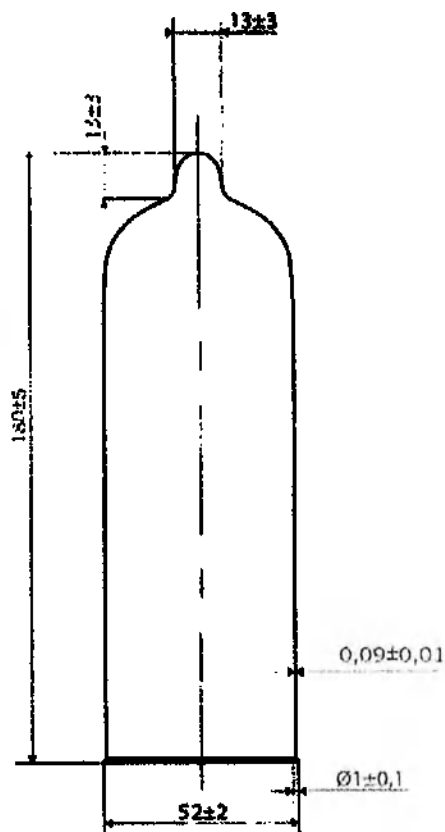

Показатели	До теплового старения	
	До теплового старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



натурального латекса марки DOMINO:
с увеличенным количеством силиконовой

Диаметр: 180 ± 5 мм

Диаметр: 52 ± 2 мм

Длина накопителя: 13 ± 3 мм

Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0,06 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$

Масса: $1,4 \pm 0,3$ г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

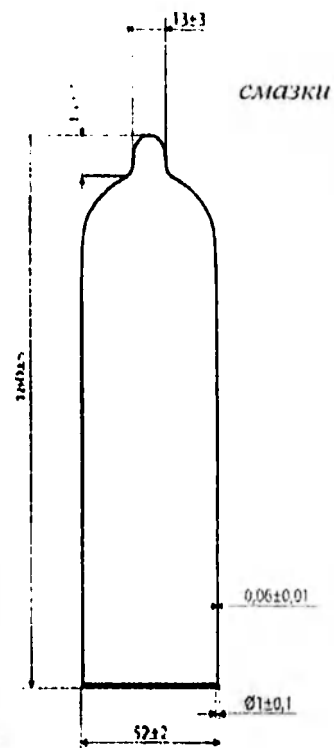

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



Показатели:

Цвет: бесцветный

Форма: капсула с накопителем

Конструкция: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Текстура: гладкая

Запах: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая

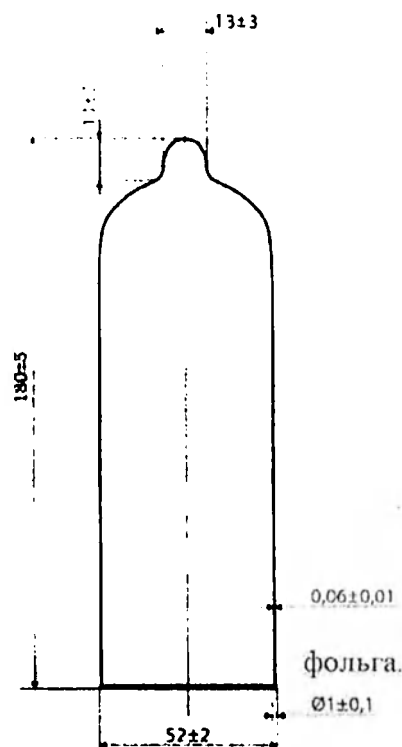

Состав светящегося вещества.

Наименование компонента	Регистрационный номер CAS	Номер ЕС веществ	Массовая доля (%)
Алюминат стронция	12004-37-4	234-455-3	98
Европий	7440-53-1	231-161-7	1
Диспрозий	7429-91-6	231-073-9	1

Производитель: «Шэньжэнь Сити Цзин Лян Цай Текнолоджи Ко., Лтд»

Показатели	До теплового старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



Латекса марки DOMINO:
сиреневого цвета "NEON VIOLET"

13±3 мм

13±3мм

±0.1 мм

0,06 мм ±0,01 мм

1,4±0,3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

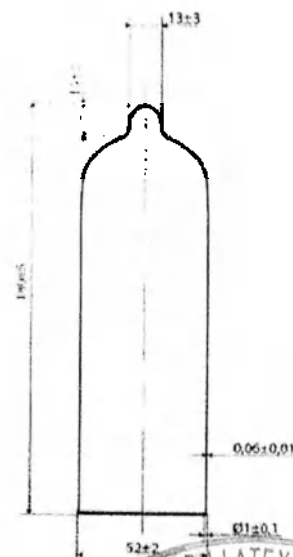

Состав светящегося вещества.

Наименование компонента	Регистрационный номер CAS	Номер ЕС веществ)	Массовая доля (%)
Алюминат стронция	12004-37-4	234-455-3	98
Европий	7440-53-1	231-161-7	1
Диспрозий	7429-91-6	231-073-9	1

Производитель: «Шэньчжэнь Сити Цзин Лян Цай Текнолоджи Ко., Лтд»

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

латекса марки DOMINO;
свечящийся золотого цвета "NEON GOLD"

Диаметр:
52±2 мм
Диаметр накопителя: 13±3 мм
Диаметр накопителя 13±3 мм

Толщина:

Манжета: 1±0,1 мм

Презерватив: 0,06 мм ±0,01 мм

Масса: 1,4±0,3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.

Поверхность: текстура - гладкая


Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки:

квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

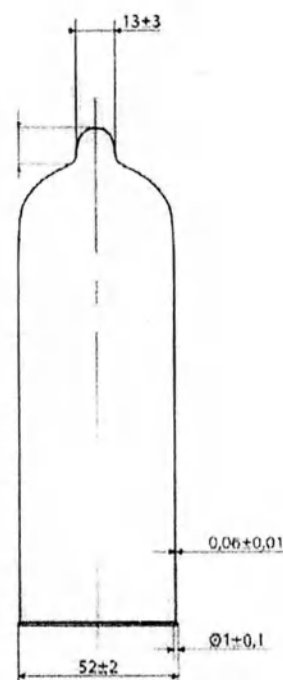

Состав светящегося вещества

Наименование компонента	Регистрационный номер CAS	Номер ЕС веществ	Массовая доля (%)
Алюминат стронция	12004-37-4	234-455-3	98
Европий	7440-53-1	231-161-7	1
Диспрозий	7429-91-6	231-073-9	1

Производитель: «Шэньчжэнь Сити Цзин Лян Цай Текнолоджи Ко., Лтд»

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, Мпа (кгс см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600



контекста марки DOMINO:

ароматизированный (с ароматом тропических фруктов) "SWEET SEX

13±3

Диаметр: 52±2 мм

Диаметр: 52±2 мм

Диаметр накопителя: 13±3 мм

Ширина накопителя 13±3 мм

Толщина:

Манжет: 1±0.1 мм

Презерватив: 0,06 мм ±0,01 мм

Масса: 1,4±0,3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: с ароматом тропических фруктов

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

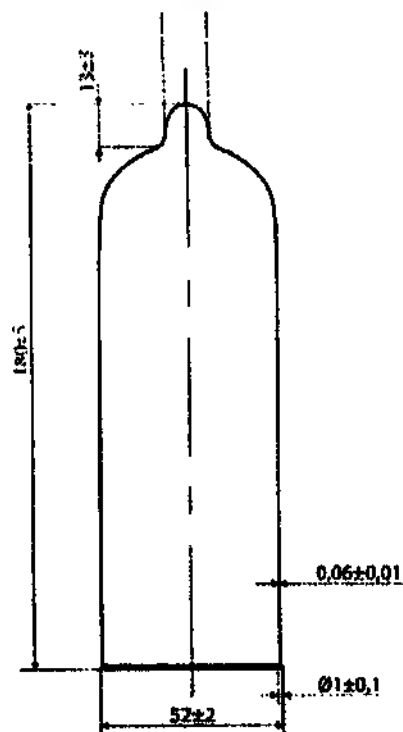

Состав ароматизатора тропических фруктов.

№	Название	Стандарт соответствия	№ FEMA
1	Бензиобензоат	GB2760	№ FEMA 2138
2	Циннамилацетат	GB2760	№ FEMA 2293
3	Терпинилацетат	GB2760	№ FEMA 3047
4	Бензальдегид	GB2760	№ FEMA 2127
5	Циннамальдегид	GB2760	№ FEMA 2286
6	Гелиотропин (пиперонал)	GB2760	№ FEMA 2911
7	Коричный спирт	GB2760	№ FEMA 2294
8	Ванилин	GB2760	№ FEMA 3107
9	Этил мальтол	GB2760	№ FEMA 3487
10	Этилванилин	GB2760	№ FEMA 2464

Производитель: Шуангма Сьянцзин Сьянляю Ко., Лтд (Тяньцзинь)



	До теплового Старения	После теплового старения
Прочность на разрыв, МПа	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Прочность при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки DOMINO:

Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом шоколада) "SWEET SEX CHOCOLATE MOUSSE"

Размеры:

Длина: 180 ± 5 мм

Диаметр: 52 ± 2 мм

Длина накопителя: 13 ± 3 мм

Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0.06 \text{ мм} \pm 0.01 \text{ мм}$

Масса: 1.4 ± 0.3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.

Поверхность: текстура - гладкая


Аромат: с ароматом шоколада

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга

Состав шоколадного ароматизатора.

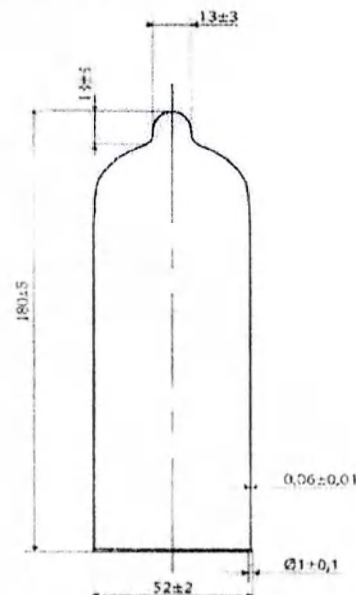

№	Название (на русском языке)	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Фенил-этиловый спирт	GB2760	—
2	Изоамиловый спирт	GB2760	№ FEMA 2057
3	Изобутиральдегид	GB2760	
4	Этил ванилин	GB2760	№ FEMA 2464
5	Ванилин	GB2760	№ FEMA 3107
6	Этил мальтол	GB2760	№ FEMA 3487
7	Растительное масло	GB2760	—

Производитель: Чарминг Фрэгрэнсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд



	До теплового Старения	После теплового старения
при растяжении, МПа	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

из натурального латекса марки DOMINO:

гладкий ароматизированный (с ароматом мороженого) "SWEET SEX ICE CREAM"

Размеры:

Длина: 180 ± 5 мм

Диаметр: 52 ± 2 мм

Длина накопителя: 13 ± 3 мм


Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: $0,06$ мм $\pm 0,01$ мм

Масса: $1,4 \pm 0,3$ г.

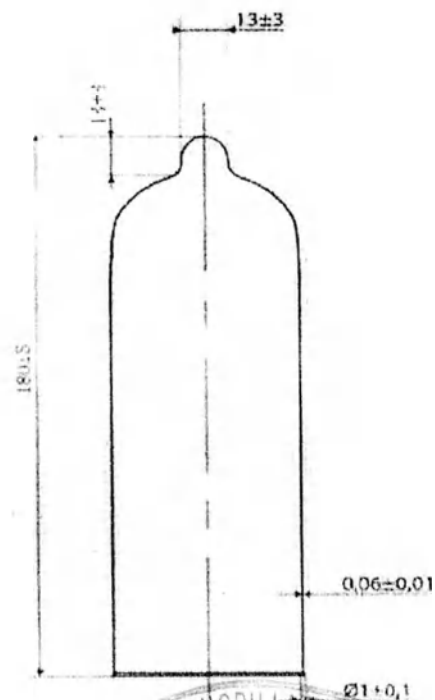

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.

Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: с ароматом мороженого

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

Состав ароматизатора мороженное.

№	Название	Стандарт соответствия	№ CNS. INS. FEMA
1	Альдегид С-14	GB2760	№ FEMA 2763
2	Молочный лактон	GB2760	№ FEMA 3742

	До теплового Старения	После теплового старения
Прочность при растяжении, МПа	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Из натурального латекса марки DOMINO:

Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом манго) "SWEET SEX MANGO "

Размеры:

Длина: 180 ± 5 мм

Диаметр: 52 ± 2 мм

Длина накопителя: 13 ± 3 мм

Ширина накопителя 13 ± 3 мм

Толщина:

Манжет: 1 ± 0.1 мм

Презерватив: 0.06 мм ± 0.01 мм

Масса. 1.4 ± 0.3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: с ароматом манго

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

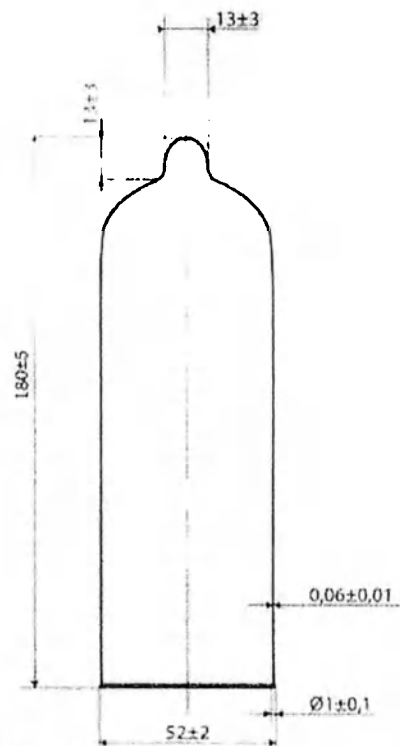

Состав манго ароматизатора.

№	Название	Стандарт соответствия	№ FEMA
1	Гамма-декалактон	GB2760	№ FEMA 2360
2	Дельта-декалактон	GB2760	№ FEMA 2361
3	Метил дигидроjasмонат	GB2760	№ FEMA 3408
4	Метил антранилат	GB2760	№ FEMA 2682
5	Гскс-3-цис-1-ил ацетат	GB2760	№ FEMA 3171
6	Бензил ацетат	GB2760	№ FEMA 2135
7	Глицерил триацетат	GB2760	№ FEMA 2007
8	Бензил диметилкарбинил бутират	GB2760	№ FEMA 2394
9	Гамма-додекалактон	GB2760	№ FEMA 2400
10	Бензальдегид	GB2760	№ FEMA 2127



альдегид	GB2760	№ FEMA 2569
	GB2760	№ FEMA 2781
	GB2760	№ FEMA 3091
	GB2760	№ FEMA 2249
гексен-1-ол	GB2760	№ FEMA 2563

Производитель: Шуангма Сьянцзин Сьянльяо Ко., Лтд (Тяньцзинь)

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки DOMINO:
Презерватив гладкий ароматизированный (с ароматом клубники)
"SWEET SEX STRAWBERRY COCTAIL"

Размеры:

Длина: 180±5 мм

Диаметр: 52±2 мм

Длина накопителя: 13±3 мм

Ширина накопителя 13±3мм

Толщина:

Манжет: 1±0.1 мм

Презерватив: 0,06 мм ±0,01 мм

Масса: 1,4±0,3 г.

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.


Поверхность: текстура - гладкая

Аромат: с ароматом клубники

Смазка силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: квадратная, прямоугольная

Тип первичной (индивидуальной) упаковки: алюминиевая фольга.

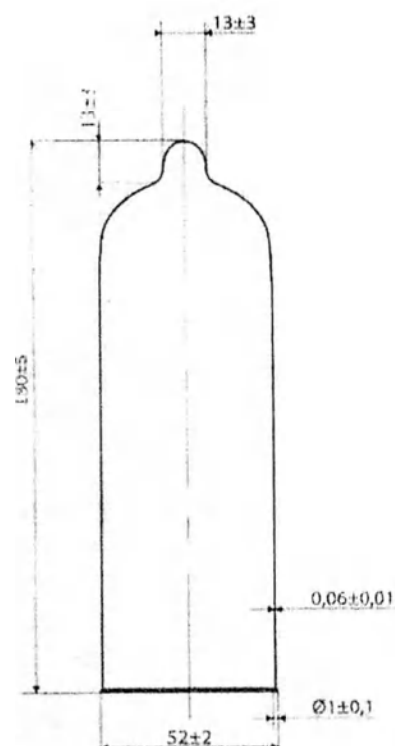

Состав клубники ароматизатора.

№	Название	Стандарт соответствия	№ CNS, INS, FEMA
1	Гаммадекалактон	GB2760	№ FEMA 2360
2	Этил бутират	GB2760	№ FEMA 2427
3	Бутират гексановой	GB2760	№ FEMA 2439



	GB2760	№ FEMA 2440
	GB2760	№ FEMA 3174
	GB2760	№ FEMA 3487
Уксусная кислота	GB2760	№ FEMA 2006
Метилен глицерин	GB2760	

Производитель: Чарминг Фрэгрэнсис энд Флэйвэринг Ко., Лтд

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

11. Данные по маркировке медицинского изделия

Макет упаковки.



quiwop
condoms

domino

CLASSIC

NICE
CONTOUR

ПРЕЗЕРВАТИВ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ
С РИФЛЕНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ

condoms
domino

CLASSIC

NICE CONTOUR

ПРЕЗЕРВАТИВ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ
С РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ "NICE CONTOUR"

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

КОЛИЧЕСТВО: 6 ШТ.
НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ДЛИНА 100 ± 5 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,06 мм

condoms
domino
CLASSIC

NICE
CONTOUR

ПРЕЗЕРВАТИВ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ
С РИФЛЕНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

condoms
domino
CLASSIC



ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕЗЕРВАТИВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРАЦЕПТИВНОМ БАРЬЕРНОГО ТИПА, А ТАКЖЕ СРЕДСТВОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЗВОЛЕННЫМИ ИЗОСТОПНКАМИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАЧЕСТВА. СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 4645-81 И ISO 13465. СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ. ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°C ДО 25°C ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 80%. НЕ ПОСЛЕДОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМОГО СОПЕЧАЮЩЕГО СВЕТА. НЕГОСОСЛЕТЕЛЬ: "DONGYANG SONGRU LATEX CONDOMS CO., LTD." ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ЛАГ-ДИСК (ПЕЧАТНЫЙ) ИД., ПЛОС.
АДРЕС: №1, NEW AND HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE 121043, JINZHOU, LIAONING, CHINA, KИТАЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ООО "ЭЛЭ-ЭЛЭ" РОССИИ, 125065, С. АНДРЕЕВ,
ВКА, ПУСК. НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, 10-й ЯНВ. Д. 101, СТР. 1, 3/ЭЛЭ-ЭЛЭ,
ПОСРЕД. А. КОМ. 14, ОБЪЕД. 101. ТЕЛ.: +7 (855) 544-33-01.



05.2028
05.2023
230501

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ
№ РЗН 2019/0546 ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

WWW.LUXE-CONDOMS.RU

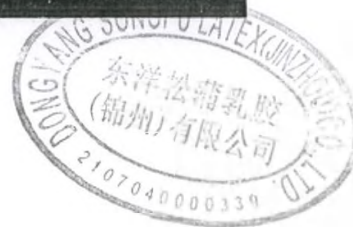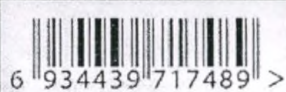

ошшор
condoms

domino

CLASSIC

FUN
BUMPS

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ
СТОЧЕЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ

condoms

domino

CLASSIC

FUN BUMPS

ПРЕЗЕРВАТИВ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ
СТОЧЕЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ "FUN BUMPS"

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

КОЛИЧЕСТВО: 6 ШТ.
НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ДЛИНА - 180 ± 5 ММ
ТОЛЩИНА СТЕНКИ - 0,05 ММ

condoms

domino

CLASSIC

FUN
BUMPS

ПРЕЗЕРВАТИВ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ
СТОЧЕЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

condoms

domino

CLASSIC


ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕЗЕРВАТИВЫ ЯВЛЯЮТСЯ КОНТРАЦЕПТИВНЫМ БАРЬЕРОМ
ТИПА, А ТАКЖЕ СРЕДСТВОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЮЩИХ ПОЛОВЫМИ ПУТЯМИ.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО НАТУРАЛЬНОМУ ПИЧЕСКУ СОТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 4645-81 И ISO
13485. СЛЕДУЙТЕ ПРИЛАЖЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ. СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ.
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°С ДО 25°С И ОТСУТСТВИИ ВОЛАЖНОСТИ НЕ
БОЛЕЕ 80%. НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОПЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "DONGYANG SONGPU LATEX CONDOMS CO. LTD." ДОНЯНГ СОНГПУ ЛАТЕКС
ЦЕДЖИ-СОНГПУ КО., ЛТД.
АДРЕС: №1, NEW AND HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE 121013, DONGYANG, LIAONING, CHINA, KPMG
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ООО "ЭЛЭЛ-ПАЙП", РОССИЯ, 125065, Г. МОСКВА,
ВН. ПЕР. К. МЕДИЦИНАЛЬНЫЙ СБОРТО ОСТАВЛЕНСКОГО, ПР-СТ АНЖЕ, Д. 101, СТР. 1, ЭТАЖ-4,
ПОВЕД. 1, 404-14, 094С 181. ТЕЛ.: +7 (495) 544-33-81.



05.2028
05.2023
230501

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ
№ РЗН 2019/0368 ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

WWW.LUXE-CONDOMS.RU

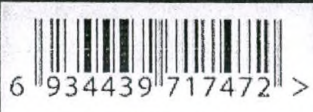

oviwop
L I S S O O S

condoms
domino

CLASSIC

KING SIZE

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВ ГЛАДКИЙ
(УВЕЛИЧЕННОГО
РАЗМЕРА)

condoms
domino

CLASSIC

KING SIZE

ПРЕЗЕРВАТИВ ГЛАДКИЙ
(УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА) "KING SIZE"

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

КОЛИЧЕСТВО РАЗ
НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ
ДЛИНА 190 мм
ПОШИТА СРЕДНИЙ ПОСРЕДНИЙ

condoms
domino
CLASSIC

**KING
SIZE**

ПРЕЗЕРВАТИВ
ГЛАДКИЙ
(УВЕЛИЧЕННОГО
РАЗМЕРА)

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

condoms
domino
CLASSIC


ПРЕЗЕРВАТИВЫ ОМАНКОЛЬЗОВАНИИ ПРЕЗЕРВАТИВЫ НЕ ПОПАДАЮТ КОНТАКТИРОВКИ БАРЬЕРНОГО
ТИПА, А ТАКЖЕ СРЕДСТВОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ИЗ НАИЗВЕСТНОГО ПАТЕНТА, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 4545-01 И ISO
13485. СЛЕДУЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ.
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°C ДО 25°C И НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕ
БОЛЕЕ 99%. НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.
НЕГОСИТЕЛИ: "DOMOWING SONGPU LATEX (JINZHONG) CO., LTD." ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПАТЕНТ
ЦИТАЦИЯ 92291 NO., LTD.
АДРЕС: NO.1, NEW AND HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE 121013, JINZHONG, LIAONING, CHINA. КИТАЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ООО "ОЭЛС-ЛАЙТ" РОССИЯ, 129085, г. МОСКВА,
Б-1, ТЕР. 1, МАГНИТНЫЙ ЛАЙН СЕРВИСА, 10-й ЭТАЖ, Д. 101, СЕР. 1, 35404,
ПОВЕР. Л. ООМ. 14, ОДН. 181. ТЕЛ.: +7 (495) 944-33-81.



05.2028
05.2023
LUT 230501

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
РЕГИСТРАЦИОННЫМ ДОСТОВЕРИЕМ
№ РЗН 2019026801 11 СЕВЕРЛАЙ 2019 г.

WWW.LUXE-CONDOMS.RU

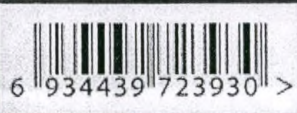



condoms
domino
CLASSIC

ПРЕЗЕРВАТИВ ГЛАДКИЙ
С УВЕЛИЧЕННЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ
СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКИ

condoms
domino
CLASSIC

EASY ENTRY

ПРЕЗЕРВАТИВ ГЛАДКИЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКИ "EASY ENTRY"

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

КОЛИЧЕСТВО: 6 ШТ.
НОМЕР НАТЯНУТОГО РАЗМЕР
ДЛИНА: 180 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 0,06 мм

condoms
domino
CLASSIC

EASY ENTRY

ПРЕЗЕРВАТИВ ГЛАДКИЙ
С УВЕЛИЧЕННЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ
СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКИ

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

condoms
domino
CLASSIC

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЗЕРВАТИВЫ РЕКАУТЕР КОНТРАЦЕПТИВНОГО КАЧЕСТВА
ТИПА, А ТАКЖЕ СЛУЖАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.
ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 4545-81 И ISO
13485. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ.
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°C ДО 25°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ
БОЛЕЕ 80%, НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "ANG SONGPU LATEX (JINZHONG) CO. LTD." ДОЛЖНО БЫТЬ ЛАТЕКС
ЦЕЗЫНЬ (CIS-3) КД, ПУС.

АДРЕС: №1, NEW AND HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE, 121013, JINZHONG, LIAONING, CHINA, КИТАЙ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ООО "АТЛАНТИКА" РОССИЯ, 125065, Г. МОСКВА,
ВЛ. ПЕР. Г. МОНИЦИН, Д. 10А, ОФИС 101, Д. 10А, СТР. 1, 5040-4.
ПОМЕЩ. 1, КОМ. 1А, ОФИС 101. ТЕЛ.: +7 (495) 544-33-01.



05.2028
05.2023
230501

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
РЕГИСТРАЦИОННЫМ ДОСТОВЕРИЕМ
№ РМ 2019/0280 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

WWW.LUXE-CONDOMS.RU



domino

condoms
domino

CLASSIC

ПРЕЗЕРВАТИВ ГЛАДКИЙ
ОСОБОПРОЧНЫЙ

condoms
domino

CLASSIC

EXTRA STRONG

ПРЕЗЕРВАТИВ ГЛАДКИЙ ОСОБОПРОЧНЫЙ
"EXTRA STRONG"

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

КОЛИЧЕСТВО: 6 ШТ.
НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ДЛИНА - 180-190 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ - 0,09 мм

condoms
domino
CLASSIC

EXTRA
STRONG

ПРЕЗЕРВАТИВ
ГЛАДКИЙ
ОСОБОПРОЧНЫЙ

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

condoms
domino
CLASSIC

ПРЕПАРАТЫ И ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВОВ ЯВЛЯЮТСЯ КОНТРАЦЕПТИВНОМ БАЛАНСНОГО
ТИПА, А ТАКЖЕ СРЕДСТВАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБЕРЕМЕННОСТИ. СЛЕДУЮЩИМ ПОТОЖИВАТЕЛЯМ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЯ ПАКЕТА, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 4645-81 И ISO
13485. СЛЕДУЕТ ПРИЛАГАЕМЫМ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. СЖИГАЮЩИЙСЯ КЕЛ
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°С ДО 25°С. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НЕ
БОЛЕЕ 90%. НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.
НЕГОСИТЕЛИ: "DONGWING SONGPU LATEX RUBBER CO. LTD." ДОИН СОНПУ ЛАТЕКС
ЦЕНА (2020) руб., НДС
АДРЕС: №1, NEW AND HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE 121013, JINZHOU, CHINA, KUNING, CHINA, KUNING
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ООО "ЭЛЛИ-ЛАЙТ" РОССИЯ, 125065, г. МОСКВА,
ПСК. ПЕР. Е. КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА, Д. 100, СТР. 1, ЭТАЖ 4,
ПОЯС 1, КОМ. 14, ОБЪЕМ 181. ТЕЛ: +7 (495) 544-33-81.



05.2028
05.2023
230501

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
РЕГИСТРАЦИОННЫМ ДОСТОВЕРИЕМ
№ РЗН 2019/0368 ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

WWW.LUXE-CONDOMS.RU



condoms
domino

condoms
domino

CLASSIC

ПРЕЗЕРВАТИВ
ГЛАДКИЙ ПРОДЛЕВАЮЩИЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ
АНЕСТЕТИКА

condoms
domino

CLASSIC

LONG ACTION

ПРЕЗЕРВАТИВ ГЛАДКИЙ ПРОДЛЕВАЮЩИЙ С
ДОБАВЛЕНИЕМ АНЕСТЕТИКА "LONG ACTION"

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

КОЛИЧЕСТВО В ЦЕПЕ
НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ДЛИНА 180 ± 5 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.06 мм

condoms
domino
CLASSIC

**LONG
ACTION**

ПРЕЗЕРВАТИВ ГЛАДКИЙ
ПРОДЛЕВАЮЩИЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ
АНЕСТЕТИКА

6

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

condoms
domino
CLASSIC

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕЗЕРВАТИВЫ РЕШАЮТ КОНТРОЛИРОВАННОЕ БАРИЕРНОЕ
ТУЛА, А ТАКЖЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СЕРВЕДИЩОСЯ ПОДКОЖНЫМ ПУТЕМ
НЕОБЩЕНЫМИ НАТУРАЛЬНОГО ПАТЕНКА. СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 4645-81 И ISO
13485. СЛЕДУЕТ ПРИМАНИМАТЬ ВНИМАНИЕ ПО ГИГИЕНЕ ИЛИ ОТСЛЕЖИВАЮЩИХ СЕР.
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°C ДО 25°C И ОТСЛЕЖИВАЮЩИХ НЕ
БОЛЕЕ 50%. НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "DONGWANG SONGPU LATEX CONDOMS CO. LTD." ДОМЭН СОУПРУ ЛАТЭКС
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ДО. ПТД.


АДРЕС: №1, NEW ANCHOR TECH DEVELOPMENT ZONE 121013, JIANGSU, CHINA, KUNTAI
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ООО "ЭЛЛИ-ЭЛЛИ", РОССИЯ, 125065, г. МОСКВА,
Пол. ПЕР. Г. МАШИНАЛЬНЫЙ СЕРП ОСТАВЛЕН, ПР-ОТ АНЖА, Д. 101, СЕР. 1, ЭТАЖ 4,
ПОМЕЩ. 1, КСМ. 14, 0345 Тел. Тел. +7 (495) 544-55-01.



05.2028
05.2023
LOT 230501

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ
№ РЗН 2019/0368 ОТ 11 СЕВЕРЯ 2019 г.

WWW.LUXE-CONDOMS.RU

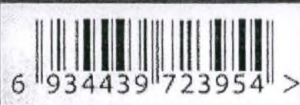

condoms
domino
CLASSIC

condoms
domino
CLASSIC

EXTASE

ПРЕЗЕРВАТИВ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
(ТОЧЕЧНАЯ И РИФЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) "EXTASE"

ПРЕЗЕРВАТИВ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ

6
ПРЕЗЕРВАТИВОВ

КОЛИЧЕСТВО: 6 ШТ.
НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ДЛИНА: 190 мм
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 0,06 мм

EXTASE

ПРЕЗЕРВАТИВ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ

6
ПРЕЗЕРВАТИВОВ

condoms
domino
CLASSIC

ПРИ ПЛАНИРУЕМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕЗЕРВАТИВЫ РЕКАУПЕРИРУЮТ СВОЮ БУДУЩУЮ ФОРМУ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СЕРЬЕЗНОСТИ ПОЛОВОЙ ИНФЕКЦИИ. ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПЛЕНКИ, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 4645-81 И ISO 13485. СЛЕДУЙТЕ ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ. ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°С ДО 25°С И ВОЗДУШНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80%. НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "DONGGUANG SONGPU LATEX CHEMICAL CO., LTD." ДОНГУАНГ СОНГПУ ЛАТЕКС ХЕМИКАЛ КОМПАНИ ЛТД., КИТАЙ.
АДРЕС: №1, NEW ANZHUANG-TECH DEVELOPMENT ZONE 121013, JIANGSU, CHINA, КИТАЙ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ООО "ЭЛЛИ-ПАРТ", РОССИЯ, 125065, Г. МОСКВА, ОУН. ПЕР. Г. КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА, Д. 101, СЕР. 1, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1, 0501. Т. 4. ОФИС 181. ТЕЛ.: +7 (495) 544-33-81.




05.2028
05.2023
230501


КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ
№ РЗН 2019180880 ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

WWW.LUXE-CONDOMS.RU



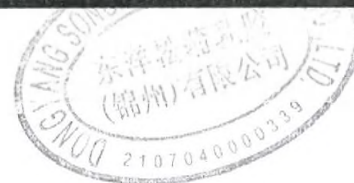

condoms SWEET SEX 3 презерватива с ароматом клубники STRAWBERRY COCTAIL

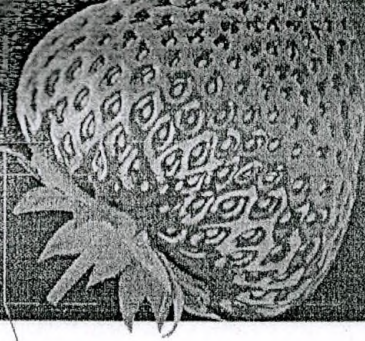

DOMINO
CONDOMS
SWEET
SEX
STRAWBERRY
COCTAIL



condoms
domino


Презерватив стандартной ароматизированный DOMINO "SWEET SEX" с ароматом клубники.
Количество: 3 шт.
Номинальные размеры: длина - 180 мм, ширина - 55 мм, толщина стенок - 0,06 мм. При правильном использовании презервативы защищают от заражения вирусом иммунодефицита человека, а также являются средством профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Изготовлены из натурального латекса. Соответствуют требованиям ISO 13485. Следуйте прилагаемой инструкции по применению. Срок годности 5 лет. Хранить в сухом месте при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Изготовитель: "Dongpu Latex (Zhongpu) Co. Ltd." Дунпу Латекс (Циньчжоу) Ко., Лтд.
Адрес: №1 New and High-tech Development Zone 1210113, Ningbo, Zhejiang, China, Китай.
Представитель на территории России: ООО "Вини-Плюс", Россия, 119085, г. Москва, вл. пер. 2.
Импортёрский округ: Восточный, пр-кт Марш. Д. 101, стр. 1, этаж 4, пом. 14, офис 181.
Тел.: +7 (805) 546-33-81.
Качество подтверждено регистрационным удостоверением ИР РЗН/2019/0010 от 11 февраля 2019 г., ГОСТ 4615-81
www.luxx-condoms.ru


SWEET
SEX



ISO 13485
05.2028
05.2023
230501



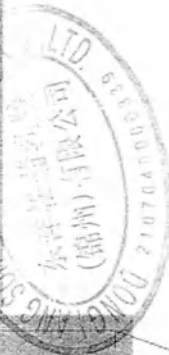

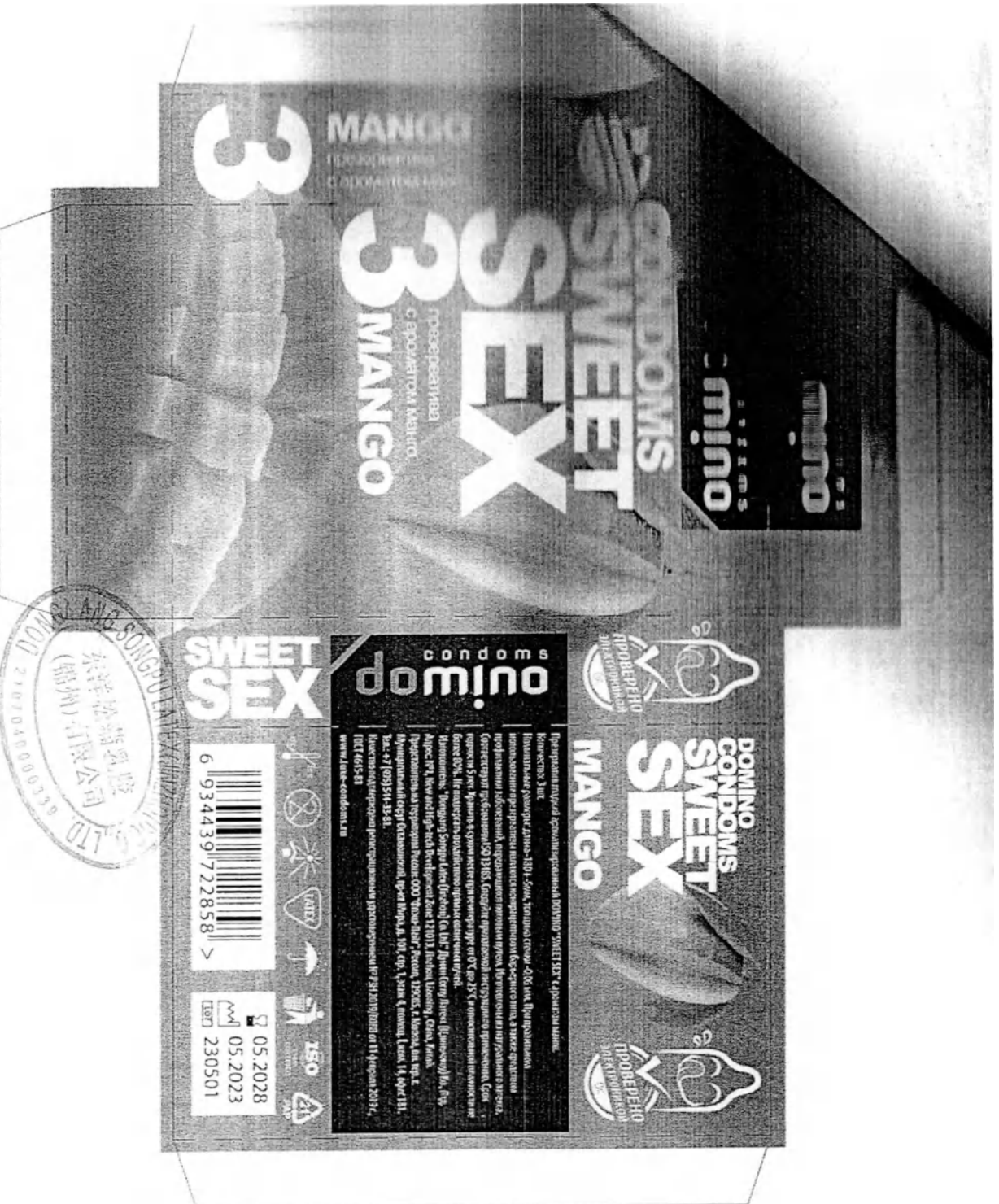



DOMINO
CONDOMS
SWEET
SEX
ICE CREAM

POCЧУC
DOMINO
CONDOMS
SWEET
SEX
ICE CREAM

SWEET
SEX



05.2028
05.2023
230501



3 CHOCOLATE MOUSSE презервативы с ароматом шоколада

domino
CONDOMS
SWEET SEX
3 презерватива с ароматом шоколада
CHOCOLATE MOUSSE



domino condoms

SWEET SEX



DOMINO
CONDOMS
SWEET SEX
CHOCOLATE MOUSSE





Презерватив гладкий ароматизированный DOMINO "SWEET SEX" с ароматом шоколада.
Количество: 3 шт.
Номинальные размеры: длина - 180+/-5мм, ширина стенок - 0,06 мм. При производстве использованы презервативы высшего качества контрацептивного барьерного типа, а также средства профилактики заболеваний, передающихся половыми путями. Изготовлены из натурального латекса. Соответствуют требованиям ЕО 13485. Следуйте прилагаемой инструкции по применению. Срок годности 5 лет. Хранить в сухом месте при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Изготовитель: "Dongpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd" Дунпу Латекс (Цзиньчжоу) Ко., Лтд, Адрес: №1, New and High-Tech Development Zone 121013, Jinzhou, Liaoning, China, Китай.
Представитель на территории России: ООО "Визит-Плюс", Россия, 125083, г. Москва, ул. Тар. К. Международный центр бизнес-инициатив, пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, этаж 4, помещ. 4.04, офис 181.
Тел.: +7 (495) 544-33-81.
Качество подтверждено регистрационным удостоверением №РЗН/2019/0018 от 11 февраля 2019г., ГОСТ 4645-81
www.luxe-condoms.ru


05.2028
05.2023
230501




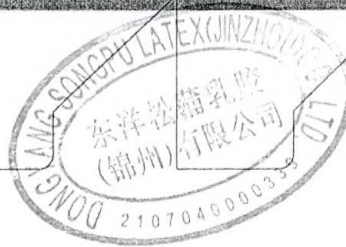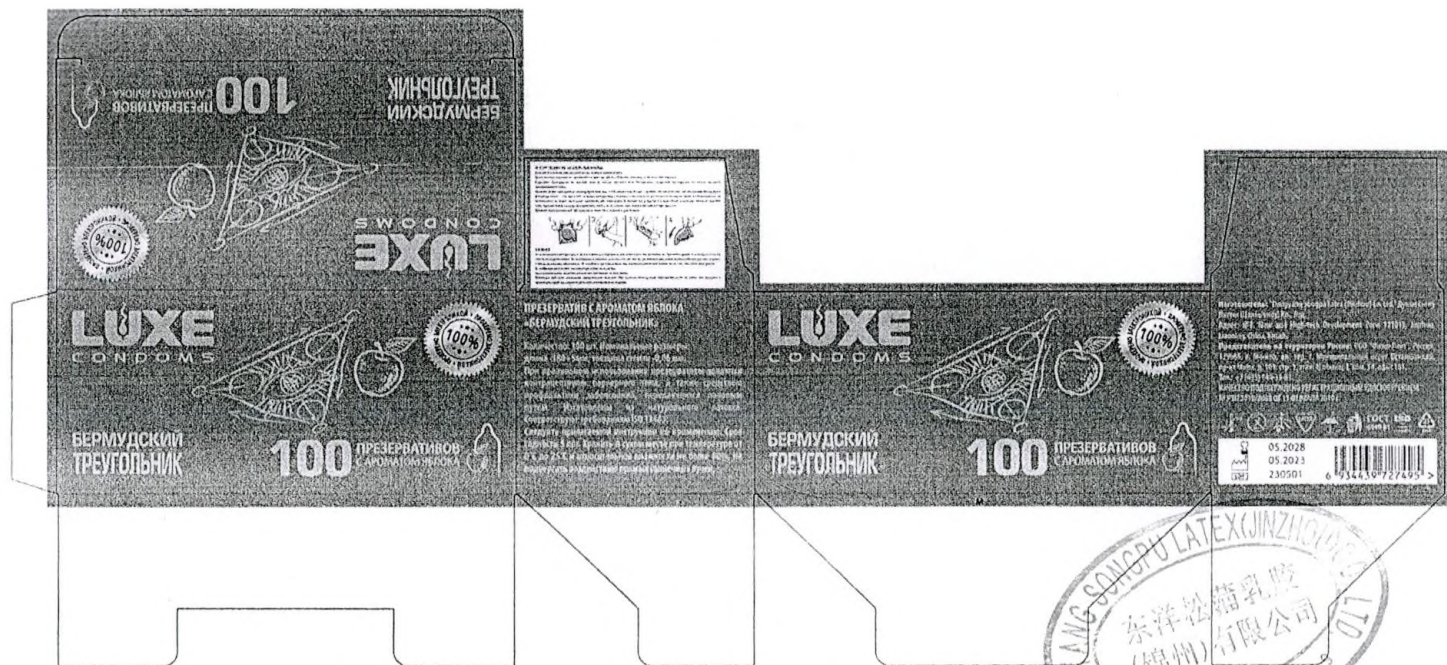




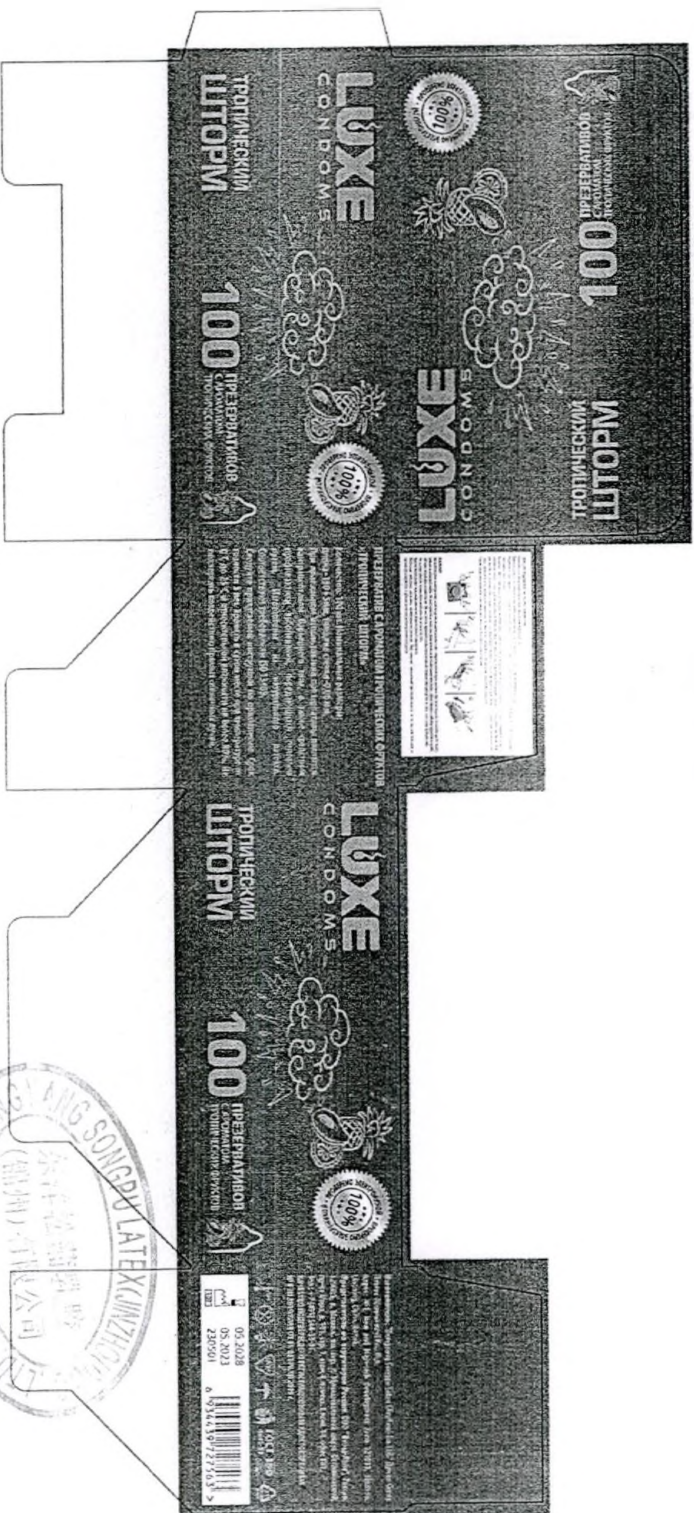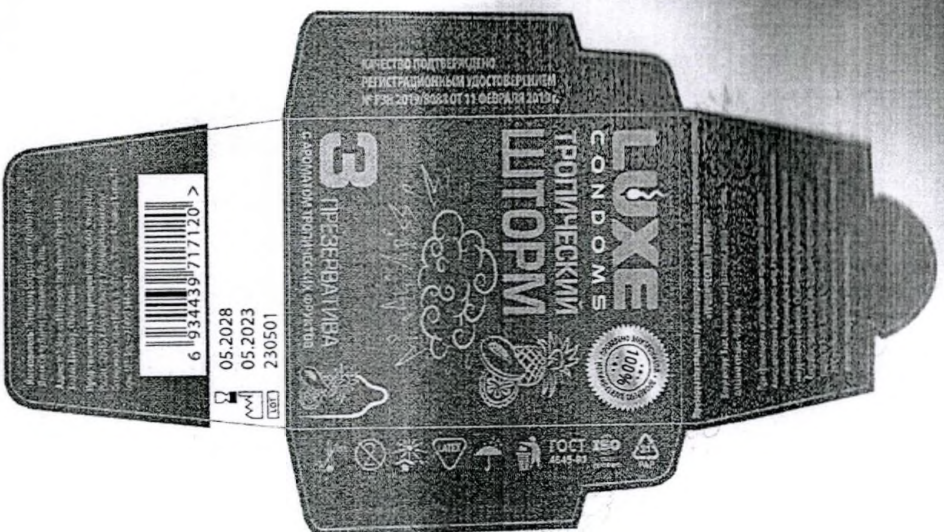


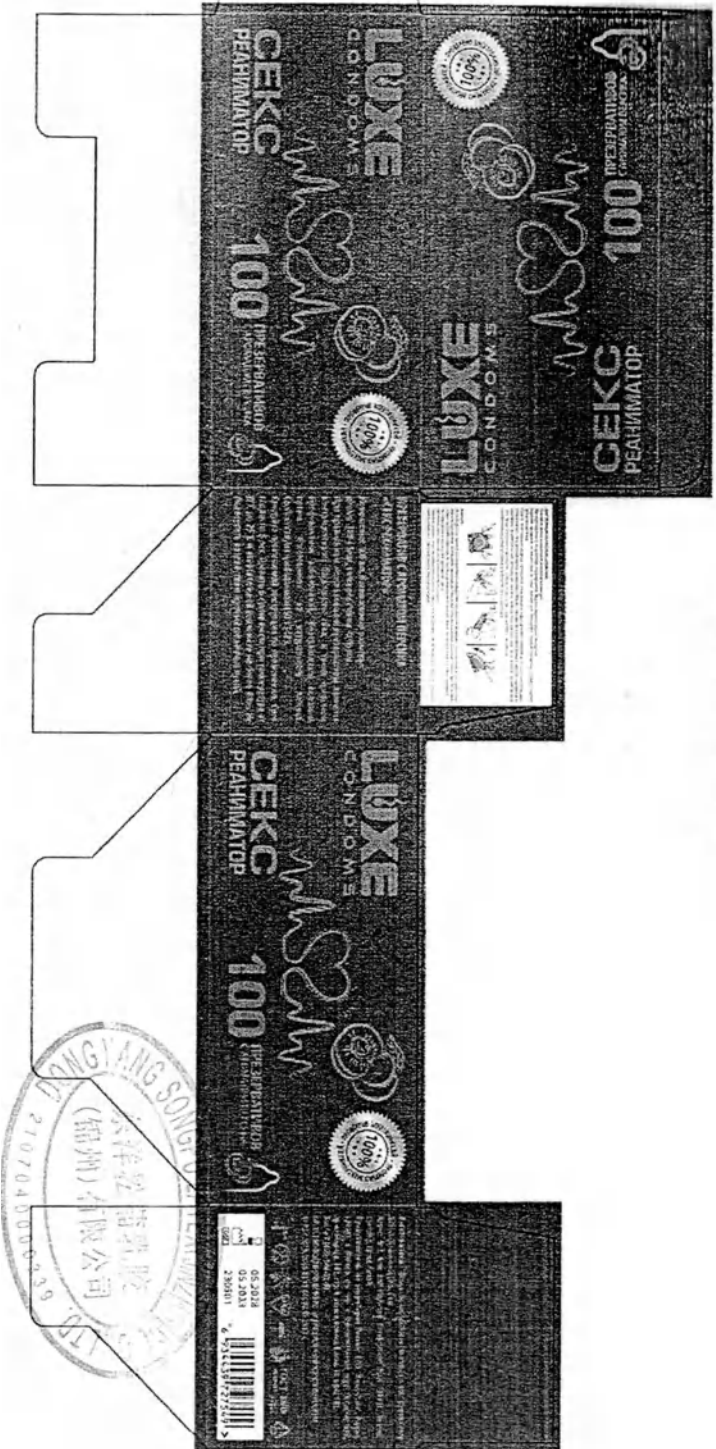


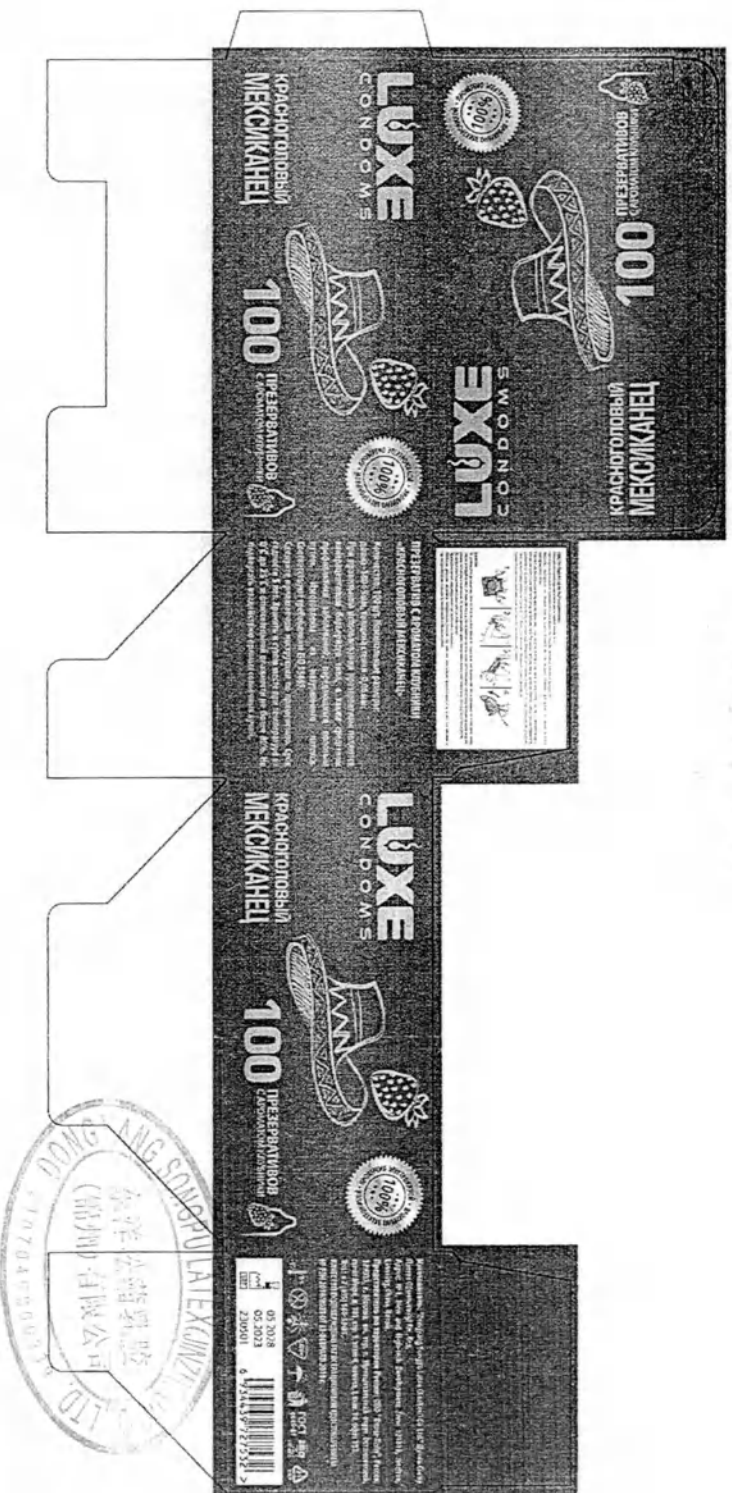



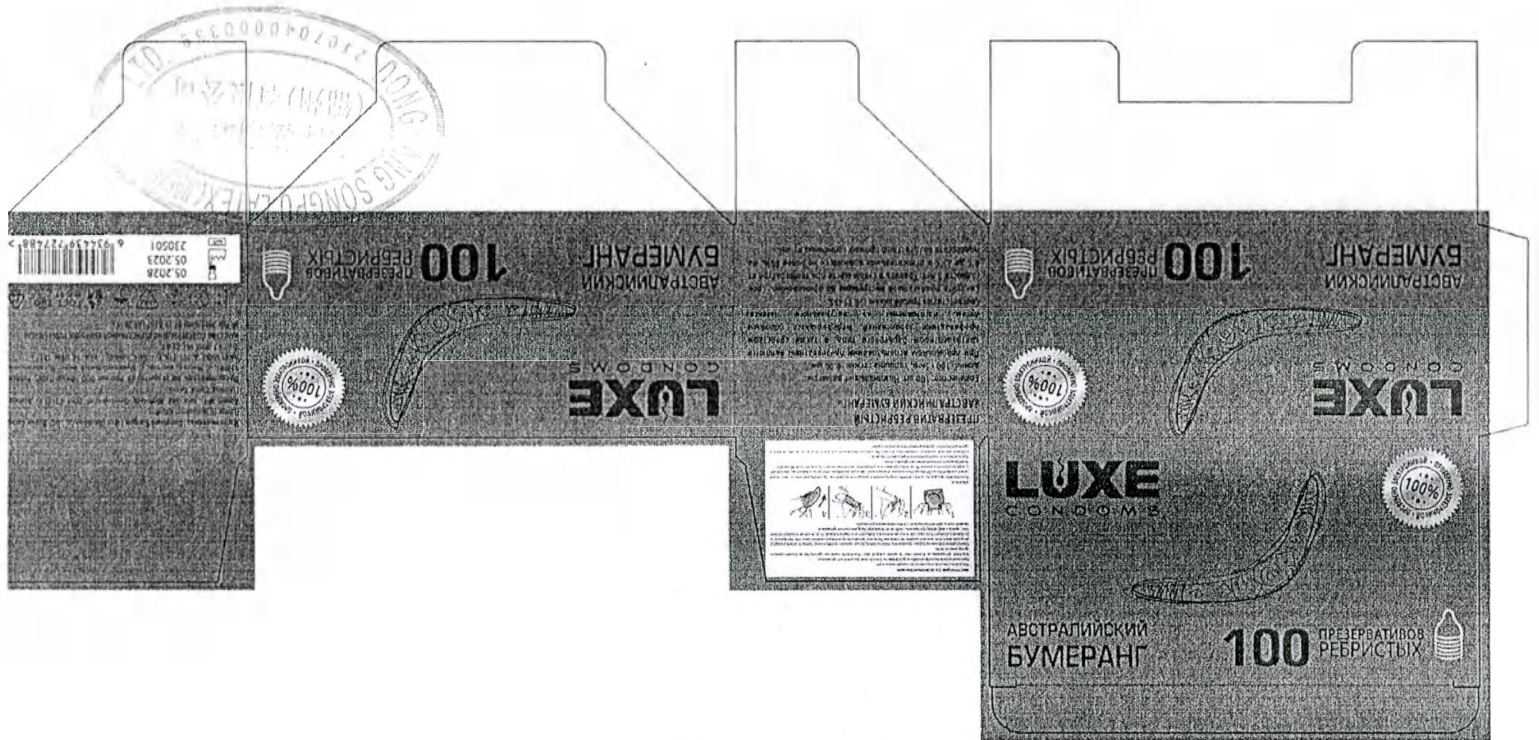

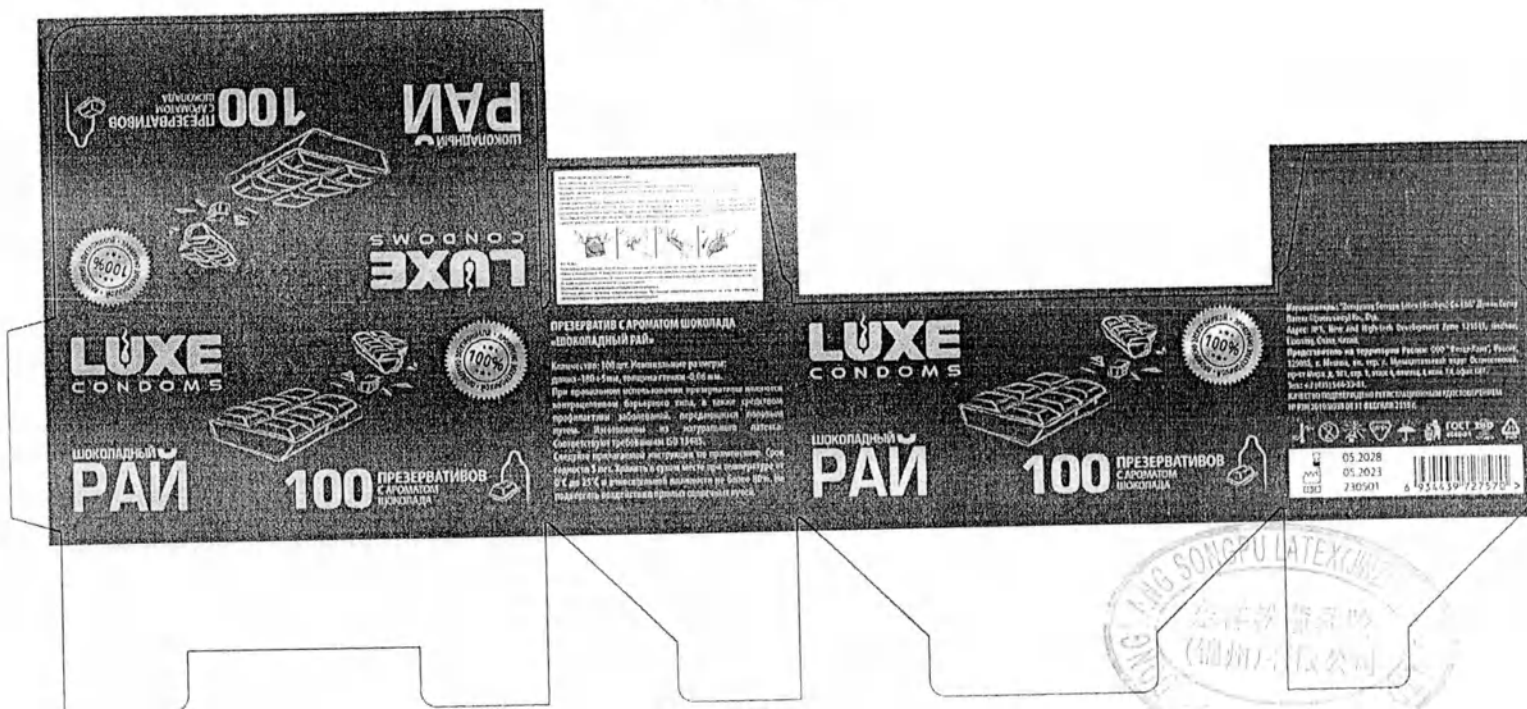

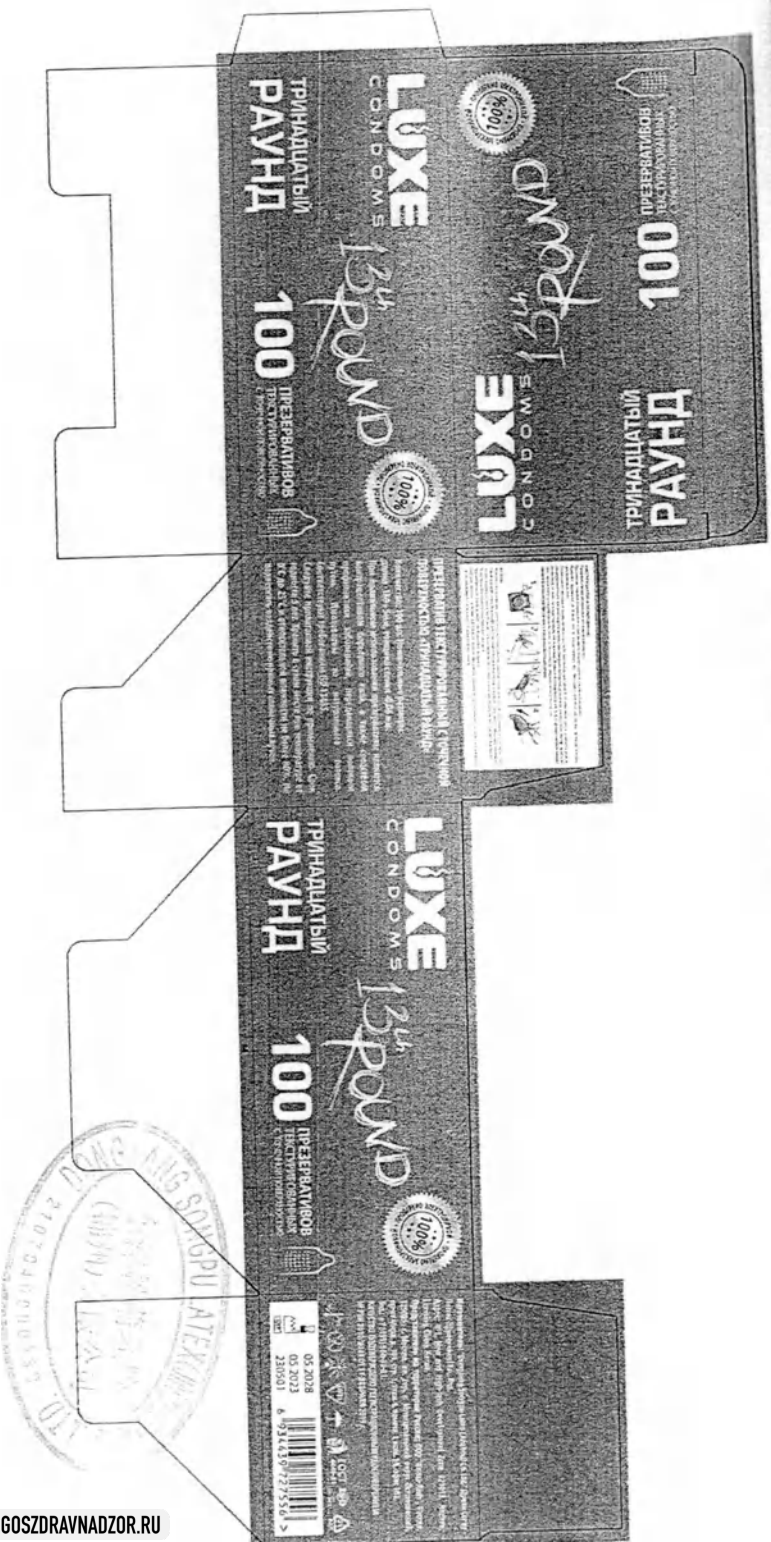

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Пользуйтесь новым презервативом при каждом половом акте.
При вскрытии упаковки не применяйте острые предметы.
Откройте упаковку, извлеките презерватив.
Наденьте презерватив на половой член до начала полового акта.
Расположите свернутый презерватив на головке полового эрегированного члена.
Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы выпустить воздух.
Сделайте это обязательно, так как оставшийся воздух в резервуаре может стать причиной разрыва презерватива. Расправьте презерватив до основания полового члена. Если презерватив не расправился, он может быть надет наизнанку или поврежден. Выбросьте его и наденьте новый.
После эякуляции извлеките половой член, прижав к нему край презерватива, чтобы он не соскользнул. Аккуратно снимите презерватив.
Сверните использованный презерватив и поместите в емкость для отходов.





ВАЖНО!


Не используйте презерватив, если его упаковка повреждена или поврежден сам презерватив.
При необходимости используйте смазку только на водной основе. Не пользуйтесь в качестве дополнительной смазки растительными, животными и любыми другими жирами, а также лосьонами и вазелином.
Не касайтесь презервативом или половым членом влагалища после того, как сняли презерватив.
Не выбрасывайте использованный презерватив в унитаз.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала.

Побочные действия: возможны аллергические реакции. При наличии повышенной чувствительности на латекс или аллергии и проконсультируйтесь с врачом до начала использования изделия.

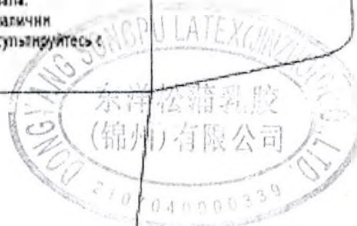

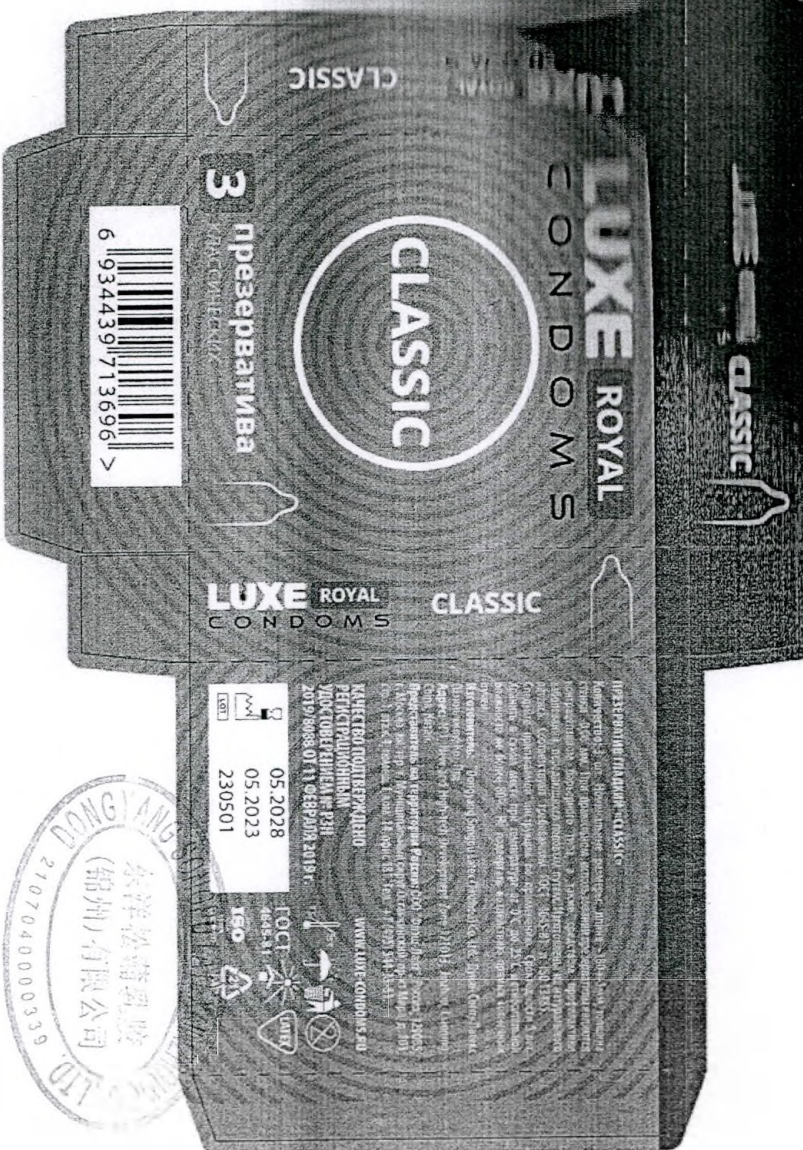

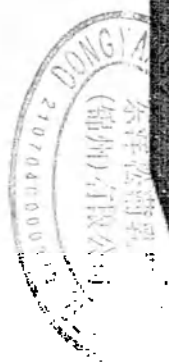



ПРЕЗЕРВАТИВ ПЛАСТИКОВЫЙ (УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА) - XXL SIZE
 Количество: 3 шт. Номинальный размер: длина - 190+5 мм, ширина стержня - 50 мм. При правильном использовании презервативы являются эффективным средством профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Изготовлены из натурального латекса. Соответствуют требованиям ГОСТ 4645-81 и ISO 13485. Срок годности 5 лет. Хранить в сухом месте при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
 Изготовитель: "Dongjiang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd." Дунцзян Сонгпу Латекс (Цзиньчжоу) Ко., Лтд.
 Адрес: №1, New and High-tech Development Zone 121013, Jinzhou, Liaoning, China, P.R.
 Представитель на территории России: ООО "Финкс-Плюс", Россия, 125085, г. Москва, ул. Лер. и. Мухоморова, д. 101, стр. 1, этаж 4, пом. 4, к. 101, 14, офис 101. Тел.: +7 (495) 544-33-81.

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
 РЕГИСТРАЦИОННЫМ
 УДОСТОВЕРЕНИЕМ № РЭН
 2019/8088 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.
 05.2028
 05.2023
 230501
 ГОСТ 4045-81
 ISO 13485
 FAP
 www.luxe-condoms.ru



ПРЕЗЕРВАТИВ ПЛАСТИКОВЫЙ (УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА) - XXL SIZE
 Количество: 12 шт. Номинальный размер: длина - 190+5 мм, ширина стержня - 50 мм. При правильном использовании презервативы являются эффективным средством профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Изготовлены из натурального латекса. Соответствуют требованиям ГОСТ 4645-81 и ISO 13485. Срок годности 5 лет. Хранить в сухом месте при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
 Изготовитель: "Dongjiang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd." Дунцзян Сонгпу Латекс (Цзиньчжоу) Ко., Лтд.
 Адрес: №1, New and High-tech Development Zone 121013, Jinzhou, Liaoning, China, P.R.
 Представитель на территории России: ООО "Финкс-Плюс", Россия, 125085, г. Москва, ул. Лер. и. Мухоморова, д. 101, стр. 1, этаж 4, пом. 4, к. 101, 14, офис 101. Тел.: +7 (495) 544-33-81.

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
 РЕГИСТРАЦИОННЫМ
 УДОСТОВЕРЕНИЕМ № РЭН
 2019/8088 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.
 05.2028
 05.2023
 230501
 ГОСТ 4045-81
 ISO 13485
 FAP
 www.luxe-condoms.ru





LUXE ROYAL
CONDOMS
NIRVANA

LUXE ROYAL
CONDOMS
NIRVANA

LUXE ROYAL
CONDOMS
NIRVANA



3 презерватива
особо уязвимых



LUXE ROYAL
CONDOMS
NIRVANA

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ
КОНИКОМБОНДОНОВ LUXE ROYAL
NIRVANA

Внешнее покрытие кондомов LUXE ROYAL NIRVANA выполнено из тонкого, прочного, эластичного материала, который обеспечивает надежную защиту от беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Кондомы LUXE ROYAL NIRVANA имеют особую форму, которая обеспечивает максимальное удовольствие и комфорт при использовании. Кондомы LUXE ROYAL NIRVANA имеют особую форму, которая обеспечивает максимальное удовольствие и комфорт при использовании. Кондомы LUXE ROYAL NIRVANA имеют особую форму, которая обеспечивает максимальное удовольствие и комфорт при использовании.


ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ
КОНИКОМБОНДОНОВ LUXE ROYAL
NIRVANA

05.2028
05.2023
230501



LUXE ROYAL
CONDOMS
NIRVANA

LUXE ROYAL
CONDOMS
NIRVANA

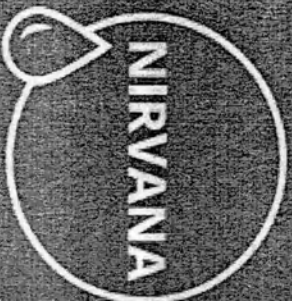

12 презервативов
особо уязвимых




LUXE ROYAL
CONDOMS
NIRVANA


LUXE ROYAL
CONDOMS
NIRVANA

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ
КОНИКОМБОНДОНОВ LUXE ROYAL
NIRVANA

05.2028
05.2023
230501



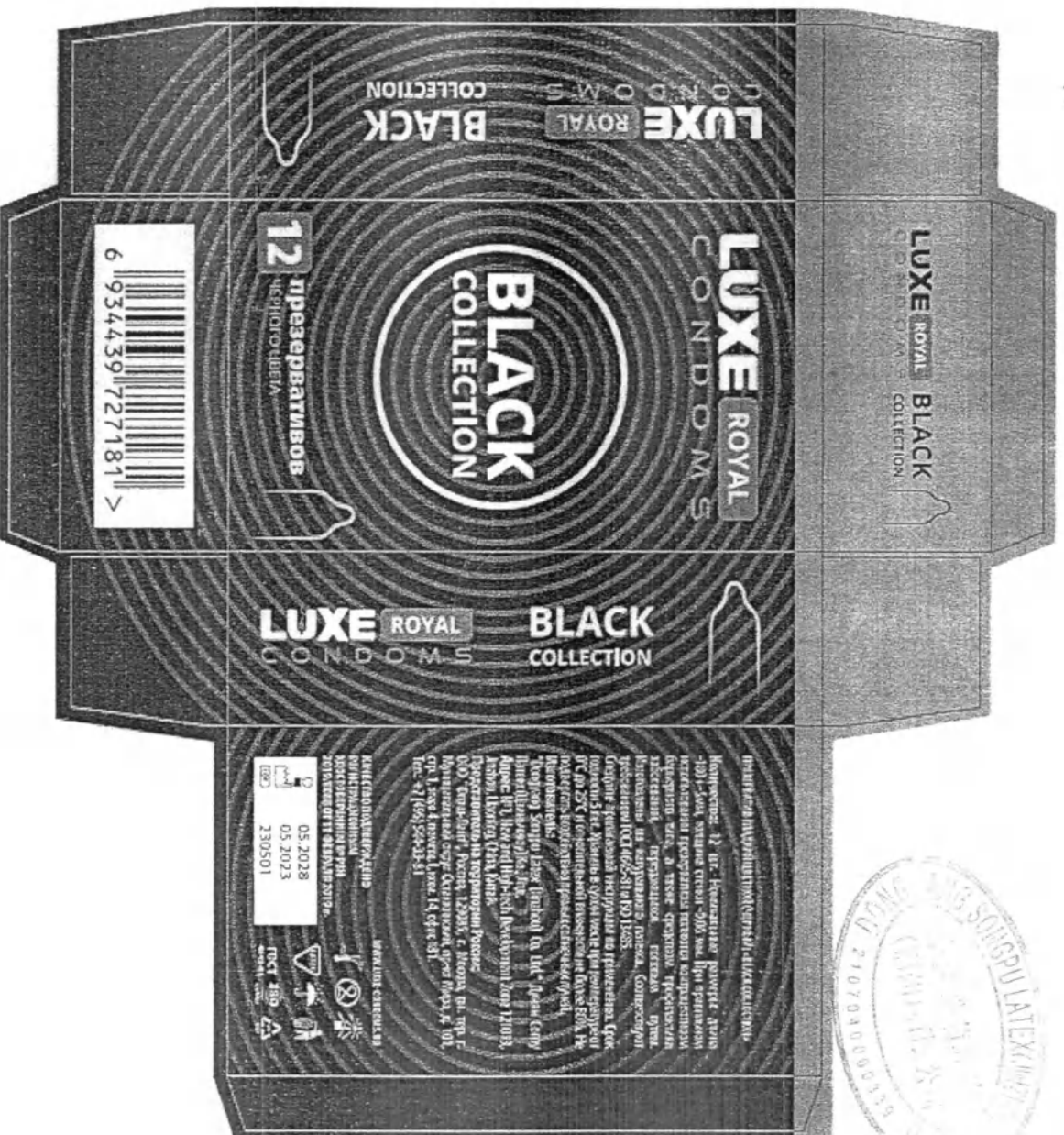

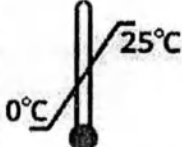	Система менеджмента качества сертифицирована по международному стандарту ISO 13485
ГОСТ 4645-81	Соответствует ГОСТ 4645-81
	Выбросить в урну
	Беречь от влаги
	Изготовлено из натурального латекса
	Не допускать воздействия солнечного света
	Дважды не использовать
	Диапазон температур, при которых следует хранить груз или манипулировать им
	Прочий картон

На индивидуальной упаковке должны быть нанесены следующие данные:

- 1) Идентификация производителя, наименование изделия, дата изготовления и срок годности
- 2) Номер партии

12. Условия безопасного применения.

В производстве презерватива используются только высоко качественные материалы. Каждый презерватив проходит электронный и дерматологический контроль. И только прошедший все этапы презерватив, упаковывается в индивидуальную упаковку, с учетом всех гигиенических требований.

Презервативы произведены из высококачественного латекса. Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к латексу. Если во время использования презерватива, Вы почувствуете дискомфорт или раздражение, немедленно прекратите использование презерватива и обратитесь к врачу. Если Вы ранее использовали презервативы из латекса и Вы считаете что у вас повышенная чувствительность или аллергия на латекс, перед использованием презервативов обратитесь за консультацией к врачу.

При правильном использовании, презервативы помогают снизить риск заражения ВИЧ (СПИД) и многими инфекциями, передающихся половым путем. Для каждого раза (вида) секса используйте новый презерватив. Для анального секса необходимо использовать дополнительную смазку, с наружи презерватива. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке лубриканта.

Не используйте в качестве лубриканта: содержащие жиры, крема и масла, например, детские, массажные или от солнечных ожогов масла, вазелин, лосьон для тела, маргарин. Это оказывает вредное воздействие на презерватив, повреждает его текстуру и делает его менее эффективным.

Ни один метод контрацепции не может обеспечить 100% защиты от беременности или передачи ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем. Если Вы беспокоитесь по поводу возможной беременности или заражения у Вас или Вашего партнера, немедленно обратитесь к врачу.

Обращайте внимания на срок годности презерватива, который Вы собираетесь использовать.

Срок годности находится на картонной упаковке или на персональной упаковке презерватива.

Храните в сухом, прохладном месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Используйте презерватив только один раз.

13. Требования охраны окружающей среды, в том числе требования безопасного уничтожения и утилизации.

Презервативы являются нетоксичными.

Утилизация изделий потребителями при самостоятельном использовании, осуществляется обычным путем совместно с твердыми бытовыми отходами.

Презервативы после использования подлежат уничтожению путем захоронения (как - токсичные промышленные отходы).

Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

неорганизованного захоронения или сжигания отходов материалов при производстве и хранении продукции; произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

Презервативы и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется в соответствии с требованиями страны изготовителя.

При утилизации отходов материалов и химикатов, а также при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно требованиям страны изготовителя.

Допускается утилизация отходов материалов на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почв контролируются в соответствии с «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий» страны изготовителя.

...ское изделие необходимо утилизировать как отходы класса А согласно СанПиН 21.

Данные по сроку службы или сроку годности.

Срок со дня изготовления

15. Требования к транспортированию и хранению.

Презервативы транспортируют крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха до 80% °С при атмосферном давлении 760+-10мм рт.ст. При транспортировании презервативов при минусовых температурах их следует распаковывать после выдержки в течение 1 суток с момента получения при нормальных климатических условиях.

Презервативы следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0°С до 25°С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых лучей и не извергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

16. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует качество презервативов при соблюдении условий использования, хранения и транспортировки.

17. Перечень сертификатов, деклараций соответствия национальным и международным стандартам.

Процесс производства, дистрибуции продукции и конечный контроль качества полностью соответствует требованиям, устанавливаемым Приложением 1 Директивы 93/42/ЕС, а также национальным стандартам качества и технической безопасности КНР и лицензией на производство изделий медицинского назначения.

Подтверждается следующими документами:

Лицензия производственного предприятия лечебной аппаратуры. Выдан Управлением по надзору за производством продовольственно-фармацевтической продукции пров. Ляонин.

Срок действия: до 04.01.2027 г.

Декларация о соответствии, производителя Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd.

Сертификат системы качественного менеджмента ISO 13485:2016.

18. Производитель.


Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd. /Дунян Сонпу Латекс (Цзиньчжоу) Ко., Лтд.
№1, New and High-tech Development Zone 121013, Jinzhou, Liaoning, China
№1, Зона развития новых и высоких технологий, 121013, Цзиньчжоу, Ляонин, Китай

+86-416-2961066

Уполномоченный представитель производителя

щество с ограниченной ответственностью «ФЛЭШ-ЛАЙТ», ООО «ФЛЭШ-ЛАЙТ»

035, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, этаж
том. I, ком. 14, офис 181. Тел. (495)544-33-81/82.

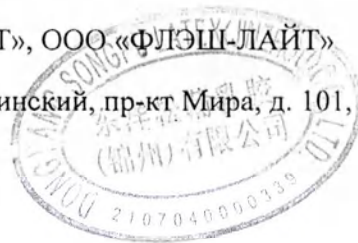



本附加证明书仅证明公文上的签名、签署人姓名时的身份。需要时可证明公文上的印章属实。附加证明书不对公文内容予以证明。
This Apostille only certifies the authenticity of the signature, the capacity of the person who has signed the public document and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
Visit <https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY/> and scan the QR code to verify the issuance of this Apostille.



10329177



附加证明书 APOSTILLE

(1961年10月5日海牙公约)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. 文书出具国: 中华人民共和国
Country: People's Republic of China

本公文书 This public document

2. 签署人
has been
signed by 吕翠莲
Lyu Cuilian

3. 签署人身份
acting in the
capacity of 签证员
Authorized Official

4. 印鉴名称
bears the
seal/stamp of 中国国际贸易促进委员会
China Council for the Promotion of International Trade

证明 Certified

5. 签发地 北京
at Beijing

6. 签发日期 2024年01月23日
the January 23, 2024

7. 签发人 孙仁安, 参赞/ Sun Renan, Counsellor
by 外交部领事司

Department of Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs

8. 附加证明书编号 认字第240000027121号
No

9. 签发机关印鉴:
Seal/Stamp:



10. 签名:
Signature:

Лист 1

002202401220004

E

ССРПТ

240021716-010 10/10(7)

Российская Федерация ESC

Российская Федерация

QR-код

24/01/2024

002

HXY2400485

240102 088 00004 10/10

СЕРТИФИКАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ССРПТ

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

Международная торговая палата Китая

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

Международная торговая палата Китая

Лист 2

02164137

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

Международная торговая палата Китая

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

Международная торговая палата Китая

СЕРТИФИКАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

QR-код

Номер/ Номер 241100B0/H02311

Настоящим удостоверяется: подлинность печати Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd. на прилагаемом документе.

Для просмотра версии на русском языке перейдите на следующую страницу.

Китайский комитет содействия развитию
международной торговли

Уполномоченное лицо: *подпись*

Уполномоченное лицо: Лю Куйлянь

Дата: 18.01.2024

(Дата: 18 января 2024)

Печать: Китайский комитет содействия развитию международной торговли. Специальная печать для коммерческих документов

Наклейка: Китайский комитет содействия развитию международной торговли. Сертификация

Веб-сайт для проверки сертификации

Сайт для проверки сертификации: <http://www.rzccpi.com/validate.html>

текст на русском языке

Печать: Beijing International Consulting Services Co., Ltd./ Beijing International Consulting Services Co., Ltd.

Телефон: 010-68008820

Специальная печать для переводов (I)/Печать только для переводов

Лист 4-102

документ на русском языке

Повторяющаяся печать на листах 4-102: Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd./ Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd. 2107040000339

Лист 103

QR-код

10329177

Данный Апостиль только удостоверяет подлинность подписи и правоспособность человека, который подписал официальный документ, и, в случае необходимости, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот публичный документ. Данный Апостиль не удостоверяет содержание документа, для которого оно было выдано.

Данный Апостиль только удостоверяет подлинность подписи и правоспособность человека, который подписал официальный документ, и, в случае необходимости, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот публичный документ. Данный Апостиль не удостоверяет содержание документа, для которого оно было выдано.

*Чтобы проверить выдачу этого Апостиля, отсканируйте QR-код и перейдите на сайт:
<https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY/>*

**АПОСТИЛЬ
АПОСТИЛЬ**

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961г.)

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961г.)

1. Страна/ Страна: Китайская Народная Республика/ Китайская Народная Республика

Настоящий официальный документ/ Настоящий официальный документ

2. подписан/ подписан Лю Куйлянь/ Лю Куйлянь

3. действующий в качестве/ действующий в качестве Уполномоченного лица/

Уполномоченного лица

4. скреплён печатью/штампом/ скреплён печатью/штампом Китайского комитета содействия развитию международной торговли/ Китайского комитета содействия развитию международной торговли

Удостоверено/ Удостоверено

5. в Пекине/ Пекине

6. Дата 23.01.2024/ 23 января 2024

7. Выдано Сунь Ренаном, Советником/ Сунь Ренаном, Советником

Департамент консульских дел Министерства иностранных дел/ Департамент консульских дел Министерства иностранных дел

8. Номер/ Номер 240000027121

9. Печать/штамп/ Печать/штамп:

10. Подпись/ Подпись /подпись/

Печать: Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики

Перевела с английского/китайского языков на русский язык переводчик Вязовова Надежда Вячеславовна

Переводчик

Вязовов Надежда Вячеславовна

Российская Федерация
Город Мытищи Московской области

Первого марта две тысячи двадцать четвертого года

Я, Асанов Антон Борисович, нотариус Мытищинского нотариального округа Московской области, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Вязовой Надежды Вячеславовны**.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/452-н/50-2024-2-383

Уплачено за совершение нотариального действия: 500 руб. 00 коп.



А.Б.Асанов

Итого пронумеровано,
прошнуровано, скреплено
печатью 104 сто шесть листа(ов)

Нотариус