

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «Фирма «Домен»

Субботина Н.В.

2010г.

М.п.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Изделия для забора проб крови Bodaywin с принадлежностями

производства

"Shandong Weigao Group Medical Polymer Co.", Ltd (Китай)

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ**
- 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ**
- 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- 4. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

ЗАО «Фирма «Домен»

199106, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 77, корп. 2, лит. Р, тел./факс (812) 327-75-85

e-mail: fdomen@mail.wplus.net; [http:// www.domen.sp.ru](http://www.domen.sp.ru)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделия для забора проб крови Bodywin - одноразовые, стерильные, обеспечивающие высокую сохранность биологического материала, находятся под вакуумом, который обеспечивает поступление определенного объема крови из вены или капилляров внутрь пробирки, с пробкой, которую при заборе не нужно открывать. Пробирки различного объема, имеют цветовое кодирование на ободке пробки, этикетке и герметизирующем колпачке, которое помогает персоналу лабораторий легко идентифицировать, для каких исследований они предназначены.

Переходники (держатели) предназначены для соединения и фиксации иглы двусторонней и пробирки.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделия Bodywin изготовлены из прозрачного ударопрочного стеклопластика и герметично закрыты пластиковыми крышечками, имеющими в центре резиновую мембрану для легкого прокалывания крышечки. Несмотря на малую толщину мембраны ее эластичность позволяет сохранять герметичную закупорку пробирки даже после 5-6 прокалываний иглой. Стерилизация пробирок осуществляется гамма-излучением. Маркировка пробирок включает в себя информацию о дате изготовления, сроке годности (не менее 18 мес.), объеме вакуума в пробирке, определяющем объем забираемой в пробирку крови.

Различают три типоразмера пробирок:

- пробирки на 10 мл (размеры – высота/наружный диаметр: 100/15,3 мм)
- пробирки на 5-7 мл (размеры – высота/наружный диаметр: 100/12,5 мм)
- пробирки на 3 мл (размеры – высота/наружный диаметр: 75/12,5 мм),

причем объем забираемой крови, в зависимости от запросов лаборатории, варьирует от 1,8 до 10 мл. Все типы пробирок соответствуют принятым стандартам и совместимы практически с любым лабораторным оборудованием, начиная со шпативов и кончая анализаторами.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

3.1. Выберите размер иглки и вид пробирки в зависимости от проводимого анализа

3.2. Наложите жгут

3.3. Откройте капсулу иглы. Поворачивайте до разрыва доступного слоя изоляции. Удалите прозрачный колпачок, обнажая закрытый пробкой конец иглы. Не удаляйте чехол иглы. Соедините иглу и держатель до плотного соединения. Введите пробирку в держатель.

Удалите чехол с иглы.

Выполните пункцию, держа иглу под углом приблизительно равным 30 градусам к руке пациента.

Зафиксируйте держатель. Выполняя свободной рукой «захват шприца» - наденьте пробирку на конец держателя, прокалывая резиновую перегородку. Кровь потечет в пробирку за счет вакуума.

3.4. Если достигнут необходимый объем и кровь перестала течь, осторожно удалите пробирку из держателя, сохраняя неподвижность держателя. Поместите большой палец руки, которой Вы будете удалять пробирку, на основание держателя. Медленно удалите пробирку. Резиновый клапан закроется для предотвращения попадания крови в держатель при удалении пробирки.

3.5. Если нужно наполнить несколько пробирок, то поместите следующую пробирку в держатель. Кровь потечет в пробирку. Все время сохраняйте неподвижность держателя.

ЗАО «Фирма «Домен»

199106, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 77, корп. 2, лит. Р, тел./факс (812) 327-75-85

e-mail: fdomen@mail.wplus.net; <http://www.domen.sp.ru>

3.6. Когда взятие крови завершено, удалите последнюю пробирку, затем удалите комплекс игла-держатель. Поместите стерильную повязку на место венопункции.

3.7. Используйте пинцет для удаления иголки из держателя, и утилизируйте их путем автоклавирования или сжигания.

ВНИМАНИЕ:

1. Пожалуйста, не используйте пробирки, если:

- истек срок годности
- повреждена упаковка и пробирки
- реагент в пробирке изменил цвет

4. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Все пробирки следует хранить при температуре 4–25°C, если на этикетке упаковки не указана другая температура. Пробирки следует хранить вдали от солнечного света и источников тепла.

Согласно действующим инструкциям «Изделия для забора проб крови Bodywin с принадлежностями» утилизируются аналогично одноразовым шприцам, а именно:

- держатели автоклавируются при 121° С и давлении 1,2 атм, они также могут утилизироваться в специальных контейнерах для острых предметов либо сжигаться;
- герметично закрытые пробирки автоклавируются при 121° С и давлении 1,2 атм либо сжигаются.

Генеральный директор
ЗАО «Фирма «Домен»



Н.В. Субботина

ЗАО «Фирма «Домен»

199106, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 77, корп. 2, лит. Р, тел./факс (812) 327-75-85

e-mail: fdomen@mail.wplus.net; <http://www.domen.sp.ru>