

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

2018 г.

Набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

**Сыворотки контрольные для
диагностики сифилиса**

Из крови кролика ТУ 9398-096-70423725-2008
Комплект № 1/1 РУ №ФСР 2009/05912 от 22.10.09

Состав набора

СК+ Сыворотка контрольная 10 фл. (по 1,0 мл)
положительная, инактивированная

Серия : **


Дата изг. : **

Годен до : **



HBsAg, антитела к ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке

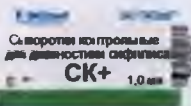

Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

"21" 05 2018 г.



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

**Сыворотки контрольные для
диагностики сифилиса**


Из крови кролика ТУ 9398-096-70423725-2008
Комплект № 1/2 РУ №ФСР 2009/05912 от 22.10.09

Состав набора

СК+сл. Сыворотка контрольная
слабоположительная, инактивированная 10 фл. (по 1,0 мл)
Серия ""
Дата изг. ""
Годен до ""

20-1-10

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

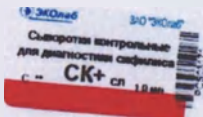

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
20/8 г.



набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

**Сыворотки контрольные для
диагностики сифилиса**

Из крови кролика ТУ 9398-096-70423725-2008
Комплект № 1/3 РУ НаФСР 2009/05912 от 22.10.09

Состав набора


СК- Сыворотка контрольная 10 фл. (по 1,0 мл)
отрицательная, инактивированная

Серия : ""
Дата изг : ""
Годен до : ""



HBsAg, антитела к ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке

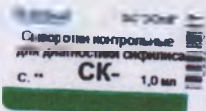

Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
"21" 20 г.



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения


ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотки контрольные для
диагностики сифилиса

Из крови кролика
Комплект № 1/4
Состав набора
СК+ Сыворотка контрольная
положительная, инактивированная
СК- Сыворотка контрольная
отрицательная, инактивированная
СК+сл Сыворотка контрольная
слабоположительная, инактивированная
Серия : **
Дата изг : **
Годеи до : **

ТУ 9398-096-70423725-2008
ПУ №ФСР 2009/05912 от 22.10.09



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

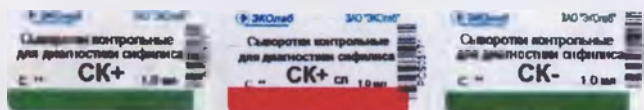

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Handwritten signature
✓

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

"22" 05 20 г.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса

Из крови человека

ТУ 9398-096-70423725-2008

Комплект №2/1

ПУ № ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г

Состав набора

СК+ - Сыворотка контрольная положительная, инактивированная 10 фл. (по 1,0 мл)

С " "

К. № " "

Кат. № " "

Дата изг. " "


Годен до " "

MD

2С-1 °C

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке

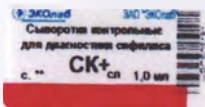

Директор производства ДП

Osinskaya A.D.

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Yurina T.V.

Юрина Т.В.

ОБ
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 27 " 2018 г.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса

Из крови человека

ТУ 9398-096-70423725-2008

Комплект №2/2

РУ № ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

Состав набора

СК_{сл} - Сыворотка контрольная слабоположительная,
инактивированная 10 фл. (по 1,0 мл)

С --
К.№ --
Кат.№ --
Дата изг. --
Годен до --

MD

2°C - 8°C

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке



Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
20/05 г.



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса

Из крови человека

ТУ 9398-096-70423725-2008

Комплект №2/3

ПУ № ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

Состав набора


СК- - Сыворотка контрольная отрицательная,
инактивированная 10 фл. (по 1,0 мл)

С. --
Х/лв --
Кат. № --
Дата изг. --
Годен до --



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке

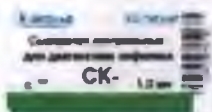

Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

21.05.2018

В.Ю. Борисов
2018г.


набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса
Из крови человека
Комплект №204
ЗАО "ЭКОлаб"
ТУ 9398-096-70423725-2008
РУ № ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

Состав набора

СК+ - Сыворотка контрольная положительная, инактивированная	3 фл. (по 1,0 мл)
СК- - Сыворотка контрольная отрицательная, инактивированная	3 фл. (по 1,0 мл)
СК+сд - Сыворотка контрольная слабоположительная, инактивированная	4 фл. (по 1,0 мл)
С	—
К.№	—
Кат.№	—
Дата изг.	—
Годен до	—

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке

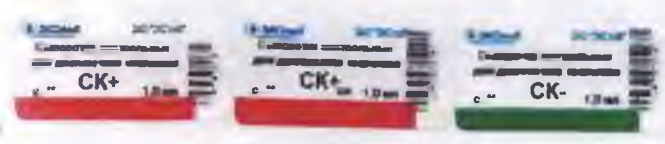

Директор производства ДП

Os

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

✓

Юрина Т.В.


Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист 26

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"


Борисов В.Ю.

23 05 2018 г.

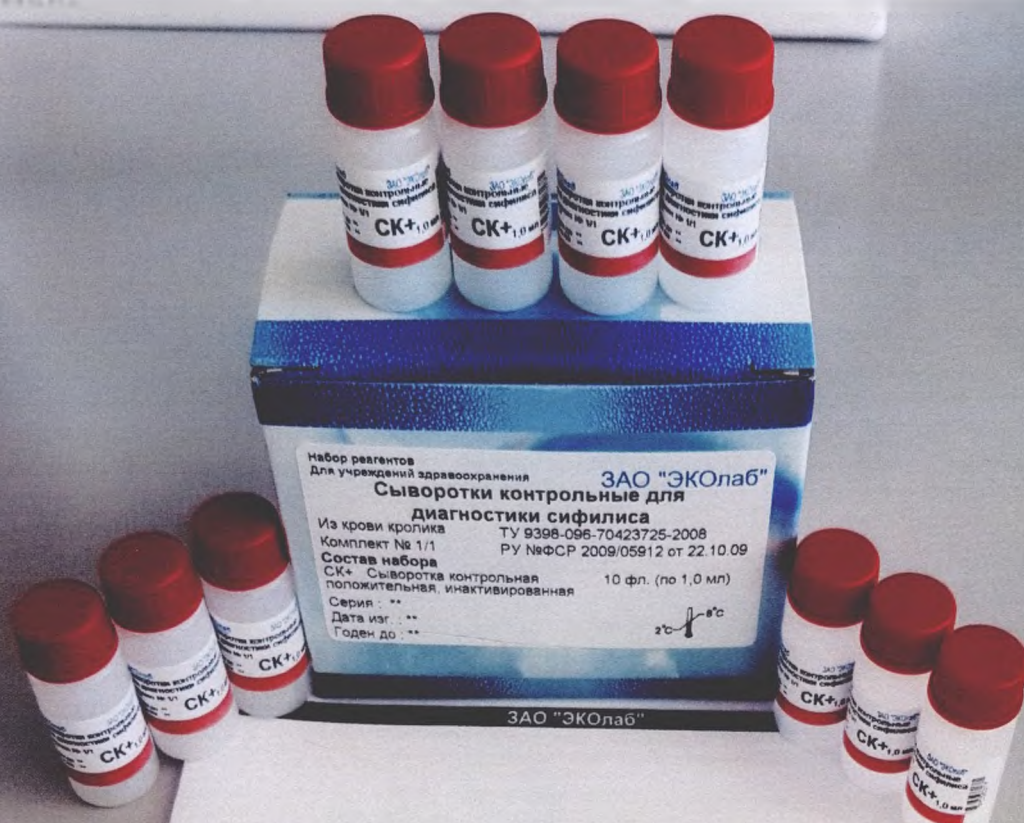


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
"Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса"
Комплект № 1
(№1/1, №1/2, №1/3, №1/4)
Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

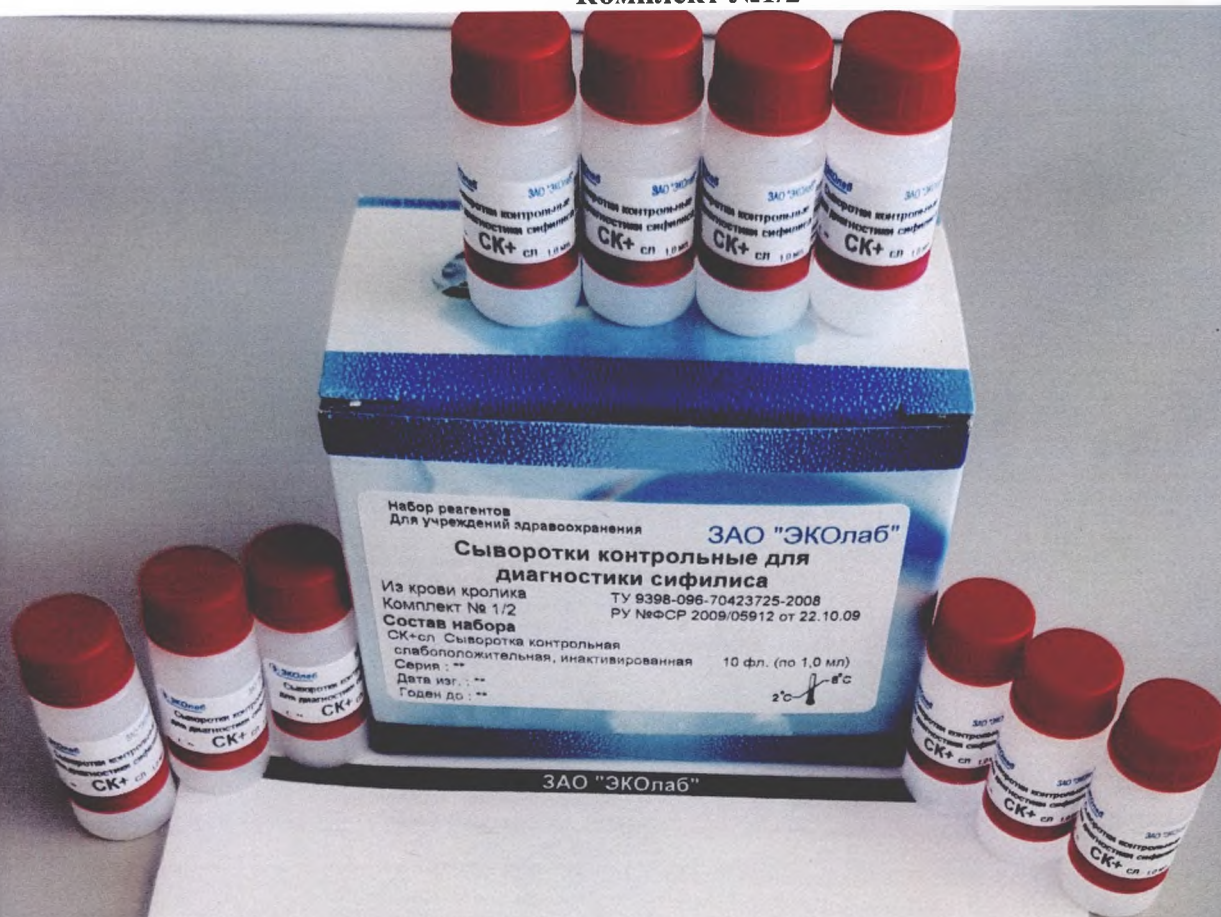

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
"Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса"
Комплект № 1
(№1/1, №1/2, №1/3, №1/4)
Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

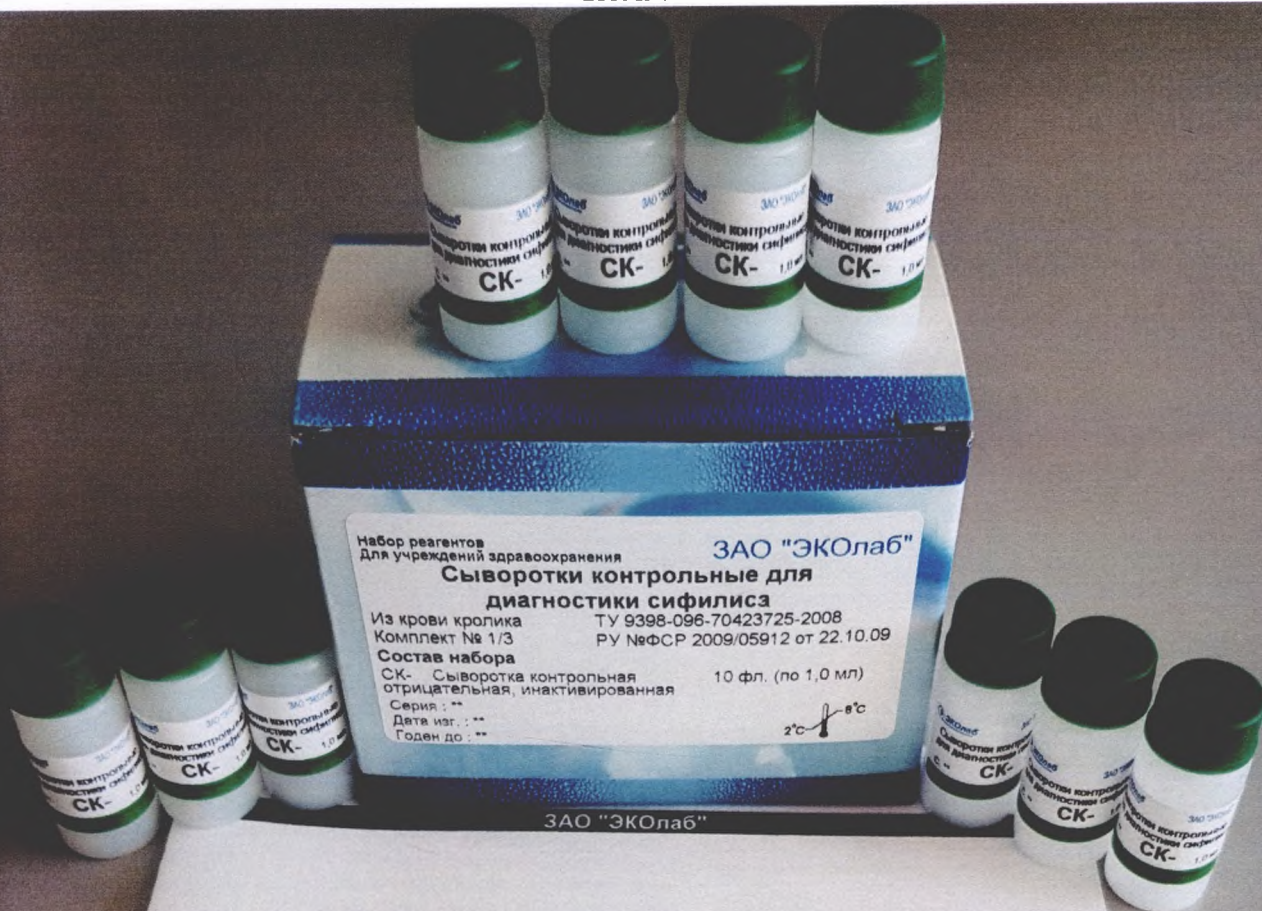

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
"Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса"
Комплект № 1
(№1/1, №1/2, №1/3, №1/4)
Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.



**ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
"Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса"
Комплект № 1
(№1/1, №1/2, №1/3, №1/4)**

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

ЗАО "ЭКОлаб"






ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов

"Сыворотки контрольные для
диагностики сифилиса"

Комплект № 2

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.


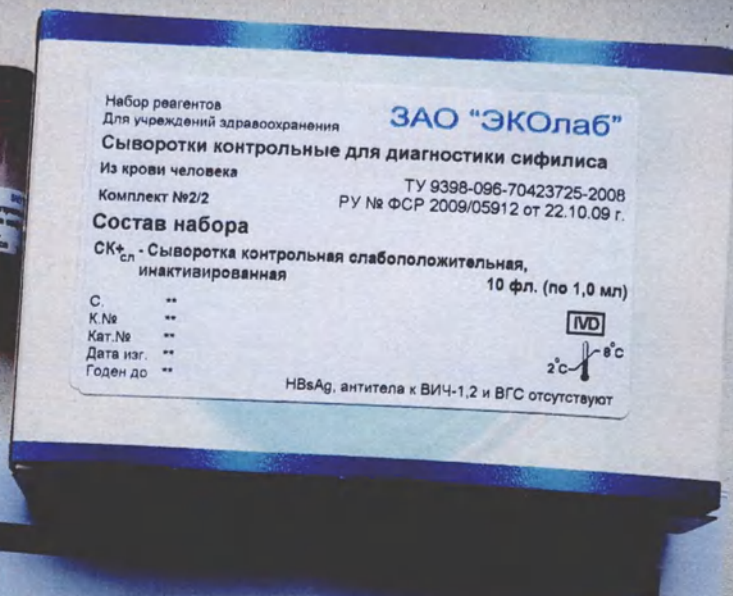


ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов

"Сыворотки контрольные для
диагностики сифилиса"
Комплект № 2

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

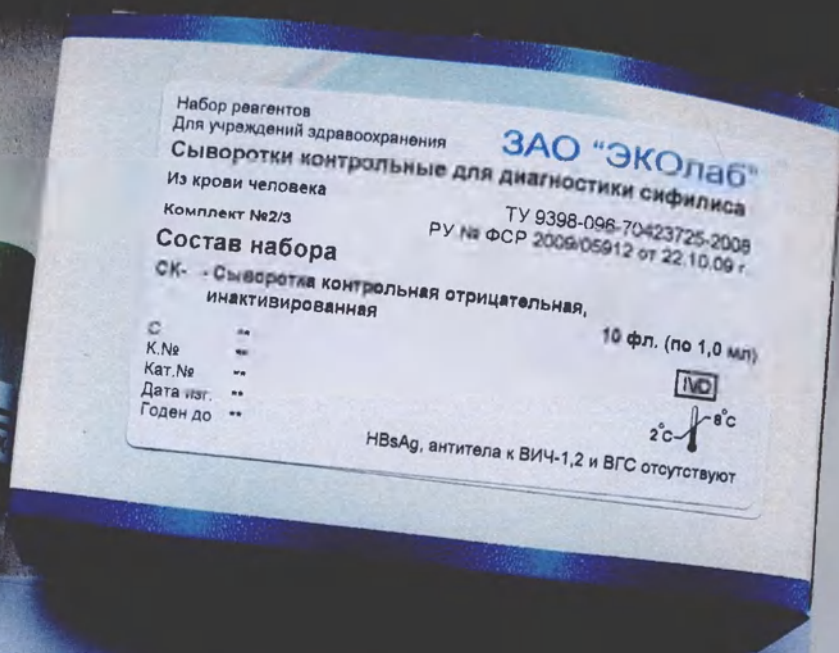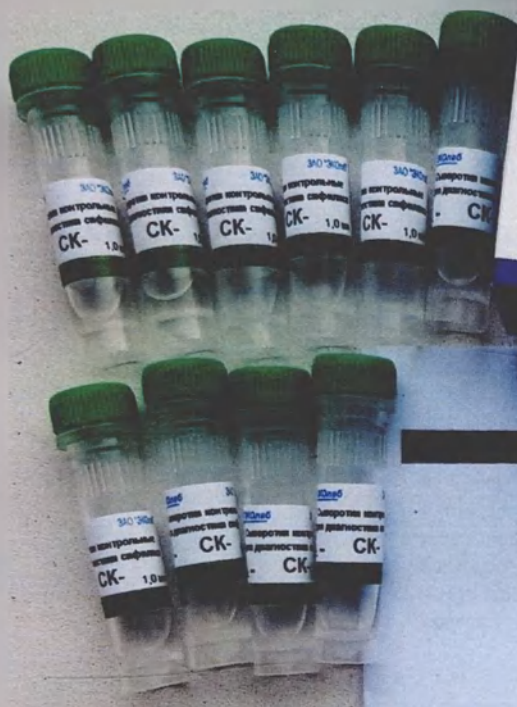

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов

"Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса" Комплект № 2

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

ЗАО "ЭКОлаб"



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса
Из крови человека
Комплект №2/4
Состав набора
ТУ 9398-096-70423725-2008
ПУ № ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

СК+ - Сыворотка контрольная положительная, инактивированная 3 фл. (по 1,0 мл)
СК- - Сыворотка контрольная отрицательная, инактивированная 3 фл. (по 1,0 мл)
СК+сл - Сыворотка контрольная слабоположительная, инактивированная 4 фл. (по 1,0 мл)

С. **
К. № **
Кат. № **
Дата изг. **
Годеи до **

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

IVD 2°C - 8°C


ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов

"Сыворотки контрольные для
диагностики сифилиса"

Комплект №2

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/05912 от 22.10.09 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

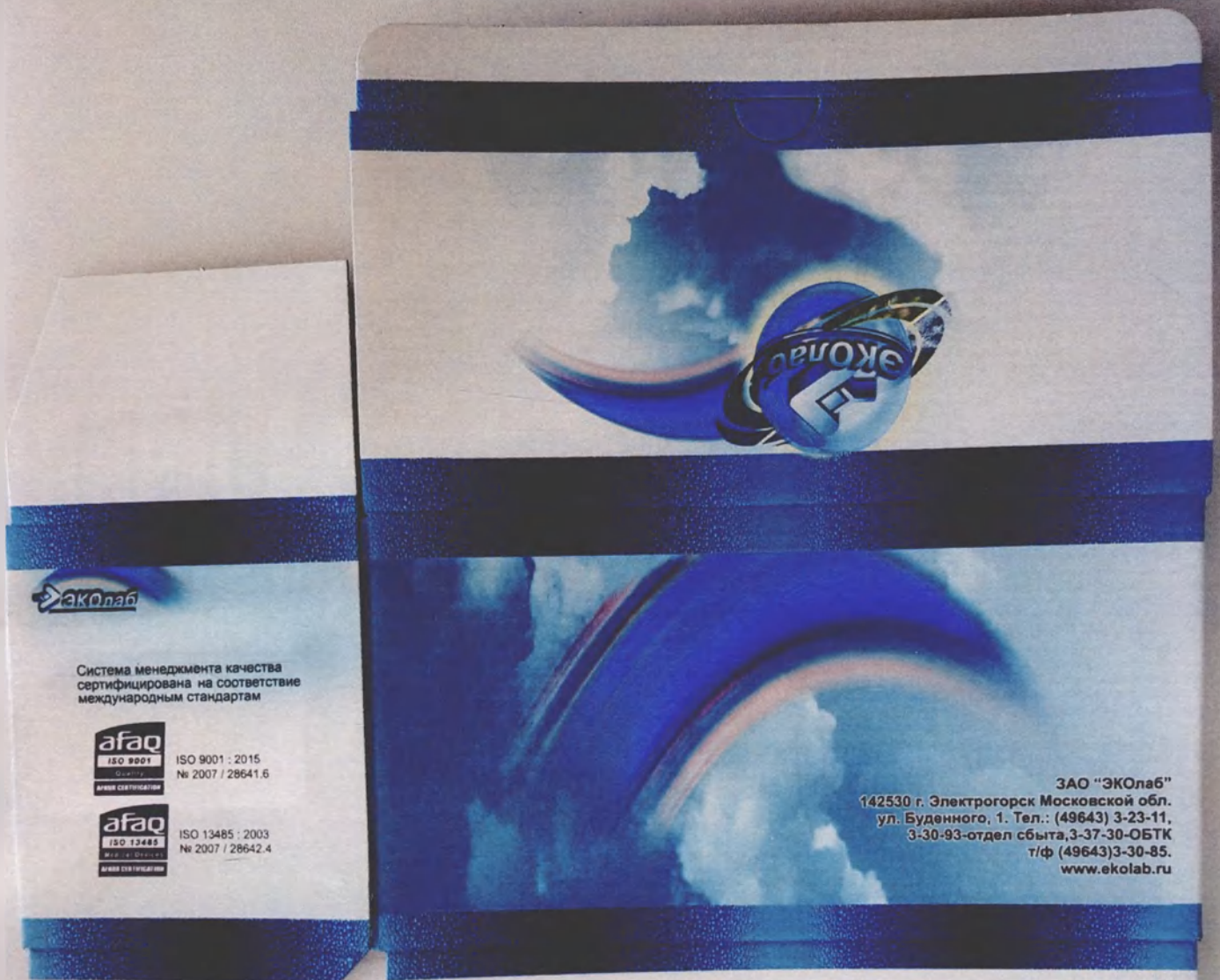

ЭКОлаб

Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
международным стандартам



ISO 9001 : 2015
№ 2007 / 28641.6



ISO 13485 : 2003
№ 2007 / 28642.4

ЗАО "ЭКОлаб"
142530 г. Электрогорск Московской обл.
ул. Буденного, 1. Тел.: (49643) 3-23-11,
3-30-93-отдел сбыта, 3-37-30-ОБТК
т/ф (49643) 3-30-85.
www.ekolab.ru



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

10 листов

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"

Барисов В.Ю.

25 05 2018 г.

