

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

« 27 » июня 2024 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 6134546
КУСАЙЛО Р. В.


Фотографические изображения медицинского изделия:

Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro

Zybio Inc. («Зибио Инк.»), Китай



Общий вид блока анализатора EXZ 6000 (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения EXZ 6000)

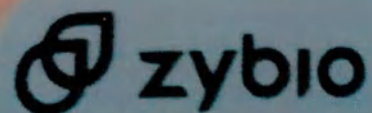

SN



EXZ6000230300152

UDI



(01)06941967200925

(11)230300

(21)EXZ6000230300152

(240)02-13-01-0003-00

NAME: Hematology Analyzer

MODEL: EXZ 6000



2023-04

REF

02-13-01-0003-00

POWER: 100V-240V~, 50/60Hz, 250VA



Zybio Inc.




Floor 1 to Floor 4, Building 30, No. 6 of Taikang Road, Block C
of Jianqiao Industrial Park, Dadukou District,
400082 Chongqing, China.

EC

REP

Qarad EC-REP BV

Pas 257, 2440 Geel, Belgium.

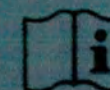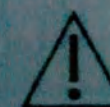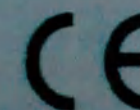


Made in China

Общий вид шильдика на блоке анализатора EXZ 6000 (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения EXZ 6000)



Общий вид блока анализатора EXZ 6000Pro (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения EXZ 6000Pro)

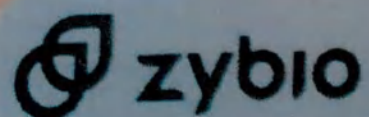

SN



EXZ6000Pro230600250

UDI



(01)06941967200895

(11)230600

(21)EXZ6000Pro230600250

(240)02-13-04-0010-00

NAME: Hematology Analyzer

MODEL: EXZ 6000Pro



2023-06

REF

02-13-04-0010-00

POWER: 100V-240V~, 50/60Hz, 300VA



Zybio Inc.


Floor 1 to Floor 4, Building 30, No. 6 of Taikang Road, Block C
of Jianqiao Industrial Park, Dadukou District,
400082 Chongqing, China.

EC

REP

Qarad EC-REP BV

Pas 257, 2440 Geel, Belgium.

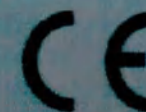

Made in China



Кабель питания (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)



Кабель передачи данных (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)




Провод функционального заземления всего устройства





Сканер штрих-кода, модель: NLS-HR22+, производитель: Newland

(Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)

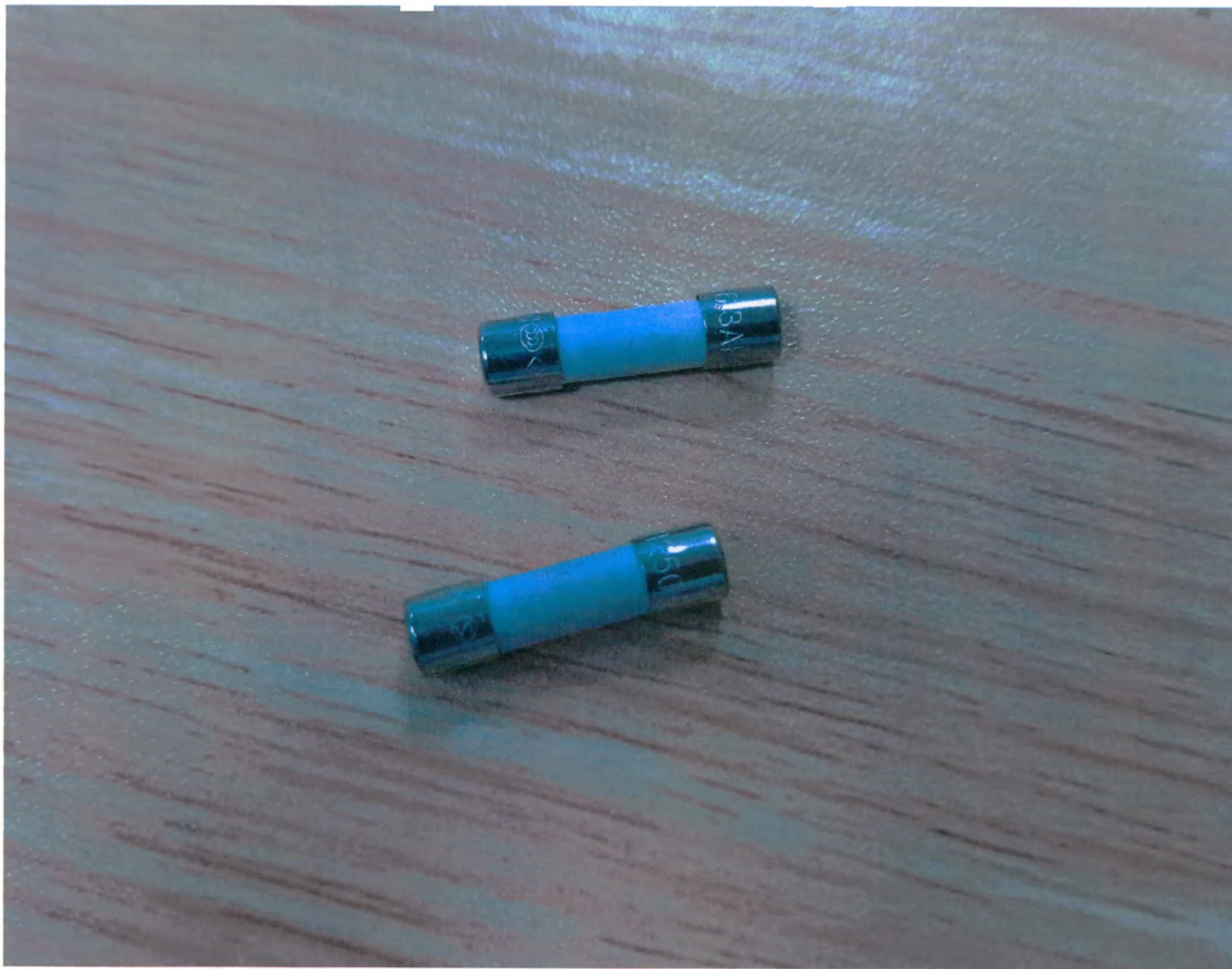

Предохранитель Т6.3АН250V (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)



Трубка LB в сборке (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)




Трубка LD-I в сборке (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)



Трубка LD-II в сборке (Анализатор автоматический гематологический для диагностики *in vitro*, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)



Трубка LP в сборке (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения EXZ 6000Pro)

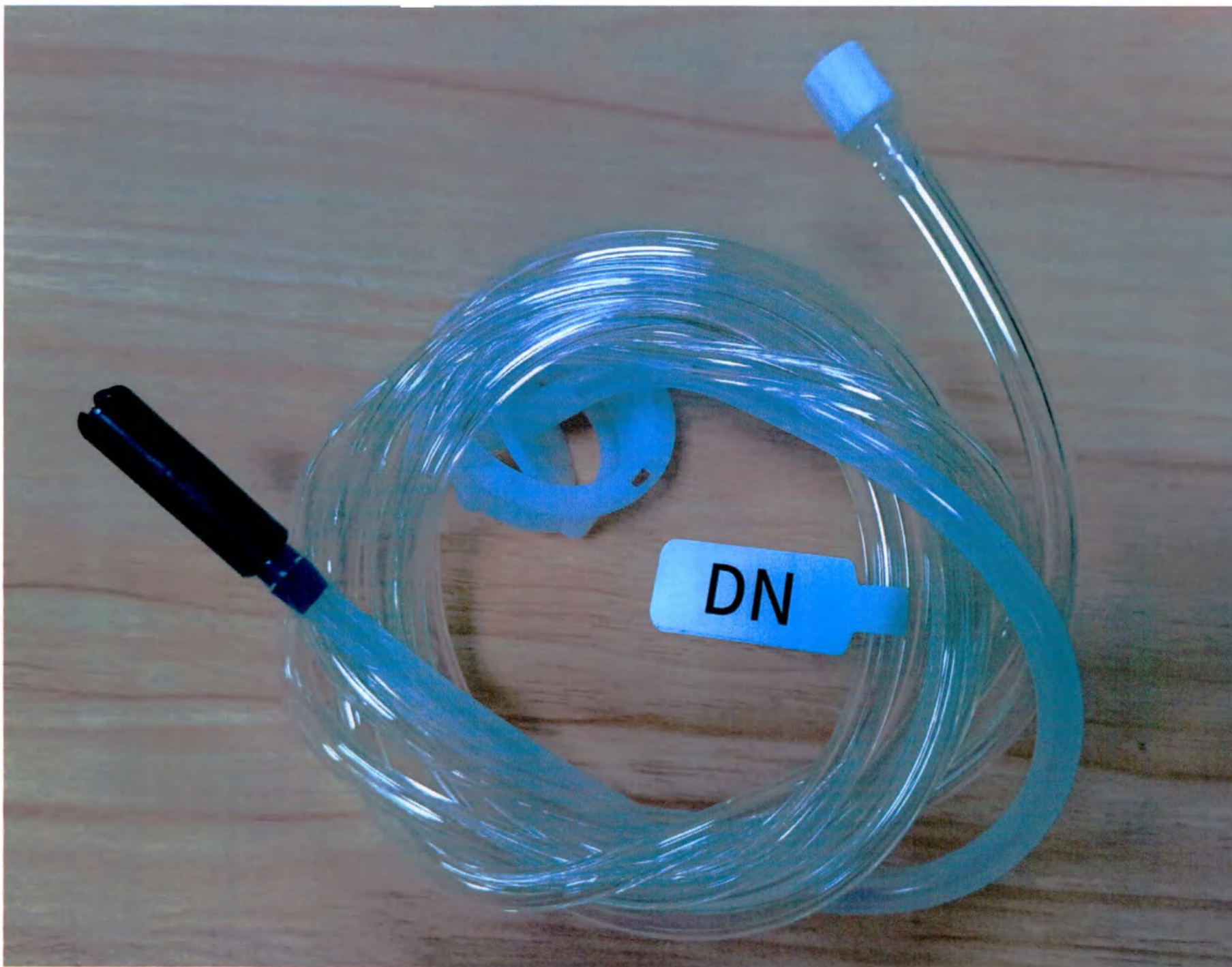


Трубка для разбавителя в сборке (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)




Трубка для жидких отходов (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)



Контейнер 20-литровый для жидких отходов (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)

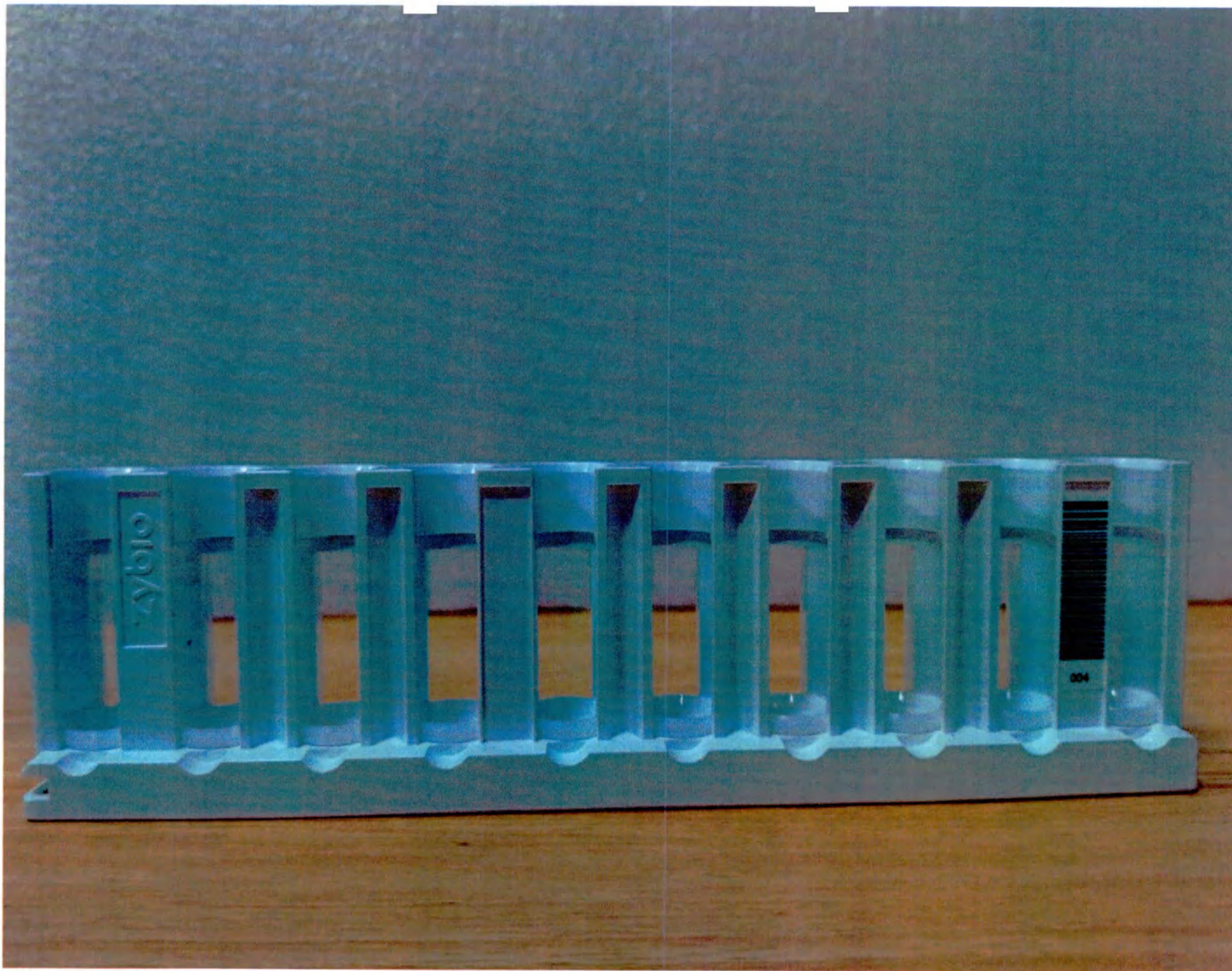

Штатив для пробирок в сборке (Анализатор автоматический гематологический для диагностики *in vitro*, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)

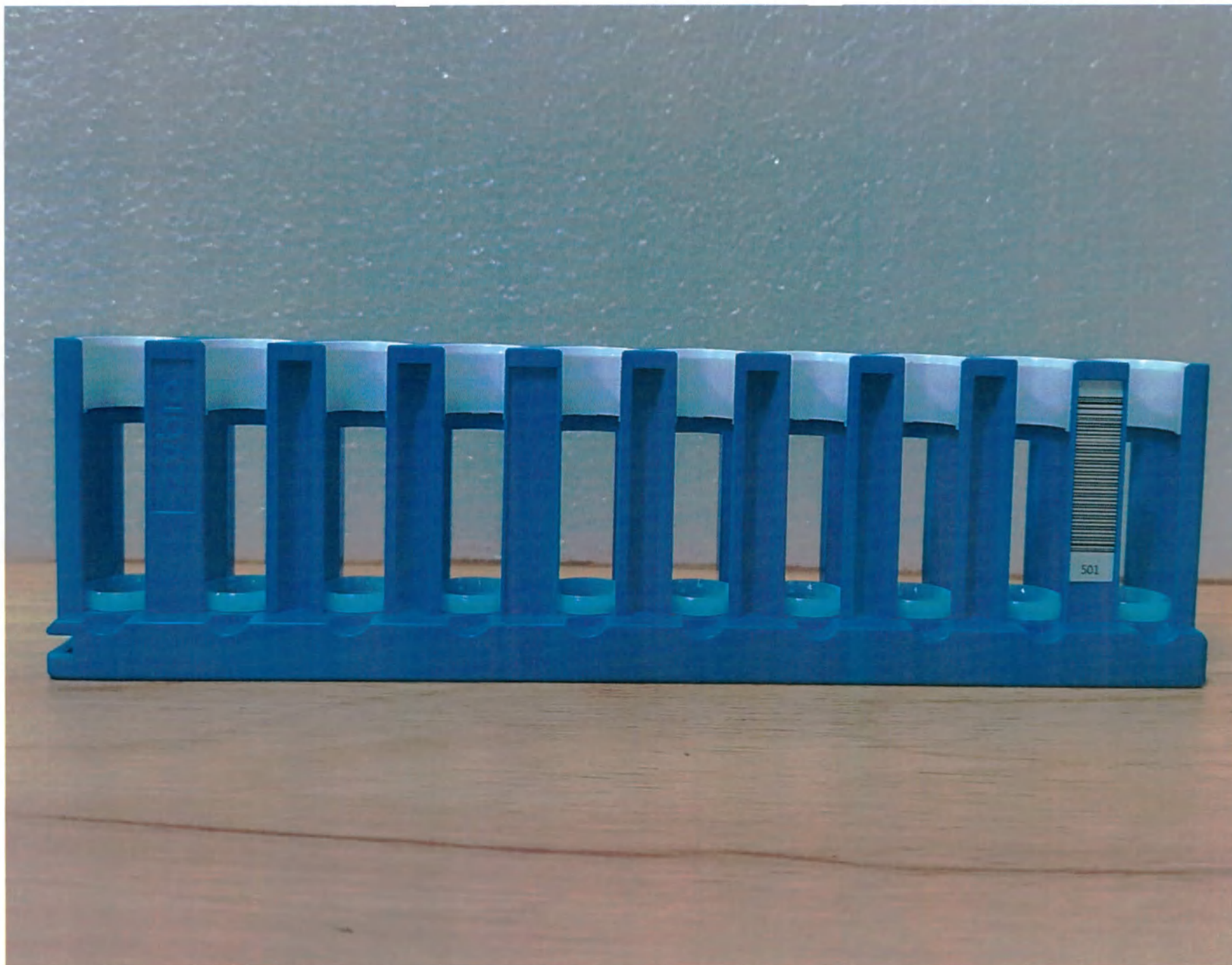


Штатив для пробирок капиллярной крови в сборке (Анализатор автоматический гематологический для диагностики *in vitro*, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: EXZ 6000, EXZ 6000Pro

Анализатор автоматический
гематологический для диагностики in vitro

Руководство по эксплуатации

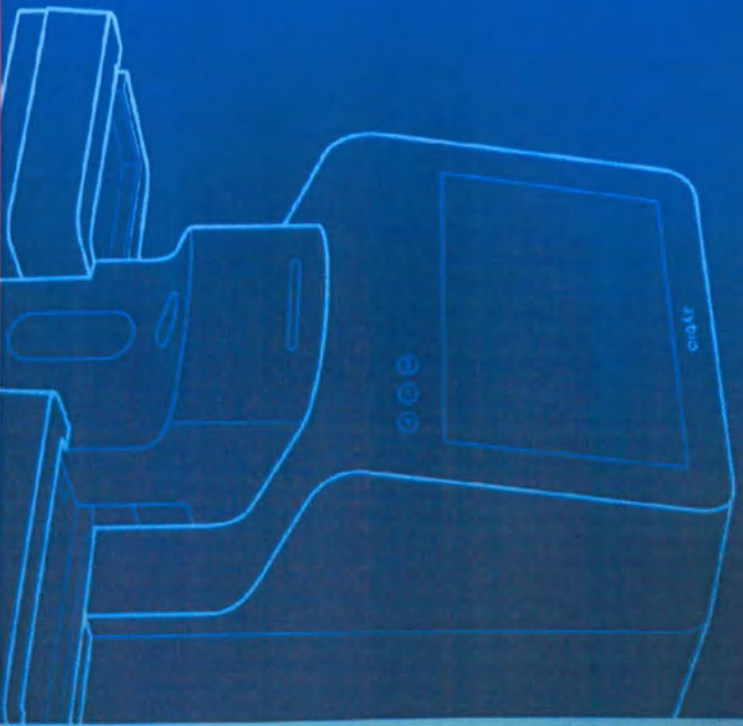

Гематология


www.zybio.com

Руководство по эксплуатации (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000Pro)

Применямо к анализатору автоматического гематологического для диагностики CVT-6, в зависимости исполнения: EXZ 1000 и EXZ 6300P10.

Ежедневная эксплуатация

Содержит ежедневные операции, которые необходимо выполнять перед началом работы.

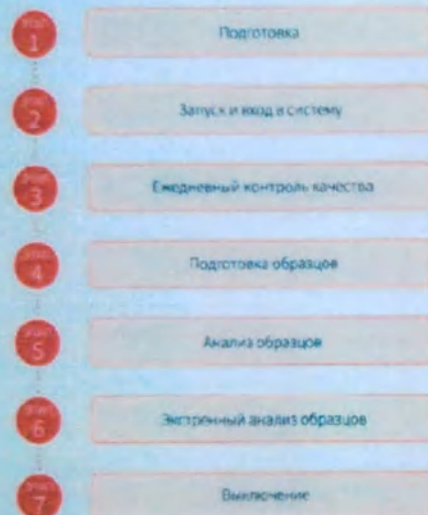

1. Подготовка

Содержит операции, которые необходимо выполнять перед началом работы.

- Убедитесь, что контейнер для отходов пуст.
- Проверьте соединения трубок для подачи реагента и воздуха, чтобы убедиться в их надежности и герметичности.
- Проверьте вилку питания основного блока, чтобы убедиться в ее надежном подсоединении.
- Проверьте, достаточно ли бумаги для принтера, правильно ли установлена бумага и правильно ли подключен принтер к электрической розетке.

2. Запуск и вход в систему

Содержит операции, которые необходимо выполнять перед началом работы.

- Переведите переключатель питания в положение "I" на задней панели анализатора.
- Убедитесь, что индикатор основного блока горит.

- Зайдите как пользователь и пароль в поле для ввода в систему.



- Анализатор последовательно выполняет самопроверку и инициализацию.

Примечание: если анализатор включен, нажмите кнопку режима ожидания с правой стороны, чтобы надолго войти в интерфейс ввода в систему.

3. Ежедневный контроль качества

Настройка контроля качества

- Перед проведением анализа новой партии контролей необходимо установить файл контроля качества для каждой партии контролей.
- Нажмите «QC» (Контроль качества) > «Setting» (Настройка) чтобы войти в интерфейс настройки контроля качества, оператор может добавить, изменить, удалить и оценить соответствующую информацию.
- Нажмите «New» (Новый) чтобы войти в интерфейс контроля качества «New», и вручную введите соответствующую информацию о контроле качества в диалоговом окне.

Операции по контролю качества

Режим AL-VNWB

- Поместите подготовленные контрольные образцы в штатив для пробирок с цельной венозной кровью для автоматического анализа.
- Ровно установите штатив для пробирок с контролем на поручневую платформу.
- Выберите файл для анализа, нажмите кнопку «Start Count» (Начать подсчет) чтобы включить анализ контроля качества, и анализатор начнет выполнять анализ контроля качества автоматически.
- После анализа оператор может снять штатив для пробирок с поручневой платформы.
- Результаты контроля качества автоматически сохраняются в файл контроля качества, а последние результаты отображаются в текущем интерфейсе.
- При необходимости повторите описанные выше действия для анализа контроля качества на разных уровнях.

Режим OV-WB/Предварительного разведения:

- Пациентно перевешиваете образцы и выполняете контроль качества в соответствии с инструкцией по применению.
- Выберите файл для анализа и ровно установите штатив для пробирок с элементами управления на поручневую платформу.
- После завершения анализа нажмите кнопку контроля.
- После проведения анализа результаты контроля качества автоматически сохраняются в файл контроля качества, а последние результаты отображаются в текущем интерфейсе.
- При необходимости повторите описанные выше действия для анализа контроля качества на разных уровнях.

Примечание: Анализ контроля качества также можно провести, поместив контроль в ежедневный образец. Однако номер образца и режим анализа заданные в интерфейсе «Analysis» (Анализ) должны совпадать с теми, которые заданы в файле контроля качества.

4. Подготовка образцов

Образцы цельной крови

Используйте соответствующие автоматические пробирки для взятия цельной крови и штативы для пробирок для взятия цельной крови и убедитесь, что минимальный объем пробы цельной венозной крови составляет не менее 1 мл, а минимальный объем пробы цельной капиллярной крови – не менее 80 мкл.


Предварительно разведенные образцы

- Этап.1**
Нажмите «Diluent» (Разбавитель) с левой стороны.
- Этап.2**
Поместите чистую пробирку под пробозабирник.
- Этап.3**
Нажмите клавишу «Aspirate» (Аспирация), чтобы добавить разбавитель. Если требуется дополнительное наполнение, нажмите клавишу «Aspirate» еще раз.
- Этап.4**
После подготовки предварительного разведения нажмите «Cancel» (Отмена), чтобы завершить операцию добавления разбавителя.
- Этап.5**
Аспируйте 20 мкл периферической крови, быстро вводите ее в пробирку с разбавителем, закройте пробирку крышкой и встряхните, чтобы составы достаточно перемешались.

5. Анализ образцов


Анализ образцов в режиме отбора проб открытым способом

- Проверьте правильность выбора режима работы и режима анализа;
- Убедитесь, что анализатор готов (т.е. индикатор состояния постоянно горит синим); а пробоборник находится в положении aspiration;
- Поместите подготовленный образец под пробоборник, нажмите клавишу «Aspirate» и убедитесь, что пробоборник может достать до образца;
- После aspiration образца раздается звуковой сигнал: образец можно извлекать. После того, как пробоборник будет установлен, анализ можно продолжить. Индикатор состояния мигает, указывая на то, что анализ образца находится в процессе;
- После анализа образца пользователи могут просмотреть результаты анализа в интерфейсах «Analysis» и «Review (Обзор)».

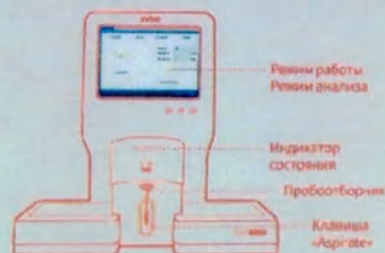

Автоматический анализ образца

- Проверьте правильность выбора режима работы и режима анализа;
- Убедитесь, что анализатор готов (т.е. индикатор состояния постоянно горит синим);
- Поместите образец в бачок штатива для пробирок для автоматического анализа артериальной крови или штатив для пробирок для цитиной капиллярной крови, затем установите штатив для пробирок на специальную платформу по порядку;
- Запустите анализ, нажав «Start/Continue» в интерфейсе анализа или нажав кнопку «Start» (Запуск) в правом нижнем углу монитора;
- Анализатор выполняет анализ образца и индикатор состояния мигает синим цветом;
- После анализа образца пользователи могут просмотреть результаты анализа в интерфейсах «Analysis» и «Review».

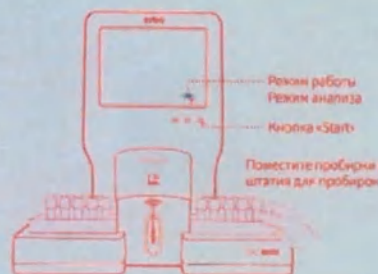

6. Экстренный анализ образцов

При наличии экстренного образца выполните анализ экстренного образца в режиме отбора проб автоматическим способом, следуя приведенным ниже инструкциям:

- Нажмите «STAT» (STAT) в интерфейсе «Analysis»;
- Выберите режим работы в интерфейсе «Next Sample» (Следующий образец), и введите информацию об образце; нажмите «OK» чтобы сохранить настройки, и выйдите из интерфейса «Next Sample»;
- Начать экстренный анализ образца;
- Когда все экстренные анализы образцов будут завершены, выйдите из экстренного режима вручную.

7. Завершение работы

- Нажмите кнопку «Shutdown» (Завершение работы) с левой стороны;
- Нажмите «Yes/No», поместите реагент, прилегающий под пробоборник, и нажмите кнопку «Aspirate». Анализатор автоматически выполнит автоматическое замачивание пробоборника в реагенте автоматически;




- Анализатор автоматически выполнит процедуру завершения работы.

Примечание: если вам необходимо сплюснуть основной источник питания, пожалуйста, заранее извлеките реагенты CH1 (определение CRP(RUO)) и SR1 (определение SAA(RUO)) и храните их при температуре 2-8°C в холодильнике.

8. Замена реагента

- Удалите флакон перед заменением реагента, и затем нажмите «Align/Setup», чтобы войти в интерфейс замены реагента. В этом интерфейсе оператор может одновременно проверить еще один реагент перед его заменой;
- Поместите RFID-карту реагента в область считывания RFID-карт (показана ниже), и затем нажмите «Card Reader» (Считывание карты), чтобы загрузить реагент;
- Подтвердите соответствующую информацию, такую как дата вскрытия (Open Date), срок годности вскрытого реагента (Exp. Date), срок годности неиспользованного реагента (Valid Date) и остаточный объем реагента (Residual Vol.);
- После того, как RFID-карта реагента будет прочитана правильно, нажмите «Replenish Reagent» (Заменить реагент), чтобы заменить флакон с реагентом.

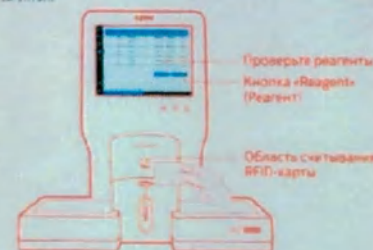

9. Предостережение


- Анализатор автоматически сохраняет результаты анализа. Если количество результатов образца достигнет предела хранения (100 000 образцов), новые полученные результаты анализа образцов автоматически перезапишут самые ранние результаты анализа образца;
- Анализатор перейдет в спящий режим, когда время с момента окончания работы достигнет разрешенного времени ожидания;
- Смотрите инструкции по контролю качества и калибровке реагентов CR1 (определение CRP(RUO)) и SR1 (определение SAA(RUO)).

Название документа: Инструкция по установке. Стандартная процедура установки
анализатора автоматического гематологического для диагностики *in vitro* в вариантах
исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000 Pro на стороне клиента


Номер документа: H-02-70-04-0010-00-01 Версия документа: 02

Инструкция по установке

Стандартная процедура установки
анализатора автоматического гематологического для диагностики *in vitro*
в вариантах исполнения EXZ 6000 и EXZ 6000 Pro на стороне клиента

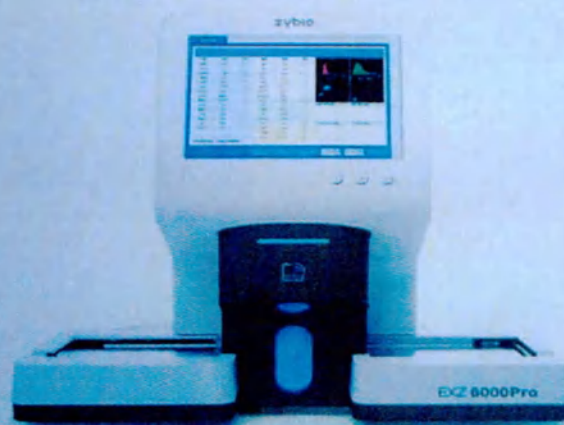

Название документа: Руководство по техническому обслуживанию
Номер документа: SOP400-F30 Версия: 05 Дата: 10.01.2023

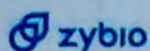

Название файла: Упаковочный лист
ID Документа: H-02-70-08-0239-00-01 Версия: 03

Упаковочный лист

Наименование изделия	Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro	Вариант исполнения	EXZ6000	SN	EXZ6000221100014
----------------------	---	--------------------	---------	----	------------------

№	Наименование	Кол-во	Единица измерения	Подтвержденный результат
1.	Блок анализатора EXZ 6000	1	шт.	✓
2.	Кабель питания	1	шт.	✓
3.	Предохранитель T6.3AH250V	2	шт.	✓
4.	Трубка для жидких отходов	1	шт.	✓
5.	Трубка для разбавителя в сборке	1	шт.	✓
6.	Контейнер 20-литровый для жидких отходов	1	шт.	✓
7.	Трубка LD-I в сборке	1	шт.	✓
8.	Трубка LD-II в сборке	1	шт.	✓
9.	Трубка LB в сборке	1	шт.	✓
10.	Трубка LP в сборке	1	шт.	НП
11.	Принадлежности для технического обслуживания	1	шт.	НП
12.	Провод функционального заземления всего устройства	1	шт.	✓
13.	Руководство по эксплуатации	1	шт.	✓
14.	Краткая инструкция по эксплуатации	1	шт.	✓
15.	Сертификат	1	шт.	✓
16.	Инструкция по установке	1	шт.	✓
17.	Упаковочный лист	1	шт.	✓
18.	Штатив для пробирок в сборке	5	шт.	✓
19.	Штатив для пробирок капиллярной крови в сборке	1	шт.	✓
20.	Сканер штрих-кода	1	шт.	✓
21.	Кабель передачи данных	1	шт.	✓


Упаковщик: Контроль качества:

Проверяющий: Дата:

P/N: 02-70-08-0239-00[04]

Имя файла: Упаковочный лист ID: S0P400-F61 Версия: 01 Дата вступления в силу: 30.01.2022
Страница: 2/2

Упаковочный лист (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения EXZ 6000)

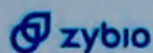

Название файла: Упаковочный лист
ID Документа: H-02-70-08-0239-00-01 Версия: 03

Упаковочный лист

Наименование изделия	Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro	Вариант исполнения	EXZ6000Pro	SN	EXZ6000Pro230600254
----------------------	---	--------------------	------------	----	---------------------

№	Наименование	Кол-во	Единица измерения	Подтвержденный результат
1.	Блок анализатора EXZ 6000Pro	1	шт.	✓
2.	Кабель питания	1	шт.	✓
3.	Предохранитель Т6 3АН250V	2	шт.	✓
4.	Трубка для жидких отходов	1	шт.	✓
5.	Трубка для разбавителя в сборке	1	шт.	✓
6.	Контейнер 20-литровый для жидких отходов	1	шт.	✓
7.	Трубка LD-I в сборке	1	шт.	✓
8.	Трубка LD-II в сборке	1	шт.	✓
9.	Трубка LB в сборке	1	шт.	✓
10.	Трубка LP в сборке	1	шт.	✓
11.	Принадлежности для технического обслуживания	1	шт.	НП
12.	Провод функционального заземления всего устройства	1	шт.	✓
13.	Руководство по эксплуатации	1	шт.	✓
14.	Краткая инструкция по эксплуатации	1	шт.	✓
15.	Сертификат	1	шт.	✓
16.	Инструкция по установке	1	шт.	✓
17.	Упаковочный лист	1	шт.	✓
18.	Штатив для пробирок в сборке	5	шт.	✓
19.	Штатив для пробирок капиллярной крови в сборке	1	шт.	✓
20.	Сканер штрих-кода	1	шт.	✓
21.	Кабель передачи данных	1	шт.	✓

Упаковщик: Контроль качества:

Проверяющий: Дата:

P/N: 02-70-08-0239-00[04]

Имя файла: Упаковочный лист ID: S0P400-F61 Версия: 01 Дата вступления в силу: 30.01.2022
Страница: 2/2

Упаковочный лист (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения EXZ 6000Pro)

Сертификат

Наименование изделия:	Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro
Вариант исполнения:	EXZ 6000
Серийный номер.:	EXZ6000221100014
Получатель:	Цинлун Лю
Дата:	16.09.2023



Этот продукт был протестирован и прошел все требования к проверке

Zubyo Inc. («Зибио Инк.»), Китай.

Сертификат

Наименование изделия:

Анализатор
автоматический
гематологический
для диагностики in
vitro

Вариант исполнения:

EXZ 6000Pro

Серийный номер.:

EXZ6000Pro230600254

Получатель:

Цинлунлю


Дата:

28.09.2023




Этот продукт был протестирован и прошел все требования к проверке

Zybio Inc. («Зибิโอ Инк.»), Китай.

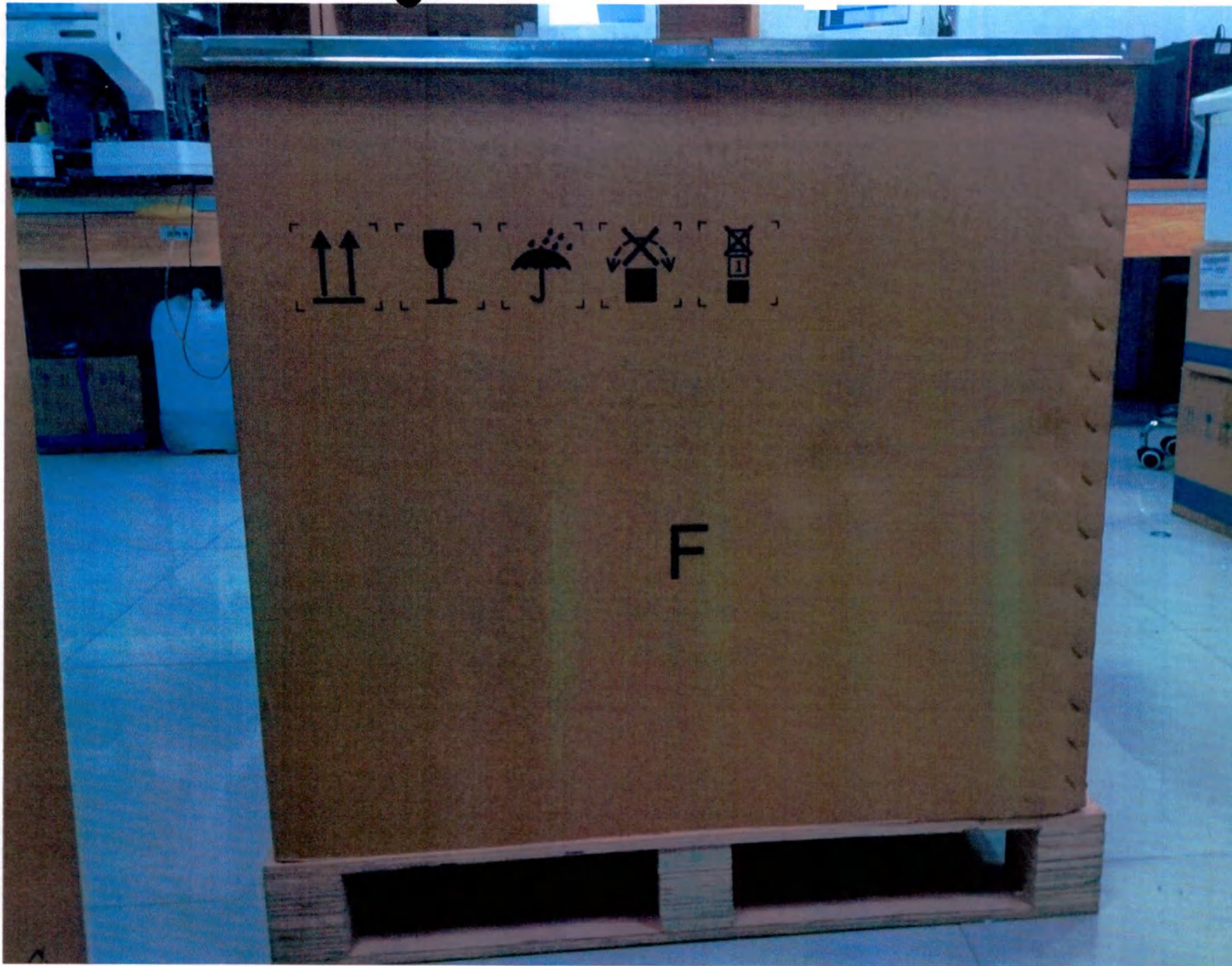





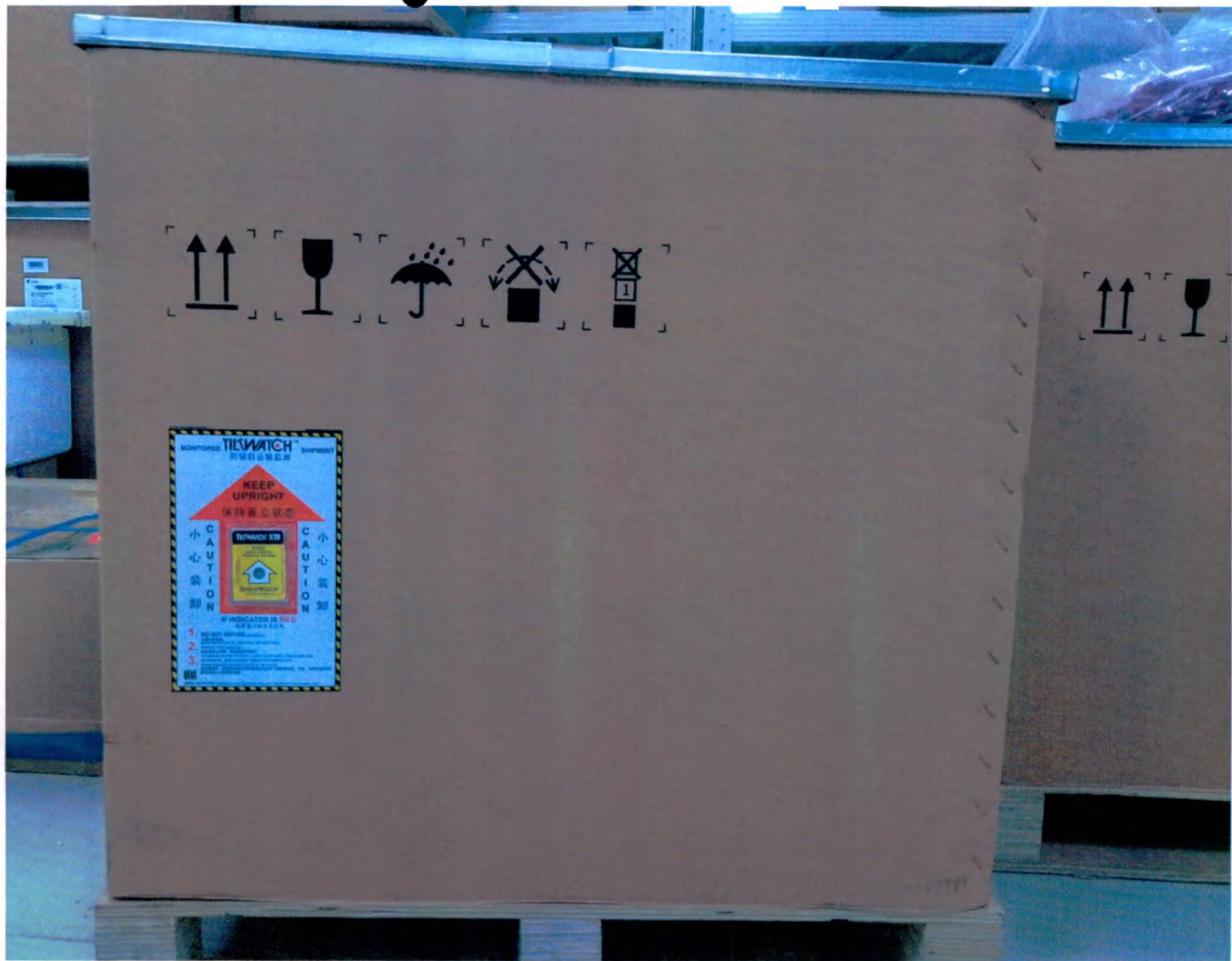

MONITORED **TILTWATCH™** SHIPMENT
防倾斜运输监测

**KEEP
UPRIGHT**

保持直立状态

小
心
装
卸
C
A
U
T
I
O
N



C
A
U
T
I
O
N
小
心
装
卸

IF INDICATOR IS RED
如果显示标志为红色


- 1. DO NOT REFUSE SHIPMENT**
不要拒收货物。
- 2. MAKE NOTATION ON DELIVERY RECEIPT AND INSPECT FOR DAMAGE.**
在收货单上注明，并检查损坏情况。
- 3. IF DAMAGE IS DISCOVERED, LEAVE IN ORIGINAL CONTAINER AND PACKAGING, AND REQUEST IMMEDIATE INSPECTION FROM CARRIER WITHIN 3 DAYS OF DELIVERY.**
如发现损坏，请将货物留在原包装箱内以及处于原包装状态，并且，在收货后3天内要求承运人立即进行检查。



MEDIA RECOVERY 7929 Brook River Dr., #300 Dallas, Texas 75247 (214) 638-9629 Toll Free (800) 527-9457



EXZ6000Pro230600250

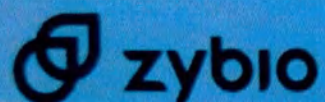

SN



EXZ6000Pro230600250

UDI



(01)06941967200895
(11)230600
(21)EXZ6000Pro230600250
(24)02-13-04-0010-00



IVD

NAME: Hematology Analyzer
MODEL: EXZ 6000Pro

2023-06

REF 02-13-04-0010-00

Qty.: 1 N.W.: 65kg G.W.: 91kg

Size: 856mm×802mm×810mm

Power: 100V-240V~, 50/60Hz, 300VA




Zybio Inc.

Floor 1 to Floor 4, Building 30, No. 6 of Taikang Road, Block C of Jianqiao Industrial Park,
Dadukou District, 400082 Chongqing, China.

EC REP


Qarad EC-REP BV.
Pas 257, 2440 Geel, Belgium.

Made in China

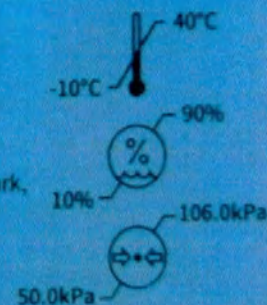



Транспортная упаковка с нанесенной оригинальной маркировкой (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения EXZ 6000)

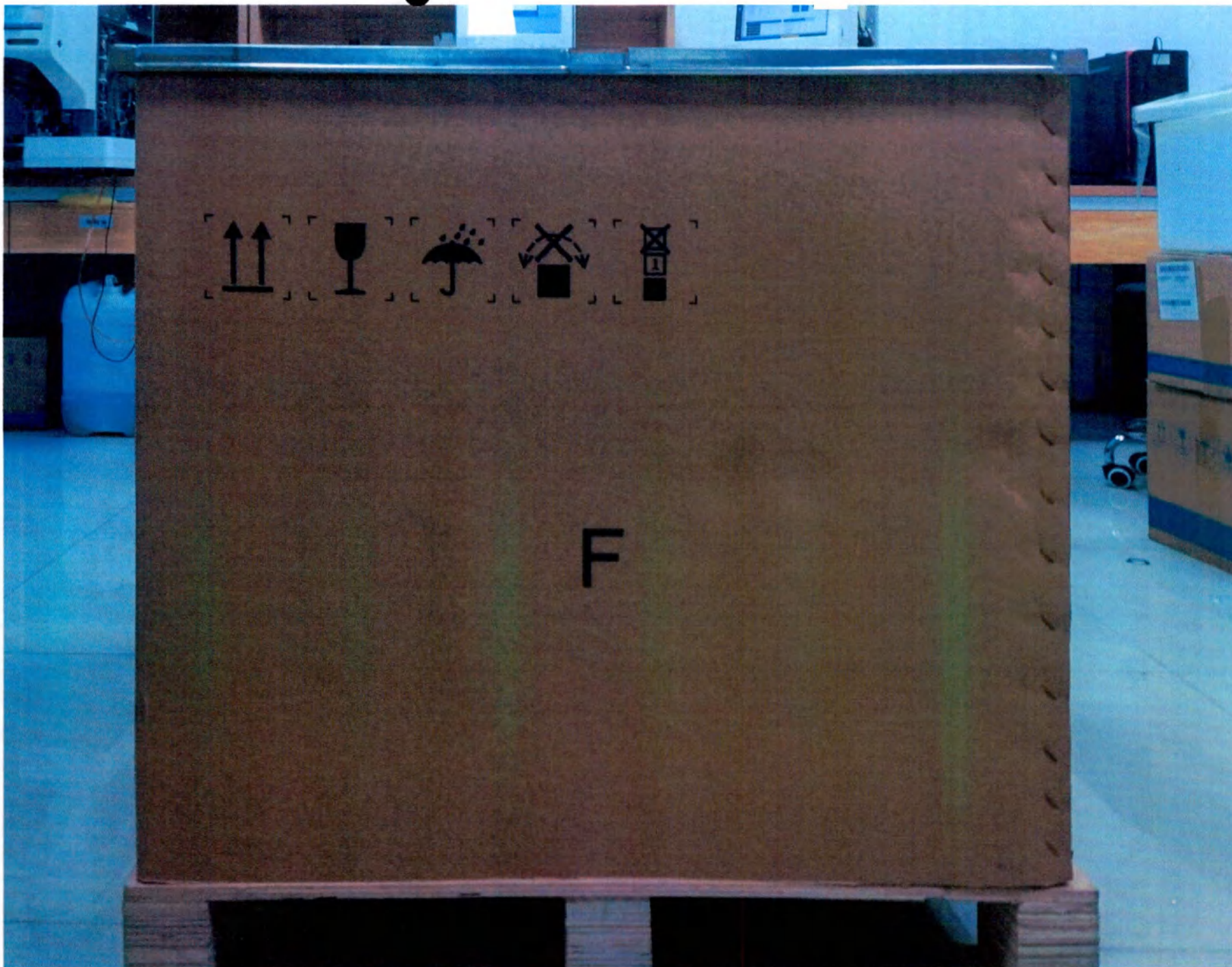







MONITORED **TILTWATCH™** SHIPMENT
防倾斜运输监测

**KEEP
UPRIGHT**

保持直立状态

小
心
装
卸
C
A
U
T
I
O
N



C
A
U
T
I
O
N
小
心
装
卸

IF INDICATOR IS RED
如果显示标志为红色


- 1. DO NOT REFUSE SHIPMENT**
不要拒收货物。
MAKE NOTATION ON DELIVERY RECEIPT AND
- 2. INSPECT FOR DAMAGE.**
在收货单上注明,并检查损坏情况。
IF DAMAGE IS DISCOVERED, LEAVE IN ORIGINAL CONTAINER AND
- 3. PACKAGING, AND REQUEST IMMEDIATE INSPECTION**
FROM CARRIER WITHIN 3 DAYS OF DELIVERY.
如发现损坏,请将货物留在原包装箱内以及处于原包装状态,并且,在收货后3天内
要求承运人立即进行检查。



MEDIA RECOVERY 7929 Brookview Dr., #200, Dallas, Texas 75247 (214) 536-8625 Toll Free (888) 527-3457



EXZ6000230300152

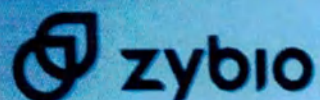

SN



EXZ6000230300152

UDI



(01)06941967200925
(11)221100
(21)EXZ6000221100001
(240)02-13-01-0003-00



IVD

NAME: Hematology Analyzer

MODEL: EXZ 6000



2023-04

REF

02-13-01-0003-00

Qty.: 1 N.W.: 61kg G.W.: 86kg

Size: 856mm×802mm×810mm

Power: 100V-240V~ 50/60Hz 250VA



Zybio Inc.


Floor 1 to Floor 4, Building 30, No. 6 of Taikang Road, Block C of Jianqiao Industrial Park,
Dadukou District, 400082 Chongqing, China.

EC REP

Qarad EC-REP BV.
Pas 257, 2440 Geel, Belgium.


Made in China

CE

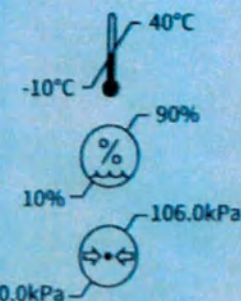



Транспортная упаковка с нанесенной оригинальной маркировкой (Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения EXZ 6000Pro)

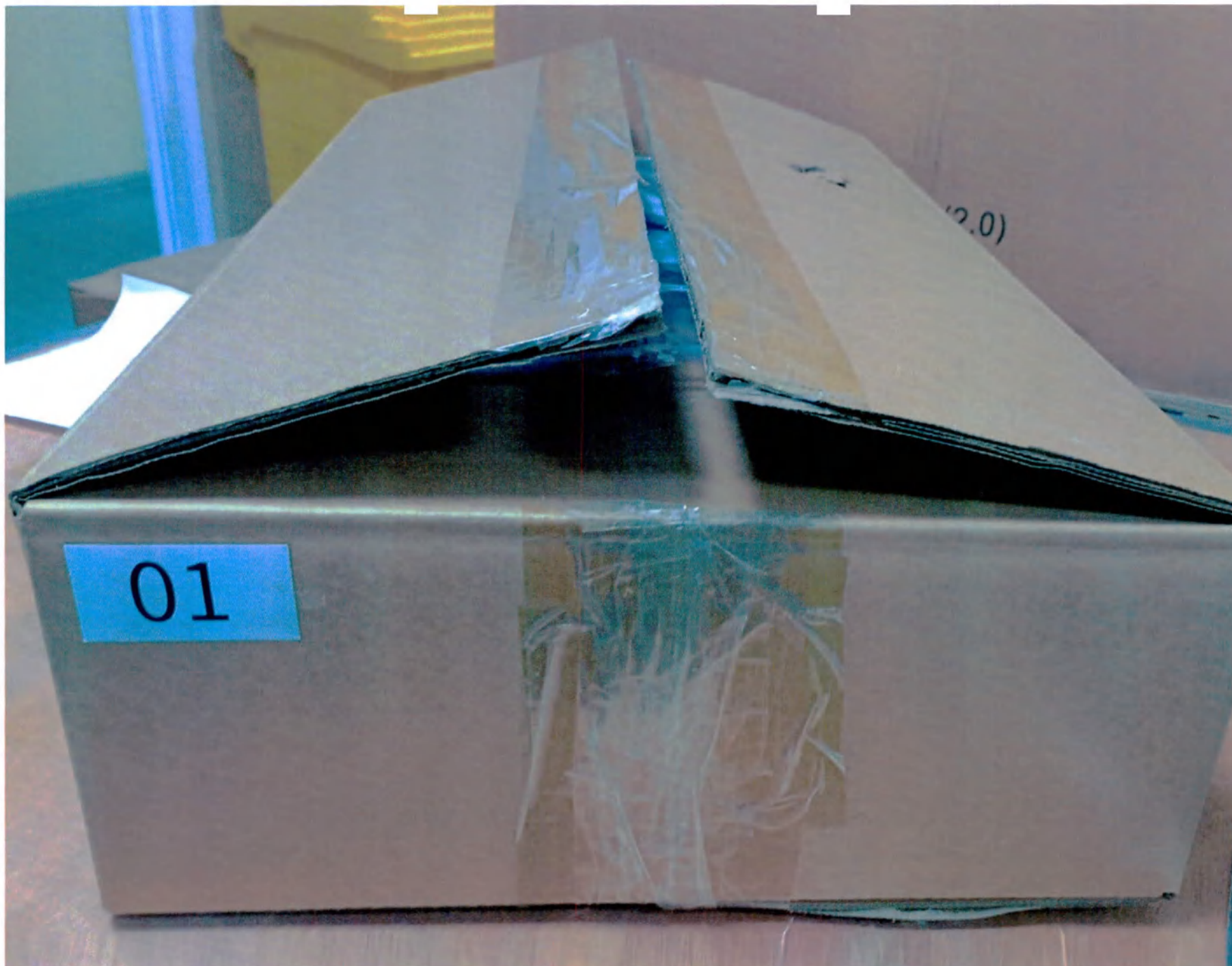





Маркировка коробок с компонентами состава анализатора

Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro
Вариант исполнения: EXZ 6000



06.2023

S/N: _____

Условия хранения и транспортирования:

Температура воздуха: -10°C – 40°C;

Относительная влажность: 10% – 90% (без конденсации);

Атмосферное давление: 50 кПа – 106 кПа.



Остальную информацию и символы см. на оригинальной маркировке



Zybio Inc. («Зибю Инк.»), Китай
Floor 1 to Floor 4, Building 30, No.6 of Taikang Road,
Block C of Jianqiao Industrial Park, Dadukou District,
400082 Chongqing, China

Макет маркировки потребительской упаковки (транспортной тары) изделия на русском языке (в варианте исполнения EXZ 6000)

Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro
Вариант исполнения: EXZ 6000Pro



06.2023

S/N: _____

Условия хранения и транспортирования:

Температура воздуха: -10°C – 40°C;

Относительная влажность: 10% – 90% (без конденсации);

Атмосферное давление: 50 кПа – 106 кПа.



Остальную информацию и символы см. на оригинальной маркировке



Zybio Inc. («Зибю Инк.»), Китай
Floor 1 to Floor 4, Building 30, No.6 of Taikang Road,
Block C of Jianqiao Industrial Park, Dadukou District,
400082 Chongqing, China

Макет маркировки потребительской упаковки (транспортной тары) изделия на русском языке (в варианте исполнения EXZ 6000Pro)

Информацию на стикере считать приоритетной
Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro
Вариант исполнения: EXZ 6000

S/N: _____

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Параметры источника питания: 100-240В~, 50/60Гц, 250 ВА.



Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: +7 (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Только для диагностики in vitro · Для профессионального применения
Остальную информацию и символы см. на оригинальной маркировке

Макет маркировки блока анализатора (шильдика) на русском языке (в варианте исполнения EXZ 6000)

Информацию на стикере считать приоритетной
Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro
Вариант исполнения: EXZ 6000Pro

S/N: _____

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Параметры источника питания: 100-240В~, 50/60Гц, 300 ВА.



Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: +7 (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Только для диагностики in vitro · Для профессионального применения
Остальную информацию и символы см. на оригинальной маркировке

Макет маркировки блока анализатора (шильдика) на русском языке (в варианте исполнения EXZ 6000Pro)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 47 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

