

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПО ПРОМЕТ»



Руководство по эксплуатации

Шкафы медицинские по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

производства ООО «НПО ПРОМЕТ», Россия

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	2
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	2
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
5. ОЧИСТКА И УХОД	3
6. МАРКИРОВКА	4
7. УПАКОВКА	4
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	4
10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	5
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5
12. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА	5
ПРИЛОЖЕНИЕ	6

Редакция 10.06.2024

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

«Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022» (далее – шкаф, мебель), варианты исполнения: Шкаф МД 1 1650/SG, Шкаф МД 1 1657/SG, Шкаф МД 2 1670/SG, Шкаф МД 1 1760/SG, Шкаф МД 2 1780/SG, Шкаф МД 1 ШМ-SSD, Шкаф МД 1 1760 R, Шкаф МД 1 1760 R-1, Шкаф МД 2 ШМ-SSR, Шкаф МД 2 ШМ-SSK, Шкаф МД 2 1780 R, Шкаф МД 2 1780 R-1, Шкаф МД 2 1780 R-5 предназначены для оборудования специализированных помещений, где проводятся хирургические операции, для хранения хирургических инструментов и других устройств для проведения хирургического исследования.

варианты исполнения: Шкаф МД 1 1650/SS, Шкаф МД 1 1657/SS, Шкаф МД 2 1670/SS, Шкаф МД 1 1760/SS, Шкаф МД 2 1780/SS, Шкаф МД 1 ШМ-SS, Шкаф МД 2 ШМ, Шкаф МД 2 ШМ-SS, Шкаф МД трейзер 1650, Шкаф МД трейзер 1670.

предназначены для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения, лекарственных средств, и медицинского оборудования.

Шкаф медицинский применяется в больницах и других лечебных заведениях.

Основные потребители: обслуживающий медицинский персонал.

Показания к применению: процедурные кабинеты, операционные, кабинеты диагностики и другие специальные медицинские помещения.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: не выявлено.

Информация о наличии лекарственных средств, материалов животного или человеческого происхождения: шкаф изготовлен из материалов, не содержащих лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и/или человеческого происхождения.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.3.1 Комплект поставки шкафов медицинских соответствует приложению 1.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие мебели	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Размеры (В×Ш×Г) отделения, мм	Кол-во отделений, ящиков, шт.	Кол-во дверей, шт.	Кол-во полок, шт.	Масса, кг
Шкаф МД 1 ШМ-SS	1830(1860)×500×500	1768×498×460	1	1 (металл)	3 (в комплекте)	26
Шкаф МД 1 ШМ-SSD	1750(1847)×600×403	822×598×360, 621×598×360	2 отделения, 1 ящик	1 (ЛДСП), 1 (стекло в рамке)	1 (металл), 2 (стекло)	51
Шкаф МД 1 1760 R	1750(1850)×600×400	822×598×360	2	1 (металл), 1 (стекло в рамке)	4 (в комплекте)	35,3
Шкаф МД 1 1760 R-1	1750(1850)×600×400	822×598×360, 621×598×360	2 отделения, 1 ящик	1 (металл), 1 (стекло в рамке)	3 (в комплекте)	34,3
Шкаф МД 2 ШМ	1831×918×461	1750×456×390	2	2 (металл)	6 (в комплекте)	47
Шкаф МД 2 ШМ-SS	1830(1890)×600×500	1746×300×468, 1746×286×468	2	2 (металл)	2 (в комплекте)	29,2
Шкаф МД 2 ШМ SSR	1750(1847)×800×403	823×731×365, 821×731×365	2	2 (ЛДСП), 2 (стекло в рамке)	2 (металл), 2 (стекло)	58
Шкаф МД 2 ШМ SSK	1750(1847)×800×403	823×731×365, 821×354×365	2 отделения, 5 ящиков	1 (ЛДСП), 2 (стекло в рамке)	2 (металл), 2 (стекло)	70
Шкаф МД 2 1780 R	1750(1850)×800×400	822×798×360	2	2 (металл), 2 (стекло в рамке)	4 (в комплекте)	47,8
Шкаф МД 2 1780 R-1	1780(1850)×800×400	822×798×360, 621×798×360	2 отделения, 2 ящика	2 (металл), 2 (текло)	3 (в комплекте)	49,3

Шкаф МД 2 1780 R-5	1750(1850)×800×400	822×798×360, 822×398×360	2 отделения, 5 ящиков	1 (металл), 2 (стекло в рамке)	4 (в ком- плекте)	53,1
Шкаф МД 2 1780/SS	1750(1850)×800×400	822×798×360	2	4 (металл)	4 (металл)	40,4
Шкаф МД 1 1760/SS	1750(1850)×800×400	822×598×360	2	2 (металл)	4 (металл)	32,3
Шкаф МД 1 1760/SG	1750(1850)×800×400	822×598×360	2	1 (металл), 1 (стекло)	2 (металл), 2 (стекло)	35,3
Шкаф МД 2 1670/SS	1655(1755)×700×320	805×698×280	2	4 (металл)	4 (металл)	33,3
Шкаф МД 2 1670/SG	1655(1755)×700×320	807×698×280	2	2 (металл), 2 (стекло)	2 (металл), 2 (стекло)	35,5
Шкаф МД 2 1780/SG	1750(1850)×800×400	822×798×360	2	2 (стекло), 2 (металл)	2 (металл), 2 (стекло)	47,8
Шкаф МД 1 1650/SS	1655(1755)×500×320	775×498×280	2	2 (металл)	4 (металл)	24,9
Шкаф МД 1 1650/SG	1655(1755)×500×320	775×498×280	2	1 (металл), 1 (стекло)	2 (металл), 2 (стекло)	26,6
Шкаф МД 1 1657/SS	1655(1755)×570×320	805×568×280	2	2 (металл)	4 (металл)	27,1
Шкаф МД 1 1657/SG	1655(1755)×570×320	775×568×280	2	1 (металл), 1 (стекло)	2 (металл), 2 (стекло)	29,3
Шкаф МД трейзер 1650	240×427×252	238×425×222	1	1	—	4,0
Шкаф МД трейзер 1670	240×627×252	238×625×222	1	2	—	5,4

Примечание:

Размеры в скобках «()» обозначают номинальное значение высоты шкафа, с установленными опорами.

Допустимые отклонения массы: ± 10%.

Предельные отклонения от габаритных размеров изделий мебели не должны превышать ±5%.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф должен эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 60 %.

При эксплуатации изделия следует использовать защитные перчатки.

Шкаф устанавливают на ровную горизонтальную поверхность для свободного открывания дверей, при необходимости выравнивают с помощью регулируемых опор. Согласно СанПиН 2.1.3684 в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность проводятся еженедельные генеральные уборки, во время которых мебель (в том числе шкафы) необходимо отодвигать от стены (под отодвиганием понимается: перемещение изделия на расстояние с полным отрывом опор шкафа от пола). Не допускается осуществлять перестановку шкафов путем волочения, т.е. без отрыва опор от пола).

Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.

Допустимая распределенная нагрузка: на ящик не более 10 кг, на полку стальную не более 30 кг, на полку стеклянную не более 10 кг. Допустимая нагрузка на шкаф должна быть не более 250 кг.

5. ОЧИСТКА И УХОД

Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ- 287-113 протираaniem наружных поверхностей салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности покрытия, или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.

6. МАРКИРОВКА

Маркировка шкафа должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, маркировка каждого изделия мебели должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование шкафа;
- серийный номер шкафа;
- дату изготовления;
- обозначение настоящих ТУ;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы, установленный предприятием-изготовителем.

Место нанесения маркировки — в соответствии с КД на шкафы.

На упаковочных коробках изделий мебели должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование шкафа;
- серийный номер шкафа;
- дату изготовления шкафа;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- грузовое место;
- условия хранения;
- цвет;
- обозначение настоящих ТУ;
- транспортную маркировку груза (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192):
- знак «Хрупкое. Осторожно»;
- знак «Верх»;
- знак «Беречь от влаги».

7. УПАКОВКА

Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, настоящих ТУ и чертежам предприятия-изготовителя.

Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Текущее техническое обслуживание МИ включает в себя внешний осмотр перед началом и во время эксплуатации.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности салазок тонким слоем смазки.

Не допускается:

- механическая чистка с использованием абразивных, хлоросодержащих и кислотных средств;
- использование металлических щеток, жестких губок при очистке;
- длительный контакт с ржавыми предметами;
- умышленно царапать поверхность.

Техническое обслуживание и ремонт изделий набора мебели производится обученными специалистами сервисной службы предприятия-изготовителя или службы уполномоченной предприятием-изготовителем в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

9. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов — 5 по ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха — от минус 50 °С до +50 °С;

– относительная влажность воздуха — 100 % при температуре +25 °С.

Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре от +5 °С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания срока эксплуатации шкафы должен быть утилизирован в соответствии с СанПиН 2.1.3684, класс А.

Утилизация частей шкафа, имевших контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, класс Б, и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с организацией, имеющей соответствующую лицензию.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средний срок службы шкафа медицинского – 5 лет, действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа — 1 год с даты продажи или даты изготовления (при отсутствии отметки о дате продаже).

12. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Продукция изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.
Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 14001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

Комплектация поставки шкафов

Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022:

I. Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022 (вид 270000), варианты исполнения:

1. Шкаф МД 1 1650/SG, в составе:

- 1.1 Стенка левая - 1 шт.;
- 1.2 Стенка правая - 1 шт.;
- 1.3 Основание - 1 шт.;
- 1.4 Крыша - 1 шт.;
- 1.5 Стенка задняя - 1 шт.;
- 1.6 Дверь металл - 1 шт.;
- 1.7 Дверь стекло - 1 шт.;
- 1.8 Разделитель - 1 шт.;
- 1.9 Полка металл - 2 шт.;
- 1.10 Полка стекло - 2 шт.;
- 1.11 Усилитель - 1 шт.;
- 1.12 Ножка - 4 шт.;
- 1.13 Комплект фурнитуры - 1 шт.;
- 1.14 Руководство по эксплуатации - 1 шт.;

2. Шкаф МД 1 1657/SG, в составе:

- 2.1. Стенка левая - 1 шт.;
- 2.2. Стенка правая - 1 шт.;
- 2.3. Основание - 1 шт.;
- 2.4. Крыша - 1 шт.;
- 2.5. Стенка задняя - 1 шт.;
- 2.6. Дверь металл - 1 шт.;
- 2.7. Дверь стекло - 1 шт.;
- 2.8. Разделитель - 1 шт.;
- 2.9. Полка металл - 2 шт.;
- 2.10. Полка стекло - 2 шт.;
- 2.11. Усилитель - 1 шт.;
- 2.12. Ножка - 4 шт.;
- 2.13. Комплект фурнитуры - 1 шт.;
- 2.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;

3. Шкаф МД 2 1670/SG, в составе:

- 3.1. Стенка левая - 1 шт.;
- 3.2. Стенка правая - 1 шт.;
- 3.3. Основание - 1 шт.;
- 3.4. Крыша - 1 шт.;
- 3.5. Стенка задняя правая - 1 шт.;
- 3.6. Стенка задняя левая - 1 шт.;
- 3.7. Дверь металл - 2 шт.;
- 3.8. Дверь стекло - 2 шт.;
- 3.9. Разделитель - 1 шт.;
- 3.10. Полка металл - 2 шт.;
- 3.11. Полка стекло - 2 шт.;
- 3.12. Усилитель - 1 шт.;
- 3.13. Ножка - 4 шт.;
- 3.14. Комплект фурнитуры - 1 шт.;
- 3.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;

4. Шкаф МД 1 1760/SG, в составе:

- 4.1. Стенка левая - 1 шт.;
- 4.2. Стенка правая - 1 шт.;
- 4.3. Основание - 1 шт.;
- 4.4. Крыша - 1 шт.;
- 4.5. Стенка задняя - 1 шт.;
- 4.6. Дверь металл - 1 шт.;
- 4.7. Дверь стекло - 1 шт.;
- 4.8. Разделитель - 1 шт.;
- 4.9. Полка металл - 2 шт.;
- 4.10. Полка стекло - 2 шт.;

- 4.11. Усилитель – 1 шт.;
- 4.12. Ножка - 4 шт.;
- 4.13. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
- 4.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 5. Шкаф МД 2 1780/SG, в составе:
 - 5.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 5.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 5.3. Основание – 1 шт.;
 - 5.4. Крыша – 1 шт.;
 - 5.5. Стенка задняя правая – 1 шт.;
 - 5.6. Стенка задняя левая – 1 шт.;
 - 5.7. Дверь металл – 2 шт.;
 - 5.8. Дверь стекло – 2 шт.;
 - 5.9. Разделитель – 1 шт.;
 - 5.10. Полка металл – 2 шт.;
 - 5.11. Полка стекло – 2 шт.;
 - 5.12. Усилитель – 1 шт.;
 - 5.13. Ножка - 4 шт.;
 - 5.14. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 5.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 6. Шкаф МД 1 ШМ-SSD, в составе:
 - 6.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 6.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 6.3. Основание – 1 шт.;
 - 6.4. Крыша – 1 шт.;
 - 6.5. Стенка задняя – 1 шт.;
 - 6.6. Дверь стекло – 1 шт.;
 - 6.7. Дверь ЛДСП – 1 шт.;
 - 6.8. Ящик – 1 шт.;
 - 6.9. Разделитель – 2 шт.;
 - 6.10. Кронштейн – 2 шт.;
 - 6.11. Вставка дна – 1 шт.;
 - 6.12. Полка металл – 1 шт.;
 - 6.13. Полка стекло – 2 шт.;
 - 6.14. Усилитель – 2 шт.;
 - 6.15. Ножка – 4 шт.;
 - 6.16. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 6.17. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- 7. Шкаф МД 1 1760 R, в составе:
 - 7.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 7.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 7.3. Основание – 1 шт.;
 - 7.4. Крыша – 1 шт.;
 - 7.5. Стенка задняя – 1 шт.;
 - 7.6. Дверь металл – 1 шт.;
 - 7.7. Дверь стекло – 1 шт.;
 - 7.8. Разделитель – 1 шт.;
 - 7.9. Полка – 4 шт.;
 - 7.10. Усилитель – 1 шт.;
 - 7.11. Ножка - 4 шт.;
 - 7.12. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 7.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 8. Шкаф МД 1 1760 R-I, в составе:
 - 8.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 8.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 8.3. Основание – 1 шт.;
 - 8.4. Крыша – 1 шт.;
 - 8.5. Стенка задняя – 1 шт.;
 - 8.6. Дверь металл – 1 шт.;
 - 8.7. Дверь стекло – 1 шт.;
 - 8.8. Разделитель – 2шт.;

- 8.9. Полка – 3 шт.;
- 8.10. Усилитель – 1 шт.;
- 8.11. Ящик – 1 шт.;
- 8.12. Кронштейн левый – 1 шт.;
- 8.13. Кронштейн правый – 1 шт.;
- 8.14. Ножка - 4 шт.;
- 8.15. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
- 8.16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 9. Шкаф МД 2 ШМ-SSR, в составе:
 - 9.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 9.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 9.3. Основание – 1 шт.;
 - 9.4. Крыша – 1 шт.;
 - 9.5. Стенка задняя правая – 1 шт.;
 - 9.6. Стенка задняя левая – 1 шт.;
 - 9.7. Дверь ЛДСП правая – 1 шт.;
 - 9.8. Дверь ЛДСП левая – 1 шт.;
 - 9.9. Дверь стекло правая – 1 шт.;
 - 9.10. Дверь стекло левая – 1 шт.;
 - 9.11. Разделитель – 1 шт.;
 - 9.12. Вставка дна – 1 шт.;
 - 9.13. Полка металл – 2 шт.;
 - 9.14. Полка стекло – 2 шт.;
 - 9.15. Усилитель – 2 шт.;
 - 9.16. Ножка – 4 шт.;
 - 9.17. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 9.18. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- 10. Шкаф МД 2 ШМ-SSK, в составе:
 - 10.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 10.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 10.3. Основание – 1 шт.;
 - 10.4. Крыша – 1 шт.;
 - 10.5. Стенка задняя правая – 1 шт.;
 - 10.6. Стенка задняя левая – 1 шт.;
 - 10.7. Ящик – 5 шт.;
 - 10.8. Перегородка – 1 шт.;
 - 10.9. Фальшстенка – 1 шт.;
 - 10.10. Дверь ЛДСП левая – 1 шт.;
 - 10.11. Дверь ЛДСП правая – 1 шт.;
 - 10.12. Дверь стекло правая – 1 шт.;
 - 10.13. Дверь стекло левая – 1 шт.;
 - 10.14. Разделитель – 1 шт.;
 - 10.15. Вставка дна – 1 шт.;
 - 10.16. Полка металл – 2 шт.;
 - 10.17. Полка стекло – 2 шт.;
 - 10.18. Усилитель – 2 шт.;
 - 10.19. Ножка – 4 шт.;
 - 10.20. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 10.21. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- 11. Шкаф МД 2 1780 R, в составе:
 - 11.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 11.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 11.3. Основание – 1 шт.;
 - 11.4. Крыша – 1 шт.;
 - 11.5. Стенка задняя правая – 1 шт.;
 - 11.6. Стенка задняя левая – 1 шт.;
 - 11.7. Дверь металл – 2 шт.;
 - 11.8. Дверь стекло – 2 шт.;
 - 11.9. Разделитель – 1 шт.;
 - 11.10. Полка – 4 шт.;
 - 11.11. Усилитель – 1 шт.;
 - 11.12. Ножка - 4 шт.;

- 11.13. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
- 11.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 12. Шкаф МД 2 1780 R-1, в составе:
 - 12.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 12.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 12.3. Основание – 1 шт.;
 - 12.4. Крыша – 1 шт.;
 - 12.5. Стенка задняя правая – 1 шт.;
 - 12.6. Стенка задняя левая – 1 шт.;
 - 12.7. Дверь металл – 2 шт.;
 - 12.8. Дверь стекло – 2 шт.;
 - 12.9. Ящик – 2 шт.;
 - 12.10. Перегородка – 1 шт.;
 - 12.11. Кронштейн левый – 1 шт.;
 - 12.12. Кронштейн правый – 1 шт.;
 - 12.13. Держатель перегородки – 1 шт.;
 - 12.14. Разделитель – 2шт.;
 - 12.15. Полка – 3 шт.;
 - 12.16. Усилитель – 1 шт.;
 - 12.17. Ножка - 4 шт.;
 - 12.18. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 12.19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- 13. Шкаф МД 2 1780 R-5, в составе:
 - 13.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 13.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 13.3. Основание – 1 шт.;
 - 13.4. Крыша – 1 шт.;
 - 13.5. Стенка задняя правая – 1 шт.;
 - 13.6. Стенка задняя левая – 1 шт.;
 - 13.7. Дверь металл – 1 шт.;
 - 13.8. Дверь стекло – 2 шт.;
 - 13.9. Ящик – 5 шт.;
 - 13.10. Перегородка – 1 шт.;
 - 13.11. Полка малая – 2 шт.;
 - 13.12. Панель под направляющие – 1 шт.;
 - 13.13. Разделитель – 1 шт.;
 - 13.14. Полка – 2 шт.;
 - 13.15. Усилитель – 1 шт.;
 - 13.16. Ножка - 4 шт.;
 - 13.17. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 13.18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;

II. Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022 (вид 139690), варианты исполнения:

- 1. Шкаф МД 1 1650/SS, в составе:
 - 1.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 1.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 1.3. Основание – 1 шт.;
 - 1.4. Крыша – 1 шт.;
 - 1.5. Стенка задняя – 1 шт.;
 - 1.6. Дверь – 2 шт.;
 - 1.7. Разделитель – 1 шт.;
 - 1.8. Полка – 4 шт.;
 - 1.9. Усилитель – 1 шт.;
 - 1.10. Ножка - 4 шт.;
 - 1.11. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 1.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 2. Шкаф МД 1 1657/SS, в составе:
 - 2.1. Стенка левая - 1 шт.;
 - 2.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 2.3. Основание – 1 шт.;
 - 2.4. Крыша – 1 шт.;
 - 2.5. Стенка задняя – 1 шт.;
 - 2.6. Дверь – 2 шт.;

- /
- 2.7. Разделитель – 1 шт.;
 - 2.8. Полка – 4 шт.;
 - 2.9. Усилитель – 1 шт.;
 - 2.10. Ножка – 4 шт.;
 - 2.11. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 2.12. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
 - 3. Шкаф МД 2 1670/SS, в составе:
 - 3.1. Стенка левая – 1 шт.;
 - 3.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 3.3. Основание – 1 шт.;
 - 3.4. Крыша – 1 шт.;
 - 3.5. Стенка задняя правая – 1 шт.;
 - 3.6. Стенка задняя левая – 1 шт.;
 - 3.7. Дверь металл – 4 шт.;
 - 3.8. Разделитель – 1 шт.;
 - 3.9. Полка – 4 шт.;
 - 3.10. Усилитель – 1 шт.;
 - 3.11. Ножка – 4 шт.;
 - 3.12. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 3.13. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
 - 4. Шкаф МД 1 1760/SS, в составе:
 - 4.1. Стенка левая – 1 шт.;
 - 4.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 4.3. Основание – 1 шт.;
 - 4.4. Крыша – 1 шт.;
 - 4.5. Стенка задняя – 1 шт.;
 - 4.6. Дверь – 2 шт.;
 - 4.7. Разделитель – 1 шт.;
 - 4.8. Полка – 4 шт.;
 - 4.9. Усилитель – 1 шт.;
 - 4.10. Ножка – 4 шт.;
 - 4.11. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 4.12. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
 - 5. Шкаф МД 2 1780/SS, в составе:
 - 5.1. Стенка левая – 1 шт.;
 - 5.2. Стенка правая – 1 шт.;
 - 5.3. Основание – 1 шт.;
 - 5.4. Крыша – 1 шт.;
 - 5.5. Стенка задняя правая – 1 шт.;
 - 5.6. Стенка задняя левая – 1 шт.;
 - 5.7. Дверь металл – 4 шт.;
 - 5.8. Разделитель – 1 шт.;
 - 5.9. Полка – 4 шт.;
 - 5.10. Усилитель – 1 шт.;
 - 5.11. Ножка – 4 шт.;
 - 5.12. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 5.13. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
 - 6. Шкаф МД 1 ШМ-SS, в составе:
 - 6.1. Стойка закладная – 1 шт.;
 - 6.2. Стенка задняя – 1 шт.;
 - 6.3. Полка малая – 3 шт.;
 - 6.4. Стенка правая – 1 шт.;
 - 6.5. Стенка левая – 1 шт.;
 - 6.6. Основание – 1 шт.;
 - 6.7. Крыша – 1 шт.;
 - 6.8. Разделитель вертикальный – 1 шт.;
 - 6.9. Дверь – 1 шт.;
 - 6.10. Рама – 1 шт.;
 - 6.11. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 6.12. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
 - 6.13. Ножка – 4 шт.;
 - 7. Шкаф МД 2 ШМ, в составе:

- 7.1. Дверь правая – 1 шт.;
- 7.2. Дверь левая – 1 шт.;
- 7.3. Стенка боковая правая – 1 шт.;
- 7.4. Стенка боковая левая – 1 шт.;
- 7.5. Стенка задняя правая – 1 шт.;
- 7.6. Стенка задняя левая – 1 шт.;
- 7.7. Крыша – 1 шт.;
- 7.8. Основание – 1 шт.;
- 7.9. Перегородка – 1 шт.;
- 7.10. Полка под перекладину – 1 шт.;
- 7.11. Полка шкафная – 5 шт.;
- 7.12. Корпус порога – 1 шт.;
- 7.13. Крышка порога – 1 шт.;
- 7.14. Труба под вешалку – 1 шт.;
- 7.15. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
- 7.16. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
8. Шкаф МД 2 ШИМ-SS, в составе:
 - 8.1. Полотно двери - 2 шт.;
 - 8.2. Дно - 1 шт.;
 - 8.3. Крыша - 1 шт.;
 - 8.4. Полка левая - 1 шт.;
 - 8.5. Полка правая - 1 шт.;
 - 8.6. Стенка боковая левая - 1 шт.;
 - 8.7. Стенка боковая правая - 1 шт.;
 - 8.8. Стенка задняя - 1 шт.;
 - 8.9. Перегородка - 1 шт.;
 - 8.10. Ножка – 4 шт.;
 - 8.11. Комплект фурнитуры - 1 шт.;
 - 8.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
9. Шкаф МД трейзер 1650, в составе:
 - 9.1. Обечайка (в составе стенка левая, стенка правая, стенка задняя) – 1 шт.;
 - 9.2. Крыша – 1 шт.;
 - 9.3. Основание - 1 шт.;
 - 9.4. Дверь - 1 шт.;
 - 9.5. Скоба задняя - 1 шт.;
 - 9.6. Скоба боковая – 1 шт.;
 - 9.7. Стопор – 1 шт. (при необходимости);
 - 9.8. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 9.9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
10. Шкаф МД трейзер 1670, в составе:
 - 10.1. Обечайка (в составе стенка левая, стенка правая, стенка задняя) – 1 шт.;
 - 10.2. Крыша – 1 шт.;
 - 10.3. Основание - 1 шт.;
 - 10.4. Дверь левая - 1 шт.;
 - 10.5. Дверь правая – 1 шт.;
 - 10.6. Скоба задняя - 1 шт.;
 - 10.7. Скоба боковая – 1 шт.;
 - 10.8. Стопор – 1 шт. (при необходимости);
 - 10.9. Комплект фурнитуры – 1 шт.;
 - 10.10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.



11/04/2025