



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕНТАЛ - ИСТ"

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate
для установки моделей зубных протезов по ТУ
32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения**

Дата выпуска документа: 01.06.2021

Дата пересмотра документа: 10.11.2024

**«УТВЕРЖДАЮ»
ООО «ДЕНТАЛ-ИСТ»**

Директор
(должность)

Афанасьев А.Н.
(имя)

(подпись)

2022/11/10

(дата)

М.П.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
4. НАИМЕНОВАНИЕ
3. НАИМЕНОВАНИЕ
4. КОМПОНЕНТЫ
5. ПРИБОРЫ

Наименование товара Оклюдатор зуботехнический Labo-Mate
для установки моделей зубных протезов по ТУ
32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах
исполнения

Дата пересмотра 10.11.2024

Номер документа №3

Основание 95983703.02-2022



МЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	4
2. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА.....	5
3. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	6
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ).....	7
5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	8
6. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	9
7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	10
8. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.....	11
9. КЛАССИФИКАЦИЯ.....	13
10. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	14
11. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	14
12. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ЭФФЕКТЫ).....	15
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ИЗДЕЛИЮ.....	16
14. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	17
15. СТЕРИЛИЗАЦИЯ.....	18
16. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОРЯДОК ОЧИСТКИ.....	19
17. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	20
17. МАРКИРОВКА.....	22
20. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	28
21. СРОК СЛУЖБЫ/ГОДНОСТИ.....	29
22. УТИЛИЗАЦИЯ.....	30
23. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	31
24. РЕКЛАМАЦИИ.....	32

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТ.
ИСТ"

ООО "ДЕНТАЛ - ИСТ"

Юридический адрес: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А

2. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА

ООО "ДЕНТАЛ - ИСТ",

Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А

КОМПЛ
Окклюда
протезов по ТУ 3
1. Окклю

3. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по
32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ)

Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения:

1. Окклюдатор Labo-Mate Bronze Denture в составе:

- Окклюдатор одного исполнения – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации.

2. Окклюдатор Labo-Mate Chrome Denture C&B в составе:

- Окклюдатор одного исполнения – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации.

3. Окклюдатор Labo-Mate Chrome Denture High Arch в составе:

- Окклюдатор одного исполнения – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации.

4. Окклюдатор Labo-Mate Chrome Denture Low Arch в составе:

- Окклюдатор одного исполнения – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации.

5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Отсутствуют.

НАЗНАЧ
Устройство
воспроизвед
загипс

6. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Устройство, используемое в зуботехнической лаборатории, позволяющее воспроизвести вертикальные движения челюстей (открытие и закрытие рта) с загипсованными в него моделями. Используется для постановки зубов в полных и частичных съемных протезах. Только для использования в медицинских целях стоматологических учреждениях квалифицированным персоналом (мед работником / стоматологом / зубным техником).

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стоматологические учреждения, в т.ч. стоматологические лаборатории, стационарные и амбулаторные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ).

	Страница 10	Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения	Дата пересмотра: 10.11.2024
--	-------------	---	--------------------------------

8. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1 Применения

Окклюдаторы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.

Окклюдаторы должны использоваться в закрытых помещениях с нормальными климатическими условиями по ГОСТ 15150:

- рабочее значение температуры окружающего воздуха: от 10 °С до 35 °С;
- предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха: от 1°С до 40 °С;
- относительная влажность воздуха: не выше 80 % при 25 °С.

Окклюдаторы, в зависимости от воспринимаемых механических воздействий, относятся к группе 2 по ГОСТ Р 50444 - переносные, не предназначенные для работы при переносках и передвижениях.

Окклюдаторы предназначены для использования в сочетании с другими медицинскими изделиями, такими как:

стоматологические гипсы,
паковочные массы
слепочные ложки,
прикусные вилки.

Окклюдаторы являются изделиями многоразового применения.

8.2 Транспортирование

Окклюдаторы в транспортной упаковке транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования изделий крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Расстановка и крепление упаковок с окклюдаторами должны соответствовать техническим условиям на погрузку и крепление грузов и обеспечивать устойчивое положение транспортной упаковки.

При перевозке изделий в упаковке изготовителя (картонной коробке) не допускается бросать её, прикладывать к ней усилия или ставить на неё предметы, приводящие к её деформации. Не допускается попадание на упаковку влаги и агрессивных сред.

8.3 Хранение

Окклюдаторы до использования должны храниться на складах в закрытой упаковке и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей.

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2.

	Страница 12	Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения	Дата пересмотра: 10.11.2024
--	-------------	---	--------------------------------

9. КЛАССИФИКАЦИЯ

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1.

Климатическое исполнение – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

Кратность применения медицинского изделия – изделие многократного применения. Инвазивность – медицинское изделие неинвазивное.

Стерильность – медицинское изделие нестерильное.

Применение для жизненно важных органов (сердце, центральная система кровообращения, центральная нервная система) – изделие не имеет контакта с жизненно важными органами, так как врач-стоматолог, зубной техник, лаборант или студент медицинского учебного заведения проводит работы на окклюдаторе только в перчатках.

Степень защиты от влаги и твёрдых частиц по ГОСТ 14254 – IP20.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий медицинское изделие относится к группе 2 - носимые, переносные и передвижные, предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах стационарного помещения по ГОСТ Р 50444.

10. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимость в изготовлении стоматологических частичных или полных протезов, моделировании коротких мостов и единичных коронок при потере зубов.

Способ (метод применения)

Окклюдаторы предназначены для применения в условиях медицинских учреждений.

Окклюдаторы должны применяться только квалифицированным медицинским персоналом или под руководством обученного персонала.

Окклюдаторы должны использоваться по утвержденным на территории РФ инструкциям для каждого исполнения окклюдатора.

11. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Окклюдаторы не имеют противопоказаний к применению, поэтому данный раздел не применяется.

12. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ЭФФЕКТЫ)

Окклюдаторы не имеют побочных действий, поэтому данный раздел не применяется.

	Страница 15	Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения	Дата пересмотра: 10.11.2024
--	-------------	---	--------------------------------

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ИЗДЕЛИЮ

По основным параметрам и характеристикам окклюдаторы должны соответствовать нормам, приведённым в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры и характеристики окклюдаторов

Наименование параметра	Labo-Mate Bronze Denture	Labo-Mate Chrome Denture C&B	Labo-Mate Chrome Denture High Arch	Labo-Mate Chrome Denture Low Arch
Габаритные размеры (ДхШхВ) $\pm 5\%$, мм	115x80x71	115x110x90	115x110x90	107x80x60
Вес $\pm 5\%$, г	142	142	189	120
Наклон нижней части ± 5 , град $^{\circ}$	105	105	105	105
Жесткость пружины $\pm 5\%$, Н/м	-	3,89	3,33	3,33
Способ соединения	Разъемное соединение	Разъемное соединение	Разъемное соединение	Разъемное соединение

14. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ


Описание принципа работы

На верхнюю и нижнюю часть гипсовой модели челюсти наносится смешанный мягкий белый гипс для ее соединения с верхними и нижними частями прикуса.

После его отверждения гипсовая модель помещается в отверстие для окклюдатора. Далее воспроизводят движения нижней челюсти относительно верхней.

Проводится оценка движения в вертикальной плоскости: если выявляются какие-либо нарушения, проводится корректировка.

Конструкцию окклюдатора рассмотрим на примере Labo-Mate Chrome Denture C&B.

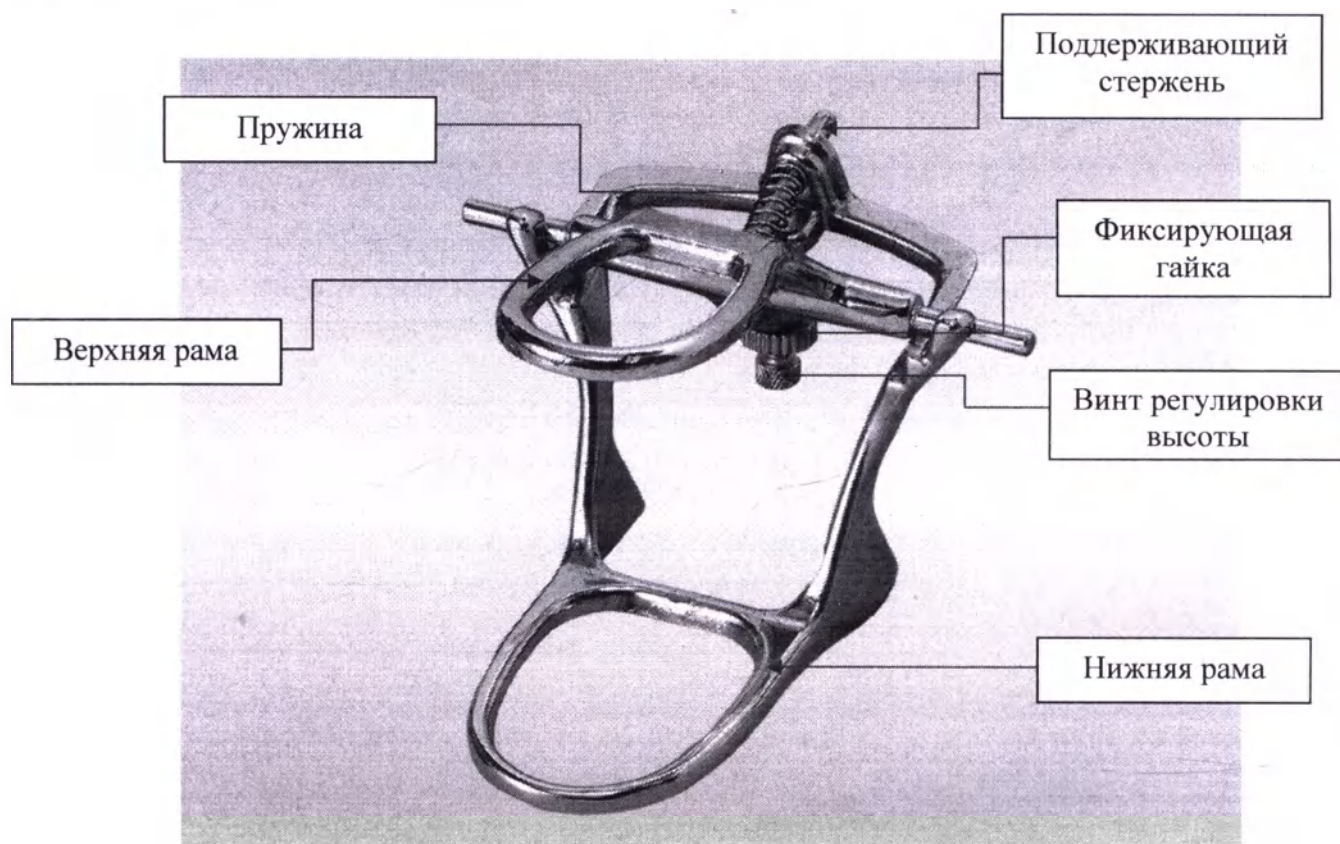

15. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Окклюдаторы поставляются нестерильными и не подлежат дальнейшей стерилизации.

	Страница 18	Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения	Дата пересмотра: 10.11.2024
--	-------------	---	--------------------------------

16. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОРЯДОК ОЧИСТКИ

Дезинфекция изделий медицинского назначения и контроль направлены на профилактику внутрибольничных инфекций у пациентов и персонала лечебно-профилактических учреждений.

Окклюдатор не имеет непосредственного контакта с пациентом, и в качестве дезинфекции может быть использован способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства; врач-стоматолог, зубной техник, лаборант или студент медицинского учебного заведения проводит работы на окклюдаторе в перчатках.

Методы и средства дезинфекции и очистки

Дезинфекция окклюдаторов проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т.ч. возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции), бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов на изделиях медицинского назначения. Дезинфекция изделий медицинского назначения и контроль направлены на профилактику внутрибольничных инфекций у пациентов и персонала лечебно-профилактических учреждений.

Окклюдатор непосредственного контакта с пациентом не имеет и в качестве дезинфекции может быть использован способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства в соответствии с МУ 287-113. Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов. Врач-стоматолог, зубной техник, лаборант или студент медицинского учебного заведения проводит работы на окклюдаторе только в перчатках.

17. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Требования безопасности

Окклюдаторы должны соответствовать требованиям безопасности ГОСТ Р 50444.

Окклюдаторы должны быть безопасными для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для окружающей среды при эксплуатации и техническом обслуживании изделий, проводимых в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Окклюдаторы должны применяться квалифицированным персоналом только в соответствии с их назначением и эксплуатационной документацией изготовителя.

Окклюдаторы являются негорючим и невзрывоопасным изделием и не оказывают химического, механического, радиационного, электромагнитного, термического и биологического воздействия на окружающую среду.

Окклюдаторы не наносят вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при их испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации.

При изготовлении и использовании окклюдаторов должны соблюдаться требования санитарного законодательства Российской Федерации.

Окклюдаторы в воздушной среде, сточных водах и в присутствии других веществ или факторов, а также при высоких температурах (в условиях пожара) токсичных соединений не образуют, в химическое взаимодействие с кислородом воздуха при обычных условиях не вступают.

Информация об обстоятельствах, при которых потребитель должен проконсультироваться с медицинским работником

Подобные обстоятельства не предусмотрены.

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Окклюдаторы предназначены только для использования квалифицированным медицинским персоналом (врачи-стоматологи, зубные техники, лаборанты) в профильных медицинских учреждениях и ЛПУ, а также студентами медицинских учебных заведений.

Работа с медицинским изделием возможна только в перчатках.

Ткани животного или человеческого происхождения

Окклюдаторы не содержат ткани животного или человеческого происхождения, также отсутствует наличие лекарственных препаратов, поэтому данный раздел не применяется.

	Страница 21	Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения	Дата пересмотра: 10.11.2024
--	-------------	---	--------------------------------

17. МАРКИРОВКА

Маркировка окклюдаторов должна соответствовать требованиям ГОСТ 50444, ГОСТ Р ИСО 15223-1 и должна однозначно идентифицировать изделие.

На каждом изделии или ярлыке, прикрепляемом к изделию, должны быть указаны:

- артикул изделия;
- серийный номер (при наличии) ;

На упаковке изделия должно быть указано:

- наименование и адрес производителя ;
- наименование изделия;
- наименование места производства медицинского изделия;
- наименование или обозначение варианта исполнения изделия;
- идентификационный (серийный/заводской) номер ;
- артикул изделия;
- месяц и год изготовления изделия, «Дата изготовления/годен до»;;
- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- обозначение настоящих технических условий;
- манипуляционный знак: «Хрупкое. Осторожно» ;
- манипуляционный знак: «Беречь от влаги» ;
- символ температурного диапазона;
- условия транспортировки и хранения изделия.

Допускается, по решению изготовителя, указывать в маркировке дополнительную информацию для потребителя.

Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства-члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится и реализуется.

Символы, применяемые при маркировании – по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Маркировка должна быть хорошо видна, разборчива, не стираема.

Транспортная маркировка изделия должна содержать:

- наименование и адрес производителя;
- наименование изделия;
- наименование места производства медицинского изделия;
- наименование или обозначение варианта исполнения изделия;
- место для наименования грузоотправителя;
- место для наименования грузополучателя;
- место для наименования пункта назначения;
- место для надписей транспортных организаций;
- надпись «число изделий, шт.»;
- надпись масса «Брутто, кг»;
- символ температурного диапазона;
- условия транспортировки и хранения изделия;
- дата изготовления.
- Габаритные размеры, мм
- Гарантийный срок хранения

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных

знаков, соответствующих значениям: «Хрупкое. Осторожно» , «Беречь от влаги»



, «Вверх» 

. Допускается наклеивание манипуляционных знаков, выполненных типографским способом.

Маркировка изделия

Артикул	02030
	_____

Маркировка упаковки изделия

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛ-ИСТ»
Оклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения	
_____ (Вариант исполнения)	
	ООО "ДЕНТАЛ - ИСТ" Юридический адрес: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А Адрес производства: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А
Артикул _____ _____ Дата изготовления/годен до Хх.хх.хх/хх.хххх	   +35 +10
РУ № _____ от «__» _____ 20__ г	
Транспортировать при температуре от -50 °С до +50 °С при влажности не более 80% при +25 °С. Хранить при температуре от +10 °С до +35 °С при влажности не более 80% при +25 °С.	

Маркировка транспортной упаковки

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛ-ИСТ»
Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения	
(Вариант исполнения)	
Наименование грузополучателя: _____ (Полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя) Наименование пункта назначения: _____	
Наименование грузоотправителя: _____ (Полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя) Надпись транспортных организаций: _____	
Число изделий, шт.: _____ Брутто, кг: _____ Габаритные размеры, мм: _____ x _____ x _____ Гарантийный срок хранения – до _____	
	 +10 +35 XX.XX.XXXX
Транспортировать при температуре от -50 °С до +50 °С при влажности не более 80% при +25 °С. Хранить при температуре от +10 °С до +35 °С при влажности не более 80% при +25 °С.	
	ООО «ДЕНТАЛ-ИСТ» Юридический адрес: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А Адрес производства: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А

18. УПАКОВКА

Упаковка окклюдаторов должна быть выполнена в соответствии требованиями ГОСТ Р 50444, ГОСТ 15150 и настоящих технических условий.

Упаковка окклюдаторов должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов при заявленных условиях хранения и транспортирования в течение всего срока годности окклюдаторов.

Упаковка окклюдаторов должна:

- сохранять физико-химические свойства изделия;
- предохранять изделие от вредных компонентов из внешней среды;
- быть безопасной для изделия и окружающей среды;
- быть прочной и чистой, способствовать защите товара от механических повреждений;
- быть экономически целесообразной.

Окклюдаторы должны быть упакованы в индивидуальную упаковку - картонные пачки или коробки по ГОСТ 33781.

Индивидуальные упаковки с окклюдаторами должны быть уложены в транспортную упаковку (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 34033, ГОСТ 9142. Транспортная упаковка с окклюдаторами должна быть оклеена лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

Масса брутто одного ящика должна быть не более 10 кг.

Перед упаковкой окклюдаторов необходимо проверить:

- комплектность;
- наличие эксплуатационной и товаросопроводительной документации;
- правильность заполнения упаковочных листов;
- правильность выполнения надписей на ящиках.

Упаковочный лист (размер листа произвольный) должен включать следующие данные:

- номер заказа;
- наименование грузополучателя и его адрес;
- обозначение модели окклюдатора;
- количество штук;
- дату отгрузки.

Эксплуатационная и товаросопроводительная документации должны быть вложены в ящик.

с Эксплуатационная и товаросопроводительная документации должны быть составлены на русском языке, а когда это предусмотрено заказ-нарядом, и на соответствующем иностранном языке.

Временная противокоррозионная защита изделий при необходимости должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.

Допускается, по согласованию с заказчиком, применять для упаковки другие виды материалов, обеспечивающих сохранность окклюдаторов при транспортировании и хранении.

	Страница 27	Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения	Дата пересмотра: 10.11.2024
--	-------------	---	--------------------------------

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание окклюдаторов должно производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации окклюдатора

10.2 Техническое обслуживание заключается в регулярной проверке износа верхней и нижней частей окклюдаторов, опорного стержня, пружины, винта регулировки высоты и фиксирующей гайки.

Техническое обслуживание окклюдаторов должно производиться только квалифицированным персоналом.

21. СРОК СЛУЖБЫ/ГОДНОСТИ

Срок годности 10 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

	Страница 29	Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703- 2021, в вариантах исполнения	Дата пересмотра: 10.11.2024
--	-------------	--	--------------------------------

22. УТИЛИЗАЦИЯ

Специальных методов обезвреживания или уничтожения окклюдаторов не требуется.

Окклюдаторы относятся медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближённые к твёрдым бытовым отходам (ТКО) (СанПиН 2.1.3684-21), и их, а также упаковку от них можно утилизировать как бытовой мусор.

	Страница 30	Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения	Дата пересмотра: 10.11.2024
--	-------------	---	--------------------------------

23. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие окклюдаторов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, связанные с использованием окклюдаторов не по назначению, повреждением упаковки и окклюдаторов.

24. РЕКЛАМАЦИИ

В случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, в также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:

Адрес для обращения потребителей:

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛ - ИСТ»

ООО «ДЕНТАЛ - ИСТ»

Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А

Тел. 8 800-222-77-05, (499) 458-67-37, 458-73-27, 745-63-18, 745-63-16,
745-63-20

sales@dental-east.ru

ИНН 7743598665

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛ - ИСТ»

ООО «ДЕНТАЛ - ИСТ»

Место производства:

ООО "ДЕНТАЛ - ИСТ",

Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А

Сшито и заверено печатью 17
(сшито) лист 00

Директор
ООО «ДЕНТАЛ-ИСТ»
Афанасьев А.Н.

