

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «БиоМебель»

Кононенко М.В.

« 01 » февраля 2024 г.

Руководство по эксплуатации

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30–008–50915213–2021

Версия 5
2024г

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия.....	3
2. Производитель.....	12
3. Функциональное назначение	13
4. Принцип действия видов мебельных изделий, комплектующих наборы медицинской мебели	20
5. Риски применения медицинского изделия, показания, противопоказания, ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению; ..	20
6. Технические характеристики.....	21
6.1 Габаритные размеры и масса.....	21
6.2 Механическая безопасность изделий	25
6.3 Декоративно-эстетические характеристики.....	26
6.4 Надежность, прочность, долговечность изделий.....	26
6.5 Санитарно-гигиеническая безопасность изделий	26
6.6 Электрическая безопасность изделий.....	27
7. Принадлежности к мебели медицинской.....	28
7.1 Надстройка одноярусная НСТ.....	28
7.2 Надстройка двухярусная НСТ2.....	28
7.3 подставка под системный блок ПСБ	28
7.4 подставка под монитор ПМ.....	29
7.5 Выдвижная полка под клавиатуру ВПК	29
7.6 Надстройка титровальная НСТ-ТИТ.....	30
7.7 Надстройка рамная НСТ-Р.....	30
7.8 Настенный сушиитель для лабораторной посуды НСЛП	31
8. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения.....	31
9. Установка и монтаж медицинской мебели.....	31
10. Требования к помещениям	32
11. Правила эксплуатации	32
11.1 Упаковка и транспортная маркировка мебели.....	32
11.2 Приемка мебели на месте эксплуатации	32
11.3 Условия эксплуатации	33
11.4 Ремонт и техническое обслуживание	34
11.5 Стерильность МИ	34
11.6 Порядок дезинфекции МИ	34
11.7 Дополнительная информация.....	35
11.8 Гарантии изготовителя.....	35
12. Порядок и условия утилизации медицинского изделия	35
Приложение А.....	36

1. Наименование медицинского изделия

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021

I. Набор медицинской мебели для лаборатории №1 в составе:

Стол� рамные, в вариантах исполнения:

1. СЛР – 1 шт.
2. СЛР-П – 1 шт.
3. СЛР-Ж – 1 шт.
4. СЛР-К – 1 шт.
5. СЛР-Т – 1 шт.
6. СЛР2 – 1 шт.
7. СЛР-У – 1 шт.
8. СЛР-А – 1 шт.

Стол� усиленные, в вариантах исполнения

1. СЛУ – 1 шт.
2. СЛУ-Ш – 1 шт.
3. СЛУ-П – 1 шт.
4. СЛУ-К – 1 шт.
5. СЛУ2 – 1 шт.
6. СЛУ-У – 1 шт.
7. СЛУ-Т – 1 шт.
8. СЛУ-В – 1 шт.

Стол� разборные, в вариантах исполнения:

1. СЛУ-Ш-СБ – 1 шт.

в составе:

Металлическая опора стола левая	– 1 шт.
Металлическая опора стола правая	– 1 шт.
Металлическая царга	– 1 шт.
Траверса	– 2 шт.
Столешница	– 1 шт.
Опора регулируемая М10*60	– 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	– 6 шт.
Гайка М10 DIN 934	– 4 шт.
Шуруп Li 4x19	– 10 шт.
Болт мебельный М10x35 DIN 912	– 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	– 8 шт.
Пластиковый профиль	– 2 шт.

2. СЛУ-Ш-СБ-Д – 1 шт.

в составе:

Металлическая опора стола левая	– 1 шт.
Металлическая опора стола правая	– 1 шт.
Металлическая царга	– 1 шт.
Траверса	– 2 шт.
Столешница	– 1 шт.
Тумба подвесная Д	– 1 шт.
Полка съемная	– 1 шт.
Опора регулируемая М10*60	– 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	– 6 шт.
Гайка М10 DIN 934	– 4 шт.
Шуруп Li 4x19	– 10 шт.
Болт мебельный М10x35 DIN 912	– 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	– 8 шт.
Пластиковый профиль	– 2 шт.

Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d – 1 шт.
 Винт М4х22 мм – 2 шт.
 Полкодержатель 5/16 металлический – 4 шт.

3. СЛУ-Ш-СБ-ОД – 1 шт.

в составе:

Металлическая опора стола левая – 1 шт.
 Металлическая опора стола правая – 1 шт.
 Металлическая царга – 1 шт.
 Траверса – 2 шт.
 Столешница – 1 шт.
 Тумба подвесная ОД – 1 шт.
 Полка съемная – 1 шт.
 Опора регулируемая М10*60 – 4 шт.
 Заглушка для профиля 30*60 серая – 6 шт.
 Гайка М10 DIN 934 – 4 шт.
 Шуруп Li 4х19 – 10 шт.
 Болт мебельный М10х35 DIN 912 – 4 шт.
 Винт установочный, DIN 914 – 8 шт.
 Пластиковый профиль – 2 шт.
 Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d – 1 шт.
 Винт М4х22 мм – 2 шт.
 Полкодержатель 5/16 металлический – 4 шт.

4. СЛУ-Ш-СБ-ДЯ – 1 шт.

в составе:

Металлическая опора стола левая – 1 шт.
 Металлическая опора стола правая – 1 шт.
 Металлическая царга – 1 шт.
 Траверса – 2 шт.
 Столешница – 1 шт.
 Тумба подвесная ДЯ – 1 шт.
 Полка съемная – 1 шт.
 Опора регулируемая М10*60 – 4 шт.
 Заглушка для профиля 30*60 серая – 6 шт.
 Гайка М10 DIN 934 – 4 шт.
 Шуруп Li 4х19 – 10 шт.
 Болт мебельный М10х35 DIN 912 – 4 шт.
 Винт установочный, DIN 914 – 8 шт.
 Пластиковый профиль – 2 шт.
 Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d – 2 шт.
 Винт М4х22 мм – 2 шт.
 Винт М4х35 мм – 2 шт.
 Полкодержатель 5/16 металлический – 4 шт.

5. СЛУ-Ш-СБ-ОЯЗ – 1 шт.

в составе:

Металлическая опора стола левая – 1 шт.
 Металлическая опора стола правая – 1 шт.
 Металлическая царга – 1 шт.
 Траверса – 2 шт.
 Столешница – 1 шт.
 Тумба подвесная ОЯЗ – 1 шт.
 Опора регулируемая М10*60 – 4 шт.
 Заглушка для профиля 30*60 серая – 6 шт.
 Гайка М10 DIN 934 – 4 шт.
 Шуруп Li 4х19 – 10 шт.
 Болт мебельный М10х35 DIN 912 – 4 шт.
 Винт установочный, DIN 914 – 8 шт.
 Пластиковый профиль – 2 шт.
 Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d – 3 шт.

Винт М4х35 мм – 6 шт.

6. СЛУ-Ш-СБ-Я2 – 1 шт.

в составе:

Металлическая опора стола левая	– 1 шт.
Металлическая опора стола правая	– 1 шт.
Металлическая царга	– 1 шт.
Траверса	– 2 шт.
Столешница	– 1 шт.
Тумба подвесная Я2	– 1 шт.
Опора регулируемая М10*60	– 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	– 6 шт.
Гайка М10 DIN 934	– 4 шт.
Шуруп Li 4x19	– 10 шт.
Болт мебельный М10х35 DIN 912	– 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	– 8 шт.
Пластиковый профиль	– 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	– 2 шт.
Винт М4х35 мм	– 4 шт.

7. СЛУ-Ш-СБ-Я3 – 1 шт.

в составе:

Металлическая опора стола левая	– 1 шт.
Металлическая опора стола правая	– 1 шт.
Металлическая царга	– 1 шт.
Траверса	– 2 шт.
Столешница	– 1 шт.
Тумба подвесная Я3	– 1 шт.
Опора регулируемая М10*60	– 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	– 6 шт.
Гайка М10 DIN 934	– 4 шт.
Шуруп Li 4x19	– 10 шт.
Болт мебельный М10х35 DIN 912	– 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	– 8 шт.
Пластиковый профиль	– 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	– 3 шт.
Винт М4х35 мм	– 6 шт.

8. СЛУ-Ш-СБ-Я4 – 1 шт.

в составе:

Металлическая опора стола левая	– 1 шт.
Металлическая опора стола правая	– 1 шт.
Металлическая царга	– 1 шт.
Траверса	– 2 шт.
Столешница	– 1 шт.
Тумба подвесная Я4	– 1 шт.
Опора регулируемая М10*60	– 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	– 6 шт.
Гайка М10 DIN 934	– 4 шт.
Шуруп Li 4x19	– 10 шт.
Болт мебельный М10х35 DIN 912	– 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	– 8 шт.
Пластиковый профиль	– 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	– 4 шт.
Винт М4х35 мм	– 8 шт.

9. СЛУ-Ш-СБ-ТСБ – 1 шт.

в составе:

Металлическая опора стола левая	– 1 шт.
Металлическая опора стола правая	– 1 шт.
Металлическая царга	– 1 шт.

Траверса	– 2 шт.
Столешница	– 1 шт.
Тумба подвесная ТСБ	– 1 шт.
Опора регулируемая М10*60	– 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	– 6 шт.
Гайка М10 DIN 934	– 4 шт.
Шуруп Li 4x19	– 10 шт.
Болт мебельный М10х35 DIN 912	– 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	– 8 шт.
Пластиковый профиль	– 2 шт.

Столешницы на опорах, в вариантах исполнения:

1. СМЛ – 1 шт.
2. СМЛ-Б – 1 шт.
3. СМЛ-2 – 1 шт.
4. СМЛ-2-Б – 1 шт.
5. СМЛ01-У – 1 шт.
6. СМЛ1-У-Б – 1 шт.

Тумбы подкатные, в вариантах исполнения:

1. СТП1 – 1 шт.
2. СТП1-О – 1 шт.
3. СТП1-Я – 1 шт.
4. СТПЯЗ-О – 1 шт.
5. СТПЯ2 – 1 шт.
6. СТПЯЗ – 1 шт.
7. СТПЯ4 – 1 шт.
8. СТП2-О – 1 шт.
9. СТП2-Я – 1 шт.
10. СТП2 – 1 шт.
11. СТП2-ЗЯ – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели для лаборатории №1 – 1 шт.

Принадлежности для набора мебели для лаборатории №1

1. надстройка одноярусная – НСТ – 1 шт.
2. надстройка двухъярусная – НСТ2 – 1 шт.
3. подставка под системный блок – ПСБ – 1 шт.
4. подставка под монитор – ПМ – 1 шт.
5. выдвижная полка под клавиатуру – ВПК – 1 шт.
6. надстройка титровальная – НСТ-ТИ – 1 шт.
7. надстройка рамная – НСТ-Р – 1 шт.

II. Набор медицинской мебели для лаборатории № 2 в составе:

Столешницы однотумбовые, в вариантах исполнения

1. СМЛ-01-Д – 1 шт.
2. СМЛ1-Д – 1 шт.
3. СМЛ-01-ОД – 1 шт.
4. СМЛ1-ОД – 1 шт.
5. СМЛ-01-ДЯ – 1 шт.
6. СМЛ1-ДЯ – 1 шт.
7. СМЛ-01-ОЯЗ – 1 шт.
8. СМЛ1-ОЯЗ – 1 шт.
9. СМЛ-01-Я2 – 1 шт.
10. СМЛ1-Я2 – 1 шт.

11. СМЛ-01-Я3 – 1 шт.
12. СМЛ1-Я3 – 1 шт.
13. СМЛ-01-Я4 – 1 шт.
14. СМЛ1-Я4 – 1 шт.
15. СМЛ1-ТСБ – 1 шт.

Столы одностумбовые для работы за микроскопом, в вариантах исполнения

1. СМЛ-01-М-Д-ВП – 1 шт.
2. СМЛ1-М-Я4 – 1 шт.
3. СМЛ1-М-ДЯ – 1 шт.
4. СМЛ1-М-Д-ВП – 1 шт.
5. СМЛ-01-М-Я4-ВП – 1 шт.
6. СМЛ1-М-Я4-ВП – 1 шт.

Столы двухстумбовые, в вариантах исполнения:

1. СМЛ-02-Д2 – 1 шт.
2. СМЛ2-Д2 – 1 шт.
3. СМЛ-02-Д2Я2 – 1 шт.
4. СМЛ2-Д2Я2 – 1 шт.
5. СМЛ-02-ДЯ4 – 1 шт.
6. СМЛ2-ДЯ4 – 1 шт.
7. СМЛ-02-ОД2 – 1 шт.
8. СМЛ2-ОД2 – 1 шт.
9. СМЛ-02-ОЯ3 – 1 шт.
10. СМЛ2-ОЯ3 – 1 шт.
11. СМЛ-02-Я2 – 1 шт.
12. СМЛ2-Я2 – 1 шт.
13. СМЛ-02-Я3 – 1 шт.
14. СМЛ2-Я3 – 1 шт.
15. СМЛ-02-Я4 – 1 шт.
16. СМЛ2-Я4 – 1 шт.

Столы двухстумбовые для работы за микроскопом, в вариантах исполнения:

1. СМЛ2-ЦЯ5 – 1 шт.
2. СМЛ2-ЦД2 – 1 шт.

Столы трехстумбовые, в вариантах исполнения:

1. СМЛ3-Д3 – 1 шт.
2. СМЛ3-Д2Я4 – 1 шт.
3. СМЛ3-ДЯ3 – 1 шт.
4. СМЛ3-ОД3 – 1 шт.
5. СМЛ3-ОД2ОЯ3 – 1 шт.
6. СМЛ3-ОЯ9 – 1 шт.
7. СМЛ3-Я6 – 1 шт.
8. СМЛ3-Я9 – 1 шт.
9. СМЛ3-Я12 – 1 шт.

Столы угловые, в вариантах исполнения:

1. СМЛ1-У – 1 шт.
2. СМЛ2-У – 1 шт.

Шкафы для хранения лабораторной посуды, в вариантах исполнения:

1. ШСО – 1 шт.

2. ШМЛ1С-Я – 1 шт.
3. ШМЛ1С – 1 шт.
4. ШСО-Д – 1 шт.
5. ШМЛ1С-5Я – 1 шт.
6. ШСО2 – 1 шт.
7. ШМЛ2С-2Я – 1 шт.
8. ШМЛ2С – 1 шт.
9. ШСО-2Д – 1 шт.
10. ШМЛ2С-5Я – 1 шт.

Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов, в вариантах исполнения:

1. ШМЛ1 – 1 шт.
2. ШМЛ1-2Д – 1 шт.
3. ШМЛ1-Я – 1 шт.
4. ШМЛ1-5Я – 1 шт.
5. ШМЛ2 – 1 шт.
6. ШМЛ2-2Д – 1 шт.
7. ШМЛ2-2Я – 1 шт.
8. ШМЛ2-5Я – 1 шт.

Тумбы, в вариантах исполнения:

1. СТО1 – 1 шт.
2. СТО1-ОТ – 1 шт.
3. СТО1-О – 1 шт.
4. СТО1-Я – 1 шт.
5. СТОЯ3-О – 1 шт.
6. СТОЯ2 – 1 шт.
7. СТОЯ3 – 1 шт.
8. СТОЯ4 – 1 шт.
9. СТОЯ5 – 1 шт.
10. СТО2 – 1 шт.
11. СТО2-О – 1 шт.
12. СТО2-Я – 1 шт.
13. СТО2-ДЯ – 1 шт.
14. СТО2-ДЯ3 – 1 шт.
15. СТО2-ДЯ4 – 1 шт.

Тумбы с мойкой (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. СМЛ-Н-1Р-С – 1 шт.
2. СМЛ-Н-2Р-С – 1 шт.
3. СМЛ-В-1Р-С – 1 шт.
4. СМЛ-В-2Р-С – 1 шт.

Шкаф навесной (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. ШМД-О – 1 шт.
2. ШМД1 – 1 шт.
3. ШМД1С – 1 шт.
4. ШМД2-О – 1 шт.
5. ШМД2 – 1 шт.
6. ШМД2С – 1 шт.
7. ШМД1-У – 1 шт.
8. ШМД1С-У – 1 шт.

Шкафы антресольные (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. ШАС1 – 1 шт.
2. ШАС2 – 1 шт.

3. ШАС1С – 1 шт.
4. ШАС2С – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели для лаборатории №2 – 1 шт.

Принадлежности для набора мебели для лаборатории №2

1. надстройка одноярусная – НСТ – 1 шт.
2. надстройка двухярусная – НСТ2 – 1 шт.
3. подставка под системный блок – ПСБ – 1 шт.
4. подставка под монитор – ПМ – 1 шт.
5. выдвижная полка под клавиатуру – ВПК – 1 шт.
6. надстройка титровальная – НСТ-ТИ – 1 шт.
7. надстройка рамная – НСТ-Р – 1 шт.
8. сушитель для лабораторной посуды навесной – НСЛП – 1 шт.

III. Набор медицинской мебели для гистологического архива, в составе:

Шкафы архивные для гистологического материала, в вариантах исполнения:

1. ШХС – 1 шт.
2. ШХБ – 1 шт.

Шкафы с ISO корзинами для гистологического материала, в вариантах исполнения:

1. ШМЛ1-ISO – 1 шт.
2. ШМЛ2-ISO – 1 шт.
3. ШМЛ2-2Д-ISO – 1 шт.

Шкафы антресольные, в вариантах исполнения:

1. ШАС1 – 1 шт.
2. ШАС2 – 1 шт.
3. ШАС1С – 1 шт.
4. ШАС2С – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели для гистологического архива – 1 шт.

IV. Набор медицинской мебели для кабинета врача, в составе:

Столы одностумбовые, в вариантах исполнения:

1. СМЛ1-ОЯ3 – 1 шт.
2. СМЛ1-Я4 – 1 шт.

Столы двухстумбовые, в вариантах исполнения:

1. СМЛ2-ОЯ3 – 1 шт.
2. СМЛ2-Я3 – 1 шт.

Столы угловые, в вариантах исполнения:

1. СМЛ1-У – 1 шт.
2. СМЛ2-У – 1 шт.

Столы на опорах, в вариантах исполнения:

1. СМЛ01-У – 1 шт.
2. СМЛ1-У-Б – 1 шт.

Столы пеленальные (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. СП-1 – 1 шт.
2. СП-2 – 1 шт.

Тумбы, в вариантах исполнения:

1. СТО1 – 1 шт.
2. СТО1-О – 1 шт.
3. СТОЯ2 – 1 шт.
4. СТОЯ3 – 1 шт.
5. СТОЯ4 – 1 шт.
6. СТОЯ5 – 1 шт.
7. СТО2 – 1 шт.
8. СТО2-ДЯ3 – 1 шт.
9. СТО2-ДЯ4 – 1 шт.

Тумбы с мойкой (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. СМЛ-Н-1Р-С – 1 шт.
2. СМЛ-Н-2Р-С – 1 шт.
3. СМЛ-В-1Р-С – 1 шт.
4. СМЛ-В-2Р-С – 1 шт.

Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов, в вариантах исполнения:

1. ШМЛ1-2Д – 1 шт.
2. ШМЛ2-2Д – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели для кабинета врача – 1 шт.

Принадлежности для набора мебели для кабинета врача

1. подставка под системный блок – ПСБ – 1 шт.
2. подставка под монитор – ПМ – 1 шт.
3. выдвижная полка под клавиатуру – ВПК – 1 шт.

V. Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов и ординаторских в составе:

Столы однотумбовые, в вариантах исполнения:

1. СМЛ-01-Д – 1 шт.
2. СМЛ1-Д – 1 шт.
3. СМЛ-01-ОД – 1 шт.
4. СМЛ1-ОД – 1 шт.
5. СМЛ-01-ДЯ – 1 шт.
6. СМЛ1-ДЯ – 1 шт.
7. СМЛ-01-ОЯ3 – 1 шт.
8. СМЛ1-ОЯ3 – 1 шт.
9. СМЛ-01-Я2 – 1 шт.
10. СМЛ1-Я2 – 1 шт.
11. СМЛ-01-Я3 – 1 шт.
12. СМЛ1-Я3 – 1 шт.
13. СМЛ-01-Я4 – 1 шт.

14. СМЛ1-Я4 – 1 шт.
15. СМЛ1-ТСБ – 1 шт.

Столешницы двухтумбовые, в вариантах исполнения:

1. СМЛ2-Д2 – 1 шт.
2. СМЛ2-Д2 – 1 шт.
3. СМЛ2-Д2Я2 – 1 шт.
4. СМЛ2-Д2Я2 – 1 шт.
5. СМЛ2-Д2Я4 – 1 шт.
6. СМЛ2-Д2Я4 – 1 шт.
7. СМЛ2-ОД2 – 1 шт.
8. СМЛ2-ОД2 – 1 шт.
9. СМЛ2-ОД3 – 1 шт.
10. СМЛ2-ОД3 – 1 шт.
11. СМЛ2-Я2 – 1 шт.
12. СМЛ2-Я2 – 1 шт.
13. СМЛ2-Я3 – 1 шт.
14. СМЛ2-Я3 – 1 шт.
15. СМЛ2-Я4 – 1 шт.
16. СМЛ2-Я4 – 1 шт.

Столешницы трехтумбовые, в вариантах исполнения:

1. СМЛ3-Д3 – 1 шт.
2. СМЛ3-Д2Я4 – 1 шт.
3. СМЛ3-Д2Я3 – 1 шт.
4. СМЛ3-ОД3 – 1 шт.
5. СМЛ3-ОД2ОД3 – 1 шт.
6. СМЛ3-ОД3 – 1 шт.
7. СМЛ3-Я6 – 1 шт.
8. СМЛ3-Я9 – 1 шт.
9. СМЛ3-Я12 – 1 шт.

Тумбы, в вариантах исполнения:

1. СТО1 – 1 шт.
2. СТО1-Я – 1 шт.
3. СТОЯ2 – 1 шт.
4. СТОЯ3 – 1 шт.
5. СТОЯ4 – 1 шт.
6. СТОЯ5 – 1 шт.
7. СТО2 – 1 шт.
8. СТО2-Я – 1 шт.
9. СТО2-ДЯ – 1 шт.
10. СТО2-ДЯ3 – 1 шт.
11. СТО2-ДЯ4 – 1 шт.

Тумба с мойкой (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. СМЛ-Н-1Р-С – 1 шт.
2. СМЛ-Н-2Р-С – 1 шт.
3. СМЛ-В-1Р-С – 1 шт.
4. СМЛ-В-2Р-С – 1 шт.

Шкафы навесные (при необходимости), в вариантах исполнения:

1. ШМД-О – 1 шт.
2. ШМД1 – 1 шт.
3. ШМД1С – 1 шт.

4. ШМД2-О – 1 шт.
5. ШМД2 – 1 шт.
6. ШМД2С – 1 шт.
7. ШМД1-У – 1 шт.
8. ШМД1С-У – 1 шт.

Шкафы антресольные, в вариантах исполнения:

1. ШАС1 – 1 шт.
2. ШАС2 – 1 шт.
3. ШАС1С – 1 шт.
4. ШАС2С – 1 шт.

Шкафы для хранения лабораторной посуды, в вариантах исполнения:

1. ШМЛ1С-Я – 1 шт.
2. ШСО-Д – 1 шт.
3. ШМЛ1С-5Я – 1 шт.
4. ШМЛ2С-2Я – 1 шт.
5. ШСО-2Д – 1 шт.

Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов, в вариантах исполнения:

1. ШМЛ1 – 1 шт.
2. ШМЛ1-2Д – 1 шт.
3. ШМЛ2 – 1 шт.
4. ШМЛ2-2Д – 1 шт.

Тумба накатная для транспортировки лекарственных препаратов (при необходимости)

1. Т-ЛП – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели для процедурных кабинетов и ординаторских – 1 шт.

Принадлежности для набора мебели для процедурных кабинетов и ординаторских

1. надстройка одноярусная – НСТ – 1 шт.
2. надстройка двухярусная – НСТ2 – 1 шт.
3. подставка под системный блок – ПСБ – 1 шт.
4. подставка под монитор – ПМ – 1 шт.
5. выдвижная полка под клавиатуру – ВПК – 1 шт.

Далее по тексту допускается использование следующих наименований – мебель, мебель медицинская, мебельное изделие

2. Производитель

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БиоМебель»

Сокращенное наименование: ООО «БиоМебель»

Юридический и Фактический адрес: 197229, город Санкт-Петербург, улица 3-я Конная Лахта, дом 48, корпус 4, литер А

Телефон/факс:

+7 (812) 320-49-49

E-mail:

biomebel@biomebel.com

3. Функциональное назначение

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов или проведения медицинских процедур и осмотров, или лабораторных исследований. Мебельные изделия имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств..

Внешний вид типовых мебельных изделий представлен в Приложении А.

Функциональное назначение изделий, комплектующих наборы медицинской мебели, указано в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение исполнения	Функциональное назначение
Набор медицинской мебели для лаборатории №1	Столы рамные	
	СЛР	Столы рамные предназначены для оборудования медицинских лабораторий, служат для размещения на них медицинского оборудования, инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СЛР-П	
	СЛР-Ж	
	СЛР-К	
	СЛР-Т	
	СЛР2	
	СЛР-У	
	СЛР-А	
	Столы усиленные	
	СЛУ	Столы усиленные предназначены для оборудования медицинских лабораторий, служат для размещения на них медицинского оборудования, инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Рама стола усилена для выдерживания высокой нагрузки. Имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СЛУ-Ш	
	СЛУ-П	
	СЛУ-К	
	СЛУ2	
	СЛУ-У	
	СЛУ-Т	
	СЛУ-В	
	Столы разборные	
	СЛУ-Ш-СБ	Столы разборные предназначены для оборудования медицинских лабораторий, служат для размещения на них медицинского оборудования, инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Сборно-разборная конструкция стола позволяет оперативно переместить стол в другое помещение при перепрофилировании лаборатории. Имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СЛУ-Ш-СБ-Д	
	СЛУ-Ш-СБ-ОД	
	СЛУ-Ш-СБ-ДЯ	
	СЛУ-Ш-СБ-ОЯЗ	
	СЛУ-Ш-СБ-Я2	
	СЛУ-Ш-СБ-Я3	
	СЛУ-Ш-СБ-Я4	
	СЛУ-Ш-СБ-ТСБ	
	Столы на опорах	
	СМЛ	Столы на опорах предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Имеют прочные покрытия поверхностей, устойчивые к воздействию реактивов, применяемых в практике лабораторий, и дезинфицирующих средств при их систематическом применении.
	СМЛ-Б	
	СМЛ-2	
	СМЛ-2-Б	
	СМЛ01-У	
	СМЛ1-У-Б	

Наименование	Обозначение исполнения	Функциональное назначение
	Тумбы подкатные	
	СТП1	Тумбы подкатные предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов для размещения под столами с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СТП1-О	
	СТП1-Я	
	СТПЯ3-О	
	СТПЯ2	
	СТПЯ3	
	СТПЯ4	
	СТП12-О	
	СТП12-Я	
	СТП2	
	СТП2-3Я	
	Принадлежности для набора мебели для лаборатории №1	
	надстройка одноярусная – НСТ	Надстройка одноярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
	надстройка двухярусная – НСТ2	Надстройка двухярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
	подставка под системный блок – ПСБ	Подставка под системный блок служит для размещения системного блока компьютера, входящего в состав лабораторного и медицинского оборудования. Не препятствует проведению дезинфекции помещения.
	подставка под монитор – ПМ	Подставка под монитор, входящий в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения монитора на рабочем столе. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.
выдвижная полка под клавиатуру – ВПК	Выдвижная полка под клавиатуру, входящую в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения клавиатуры в рабочей зоне стола. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.	
надстройка титровальная – НСТ-ТИ	Надстройка титровальная предназначена для установки на столы, служит для размещения пипеток и бюрок для проведения медицинских исследований в лаборатории.	
надстройка рамная – НСТ-Р	Надстройка рамная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.	
Набор медицинской мебели для лаборатории №2	Столы однотумбовые	
	СМЛ1-01-Д	Столы однотумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СМЛ1-Д	
	СМЛ1-01-ОД	
	СМЛ1-ОД	
	СМЛ1-01-ДЯ	
	СМЛ1-ДЯ	
	СМЛ1-01-ОЯ3	
	СМЛ1-ОЯ3	
	СМЛ1-01-Я2	
	СМЛ1-Я2	
	СМЛ1-01-Я3	
	СМЛ1-Я3	
	СМЛ1-01-Я4	
	СМЛ1-Я4	
	СМЛ1-ТСБ	
	Столы однотумбовые для работы за микроскопом	
	СМЛ1-01-М-Д-ВП	Столы однотумбовые для работы за микроскопом предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения медицинских препаратов, медицинского оборудования и инструментов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СМЛ1-М-Я4	
	СМЛ1-М-ДЯ	
	СМЛ1-М-Д-ВП	
	СМЛ1-01-М-Я4-ВП	
	СМЛ1-М-Я4-ВП	
Столы двухтумбовые		
СМЛ1-02-Д2		

Наименование	Обозначение исполнения	Функциональное назначение
	СМЛ2-Д2 СМЛ2-Д2Я2 СМЛ2-Д2Я2 СМЛ2-ДЯ4 СМЛ2-ДЯ4 СМЛ2-ОД2 СМЛ2-ОД2 СМЛ2-ОЯ3 СМЛ2-ОЯ3 СМЛ2-Я2 СМЛ2-Я2 СМЛ2-Я3 СМЛ2-Я3 СМЛ2-Я4 СМЛ2-Я4	Столы двухтумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
Столы двухтумбовые для работы за микроскопом		
	СМЛ2-ЦЯ5 СМЛ2-ЦД2	Столы двухтумбовые для работы за микроскопом предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения медицинских препаратов, медицинского оборудования и инструментов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
Столы трехтумбовые		
	СМЛ3-Д3 СМЛ3-Д2Я4 СМЛ3-ДЯ3 СМЛ3-ОД3 СМЛ3-ОД2ОЯ3 СМЛ3-ОЯ9 СМЛ3-Я6 СМЛ3-Я9 СМЛ3-Я12	Столы трехтумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения медицинских препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
Столы угловые		
	СМЛ1-У СМЛ2-У	Столы угловые предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
Шкафы для хранения лабораторной посуды		
	ШСО ШМЛ1С-Я ШМЛ1С ШСО-Д ШМЛ1С-5Я ШСО2 ШМЛ2С-2Я ШМЛ2С ШСО-2Д ШМЛ2С-5Я	Шкафы предназначены для упорядоченного хранения медицинских изделий, расходных материалов и лабораторной посуды. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов		
	ШМЛ1 ШМЛ1-2Д ШМЛ1-Я ШМЛ1-5Я ШМЛ2 ШМЛ2-2Д ШМЛ2-2Я ШМЛ2-5Я	Шкафы предназначены для хранения реактивов, диагностических реагентов, расходных материалов, лекарственных средств и медицинских изделий. Обеспечивают защиту от солнечных лучей и ограничивают доступ к содержимому с помощью встроенных замков. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
Тумбы		
	СТО1 СТО1-ОТ СТО1-О СТО1-Я СТОЯ3-О	Тумбы предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов. Изготовлены из прочных материалов.

Наименование	Обозначение исполнения	Функциональное назначение
	СТОЯ2	устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СТОЯ3	
	СТОЯ4	
	СТОЯ5	
	СТО2	
	СТО2-О	
	СТО2-Я	
	СТО2-ДЯ	
	СТО2-ДЯ3	
	СТО2-ДЯ4	
	Тумбы с мойкой (при необходимости)	
	СМЛ-Н-1Р-С	Тумбы с мойкой предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов для создания мест для мытья лабораторной посуды, изготовлены из прочных влагозащищенных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СМЛ-Н-2Р-С	
	СМЛ-В-1Р-С	
	СМЛ-В-2Р-С	
	Шкафы навесные (при необходимости)	
	ШМД-О	Шкафы навесные предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	ШМД1	
	ШМД1С	
	ШМД2-О	
	ШМД2	
	ШМД2С	
	ШМД1-У	
	ШМД1С-У	
	Шкафы антресольные (при необходимости)	
	ШАС1	Шкафы антресольные предназначены для хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	ШАС2	
	ШАС1С	
	ШАС2С	
Принадлежности для набора мебели для лаборатории №2		
надстройка одноярусная – НСТ	Надстройка одноярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.	
надстройка двухярусная – НСТ2	Надстройка двухярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.	
подставка под системный блок – ПСБ	Подставка под системный блок служит для размещения системного блока компьютера, входящего в состав лабораторного и медицинского оборудования. Не препятствует проведению дезинфекции помещения.	
подставка под монитор – ПМ	Подставка под монитор, входящий в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения монитора на рабочем столе. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.	
выдвижная полка под клавиатуру – ВПК	Выдвижная полка под клавиатуру, входящую в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения клавиатуры в рабочей зоне стола. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.	
надстройка титровальная – ПСТ-ТИ	Надстройка титровальная предназначена для установки на столы, служит для размещения пипеток и бюреток для проведения медицинских исследований в лаборатории	
надстройка рамная – НСТ-Р	Надстройка рамная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов	
сушитель для лабораторной посуды навесной – НСЛП – 1 шт.	Сушитель для лабораторной посуды навесной служит для сушки лабораторной посуды после мытья.	
Набор медицинской мебели для гистологического архива	Шкафы архивные для гистологического материала	
	ШХС	Шкафы архивные для гистологического материала предназначены для упорядоченного хранения парафиновых блоков с образцами тканей и
	ШХБ	

Наименование	Обозначение исполнения	Функциональное назначение
		срезов образцов, заключенных на предметных стеклах. Ящики шкафов имеют вкладыши с ячейками для хранения соответствующих материалов в картотечном порядке. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	Шкафы с ISO корзинами для гистологического материала	
	ШМЛ1-ISO	Шкафы с ISO корзинами для гистологического материала предназначены для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью размещения и хранения гистологического материала. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	ШМЛ2-ISO	
	ШМЛ2-2Д-ISO	
	Шкафы антресольные	
	ШАС1	Шкафы антресольные предназначены для хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	ШАС2	
	ШАС1С	
	ШАС2С	
Набор медицинской мебели для кабинета врача	Столы одностумбовые	
	СМЛ1-ОЯЗ	Столы одностумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СМЛ1-Я4	
	Столы двухтумбовые	
	СМЛ2-ОЯЗ	Столы двухтумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СМЛ2-ЯЗ	
	Столы угловые	
	СМЛ1-У	Столы угловые предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств
	СМЛ2-У	
	Столы на опорах	
	СМЛ101-У	Столы на опорах предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Имеют прочные покрытия поверхностей, устойчивые к воздействию реактивов, применяемых в практике лабораторий, и дезинфицирующих средств при их систематическом применении.
	СМЛ1-У-Б	
	Столы пеленальные (при необходимости)	
	СП-1	Стол пеленальный предназначен для проведения терапевтического осмотра новорожденных и детей младенческого возраста
	СП-2	
	Тумбы	
	СТО1	Тумбы предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СТО1-О	
	СТОЯ2	
	СТОЯЗ	
	СТОЯ4	
	СТОЯ5	
	СТО2	
	СТО2-ДЯЗ	
	СТО2-ДЯ4	
	Тумбы с мойкой (при необходимости)	
	СМЛ-Н-1Р-С	Тумбы с мойкой предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов для
	СМЛ-Н-2Р-С	

Наименование	Обозначение исполнения	Функциональное назначение
	СМЛ-В-1Р-С	создания мест для мытья лабораторной посуды, изготовлены из прочных влагозащищенных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СМЛ-В-2Р-С	
	Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов	
	ШМЛ1-2Д	Шкафы предназначены для хранения реактивов, диагностических реагентов, расходных материалов, лекарственных средств и медицинских изделий. Обеспечивают защиту от солнечных лучей и ограничивают доступ к содержимому с помощью встроенных замков. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	ШМЛ2-2Д	
	Принадлежности для набора мебели для кабинета врача	
	подставка под системный блок – ПСБ	Подставка под системный блок служит для размещения системного блока компьютера, входящего в состав лабораторного и медицинского оборудования. Не препятствует проведению дезинфекции помещения.
	подставка под монитор – ПМ	Подставка под монитор, входящий в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения монитора на рабочем столе. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.
	выдвижная полка под клавиатуру – ВПК	Выдвижная полка под клавиатуру, входящую в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения клавиатуры в рабочей зоне стола. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.
	Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов и ординаторских	Столы одностумбовые
СМЛ-01-Д		Столы одностумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
СМЛ1-Д		
СМЛ-01-ОД		
СМЛ1-ОД		
СМЛ-01-ДЯ		
СМЛ1-ДЯ		
СМЛ-01-ОЯ3		
СМЛ1-ОЯ3		
СМЛ-01-Я2		
СМЛ1-Я2		
СМЛ-01-Я3		
СМЛ1-Я3		
СМЛ-01-Я4		
СМЛ1-Я4		
СМЛ1-ТСБ		
Столы двухстумбовые		
СМЛ-02-Д2		Столы двухстумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
СМЛ2-Д2		
СМЛ-02-Д2Я2		
СМЛ2-Д2Я2		
СМЛ-02-ДЯ4.		
СМЛ2-ДЯ4.		
СМЛ-02-ОД2.		
СМЛ2-ОД2		
СМЛ-02-ОЯ3		
СМЛ2-ОЯ3.		
СМЛ-02-Я2		
СМЛ2-Я2.		
СМЛ-02-Я3		
СМЛ2-Я3.		
СМЛ-02-Я4.		
СМЛ2-Я4		
Столы трехстумбовые		
СМЛ3-Д3		Столы трехстумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения медицинских препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
СМЛ3-Д2Я4.		
СМЛ3-ДЯ3		
СМЛ3-ОД3		
СМЛ3-ОД2ОЯ3		
СМЛ3-ОЯ9		
СМЛ3-Я6		
СМЛ3-Я9		
СМЛ3-Я12		
Тумбы		

Наименование	Обозначение исполнения	Функциональное назначение
	СТО1	Тумбы предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СТО1-Я	
	СТОЯ2	
	СТОЯ3	
	СТОЯ4	
	СТОЯ5	
	СТО2	
	СТО2-Я	
	СТО2-ДЯ	
	СТО2-ДЯ3	
СТО2-ДЯ4		
Тумба с мойкой (при необходимости)		
	СМЛ-Н-1Р-С	Тумбы с мойкой предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов для создания мест для мытья лабораторной посуды, изготовлены из прочных влагозащищенных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	СМЛ-Н-2Р-С	
	СМЛ-В-1Р-С	
	СМЛ-В-2Р-С	
Шкафы навесные (при необходимости)		
	ШМД-О	Шкафы навесные предназначены для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	ШМД1	
	ШМД1С	
	ШМД2-О	
	ШМД2	
	ШМД2С	
	ШМД1-У	
ШМД1С-У		
Шкафы антресольные		
	ШАС1	Шкафы антресольные предназначены для хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	ШАС2	
	ШАС1С	
	ШАС2С	
Шкафы для хранения лабораторной посуды		
	ШМЛ1С-Я	Шкафы предназначены для упорядоченного хранения медицинских изделий, расходных материалов и лабораторной посуды. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	ШСО-Д	
	ШМЛ1С-5Я	
	ШМЛ2С-2Я	
	ШСО-2Д	
Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов		
	ШМЛ2	Шкафы предназначены для хранения реактивов, диагностических реагентов, расходных материалов, лекарственных средств и медицинских изделий. Обеспечивают защиту от солнечных лучей и ограничивают доступ к содержимому с помощью встроенных замков. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
	ШМЛ2-2Д	
	ШМЛ1	
	ШМЛ1-2Д	
Тумба подкатная для транспортировки лекарственных препаратов (при необходимости)		
	Т-ЛП	Тумба-тележка для транспортировки лекарственных препаратов служит для развоза лекарств пациентам в пределах ЛПУ, имеет запираемые дверцы, оснащена ISO корзинами для размещения лекарств и рабочей поверхностью. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.
Принадлежности для набора мебели для процедурных кабинетов и ординаторских		
	надстройка одноярусная – НСТ	Надстройка одноярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
	надстройка двухярусная – НСТ2	Надстройка двухярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
	подставка под системный блок – ПСБ	Подставка под системный блок служит для размещения системного блока компьютера, входящего в состав лабораторного и медицинского оборудования. Не препятствует проведению дезинфекции помещения.
	подставка под монитор – ПМ	Подставка под монитор, входящий в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения монитора на рабочем столе. Облегчает проведение дезинфекции

Наименование	Обозначение исполнения	Функциональное назначение
	выдвижная полка под клавиатуру – ВПК	поверхности стола. Выдвижная полка под клавиатуру, входящую в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения клавиатуры в рабочей зоне стола. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.

4. Принцип действия видов мебельных изделий, комплектующих наборы медицинской мебели

Функциональное назначение медицинских шкафов (а также тумб, навесных и антресольных шкафов) реализуется посредством наличия в изделиях горизонтальных плоскостей (полок), специальных приспособлений (вкладки, модульные ящики и т.д.) для размещения медицинских изделий, реагентов, расходных материалов, образцов и лекарственных средств и разграничения полезного объема изделий, а также физического ограничения объема полезного пространства стенками изделий. Обеспечение устойчивости к нагрузкам и влиянию вредных и опасных производственных факторов ЛПУ, в том числе, в условиях систематического применения дезинфицирующих средств, реализуется посредством применения специальных материалов изготовления. Ограничение доступа посторонних лиц обеспечивается наличием в ящиках и дверцах изделий замков с комплектами ключей (при необходимости). Подключение электрических приборов обеспечивается (при необходимости) с помощью электрических проводников и соединителей.

Функциональное назначение всех видов столов реализуется посредством наличия рабочей поверхности, прочность, устойчивость и долговечность которой, обеспечивается использованием материалов, устойчивых к воздействию реактивов, применяемых в практике лабораторий, и к систематическому применению дезинфицирующих средств.

5. Риски применения медицинского изделия, показания, противопоказания, ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению;

Мебель медицинская изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, описанных в настоящем руководстве, она обеспечивала:

- механическую безопасность;
- химическую и санитарно-гигиеническую безопасность;

Основные риски при эксплуатации мебели:

1. Падение незакрепленной напольной мебели
2. Защемление от движущихся частей
3. Травмирование от падения мебели при непредназначенном применении

В ходе менеджмента риска проведены мероприятия по уменьшению рисков. Совокупные остаточные риски признаны приемлемыми.

Показания: Не применимо

Противопоказания: Запрещено использование не по назначению.

Возможные побочные действия: отсутствуют при применении по назначению.

6. Технические характеристики

6.1 Габаритные размеры и масса

- 6.1.1 Габаритные размеры мебельных изделий устанавливаются согласно требованиям заказчика, указанным в договоре, и ограничиваются диапазонами, указанными в Таблице 2.
- 6.1.2 Предельные отклонения от установленных габаритных размеров древесных элементов не должны превышать ± 4 мм для габаритных размеров до 2000 мм и ± 5 для габаритных размеров свыше 2000 мм.
- 6.1.3 Зазоры в проемах на сторону не должны превышать:
- 2,0 мм – для дверей (у столов с тумбами, шкафов и аналогичных изделий);
 - 1,5 мм – для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем.
- 6.1.4 Предельные отклонения массы единичного изделия мебели не должны превышать ± 2 кг.

Таблица 2.

№ПП	арт	габаритные размеры*						Масса, кг	
		длина, мм		глубина, мм		высота, мм			
		min	max	min	max	min	max	min	max
Шкафы для хранения лабораторной посуды									
1.	ШСО	300	600	300	650	1600	2400	21	83
2.	ШМЛ1С-Я	300	600	300	650	1600	2400	30	107
3.	ШМЛ1С	300	600	300	650	1600	2400	27	80
4.	ШСО-Д	300	600	300	650	1600	2400	25	75
5.	ШМЛ1С-5Я	300	600	300	650	1600	2400	39	115
6.	ШСО2	600	1200	300	650	1600	2400	31	147
7.	ШМЛ2С-2Я	600	1200	300	650	1600	2400	53	196
8.	ШМЛ2С	600	1200	300	650	1600	2400	48	186
9.	ШСО-2Д	600	1200	300	650	1600	2400	35	86
10.	ШМЛ2С-5Я	600	1200	300	650	1600	2400	65	203
Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов									
11.	ШМЛ1	300	600	300	650	1600	2400	26	78
12.	ШМЛ1-2Д	300	600	300	650	1600	2400	26,5	78,5
13.	ШМЛ1-Я	300	600	300	650	1600	2400	29	105
14.	ШМЛ1-5Я	300	600	300	650	1600	2400	38	114
15.	ШМЛ2	600	1200	300	650	1600	2400	45	182
16.	ШМЛ2-2Д	600	1200	300	650	1600	2400	47	184
17.	ШМЛ2-2Я	600	1200	300	650	1600	2400	51	193
18.	ШМЛ2-5Я	600	1200	300	650	1600	2400	63	200
Шкафы для ISO корзин									
19.	ШМЛ1-ISO	450	—	650	—	1600	2400	45	64
20.	ШМЛ2-ISO	450	—	650	—	1600	2400	46	65
21.	ШМЛ2-2Д-ISO	450	—	650	—	1600	2400	46	65
Шкафы архивные для гистологического материала									
22.	ШХС	650	1300	595	—	1520	1940	180	380
23.	ШХБ	650	1300	595	—	1520	1940	205	440
Столы									

№ПП	арт	габаритные размеры*						Масса, кг	
		длина, мм		глубина, мм		высота, мм			
		min	max	min	max	min	max	min	max
Столы на опорах									
24.	СМЛ	500	1800	500	1200	500	1100	11	75
25.	СМЛ-Б	500	1800	500	1200	500	1100	16	98
26.	СМЛ-2	1500	3000	500	1200	500	1100	45	106
27.	СМЛ-2-Б	1500	3000	500	1200	500	1100	62	147
28.	СМЛ01-У	400	3000	500	3000	750	1100	25	150
29.	СМЛ1-У-Б	400	3000	500	3000	750	1100	35	210
Столы одностумбовые									
30.	СМЛ-01-Д	800	1800	500	1000	750	1100	29	99
31.	СМЛ1-Д	800	1800	500	1000	750	1100	35	155
32.	СМЛ-01-ОД	800	1800	500	1000	750	1100	42	103
33.	СМЛ1-ОД	800	1800	500	1000	750	1100	46	117
34.	СМЛ-01-ДЯ	800	1800	500	1000	750	1100	33	103
35.	СМЛ1-ДЯ	800	1800	500	1000	750	1100	48	118
36.	СМЛ-01-ОЯЗ	800	1800	500	1000	750	1100	38	108
37.	СМЛ1-ОЯЗ	800	1800	500	1000	750	1100	53	123
38.	СМЛ-01-Я2	800	1800	500	1000	750	1100	36	106
39.	СМЛ1-Я2	800	1800	500	1000	750	1100	51	119
40.	СМЛ-01-ЯЗ	800	1800	500	1000	750	1100	37	107
41.	СМЛ1-ЯЗ	800	1800	500	1000	750	1100	52	122
42.	СМЛ-01-Я4	800	1800	500	1000	750	1100	42	112
43.	СМЛ1-Я4	800	1800	500	1000	750	1100	57	129
44.	СМЛ1-ТСБ	800	1800	500	1000	750	1100	34	105
Столы двухтумбовые									
45.	СМЛ-02-Д2	1400	1800	500	1000	750	1100	52	122
46.	СМЛ2-Д2	1400	1800	500	1000	750	1100	56	125
47.	СМЛ-02-Д2Я2	1400	1800	500	1000	750	1100	79	129
48.	СМЛ2-Д2Я2	1400	1800	500	1000	750	1100	82	140
49.	СМЛ-02-ДЯ4	1400	1800	500	1000	750	1100	63	132
50.	СМЛ2-ДЯ4	1400	1800	500	1000	750	1100	88	142
51.	СМЛ-02-ОД2	1400	1800	500	1000	750	1100	75	128
52.	СМЛ2-ОД2	1400	1800	500	1000	750	1100	78	139
53.	СМЛ-02-ОЯЗ	1400	1800	500	1000	750	1100	71	123
54.	СМЛ2-ОЯЗ	1400	1800	500	1000	750	1100	74	133
55.	СМЛ-02-Я2	1400	1800	500	1000	750	1100	70	121
56.	СМЛ2-Я2	1400	1800	500	1000	750	1100	74	132
57.	СМЛ-02-ЯЗ	1400	1800	500	1000	750	1100	72	124
58.	СМЛ2-ЯЗ	1400	1800	500	1000	750	1100	73	125
59.	СМЛ-02-Я4	1400	1800	500	1000	750	1100	75	135
60.	СМЛ2-Я4	1400	1800	500	1000	750	1100	79	141
Столы трехтумбовые									
61.	СМЛЗ-ДЗ	2400	4000	500	1000	750	1100	91	238
62.	СМЛЗ-Д2Я4	2400	4000	500	1000	750	1100	98	245

№ПП	арт	габаритные размеры*						Масса, кг	
		длина, мм		глубина, мм		высота, мм			
		min	max	min	max	min	max	min	max
63.	СМЛЗ-ДЯЗ	2400	4000	500	1000	750	1100	125	252
64.	СМЛЗ-ОДЗ	2400	4000	500	1000	750	1100	123	248
65.	СМЛЗ-ОД2ОЯЗ	2400	4000	500	1000	750	1100	128	256
66.	СМЛЗ-ОЯ9	2400	4000	500	1000	750	1100	122	247
67.	СМЛЗ-Я6	2400	4000	500	1000	750	1100	114	236
68.	СМЛЗ-Я9	2400	4000	500	1000	750	1100	119	242
69.	СМЛЗ-Я12	2400	4000	500	1000	750	1100	126	255
Столы угловые									
70.	СМЛ1-У	400	3000	500	3000	750	1100	53	215
71.	СМЛ2-У	400	3000	500	3000	750	1100	72	280
Столы однотоумбовые для работы за микроскопом									
72.	СМЛ-01-М-Д-ВП	800	1800	500	1000	750	1100	29	99
73.	СМЛ1-М-Я4	800	1800	500	1000	750	1100	42	112
74.	СМЛ1-М-ДЯ	800	1800	500	1000	750	1100	33	103
75.	СМЛ1-М-Д-ВП	800	1800	500	1000	750	1100	43	103
76.	СМЛ-01-М-Я4-ВП	800	1800	500	1000	750	1100	47	118
77.	СМЛ1-М-Я4-ВП	800	1800	500	1000	750	1100	49	108
Столы двухтумбовые для работы за микроскопом									
78.	СМЛ2-ЦЯ5	1400	1800	500	1000	750	1100	78	136
79.	СМЛ2-ЦД2	1400	1800	500	1000	750	1100	82	143
Столы пеленальные									
80.	СП-1	700	1200	700	720	900	1100	38	52
81.	СП-2	700	1200	700	720	900	1100	71	110
Столы усиленные									
82.	СЛУ	400	1800	500	1200	600	1100	20	95
83.	СЛУ-Ш	400	1800	500	1200	600	1100	35	125
84.	СЛУ-П	400	1800	500	1200	600	1100	28	130
85.	СЛУ-К	400	1800	500	1200	600	1100	18	92
86.	СЛУ2	1400	3000	500	1000	750	1100	52	148
87.	СЛУ-У	400	3000	500	3000	750	1100	54	285
88.	СЛУ-Т	400	1800	500	1200	600	1100	45	225
89.	СЛУ-В	400	1800	500	1200	600	1100	43	360
Столы рамные									
90.	СЛР	400	1800	500	1200	600	1100	18	72
91.	СЛР-П	400	1800	500	1200	600	1100	25	120
92.	СЛР-Ж	400	1800	500	1200	600	1100	20	75
93.	СЛР-К	400	1800	500	1200	600	1100	17	88
94.	СЛР-Т	400	1800	500	1200	600	1100	35	227
95.	СЛР2	1400	3000	500	1000	750	1100	56	125

№ПП	арт	габаритные размеры*						Масса, кг	
		длина, мм		глубина, мм		высота, мм			
		min	max	min	max	min	max	min	max
96.	СЛР-У	400	3000	500	3000	750	1100	50	220
97.	СЛР-А	400	800	400	1200	600	1500	30	147
Столы разборные									
98.	СЛУ-Ш-СБ	1200	1800	600	800	720	900	50	71
99.	СЛУ-Ш-СБ-Д	1200	1800	600	800	720	900	71	92
100.	СЛУ-Ш-СБ-ОД	1200	1800	600	800	720	900	72	93
101.	СЛУ-Ш-СБ-ДЯ	1200	1800	600	800	720	900	75	95
102.	СЛУ-Ш-СБ-ОЯЗ	1200	1800	600	800	720	900	81	101
103.	СЛУ-Ш-СБ-Я2	1200	1800	600	800	720	900	77	100
104.	СЛУ-Ш-СБ-Я3	1200	1800	600	800	720	900	80	102
105.	СЛУ-Ш-СБ-Я4	1200	1800	600	800	720	900	82	105
106.	СЛУ-Ш-СБ-ТСБ	1200	1800	600	800	720	900	63	84
Тумбы									
107.	СТО1	300	610	300	850	600	1100	21	53
108.	СТО1-ОТ	300	610	300	850	600	1100	14	43
109.	СТО1-О	300	610	300	850	600	1100	17	64
110.	СТО1-Я	300	610	300	850	600	1100	21	69
111.	СТОЯ3-О	300	610	300	850	600	1100	26	74
112.	СТОЯ2	300	610	300	850	600	1100	23	71
113.	СТОЯ3	300	610	300	850	600	1100	25	73
114.	СТОЯ4	300	610	300	850	600	1100	29	78
115.	СТОЯ5	300	610	300	850	600	1100	32	81
116.	СТО2	500	1210	450	850	600	1100	31	99
117.	СТО2-О	500	1210	450	850	600	1100	29	95
118.	СТО2-Я	500	1210	450	850	600	1100	34	102
119.	СТО2-ДЯ	500	1210	450	850	600	1100	43	119
120.	СТО2-ДЯ3	500	1210	450	850	600	1100	46	126
121.	СТО2-ДЯ4	500	1210	450	850	600	1100	51	132
Тумбы подкатные									
122.	СТП1	300	610	450	850	600	1100	17	65
123.	СТП1-О	300	610	450	850	600	1100	18	67
124.	СТП1-Я	300	610	450	850	600	1100	20	72
125.	СТПЯ3-О	300	610	450	850	600	1100	23	75
126.	СТПЯ2	300	610	450	850	600	1100	21	73
127.	СТПЯ3	300	610	450	850	600	1100	22	75
128.	СТПЯ4	300	610	450	850	600	1100	24	78
129.	СТП2-О	500	1210	450	850	600	1100	25	93
130.	СТП2-Я	500	1210	450	850	600	1100	29	99
131.	СТП2	500	1210	450	850	600	1100	24	91
132.	СТП2-ЗЯ	500	1210	450	850	600	1100	27	94
Тумбы с мойкой									
133.	СМЛ-Н-1Р-С	500	1200	500	900	750	950	28	85

№ПП	арт	габаритные размеры*						Масса, кг	
		длина, мм		глубина, мм		высота, мм			
		min	max	min	max	min	max	min	max
134.	СМЛ-Н-2Р-С	800	2000	500	900	750	950	31	195
135.	СМЛ-В-1Р-С	400	2000	500	900	750	950	26	185
136.	СМЛ-В-2Р-С	800	1200	500	900	750	950	32	88
Тумба-тележка для транспортировки лекарственных препаратов									
137.	Т-ЛП	400	700	400	700	600	1000	25	63
Шкафы навесные									
138.	ШМД-О	300	600	250	400	500	900	7	26
139.	ШМД1	300	600	250	400	500	900	11	31
140.	ШМД1С	300	600	250	400	500	900	21	33
141.	ШМД2-О	600	1200	250	400	500	900	26	45
142.	ШМД2	600	1200	250	400	500	900	32	52
143.	ШМД2С	600	1200	250	400	500	900	34	55
144.	ШМД1-У	600	900	600	900	500	900	27	41
145.	ШМД1С-У	600	900	600	900	500	900	28	42
Шкафы антресольные									
146.	ШАС1	300	1000	300	600	400	800	9	49
147.	ШАС2	300	1000	300	600	400	800	11	51
148.	ШАС1С	300	1000	300	600	400	800	10	53
149.	ШАС2С	300	1000	300	600	400	800	12	52
II. Принадлежности									
1.	НСТ	800	3000	200	500	500	1500	16	42
2.	НСТ2	800	3000	200	500	500	1500	22	56
3.	ПСБ	250	600	470	600	240	300	4	10
4.	ПМ	500	800	200	300	100	300	2	7
5.	ВПК	350	500	350	—	80	120	2,2	3,5
6.	НСТ-ТИ	800	1200	200	300	800	1200	27	36
7.	НСТ-Р	800	3000	200	500	500	1500	39	78
8.	НСЛП	450	500	630	650	100	150	4	6

6.2 Механическая безопасность изделий

- 6.2.1 Вкладные и накладные элементы мебели, включая декоративные, должны быть закреплены неподвижно, ребра торцов погонажных деталей притуплены.
- 6.2.2 Все доступные кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и свободны от заусенцев.
- 6.2.3 Замки (при наличии) должны быть закреплены на деталях изделий неподвижно и прочно, должно обеспечиваться их легкое отпирание и запирание.
- 6.2.4 Самопроизвольное открывание дверей в мебельных изделиях не допускается. Перекосы и неплотные прилегания открывающихся элементов мебели в процессе эксплуатации не допускаются.
- 6.2.5 Выдвижные и раздвижные элементы изделий мебели, при их наличии, должны иметь свободный ход, без заеданий и перекосов.

- 6.2.6 Мебель в состоянии эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, зазор между опорами и полом - недопустим.

6.3 Декоративно-эстетические характеристики

- 6.3.1 Поверхности изделий должны иметь, однородное защитно-декоративное или защитное покрытие, устойчивое к пятнообразованию и допускающее применение дезинфицирующих средств.
- 6.3.2 Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев.
- 6.3.3 Защитно-декоративные покрытия для фурнитуры и деталей из металла должны соответствовать нормам ГОСТ 9.301. Неорганические покрытия деталей - по ГОСТ 9.303 для группы условий 1.
- 6.3.4 Цветовое решение поверхности мебельных изделий должно соответствовать требованиям заказчика, утвержденным договором и ограничивается каталогом цветности, применяемым на производстве.
- 6.3.5 Накладные задние стенки не должны выступать за наружные плоскости боковых и верхних горизонтальных щитов изделий.
- 6.3.6 На видимой поверхности изделий не допускаются дефекты
- 6.3.7 Шероховатость поверхности древесных материалов R_m , для которых не предусматриваются защитно-декоративные покрытия, а также невидимых поверхностей, с которыми при эксплуатации соприкасается человек, должна составлять не более 63 мкм по ГОСТ 7016.
- 6.3.8 Металлические поверхности колесных опор могут окрашиваться термореактивной порошковой краской, либо иметь другое покрытие, соответствующее конструкторской документации.

6.4 Надежность, прочность, долговечность изделий

- 6.4.1 Конструктивное исполнение мебельных изделий должно обеспечивать их высокую надежность, долговечность, удобство и безопасность при эксплуатации.
- 6.4.2 Мебельные изделия, устанавливаемые на опорах качения (колесные опоры, ролики) должны обладать вибропрочностью при вибрационных нагрузках.
- 6.4.3 Пластмассовые детали колесных опор должны выполняться из ударопрочной и износостойкой пластмассы.
- 6.4.4 Колеса должны свободно без заедания вращаться на горизонтальной оси от усилия не более 0,35 Н (0,035 кгс).
- 6.4.5 Мебель должна быть устойчива при эксплуатации к воздействию климатических факторов категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, что предполагает эксплуатацию изделий мебели в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями в лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях. Номинальное значение температуры окружающей среды: от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность при температуре 25 °С – до 80%.

6.5 Санитарно-гигиеническая безопасность изделий

- 6.5.1 Мебельные изделия должны изготавливаться из материалов, пригодных для эксплуатации в медицинских учреждениях.
- 6.5.2 Применение в конструкции мебели вредных для человека материалов и веществ, не отвечающих гигиеническим требованиям, установленным органами и учреждениями

Роспотребнадзора, не допускается.

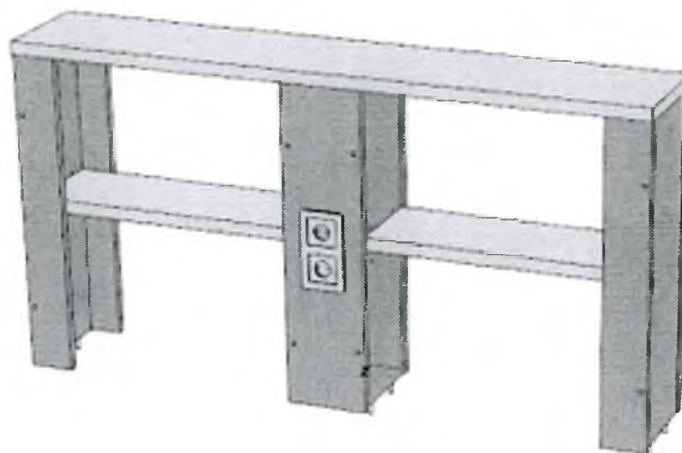
- 6.5.3 Наружные поверхности мебельных изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

6.6 Электрическая безопасность изделий

- 6.6.1 Изделия, имеющие электрический монтаж, должны соответствовать требованиям электробезопасности.

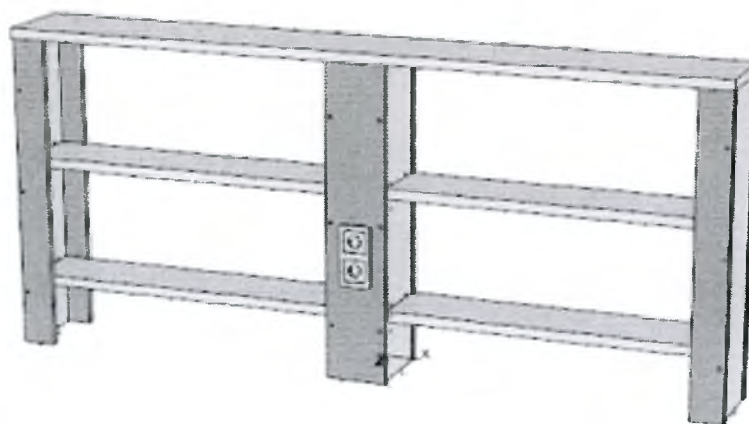
7. Принадлежности к мебели медицинской

7.1 Надстройка одноярусная НСТ



Надстройка одноярусная НСТ - это принадлежность, используемая для столов, размещаемых в медицинских лабораториях ЛПУ, с возможностью установки выносных электрических розеток для удобства подключения настольного оборудования и увеличения поверхности для размещения необходимых предметов.

7.2 Надстройка двухярусная НСТ2



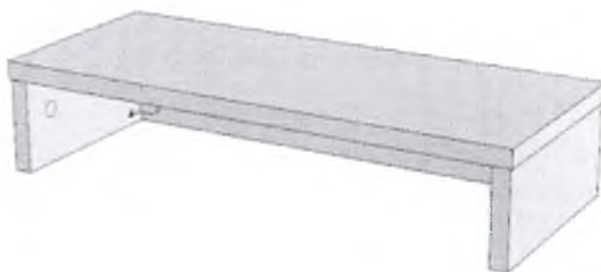
Надстройка одноярусная НСТ - это принадлежность, используемая для столов, размещаемых в медицинских лабораториях ЛПУ, с возможностью установки выносных электрических розеток для удобства подключения настольного оборудования и увеличения поверхности для размещения необходимых предметов.

7.3 подставка под системный блок ПСБ



Подставка под системный блок ПСБ – это принадлежность, используемая для рабочих столов, для размещения на ней системного блока. Колесные опоры позволяют легко отодвигать системный блок компьютера для проведения влажной уборки и дезинфекции помещений

7.4 подставка под монитор ПМ



Подставка под монитор ПМ – это принадлежность, используемая для рабочих столов, для размещения на ней монитора компьютера или моноблока. Подставка обеспечивает необходимую высоту размещения монитора, для предупреждения расстройств опорно-двигательного аппарата человека, также, дополнительно, освобождает рабочую поверхность стола, обычно занимаемую опорой монитора или моноблока.

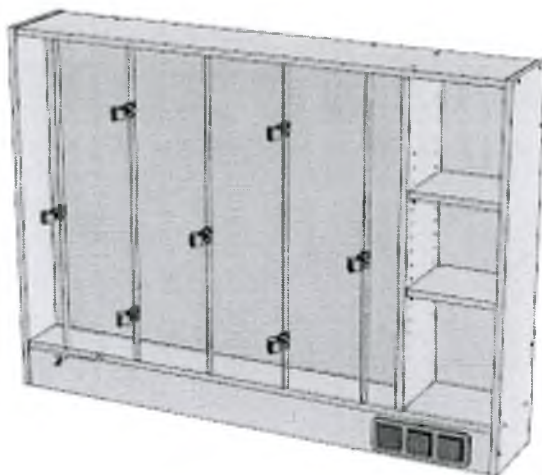
7.5 Выдвижная полка под клавиатуру ВПК



Выдвижная полка под клавиатуру ВПК – это принадлежность, используемая для рабочих столов, для размещения на ней устройства ввода информации – клавиатуры, и манипулятора типа «мышь». Выдвижная полка обеспечивает необходимую высоту размещения клавиатуры, для

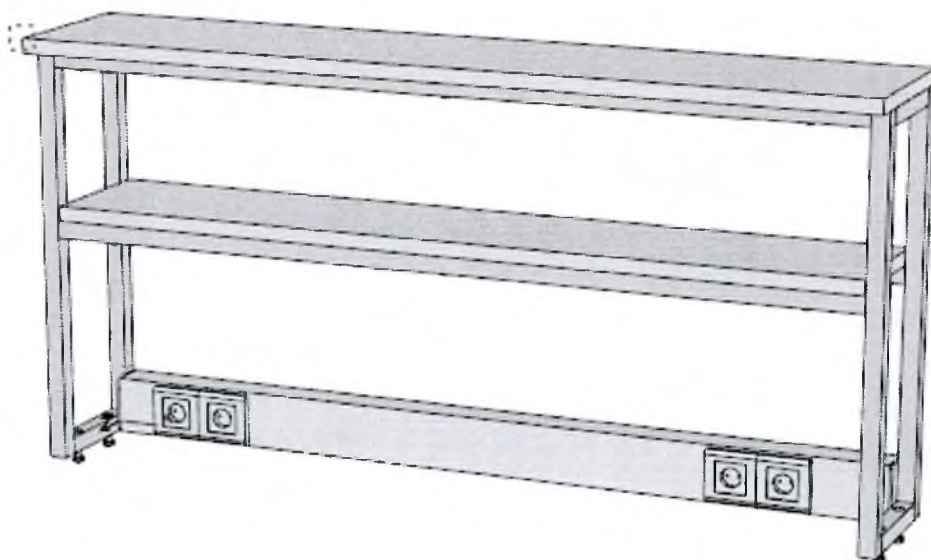
предупреждения расстройств опорно-двигательного аппарата, дополнительно, освобождает рабочую поверхность стола.

7.6 Надстройка титровальная НСТ-ТИТ



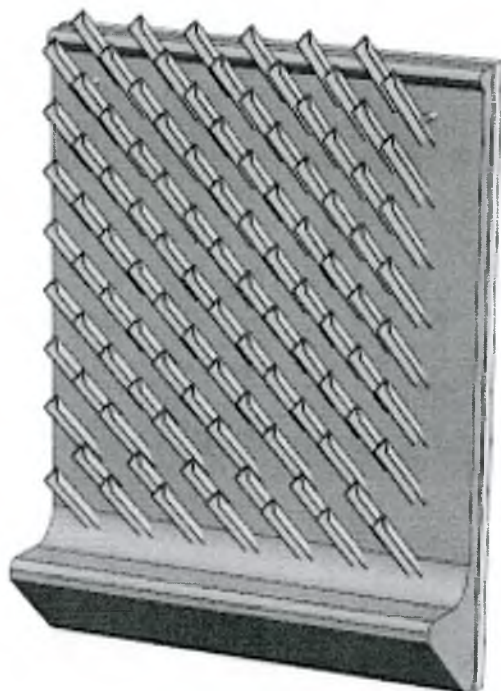
Надстройка титровальная НСТ-ТИТ – принадлежность, используемая для рабочих столов медицинских лабораторий ЛПУ, для установки в нее бюреток для удобства проведения титровальных работ. Может быть оснащена выносными электрическими розетками для удобства подключения настольного оборудования.

7.7 Надстройка рамная НСТ-Р



Надстройка рамная НСТ-Р это принадлежность, используемая для столов, размещаемых в медицинских лабораториях ЛПУ, с возможностью установки выносных электрических розеток для удобства подключения настольного оборудования и увеличения поверхности для размещения необходимых предметов. Обладает повышенной безопасной рабочей нагрузкой.

7.8 Настенный сушитель для лабораторной посуды НСЛП



Настенный сушитель для лабораторной посуды НСЛП – это принадлежность, используемая для тумб с раковинами, установленными в медицинских лабораториях ЛПУ, предназначенная для сушки лабораторной посуды.

8. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

Медицинское изделие не содержит лекарственных средств для медицинского применения, материалов животных и материалов человеческого происхождения.

9. Установка и монтаж медицинской мебели

Мебельные изделия поставляются в собранном виде, кроме столов разборных (СЛУ-Ш-СБ, СЛУ-Ш-СБ-Д, СЛУ-Ш-СБ-ОД, СЛУ-Ш-СБ-ДЯ, СЛУ-Ш-СБ-ОЯЗ, СЛУ-Ш-СБ-Я2, СЛУ-Ш-СБ-Я3, СЛУ-Ш-СБ-Я4, СЛУ-Ш-СБ-ТСБ)

Сборка столов разборных осуществляется силами производителя или уполномоченного им лица на месте монтажа продукции в соответствии со схемами сборки изделий.

ВНИМАНИЕ: Напольные мебельные изделия должны быть установлены и выровнены по уровню с использованием регулируемых опор.

ВНИМАНИЕ: Собранный напольная мебель должна быть прикреплена к стенам помещения с использованием подходящих материалов с учетом материала стен.

ВНИМАНИЕ: Навесные изделия должны быть прикреплены с использованием соответствующего крепежа.

ВНИМАНИЕ: Столы пеленальные требуют обязательного прикрепления к стене помещения. В

случае самостоятельной установки изделий потребителем, до него должна быть донесена информация о необходимости крепления изделия к стене.

10. Требования к помещениям

Размещение мебели в помещении осуществляется на основе плана помещения, согласованного между поставщиком и потребителем.

Во избежание ограничения предусмотренных функций медицинской мебели необходимо рассчитывать пространство, занимаемое механизмами и дверьми изделий.

ВНИМАНИЕ: На плане помещения, в котором планируется установка изделий с раковинами и подводом воды, в обязательном порядке должны быть обозначены места подключения к водопроводной и канализационной системам здания.

ВНИМАНИЕ: На плане помещения, в котором планируется установка изделий с выносными розетками в обязательном порядке должны быть обозначены места подключения к электрической сети здания.

Надлежащая и безопасная эксплуатация мебельных изделий гарантирована в случае соблюдения требований к установке и монтажу, сборке мебели согласно схемам сборки или с привлечением сборщиков мебели производителя.

Подключение к водопроводной, канализационной и электрической сети должно проводиться только квалифицированным персоналом.

11. Правила эксплуатации

11.1 Упаковка и транспортная маркировка мебели

При междугородных перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта мебель должна быть упакована в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, при выполнении требований транспортной маркировки.

При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах касания изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Вся съемная фурнитура изделий мебели должна быть упакована в заклеенные (защитные) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

Съемную фурнитуру и комплектующие изделия по согласованию с потребителем допускается поставлять отдельно упакованной с этой же партией изделий мебели, гарнитура, набора с соответствующими указаниями в товаросопроводительной документации.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192, с нанесением манипуляционных знаков, имеющих значение "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги" при необходимости. см. рисунок ниже.

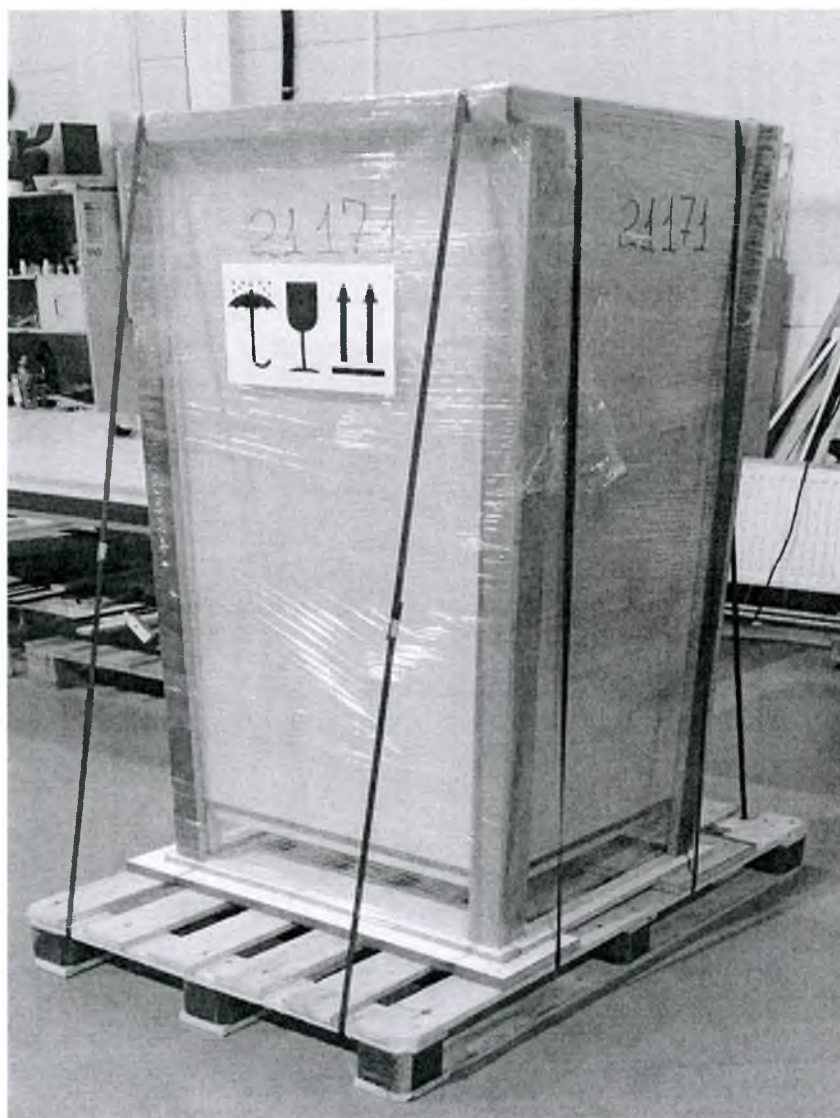
11.2 Приемка мебели на месте эксплуатации

После сборки (в случае столов разборных) и монтажа мебели проверяют её внешний вид, качество сборки, качество стеклоизделий и зеркал в изделиях мебели (при наличии).

Рабочие поверхности столов проверяют пузырьковым уровнем.

Проверяют устойчивость шкафов, зазор между опорами и полом – недопустим.

Проверяют крепление стационарно установленной мебели к стенам.



Пример транспортной упаковки изделий

11.3 Условия эксплуатации

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и не выше $+35^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
- Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, временно находящихся на поверхности из ЛДСП не должна превышать $+100^{\circ}\text{C}$. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
- Поверхность мебели рекомендуется чистить и дезинфицировать с применением стандартных

дезсредств (на основе ЧАС, алкиламинов, а также хлорактивные, кислородактивные и спиртосодержащие ДС), используемых в практике лабораторий и ЛПУ согласно инструкции по применению этих средств.

- Не рекомендуется использование абразивных чистящих средств.
- Не допускайте длительного воздействия влаги на незащищенные ламинированным покрытием поверхности, а также в местах стыков ламинированного покрытия и шпона.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку на всю рабочую поверхность стола, полки.
- **Используйте мебель только в соответствии с функциональным назначением. Использование мебели не по назначению – запрещено.**
- **Не оставляйте детей на пеленальном столе без присмотра!**

11.4 Ремонт и техническое обслуживание

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

11.5 Стерильность МИ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов, лабораторий и палат по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 поставляется в нестерильном виде, стерилизации не подлежит.

Медицинская мебель подлежит дезинфекции в соответствии с графиком дезинфекции, принятым в лаборатории или ЛПУ.

11.6 Порядок дезинфекции МИ

Дезинфекцию мебели проводят химическим методом в соответствии с МУ-287-113 любыми указанными средствами (на основе ЧАС, алкиламинов, а также хлорактивными, кислородактивными и спиртосодержащими дезинфицирующими средствами).

Допускается проводить дезинфекцию 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. Режим дезинфекции выбирают в соответствии с инструкцией по применению средства.

Для указанных дезинфицирующих средств режимы дезинфекции представлены в таблице:

Режимы дезинфекции*

Название дезинфицирующего средства	Режим дезинфекции	
	Концентрация раствора, %	Время выдержки, мин**
Хлорамин	1,0	30
Перекись водорода с 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Астра», «Айна», «Лотос», «Маричка», Россия)	3,0	80

*Выдержка из МУ 287-113

**Дезинфекцию проводят смоченной в растворе отжатой салфеткой путем протирания всех поверхностей мебели

каждые 15 минут в течение времени выдержки.

Дезинфекция осуществляется в соответствии с графиком дезинфекции принятым в лаборатории или ЛПУ.

11.7 Дополнительная информация

Известных ограничений по совместному использованию изделий медицинской мебели с другими медицинскими изделиями нет.

Мебель не является источником известного опасного излучения (электромагнитное, ионизирующее, иное)

В случае неисправности мебели следует сообщить производителю о причинах поломки, на время гарантийного ремонта или замены изделия не следует использовать неисправные изделия.

11.8 Гарантии изготовителя

На мебель предоставляется гарантия сроком 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия 10 лет.

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

12. Порядок и условия утилизации медицинского изделия

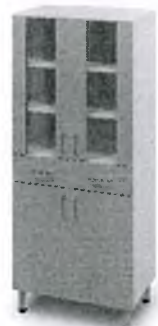
Утилизация мебельных изделий осуществляется методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.3684-21» для отходов класса А или Б в зависимости от места использования и потенциального заражения микроорганизмами 3-4 групп патогенности.

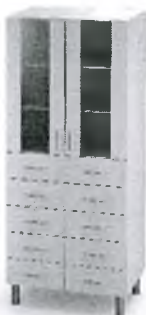
Перед утилизацией необходимо провести дезинфекцию мебели, мебель следует разобрать.

Приложение А

Изображения мебельных изделий, комплектующих наборы медицинской мебели

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
Шкафы для хранения лабораторной посуды			
1.	ШСО		Полки, количество: от 3 до 10 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
2.	ШМЛ1С-Я		Полки, количество: от 2 до 10 шт. Ящики, количество: 1 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 1 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
3.	ШМЛ1С		Полки, количество: от 3 до 10 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 1 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
4.	ШСО-Д		Полки, количество: от 3 до 10 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
5.	ШМЛ1С-5Я		Полки, количество: от 1 до 5 шт. Ящики, количество: 5 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 1 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
6.	ШСО2		Полки, количество: от 6 до 20 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
7.	ШМЛ2С-2Я		Полки, количество: от 3 до 20 шт Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 2 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
8.	ШМЛ2С		Полки, количество: от 3 до 20 шт Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 2 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

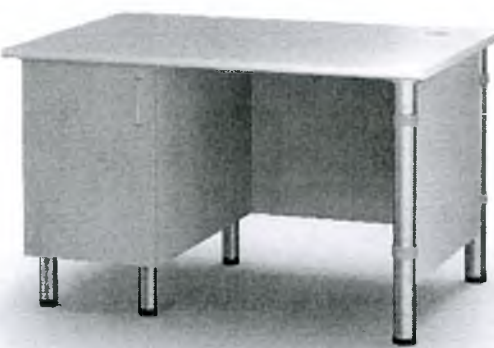
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
9.	ШСО-2Д		Полки, количество: от 3 до 20 шт Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
10.	ШМЛ2С-5Я		Полки, количество: от 1 до 20 шт Ящики, количество: 10 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 2 до 12 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов			
11.	ШМЛ1		Полки, количество: от 3 до 10 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: 1 шт Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
12.	ШМЛ1-2Д		Полки, количество: от 3 до 10 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
13.	ШМЛ1-Я		Полки, количество: от 2 до 10 шт. Ящики, количество: 1 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 1 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
14.	ШМЛ1-5Я		Полки, количество: от 1 до 5 шт. Ящики, количество: 5 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 1 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
15.	ШМЛ2		Полки, количество: от 3 до 20 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
16.	ШМЛ2-2Д		Полки, количество: от 3 до 20 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 1 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

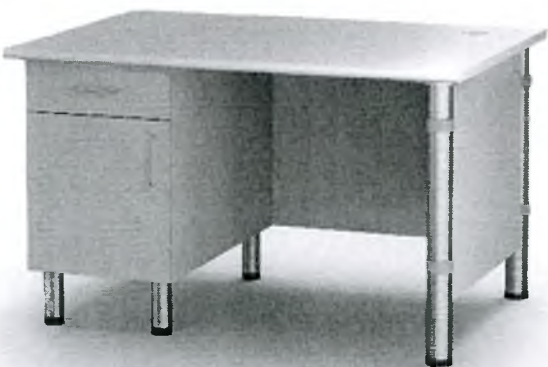
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
17.	ШМЛ2-2Я		Полки, количество: от 3 до 20 шт Ящики, количество: 2 шт Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 1 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
18.	ШМЛ2-5Я		Полки, количество: от 1 до 10 шт Ящики, количество: 10 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 2 до 12 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Шкафы для ISO корзин			
19.	ШМЛ1-ISO		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: от 4 до 24 шт. Замки: 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
20.	ШМЛ2-ISO		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: от 4 до 24 шт. Замки: 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
21.	ШМЛ2-2Д-ISO		Полки, количество: от 1 до 5 шт Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: от 4 до 24 шт. Замки: 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Шкафы архивные для гистологического материала			
22.	ШХС		Полки, количество: нет. Ящики, количество: от 10 до 46 шт. Специальные вставки для хранения: от 10 до 46 шт. Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
23.	ШХБ		Полки, количество: нет. Ящики, количество: от 14 до 54 шт. Специальные вставки для хранения: от 14 до 54 шт. Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Стол			
Стол на опорах			
24.	СМЛ		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

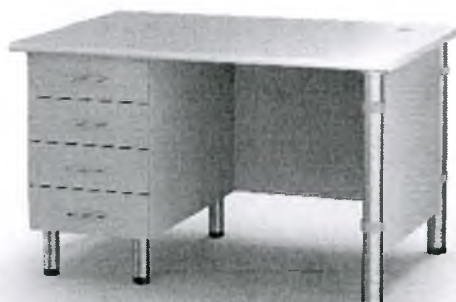
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
25.	СМЛ-Б		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
26.	СМЛ-2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
27.	СМЛ-2-Б		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
28.	СМЛ01-у		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
29.	СМЛ1-У-Б		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Стол�ы однотоумбовые			
30.	СМЛ-01-Д		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
31.	СМЛ1-Д		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
32.	СМЛ-01-ОД		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
33.	СМЛ1-ОД		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
34.	СМЛ-01-ДЯ		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: 1 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
35.	СМЛ1-ДЯ		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: 1 шт. Специальные вставки для хранения: нет. Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет. Колесная опора: нет. Тормоз: нет.
36.	СМЛ-01-ОЯЗ		Полки, количество: 1 шт. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет. Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет. Колесная опора: нет. Тормоз: нет.
37.	СМЛ1-ОЯЗ		Полки, количество: 1 шт. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет. Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет. Колесная опора: нет. Тормоз: нет.

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
38.	СМЛ-01-Я2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
39.	СМЛ1-Я2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
40.	СМЛ-01-Я3		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
41.	СМЛ1-Я3		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
42.	СМЛ-01-Я4		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
43.	СМЛ1-Я4		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
44.	СМЛ1-ТСБ		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Столы двухтумбовые			
45.	СМЛ-02-Д2		Полки, количество: от 2 до 8 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

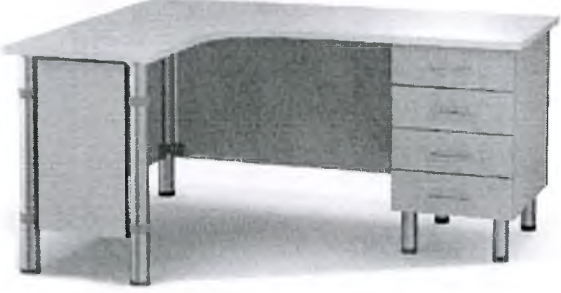
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
46.	СМЛ2-Д2		Полки, количество: от 2 до 8 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
47.	СМЛ-02-Д2Я2		Полки, количество: от 2 до 6 шт. Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
48.	СМЛ2-Д2Я2		Полки, количество: от 2 до 6 шт. Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
49.	СМЛ-02-ДЯ4		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 5 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
50.	СМЛ2-ДЯ4		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 5 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
51.	СМЛ-02-ОД2		Полки, количество: от 2 до 8 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
52.	СМЛ2-ОД2		Полки, количество: от 2 до 8 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
53.	СМЛ-02-ОЯ3		Полки, количество: 2 шт. Ящики, количество: 6 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

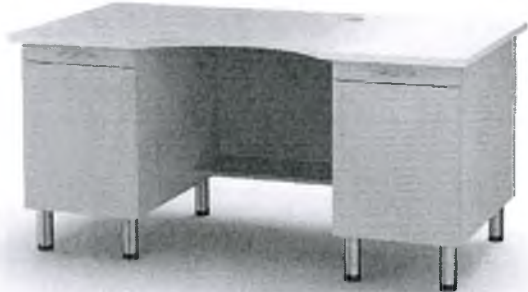
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
54.	СМЛ2-ОЯ3		Полки, количество: 2 шт. Ящики, количество: 6 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
55.	СМЛ-02-Я2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
56.	СМЛ2-Я2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
57.	СМЛ-02-Я3		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 6 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

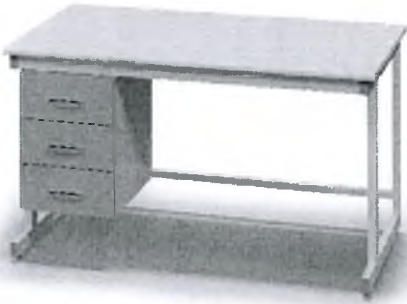
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
58.	СМЛ2-Я3		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 6 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
59.	СМЛ-02-Я4		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 8 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 8 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
60.	СМЛ2-Я4		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 8 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 8 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Столы трехтумбовые			
61.	СМЛ3-Д3		Полки, количество: от 3 до 12 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
62.	СМЛ3-Д2Я4		Полки, количество: от 2 до 8 шт. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
63.	СМЛЗ-ДЯЗ		Полки, количество: от 3 до 9 шт. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
64.	СМЛЗ-ОДЗ		Полки, количество: от 3 до 12 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
65.	СМЛЗ-ОД2ОЯЗ		Полки, количество: от 3 до 9 шт. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 5 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
66.	СМЛЗ-ОЯ9		Полки, количество: 3 шт. Ящики, количество: 9 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 9 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
67.	СМЛЗ-Я6		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 6 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

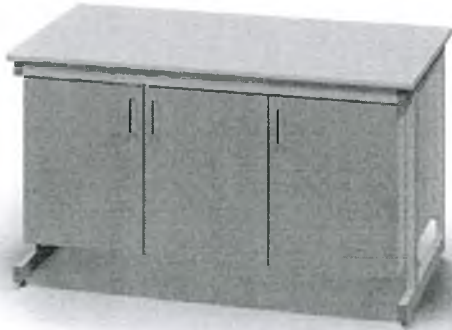
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
68.	СМЛЗ-Я9		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 9 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 9 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
69.	СМЛЗ-Я12		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 12 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 12 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Стол� угловые			
70.	СМЛ1-У		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
71.	СМЛ2-У		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 5 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Стол� одготумбовые для работы за микроскопом			

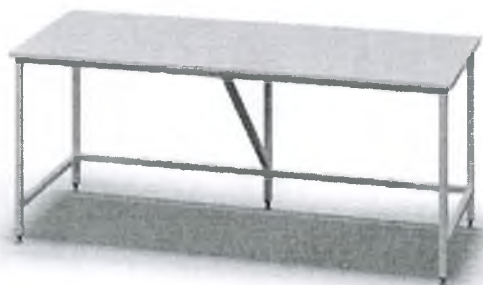
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
72.	СМЛ-01-М-Д-ВП		Полки, количество от 1 до 3 шт. Специализированные выдвижные полки для препаратов, количество: 1 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: есть Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
73.	СМЛ1-М-Я4		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: есть Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
74.	СМЛ1-М-ДЯ		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: 1 шт. Специальные вставки для хранения: есть Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
75.	СМЛ1-М-Д-ВП		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Специализированные выдвижные полки для препаратов, количество: 1 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: есть Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
76.	СМЛ-01- М-Я4- ВП		Полки, количество: нет. Специализированные выдвижные полки для препаратов, количество: 1 шт. Ящики, количество: 5 шт. Специальные вставки для хранения: есть Замки: от 0 до 5 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
77.	СМЛ1- М-Я4- ВП		Полки, количество: нет. Специализированные выдвижные полки для препаратов, количество: 1 шт. Ящики, количество: 5 шт. Специальные вставки для хранения: есть Замки: от 0 до 5 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Столы двухтумбовые для работы за микроскопом			
78.	СМЛ2- ЦЯ5		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Специализированные выдвижные полки для препаратов, количество: 2 шт. Ящики, количество: 5 шт. Специальные вставки для хранения: есть Замки: от 0 до 6 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
79.	СМЛ2- ЦД2		Полки, количество: от 2 до 6. Специализированные выдвижные полки для препаратов, количество: 2 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: есть Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Столы пеленальные			

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
80.	СП-1		Полки, количество: 1 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
81.	СП-2		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: от 1 до 2 шт. шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Стол� усиленные			
82.	СЛУ		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
83.	СЛУ-Ш		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

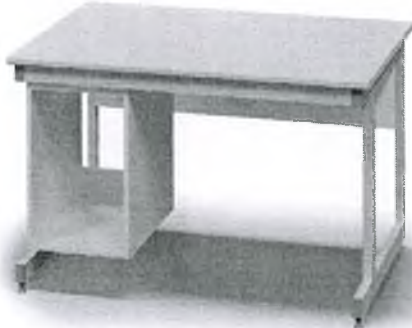
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
84.	СЛУ-П		Полки, количество: 1 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
85.	СЛУ-К		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: да Тормоз: есть
86.	СЛУ2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
87.	СЛУ-У		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
88.	СЛУ-Т		Полки, количество: от 2 до 12 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
89.	СЛУ-В		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет Антивибрационные опоры.
Стол� рамные			
90.	СЛР		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
91.	СЛР-П		Полки, количество: 1 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
92.	СЛР-Ж		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
93.	СЛР-К		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: да Тормоз: есть
94.	СЛР-Т		Полки, количество: от 2 до 12 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
95.	СЛР2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
96.	СЛР-У		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
97.	СЛР-А		Полки, количество: 2 шт. Ящики, количество: от 1 до 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
Стол� разборные			
98.	СЛУ-Ш-СБ		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
99.	СЛУ-Ш-СБ-Д		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
100.	СЛУ-Ш-СБ-ОД		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
101.	СЛУ-Ш-СБ-ДЯ		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: 1 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
102.	СЛУ-Ш-СБ-ОЯЗ		Полки, количество: 1 шт. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
103.	СЛУ-Ш-СБ-Я2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
104.	СЛУ-Ш-СБ-ЯЗ		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
105.	СЛУ-Ш-СБ-Я4		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
106.	СЛУ-Ш-СБ-ТСБ		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Тумбы			
107.	СТО1		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
108.	СТО1-ОТ		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
109.	СТО1-О		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
110.	СТО1-Я		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: 1 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
111.	СТОЯ3-О		Полки, количество: 1 шт. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
112.	СТОЯ2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
113.	СТОЯ3		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
114.	СТОЯ4		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
115.	СТОЯ5		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 5 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 5 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
116.	СТО2		Полки, количество: от 1 до 8 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
117.	СТО2-О		Полки, количество: от 1 до 8 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
118.	СТО2-Я		Полки, количество: от 1 до 6 шт. Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
119.	СТО2-ДЯ		Полки, количество: от 2 до 7 шт. Ящики, количество: 1 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
120.	СТО2-ДЯ3		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
121.	СТО2-ДЯ4		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 5 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Тумбы подкатные			
122.	СТП1		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
123.	СТП1-О		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть

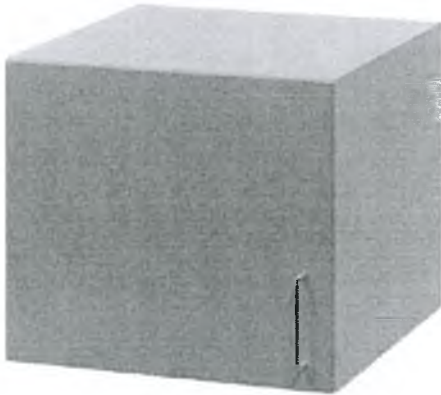
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
124.	СТП1-Я		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: 1 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
125.	СТПЯ3-О		Полки, количество: 1 шт. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
126.	СТПЯ2		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
127.	СТПЯ3		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 3 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть

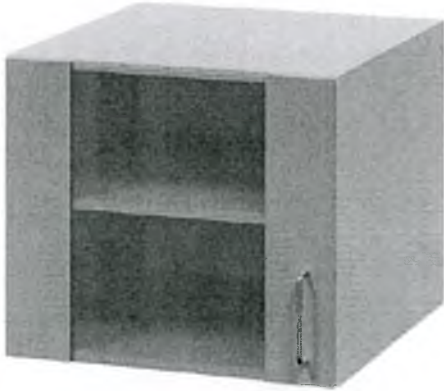
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
128.	СТПЯ4		Полки, количество: нет. Ящики, количество: 4 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
129.	СТП2-О		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
130.	СТП2-Я		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: 2 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
131.	СТП2		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть

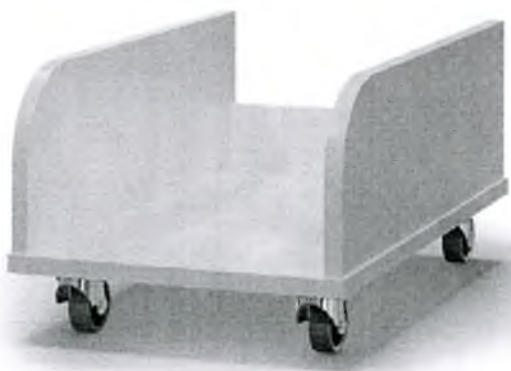
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
132.	СТП2-3Я		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: 3 шт. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 4 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
Тумбы с мойкой			
133.	СМЛ-Н-1Р-С		Полки, количество: нет Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
134.	СМЛ-Н-2Р-С		Полки, количество: нет Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
135.	СМЛ-В-1Р-С		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

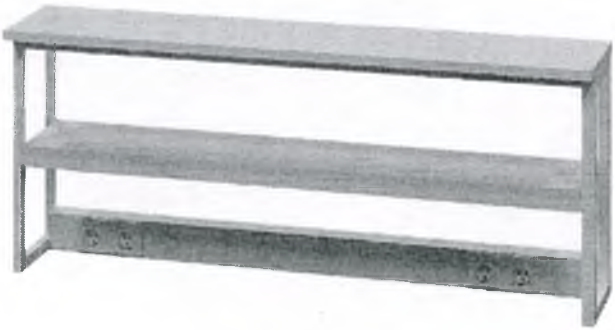
№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
136.	СМЛ-В-2Р-С		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Тумба-тележка для транспортировки лекарственных препаратов			
137.	Т-ЛП		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет Специальные вставки для хранения: от 1 до 10 шт. Замки: от 0 до 2 Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
Шкафы навесные			
138.	ШМД-О		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
139.	ШМД1		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
140.	ШМД1С		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
141.	ШМД2-О		Полки, количество: от 1 до 8 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
142.	ШМД2		Полки, количество: от 1 до 8 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
143.	ШМД2С		Полки, количество: от 1 до 8 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
144.	ШМД1-У		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
145.	ШМД1С-У		Полки, количество: от 1 до 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
Шкафы антресольные			
146.	ШАС1		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
147.	ШАС2		Полки, количество: от 1 до 6 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
148.	ШАС1С		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 1 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
149.	ШАС2С		Полки, количество: от 1 до 6 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: от 0 до 2 шт. Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
II. Принадлежности			
1.	НСТ		Полки, количество: 2 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: есть Колесная опора: нет Тормоз: нет
2.	НСТ2		Полки, количество: 4 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: есть Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
3.	ПСБ		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: есть Тормоз: есть
4.	ПМ		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
5.	ВПК		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет
6.	НСТ-ТИ		Полки, количество: от 1 до 3 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: есть Колесная опора: нет Тормоз: нет

№ПП	арт	Изображение	Функциональные особенности
7.	НСТ-Р		Полки, количество: 2 шт. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: есть Колесная опора: нет Тормоз: нет
8.	НСЛП		Полки, количество: нет. Ящики, количество: нет. Специальные вставки для хранения: нет Замки: нет Электропроводка: нет Колесная опора: нет Тормоз: нет

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 75 листов
Директор ООО «БиоМебель»
Кононенко М.В.





ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для лаборатории № 1

Изготовитель: ООО «БиоМебель»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

Набор медицинской мебели для лаборатории №1 в составе:

Стол� рамные, в вариантах исполнения

Стол� усиленные, в вариантах исполнения

Стол� разборные, в вариантах исполнения

Стол� на опорах, в вариантах исполнения

Тумбы подкатные, в вариантах исполнения

Руководство по эксплуатации

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели для лаборатории №1

Принадлежности для набора мебели для лаборатории №1

1. надстройка однаюрсная – НСТ – 1 шт.
2. надстройка двухюрсная – НСТ2 – 1 шт.
3. подставка под системный блок – ПСБ – 1 шт.
4. подставка под монитор – ПМ – 1 шт.
5. выдвигная полка под клавиатуру – ВПК – 1 шт.
6. надстройка титровальная – НСТ-ТИ – 1 шт.
7. надстройка рамная – НСТ-Р – 1 шт.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов или проведения медицинских процедур и осмотров, или лабораторных исследований. Мебельные изделия имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры мебельных изделий устанавливаются согласно требованиям заказчика, указанным в договоре, и ограничиваются диапазонами, указанными в ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 и шагом линейных размеров, равным 5 мм в пределах установленных диапазонов.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °С и не выше +35 °С при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
- Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, кратковременно находящихся на поверхности из ЛДСП, не должна превышать +100 °С. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
- Поверхность мебели рекомендуется чистить и дезинфицировать с применением стандартных дезсредств (на основе ЧАС, алкиламинов, а также хлорактивные, кислородактивные и спиртосодержащие ДС), используемых в практике лабораторий и ЛПУ согласно инструкции по применению этих средств и руководствуясь положениями МУ-287-113.
- Не рекомендуется использование абразивных чистящих средств.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку равномерно на всю рабочую поверхность.

МОНТАЖ МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия поставляются в собранном виде, кроме столов разборных.

Комплектность столов разборных подтверждается комплектовочными ведомостями и собираются в соответствии с инструкцией по сборке стола, размещенной ниже в данном документе. Остальные мебельные изделия Набора медицинской мебели для лаборатории №1, поставляются в собранном виде и не требуют проверки комплектности и сборки, кроме монтажа (установки) на месте эксплуатации.

Напольные мебельные изделия должны быть установлены и выровнены по уровню с использованием регулируемых опор. Проверку комплектности поставки, а также наличие брака проверяется потребителем до монтажа изделий на месте эксплуатации.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий осуществляется методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.3684-21» для отходов класса А или Б в зависимости от места использования и потенциального заражения микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Перед утилизацией необходимо провести дезинфекцию мебели, мебель следует разобрать.

Стол� рамные

Стол� рамные предназначены для оборудования медицинских лабораторий, служат для размещения на них медицинского оборудования, инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.

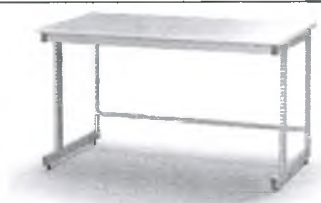
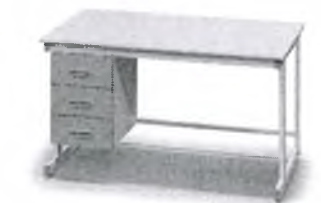
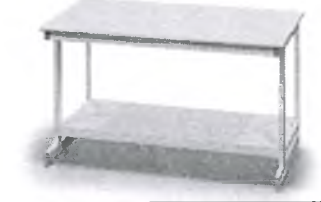
Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СЛР					
2.	СЛР-П					
3.	СЛР-Ж					
4.	СЛР-К					
5.	СЛР-Т					
6.	СЛР2					
7.	СЛР-У					
8.	СЛР-А					

Столы усиленные

Столы усиленные предназначены для оборудования медицинских лабораторий, служат для размещения на них медицинского оборудования, инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Рама стола усилена для выдерживания высокой нагрузки. Имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СЛУ					
2.	СЛУ-Ш					
3.	СЛУ-П					
4.	СЛУ-К					
5.	СЛУ2					
6.	СЛУ-У					

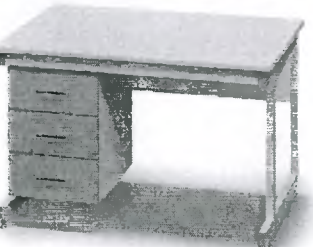
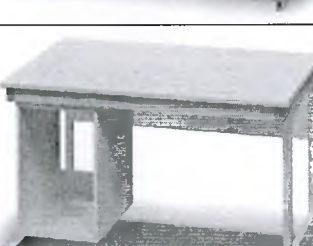
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
7.	СЛУ-Т					
8.	СЛУ-В					

Стол�ы разборные

Стол�ы разборные предназначены для оборудования медицинских лабораторий, служат для размещения на них медицинского оборудования, инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Сборно-разборная конструкция стола позволяет оперативно переместить стол в другое помещение при перепрофилировании лаборатории. Имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СЛУ-Ш-СБ					
2.	СЛУ-Ш-СБ-Д					
3.	СЛУ-Ш-СБ-ОД					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
4.	СЛУ-Ш-СБ-ДЯ					
5.	СЛУ-Ш-СБ-ОЯЗ					
6.	СЛУ-Ш-СБ-Я2					
7.	СЛУ-Ш-СБ-ЯЗ					
8.	СЛУ-Ш-СБ-Я4					
9.	СЛУ-Ш-СБ-ТСБ					

Комплектовочные ведомости на Столы разборные

СЛУ-Ш-СБ-ЯЗ в составе:

Металлическая опора стола левая	- 1 шт.
Металлическая опора стола правая	- 1 шт.
Металлическая царга	- 1 шт.
Траверса	- 2 шт.
Столешница	- 1 шт.
Тумба подвесная ЯЗ	- 1 шт.
Опора регулируемая M10*60	- 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	- 6 шт.
Гайка M10 DIN 934	- 4 шт.
Шуруп Li 4x19	- 10 шт.
Болт мебельный M10x35 DIN 912	- 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	- 8 шт.
Пластиковый профиль	- 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	- 3 шт.
Винт M4x35 мм	- 6 шт.

СЛУ-Ш-СБ-ОД в составе:

Металлическая опора стола левая	- 1 шт.
Металлическая опора стола правая	- 1 шт.
Металлическая царга	- 1 шт.
Траверса	- 2 шт.
Столешница	- 1 шт.
Тумба подвесная ОД	- 1 шт.
Полка съемная	- 1 шт.
Опора регулируемая M10*60	- 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	- 6 шт.
Гайка M10 DIN 934	- 4 шт.
Шуруп Li 4x19	- 10 шт.
Болт мебельный M10x35 DIN 912	- 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	- 8 шт.
Пластиковый профиль	- 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	- 1 шт.
Винт M4x22 мм	- 2 шт.
Полкодержатель 5/16 металлический	- 4 шт.

СЛУ-Ш-СБ-ОЯЗ в составе:

Металлическая опора стола левая	- 1 шт.
Металлическая опора стола правая	- 1 шт.
Металлическая царга	- 1 шт.
Траверса	- 2 шт.
Столешница	- 1 шт.
Тумба подвесная ОЯЗ	- 1 шт.
Опора регулируемая M10*60	- 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	- 6 шт.
Гайка M10 DIN 934	- 4 шт.
Шуруп Li 4x19	- 10 шт.
Болт мебельный M10x35 DIN 912	- 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	- 8 шт.
Пластиковый профиль	- 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	- 3 шт.
Винт M4x35 мм	- 6 шт.

СЛУ-Ш-СБ-Д в составе:

Металлическая опора стола левая	- 1 шт.
Металлическая опора стола правая	- 1 шт.
Металлическая царга	- 1 шт.
Траверса	- 2 шт.
Столешница	- 1 шт.
Тумба подвесная Д	- 1 шт.
Полка съемная	- 1 шт.
Опора регулируемая M10*60	- 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	- 6 шт.
Гайка M10 DIN 934	- 4 шт.
Шуруп Li 4x19	- 10 шт.
Болт мебельный M10x35 DIN 912	- 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	- 8 шт.
Пластиковый профиль	- 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	- 1 шт.
Винт M4x22 мм	- 2 шт.
Полкодержатель 5/16 металлический	- 4 шт.

СЛУ-Ш-СБ-ДЯ в составе:

Металлическая опора стола левая	- 1 шт.
Металлическая опора стола правая	- 1 шт.
Металлическая царга	- 1 шт.
Траверса	- 2 шт.
Столешница	- 1 шт.
Тумба подвесная ДЯ	- 1 шт.
Полка съемная	- 1 шт.
Опора регулируемая M10*60	- 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	- 6 шт.
Гайка M10 DIN 934	- 4 шт.
Шуруп Li 4x19	- 10 шт.
Болт мебельный M10x35 DIN 912	- 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	- 8 шт.
Пластиковый профиль	- 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	- 2 шт.
Винт M4x22 мм	- 2 шт.
Винт M4x35 мм	- 2 шт.
Полкодержатель 5/16 металлический	- 4 шт.

СЛУ-Ш-СБ-Я2 в составе:

Металлическая опора стола левая	- 1 шт.
Металлическая опора стола правая	- 1 шт.
Металлическая царга	- 1 шт.
Траверса	- 2 шт.
Столешница	- 1 шт.
Тумба подвесная Я2	- 1 шт.
Опора регулируемая M10*60	- 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	- 6 шт.
Гайка M10 DIN 934	- 4 шт.
Шуруп Li 4x19	- 10 шт.
Болт мебельный M10x35 DIN 912	- 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	- 8 шт.
Пластиковый профиль	- 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	- 2 шт.
Винт M4x35 мм	- 4 шт.

СЛУ-Ш-СБ-Я3 в составе:

Металлическая опора стола левая	- 1 шт.
Металлическая опора стола правая	- 1 шт.
Металлическая царга	- 1 шт.
Траверса	- 2 шт.
Столешница	- 1 шт.
Тумба подвесная Я3	- 1 шт.
Опора регулируемая М10*60	- 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	- 6 шт.
Гайка М10 DIN 934	- 4 шт.
Шуруп Li 4x19	- 10 шт.
Болт мебельный М10х35 DIN 912	- 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	- 8 шт.
Пластиковый профиль	- 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	- 3 шт.
Винт М4х35 мм	- 6 шт.

СЛУ-Ш-СБ-ТСБ в составе:

Металлическая опора стола левая	- 1 шт.
Металлическая опора стола правая	- 1 шт.
Металлическая царга	- 1 шт.
Траверса	- 2 шт.
Столешница	- 1 шт.
Тумба подвесная ТСБ	- 1 шт.
Опора регулируемая М10*60	- 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	- 6 шт.
Гайка М10 DIN 934	- 4 шт.
Шуруп Li 4x19	- 10 шт.
Болт мебельный М10х35 DIN 912	- 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	- 8 шт.
Пластиковый профиль	- 2 шт.

СЛУ-Ш-СБ-Я4 в составе:

Металлическая опора стола левая	- 1 шт.
Металлическая опора стола правая	- 1 шт.
Металлическая царга	- 1 шт.
Траверса	- 2 шт.
Столешница	- 1 шт.
Тумба подвесная Я4	- 1 шт.
Опора регулируемая М10*60	- 4 шт.
Заглушка для профиля 30*60 серая	- 6 шт.
Гайка М10 DIN 934	- 4 шт.
Шуруп Li 4x19	- 10 шт.
Болт мебельный М10х35 DIN 912	- 4 шт.
Винт установочный, DIN 914	- 8 шт.
Пластиковый профиль	- 2 шт.
Ручка-скоба 128мм хром CAVO_d	- 4 шт.
Винт М4х35 мм	- 8 шт.

Инструкция по сборка стола

Номер детали на схеме	Название и изображение деталей сборки	
1.1	Металлическая опора стола правая	
1.2	Металлическая опора стола левая	
2	Металлическая царга	
3	Траверса	
4	Столешница	
5	Тумба подвесная в сборе*	
6	Полка съемная	
7		Опора регулируемая M10x60
8		Заглушка для профиля 30x60
9		Гайка M10 DIN 934
10		Саморез Li 4x19
11		Болт мебельный M10x35 DIN 912
12		Винт установочный, DIN 914
13		Пластиковый профиль
14		Ручка-скоба 128 мм хром CAVO_d
15		Винт M4x22
16		Винт M4x35
17		Полкодержатель 6/16 металлический

* Вариант тумбы подвесной в сборе зависит от варианта исполнения стола

Столешницы собираются по представленной схеме в зависимости от варианта исполнения. Сборка стола СЛУ-Ш-СБ осуществляется по этапам 1-9. Сборка столов с тумбами осуществляется по этапам 1-13.

1. Заглушки стола (8) забить в металлические опоры стола (1.1) и (1.2).
2. На опоры (7) накрутить гайки (9).
3. Закрутить опоры (7) в металлические опоры стола (1.1) и (1.2).
4. Соединить металлические опоры стола (1.1) и (1.2) продольными траверсами (3).
5. Установить металлическую царгу (2).
6. Закрепить столешницу (4) на раме, для крепления столешницы используются саморезы (10).
7. Выровнять положение стола по уровню регулируемые опоры (диап. регулировки 0-30 мм).
8. Зафиксировать регулируемые опоры стола (7) контр-гайкой (9).
9. На траверсы (3) стола установить пластиковый профиль (13) см. Схему навешивания тумбы.
10. Навесить тумбу в сборе (5) см. Схему навешивания тумбы.
11. Установить ручки (14) на распашные двери / фасады ящиков тумбы (для двери винты M4x22 (15) для фасада ящиков винты M4x35 (16)).
12. В тумбу (5) на нужной высоте установить полкодержатели (17) и съемную полку (6).
13. Переместить тумбу (5) в нужное положение по направляющим траверсам (3).

Схема сборки стола

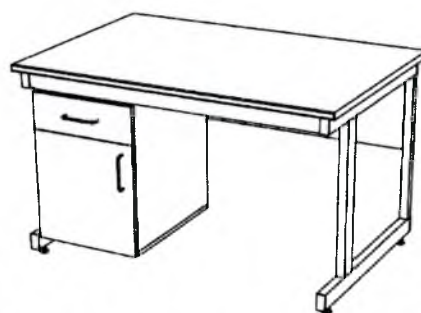


Рисунок 1 Условное изображение стола

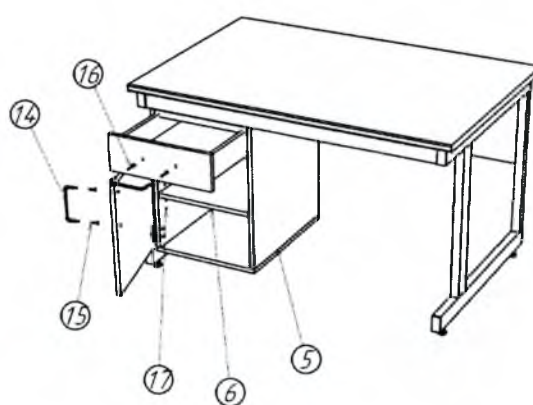
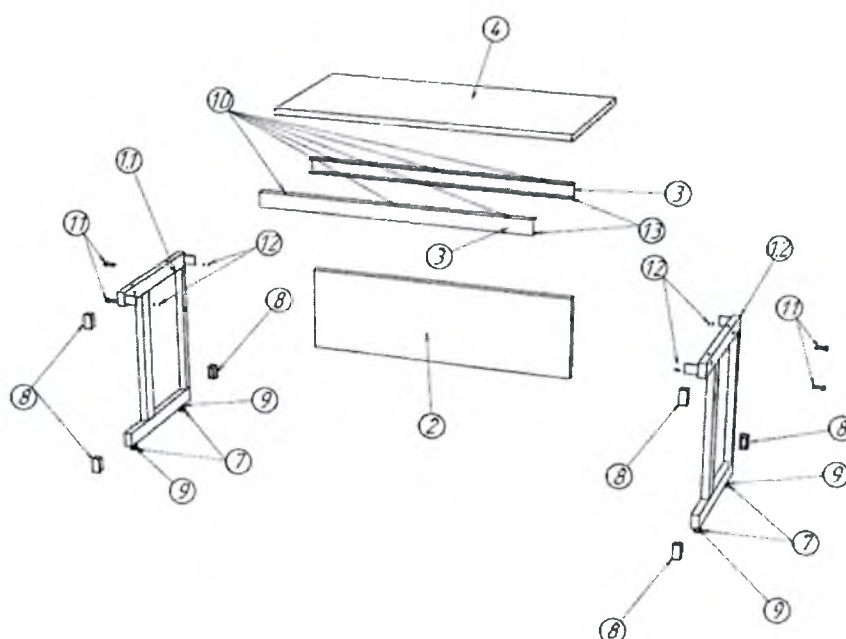
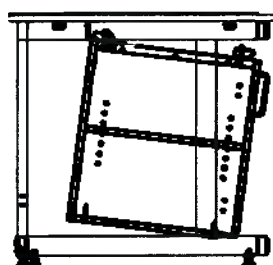
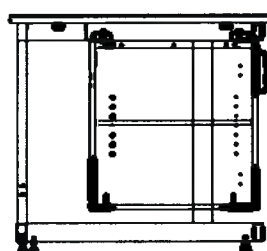
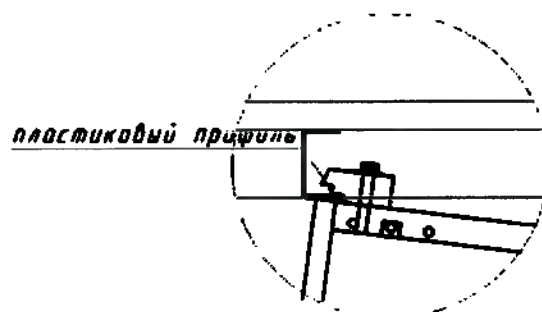


Рисунок 2 Схема сопряжения компонентов

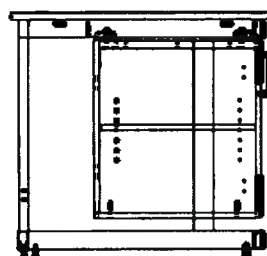
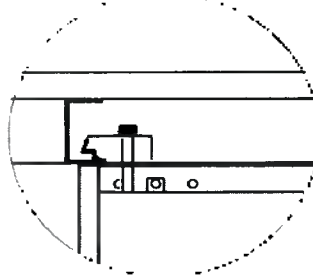
Схема навешивания тумбы



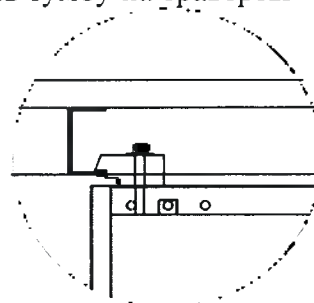
1. Завести тумбу в стол (задние крепления)



2 Завести передние крепления на траверсы



3 Опустить тумбу на траверсы



Стол на опорах

Стол на опорах предназначен для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Имеют прочные покрытия поверхностей, устойчивые к воздействию реактивов, применяемых в практике лабораторий, и дезинфицирующих средств при их систематическом применении.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ					
2.	СМЛ-Б					
3.	СМЛ-2					
4.	СМЛ-2-Б					
5.	СМЛ01-У					
6.	СМЛ1-У-Б					



Тумбы подкатные

Тумбы подкатные предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов для размещения под столами с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СТП1					
2.	СТП1-О					
3.	СТП1-Я					
4.	СТПЯЗ-О					

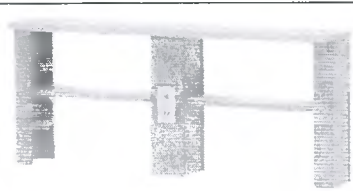
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
5.	СТПЯ2					
6.	СТПЯ3					
7.	СТПЯ4					
8.	СТП2-О					
9.	СТП2-Я					

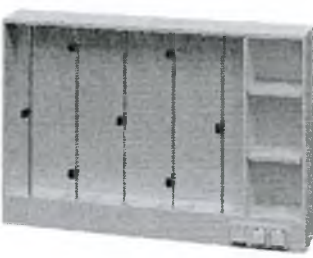
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
10.	СТП2					
11.	СТП2-3Я					

Принадлежности для набора мебели для лаборатории №1

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	НСТ	Надстройка одноярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
2	НСТ2	Надстройка двухярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
3	ПСБ	Подставка под системный блок служит для размещения системного блока компьютера, входящего в состав лабораторного и медицинского оборудования. Не препятствует проведению дезинфекции помещения.
4	ПМ	Подставка под монитор, входящий в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения монитора на рабочем столе. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.
5	ВПК	Выдвижная полка под клавиатуру, входящую в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения клавиатуры в рабочей зоне стола. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.
6	НСТ-ТИ	Надстройка титровальная предназначена для установки на столы, служит для размещения пипеток и бюреток для проведения медицинских исследований в лаборатории.
7	НСТ-Р	Надстройка рамная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.

Технические характеристики

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	НСТ					
2.	НСТ2					
3.	ПСБ					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
4.	ПМ					
5.	ВПК					
6.	НСТ-ТИ					
7.	НСТ-Р					

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМебель» производит мебельные изделия в соответствии с ТУ 32.50.30-008-50915213-2021. Наборы медицинской мебели производятся из безопасных материалов и предназначены для повседневного использования сотрудниками ЛПУ, лабораторий и пациентами.

На наборы мебели предоставляется гарантия сроком 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена **не осуществляется**:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия 10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие: Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для лаборатории № 1

Штамп ОТК

Упаковку и комплектацию произвёл _____

Штамп упаковщика

Регистрационное удостоверение №

ПРОДАВЕЦ

МП _____ Расшифровка подписи _____

Личная подпись

Дата продажи _____

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для лаборатории № 2

Изготовитель: ООО «БиоМебель»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

Набор медицинской мебели для лаборатории №2 в составе:

Столы одностумбовые, в вариантах исполнения

Столы одностумбовые для работы за микроскопом, в вариантах исполнения

Столы двухстумбовые, в вариантах исполнения

Столы двухстумбовые для работы за микроскопом, в вариантах исполнения

Столы трехстумбовые, в вариантах исполнения

Столы угловые, в вариантах исполнения

Шкафы для хранения лабораторной посуды, в вариантах исполнения

Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов, в вариантах исполнения

Тумбы, в вариантах исполнения

Тумбы с мойкой (при необходимости), в вариантах исполнения

Шкаф навесной (при необходимости), в вариантах исполнения

Шкафы антресольные (при необходимости), в вариантах исполнения

Руководство по эксплуатации

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели для лаборатории №2

Принадлежности для набора мебели для лаборатории №2

1. надстройка одноярусная – НСТ – 1 шт.
2. надстройка двухярусная – НСТ2 – 1 шт.
3. подставка под системный блок – ПСБ – 1 шт.
4. подставка под монитор – ПМ – 1 шт.
5. выдвижная полка под клавиатуру – ВПК – 1 шт.
6. надстройка титровальная – НСТ-ТИ – 1 шт.
7. надстройка рамная – НСТ-Р – 1 шт.
8. сушитель для лабораторной посуды навесной – НСЛП – 1 шт.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов или проведения медицинских процедур и осмотров, или лабораторных исследований. Мебельные изделия имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Основные технические характеристики

Габаритные размеры мебельных изделий устанавливаются согласно требованиям заказчика, указанным в договоре, и ограничиваются диапазонами, указанными в ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 и шагом линейных размеров, равным 5 мм в пределах установленных диапазонов.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °С и не выше +35 °С при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
- Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, кратковременно находящихся на поверхности из ЛДСП, не должна превышать +100 °С. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
- Поверхность мебели рекомендуется чистить и дезинфицировать с применением стандартных дезсредств (на основе ЧАС, алкиламинов, а также хлорактивные, кислородактивные и спиртосодержащие ДС), используемых в практике лабораторий и ЛПУ согласно инструкции по применению этих средств и МУ-287-113.
- Не рекомендуется использование абразивных чистящих средств.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку равномерно на всю рабочую поверхность.

МОНТАЖ МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия набора медицинской мебели для лаборатории №2, поставляются в собранном виде и не требуют сборки, кроме монтажа (установки) на месте эксплуатации.

Напольные мебельные изделия должны быть установлены и выровнены по уровню с использованием регулируемых опор. Пристенные мебельные изделия должны быть прикреплены к стене. Проверку комплектности поставки, а также наличие брака проверяется потребителем до монтажа изделий на месте эксплуатации.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий осуществляется методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.3684-21» для отходов класса А или Б в зависимости от места использования и потенциального заражения микроорганизмами 3-4 групп патогенности.

Перед утилизацией необходимо провести дезинфекцию мебели (см. Инструкцию по эксплуатации), мебель следует разобрать.

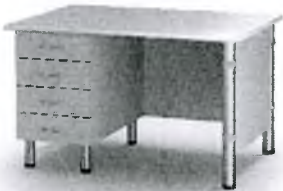
Стол� однотоумбовые

Стол� однотоумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ-01-Д					
2.	СМЛ-Д					
3.	СМЛ-01-ОД					
4.	СМЛ-ОД					
5.	СМЛ-01-ДЯ					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
6.	СМЛ1-ДЯ					
7.	СМЛ1-01-ОЯЗ					
8.	СМЛ1-ОЯЗ					
9.	СМЛ1-01-Я2					
10.	СМЛ1-Я2					
11.	СМЛ1-01-ЯЗ					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
12.	СМЛ1-ЯЗ					
13.	СМЛ1-01-Я4					
14.	СМЛ1-Я4					
15.	СМЛ1-ТСБ					

Столешники для работы за микроскопом

Столешники для работы за микроскопом предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения медицинских препаратов, медицинского оборудования и инструментов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ-01-М-Д-ВП					
2.	СМЛ-М-Я4					
3.	СМЛ-М-ДЯ					
4.	СМЛ-М-Д-ВП					
5.	СМЛ-01-М-Я4-ВП					

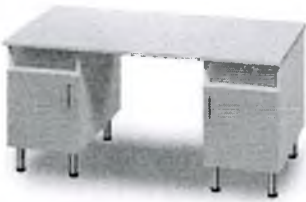
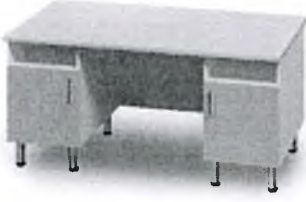
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
6.	СМЛ1-М-Я4-ВП					

Столешницы двухтумбовые

Столешницы двухтумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ1-02-Д12					
2.	СМЛ2-Д12					
3.	СМЛ1-02-Д2Я2					
4.	СМЛ2-Д2Я2					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
5.	СМЛ-02-ДЯ4					
6.	СМЛ2-ДЯ4					
7.	СМЛ-02-ОД2					
8.	СМЛ2-ОД2					
9.	СМЛ-02-ОЯ3					
10.	СМЛ2-ОЯ3					
11.	СМЛ-02-Я2					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
12.	СМЛ12-Я2					
13.	СМЛ12-Я3					
14.	СМЛ12-Я3					
15.	СМЛ12-Я4					
16.	СМЛ12-Я4					

Столешницы двухтумбовые для работы за микроскопом

Столешницы двухтумбовые для работы за микроскопом предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения медицинских препаратов, медицинского оборудования и инструментов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

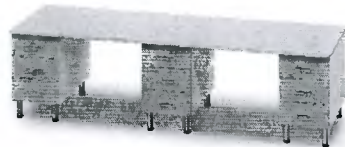
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ2-ЦЯ5					
2.	СМЛ2-ЦД2					

Столешницы трехтумбовые

Столешницы трехтумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения медицинских препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ3-ДЗ					
2.	СМЛ3-Д2Я4					

3.	СМЛЗ-ДЯЗ					
4.	СМЛЗ-О/ДЗ					
5.	СМЛЗ-ОДЗОЯЗ					
6.	СМЛЗ-ОЯ9					
7.	СМЛЗ-Я6					
8.	СМЛЗ-Я9					
9.	СМЛЗ-Я12					

Стол� угловые

Стол� угловые предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ1-У					
2.	СМЛ2-У					

Шкафы для хранения лабораторной посуды

Шкафы предназначены для упорядоченного хранения медицинских изделий, расходных материалов и лабораторной посуды. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШСО					

2.	ШМЛ1С-Я					
3.	ШМЛ1С					
4.	ШСО-Д					
5.	ШМЛ1С-5Я					
6.	ШСО2					

7.	ШМЛ2С-2Я					
8.	ШМЛ2С					
9.	ШСО-2Д					
10.	ШМЛ2С-5Я					

Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов

Шкафы предназначены для хранения реактивов, диагностических реагентов, расходных материалов, лекарственных средств и медицинских изделий. Обеспечивают защиту от солнечных лучей и ограничивают доступ к содержимому с помощью встроенных замков. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

1.	ШМЛ1					
2.	ШМЛ1-2Д					
3.	ШМЛ1-Я					
4.	ШМЛ1-5Я					
5.	ШМЛ2					

6.	ШМЛ2-2Д					
7.	ШМЛ2-2Я					
8.	ШМЛ2-5Я					

Тумбы

Тумбы предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СТО1					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
2.	СТО1-ОТ					
3.	СТО1-О					
4.	СТО1-Я					
5.	СТОЯ3-О					
6.	СТОЯ2					
7.	СТОЯ3					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
8.	СТОЯ4					
9.	СТОЯ5					
10.	СТО2					
11.	СТО2-О					
12.	СТО2-Я					
13.	СТО2-ДЯ					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
14.	СТО2-ДЯЗ					
15.	СТО2-ДЯ4					

Тумбы с мойкой (при необходимости)

Тумбы с мойкой предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов для создания мест для мытья лабораторной посуды, изготовлены из прочных влагозащищенных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

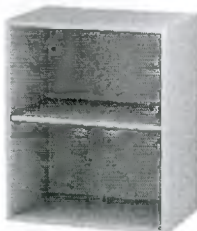
Технические характеристики вариантов исполнения

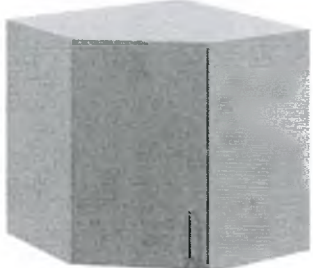
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ-Н-1Р-С					
2.	СМЛ-Н-2Р-С					
3.	СМЛ-В-1Р-С					
4.	СМЛ-В-2Р-С					

Шкафы навесные (при необходимости)

Шкафы навесные предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШМД-О					
2.	ШМД1					
3.	ШМД1С					
4.	ШМД2-О					
5.	ШМД2					
6.	ШМД2С					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
						
7.	ШМДІ-У					
8.	ШМДІС-У					

Шкафы антресольные (при необходимости)

Шкафы антресольные предназначены для хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШАС1					
2.	ШАС2					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
3.	ШАС1С					
4.	ШАС2С					

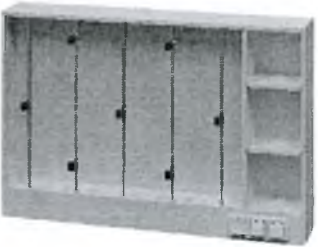
Принадлежности для набора мебели для лаборатории №2

надстройка одноярусная – НСТ	Надстройка одноярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
надстройка двухярусная – НСТ2	Надстройка двухярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
подставка под системный блок – ПСБ	Подставка под системный блок служит для размещения системного блока компьютера, входящего в состав лабораторного и медицинского оборудования. Не препятствует проведению дезинфекции помещения.
подставка под монитор – ПМ	Подставка под монитор, входящий в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения монитора на рабочем столе. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.
выдвижная полка под клавиатуру – ВПК	Выдвижная полка под клавиатуру, входящую в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения клавиатуры в рабочей зоне стола. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.
надстройка титровальная – НСТ-ТИ	Надстройка титровальная предназначена для установки на столы, служит для размещения пипеток и бюреток для проведения медицинских исследований в лаборатории
надстройка рамная – НСТ-Р	Надстройка рамная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов

сушиль для лабораторной посуды навесной – НСЛП – 1 шт.

Сушиль для лабораторной посуды навесной служит для сушки лабораторной посуды после мытья.

Технические характеристики

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	НСТ					
2.	НСТ2					
3.	ПСБ					
4.	ПМ					
5.	ВПК					
6.	НСТ-ТИ					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
7.	НСТ-Р					
8.	НСЛП					

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМебель» производит мебельные изделия в соответствии с ТУ 32.50.30-008-50915213-2021. Наборы медицинской мебели производятся из безопасных материалов и предназначены для повседневного использования сотрудниками ЛПУ, лабораторий и пациентами.

На наборы мебели предоставляется гарантия сроком 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена **не осуществляется:**

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия 10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие: Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для лаборатории № 2

Штамп ОТК

Упаковку и комплектацию произвёл _____

Штамп упаковщика

Регистрационное удостоверение №

ПРОДАВЕЦ

МП _____ Расшифровка подписи _____

Личная подпись

Дата продажи _____

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для гистологического архива

Изготовитель: ООО «БиоМебель»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

Набор медицинской мебели для гистологического архива в составе:

Шкафы архивные для гистологического материала, в вариантах исполнения

Шкафы с ISO корзинами для гистологического материала, в вариантах исполнения

Шкафы антресольные, в вариантах исполнения

Руководство по эксплуатации

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели для гистологического архива

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов или проведения медицинских процедур и осмотров, или лабораторных исследований. Мебельные изделия имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Основные технические характеристики

Габаритные размеры мебельных изделий устанавливаются согласно требованиям заказчика, указанным в договоре, и ограничиваются диапазонами, указанными в ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 и шагом линейных размеров, равным 5 мм в пределах установленных диапазонов.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °С и не выше +35 °С при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
- Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, кратковременно находящихся на поверхности из ЛДСП, не должна превышать +100 °С. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
- Поверхность мебели рекомендуется чистить и дезинфицировать с применением стандартных дезсредств (на основе ЧАС, алкиламинов, а также хлорактивные, кислородоактивные и спиртосодержащие ДС), используемых в практике лабораторий и ЛПУ согласно инструкции по применению этих средств МУ 287-113.
- Не рекомендуется использование абразивных чистящих средств.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку равномерно на всю рабочую поверхность.

МОНТАЖ МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия набора медицинской мебели для гистологического архива, поставляются в собранном виде и не требуют проверки комплектности и сборки, кроме монтажа (установки) на месте эксплуатации.

Напольные мебельные изделия должны быть установлены и выровнены по уровню с использованием регулируемых опор. Пристенные мебельные изделия должны быть прикреплены к стене. Проверку комплектности поставки, а также наличие брака проверяется потребителем до монтажа изделий на месте эксплуатации.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий осуществляется методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.3684-21» для отходов класса А или Б в зависимости от места использования и потенциального заражения микроорганизмами 3-4 групп патогенности.

Перед утилизацией необходимо провести дезинфекцию мебели (см. Инструкцию по эксплуатации), мебель следует разобрать.

Шкафы архивные для гистологического материала

Шкафы архивные для гистологического материала предназначены для упорядоченного хранения парафиновых блоков с образцами тканей и срезов образцов, заключенных на предметных стеклах. Ящики шкафов имеют вкладыши с ячейками для хранения соответствующих материалов в картотечном порядке. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШХС					
2.	ШХБ					

Шкафы с ISO корзинами для гистологического материала

Шкафы с ISO корзинами для гистологического материала предназначены для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью размещения и хранения гистологического материала. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШМЛ1-ISO					
2.	ШМЛ2-ISO					
3.	ШМЛ2-2Д-ISO					

Шкафы антресольные

Шкафы антресольные предназначены для хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШАС1					
2.	ШАС2					
3.	ШАС1С					
4.	ШАС2С					

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМебель» производит мебельные изделия в соответствии с ТУ 32.50.30-008-50915213-2021. Наборы медицинской мебели производятся из безопасных материалов и предназначены для повседневного использования сотрудниками ЛПУ, лабораторий и пациентами.

На наборы мебели предоставляется гарантия сроком 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена **не осуществляется**:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.

- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия 10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие: Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для гистологического архива.

Штамп ОТК

Упаковку и комплектацию произвёл _____

Штамп упаковщика

Регистрационное удостоверение №

ПРОДАВЕЦ

МП _____ Расшифровка подписи _____

Личная подпись

Дата продажи _____

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для кабинета врача

Изготовитель: ООО «БиоМебель»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

Набор медицинской мебели для кабинета врача в составе:

Столы однотумбовые, в вариантах исполнения

Столы двухтумбовые, в вариантах исполнения

Столы угловые, в вариантах исполнения

Столы на опорах, в вариантах исполнения

Столы пеленальные (при необходимости), в вариантах исполнения

Тумбы, в вариантах исполнения

Тумбы с мойкой (при необходимости), в вариантах исполнения

Шкафы для хранения лабораторной посуды, в вариантах исполнения

Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов, в вариантах исполнения

Руководство по эксплуатации

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели кабинета врача

Принадлежности для набора мебели для кабинета врача

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов или проведения медицинских процедур и осмотров, или лабораторных исследований. Мебельные изделия имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Основные технические характеристики

Габаритные размеры мебельных изделий устанавливаются согласно требованиям заказчика, указанным в договоре, и ограничиваются диапазонами, указанными в ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 и шагом линейных размеров, равным 5 мм в пределах установленных диапазонов.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °С и не выше +35 °С при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
- Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, кратковременно находящихся на поверхности из ЛДСП, не должна превышать +100 °С. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
- Поверхность мебели рекомендуется чистить и дезинфицировать с применением стандартных дезсредств (на основе ЧАС, алкиламинов, а также хлорактивные, кислородактивные и спиртосодержащие ДС), используемых в практике лабораторий и ЛПУ согласно инструкции по применению этих средств и МУ 287-113.
- Не рекомендуется использование абразивных чистящих средств.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку равномерно на всю рабочую поверхность.

МОНТАЖ МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия набора медицинской мебели для кабинета врача, поставляются в собранном виде и не требуют сборки, кроме монтажа (установки) на месте эксплуатации.

Напольные мебельные изделия должны быть установлены и выровнены по уровню с использованием регулируемых опор. Пристенные мебельные изделия должны быть прикреплены к стене. Проверку комплектности поставки, а также наличие брака проверяется потребителем до монтажа изделий на месте эксплуатации.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий осуществляется методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.3684-21» для отходов класса А или Б в зависимости от места использования и потенциального заражения микроорганизмами 3-4 групп патогенности.

Перед утилизацией необходимо провести дезинфекцию мебели (см. Инструкцию по эксплуатации), мебель следует разобрать.

Стол� однотоумбовые

Стол� однотоумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств..

Основные технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ1-ОЯЗ					
2.	СМЛ1-Я4					

Стол� двухтумбовые

Стол� двухтумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Основные технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ2-ОЯЗ					
2.	СМЛ2-ЯЗ					

Стол� угловые

Стол� угловые предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств

Основные технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ1-У					
2.	СМЛ2-У					

Стол� на опорах

Стол� на опорах предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и для проведения лабораторных исследований. Имеют прочные покрытия поверхностей, устойчивые к воздействию реактивов, применяемых в практике лабораторий, и дезинфицирующих средств при их систематическом применении.

Основные технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ01-У					
2.	СМЛ11-У-Б					

Стол пеленальный (при необходимости)

Стол пеленальный предназначен для проведения терапевтического осмотра новорожденных и детей младенческого возраста.

Основные технические характеристики вариантов исполнения

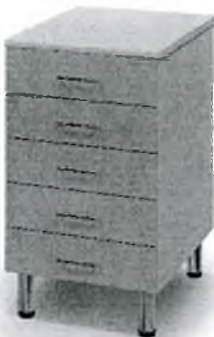
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СП-1					
2.	СП-2					

Тумбы

Тумбы предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Основные технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СТО1					
2.	СТО1-О					
3.	СТОЯ2					
4.	СТОЯ3					

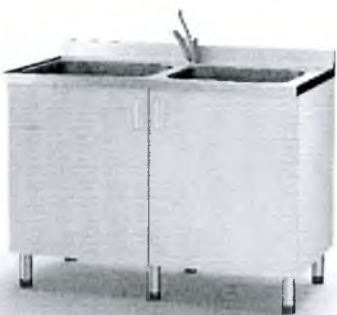
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
5.	СТОЯ4					
6.	СТОЯ5					
7.	СТО2					
8.	СТО2-ДЯЗ					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
9.	СТО2-ДЯ4					

Тумбы с мойкой (при необходимости)

Тумбы с мойкой предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов для создания мест для мытья лабораторной посуды, изготовлены из прочных влагозащищенных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Основные технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ-Н-1Р-С					
2.	СМЛ-Н-2Р-С					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
3.	СМЛ-В-1Р-С					
4.	СМЛ-В-2Р-С					

Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов

Шкафы предназначены для хранения реактивов, диагностических реагентов, расходных материалов, лекарственных средств и медицинских изделий. Обеспечивают защиту от солнечных лучей и ограничивают доступ к содержимому с помощью встроенных замков. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Основные технические характеристики вариантов исполнения

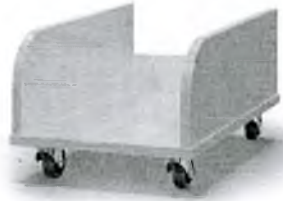
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШМЛ11-2Д					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
2.	ШМЛ12-2Д					

Принадлежности для набора медицинской мебели для кабинета врача

подставка под системный блок – ПСБ	Подставка под системный блок служит для размещения системного блока компьютера, входящего в состав лабораторного и медицинского оборудования. Не препятствует проведению дезинфекции помещения.
подставка под монитор – ПМ	Подставка под монитор, входящий в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения монитора на рабочем столе. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.
выдвижная полка под клавиатуру – ВПК	Выдвижная полка под клавиатуру, входящую в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения клавиатуры в рабочей зоне стола. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.

Основные технические характеристики

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ПСБ					
2.	ПМ		500	300	100	4
3.	ВПК		500	350	80	3

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМебель» производит мебельные изделия в соответствии с ТУ 32.50.30-008-50915213-2021. Наборы медицинской мебели производятся из безопасных материалов и предназначены для повседневного использования сотрудниками ЛПУ, лабораторий и пациентами.

На наборы мебели предоставляется гарантия сроком 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена **не осуществляется**:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия 10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие: Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для кабинета врача

Штамп ОТК

Упаковку и комплектацию произвёл _____

Штамп упаковщика

Регистрационное удостоверение № _____

ПРОДАВЕЦ

МП _____ Расшифровка подписи _____

Личная подпись

Дата продажи _____

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов и ординаторских

Изготовитель: ООО «БиоМебель»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов и ординаторских в составе:

Столлы однотоумбовые, в вариантах исполнения

Столлы двухтоумбовые, в вариантах исполнения

Столлы трехтоумбовые, в вариантах исполнения

Тоумбы, в вариантах исполнения

Тоумба с мойкой (при необходимости), в вариантах исполнения

Шкафы навесные (при необходимости), в вариантах исполнения

Шкафы антресольные, в вариантах исполнения

Шкафы для хранения лабораторной посуды, в вариантах исполнения

Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов, в вариантах исполнения

Тоумба подкатная для транспортировки лекарственных препаратов (при необходимости)

Руководство по эксплуатации

Паспорт мебельных изделий для набора медицинской мебели для процедурных кабинетов и ординаторских

Принадлежности для набора мебели для процедурных кабинетов и ординаторских

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов или проведения медицинских процедур и осмотров, или лабораторных исследований. Мебельные изделия имеют прочные покрытия, устойчивые к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Основные технические характеристики

Габаритные размеры мебельных изделий устанавливаются согласно требованиям заказчика, указанным в договоре, и ограничиваются диапазонами, указанными в ТУ 32.50.30-008-50915213-2021 и шагом линейных размеров, равным 5 мм в пределах установленных диапазонов.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °С и не выше +35 °С при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
- Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, кратковременно находящихся на поверхности из ЛДСП, не должна превышать +100 °С. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
- Поверхность мебели рекомендуется чистить и дезинфицировать с применением стандартных дезсредств (на основе ЧАС, алкиламинов, а также хлорактивные, кислородактивные и спиртосодержащие ДС), используемых в практике лабораторий и ЛПУ согласно инструкции по применению этих средств и МУ 287-113.
- Не рекомендуется использование абразивных чистящих средств.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку равномерно на всю рабочую поверхность.

МОНТАЖ МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия набора медицинской мебели для процедурных кабинетов и ординаторских, поставляются в собранном виде и не требуют проверки комплектности и сборки, кроме монтажа (установки) на месте эксплуатации.

Напольные мебельные изделия должны быть установлены и выровнены по уровню с использованием регулируемых опор. Пристенные мебельные изделия должны быть прикреплены к стене. Проверку комплектности поставки, а также наличие брака проверяется потребителем до монтажа изделий на месте эксплуатации.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

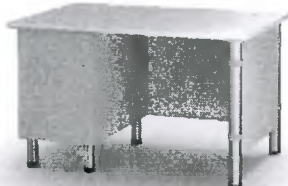
Утилизация мебельных изделий осуществляется методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.3684-21» для отходов класса А или Б в зависимости от места использования и потенциального заражения микроорганизмами 3-4 групп патогенности.

Перед утилизацией необходимо провести дезинфекцию мебели (см. Инструкцию по эксплуатации), мебель следует разобрать.

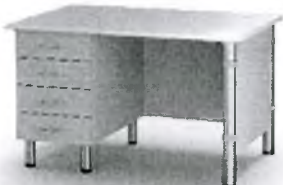
Стол� однотоумбовые

Стол� однотоумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ-01-Д					
2.	СМЛ1-Д					
3.	СМЛ-01-ОД					
4.	СМЛ1-ОД					
5.	СМЛ-01-ДЯ					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
6.	СМЛ1-ДЯ					
7.	СМЛ-01-ОЯ3					
8.	СМЛ11-ОЯ3					
9.	СМЛ-01-Я2					
10.	СМЛ11-Я2					
11.	СМЛ1-01-Я3					

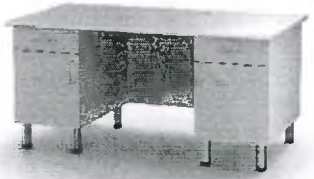
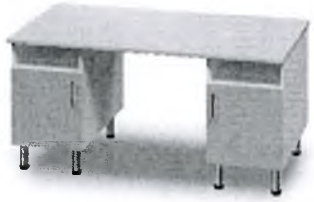
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
12.	СМЛП-ЯЗ					
13.	СМЛП-01-Я4					
14.	СМЛП-Я4					
15.	СМЛП-ТСБ					

Столы двухтумбовые

Столы двухтумбовые предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ-02-Д2					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
2.	СМЛ2-Д2					
3.	СМЛ1-02-Д2Я2					
4.	СМЛ2-Д2Я2					
5.	СМЛ-02-ДЯ4					
6.	СМЛ2-ДЯ4					
7.	СМЛ1-02-ОД2					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
8.	СМЛ2-ОД2					
9.	СМЛ-02-ОЯ3					
10.	СМЛ2-ОЯ3					
11.	СМЛ-02-Я2					
12.	СМЛ2-Я2					
13.	СМЛ-02-Я3					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
14.	СМЛ12-Я3					
15.	СМЛ-02-Я4					
16.	СМЛ2-Я4					

Столешницы трехдверные

Столешницы трехдверные предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения медицинских препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ13-ДЗ					
2.	СМЛ13-Д2Я4					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
3.	СМЛЗ-ДЯЗ					
4.	СМЛЗ-ОДЗ					
5.	СМЛЗ-ОДЗОЯЗ					
6.	СМЛЗ-ОЯ9					
7.	СМЛЗ-Я6					
8.	СМЛЗ-Я9					
9.	СМЛЗ-Я12					

Тумбы

Тумбы предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СТО1					
2.	СТО1-Я					
3.	СТОЯ2					
4.	СТОЯ3					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
5.	СТОЯ4					
6.	СТОЯ5					
7.	СТО2					
8.	СТО2-Я					
9.	СТО2-ДЯ					
10.	СТО2-ДЯЗ					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
11.	СТО2-ДЯ4					

Тумбы с мойкой (при необходимости)

Тумбы с мойкой предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов для создания мест для мытья лабораторной посуды, изготовлены из прочных влагозащищенных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	СМЛ-Н-1Р-С					
2.	СМЛ-Н-2Р-С					
3.	СМЛ-В-1Р-С					

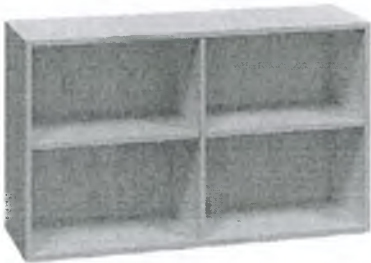
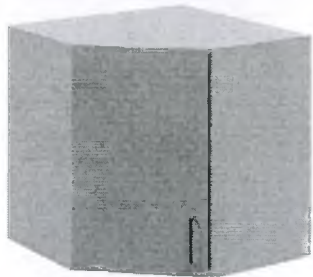
№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
4.	СМЛ-В-2Р-С					

Шкафы навесные (при необходимости)

Шкафы навесные предназначены для оборудования специализированных медицинских кабинетов с целью хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШМД-О					
2.	ШМДІ					
3.	ШМДІС					

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
4.	ШМД2-О					
5.	ШМД2					
6.	ШМД2С					
7.	ШМД1-У					
8.	ШМД1С-У					

Шкафы антресольные (при необходимости)

Шкафы антресольные предназначены для хранения медицинских изделий, расходных материалов, образцов и лекарственных средств. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

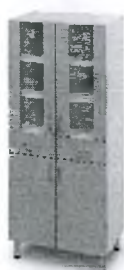
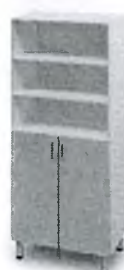
Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШАС1					
2.	ШАС2					
3.	ШАС1С					
4.	ШАС2С					

Шкафы для хранения лабораторной посуды

Шкафы предназначены для упорядоченного хранения медицинских изделий, расходных материалов и лабораторной посуды. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

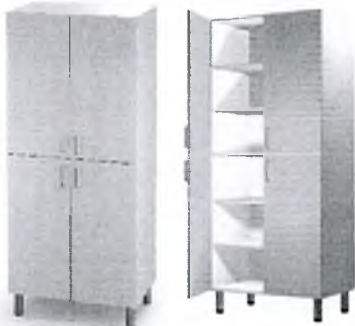
Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
	ШМЛ1С-Я					
2.	ШСО-Д					
3.	ШМЛ1С-5Я					
4.	ШМЛ1С-2Я					
5.	ШСО-2Д					

Шкафы для хранения лекарственных средств и реагентов

Шкафы предназначены для хранения реактивов, диагностических реагентов, расходных материалов, лекарственных средств и медицинских изделий. Обеспечивают защиту от солнечных лучей и ограничивают доступ к содержимому с помощью встроенных замков. Шкафы изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики вариантов исполнения

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	ШМЛ12					
2.	ШМЛ2-2Д					
3.	ШМЛ1					
4.	ШМЛ1-2Д					

Тумба подкатная для транспортировки лекарственных препаратов (при необходимости)

Тумба-тележка для транспортировки лекарственных препаратов служит для развоза лекарств пациентам в пределах ЛПУ, имеет запираемые дверцы, оснащена ISO корзинами для размещения лекарств и рабочей поверхностью. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Технические характеристики

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	Т-ЛП					

Принадлежности для набора медицинской мебели для процедурных кабинетов и ординаторских

надстройка одноярусная – НСТ	Надстройка одноярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
надстройка двухярусная – НСТ2	Надстройка двухярусная предназначена для установки на столы, служит для размещения негабаритного медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов.
подставка под системный блок – ПСБ	Подставка под системный блок служит для размещения системного блока компьютера, входящего в состав лабораторного и медицинского оборудования. Не препятствует проведению дезинфекции помещения.
подставка под монитор – ПМ	Подставка под монитор, входящий в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения монитора на рабочем столе. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.
выдвижная полка под клавиатуру – ВПК	Выдвижная полка под клавиатуру, входящую в состав лабораторного и медицинского оборудования, служит для эргономичного размещения клавиатуры в рабочей зоне стола. Облегчает проведение дезинфекции поверхности стола.

Технические характеристики

№ п/п	Обозначение	Изображение	Габаритные размеры изделия в мм			Масса, кг
			Длина	Глубина	Высота	
1.	НСТ					
2.	НСТ2					
3.	ПСБ					
4.	ПМ					
5.	ВПК					

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМебель» производит мебельные изделия в соответствии с ТУ 32.50.30-008-50915213-2021. Наборы медицинской мебели производятся из безопасных материалов и предназначены для повседневного использования сотрудниками ЛПУ, лабораторий и пациентами.

На наборы мебели предоставляется гарантия сроком 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия 10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие: Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и лабораторий по ТУ 32.50.30-008-50915213-2021: Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов и ординаторских

Штамп ОТК

Упаковку и комплектацию произвёл _____

Штамп упаковщика

Регистрационное удостоверение №

ПРОДАВЕЦ

МП _____ Расшифровка подписи _____

Личная подпись

Дата продажи _____

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 86 лист 06
Директор ООО «БиоМebelь»
Кононенко М.В.

