

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПО ПРОМЕТ»



Е.В. Петров

10 июня 2024 г.

Руководство по эксплуатации

Набор мебели медицинской МД для оборудования кабинетов и палат по ТУ 9452-005-47270095-2015

производства ООО «НПО ПРОМЕТ», Россия

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	5
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	5
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	5
ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	6
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ..	8
МАРКИРОВКА, УПАКОВКА	8
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА	8
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
ОЧИСТКА И УХОД	9
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	9
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА	10

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор мебели медицинской МД для оборудования кабинетов и палат

по ТУ 9452-005-47270095-2015:

Вариант 1:

1. Шкаф МД 1 1650/SS – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-1 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 2N – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 2:

1. Шкаф МД 1 1650/SG – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-2 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 3G – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 3:

1. Шкаф МД 1 1657/SS – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-3 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 2G – 1 шт. (при необходимости);
6. Стол хирургический МД CX – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 4:

1. Шкаф МД 1 1657/SG – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-4 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 3N – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 5:

1. Шкаф МД 2 1670/SS – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-5 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP N – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 6:

1. Шкаф МД 2 1670/SG – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-6 – 1 шт.;
5. Стол манипуляционный МД SM 1 – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 7:

1. Шкаф МД 1 1760/SS – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-7 – 1 шт. (при необходимости);
5. Стол манипуляционный МД SM N – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 8:

1. Шкаф МД 1 1760/SG – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-8 – 1 шт.;
5. Стол манипуляционный МД SM 2 – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 9:

1. Шкаф МД 2 1780/SS – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);

3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТПЛ-9 – 1 шт.;
5. Стол манипуляционный МД SM 6 – 1 шт.;
6. Стол хирургический МД CX – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 10:

1. Шкаф МД 2 1780/SG – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-1 – 1 шт.;
5. Стол хирургический МД CX – 1 шт.;

Вариант 11:

1. Шкаф МД 1 ШМ-SS – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-2 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 2N – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 12:

1. Шкаф МД 1 ШМ-SSD – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-3 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 3G – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 13:

1. Шкаф МД 1 1760 R – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТПЛ-4 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP N – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 14:

1. Шкаф МД 1 1760 R-1 – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТПЛ-5 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SM 2 – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 15:

1. Шкаф МД 2 ШМ – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТПЛ-6 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 2N – 1 шт.;
6. Стол хирургический МД CX – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 16:

1. Шкаф МД 2 ШМ-SS – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТПЛ-7 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 3G – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 17:

1. Шкаф МД 2 ШМ-SSR – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТПЛ-8 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 2G – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 18:

1. Шкаф МД 2 ШМ-SSK – 1 шт.;

2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТПЛ-9 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP 3N – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 19:

1. Шкаф МД 2 1780 R – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-1 – 1 шт.;
5. Стол процедурный МД SP N – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 20:

1. Шкаф МД 2 1780 R-1 – 1 шт.;
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТП-2 – 1 шт.;
5. Тумба МД ТПЛ-6 – 1 шт. (при необходимости);
6. Стол манипуляционный МД SM 1 – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 21:

1. Шкаф МД 2 1780 R-5 – 1 шт. (при необходимости);
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Тумба МД ТПЛ-9 – 1 шт.;
5. Стол манипуляционный МД SM N – 1 шт. (при необходимости);

Вариант 22:

1. Шкаф МД 1 1657/SS – 1 шт. (при необходимости);
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Стол процедурный МД SP 2G – 1 шт.;
5. Банкетка терапевтическая МД Б – 1 шт.;

Вариант 23:

1. Шкаф МД 2 1670/SS – 1 шт. (при необходимости);
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Стол процедурный МД SP N – 1 шт.;
5. Банкетка терапевтическая МД БС – 1 шт.;

Вариант 24:

1. Шкаф МД 2 1670/SG – 1 шт. (при необходимости);
2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. (при необходимости);
3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1 шт. (при необходимости);
4. Стол манипуляционный МД SM 1 – 1 шт.;
5. Банкетка терапевтическая МД БСП – 1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ» (ООО «НПО ПРОМЕТ»),
301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

Адрес места производства:

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ» (ООО «НПО ПРОМЕТ»),
301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Настоящие технические условия распространяются на медицинское изделие «Набор мебели медицинской МД для оборудования кабинетов и палат по ТУ 9452-005-47270095-2015» (далее — набор мебели), предназначенный для оборудования процедурных кабинетов, кабинетов диагностики и других специальных медицинских помещений в медицинских учреждениях с целью размещения лекарственных средств, размещения и хранения медицинского инструмента, перевязочных материалов, а также для проведения медицинских манипуляций в процедурных кабинетах и кабинетах хирургической помощи.

Набор мебели комплектуется шкафами, тумбами, столами, банкетками терапевтическими, (далее — изделия мебели, мебель).

Шкаф МД предназначен для оборудования специализированных (хирургических, операционных, процедурных, диагностических) медицинских кабинетов с целью размещения медикаментов, размещения и хранения расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Тумба МД предназначена для оборудования специализированных (хирургических, операционных, процедурных, диагностических) медицинских кабинетов с целью размещения медикаментов, размещения и хранения расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Стол процедурный МД SP предназначен для оборудования специализированных (процедурных, диагностических) медицинских кабинетов с целью размещения медикаментов, размещения и хранения расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Стол хирургический МД СХ предназначен для оборудования специализированных (хирургических, операционных, процедурных, диагностических) медицинских кабинетов с целью размещения медикаментов, размещения и хранения расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Стол манипуляционный МД SM предназначен для оборудования специализированных (хирургических, процедурных, диагностических) медицинских кабинетов с целью размещения медикаментов, размещения и хранения расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Шкаф МД трейзер предназначен для оборудования в специализированных (хирургических, процедурных, диагностических) медицинских кабинетах в шкафах мест ограниченного доступа при размещении медикаментов, размещении и хранении расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Банкетка терапевтическая МД Б, МД БС, МД БСП предназначена для оборудования в специализированных (процедурных, диагностических) медицинских кабинетах с целью размещения пациентов и проведения диагностики и манипуляционных действий над ними.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению — процедурные кабинеты, операционные, кабинеты диагностики и другие специальные медицинские помещения, в медицинских учреждениях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Отсутствуют

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Основные технические характеристики количество отделений, ящиков, дверей, полок, масса изделий мебели должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Изделие мебели	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Размеры (В×Ш×Г) отделения, мм	Кол-во отделений, ящиков, шт.	Кол-во дверей, шт.	Кол-во полок, шт.	Масса, кг
Шкаф МД 1 ШМ-SS	1830/1900×500×500	1768×498×460	1	1 (металл)	3 (в комплекте)	26
Шкаф МД 1 ШМ-SSD	1850×600×400	822×598×360, 621×598×360	1 отделение, 1 ящик	1 (ЛДСП), 1 (стекло в рамке)	2 (сталь), 2 (стекло)	43
Шкаф МД 1 1760 R	1850×600×400	822×598×360	2	1 (сталь), 1 (стекло в рамке)	4 (в комплекте)	35,3
Шкаф МД 1 1760 R-1	1850-600-400	822×598×360, 621×598×360	2 отделения, 1 ящик	1 (сталь), 1 (стекло в рамке)	3 (в комплекте)	34,3
Шкаф МД 2 ШМ	1830×915×458	1750×456×390	2	2 (металл)	6 (в комплекте)	47
Шкаф МД 2 ШМ-SS	1830/1920×575×500	1746×300/274×468	2	2 (металл)	2 (в комплекте)	29,2
Шкаф МД 2 ШМ SSR	1865×800×400	823×731×365/ 821×731×365	2	2 (ЛДСП), 2 (стекло в рамке)	2 (сталь), 2 (стекло)	58
Шкаф МД 2 ШМ SSK	1865×800×400	823×731×365/ 821×354×365	2 отделения, 5 ящиков	1 (ЛДСП), 2 (стекло в рамке)	2 (сталь), 2 (стекло)	70
Шкаф МД 2 1780 R	1850×800×400	822-798-360	2	2 (сталь), 2 (стекло в рамке)	4 (в комплекте)	47,8
Шкаф МД 2 1780 R-1	1850×800×400	822×798×360/ 621×798×360	2 отделения, 2 ящика	2 (сталь), 2 (стекло)	3 (в комплекте)	49,3
Шкаф МД 2 1780 R-5	1850×800×400	822×798×360/ 822×398×360	2 отделения, 5 ящиков	1 (сталь), 2 (стекло в рамке)	4 (в комплекте)	53,1
Тумба МД ТП-1	652,5×420×490	308×416×463/ 125×416×463	2 отделения, 1 ящик	1	1	16,5
Тумба МД ТП-2	652,5×420×490	456×416×463	1 отделение, 1 ящик	1	1	15,7
Тумба МД ТП-3	652,5×420×490	114×416×463/ 456×416×463	2	1	1	12,5
Тумба МД ТП-4	700×420×490	-	3 ящика	-	-	21,2
Тумба МД ТП-5	860×450×466	304×361×426	1 отделение, 1 ящик	1 (металл)	1	15,9
Тумба МД ТП-6	720×420×490	431×416×463	1 отделение, 1 ящик	1	1	20
Тумба МД ТП-7	718×423×515	114×416×463/ 431×416×463	2 отделения	1	1	16,2
Тумба МД ТП-8	718×423×515	-	3 ящика	-	-	25,9
Тумба МД ТП-9	860...1150×650×490	456×416×463	1 ящик, 1 отделение, на тумбе установлен откидной столик	1	1	23,1
Стол процедурный МД SP 2N	960×620×450	-	-	-	2 (нерж. сталь)	8,9
Стол процедурный МД SP 3G	960×630×470	-	-	-	3 (стекло)	18,5

Стол процедурный МД SP 2G	960×630×470	—	—	—	2 (стекло)	12,5
Стол процедурный МД SP 3N	960×620×450	—	—	—	3 (нерж. сталь)	11,5
Стол процедурный МД SP N	790...1150×700×410	—	—	—	1	12
Стол манипуляционный МД SM 1	960×602×450	—	1 ящик	—	2	18
Стол манипуляционный МД SM N	890×680×440	—	—	—	—	10,3
Стол манипуляционный МД SM 2	960×620×450	—	2 ящика	—	3	27,8
Стол манипуляционный МД SM 6	960×620×450	—	6 ящиков	—	1	36,4
Стол хирургический МД CX	755...1055×560×414	—	—	—	1 (нерж. сталь)	9,4
Шкаф МД 2 1780/SS	1850×800×400	822×798×360	2	4 (сталь)	4 (сталь)	40,4
Шкаф МД 1 1760/SS	1850×600×400	822×598×360	2	2 (сталь)	4 (сталь)	32,3
Шкаф МД 1 1760/SG	1881×600×400	822×598×360	2	1 (сталь), 1 (стекло)	2 (сталь), 2 (стекло)	35,3
Шкаф МД 2 1670/SS	1755×700×320	805×698×280	2	4 (сталь)	4 (сталь)	33,3
Шкаф МД 2 1670/SG	1755×700×320	775×698×280	2	2 (сталь), 2 (стекло)	2 (сталь), 2 (стекло)	35,5
Шкаф МД 2 1780/SG	1750/1850*×800×400	822×798×360	2	2 (стекло), 2 (сталь)	2 (сталь), 2 (стекло)	47,8
Шкаф МД 1 1650/SS	1655/1755*×500×320	775×498×280	2	2 (сталь)	4 (сталь)	24,9
Шкаф МД 1 1650/SG	1655/1755*×500×320	775×498×280	2	1 (сталь), 1 (стекло)	2 (сталь), 2 (стекло)	26,6
Шкаф МД 1 1657/SS	1655/1755*×570×320	775×568×280	2	2 (сталь)	4 (сталь)	27,1
Шкаф МД 1 1657/SG	1655/1755*×570×320	775×568×280	2	1 (сталь), 1 (стекло)	2 (сталь), 2 (стекло)	29,3
Шкаф МД трейзер 1650	240×427×252	238×425×222	1	1	—	4,45
Шкаф МД трейзер 1670	240×627×252	238×625×222	1	2	—	6,1
Банкетка терапевтическая МД Б	1520×470×475	—	—	—	—	14,5
Банкетка терапевтическая МД БС	1520×550×900	—	—	—	—	22,5
Банкетка терапевтическая МД БСП	1520×550×900	—	—	—	—	23

Примечания:

1 Размеры, указанные через символ «...» — высота в крайнем нижнем и крайнем верхнем положении (изменяется с помощью ручки регулировки высоты).

2 Размеры, обозначенные символом «*», — высота в крайнем нижнем и крайнем верхнем положении (изменяется с помощью регулируемых опор).

3 Допустимые отклонения массы — ±10 %.

4 Предельные отклонения размеров — ±10 %.

• Допустимая нагрузка на одну металлическую полку и на один выдвижной ящик тумбы МД ТП должна быть не более 15 кг.

• Допустимая нагрузка на одну металлическую полку стола манипуляционного МД SM должна быть не более 10 кг.

- Допустимая нагрузка на один большой выдвижной ящик стола манипуляционного МД SM должна быть не более 15 кг, на маленький не более 5 кг.
- Для шкафов МД 1(2) 1650 (1657, 1670, 1760, 1780) /SS(SG) допустимая нагрузка на одну металлическую полку должна быть не более 30 кг, на одну стеклянную полку — не более 10 кг.
- Допустимая нагрузка на шкаф МД 1(2) 1650 (1657, 1670, 1760, 1780)/SS(SG) должна быть не более 250 кг.
- Предельная равномерно распределенная номинальная нагрузка на банкетку должна быть не более 250 кг.
- Столы и тумбы должны быть снабжены колёсными опорами диаметром 50 мм, две из которых должны иметь фиксирующее устройство. Усилие перемещения столов и тумб должно быть равномерным во всех направлениях и не превышать 15 Н.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В составе медицинского изделия отсутствуют материалы животного или человеческого происхождения, а также лекаственные средства

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА

Маркировка набора мебели должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, Маркировка каждого изделия мебели должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- серийный номер;
- номер регистрационного удостоверения;
- дату изготовления;
- обозначение настоящих ТУ;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы, установленный предприятием-изготовителем.

На упаковочных коробках изделий мебели должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- серийный номер;
- дату изготовления (упаковывания);
- наименование изделия;
- цвет;
- номер регистрационного удостоверения;
- грузовое место;
- обозначение настоящих ТУ;
- условия хранения;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- транспортную маркировку груза (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192):
- знак «Осторожно, хрупкое»;
- знак «Беречь от влаги».

Изделие упаковывается в картонный ящик по ГОСТ 9142.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Набор мебели транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования набора мебели в части воздействия климатических факторов — 5 по ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха — от минус 50 °С до +50 °С;
- относительная влажность воздуха — 96 % при температуре +35 °С.

Набор мебели в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70 %.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия мебели устанавливаются на горизонтальную поверхность и при необходимости выравниваются с помощью регулируемых опор (при наличии).

При возникновении неисправности следует обратиться в адрес предприятия-изготовителя или в сервисную службу, уполномоченную предприятием-изготовителем.

При эксплуатации изделия следует удостовериться в отсутствии дефектов перед применением.

При эксплуатации изделия следует использовать защитные перчатки.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева изделий мебели не должна превышать +40 °С.

Набор мебели должен эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 °С и относительной влажности не более 60 %.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Набор мебели не должен содержать веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Количество вредных веществ, выделяющихся из дверей и ящиков, не должно превышать величин, установленных органами санитарного надзора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт изделий набора мебели производится обученными специалистами сервисной службы предприятия-изготовителя или службы уполномоченной предприятием-изготовителем в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

ОЧИСТКА И УХОД

Набор мебели и его составные части подлежат очистке и дезинфекции способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства. Дезинфекция проводится в соответствии с МУ-287-113 протиранием наружных поверхностей салфеткой, смоченной 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1%-ным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания срока эксплуатации набор мебели должен быть утилизирован в соответствии с СанПиН 2.1.3684, класс А.

Утилизация частей набора мебели, имевших контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, класс Б, и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с организацией, имеющей соответствующую лицензию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие наборов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения изделий мебели в упаковке предприятия-изготовителя 2 года со дня упаковывания.

Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели — 1 год с даты продажи или даты изготовления (при отсутствии отметки о дате продажи). Гарантийные обязательства обеспечиваются квалификацией персонала и использованием новейшего оборудования и материалов.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании «Промет» Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Продукция изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

