

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцева Д.Г.
2024 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической
крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»

Макет этикеток




Вариант исполнения 1

Кат. № 300-73

На пачку:

ВерсаФлоу

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической
крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

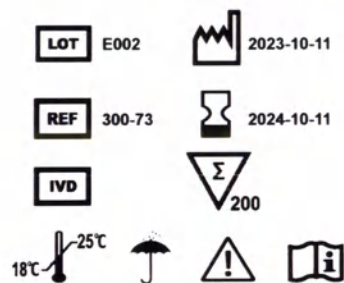


Состав набора:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Лизирующий раствор | 1 фл. (220 мл) |
| 2. Инструкция | 1 шт. |
| 3. Паспорт | 1 шт. |

ТУ 21.20.23-710-98539446-2023
РУ №



ВерсаФлоу

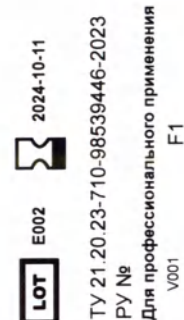

На флаконы:



«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 300-73

На пакет:



FLOW
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ

ВерсаФлоу

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

LOT E002




REF 300-73

2023-10-11



2024-10-11

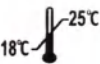

Состав набора:

1. Лизирующий раствор 1 фл. (220 мл)
2. Инструкция 1 шт.
3. Паспорт 1 шт.

Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-710-98539446-2023
РУ №

F1

V001



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

На флаконы:



Лизирующий раствор

REF 300-73

объем 220 мл

серия № E002

годен до 2024-10-11

готов к использованию

хранить при +18...+25°C



«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 300-74

На пачку:

ВерсаФлоу

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической
крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023



LOT E002 2023-10-11

REF 300-74 2024-10-11

IVD 200

18°C -25°C

Состав набора:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Лизирующий раствор | 1 фл. (220 мл) |
| 2. Фиксирующий раствор (100X) | 1 фл. (4 мл) |
| 3. Буферный раствор | 1 фл. (110 мл) |
| 4. Инструкция | 1 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |

ТУ 21.20.23-710-98539446-2023
РУ №

ВерсаФлоу

LOT E002 2024-10-11
ТУ 21.20.23-710-98539446-2023
РУ №
Для профессионального применения
V001 F1

На флаконы:

Лизирующий раствор
REF 300-74
объем 220 мл
серия № E002
годен до 2024-10-11
готов к использованию
хранить при +18...+25°C

IVD

ALKOR BIO

Буферный раствор
REF 300-74
объем 110 мл
серия № E002
годен до 2024-10-11
готов к использованию
хранить при +18...+25°C

IVD

ALKOR BIO

Фиксирующий раствор (100X)
REF 300-74
объем 4 мл
серия № E002 годен до 2024-10-11
хранить при +18...+25°C
готов к использованию

IVD

ALKOR BIO

«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 300-74

На пакет:



FLOW
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ

ВерсаФлоу


Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

LOT E002

REF 300-74

2023-10-11

2024-10-11

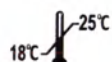

Состав набора:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Лизирующий раствор | 1 фл. (220 мл) |
| 2. Фиксирующий раствор (100X) | 1 фл. (4 мл) |
| 3. Буферный раствор | 1 фл. (110 мл) |
| 4. Инструкция | 1 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |

Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-710-98539446-2023
ПУ №

F1

V001



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

На флаконы:

АЛКОР БИО

Лизирующий раствор

REF 300-74

объем 220 мл
серия № E002
годен до 2024-10-11
готов к использованию
хранить при +18...+25°C



V001

АЛКОР БИО

Буферный раствор

REF 300-74

объем 110 мл
серия № E002
годен до 2024-10-11
готов к использованию
хранить при +18...+25°C



V001

АЛКОР БИО

Фиксирующий раствор (100X)

REF 300-74

объем 4 мл
серия № E002 годен до 2024-10-11
хранить при +18...+25°C
готов к использованию



V001

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

5 (11576) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Полынцев Д.Г.



20 24 г.

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической
крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

ГРУППА КОМПАНИЙ

АЛКОР БИО

FLOW

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ

ВерсаФлоу

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

LOT

E002

REF

300-73

2023-10-11

2024-10-11

18°C

25°C

IVD

Состав набора:

1. Лизирующий раствор

1 фл. (220 мл)

2. Инструкция

1 шт.

3. Паспорт

1 шт.

Для профессионального применения

ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

000 «Компания Алкор Био»

192148, Россия, г. Санкт-Петербург,

Железнодорожный пр., 40, лит. А

info@alkorbio.ru

www.alkorbio.ru

горячая линия:

+7 (812) 677 2162

+7 (812) 677 8779

+7 (800) 234 3779

Лизирующий раствор

REF 300-73

объем

220 мл

серия №

E002

годен до

2024-10-11

готов к использованию

хранить при +18...+25°C

IVD

«ВерсаФлоу»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынин Д.Г.
«...» ... 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»

Исследования клеточного жёна иммунной системы занимают важное место при диагностике иммунологических заболеваний. Идентификация лейкоцитарных субпопуляций по морфологическим аддуктам, их количественное определение и оценка активности осуществляется с помощью проточной цитометрии.

Для проведения цитофлуориметрического исследования необходима качественная подготовка образцов: обогащение компонентов крови специфическими моноклональными антителами, мечеными флуорохромами, лизис эритроцитов; фиксация лейкоцитов. Лизис эритроцитов обеспечивает удобную идентификацию и выдел лейкоцитов и статистически достоверное количество, особенно при этом время исследования и объем анализируемой проточной цитометрии информации.

Набор «ВерсаФлоу» позволяет провести подготовку лейкоцитов цельной периферической крови к проведению цитофлуориметрического анализа.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. «Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023» (далее по тексту – набор «ВерсаФлоу») предназначен для лизиса эритроцитов в цельной периферической крови (с лизисом солью гепарина или с калиевой солью ЭДТА (КЭДТА)) и подготовки образцов к проведению цитофлуориметрического анализа лейкоцитов.

Набор «ВерсаФлоу» может быть использован при подготовке проб для ручного лизиса с однократной фиксацией лейкоцитов или без фиксации.

1.2. Функциональное назначение набора – вспомогательное средство для проведения цитофлуориметрического анализа. Применяется для подготовки лейкоцитов цельной периферической крови к цитофлуориметрическому исследованию.

1.3. Показания к применению: набор «ВерсаФлоу» предназначен для цитофлуориметрического анализа иммунного статуса человека.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон-факс: (812) 677-87-79
П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

Кат. № 200-73 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма упаковки	Количество	Серия реагента	Соответствие контролируемому параметру
Лизирующий раствор	Бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость	1 флакон (220 мл)	E002	соответствует
Паспорт		1 шт.	-	-
Инструкция по применению		1 шт.	-	-

Параметры контроля качества		
Наименование контролируемого параметра	Норма	Соответствие контролируемому параметру
Визуальный контроль субпопуляций по размеру и гранулярности (F5/SS3)	Типичное расположение лейкоцитарных фракций	соответствует
«Открытие» в лейкограмме, процент, не менее	80	соответствует
«Чистота» субпопуляции CD45 лиз, процент, не менее	95	соответствует
Упаковка и маркировка	Флакон 250 мл из полипропилена низкого давления (с закрывающейся крышкой). Этикетка из ленты клеевой на бумажной основе	соответствует

«Версифлоу»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алар Био»
Полномочия ДЛ
_____ 2023 г.

ООО «Компания Алар Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-47-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«Версифлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

Кат. № 300-73 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Количество	Серия реагента	Соответствие контрольного параметра
Состав набора				
Лизирующий раствор	Бесцветная или светло-желтого цвета прозрачная жидкость	1 флакон (220 мл)	E002	соответствует
Паспорт		1 шт.	-	-
Инструкция по применению		1 шт.	-	-

Параметры контроля качества		
Наименование контролируемого параметра	Порка	Соответствие контролируемого параметра
Визуальный контроль субфракций по размеру и группировке (P55/33)	Типичная расколотая лимфоцитарная фракция	соответствует
«Открытость» в лизисе эритроцитов, процент, не менее	80	соответствует
«Чистота» субфракции CD45 поц, процент, не менее	95	соответствует
Упаковка и маркировка	Флакон 250 мл из поликарбоната бесцветного (или прозрачного) цвета. Этикетка из бумаги клеевая на бумажной основе	соответствует

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского назначения для диагностики in vitro

«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «Версифлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»

Использование качественного метода лизиса эритроцитов позволяет избежать ошибок при определении морфологических показателей. Идентификация лимфоцитарных субфракций по морфологическим характеристикам, их количественное определение и оценка активности осуществляется с помощью проточной цитометрии.

Для проведения цитофлуориметрического исследования необходима качественная подготовка образца: переизмельчение клеток, удаление фибринов, фазовый лизис. Набор реагентов «Версифлоу» обеспечивает удобный цитофлуориметрический анализ лизиса эритроцитов, позволяя при этом избежать загрязнения и избытка цитоплазматической проточной цитометрии информации.

Набор «Версифлоу» позволяет проводить подготовку лизиса цельной периферической крови к проведению цитофлуориметрического анализа.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. «Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «Версифлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023» (далее по тексту – набор «Версифлоу») предназначен для лизиса эритроцитов в цельной периферической крови (с лизисом клеток гепатоцитов или с лизисом клеток CD45) и подготовки образца к проведению цитофлуориметрического анализа лизиса.

Набор «Версифлоу» может быть использован при подготовке проб для ручного лизиса с последующей фазовой лизисом или без фазового.

1.2. Функциональное назначение набора – вспомогательное средство для проведения цитофлуориметрического анализа. Применяется для подготовки лизиса цельной периферической крови к цитофлуориметрическому исследованию.

1.3. Показания к применению: набор «Версифлоу» предназначен для цитофлуориметрической оценки иммунного статуса человека.

Версифлоу

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «Версифлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

LOT E002 2023-10-11

REF 300-73 2024-10-11


IVD 200

18°C 25°C 18°C 25°C

Состав набора:

1. Лизирующий раствор 1 фл. (220 мл)
2. Инструкция 1 шт.
3. Паспорт 1 шт.

ТУ 21.20.23-710-98539446-2023
РУ №

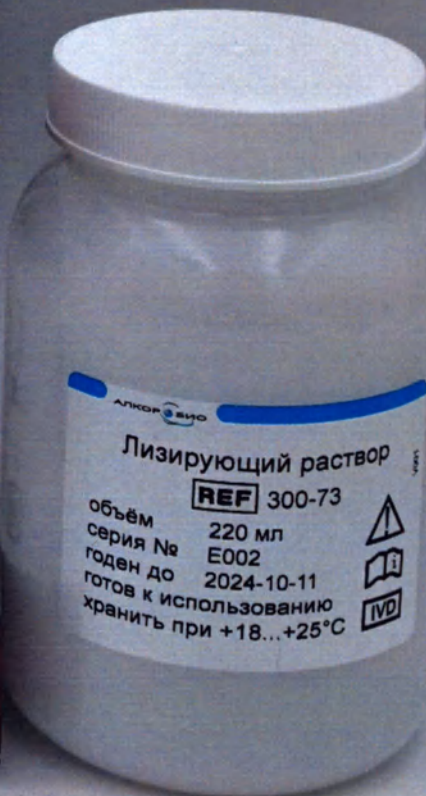



ВерсаФлоу



Е002



2024-10-11

ТУ 21 20 23-710-98539446-2023
Р/У №

Для профессионального применения
1/021

F1




2 000027 754182

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

ООО «АлкорБио»
1512017, г. Архангельск, ул. Советская, д. 15
Тел: +7 (917) 810-10-10

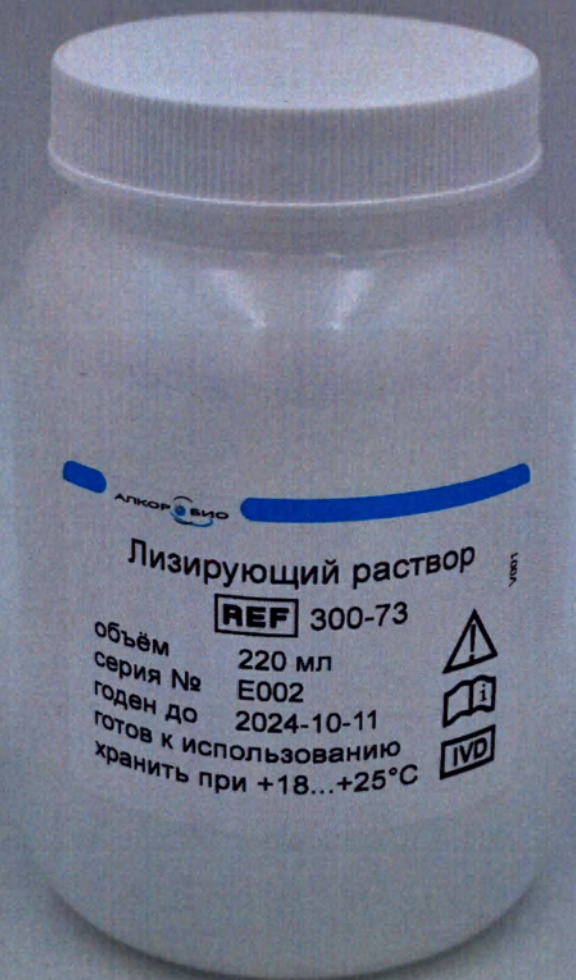

АЛКОР БИО

Лизирующий раствор

REF 300-73

объем 220 мл

серия № E002

годен до 2024-10-11

готов к использованию

хранить при +18...+25°C



ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

FLOW

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ

ВерсаФлоу

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

LOT E002

REF 300-74

2023-10-11

2024-10-11

Σ 200

18°C

25°C

IVD

Состав набора:

1. Лизирующий раствор 1 фл. (220 мл)
2. Фиксирующий раствор (100X) 1 фл. (4 мл)
3. Буферный раствор 1 фл. (110 мл)
4. Инструкция 1 шт.
5. Паспорт 1 шт.

F1

V001



Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-710-98539446-2023
ру №

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А

info@alkorbio.ru
www.alkorbio.ru
горячая линия: +7 (812) 677-87-79

Буферный раствор

REF 300-74

110 мл

E002

2024-10-11

готов к использованию

хранить при +18...+25°C

Лизирующий раствор

REF 300-74

объем 220 мл

серия № E002

годен до 2024-10-11

готов к использованию

хранить при +18...+25°C

«ВерсаФлоу»
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынина Д.Г.
«...» 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»

Исследование клеточного звена иммунной системы занимает важное место при диагностике иммунологических заболеваний. Идентификация лейкоцитарных субпопуляций по морфологическим характеристикам, их количественное определение и оценка активности осуществляется с помощью проточной цитометрии.

Для проведения цитофлуориметрического исследования необходима качественная подготовка образца: окрашивание компонентов крови специфическими моноклональными антителами, мечеными флуорофорами; лизис эритроцитов; фиксация лейкоцитов в статистически достаточном количестве, сохраняя при этом время исследования и объем анализируемой проточной цитометром информации.

Набор «ВерсаФлоу» позволяет провести подготовку лейкоцитов цельной периферической крови к проведению цитофлуориметрического анализа.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. «Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023» (далее по тексту – набор «ВерсаФлоу») предназначен для лизиса эритроцитов в цельной периферической крови (с добавлением солизы гепарина или с калиевой солью ЭДТА (КЭДТА)) и подготовки образца к проведению цитофлуориметрического анализа лейкоцитов.

Набор «ВерсаФлоу» может быть использован при подготовке проб для ручного лизиса с последующей фиксацией лейкоцитов или без фиксации.

1.2. Функциональное назначение набора – вспомогательное средство для проведения цитофлуориметрического анализа. Предназначен для подготовки лейкоцитов цельной периферической крови к цитофлуориметрическому исследованию.

1.3. Показания к применению набора «ВерсаФлоу» предназначены для цитофлуориметрического анализа иммунного статуса человека.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

Кат. № 300-74 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Комплекта-ция	Серия реагента	Соответствие контролируемого параметра
Состав набора				
Лизирующий раствор	Бесцветная или светло-желтого цвета прозрачная жидкость	1 флакон (220 мл)	E002	соответствует
Фиксирующий раствор (100X)	Бесцветная прозрачная жидкость	1 флакон (4 мл)	E002	соответствует
Буферный раствор	Бесцветная прозрачная жидкость	1 флакон (110 мл)	E002	соответствует
Паспорт		1 шт.	E002	соответствует
Инструкция по применению		1 шт.	-	-

Параметры контроля качества		Соответствие контролируемого параметра
Наименование контролируемого параметра	Норма	
Визуальный контроль субпопуляций по размеру и granularity (FS/SS)	Типичное распределение лейкоцитарных фракций	соответствует
«Открытость» лейкоцитов, процент, не менее	80	соответствует
«Чистота» субпопуляций CD45 low, процент, не менее	95	соответствует
Упаковка и маркировка	Флаконы № 130 и 350 мл из полипропилена с защитным покрытием (с защитным покрытием крышками). Этикетка из бумаги, клеевая на тыльной стороне	соответствует

«ВерсаФлоу»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Аликс Био»
Полномочия ДГ
«...» ... 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023»

Назначение конечного пользователя системы состоит из двух частей: подготовка образцов крови и проведение цитометрического анализа.

Для проведения цитометрического исследования необходимо качественная подготовка образцов: центрифугирование, удаление плазмы, фиксация лейкоцитов. Набор реагентов обеспечивает удаление эритроцитов и лейкоцитов в стандартные количества, сохраняя при этом время исследования и объем анализируемой пробной цитометрии.

Набор «ВерсаФлоу» позволяет провести подготовку лейкоцитов цельной периферической крови к проведению цитометрического анализа.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. «Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023» (далее по тексту – набор «ВерсаФлоу») предназначен для лизиса эритроцитов в цельной периферической крови (с лизисом лейкоцитов) и подготовки образцов к проведению цитометрического анализа лейкоцитов.

Набор «ВерсаФлоу» может быть использован при подготовке проб для ручного лизиса и автоматизированной фиксации лейкоцитов или без фиксации.

1.2. Функциональное назначение набора – автоматизированное средство для проведения цитометрического анализа. Применяется для подготовки лейкоцитов цельной периферической крови к цитометрическому исследованию.

1.3. Показания к применению: набор «ВерсаФлоу» предназначен для цитометрического анализа мазков мазков крови.

ООО «Компания Аликс Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 45, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

НАС ПОРТ № E002

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

Кат. № 200-74 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Комплектация	Серия реагента	Состояние контроля качества
Состав набора				
Лизирующий раствор	Бесцветная или слегка желтоватая жидкая прозрачная масса	1 флакон (220 мл)	E002	соответствует
Фиксирующий раствор (100X)	Бесцветная прозрачная жидкость	1 флакон (4 мл)	E002	соответствует
Буферный раствор	Бесцветная прозрачная жидкость	1 флакон (110 мл)	E002	соответствует
Паспорт	1 шт.	E002		соответствует
Инструкция по применению	1 шт.			

Параметры контроля качества

Наименование контролируемого параметра	Норма	Состояние контролируемого параметра
Визуальный контроль субпопуляций по размеру и гранулярности (FSSS)	Тотальное распределение лейкоцитарных фракций	соответствует
«Открытие» в лейкоцитах, процент, не менее	80	соответствует
«Закрытие» субпопуляций CD45 поз, процент, не менее	95	соответствует
Упаковка и маркировка	Флаконы 8, 120 и 250 мл из поликарбоната высокого качества (с маркировкой «Аликс Био») Упаковка из листов алюминия на бумажной основе	соответствует

ВерсаФлоу

Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови «ВерсаФлоу», по ТУ 21.20.23-710-98539446-2023

LOT E002 2023-10-11

REF 300-74 2024-10-11

IVD 200

18°C -25°C

Состав набора:

1. Лизирующий раствор 1 фл. (220 мл)
2. Фиксирующий раствор (100X) 1 фл. (4 мл)
3. Буферный раствор 1 фл. (110 мл)
4. Инструкция 1 шт.
5. Паспорт 1 шт.

ТУ 21.20.23-710-98539446-2023
РУ №

Лизирующий раствор

REF 300-74

объем 220 мл
серия № E002
годен до 2024-10-11
готов к использованию
хранить при +18...+25°C

IV

Фиксирующий раствор

REF 300-74



объем 4 мл
серия № E002
годен до 2024-10-11
готов к использованию
хранить при +18...+25°C

Буферный раствор

REF 300-74

объем 110 мл
серия № E002
годен до 2024-10-11
готов к использованию
хранить при +18...+25°C

IV

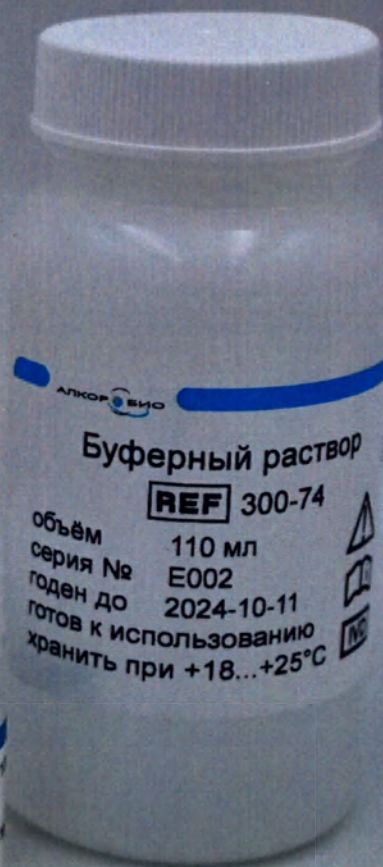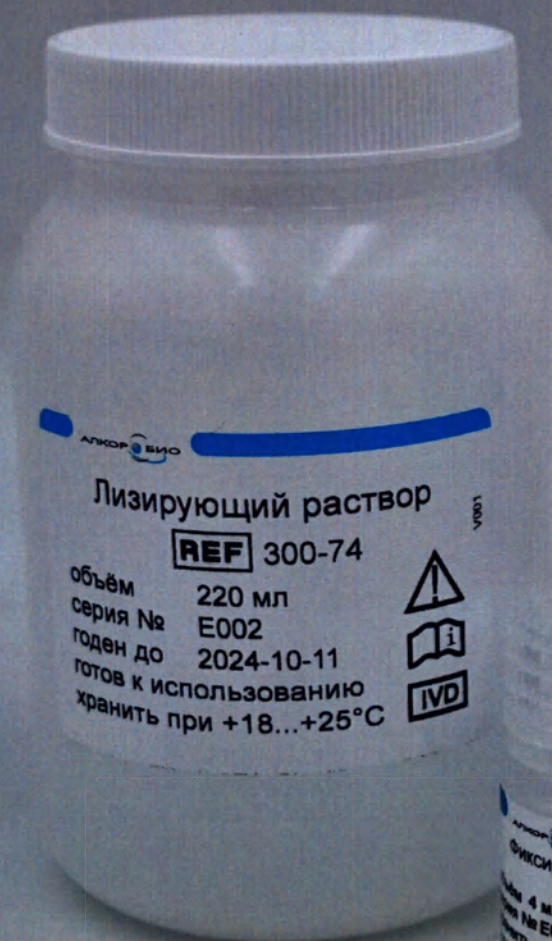

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
8 () лист

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»

Д. Полынцев

