

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Актив Медикал Групп»

Костин С.Г.



«10» марта 2009 г.

Инструкция по эксплуатации

**«Наконечники стоматологические «БЛОССОМ» (BLOSSOM) для
слюноотсосов»**

1. Техническое описание.

Наконечники стоматологические «БЛОССОМ» (BLOSSOM) предназначены для удаления влаги из полости рта в момент манипуляций. Наконечники присоединяются к слюноотсосу стоматологических установок любых фирм. Нужная форма изгиба обеспечивается внутренним армированием наконечника металлической проволокой. Перфорация на дистальном конце наконечника позволяет избежать попадания крупных зубных отломков во внутренние части слюноотсоса.

2. Меры безопасности.

- Визуальным осмотром определить целостность наконечника.
- Поврежденный наконечник использовать запрещается.

3. Форма выпуска.

Наконечники стоматологические «БЛОССОМ» (BLOSSOM) выпускаются в потребительской таре, на которой указан номер партии, количество штук в упаковке, производитель, дата изготовления, срок годности.

4. Инструкции по применению.

- Вскрыть потребительскую тару, извлечь наконечник.
- Плотно одеть на слюноотсос.
- Ввести в полость рта.

5. Хранение.

Хранить при температуре -40°C $+70^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности до 80%.

Избегайте воздействия пыли, прямых солнечных лучей, влаги, механических воздействий.

Генеральный директор

ООО «Актив Медикал Групп»

Костин С.Г.



«10» марта 2009 г.

Генеральный директор
ООО "Актив Медикал Групп"
Косинин С.Р.

