
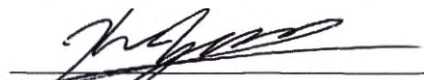


FUJIFILM Healthcare Corporation


Kenichi Yusa
Senior Manager,
Radiation Diagnostic Systems Division
R&D Division, Ultrasound Diagnostic
Systems Division

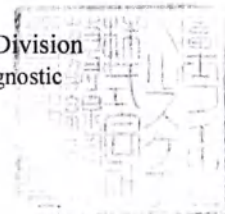

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ДОПОЛНЕНИЕ)
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Система ультразвуковая диагностическая ARIETTA, варианты исполнения:
ARIETTA S70, ARIETTA 65, с принадлежностями**

**OPERETIONAL DOCUMENTATION (SUPPLEMENT)
FOR MEDICAL DEVICE**

**Ultrasound diagnostic system ARIETTA, versions: ARIETTA S70, ARIETTA 65,
with accessories**

Разработчик: *FUJIFILM Healthcare Corporation*
(ФУДЖИФИЛЬМ Хелскеа Корпорэйшн)
(Developer) *(Япония), 2-1 Shintoyofuta, Kashinwa-shi, Chiba, 277-0804,*
Japan

Место производства *FUJIFILM Healthcare Corporation,*
медицинского изделия *2-1 Shintoyofuta, Kashinwa-shi, Chiba, 277-0804, Japan*
(Place of manufacture of
a medical device)

Наименование

«Система ультразвуковая диагностическая ARIETTA, варианты исполнения: ARIETTA S70, ARIETTA 65, с принадлежностями»

Система ультразвуковая диагностическая ARIETTA 65 с принадлежностями

I. Состав:

1. Основной блок.
2. Видеомонитор специальный.
3. Кабель сетевой
4. Кабель для подключения видеопринтера – 2 шт.
5. Инструкция по эксплуатации – 2 шт.
6. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический S12 – не более 5 шт. (при необходимости).
7. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический детский S31 – не более 5 шт. (при необходимости).
8. Датчик электронный конвексный секторный для нейросонографии C42 – не более 5 шт. (при необходимости).
9. Датчик электронный фазированный секторный интраоперационный S31KP – не более 5 шт. (при необходимости).
10. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспищеводный S3ESEL – не более 5 шт. (при необходимости).
11. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспищеводный S3ESL1 – не более 5 шт. (при необходимости).
12. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспищеводный UST-52126 – не более 5 шт. (при необходимости).
13. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический UST-52105 – не более 5 шт. (при необходимости).
14. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C41 – не более 5 шт. (при необходимости).
15. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C35 – не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C251 – не более 5 шт. (при необходимости).
17. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C22P – не более 5 шт. (при необходимости).
18. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C22T – не более 5 шт. (при необходимости).
19. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C22K – не более 5 шт. (при необходимости).
20. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C22I – не более 5 шт. (при необходимости).
21. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C25P – не более 5 шт. (при необходимости).
22. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный UST-9130 – не более 5 шт. (при необходимости).
23. Датчик электронный конвексный секторный трансвагинальный C41V1 – не более 5 шт. (при необходимости).
24. Датчик электронный конвексный секторный трансвагинальный C41B – не более 5 шт. (при необходимости).
25. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный C41RP не более 5 шт. (при необходимости).
26. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный CC41R – не более 5 шт. (при необходимости).

27. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C42K – не более 5 шт. (при необходимости).
28. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C42T – не более 5 шт. (при необходимости).
29. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный UST-9132I – не более 5 шт. (при необходимости).
30. Датчик Би-плановый трансректальный C41L47RP – не более 5 шт. (при необходимости).
31. Датчик электронный линейный для малых органов L34 – не более 5 шт. (при необходимости).
32. Датчик электронный линейный для периферических сосудов L441 – не более 5 шт. (при необходимости).
33. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA - не более 5 шт. (при необходимости).
34. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA1 - не более 5 шт. (при необходимости).
35. Датчик электронный линейный интраоперационный L44K - не более 5 шт. (при необходимости).
36. Датчик электронный линейный интраоперационный L53K - не более 5 шт. (при необходимости).
37. Датчик электронный линейный интраоперационный L46K1 - не более 5 шт. (при необходимости).
38. Датчик электронный линейный для малых органов L55 - не более 5 шт. (при необходимости).
39. Датчик электронный линейный для малых органов L64 - не более 5 шт. (при необходимости).
40. Датчик электронный линейный интраоперационный L46K – не более 5 шт. (при необходимости).
41. Датчик электронный линейный интраоперационный L43K - не более 5 шт. (при необходимости).
42. Датчик электронный линейный интраоперационный UST-533 - не более 5 шт. (при необходимости).
43. Датчик электронный линейный лапароскопический UST-5418 - не более 5 шт. (при необходимости).
44. Датчик электронный линейный интраоперационный UST-5550 - не более 5 шт. (при необходимости).
45. Датчик электронный линейный интраоперационный EUP-O54J - не более 5 шт. (при необходимости).
46. Датчик электронный радиальный трансректальный R41R- не более 5 шт. (при необходимости).
47. Датчик электронный радиальный трансректальный R41RL - не более 5 шт. (при необходимости).
48. Датчик независимый кардиологический для непрерывно-волнового доплера UST-2266-5- не более 5 шт. (при необходимости).
49. Датчик электронный фазированный секторный для неонатальной кардиологии S42 - не более 5 шт. (при необходимости).
50. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный CC41R1 - не более 5 шт. (при необходимости).
51. Датчик Би-плановый трансректальный CL4416R - не более 5 шт. (при необходимости).
52. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический S22 - не более 5 шт. (при необходимости).
53. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный EUP-B514 - не более 5 шт. (при необходимости).

*

54. Датчик электронный линейный для малых органов EUP-L53L - не более 5 шт. (при необходимости).
55. Датчик объёмный для акушерства VC34 - не более 5 шт. (при необходимости).
56. Датчик объёмный для малых органов VL54 - не более 5 шт. (при необходимости).
57. Датчик объёмный трансвагинальный VC41V - не более 5 шт. (при необходимости).
58. Блок биофизиосигналов PEU-ARIETTA70 (при необходимости).
59. Блок CW&3D EU-9163 (при необходимости).
60. Блок ускорения производительности EU-9162 (при необходимости).
61. Блок для подключения независимых датчиков EU-9166 (при необходимости).
62. Блок аналогово видеосигнала EU-9167 (при необходимости).
63. Блок магнитного датчика EZU-RV3S (при необходимости).
64. Блок магнитного датчика EZU-RV2S (при необходимости).
65. Видеопринтер цифровой черно-белый UP-X898MD (при необходимости).
66. Видеопринтер цифровой цветной UP-D25MD (при необходимости).
67. ЖК-монитор IPF-2101 (при необходимости).
68. Ключ для активации программы панорамного сканирования SOP ARIETTA70-1 (при необходимости).
69. Ключ для активации программы Rt-3D SOP-ARIETTA70-4 (при необходимости).
70. Ключ для активации программы FA, SOP-ARIETTA70-5 (при необходимости).
71. Ключ для активации программы автоматического введения данных пациента SOP-ARIETTA70-6 (при необходимости).
72. Ключ для активации программы измерения профиля потока SOP ARIETTA70-7 (при необходимости).
73. Ключ для активации программы соединения в формате DICOM SOP-ARIETTA70-10 (при необходимости).
74. Ключ для активации программы измерения объёма в режиме 3D SOP-ARIETTA70-20 (при необходимости).
75. Ключ для активации программы STIC SOP-ARIETTA70-41 (при необходимости).
76. Ключ для активации программы 4Dshading SOP-ARIETTA70-51 (при необходимости).
77. Ключ для активации программы 3D реконструкции методом «свободной руки» SOP-ARIETTA70-37 (при необходимости).
78. Ключ для активации программы замедленно изображения SOP-ARIETTA70-57 (при необходимости).
79. Ключ для активации программы передачи структурированного отчета в формате DICOM SOP-ARIETTA70-21 (при необходимости).
80. Ключ для активации программы QR в формате DICOM SOP-ARIETTA70-59 (при необходимости).
81. Ключ для активации программы автоматического измерения FHR SOP-ARIETTA70-72 (при необходимости).
82. Ключ для активации программы автоматического измерения IMT SOP-ARIETTA70-38 (при необходимости).
83. Ключ для активации программы Picture in Picture SOP-ARIETTA70-63 (при необходимости).
84. Ключ для активации программы автоматического измерения NTSOP-ARIETTA70-42 (при необходимости).
85. Ключ для активации программы TVF SOP-ARIETTA70-47 (при необходимости).
86. Ключ для активации программы стресс-эхо SOP-ARIETTA70-15 (при необходимости).
87. Ключ для активации программы анализа 2DTT SOP-ARIETTA70-49 (при необходимости).
88. Ключ для активации программы eTracking SOP-ARIETTA70-11 (при необходимости).
89. Ключ для активации программы WI SOP-ARIETTA70-34 (при необходимости).
90. Ключ для активации программы FMD* SOP-ARIETTA70-16 (при необходимости).

91. Ключ для активации программы анализа TDI SOP-ARIETTA70-13 (при необходимости).
92. Ключ для активации программы режима тканевого доплера SOP -ARIETTA70-56 (при необходимости).
93. Ключ для активации программы CW SOP-ARIETTA70-55 (при необходимости).
94. Ключ для активации программы RTE SOP-ARIETTA70-43 (при необходимости).
95. Ключ для активации программы получения гистограммы эластичности SOP-ARIETTA70-60 (при необходимости).
96. Ключ для активации программы Eyeball EF SOP-ARIETTA70-58 (при необходимости).
97. Ключ для активации программы получения расширенного кардиологического отчета SOP-ARIETTA70-70 (при необходимости).
98. Ключ для активации программы измерений в режиме сдвиговой волны SOP-ARIETTA70-73 (при необходимости).
99. Ключ для активации программы навигации в 3D SOP-ARIETTA70-75 (при необходимости).
100. Ключ для активации антивирусной программы SOP-ARIETTA70-48 (при необходимости).
101. Ключ для активации программы RVSSOP-ARIETTA70-62 (при необходимости).
102. Программа контрастной гармонической визуализации CHM ARIETTA70 (при необходимости).
103. Программное обеспечение для панорамного сканирования (ARIETTA 65) (при необходимости).
104. Программное обеспечение для работы анатомического М-режима (ARIETTA65) (при необходимости).
105. Программное обеспечение для работы в сети DICOM (ARIETTA 65) (при необходимости).
106. Программное обеспечение для создания структурированных отчетов DICOM (ARIETTA 65) (при необходимости).
107. Программное обеспечение для запроса и получения данных через DICOM (ARIETTA 65) (при необходимости).
108. Программное обеспечение для исследования профиля потока (ARIETTA 65) (при необходимости).
109. Программное обеспечение для анализа данных тканевого доплера (ARIETTA 65) (при необходимости).
110. Программное обеспечения для стресс-эхо (ARIETTA 65) (при необходимости).
111. Программное обеспечение для автоматического измерения комплекса интима-медиа (ARIETTA 65) (при необходимости).

II. Принадлежности.

1. Пункционный адаптер MP-2783-G22 – не более 5 шт.
2. Пункционный адаптер EZU-PA3C1H – не более 5 шт.
3. Пункционный адаптер EZU-PA3U – не более 5 шт.
4. Пункционный адаптер MP-2445SET – не более 5 шт.
5. Пункционный адаптер MP-2458– не более 5 шт.
6. Пункционный адаптер EZU-PA532 – не более 5 шт.
7. Пункционный адаптер EZU-PA7C2– не более 5 шт.
8. Пункционный адаптер MP-2824– не более 5 шт.
9. Пункционный адаптер MP-2781– не более 5 шт.
10. Пункционный адаптер MP-2781-5– не более 5 шт.
11. Пункционный адаптер MP-2781-25– не более 5 шт.
12. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-1– не более 5 шт.
13. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-2– не более 5 шт.
14. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-3– не более 5 шт.
15. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-4– не более 5 шт.

16. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-C– не более 5 шт.
17. Пункционный адаптер EZU-PA7V– не более 5 шт.
18. Пункционный адаптер MP-2452– не более 5 шт.
19. Пункционный адаптер EZU-PA5V– не более 5 шт.
20. Пункционный адаптер EZU-PA7L2– не более 5 шт.
21. Пункционный адаптер EZU-PA7L3– не более 5 шт.
22. Пункционный адаптер MP-2448– не более 5 шт.
23. Пункционный адаптер MP-2450– не более 5 шт.
24. Пункционный адаптер EZU-PA7LV1– не более 5 шт.
25. Пункционный адаптер MP-2452-G18– не более 5 шт.
26. Пункционный адаптер MP-24455-G14– не более 5 шт.
27. Пункционный адаптер MP-2445-G17– не более 5 шт.
28. Пункционный адаптер MP-2445-G18– не более 5 шт.
29. Пункционный адаптер MP-2445-G19– не более 5 шт.
30. Пункционный адаптер MP-2445-G20/21– не более 5 шт.
31. Пункционный адаптер MP-2445-G22– не более 5 шт.
32. Пункционный адаптер MP-2445-G16– не более 5 шт.
33. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-1– не более 5 шт.
34. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-2– не более 5 шт.
35. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-3– не более 5 шт.
36. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-4– не более 5 шт.
37. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-C– не более 5 шт.
38. Пункционный адаптер BA-002-G15-A0– не более 5 шт.
39. Пункционный адаптер BA-002-G15-A15– не более 5 шт.
40. Пункционный адаптер BA-001– не более 5 шт.
41. Насадка EZU-PA3C1– не более 5 шт.
42. Насадка EZU-PA3C2– не более 5 шт.
43. Насадка EZU-TEATC2– не более 5 шт.
44. Насадка для RVS RV-002 – не более 5 шт.
45. Насадка для RVS RV-003 – не более 5 шт.
46. Насадка для RVS RV-004 – не более 5 шт.
47. Насадка для RVS RV-005 – не более 5 шт.
48. Насадка для RVS RV-006 – не более 5 шт.
49. Насадка для RVS RV-007 – не более 5 шт.
50. Насадка для RVS RV-008 – не более 5 шт.
51. Насадка для RVS RV-009 – не более 5 шт.
52. Насадка для RVS RV-010 – не более 5 шт.
53. Насадка для RVS RV-011 – не более 5 шт.
54. Насадка для RVS RV-012 – не более 5 шт.
55. Насадка для RVS RV-013 – не более 5 шт.
56. Насадка для RVS RV-015 – не более 5 шт.
57. Водная насадка EZU-WL3 – не более 5 шт.
58. Акустическая насадка EZU-TECPL1 – не более 5 шт.
59. Адаптер для подключения датчиков HI VISION JB-293 – не более 5 шт.
60. Адаптер для подключения датчиков ProSound LN/CV JB-294 – не более 5 шт.
61. Адаптер для подключения датчиков ProSound LN/CV JB-294B – не более 5 шт.
62. Адаптер для подключения секторных датчиков ProSound JB-295 – не более 5 шт.
63. Адаптер для подключения секторных датчиков ProSound JB-295B – не более 5 шт.
64. Водонепроницаемый чехол WP-001 – не более 5 шт.
65. Водонепроницаемый чехол для коннектора MP-2790 – не более 5 шт.
66. Водонепроницаемый чехол для датчика EZU-WB1-H – не более 5 шт.
67. Водонепроницаемый чехол для датчика EZU-WB1 – не более 5 шт.
68. Чехол для датчика UST-52126 CIV-610-933 – не более 5 шт.
69. Чехол для датчика RB-665P-NS – не более 5 шт.
70. Чехол для датчика RB-945BP-NS – не более 5 шт.

71. Чехол для датчика RB-945BP-S – не более 5 шт.
72. Эластографический стабилизатор MP-2804 – не более 5 шт.
73. Эластографический стабилизатор EL-001 – не более 5 шт.
74. Эластографический стабилизатор EL-002 – не более 5 шт.
75. Подогреватель геля JW-3000.
76. Буквенно-цифровая клавиатура EU-9165
77. Комплект фиксации датчика MP-PH0001.
78. Рука-держатель для FMD MP-AH0001.
79. Рука-держатель для FMD MP-AH0001-1.
80. Набор креплений для видеорекордера PM-AR70-H003.
81. Комплект правосторонний для монтажа подогревателя геля слева MP-FX-AR70-2R.
82. Комплект левосторонний для монтажа подогревателя геля MP-FX AR70-2-L.
83. Сигнальный кабель для RVSL-CABLE0940-12.
84. Регулируемая стойка магнитного определителя позиции EZU-RVF1.
85. Источник питания для измерителя сдвиговой волны EU-9192.
86. Т-тип держатель датчика MP-2749 – не более 5 шт.
87. I-тип держателя датчика MP-2750 – не более 5 шт.
88. Держатель внутрисосудистого датчика MP-PH-AR70-8.
89. Фиксатор пункционный иглы BA-001 – не более 5 шт.
90. Фиксатор пункционный иглы BA-001-G16 – не более 5 шт.
91. Фиксатор пункционный иглы BA-001-G18 – не более 5 шт.
92. Фиксатор пункционный иглы BA-001-G20 – не более 5 шт.
93. Ножная педаль MP-234B.
94. Ножная педаль MP-2819.
95. Гелевая насадка на датчик SF-001.
96. Эластографическая насадка на датчик EZU-TEATC2.
97. Эластографическая насадка на датчик EZU-TECPL1.

Система ультразвуковая диагностическая ARIETTA S70 с принадлежностями

I. Состав:

1. Основной блок.
2. Видеомонитор специальный.
3. Кабель сетевой.
4. Кабель для подключения видеопринтера - 2 шт.
5. Инструкция по эксплуатации - 2 шт.
6. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический S12 - не более 5 шт. (при необходимости).
7. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический детский S31 - не более 5 шт. (при необходимости).
8. Датчик электронный конвексный секторный для нейросонографии C42 - не более 5 шт. (при необходимости).
9. Датчик электронный фазированный секторный интраоперационный S31KP - не более 5 шт. (при необходимости).
10. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспищеводный S3ESEL - не более 5 шт. (при необходимости).
11. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспищеводный S3ESL1 - не более 5 шт. (при необходимости).
12. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспищеводный UST-52126 - не более 5 шт. (при необходимости).
13. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический UST-52105 - не более 5 шт. (при необходимости).
14. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C41 - не более 5 шт. (при необходимости).
15. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C35 - не более 5 шт. (при необходимости).

16. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C251 - не более 5 шт. (при необходимости).
17. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C22P - не более 5 шт. (при необходимости).
18. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C22T - не более 5 шт. (при необходимости).
19. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C22K - не более 5 шт. (при необходимости).
20. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C22I - не более 5 шт. (при необходимости).
21. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный C25P - не более 5 шт. (при необходимости).
22. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный UST-9130 - не более 5 шт. (при необходимости).
23. Датчик электронный конвексный секторный трансвагинальный C41V1 - не более 5 шт. (при необходимости).
24. Датчик электронный конвексный секторный трансвагинальный C41B - не более 5 шт. (при необходимости).
25. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный C41RP - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный CC41R - не более 5 шт. (при необходимости).
27. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C42K - не более 5 шт. (при необходимости).
28. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C42T - не более 5 шт. (при необходимости).
29. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный UST-9132I - не более 5 шт. (при необходимости).
30. Датчик Би-плановый трансректальный C41L47RP - не более 5 шт. (при необходимости).
31. Датчик электронный линейный для малых органов L34 - не более 5 шт. (при необходимости).
32. Датчик электронный линейный для периферических сосудов L44I - не более 5 шт. (при необходимости).
33. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA - не более 5 шт. (при необходимости).
34. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA1 - не более 5 шт. (при необходимости).
35. Датчик электронный линейный интраоперационный L44K - не более 5 шт. (при необходимости).
36. Датчик электронный линейный интраоперационный L53K - не более 5 шт. (при необходимости).
37. Датчик электронный линейный интраоперационный L46K1 - не более 5 шт. (при необходимости).
38. Датчик электронный линейный для малых органов L55 - не более 5 шт. (при необходимости).
39. Датчик электронный линейный для малых органов L64 - не более 5 шт. (при необходимости).
40. Датчик электронный линейный интраоперационный L46K - не более 5 шт. (при необходимости).
41. Датчик электронный линейный интраоперационный L43K - не более 5 шт. (при необходимости).
42. Датчик электронный линейный интраоперационный UST-533 - не более 5 шт. (при необходимости).
43. Датчик электронный линейный лапароскопический UST-5418 - не более 5 шт. (при необходимости).
44. Датчик электронный линейный интраоперационный UST-5550 - не более 5 шт. (при необходимости).

45. Датчик электронный линейный интраоперационный EUP-O54J - не более 5 шт. (при необходимости).
46. Датчик электронный радиальный трансректальный R41R - не более 5 шт. (при необходимости).
47. Датчик электронный радиальный трансректальный R41RL - не более 5 шт. (при необходимости).
48. Датчик независимый кардиологический для непрерывно-волнового доплера UST-2265-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
49. Датчик независимый кардиологический для непрерывно-волнового доплера UST-2266-5 - не более 5 шт. (при необходимости).
50. Датчик электронный фазированный секторный для неонатальной кардиологии S42 - не более 5 шт. (при необходимости).
51. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный CC41R1 - не более 5 шт. (при необходимости).
52. Датчик Би-плановый трансректальный CL4416R - не более 5 шт. (при необходимости).
53. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический S22 - не более 5 шт. (при необходимости).
54. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный EUP-B514 - не более 5 шт. (при необходимости).
55. Датчик электронный линейный для малых органов EUP-L53L - не более 5 шт. (при необходимости).
56. Датчик объемный для акушерства VC34 - не более 5 шт. (при необходимости).
57. Датчик объемный для малых органов VL54 - не более 5 шт. (при необходимости).
58. Датчик объемный трансвагинальный VC41V - не более 5 шт. (при необходимости).
59. Блок биофизических сигналов PEU-ARIETTA70 (при необходимости).
60. Блок CW & 3D EU-9163 (при необходимости).
61. Блок ускорения производительности EU-9162 (при необходимости).
62. Блок для подключения независимых датчиков EU-9166 (при необходимости).
63. Блок аналогового видеосигнала EU-9167 (при необходимости).
64. Блок магнитного датчика EZU-RV3S (при необходимости).
65. Блок магнитного датчика EZU-RV2S (при необходимости).
66. Видеопринтер цифровой черно-белый UP-X898MD (при необходимости).
67. Видеопринтер цифровой цветной UP-D25MD (при необходимости).
68. ЖК-монитор IPF-2101 (при необходимости).
69. Ключ для активации программы панорамного сканирования SOP ARIETTA70-1 (при необходимости).
70. Ключ для активации программы Rt-3D SOP-ARIETTA70-4 (при необходимости).
71. Ключ для активации программы FAM SOP-ARIETTA70-5 (при необходимости).
72. Ключ для активации программы автоматического введения данных пациента SOP-ARIETTA70-6 (при необходимости).
73. Ключ для активации программы измерения профиля потока SOP ARIETTA70-7 (при необходимости).
74. Ключ для активации программы соединения в формате DICOM SOP-ARIETTA70-10 (при необходимости).
75. Ключ для активации программы измерения объема в режиме 3D SOP-ARIETTA70-20 (при необходимости).
76. Ключ для активации программы STIC SOP-ARIETTA70-41 (при необходимости).
77. Ключ для активации программы 4Dshading SOP-ARIETTA70-51 (при необходимости).
78. Ключ для активации программы 3D реконструкции методом "свободной руки" SOP-ARIETTA70-37 (при необходимости).
79. Ключ для активации программы замедленного изображения SOP-ARIETTA70-57 (при необходимости).
80. Ключ для активации программы передачи структурированного отчета в формате DICOM SOP-ARIETTA70-21 (при необходимости).

81. Ключ для активации программы QR в формате DICOM SOP-ARIETTA70-59 (при необходимости).
82. Ключ для активации программы автоматического измерения FHR SOP-ARIETTA70-72 (при необходимости).
83. Ключ для активации программы автоматического измерения IMT SOP-ARIETTA70-38 (при необходимости).
84. Ключ для активации программы Picture in Picture SOP-ARIETTA70-63 (при необходимости).
85. Ключ для активации программы автоматического измерения NTSOP-ARIETTA70-42 (при необходимости).
86. Ключ для активации программы TVF SOP-ARIETTA70-47 (при необходимости).
87. Ключ для активации программы стресс-эхо SOP-ARIETTA70-15 (при необходимости).
88. Ключ для активации программы анализа 2DTT SOP-ARIETTA70-49 (при необходимости).
89. Ключ для активации программы eTrackingSOP-ARIETTA70-11 (при необходимости).
90. Ключ для активации программы WI SOP-ARIETTA70-34 (при необходимости).
91. Ключ для активации программы FMD SOP-ARIETTA70-16 (при необходимости).
92. Ключ для активации программы анализа TDI SOP-ARIETTA70-13 (при необходимости).
93. Ключ для активации программы режима тканевого доплера SOP-ARIETTA70-56 (при необходимости).
94. Ключ для активации программы CW SOP-ARIETTA70-55 (при необходимости).
95. Ключ для активации программы RTE SOP-ARIETTA70-43 (при необходимости).
96. Ключ для активации программы получения гистограммы эластичности SOP-ARIETTA70-60 (при необходимости).
97. Ключ для активации программы Eyeball EF SOP-ARIETTA70-58 (при необходимости).
98. Ключ для активации программы получения расширенного кардиологического отчета SOP-ARIETTA70-70 (при необходимости).
99. Ключ для активации программы измерений в режиме сдвиговой волны SOP-ARIETTA70-73 (при необходимости).
100. Ключ для активации программы навигации в 3D SOP-ARIETTA70-75 (при необходимости).
101. Ключ для активации антивирусной программы SOP-ARIETTA70-48 (при необходимости).
102. Ключ для активации программы RVSSOP-ARIETTA70-62 (при необходимости).
103. Программа контрастной гармонической визуализации CHM ARIETTA70 (при необходимости).

II. Принадлежности:

1. Пункционный адаптер MP-2783-G22 - не более 5 шт.
2. Пункционный адаптер EZU-PA3C1H - не более 5 шт.
3. Пункционный адаптер EZU-PA3U - не более 5 шт.
4. Пункционный адаптер MP-2445-SET - не более 5 шт.
5. Пункционный адаптер MP-2458 - не более 5 шт.
6. Пункционный адаптер EZU-PA532 - не более 5 шт.
7. Пункционный адаптер EZU-PA7C2 - не более 5 шт.
8. Пункционный адаптер MP-2824 - не более 5 шт.
9. Пункционный адаптер MP-2781 - не более 5 шт.
10. Пункционный адаптер MP-2781-5 - не более 5 шт.
11. Пункционный адаптер MP-2781-25 - не более 5 шт.
12. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-1 - не более 5 шт.
13. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-2 - не более 5 шт.
14. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-3 - не более 5 шт.
15. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-4 - не более 5 шт.
16. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-C - не более 5 шт.
17. Пункционный адаптер EZU-PA7V - не более 5 шт.

18. Пункционный адаптер MP-2452 - не более 5 шт.
19. Пункционный адаптер EZU-PA5V - не более 5 шт.
20. Пункционный адаптер EZU-PA7L2 - не более 5 шт.
21. Пункционный адаптер EZU-PA7L3 - не более 5 шт.
22. Пункционный адаптер MP-2448 - не более 5 шт.
23. Пункционный адаптер MP-2450 - не более 5 шт.
24. Пункционный адаптер EZU-PA7LV1 - не более 5 шт.
25. Пункционный адаптер MP-2452-G18 - не более 5 шт.
26. Пункционный адаптер MP-2445-G14 - не более 5 шт.
27. Пункционный адаптер MP-2445-G17 - не более 5 шт.
28. Пункционный адаптер MP-2445-G18 - не более 5 шт.
29. Пункционный адаптер MP-2445-G19 - не более 5 шт.
30. Пункционный адаптер MP-2445-G20/21 - не более 5 шт.
31. Пункционный адаптер MP-2445-G22 - не более 5 шт.
32. Пункционный адаптер MP-2445-G16 - не более 5 шт.
33. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-1 - не более 5 шт.
34. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-2 - не более 5 шт.
35. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-3 - не более 5 шт.
36. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-4 - не более 5 шт.
37. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-C - не более 5 шт.
38. Пункционный адаптер BA-002-G15-A0 - не более 5 шт.
39. Пункционный адаптер BA-002-G15-A15 - не более 5 шт.
40. Насадка EZU-PA3C1 - не более 5 шт.
41. Насадка EZU-PA3C2 - не более 5 шт.
42. Насадка EZU-TEATC2 - не более 5 шт.
43. Насадка для RVS RV-002 - не более 5 шт.
44. Насадка для RVS RV-003 - не более 5 шт.
45. Насадка для RVS RV-004 - не более 5 шт.
46. Насадка для RVS RV-005 - не более 5 шт.
47. Насадка для RVS RV-006 - не более 5 шт.
48. Насадка для RVS RV-007 - не более 5 шт.
49. Насадка для RVS RV-008 - не более 5 шт.
50. Насадка для RVS RV-009 - не более 5 шт.
51. Насадка для RVS RV-010 - не более 5 шт.
52. Насадка для RVS RV-011 - не более 5 шт.
53. Насадка для RVS RV-012 - не более 5 шт.
54. Насадка для RVS RV-013 - не более 5 шт.
55. Насадка для RVS RV-015 - не более 5 шт.
56. Водная насадка EZU-WL3 - не более 5 шт.
57. Акустическая насадка EZU-TECPL1 - не более 5 шт.
58. Адаптер для подключения датчиков HI VISION JB-293 - не более 5 шт.
59. Адаптер для подключения датчиков ProSound LN/CV JB-294 - не более 5 шт.
60. Адаптер для подключения датчиков ProSound LN/CV JB-294B - не более 5 шт.
61. Адаптер для подключения секторных датчиков ProSound JB-295 - не более 5 шт.
62. Адаптер для подключения секторных датчиков ProSound JB-295B - не более 5 шт.
63. Водонепроницаемый чехол WP-001 - не более 5 шт.
64. Водонепроницаемый чехол для коннектора MP-2790 - не более 5 шт.
65. Водонепроницаемый чехол для датчика EZU-WB1-H - не более 5 шт.
66. Водонепроницаемый чехол для датчика EZU-WB1 - не более 5 шт.
67. Чехол для датчика UST-52126 CIV-610-933 - не более 5 шт.
68. Чехол для датчика RB-665P-NS - не более 5 шт.
69. Чехол для датчика RB-945BP-NS - не более 5 шт.
70. Чехол для датчика RB-945BP-S - не более 5 шт.
71. Эластографический стабилизатор MP-2804 - не более 5 шт.
72. Эластографический стабилизатор EL-001 - не более 5 шт.

73. Эластографический стабилизатор EL-002 - не более 5 шт.
74. Подогреватель геля JW-3000.
75. Буквенно-цифровая клавиатура EU-9165.
76. Комплект фиксации датчика MP-PH0001.
77. Рука-держатель для FMD MP-AH0001.
78. Рука-держатель для FMD MP-AH0001-1.
79. Набор креплений для видеорекодера PM-AR70-H003.
80. Комплект правосторонний для монтажа подогревателя геля слева MP-FX-AR70-2-R.
81. Комплект левосторонний для монтажа подогревателя геля MP-FX AR70-2-L.
82. Сигнальный кабель для RVSL-CABLE-940-12.
83. Регулируемая стойка магнитного определителя позиции EZU-RVF1.
84. Источник питания для измерителя сдвиговой волны EU-9192.
85. Т-тип держатель датчика MP-2749 - не более 5 шт.
86. I-тип держатель датчика MP-2750 - не более 5 шт.
87. Держатель внутрисполостного датчика MP-PH-AR70-8.
88. Фиксатор пункционной иглы BA-001 - не более 5 шт.
89. Фиксатор пункционной иглы BA-001-G16 - не более 5 шт.
90. Фиксатор пункционной иглы BA-001-G18 - не более 5 шт.
91. Фиксатор пункционной иглы BA-001-G20 - не более 5 шт.
92. Ножная педаль MP-2345B.
93. Ножная педаль MP-2819.

Уполномоченный Представитель Производителя

Общество с ограниченной ответственностью «ИПС»,

121059, город Москва, Бережковская наб., д. 20 стр. 5, этаж 3 помещение I комната 26,

Тел./Факс: (495) 775-27-89, E-mail: info@ips-med.ru

NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that Keiichi Yusa who is authorized to sign to the attached document on behalf of FUJIFILM Healthcare Corporation, affixed his signature in my very presence to the said document.

Dated this 13th day of July, 2022.

K. HARA

HARA Keiichiro

NOTARY

3-1, Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

ATTACHED TO
TOKYO LEGAL AFFAIRS BUREAU

Перевод с английского и японского языка на русский язык

*Логотип: /ФУДЖИФИЛМ
ценность инноваций /*

ФУДЖИФИЛМ Хэлскейр Корпорэйшн
2-1, Шинтойофута, Кашива-ши, Чиба-кен, 277-0804, ЯПОНИЯ
ТЕЛ: +81-4-7131-4252 ФАКС: +81-4-7131-4156

ФУДЖИФИЛМ Хэлскейр Корпорэйшн

*Подпись: /Кейчи Юса/
Старший руководитель
Отдел систем лучевой диагностики
Отдел исследований и разработок,
Отдел Систем Ультразвуковой Диагностики*

*Печать: /отделение
систем лучевой
диагностической
компаний
«ФУДЖИФИЛМ
Хэлскеа Корпорэйшн
»/*

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ДОПОЛНЕНИЕ) НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Система ультразвуковая диагностическая ARIETTA в варианты
исполнения: ARIETTA S70, ARIETTA 65 с принадлежностями**

Разработчик:

ФУДЖИФИЛЬМ Хелскеа Корпорэйшн
(Япония), 2-1 Шинтойофута, Кашива-ши, Чиба-кен, 277-
0804, ЯПОНИЯ

**Место производства
медицинского изделия**

ФУДЖИФИЛЬМ Хелскеа Корпорэйшн,
Шинтойофута, Кашива-ши, Чиба, 277-0804, ЯПОНИЯ

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим удостоверяется, что Кейчи Юса, уполномочен подписывать прилагаемый документ от имени FUJIFILM Healthcare Corporation (ФУДЖИФИЛМ Хелскеа Корпорэйшн), поставил свою подпись в моем присутствии на указанном документе.

От 13 июля 2022 года.

Подпись: /К. ХАРА/

ХАРА Кейчиро
НОТАРИУС

3-1, Маруноучи 3-чом,
Чийода-ку, Токио, Япония

ПРИКРЕПЛЕН К ТОКИЙСКОМУ БЮРО ПО
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

Перевод данного текста выполнен переводчиком Юдиным Юрием Константиновичем

Российская Федерация

Город Москва.

Второго сентября две тысячи двадцать второго года.

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Юдина Юрия Константиновича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2022-

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Л.В. Дейнеко

Проставлено, пронумеровано и скреплено печатью 1 лист(-а, -ов):

Л.В. Дейнеко