

B.BRAUN

Инструкция по применению

Гель для ран Пронтосан (Prontosan Wound Gel)

Гель для ран **Пронтосан** используется для очищения, деконтаминации и увлажнения покрытых корками, инфицированных (загрязненных), хронических кожных ран.

1. Введение:

Хронические кожные раны, как правило покрыты экссудатом, образованиями в виде пленок, корок и струпа, омертвевшей тканью и так называемыми клеточным детритом. Эти покрытия создают хорошие условия не только для роста патогенной флоры, но также для транзитной и резидентной тканевой флоры, что может значительно замедлить естественное заживление раны.

Применение геля для ран Пронтосан показано для тщательного очищения раны и в то же время постоянного её увлажнения.

2. Характеристика продукта и показания к применению:

Гель для ран Пронтосан может использоваться:

- для очищения, деконтаминации и увлажнения хронических ран кожи;
- для предохраняющего увлажнения бинтов и раневых повязок, типа компрессов, марли, тампонов, губок, гелей, гидроволокон, альгинатов, гидроколлоидов и т.д.;
- во время перевязок, чтобы ослабить затвердевшую марлевую повязку или другие перевязочные материалы.

Использование геля Пронтосан является безболезненным и также хорошо переносится аллергиками.

Неприятный запах из раны, если он есть, при применении Пронтосана быстро устраняется.

3. Общие принципы применения:

Прежде всего раны должны всегда смачиваться и очищаться с помощью раствора для ран Пронтосан для удаления поверхностных пленок прежде, чем будет продолжена дальнейшая обработка гелем Пронтосан.

Поверхность раны должна всегда покрываться слоем геля по крайней мере 3 - 5 мм толщиной. Пронтосан наносится на рану или заполняет полости или раневые карманы. Повязки, марля, компрессы или другие впитывающие



материалы могут также быть смочены или увлажнены перед наложением или заполнением полости раны. Гель Пронтосан должен остаться на ране до следующей перевязки. В зависимости от того, когда намечается очередная перевязка, применяется различное количество геля Пронтосан.

- большее количество геля (слой 5 мм) наносится: например, когда повязку меняют через несколько дней.

- меньшее количество (слой 3 мм) – в том случае, когда повязку меняют в тот же день или на следующий день.

В этом случае поверхность раны сохранена увлажненной, что гарантирует хорошее очищение, повязки легко снимаются при следующей перевязке.

Нанесение геля должно выполняться с такой частотой, которое будет достаточным для полного удаления всех пленок и некротических тканей и для достижения оптимального очищения раны. Это - хорошее предварительное условие для естественного заживления раны и обеспечивает возможность хорошего обзора при хирургической обработке раны.

4. Очищение раневой поверхности:

С целью снижения риска занесения в рану микробов рекомендуется очищение как можно большей области вокруг раны с помощью раствора Пронтосан.

Если требуется, дезактивация части тела или всего тела пострадавшего человека рекомендуется применение соответствующих средств. Пожалуйста запрашивайте информацию по дезактивации MRSA- (метициллин устойчивых стафилококков).

5. Переносимость ткани и биологическая совместимость:

Гель для ран Пронтосан не цитотоксичен, не раздражает и не сенсibilизирует ткани; безболезненно наносится на рану, не тормозит развитие грануляции и эпителизации. Оценивается как дерматологически безопасный.

За многие годы клинического использования была доказана очень хорошая совместимость ткани с полигексанидом и ундециленамидопропил бетаином, даже у пациентов с тяжелым течением (развитием) хронических ран.

6. Побочные явления:

В очень редких случаях может быть небольшое чувство жжения после нанесения геля Пронтосан, но оно исчезает уже через нескольких минут.



7. Противопоказания:

Поскольку аллергические реакции не могут быть исключены, гель Пронтосан не должен применяться, если к нему наблюдалась аллергическая реакция, или подозревается аллергия на один из его компонентов.

Не используйте на гиалиновых хрящах.

Не используйте в комбинации с анионными тензидами, поскольку это может оказать повреждающее действие. Гель Пронтосан не должен смешиваться с другими дезинфицирующими средствами, мазями, маслами или ферментами и т.д. При удалении веществ из раны, необходимо обеспечить их полное смывание с поверхности раны с помощью раствора Пронтосан.

8. Общие инструкции безопасности:

Только для наружного использования.

Не применять для внутримышечного или внутривенного введения!

Не для приема внутрь.

Используйте только качественные и неповрежденные перевязочные материалы.

Держите флаконы вдали от прямого солнечного света.

Храните лекарства вне досягаемости от детей!

9. Техническая информация:

Состав Геля для ран Пронтосан:

Вода для инъекций,

Глицерин, гидроксипропилцеллюлоза,

0,1% ундециленамидопропил бетаин,

0,1 % полиаминопропил биганид (полигексанид)

Внешний вид и запах: прозрачный, бесцветный и фактически без запаха воднорастворимый обезжиренный гель.

Химическая стабильность:


Стабилен при комнатной температуре в соответствии с инструкциями по хранению.

Аутентичность: - стерильный А, печать аутентичности А.

Срок годности: 8 недель после вскрытия флакона.

Сохранение и срок годности:

Гель для ран Пронтосан имеет антибактериальный компонент, который подавляет бактериальную флору, при его применении значительно снижен риск распространения микробов вокруг раны.

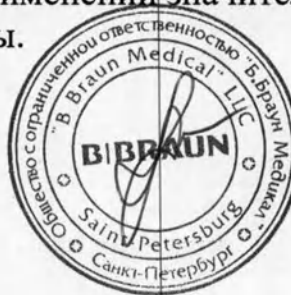

При применении геля для ран Пронтосан создается эффективный противомикробный барьер между раной пациента и персонала.

Является нестерильным после открытия флакона, но возможный срок хранения вскрытого флакона 8 недель, если сразу после использования закрывать флакон защитным колпачком и защищать горлышко флакона от загрязнения (контаминации) или прямого контакта.

Флаконы, которые непосредственно касались поверхности раны, должны быть выброшены сразу после использования.

