

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «МЕДПЛАНТ»


А.В. Пушин

2022 г.




**Фотографические изображения медицинского изделия  
«Жгут кровоостанавливающий ЖК-"Медплант"  
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014»**


Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) в развернутом виде

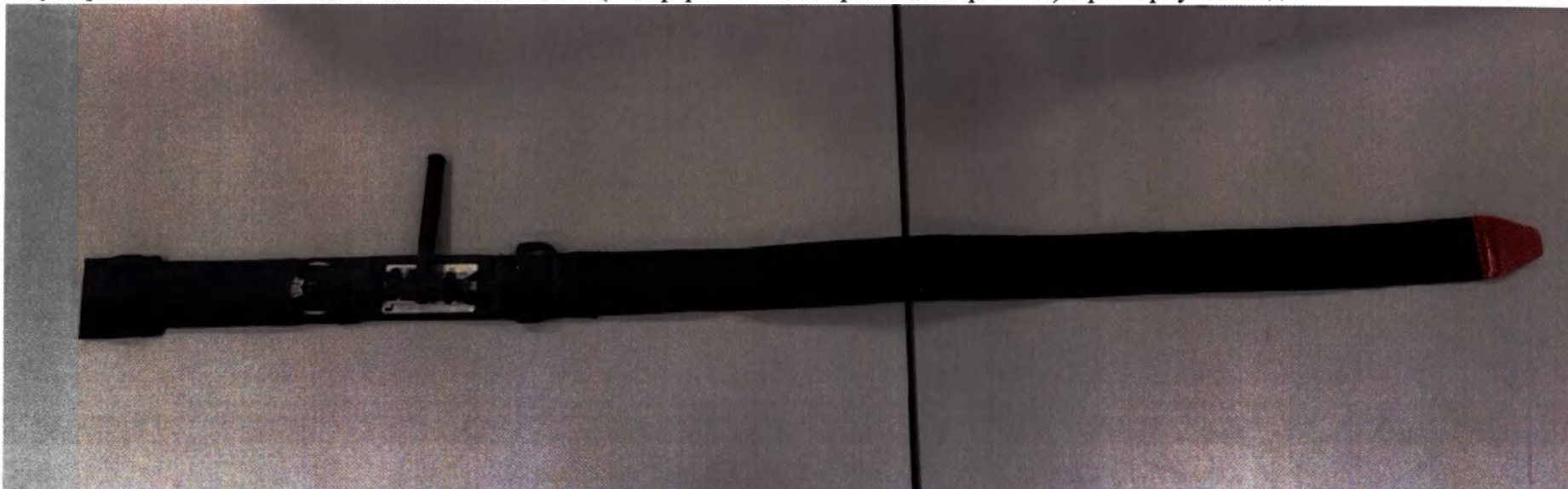


Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) в развернутом виде

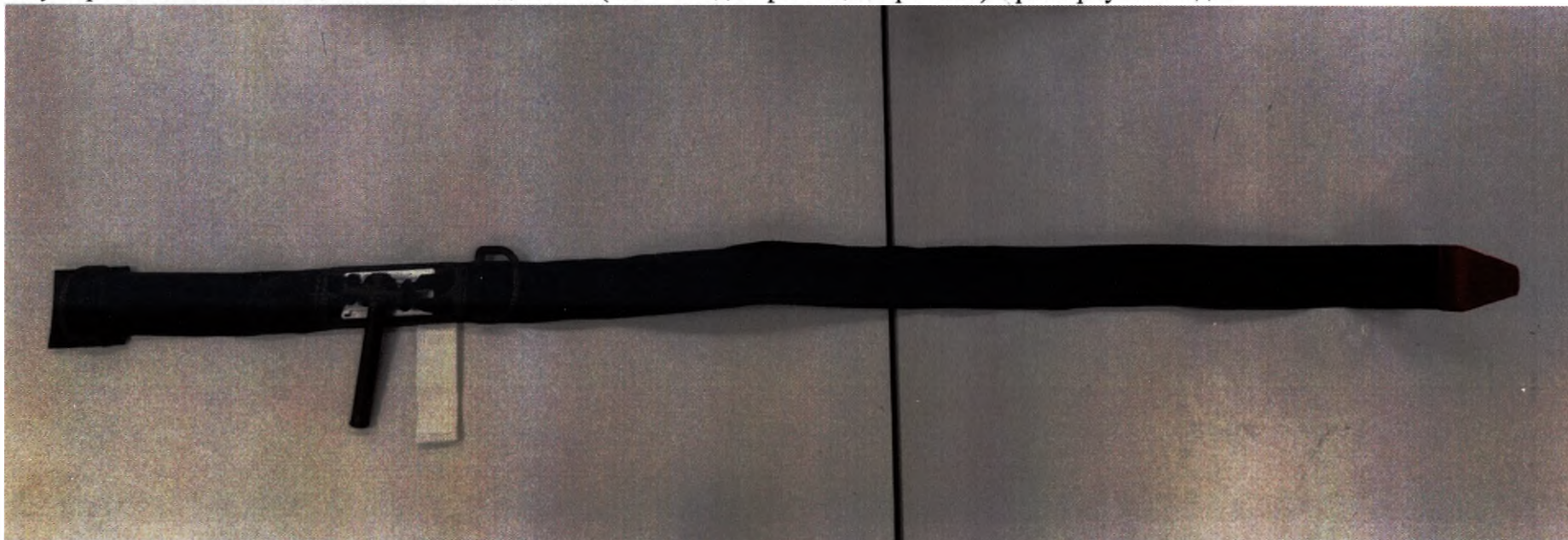


Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) в развернутом виде

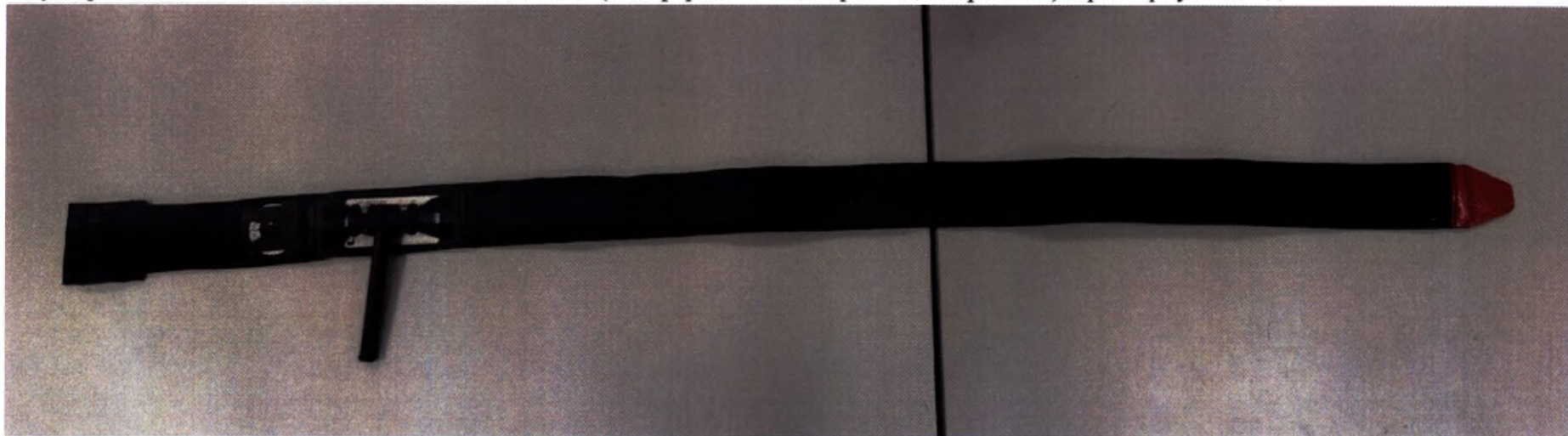


Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) в развернутом виде

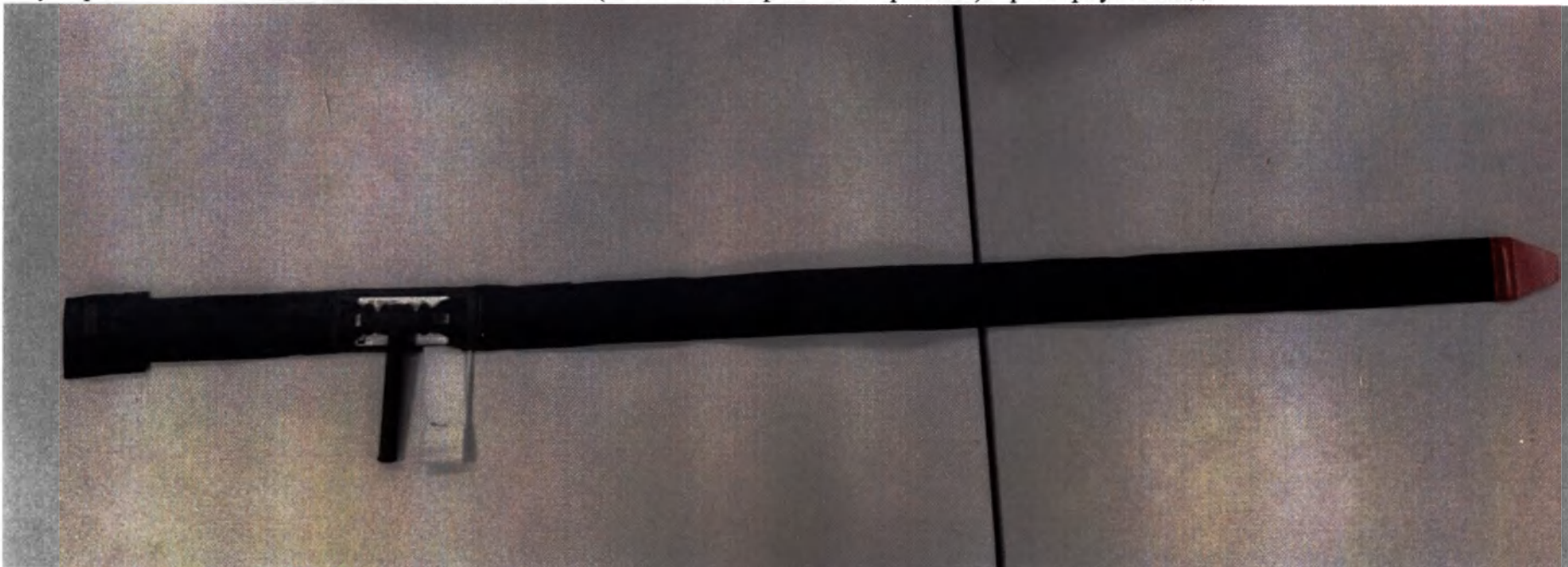


Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) крупным планом

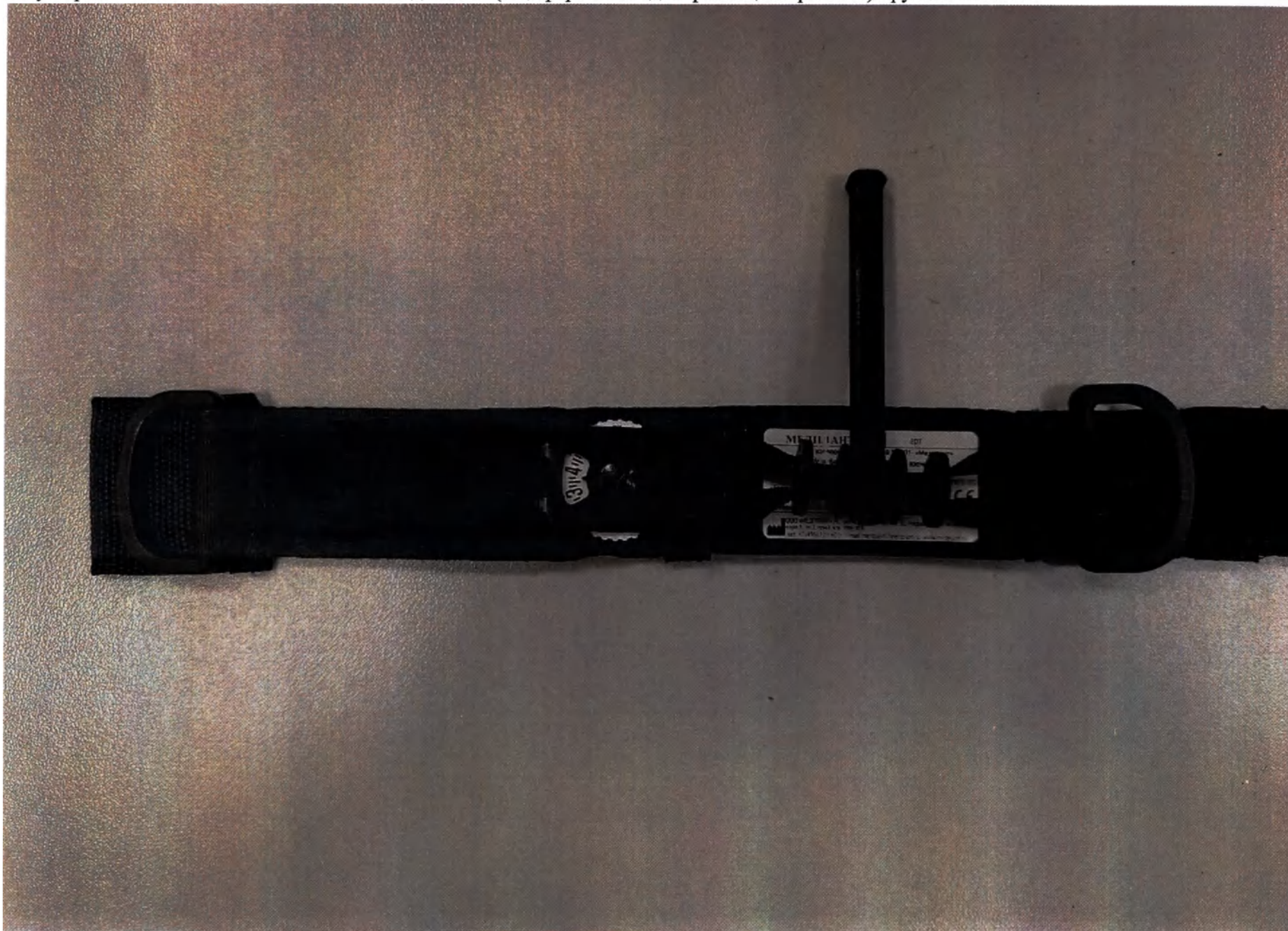


Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) крупным планом

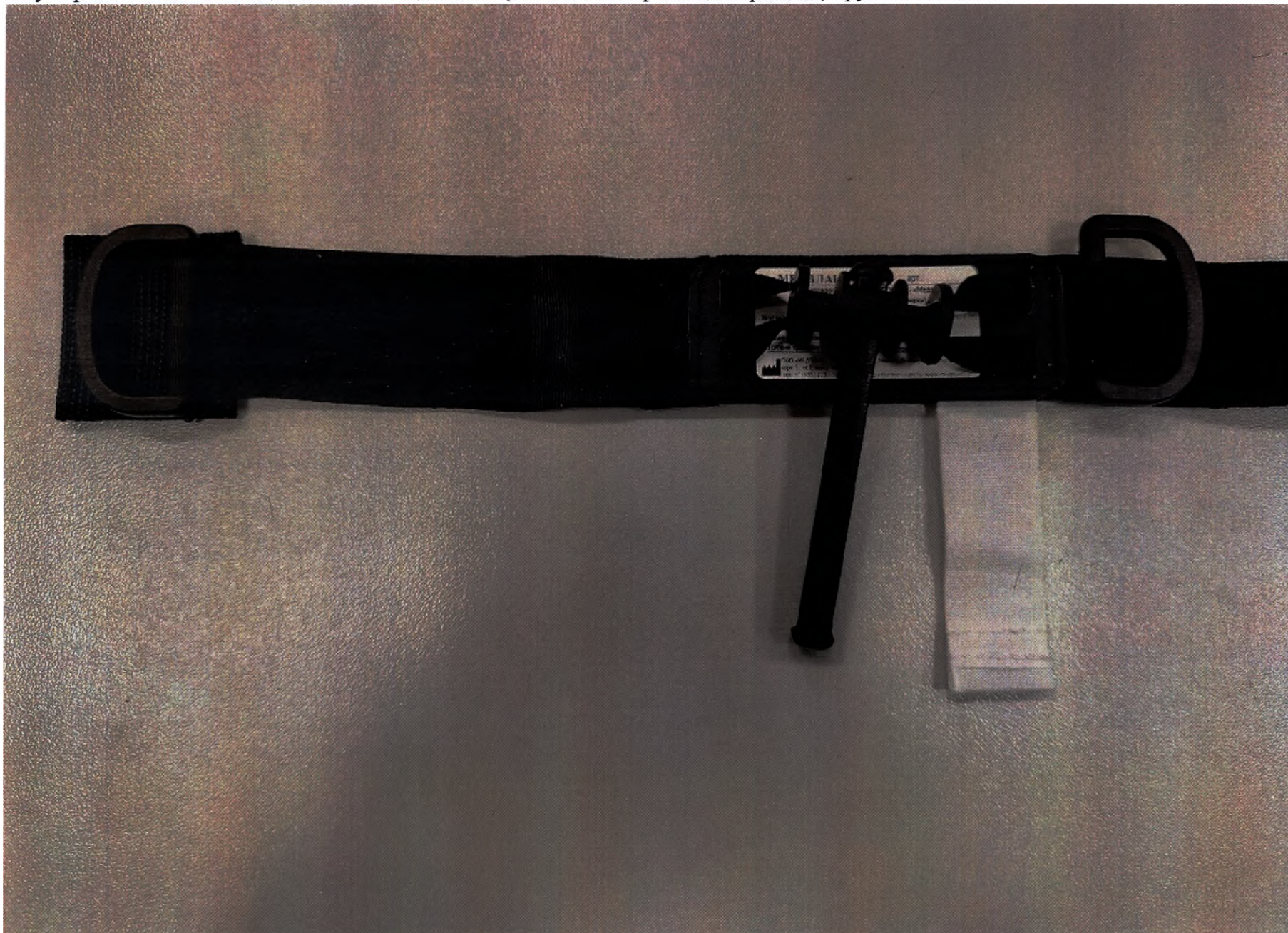

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) крупным планом

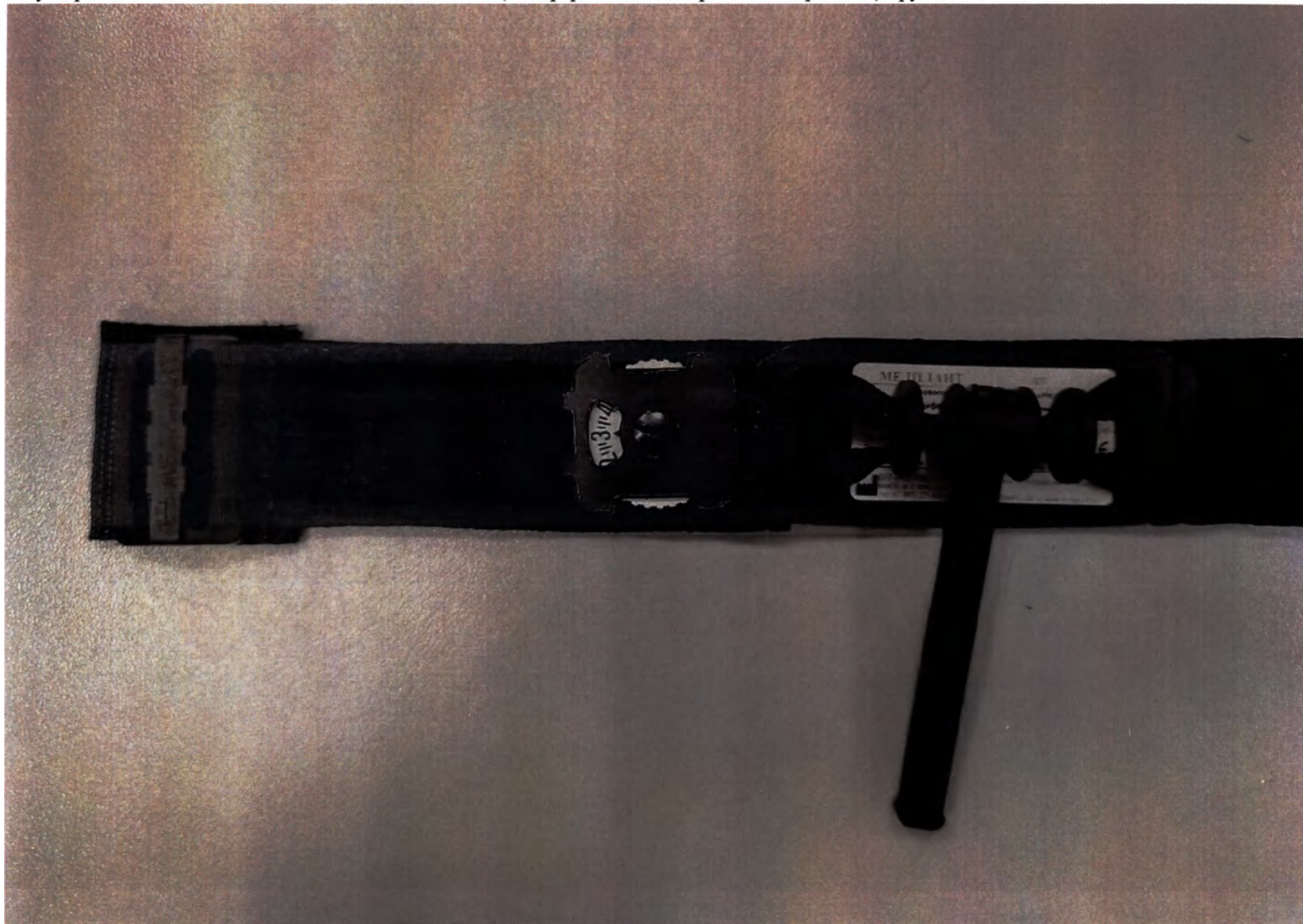


Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) крупным планом

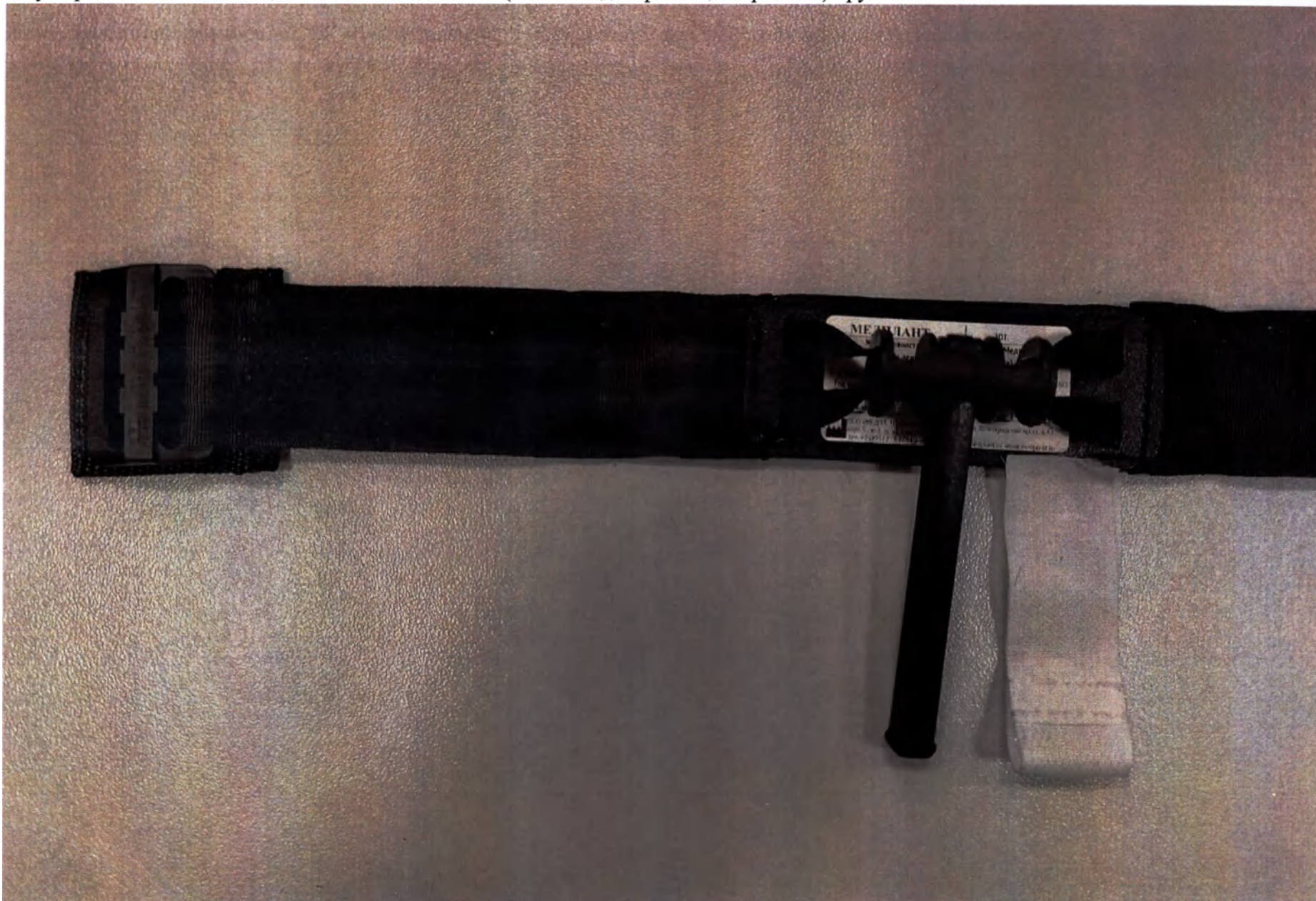

Общий вид в упаковке и маркировка

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени), вид сложения 1

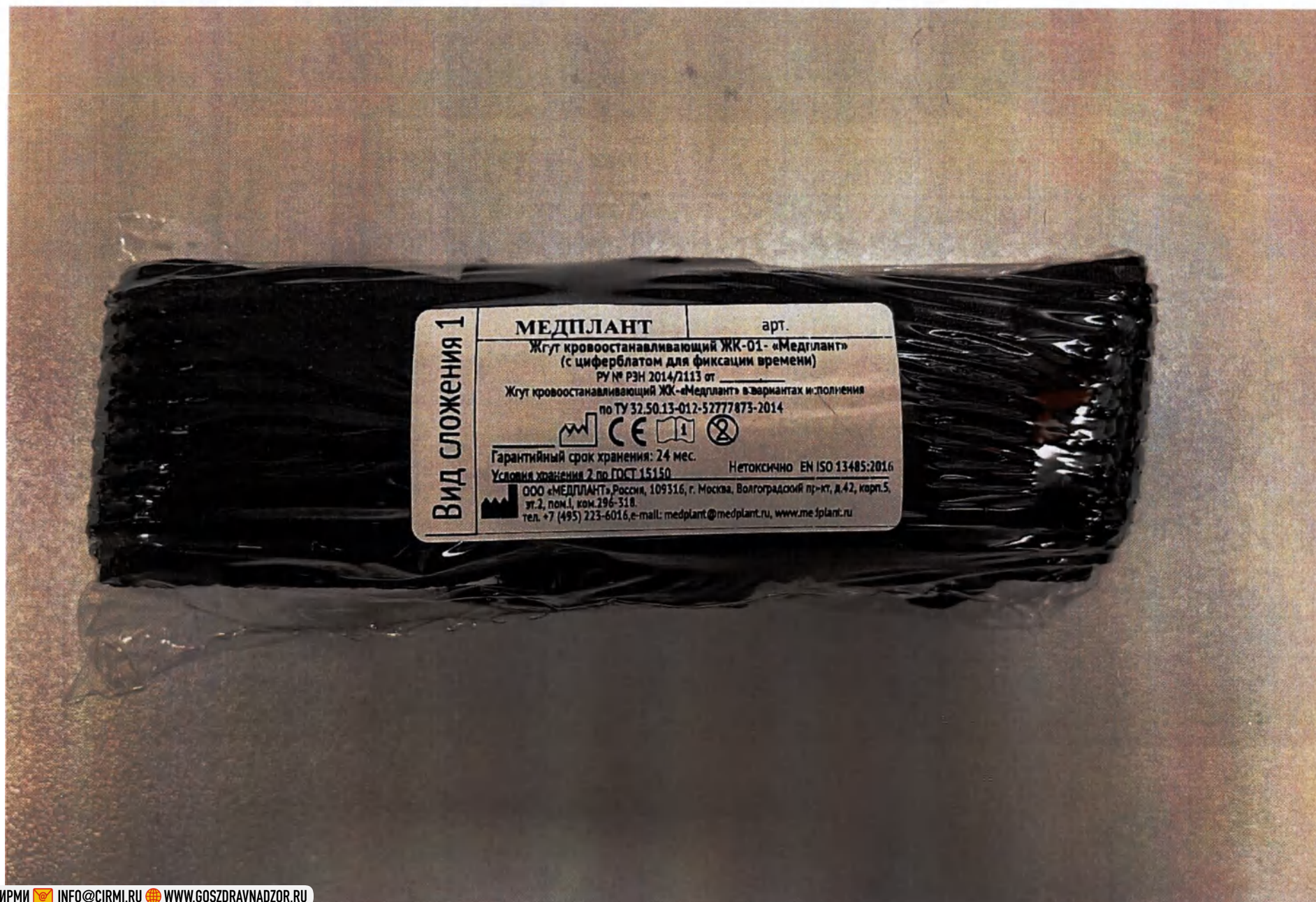

# Вид сложения 1

МЕДПЛАНТ

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01 - «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)

РЧ № РЭН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК - «Медплант» в вариантах и исполнениях  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014




Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетокично EN ISO 13485:2016

ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр.-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

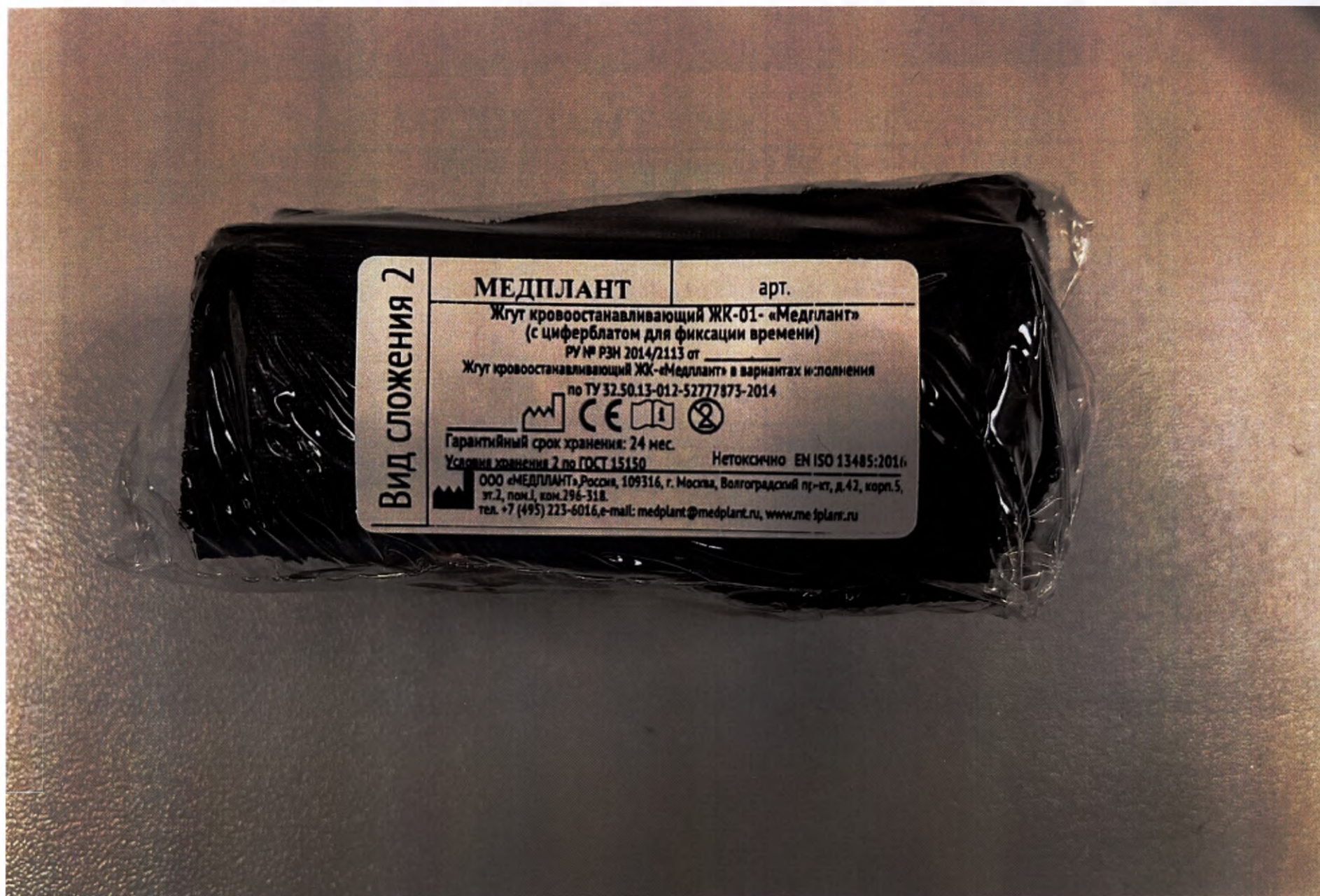

Вид сложения 2

**МЕДПЛАНТ**

арт.

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)**

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения**

по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



**Гарантийный срок хранения: 24 мес.**


**Условия хранения 2 по ГОСТ 15150**

**Нетоксично EN ISO 13485:2016**



**ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.**

**тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru**

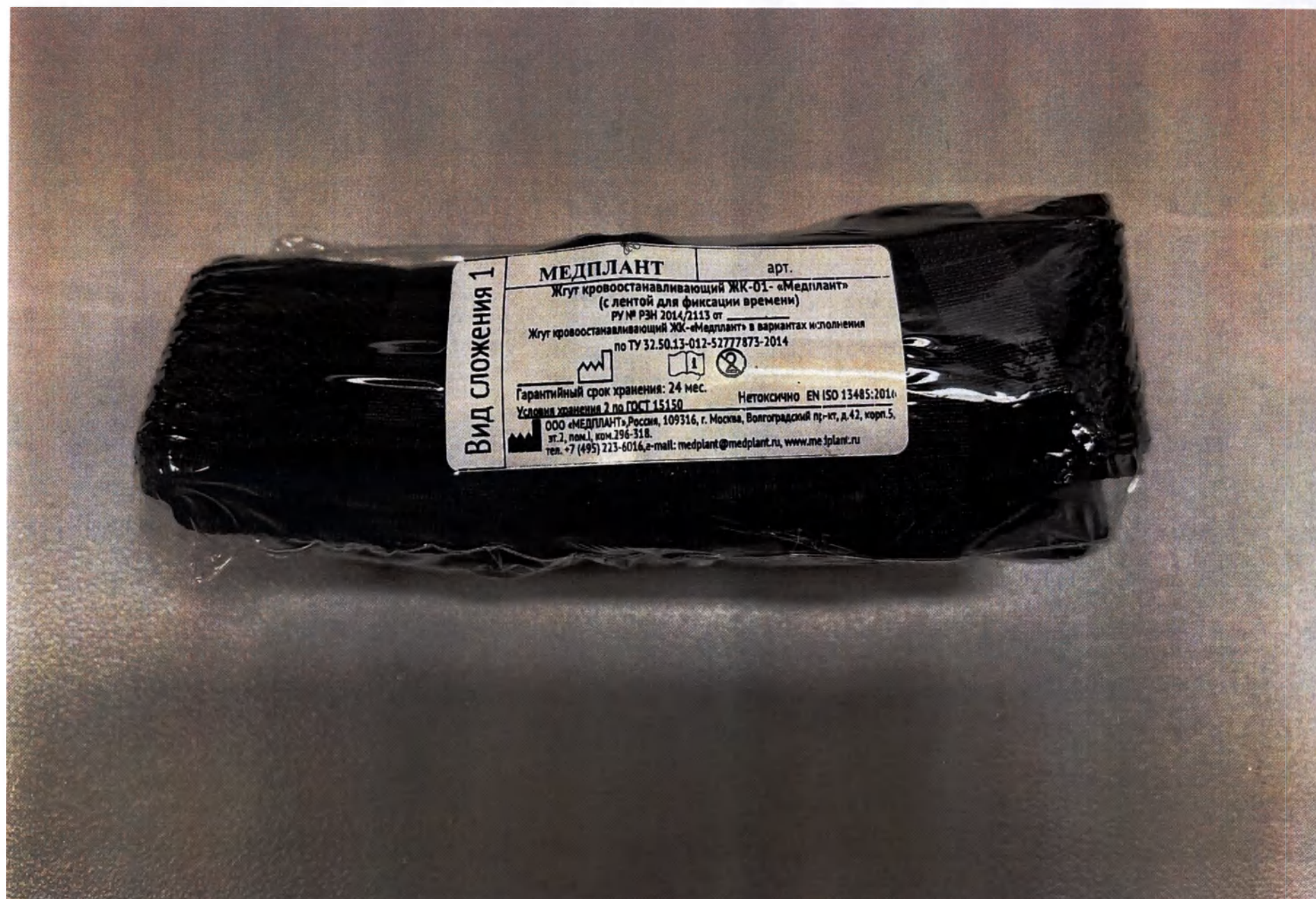

Вид сложения 1

**МЕДПЛАНТ**

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.


Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2014



ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корп. 5,  
эт. 2, пом. 1, ком. 296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

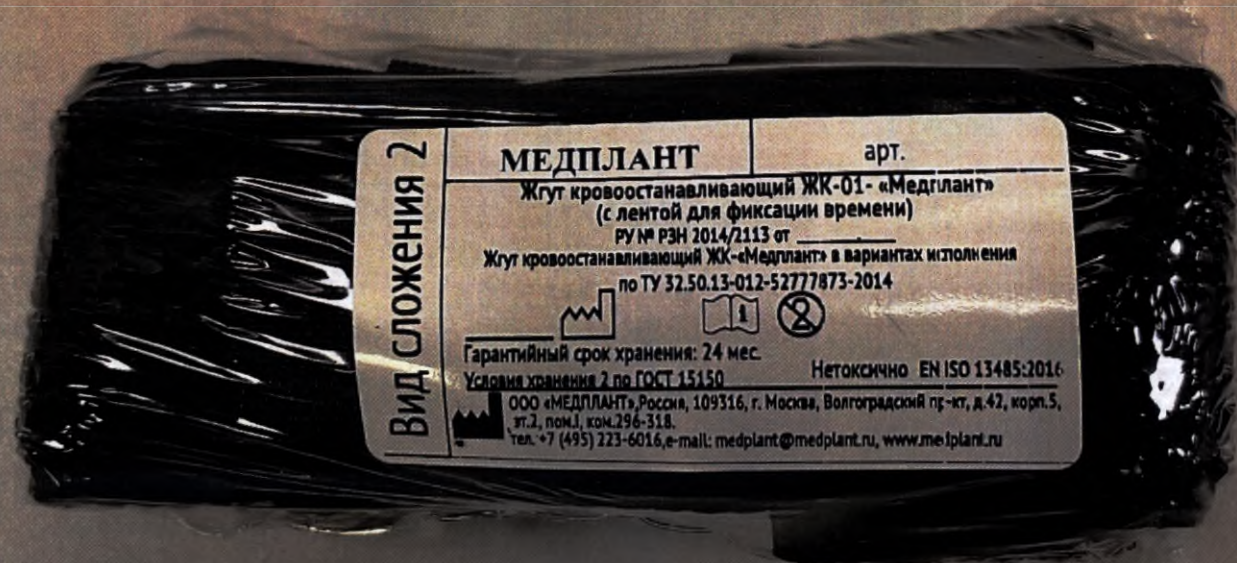

Вид сложения 2

**МЕДПЛАНТ**

арт. \_\_\_\_\_

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)**

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014**



**Гарантийный срок хранения: 24 мес.**

**Условия хранения 2 по ГОСТ 15150**


**Нетоксично EN ISO 13485:2016**



**ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.**

**тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru**

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени), вид сложения 1

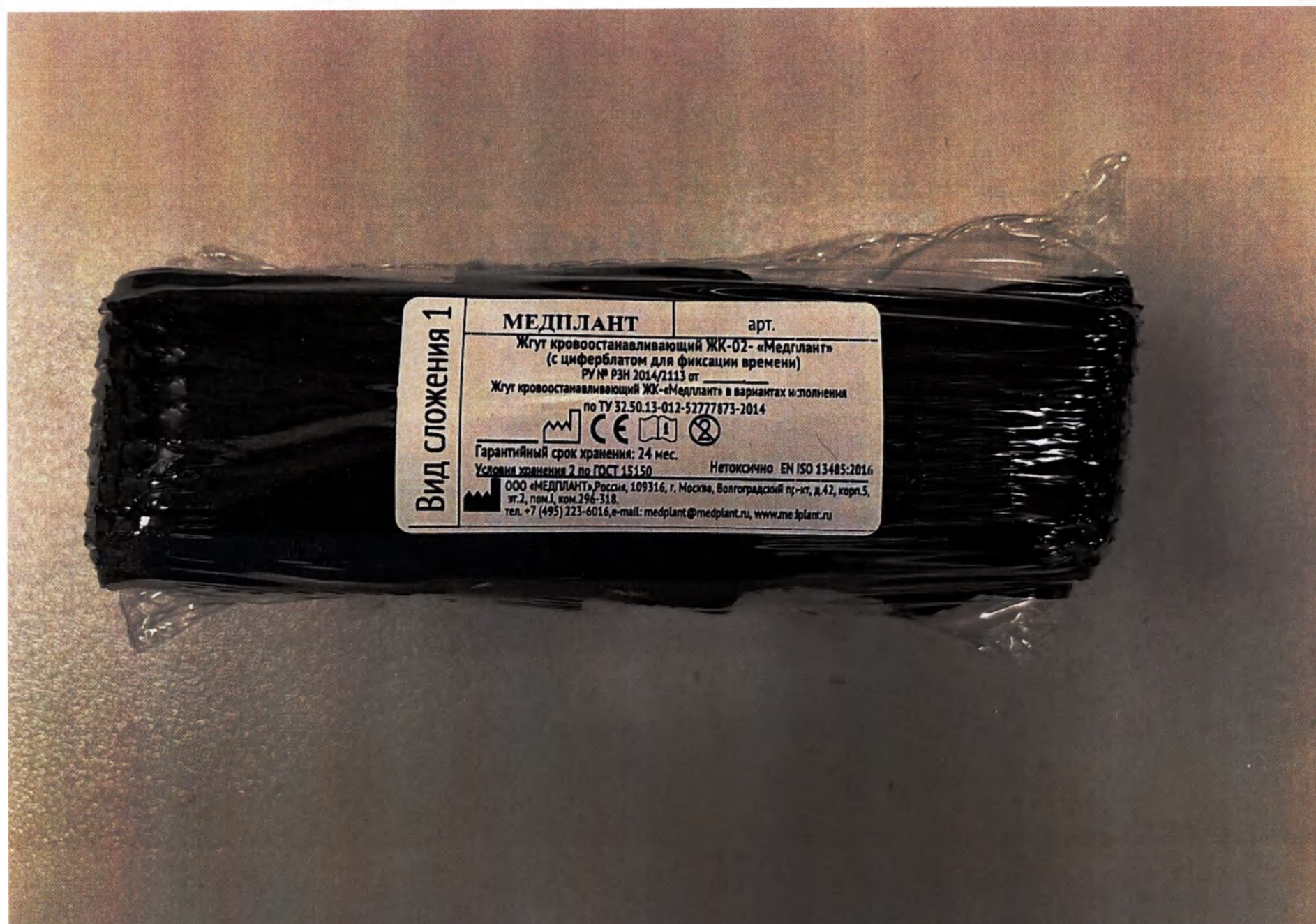

Вид сложения 1

**МЕДПЛАНТ**

арт.

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)**

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016



ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.  
тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru



Вид сложения 2

**МЕДПЛАНТ**


арт.

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)**

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения


по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014

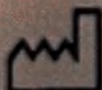

Гарантийный срок хранения: 24 мес.


Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016

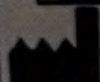

ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

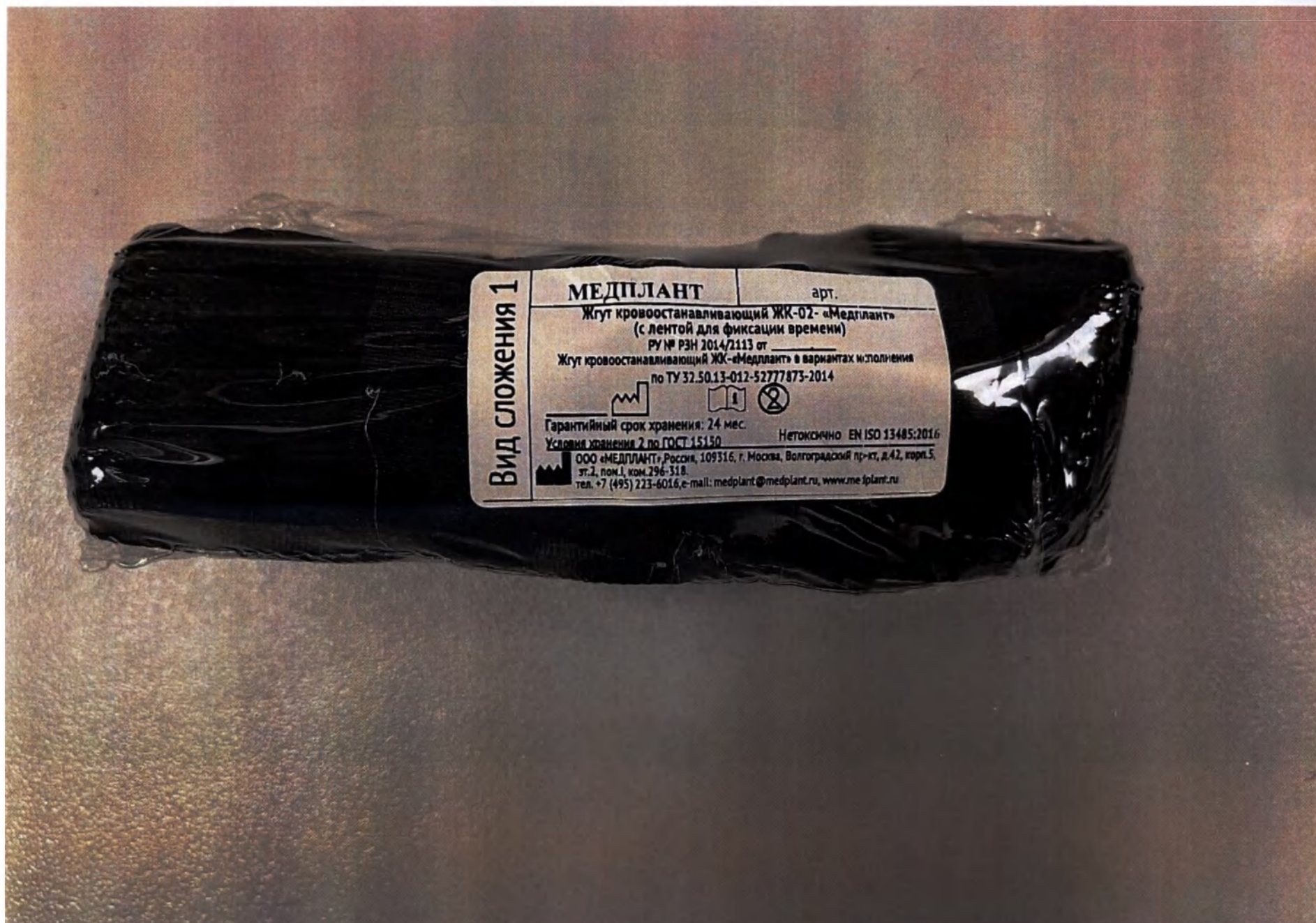

Вид сложения 1

**МЕДПЛАНТ**

арт.

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)**

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014




Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Нетоксично EN ISO 13485:2016

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150



ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.  
тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

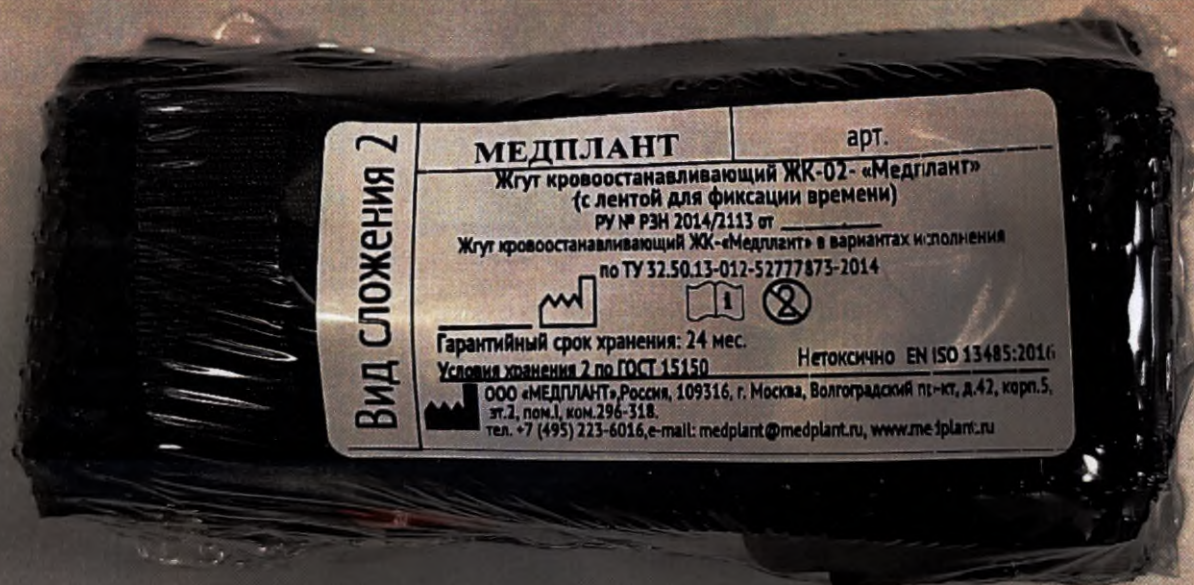

Вид сложения 2

**МЕДПЛАНТ**

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016



ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Вид сложения 1

МЕДПЛАНТ

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения

по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014

Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016

 ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Вид сложения 2

МЕДПЛАНТ

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения

по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014

Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016

 ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Вид сложения 1

МЕДПЛАНТ

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения

по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014

Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016

 ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Вид сложения 2

МЕДПЛАНТ

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения

по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014

Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016

 ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид сложения 1 | <b>МЕДПЛАНТ</b> арт.<br><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br><b>(с циферблатом для фиксации времени)</b><br>РУ № РЗН 2014/2113 от _____<br>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014<br>  <br>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150 Нетоксично EN ISO 13485:2016<br> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru | <b>МЕДПЛАНТ</b> арт.<br><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br><b>(с циферблатом для фиксации времени)</b><br>РУ № РЗН 2014/2113 от _____<br>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014<br>  <br>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150 Нетоксично EN ISO 13485:2016<br> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru |
|                | <b>МЕДПЛАНТ</b> арт.<br><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br><b>(с лентой для фиксации времени)</b><br>РУ № РЗН 2014/2113 от _____<br>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014<br> <br>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150 Нетоксично EN ISO 13485:2016<br> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru                                                                                       | <b>МЕДПЛАНТ</b> арт.<br><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br><b>(с лентой для фиксации времени)</b><br>РУ № РЗН 2014/2113 от _____<br>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014<br> <br>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150 Нетоксично EN ISO 13485:2016<br> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru                                                                                         |

| МЕДПЛАНТ                                                                                                                                                                                                                                                            | арт.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»</b><br><b>(с циферблатом для фиксации времени)</b><br>РУ № РЗН 2014/2113 от _____                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения</b><br>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Год выпуска: _____<br>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150                                                                                                                                                                        |   <br>Нетоксично EN ISO 13485:2016 |
|  ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт.2, пом.1, ком.296-318.<br>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


| МЕДПЛАНТ                                                                                                                                                                                                                                                              | арт.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br><b>(с циферблатом для фиксации времени)</b><br>РУ № РЗН 2014/2113 от _____                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения</b><br>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Год выпуска: _____<br>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150                                                                                                                                                                          |   <br>Нетоксично EN ISO 13485:2016 |
|  ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт.2, пом.1, ком.296-318.<br>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| МЕДПЛАНТ                                                                                                                                                                                                                                                              | арт.                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»</b><br><b>(с лентой для фиксации времени)</b><br>РУ № РЗН 2014/2113 от _____                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения</b><br>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| Год выпуска: _____<br>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150                                                                                                                                                                          |  <br>Нетоксично EN ISO 13485:2016 |
|  ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт.2, пом.1, ком.296-318.<br>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru |                                                                                                                                                                                                         |


| МЕДПЛАНТ                                                                                                                                                                                                                                                                | арт.                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br><b>(с лентой для фиксации времени)</b><br>РУ № РЗН 2014/2113 от _____                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения</b><br>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
| Год выпуска: _____<br>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150                                                                                                                                                                            |  <br>Нетоксично EN ISO 13485:2016 |
|  ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт.2, пом.1, ком.296-318.<br>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru |                                                                                                                                                                                                         |

Общий вид изделия в сложенном виде, эксплуатационная документация вложена внутрь

Руководство по эксплуатации

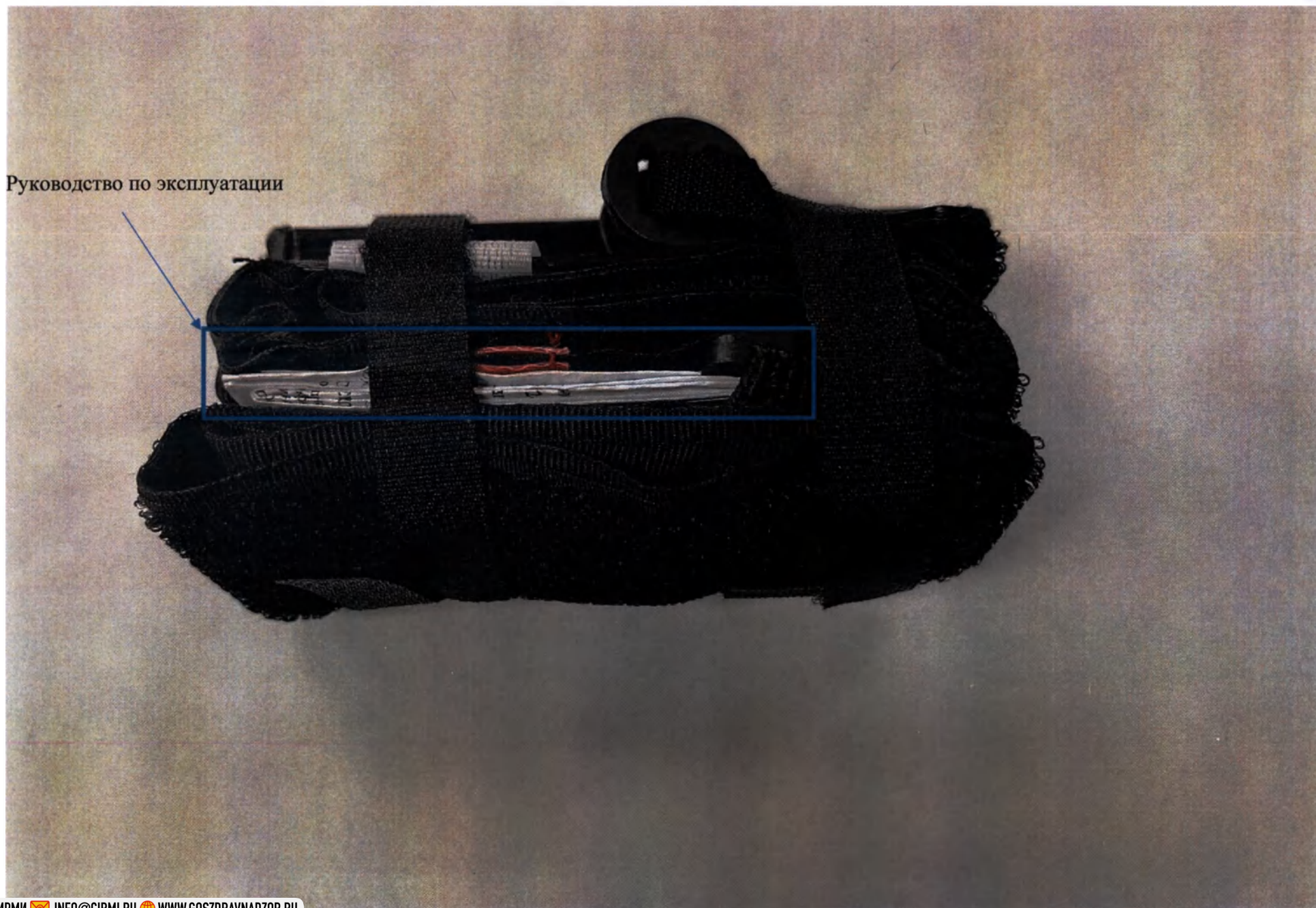

Общий вид изделия в упаковке, эксплуатационная документация вложена внутрь

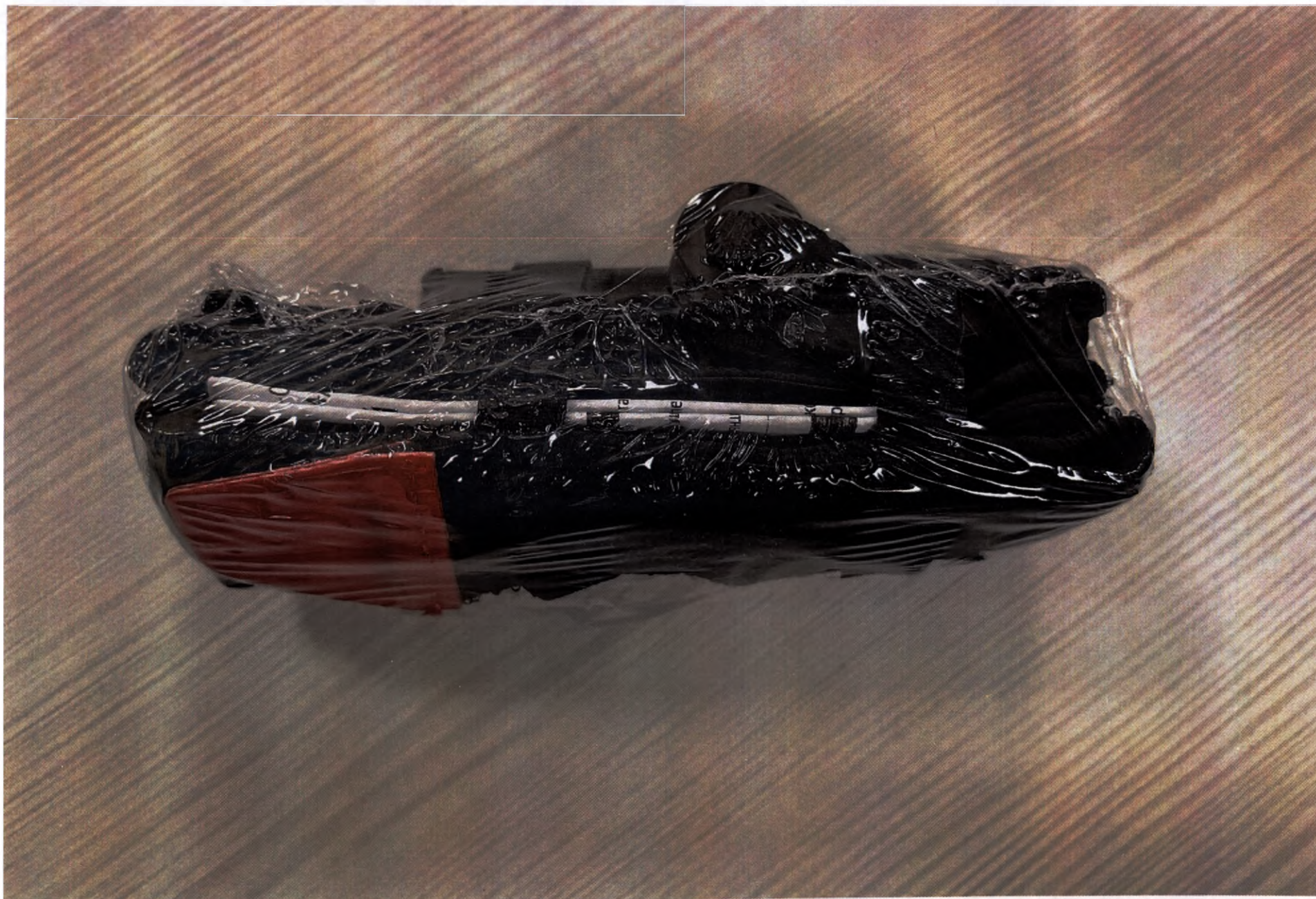

всего прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 28

цифрами

прописью

) листов

*восемь*  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ПУШИН/А.В.

должность, ФИО

подпись

