


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**«Система мониторинга симпатической активности MERIDIAN» по ТУ
26.60.12-001- 53255591-2023 с принадлежностями»**

1. Основной блок обработки и отображения данных медицинского исследования.

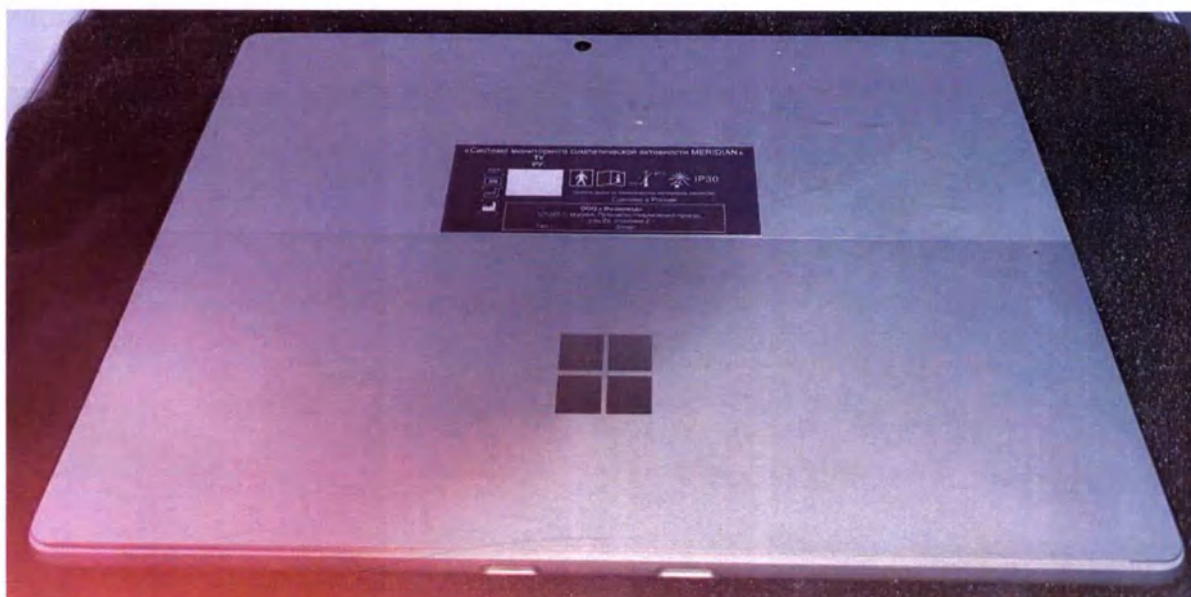


2. Блок питания с кабелем.



3. Регистратор ЭДА носимый беспроводной с кабелем пациента (при необходимости).




4. Зарядное устройство для встроенной перезаряжаемой батареи питания носимого регистратора– 1 шт.

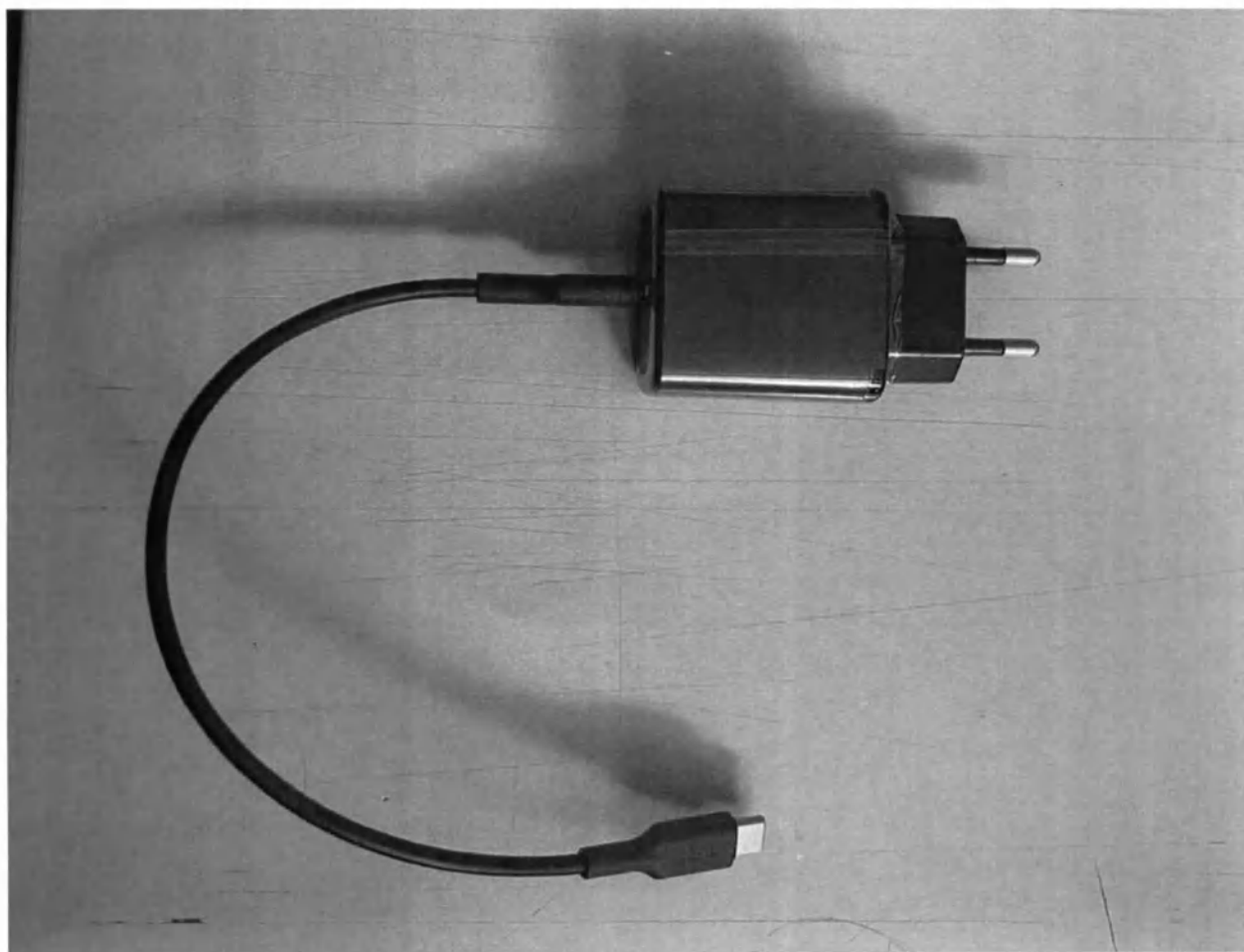

5. Регистратор ЭДА переносной беспроводной (при необходимости).



6. Кабель пациента для регистратора переносного - не более 2 шт. (при необходимости).

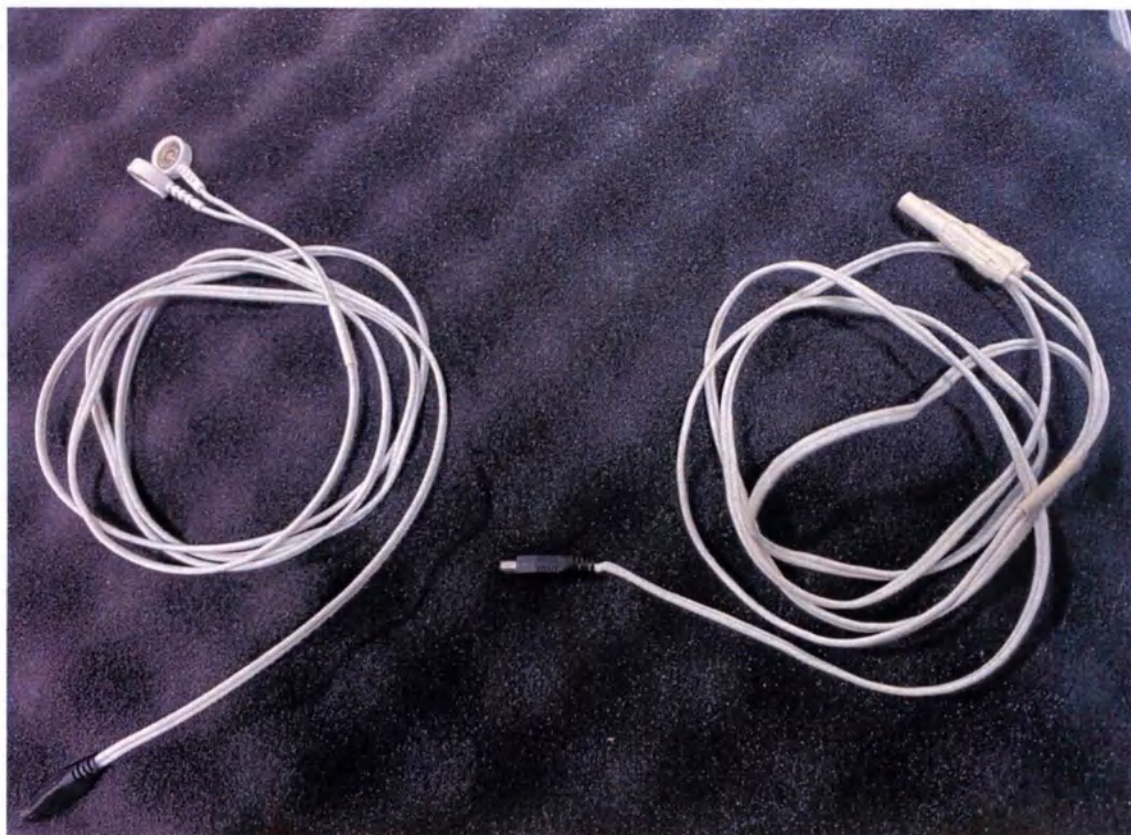


7. Элемент питания типа ААА для регистратора переносного - не более 4 шт. (при необходимости).



8. Электроды одноразовые с твердым гелем, производства "Медико Электроудс Интернешнл Лтд.", Индия, РУ № РЗН 2017/6494 - упаковка 50 шт. (при необходимости).



9. «Программное обеспечение для синхронизированного видеомониторинга»

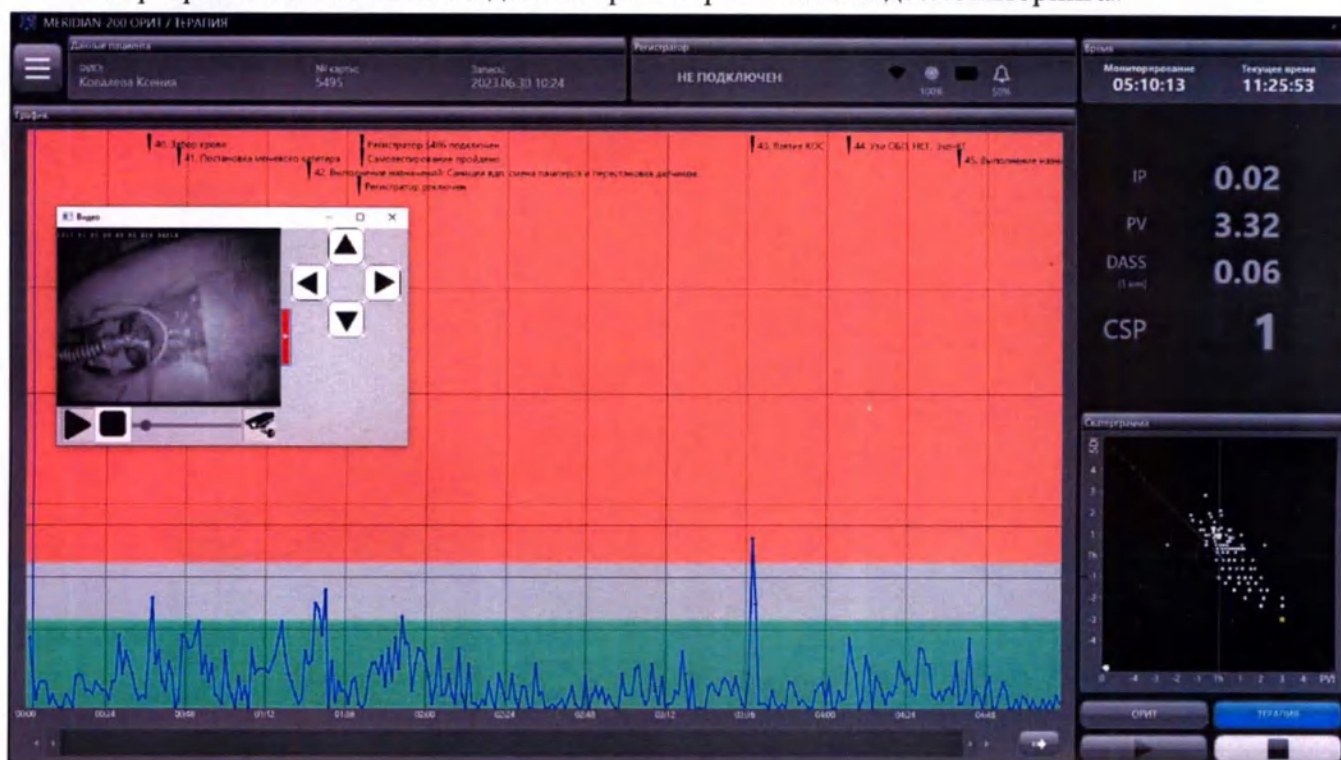


10. «Интерфейсный кабель для интеграции с другими медицинскими приборами»



11. «Краткая схема последовательности работы»

Система мониторинга симпатической активности MERIDIAN
Краткая инструкция

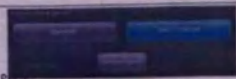Подготовка к мониторингованию 1. Включить моноблок Для того, чтобы включить моноблок, нажмите на кнопку включения	
2. Запустить программу Meridian Программа мониторингования запустится автоматически.	 рис.1
3. Выбрать режим работы Нужно выбрать режим работы «Хирургия» или «ОРИТ/ТЕРАПИЯ» и нажать «Начать работу» (Рис.2).	 Рис.2
4. Включить регистратор После запуска программы включить регистратор с помощью тумблера вкл/выкл (Рис. 3 №1) и кнопки вкл. (Рис. и убедиться, что связь с монитором полностью установлена («Канал связи» должен гореть зеленым)). ВНИМАНИЕ - Перед началом мониторингования необходимо проверить заряд батареи. Индикация уровня заряда батареи, расположенная на передней панели регистратора, должна гореть зеленым. Если регистратор не подключен, нажать на экране в окне «Регистратор» на «НЕ ПОДКЛЮЧЕН», выбрать из списка регистратор, нажать «подключаться автоматически»	 Рис.3  Рис. 3.1
Подключение кабеля и наложение электродов 5. Кабель пациента Подключить кабель пациента в разъем №2 (Рис. 3) 6. Электроды Достать электроды из упаковки, подсоединить электроды к пациенту, затем соединить разъем электродного кабеля с разъемом кабеля пациента. Индикация качества наложения	 Рис. 4

12. «Руководство по эксплуатации»

ОКПД2 26.60.12.129

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Физиомед»



Хныкина Е.В.
14 марта 2024 г.


**СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СИМПАТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ**


MERIDIAN

по ТУ 26.60.12.129-001- 53255591-2023

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Упаковка и маркировка медицинского изделия

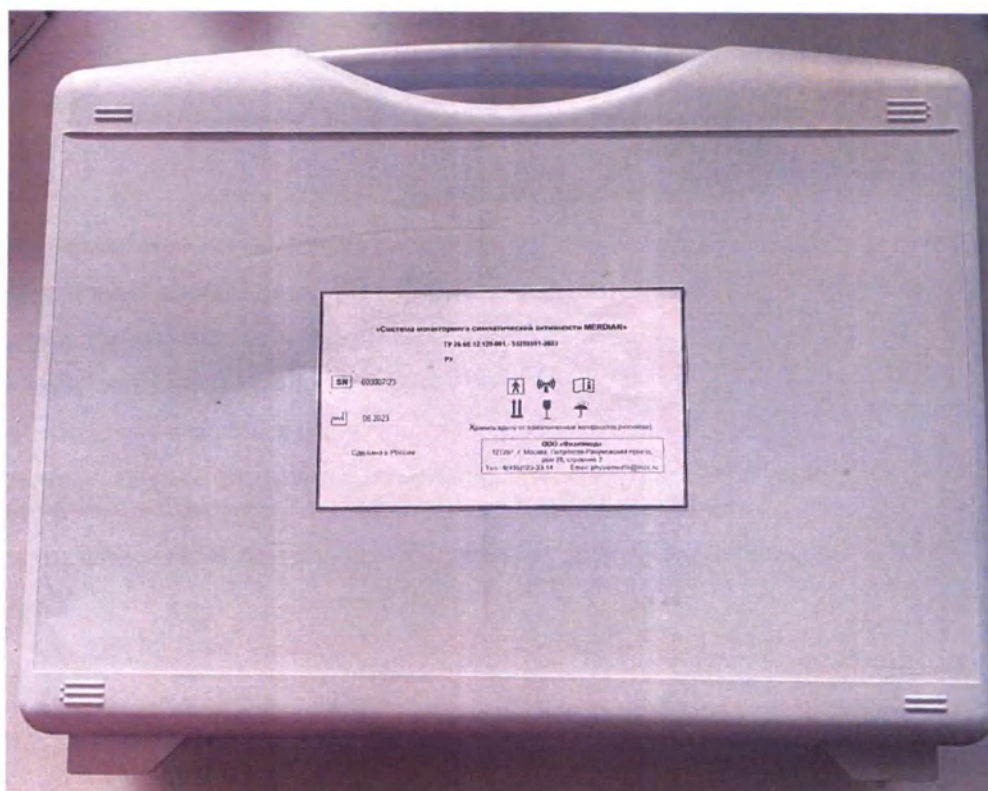

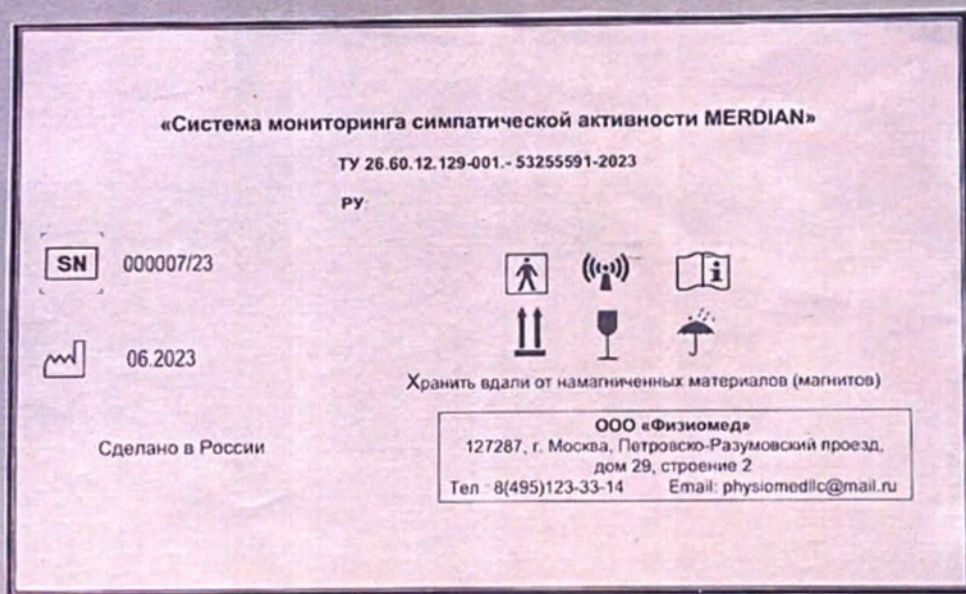

Маркировка Системы мониторинга наносится непосредственно на изделие, или на ярлык или на этикетку с указанием следующих сведений:

- серийный номер
- номер ТУ
- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- месяц и год выпуска изделия;
- номер регистрационного удостоверения;
- температурный диапазон хранения;
- символы «Беречь от солнечных лучей», «Изделие типа BF», класс защиты от поражения электрическим током, «Обратитесь к инструкции по применению», «IP30».

Надписи, содержащие данные о дате изготовления, допускается выполнять от руки.

10 (десять) листов

