

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий – ИП

ООО «Медтехника Р»

И.В. Сирин



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ

АТ003, АТ750-01, АТ850-01, РЕТ02, РЕТ05, РМТ01, ЕТ016, ЕТ750-01, ЕТ750-02, ЕТ850-01, ЕТ850-02, ЕТ006, ИТТ006Х, С3, С4, СТ001, СТ005, СТ008, СТ108, СТ109, СТ750-03, СТ850-03

ТУ 30.99.10-009-98238288-2024,

зарегистрированный товарный знак MED-MOS

2024 г.

Оглавление

1. Введение	1
2. Назначение.....	1
3. Меры предосторожности	1
4. Символы.....	2
5. Маркировка	2
6. Комплектность	4
7. Основные параметры и конструкция.....	9
8. Основные технические характеристики.....	45
9. Подготовка и порядок работы, указание мер безопасности	45
10. Инструкция пользователя	45
11. Техническое обслуживание	46
12. Очистка и дезинфекция.....	47
13. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации.....	47
14. Утилизация	47
15. Текущий ремонт.....	48
16. Соответствие стандартам.....	48
17. Гарантийные обязательства	49

1. Введение

1.1. Представленная здесь информация является частью руководства, пожалуйста, прочтите описание внимательно, так как здесь представлена важная информация о безопасном использовании и процедуре технического обслуживания.

1.2. Наличие и количество соответствующих комплектующих определяется пользователем при заказе изделия

1.3. Все комплектующие могут быть приобретены как вместе с тележками медицинскими, так и без них.

2. Назначение

2.1. Тележки медицинские предназначены для использования в лечебно-профилактических учреждениях при проведении медицинских манипуляций.

2.2. Потенциальные пользователи: изделие рассчитано на применение пользователями без специальной подготовки.

2.3. Показания: перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Противопоказания: отсутствуют.

2.5. Возможные побочные действия: отсутствуют.

2.6. Условия применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

3. Меры предосторожности



Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство тележки, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.



При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.



Запрещается нагружать столешницу медицинской тележки грузом, превышающим 25 кг (стальная), 8 кг (алюминиевая).



Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.

 Во время передвижения тележки следует избегать препятствий и столкновений.

 Не перемещать тележку по электрическим кабелям.

4. Символы

	Предупреждение
---	----------------

Символы, используемые на маркировке изделия

Символ	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации

Символы, используемые на транспортной упаковке

Символ	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Верх

5. Маркировка

На каждой тележке медицинской должен быть прикреплен ярлык из нержавеющей стали, на котором содержится:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и каталожный номер изделия;
- дата изготовления (год);
- № партии;
- обозначение настоящих технических условий;
- адрес производственной площадки

6. Комплектность

Тележки медицинские по ТУ 30.99.10-009-98238288-2024, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, в вариантах исполнения:

1. 1 Тележка медицинская ЕТ750-01, в составе:
 - 1.1. тележка медицинская ЕТ750-01;
 - 1.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 1.3. открытый контейнер - 1 шт. (при необходимости);
 - 1.4. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);
 - 1.5. инфузионная стойка – 1 шт. (при необходимости);
 - 1.6. навесная полка с держателем - 1 шт. (при необходимости);
 - 1.7. поднос - 1 шт. (при необходимости);
 - 1.8. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 1.9. руководство по эксплуатации.
2. Тележка медицинская ЕТ750-02, в составе:
 - 2.1. тележка медицинская ЕТ750-02;
 - 2.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 2.3. открытый контейнер - 1 шт. (при необходимости);
 - 2.4. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);
 - 2.5. инфузионная стойка – 1 шт. (при необходимости);
 - 2.6. навесная полка с держателем - 1 шт. (при необходимости);
 - 2.7. поднос - 1 шт. (при необходимости);
 - 2.8. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 2.9. руководство по эксплуатации.
3. Тележка медицинская ЕТ850-01, в составе:
 - 3.1. тележка медицинская ЕТ850-01;
 - 3.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 3.3. открытый контейнер - 1 шт. (при необходимости);
 - 3.4. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);
 - 3.5. инфузионная стойка – 1 шт. (при необходимости);
 - 3.6. навесная полка с держателем - 1 шт. (при необходимости);
 - 3.7. поднос - 1 шт. (при необходимости);
 - 3.8. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 3.9. руководство по эксплуатации.
4. Тележка медицинская ЕТ850-02, в составе:
 - 4.1. тележка медицинская ЕТ850-02;

- 4.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 4.3. открытый контейнер - 1 шт. (при необходимости);
 - 4.4. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);
 - 4.5. инфузионная стойка – 1 шт. (при необходимости);
 - 4.6. навесная полка с держателем - 1 шт. (при необходимости);
 - 4.7. поднос - 1 шт. (при необходимости);
 - 4.8. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 4.9. руководство по эксплуатации.
5. Тележка медицинская АТ750-01, в составе:
- 5.1. тележка медицинская АТ750-01;
 - 5.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 5.3. открытый контейнер - 1 шт. (при необходимости);
 - 5.4. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);
 - 5.5. инфузионная стойка – 1 шт. (при необходимости);
 - 5.6. навесная полка с держателем - 1 шт. (при необходимости);
 - 5.7. поднос - 1 шт. (при необходимости);
 - 5.8. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 5.9. руководство по эксплуатации.
6. Тележка медицинская АТ850-01, в составе:
- 6.1. тележка медицинская АТ850-01;
 - 6.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 6.3. открытый контейнер - 1 шт. (при необходимости);
 - 6.4. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);
 - 6.5. инфузионная стойка – 1 шт. (при необходимости);
 - 6.6. навесная полка с держателем - 1 шт. (при необходимости);
 - 6.7. поднос - 1 шт. (при необходимости);
 - 6.8. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 6.9. руководство по эксплуатации.
7. Тележка медицинская ЕТ006, в составе:
- 7.1. тележка медицинская ЕТ006;
 - 7.2. контейнер – 1 шт. (при необходимости);
 - 7.3. инфузионная стойка – 1 шт. (при необходимости);
 - 7.4. поднос - 1 шт. (при необходимости);
 - 7.5. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 7.6. руководство по эксплуатации
8. Тележка медицинская ЕТ016, в составе:

- 8.1. тележка медицинская ЕТ016;
 - 8.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 8.3. инфузионная стойка - 1 шт. (при необходимости);
 - 8.4. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 8.5. руководство по эксплуатации.
9. Тележка медицинская РЕТ02, в составе:
- 9.1. тележка медицинская РЕТ02;
 - 9.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 9.3. открытый контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 9.4. инфузионная стойка - 1 шт. (при необходимости);
 - 9.5. навесная полка с держателем - 1 шт. (при необходимости);
 - 9.6. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 9.7. руководство по эксплуатации.
10. Тележка медицинская РЕТ05, в составе:
- 10.1. тележка медицинская РЕТ05;
 - 10.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 10.3. открытый контейнер – 2 шт. (при необходимости);
 - 10.4. открытый металлический контейнер – 1 шт. (при необходимости);
 - 10.5. инфузионная стойка - 1 шт. (при необходимости);
 - 10.6. навесная полка с держателем - 1 шт. (при необходимости);
 - 10.7. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 10.8. руководство по эксплуатации.
11. Тележка медицинская СЗ, в составе:
- 11.1. тележка медицинская СЗ;
 - 11.2. резервуар для медицинских отходов – 1 шт. (при необходимости);
 - 11.3. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 11.4. руководство по эксплуатации.
12. Тележка медицинская С4, в составе:
- 12.1. тележка медицинская С4;
 - 12.2. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 12.3. руководство по эксплуатации.
13. Тележка медицинская РМТ01, в составе:
- 13.1. тележка медицинская РМТ01;
 - 13.2. контейнер - 2 шт. (при необходимости);
 - 13.3. открытый контейнер – 1 шт. (при необходимости);
 - 13.4. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);

- 13.5. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
- 13.6. руководство по эксплуатации.
- 14. Тележка медицинская АТ003, в составе:
 - 14.1. тележка медицинская АТ003;
 - 14.2. открытый контейнер – 1 шт. (при необходимости);
 - 14.3. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);
 - 14.4. инфузионная стойка - 1 шт. (при необходимости);
 - 14.5. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 14.6. руководство по эксплуатации.
- 15. Тележка медицинская СТ001, в составе:
 - 15.1. тележка медицинская СТ001;
 - 15.2. контейнер - 1 шт. (при необходимости);
 - 15.3. резервуар для медицинских отходов – 2 шт. (при необходимости);
 - 15.4. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 15.5. руководство по эксплуатации.
- 16. Тележка медицинская СТ005, в составе:
 - 16.1. тележка медицинская СТ005;
 - 16.2. резервуар для медицинских отходов – 2 шт. (при необходимости);
 - 16.3. мешок для хранения - 1 шт. (при необходимости);
 - 16.4. полка - 1 шт. (при необходимости);
 - 16.5. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 16.6. руководство по эксплуатации.
- 17. Тележка медицинская СТ008, в составе:
 - 17.1. тележка медицинская СТ008;
 - 17.2. резервуар для медицинских отходов – 2 шт. (при необходимости);
 - 17.3. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 17.4. руководство по эксплуатации.
- 18. Тележка медицинская СТ108, в составе:
 - 18.1. тележка медицинская СТ108;
 - 18.2. резервуар для медицинских отходов – 1 шт. (при необходимости);
 - 18.3. открытый контейнер – 1 шт. (при необходимости);
 - 18.4. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);
 - 18.5. руководство по эксплуатации.
- 19. Тележка медицинская СТ109, в составе:
 - 19.1. тележка медицинская СТ109;
 - 19.2. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);

19.3. руководство по эксплуатации.

20. Тележка медицинская ИТТ006Х, в составе:

20.1. тележка медицинская ИТТ006Х;

20.2. контейнер - 14 шт. (при необходимости);

20.3. инфузионная стойка – 1 шт. (при необходимости);

20.4. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);

20.5. руководство по эксплуатации.

21. Тележка медицинская СТ750-03, в составе:

21.1. тележка медицинская СТ750-03;

21.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);

21.3. открытый контейнер - 1 шт. (при необходимости);

21.4. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);

21.5. поднос - 1 шт. (при необходимости);

21.6. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);

21.7. руководство по эксплуатации.

22. Тележка медицинская СТ850-03, в составе:

22.1. тележка медицинская СТ850-03;

22.2. контейнер – 2 шт. (при необходимости);

22.3. открытый контейнер - 1 шт. (при необходимости);

22.4. корзина для медицинских отходов - 2 шт. (при необходимости);

22.5. поднос - 1 шт. (при необходимости);

22.6. встраиваемый замок с комплектом ключей - 1 комплект (при необходимости);

22.7. руководство по эксплуатации.

7. Основные параметры и конструкция



Рис.2 ET006

Специфическое назначение: Тележка медицинская ET006 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская ET006 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвиганию ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	ЕТ006
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	690*450*945
Размер ящиков тип 1-4шт. (длина*ширина*высота), мм	690*405*125
Размер ящиков тип 2-1 шт. (длина*ширина*высота), мм	690*405*205
Размер столешницы (ширина*длина), мм	450*440
Размер контейнера 1 (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Размер подноса (длина*ширина*высота), мм	370*320*15
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	48, 57

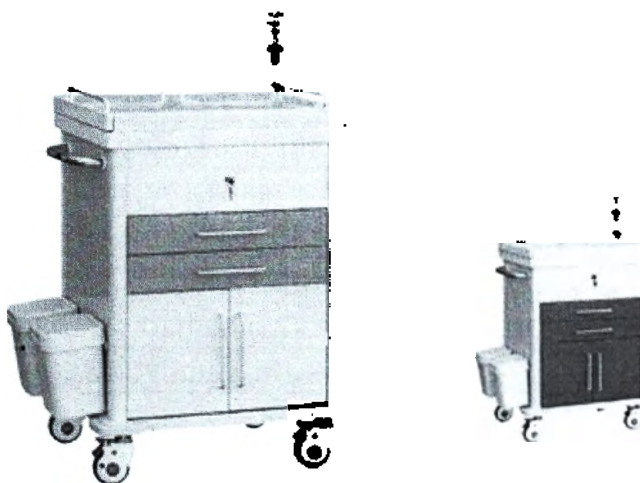


Рис.3 ЕТ016

Специфическое назначение: Тележка медицинская ЕТ016 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская ET016 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков и открытию дверцы тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	ET016
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	690*500*990
Размер ящиков тип 1-2 шт. (длина*ширина*высота), мм	690*490*167
Размер двери 2 шт. (длина*высота), мм	690*490
Размер столешницы (ширина*длина), мм	690*490
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	48, 57

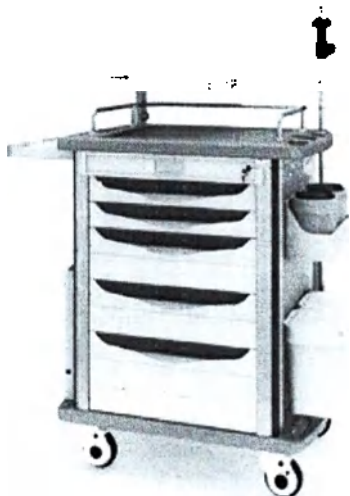


Рис.4 ET750-01

Специфическое назначение: Тележка медицинская ET750-01 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская ET750-01 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 8 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвиганию ящиков и открытию дверцы тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Артикул	ЕТ750-01
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	750*480*930
Размер ящиков тип 1-2шт. (длина*ширина*высота), мм	680*440*115
Размер ящиков тип 2-2 шт. (длина*ширина*высота), мм	680*440*120
Размер ящиков тип 3-1 шт. (длина*ширина*высота), мм	680*440*205
Размер столешницы (ширина*длина), мм	450*470
Размер контейнера 1,2 (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	460*320*150
Размер корзины для медицинских отходов (длина*ширина*высота), мм	130*125*190
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Размер навесной полки с держателем (длина*ширина*высота (от и до), мм	360*120*130-340
Размер подноса (длина*ширина*высота), мм	370*320*15
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Алюминий, нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	48,57

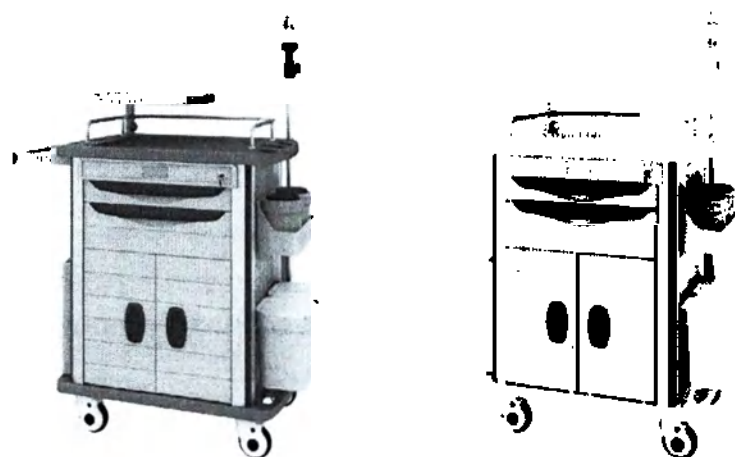


Рис.5 ЕТ750-02

Специфическое назначение: Тележка медицинская ЕТ750-02 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах

медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская ЕТ750-02 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 8 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвиганию ящиков и открытию дверцы тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	ЕТ750-02
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	750*480*930
Размер ящиков тип 1-2шт. (длина*ширина*высота), мм	680*440*190
Размер двери – 2 шт. (Д*В), мм	680*440
Размер столешницы (ширина*длина), мм	450*440
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	460*320*150
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер корзины для медицинских отходов 1,2 (длина*ширина*высота), мм	130*125*190
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Размер навесной полки с держателем (длина*ширина*высота (от и до), мм	360*120*130-340
Размер подноса (длина*ширина*высота), мм	370*320*15
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	80

Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Каркас из алюминия, покрыт пластиком АБС
Вес нетто, брутто кг	42, 46

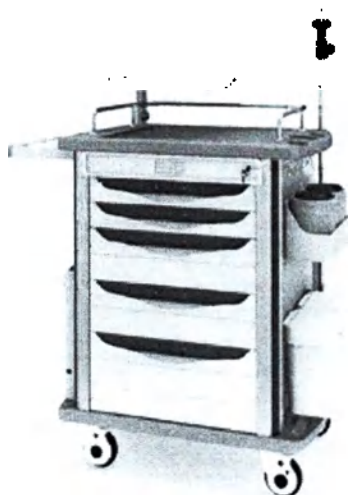


Рис.6 ET850-01

Специфическое назначение: Тележка медицинская ET850-01 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская ET850-01 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 8 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвигению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	ЕТ850-01
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	850*520*950
Размер ящиков тип 1-2шт. (длина*ширина*высота), мм	780*480*120
Размер ящиков тип 2-2 шт. (длина*ширина*высота), мм	780*480*125
Размер ящиков тип 3-1 шт. (длина*ширина*высота), мм	780*480*205
Размер столешницы (ширина*длина), мм	490*470
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	460*320*150
Размер корзины для медицинских отходов (длина*ширина*высота), мм	130*125*190
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Размер навесной полки с держателем (длина*ширина*высота (от и до), мм	360*120*130-340
Размер подноса (длина*ширина*высота), мм	370*320*15
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Алюминий, нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	42, 46

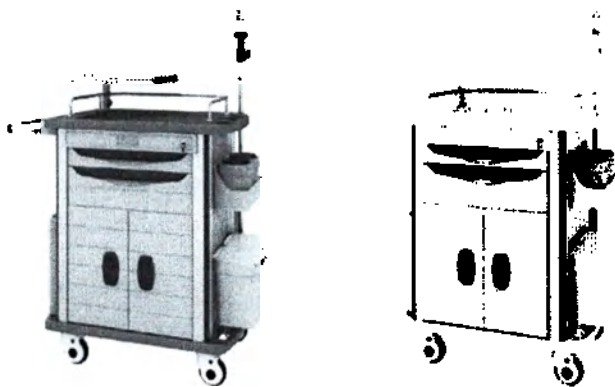


Рис.7 ET850-02

Специфическое назначение: Тележка медицинская ET850-02 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская ET850-02 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 8 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков и открытию дверцы тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	ЕТ850-02
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	850*520*950
Размер ящиков тип 1-1 шт.(длина*ширина*высота), мм	780*480*120
Размер ящиков тип 2-1 шт.(длина*ширина*высота), мм	780*480*137
Размер столешницы (ширина*длина), мм	450*440
Размер двери – 2 шт. (длина*высота), мм	520*570
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	460*320*150
Размер корзины для медицинских отходов 1,2 (длина*ширина*высота), мм	130*125*190
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Размер навесной полки с держателем (длина*ширина*высота (от и до), мм	360*120*130-340
Размер подноса (длина*ширина*высота), мм	370*320*15
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Алюминий, нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.8 PET02

Специфическое назначение: Тележка медицинская PET02 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская PET02 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	РЕТ02
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	615*550*1010
Размер ящиков тип 1-2шт. (длина*ширина*высота), мм	610*540*135
Размер ящиков тип 2-2 шт. (длина*ширина*высота), мм	610*535*175
Размер ящиков тип 3-1 шт. (длина*ширина*высота), мм	610*535*260
Размер столешницы (ширина*длина), мм	550*520
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер открытого контейнера, мм	450*320*150
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Размер навесной полки с держателем (длина*ширина*высота(от и до), мм	360*120*130-340
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.9 РЕТ05

Специфическое назначение: Тележка медицинская РЕТ05 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах

медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская РЕТ05 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвиганию ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	РЕТ05
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	670*640*1000
Размер ящиков тип 1-2шт. (длина*ширина*высота), мм	610*540*110
Размер ящиков тип 2-2 шт. (длина*ширина*высота), мм	610*535*160
Размер ящиков тип 3-1 шт. (длина*ширина*высота), мм	610*535*225
Размер столешницы (ширина*длина), мм	550*520
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	450*320*150
Размер открытого металлического контейнера (длина*ширина*высота), мм	450*320*150
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Размер навесной полки с держателем (длина*ширина*высота(от и до), мм	360*120*130-340
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь,

	АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.10 ИТТ006Х

Специфическое назначение: Тележка медицинская ИТТ006Х предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская ИТТ006Х используется для перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвигению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	ИТТ006Х
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	960*490*1500
Размер выдвижных контейнеров тип 1-10шт. (длина*ширина*высота), мм	950*215*125
Размер выдвижных контейнеров тип 2-4 шт. (длина*ширина*высота), мм	950*215*62
Размер столешницы (ширина*длина), мм	960*490
Высота инфузионной стойки с крючками, мм	400
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между выдвижными контейнерами тип 1, мм	2
Расстояние между выдвижными контейнерами тип 2, мм	1
Высота основания, мм	30
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто, кг	48, 57



Рис.11 С3

Специфическое назначение: Тележка медицинская С3 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская С3 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	С3
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	720*460*980
Размер полки (2 шт.) (длина*ширина*высота), мм	720*460*50
Размер ящика, мм	700*430*80
Расстояние между ящиком и полкой, мм	450

Высота боковых ограждений, мм	85
Резервуар для медицинских отходов (объем), л	6
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан, полипропилен
Вес нетто, брутто, кг	13,1, 19,1



Рис.12 С4

Специфическое назначение: Тележка медицинская С4 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов в пределах медицинских учреждений.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская С4 используется для перевозки лекарств, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	C4
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	720*460*980
Размер ящика (длина*ширина*высота), мм	700*430*80
Размер полки (2шт.) (длина*ширина*высота), мм	720*460*50
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиком и полкой, мм	257
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто, кг	15,4, 20,4

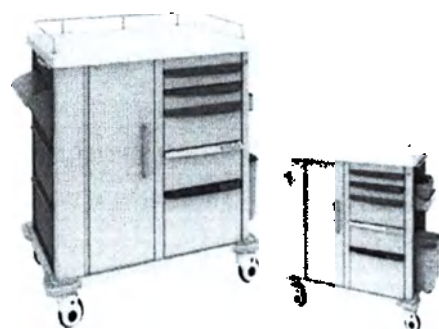


Рис.13 РМТ01

Специфическое назначение: Тележка медицинская РМТ01 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская РМТ01 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвигению ящиков и открытию дверцы тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	PMT01
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	920*640*1060
Размер двери (длина *высота), мм	200*810
Размер ящиков тип 1-2 шт. (длина*ширина*высота), мм	350*640*70
Размер ящиков тип 2-2 шт. (длина*ширина*высота), мм	350*640*200
Размер ящиков тип 3-1 шт. (длина*ширина*высота), мм.	350*640*270
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	520*320*150
Размер корзины для медицинских отходов 1,2 (длина*ширина*высота), мм	130*125*190
Размер столешницы (ширина*длина), мм	920*640
Высота боковых ограждений, мм	60
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	42, 46

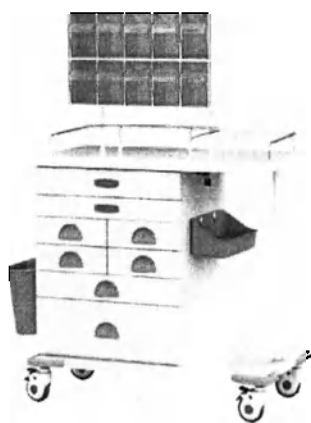


Рис.14 AT003

Специфическое назначение: Тележка медицинская AT003 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская AT003 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 8 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	AT003
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	930*450*1500

Размер ящиков тип 1-2 шт. (длина*ширина*высота), мм	550*450*100
Размер ящиков тип 2-4 шт. (длина*ширина*высота), мм	275*450*110
Размер ящиков тип 3-1 шт. (длина*ширина*высота), мм	550*450*280
Размер ящиков тип 4-1 шт. (длина*ширина*высота), мм	550*450*280
Размер корзины для медицинских отходов (длина*ширина*высота), мм	320*160*300
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	420*320*150
Размер столешницы (ширина*длина), мм	930*450
Высота инфузионной стойки, мм	520
Высота боковых ограждений, мм	60
Высота опорной стойки, мм	800
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Алюминий, нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.15 АТ750-01

Специфическое назначение: Тележка медицинская АТ750-01 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах

медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская АТ750-01 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 8 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвиганию ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	АТ750-01
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	750*480*930
Размер ящиков тип 1-2шт. (длина*ширина*высота), мм	680*440*190
Размер двери – 2 шт. (Д*В), мм	680*440
Размер столешницы (ширина*длина), мм	450*440
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	460*320*150
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер корзины для медицинских отходов 1,2 (длина*ширина*высота), мм	130*125*190
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Размер навесной полки с держателем (длина*ширина*высота (от и до), мм	360*120*130-340
Размер подноса (длина*ширина*высота), мм	370*320*15
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1

Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Каркас из алюминия, покрыт пластиком АБС
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.16 АТ850-01

Специфическое назначение: Тележка медицинская АТ850-01 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария, медикаментов и медицинского оборудования, для проведения медицинских процедур в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская АТ850-01 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для проведения медицинских процедур, для размещения инструментов, материалов и оборудования, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 8 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	AT850-01
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	850*520*950
Размер ящиков тип 1-1шт.(длина*ширина*высота), мм	780*480*120
Размер ящиков тип 2-1 шт.(длина*ширина*высота), мм	780*480*137
Размер столешницы (ширина*длина), мм	450*440
Размер двери – 2 шт. (длина*высота), мм	520*570
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	460*320*150
Размер корзины для медицинских отходов 1,2 (длина*ширина*высота), мм	130*125*190
Высота инфузионной стойки от и до, мм	300-740
Размер навесной полки с держателем (длина*ширина*высота (от и до), мм	360*120*130-340
Размер подноса (длина*ширина*высота), мм	370*320*15
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Алюминий, нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.17 СТ001

Специфическое назначение: Тележка медицинская СТ001 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская СТ001 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	СТ001
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	604*457*855
Размер столешницы (ширина*длина), мм	604*457
Размер ящика (длина*ширина*высота), мм	604*457*200
Размер контейнера (длина*ширина*высота), мм	590*457*100

Резервуар для медицинских отходов (объем), л	6
Расстояние между полками, мм	340
Высота ограждений, мм	85
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	Диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан, полипропилен
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.18 СТ005

Специфическое назначение: Тележка медицинская СТ005 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская СТ005 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.
 Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.
 Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).
 Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	СТ005
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	620*470*910
Размер ящика (длина*ширина*высота), мм	620*470*910
Размер столешницы (ширина*длина), мм	620*470
Размер полки (ширина*длина*высота), мм	620*470*50
Объем мешка для хранения, л	80
Резервуар для медицинских отходов (объем) 2 шт., л	6
Высота ограждений, мм	85
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полипропилен
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.19 СТ008

Специфическое назначение: Тележка медицинская СТ008 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская СТ008 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвигению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	СТ008
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	620*470*910
Размер ящика (длина*ширина*высота), мм	620*470*910
Размер столешницы (ширина*длина), мм	620*470
Размер нижней полки (ширина*длина), мм	620*470
Резервуар для медицинских отходов (объем) 2 шт., л	6
Высота боковых ограждений, мм	85
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.20 СТ108

Специфическое назначение: Тележка медицинская СТ108 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская СТ108 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	СТ108
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	930*450*1500
Размер ящиков тип 1-1 шт. (длина*ширина*высота), мм	650*450*75

Размер ящиков тип 2-1 шт. (длина*ширина*высота), мм	650*450*170
Размер столешницы (ширина*длина), мм	930*450
Высота бокового ограждения, мм	120
Резервуар для медицинских отходов (объем), л	6
Размер открытого контейнера, мм	450*320*150
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полипропилен
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.21 СТ109

Специфическое назначение: Тележка медицинская СТ109 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов, в пределах медицинских учреждений.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская СТ109 используется для перевозки лекарств, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Артикул	СТ109
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	470*450*935
Размер выдвижного ящика (длина*ширина*высота), мм	760*455*91
Размер столешницы (ширина*длина), мм	470*450
Размер полок (длина*ширина*высота), мм	470*450*30
Расстояние между полками, мм	250
Ручка-толкатель (высота), мм	250
Диаметр колес, мм	100
Наличие тормозов	диагональные
Высота ограждений, мм	85
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полипропилен
Вес нетто, брутто кг	42, 46



Рис.22 СТ850-03

Специфическое назначение: Тележка медицинская СТ850-03 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская СТ850-03 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвижению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	СТ850-03
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	850*520*950
Размер ящиков тип 1-1шт. (длина*ширина*высота), мм	850*520*120
Размер ящиков тип 2-3 шт. (длина*ширина*высота), мм	850*520*175
Размер столешницы (ширина*длина), мм	850*520
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	490*120*240
Размер корзины для медицинских отходов – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	130*125*190
Размер подноса (длина*ширина*высота), мм	370*320*15
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	36,40



СТ750-03

Рис.23

Специфическое назначение: Тележка медицинская СТ750-03 предназначена для перевозки различного медицинского инструментария и медикаментов в пределах медицинских учреждений, а также для сбора медицинских отходов с указанием класса в соответствии с действующим законодательством.

Область применения: в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Принцип действия: Тележка медицинская СТ750-03 используется для сбора медицинских отходов, перевозки лекарств, для размещения инструментов и материалов, которые необходимы при работе в медицинских учреждениях.

Функциональное назначение:

Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную, не менее 25 кг.

Усилие, необходимое для перемещения тележки медицинской с равномерно распределенной панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой поверхности, не превышает 95 Н.

Усилие, прилагаемое к выдвиганию ящиков тележки медицинской не более 5Н.

Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

Вариант исполнения	СТ750-03
Габариты изделия (длина*ширина*высота), мм	750*480*930
Размер ящиков тип 1-1шт. (длина*ширина*высота), мм	750*480*120

Размер ящиков тип 2-3 шт. (длина*ширина*высота), мм	750*480*155
Размер столешницы (ширина*длина), мм	750*480
Размер контейнера – 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	170*155*240
Размер открытого контейнера (длина*ширина*высота), мм	490*120*240
Размер корзины для медицинских отходов - 2 шт. (длина*ширина*высота), мм	130*125*190
Размер подноса (длина*ширина*высота), мм	370*320*15
Высота боковых ограждений, мм	85
Расстояние между ящиками, мм	1
Диаметр колес, мм	80
Наличие тормозов	диагональные
Материал изделия	Нержавеющая сталь, АБС-пластик, полиуретан
Вес нетто, брутто кг	36,40

Предельные отклонения габаритных размеров тележек медицинских не превышают $\pm 10\%$. Предельные отклонения массы не превышают $\pm 10\%$

Материалы, применяемые для изготовления изделия:

Компонент тележки	Материал	Марка материала	Производитель материала
Каркас тележки	нержавеющая сталь	304 AISI или 08X18H10 или 10	Shanghai Baosteel, Китай ГОСТ 5582, ГОСТ11068 ГОСТ 19904
	алюминий	A98/1098 или A97	Aluminum Corporation of China Limited, Китай ГОСТ 11069-2001
Открытый металлический контейнер	нержавеющая сталь	304 AISI или 08X18H10 или 10	Shanghai Baosteel, Китай ГОСТ 5582, ГОСТ11068 ГОСТ 19904
Ящик Дверь Корзина для медицинских отходов Контейнер Открытый контейнер Столешница Инфузионная стойка Навесная полка Поднос Крепление для мешка Полка Ручка толкатель	АБС пластик	АБС 2020-31	LG Chemicals, Китай
Боковые ограждения	нержавеющая сталь	304 AISI или 08X18H10 или 10	Shanghai Baosteel, Китай ГОСТ 5582, ГОСТ11068 ГОСТ 19904
Колёса	полиуретан	SCm100	Zhongshan longway casters Co., Ltd, Китай
Мешок для хранения	ПВХ	XHDY001	Yuyao BaoQi Electrical Appliance Factory, Китай
Резервуар для медицинских	полипропилен	H 32	Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.,

ОТХОДОВ			Китай
---------	--	--	-------

8. Основные технические характеристики

8.1. Тележка медицинская выдерживает номинальную нагрузку, равномерно распределенную: из нержавеющей стали не менее 25 кг, из алюминия не менее 8 кг.

8.2. Усилие передвижения тележки медицинской по полу с номинальной нагрузкой не более 95 Н.

8.3. Усилие, прилагаемое к выдвигению ящиков тележки медицинской не более 5Н.

8.4. Колеса медицинской тележки вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

8.5 Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов, не более 150 Н (15 кгс).

8.6 Усилие, прилагаемое к стойке при ее поднятии (без нагрузки) и к столешнице при ее наклоне не более 50 Н.

9. Подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

9.1. Извлечь тележку медицинскую из транспортной тары. Законсервированные поверхности протереть марлевым тампоном, смоченным спиртом.

9.2. Проверить комплектность тележки медицинской в соответствии с заказом.

9.3. После транспортирования тележки медицинской в условиях отрицательных температур его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

9.4. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания тележки, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

10. Инструкция пользователя

10.1. Для открытия ящика (на моделях АТ003, РМТ01, ЕТ006, ИТТ006Х, С3, С4, СТ001, СТ005, СТ008, СТ108, СТ109) необходимо потянуть ящик за ручку (если она имеется) на себя, если ящик не оснащен ручкой, то потянуть за удобную часть ящика на себя. Для изделий ЕТ016, ЕТ750-01, ЕТ750-02, РЕТ02, РЕТ05, ЕТ850-01, ЕТ850-02, АТ850-01, АТ750-01, СТ850-03 ,СТ750-03 проверьте, не заблокированы ли ящики (см. пункт 6.2)

10.2. Для разблокировки замка (на моделях ЕТ016, ЕТ750-01, ЕТ750-02, РЕТ02, РЕТ05, ЕТ850-01, ЕТ850-02, АТ850-01, АТ750-01, СТ850-03 ,СТ750-03) необходимо повернуть ключ против часовой стрелки. Для блокировки замка необходимо повернуть ключ по часовой стрелке.

Внимание! Убедитесь, что все дверцы и ящики, относящиеся к данному замку, закрыты.

10.3. Для регулирования инфузионной стойки (на моделях ЕТ006, ЕТ016, ЕТ750-01, ЕТ750-02, ЕТ850-01, ЕТ850-02, РЕТ02, РЕТ05, ИТТ006Х, АТ003, АТ850-01, АТ750-01) необходимо разблокировать ведущие части. Для разблокировки ведущих частей инфузионной стойки необходимо повернуть вентиль против часовой стрелки, для блокировки (фиксации высоты) необходимо повернуть вентиль по часовой стрелке.

!Внимание! Не используйте инфузионную стойку без блокировки.

10.4. Для регулирования съемной полки (на моделях ЕТ750-01, ЕТ750-02, РЕТ02, РЕТ05, ЕТ750-01, ЕТ850-01) необходимо разблокировать ведущие части. Для разблокировки ведущих частей съемной полки необходимо повернуть вентиль против часовой стрелки, для блокировки (фиксации высоты) необходимо повернуть вентиль по часовой стрелке.

!Внимание! Не используйте съемную полку без блокировки.

10.5. Тормоза (на моделях АТ003, РМТ01, ЕТ006, ИТТ006Х, С3, С4, СТ001, СТ005, СТ008, СТ108, СТ109, ЕТ016, ЕТ750-01, ЕТ750-02, РЕТ02, РЕТ05, ЕТ850-01, ЕТ850-02, АТ850-01, АТ750-01, СТ850-03, СТ750-03). Для фиксации тормозов надавите на них вниз до щелчка. Проверьте зафиксирована ли тележка. Для снятия фиксации тормозов потяните на вверх до щелчка.

10.7. Для того что бы снять съемный контейнер (Вариант исполнения ИТТ006Х) необходимо потянуть съемный контейнер вверх и высвободить из ячейки. Для того что бы поставить съемный контейнер на место необходимо вставить съемный контейнер в ячейку.

11. Техническое обслуживание

11.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колес любой консистентной технической смазкой, промывке моющими растворами и санитарной обработке медицинской тележки.

11.2. Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования медицинской тележки, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.

11.3. Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна.

12. Очистка и дезинфекция

12.1. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.

12.2. Поверхности тележек медицинских должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96 или 1 %-ным раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-96.

13. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации

13.1 Транспортирование изделий следует производить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на транспорте данного вида, по условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

13.2 Тележки медицинские должны храниться в потребительской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях в вертикальном положении.

13.3 Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

13.4 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69.

13.5 Тележки медицинские при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов для условий хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69.

13.5. Условия эксплуатации тележки медицинской соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ Р 50444-92: температура от +10 °С до + 35 °С; относительная влажность – 80 % при температуре 25 °С.

14. Утилизация

14.1 Тележки медицинские утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

14.2. Данное медицинское изделие при использовании, хранении и транспортировке безопасно для окружающей среды.

15. Текущий ремонт

15.1. Общие положения.

15.1.1. Текущий ремонт производится специалистами ремонтных предприятий или предприятия-изготовителя.

15.2. Содержание текущего ремонта

15.2.1. Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;**
- 2) исправление неисправностей;**
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.**

15.3. Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

15.4. После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

16. Соответствие стандартам

ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

ГОСТ Р 51084-97 Тележки для транспортирования пациентов и грузов. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro

ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия

17. Гарантийные обязательства

Если качество приобретенного продукта вызывает сомнения, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным представителем как можно скорее.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи и при выполнении требований настоящего «Руководства по эксплуатации»; за исключением быстроизнашивающихся деталей и повреждений, причинённых вследствие ненадлежащего обращения.

Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции могут быть произведены в компании ООО «Медтехника-Р» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня продажи. При обращении потребителя по гарантии, срок эксплуатации замененных частей не обновляется.

При обращении в ООО «Медтехника-Р» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Срок службы: не менее 5 лет, изготовлено из перерабатываемых материалов, не загрязняющих окружающую среду.

Адрес для направлений претензий и рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК»

Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 35/2, этаж 1, пом. Х

Тел.: +7 (495) 504-26-51

+7 (495) 504-26-53

E-mail: info@rebotec.net

Официальный сайт: <http://www.med-mos.ru>

Приложение 1 (Гарантийный сертификат)

Гарантийный сертификат на изделие

Уважаемый пользователь: Искренне благодарим за приобретение нашей продукции, для того, чтобы вы смогли наслаждаться услугами компании еще больше, внимательно прочитайте инструкцию. Руководство пользователя содержит соответствующие методы эксплуатации и технического обслуживания:

1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек медицинских заявленным характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации, а также условий транспортировки и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации тележек медицинских – один год со дня ввода в эксплуатацию или со дня получения его потребителем.

Гарантийный срок хранения- 2 года со дня продажи.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

3. Если пользователь не соблюдает условия гарантии, то данный гарантийный сертификат недействителен.

4. Нижеследующий список не подразумевает технического обслуживания, компания имеет право не предлагать бесплатный ремонт или замену или бесплатное гарантийное обслуживание, но может предложить услуги по ремонту, взимая плату только за стоимость запасных частей.

А: Неисправности или повреждения вследствие демонтажа или ремонта неуполномоченным должностным или непрофессиональным лицом.

В: Неисправности или повреждения, вызванные другими нематериальными, производственными факторами и т.д.

5. Средний срок службы до списания 5 лет.

6. Адрес для направлений претензий и рекламаций:

ООО «Медтехника Р»

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 35/2, этаж 1, пом. X

тел. (495) 504-26-51, факс (495)504-26-53, e-mail:

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

50 (пятьдесят) листа (ов)

Управляющий-ИП Сирин И.В.

Подпись _____

