

127

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Компания «Интермедсервис»»



Голубев В.А.
«12» февраля 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материалы стоматологические вспомогательные лечебные

Материал для защиты десны Top Dam

TopDam представляет собой фотополимеризуемую метакрилатную композитную смолу, которая отражает свет и пассивно прилипает к десне, затекая в межзубные промежутки.

TopDam изолирует зубы при микроабразивной обработке так же хорошо, как раббердам. Применение TopDam особенно полезно у детей и подростков, у которых зубы прорезались не полностью, что затрудняет идеальную постановку раббердама. При использовании TopDam необходимо высушить мягкие ткани перед нанесением материала; нанести материал на десну, обеспечивая достаточную для хорошей адгезии площадь поверхности; аккуратно нанести материал на десневой край и в область межзубных промежутков, обеспечивая, таким образом, ретенцию материала. Пустоты в материале TopDam могут быть заполнены путем нанесения дополнительной порции материала с последующей ее фотополимеризацией. Если при промывании полимеризованный барьер TopDam сместился, он может быть снова возвращен на место и "приклеен" с помощью новой порции материала.

Кислотный гель для кондиционирования эмали и керамики Cond Ac Porcelana

1. При работе с фарфором врачу, его ассистенту и пациенту необходимо надеть защитные очки. Врач и его ассистент должны надеть защитные перчатки.

2. Ассистент должен стоять со стороны кресла и держать вакуумный отсос на расстоянии 6-7 см от поверхности фарфора во время процесса протравливания для отсоса кислотных испарений.

3. Снять колпачок с крышки шприца Cond Ac Porcelana и поместить изогнутый наконечник на шприц. Осторожно начинайте равномерно выдавливать гель на подушечку для смешивания. Не выдавливайте гель в рот пациенту. Для того, чтобы лучше контролировать процесс выдавливания, не нажимайте сильно большим пальцем на шприц. Вместо этого рекомендуется держать емкость шприца между большим и указательным пальцами, оставив поршень сверху. Осторожно отведите шприц назад большим и указательным пальцами и начинайте выдавливать гель. Используйте новый наконечник для каждого пациента.

4. Аккуратно нанесите Cond Ac Porcelana на поверхность фарфора и оставьте на 2 минуты, отсасывая при этом испарения с помощью вакуума.

5. Прополощите рабочие поверхности с большим количеством воды в течении 2 минут и высушите с помощью чистого, незагрязненного, несодержащего масла и влаги сжатого воздуха.

6. Подсушите чистым, масло-несодержащим воздухом рабочие поверхности.

7. Приступайте к восстановлению или цементированию фарфорового зуба, вкладки или виниров, используя ненаполненный композитный бондинговый агент и восстановительную пластмассу или композитный цемент.

Внимание: Если Cond Ac Porcelana попадает на кожу или мягкие ткани, прополощите эту область большим количеством воды в течении как минимум 2 минут. Используйте при этом высокоскоростную отсасывающую систему для удаления воды.

Кислотный гель для кондиционирования дентина Cond Ac 37

Для травления дентина.

На сухую поверхность подготовленного дентина нанести необходимое количество геля для травления дентина Cond Ac 37 на 20-30 секунд. Затем гель смыть водой и просушить дентин.

Средство для уменьшения чувствительности дентина Desensibilize

Состав: Вязкая смесь нитрата калия и хлорида стронция для обработки гиперчувствительности зубов.

Показания: Лечение гиперестезии зубов.

Способ применения: Повышенная чувствительность зубов. Просушить обрабатываемый зуб, предварительно изолировав его от попадания слюны. Нанесите из шприца Desensibilize KF 2% и оставьте на 1 минуту. Предложить пациенту прополоскать рот. Всю процедуру повторить два-три раза.
Каждые три месяца повторяйте этот курс лечения.

Средство для уменьшения чувствительности дентина Desensibilize KF

Показания: Профилактика кариеса зубов, лечение гиперестезии зубов.

1. Desensibilize KF 0,2%

Состав: нитрат калия 5%, фторид натрия 0,2%, глицерин, дистиллированная вода, сгуститель

Свойства: Профилактическое действие фтористых соединений на кариес хорошо показано во многих последних научных работах. Фтористый натрий по меньшей мере так же активен, как фтористые соединения тяжелых металлов (например, олова). Desensibilize KF 2%, который вобрал в себя специфические свойства фтористых соединений, действует двойным образом:

1. Его бактериостатическое действие уменьшает флору, покрывающую коронку зуба, пелликулу.

Это действие препарата является особенно важным, когда речь идет о бактериях молочнокислой группы, так как они являясь производителем кислот, представляют особую опасность.

2. Это процесс усиливается вдвойне за счет действия фтора на эмаль, вызывая изменение ее кристаллической структуры и значительно увеличивая ее стойкость к химическому воздействию. Это второе действие одинаково эффективно и при обнажении дентина и цемента.

Способ применения: 1. Профилактика кариеса зубов. Тщательно удалите зубные камни. Изолируйте зубы ватными тампонами. Просушите струей теплого воздуха обрабатываемые поверхности. Нанесите из шприца Desensibilize KF 2%.

В зубные фиссуры Desensibilize KF 2% вводите с помощью зонда.

Закончив процедуру, предложите пациенту тщательно и несколько раз прополоскать рот. Каждые три месяца повторяйте этот курс лечения.

2. Повышенная чувствительность зубов. Просушить обрабатываемый зуб, предварительно изолировав его от попадания слюны. Нанесите из шприца Desensibilize KF 2% и оставьте на 1 минуту. Предложить пациенту прополоскать рот. Всю процедуру повторить два-три раза.

2. Desensibilize KF 2%

Состав: нитрат калия 5%, фторид натрия 2%, глицерин, дистиллированная вода, сгуститель

Свойства: Профилактическое действие фтористых соединений на кариес хорошо показано во многих последних научных работах. Фтористый натрий по меньшей мере так же активен, как фтористые соединения тяжелых металлов (например, олова). Desensibilize KF 2%, который вобрал в себя специфические свойства фтористых соединений, действует двойным образом:

1. Его бактериостатическое действие уменьшает флору, покрывающую коронку зуба, пелликулу.

Это действие препарата является особенно важным, когда речь идет о бактериях

73
молочнокислой группы, так как они являясь производителем кислот, представляют особую опасность.

2. Это процесс усиливается вдвойне за счет действия фтора на эмаль, вызывая изменение ее кристаллической структуры и значительно увеличивая ее стойкость к химическому воздействию. Это второе действие одинаково эффективно и при обнажении дентина и цемента.

Способ применения: 1. Профилактика кариеса зубов. Тщательно удалите зубные камни.

Изолируйте зубы ватными тампонами. Просушите струей теплого воздуха

обрабатываемые поверхности. Нанесите из шприца Desensibilize KF 2%.

В зубные фиссуры Desensibilize KF 2% вводите с помощью зонда.

Закончив процедуру, предложите пациенту тщательно и несколько раз прополоскать рот.

Каждые три месяца повторяйте этот курс лечения.

2. Повышенная чувствительность зубов. Просушить обрабатываемый зуб, предварительно изолировав его от попадания слюны. Нанесите из шприца Desensibilize KF 2% и оставьте на 1 минуту. Предложить пациенту прополоскать рот. Всю процедуру повторить два-три раза.

Гель для изоляции свежих композитных пломб OxiBlock

Водоотталкивающий гель, используемый при пломбировании зубов стеклоиономерами и другими типами постоянных пломбировочных материалов. Гель для изоляции свежих композитных пломб OxiBlock защищает стеклоиономер в процессе его затвердевания от влаги полости рта, снижает краевую проницаемость постоянных пломбировочных материалов, повышает прочность материала пломбы.

Назначение: Обезвоживание поверхности пломбы в процессе связывания пломбировочного материала, лечение гиперстезии зубов.

Способ употребления: Гель наносят тонким равномерным слоем на обрабатываемую поверхность пломбы или эмали зуба из шприца.

