



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Компания «Интермедсервис»»



Голубев В.А.
«25» июня 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Цементы стеклоиономерные Maxxion R

НАЗНАЧЕНИЕ.

Маххiон R применяется:

- как подкладка при пломбировании композитами и амальгамой,
- для цементации коронок;
- для пломбирования молочных зубов;
- для временного пломбирования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.

Маххiон R обладает совместимости с тканями зуба, но при пломбировании глубоких полостей рекомендуется закрывать прокладкой поверхность дентина, находящегося в непосредственной близости к пульпе. Для этого участка дентина рекомендуется использовать прокладку на основе гидроксида кальция.

Перед началом работы заполните капельницу дистиллированной водой, а (флакон с порошком несколько раз встряхните. Порошок дозируется мерной ложкой, заполняя ее вровень с краями, избыток порошка удаляется шпателем. При извлечении мерной ложки с порошком из флакона не следует прикасаться к стенкам флакона. Материал замешивается на специальном блокноте или на стекле при температуре + 23 С.

Время замешивания 1 минута. По консистенции готовая масса должна быть похожа на пасту для пломбирования. Рабочее время материала густой консистенции около 1 минуты 30 секунд. Время отверждения не менее 2 минут.

ВНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА В ПОЛОСТЬ.

Подготовить полость по общепринятой методике. Стенки полости должны быть чистыми и сухими. Внимание! Во время заполнения полости и твердения материал не должен контактировать с водой, слюной или кровью.

Через 4-6 минут после внесения в полость у материала густой консистенции появляется устойчивость к воздействию влаги и кислоты, что дает возможность приступить к проведению работы по технологии пломбирования композитами. Обработку пломбы из Маххiон R можно начинать через 6 минут.

Примечание. Для того, чтобы материал не прилипал к инструменту, припудрите его порошком Маххiон R . По окончании работы все используемые инструменты необходимо немедленно промыть водой или дезинфицирующим составом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Следите, чтобы материал не попадал в глаза, при попадании необходимо немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ.

По окончании работы флакон с порошком необходимо плотно закрыть, беречь от влаги. Попадание влаги ухудшает свойства материала и может привести к его непригодности. Срок годности материала при температуре от +18 до +32 С 2 года.