



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»
Ростиашвили Г.Г.

20 марта 2012г.

Инструкция по применению

Эндодонтические иглы для антисептической обработки корневых каналов зубов «ЭНДОНИДЛ»

и

Эндодонтический шприц для антисептической обработки корневых каналов зубов «ЭНДОШПРИЦ»

Показания и свойства

Применяются в профессиональной стоматологии для орошения корневых каналов зубов антисептическими растворами (гипохлоритом натрия) в процессе подготовки их к пломбированию.

«Эндонидл» представляет собой иглу калибра 27G/30G и длиной 35/38мм. «Эндонидл» имеет тупой срез кончика иглы. Это делает невозможным механическое повреждение апекса. Игла «Эндонидл» выпускается с латеральной, билатеральной перфорацией и без перфорации. Латеральная и билатеральная перфорации делают невозможным заапикальное введение ирригационного раствора и создание чрезмерного давления в периапикальной области, что пагубно может воздействовать на апекс. «Эндонидл» с латеральной перфорацией имеет боковое отверстие шириной 0,15мм на расстоянии 3мм от окончания иглы. «Эндонидл» с билатеральной перфорацией имеет два боковых отверстия, одно напротив другого, шириной 0,15мм на расстоянии 3мм от окончания иглы. Когда кончик иглы находится в суженной части корневого канала, ирригационный раствор, подающийся под давлением, мог бы попасть в периапикальную область, но боковое отверстие дает возможность жидкости выйти в более широкий участок (рис.1, рис.2) корневого канала, тем самым, не создавать чрезмерного давления в периапикальной области. Ирригационный раствор, выходя в более широкие участки канала, направляется в пульповую камеру, производя при этом свое антисептическое воздействие.


Рис.1



Рис.2



Рис.3

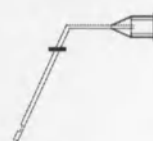

Способ применения эндодонтических игл «Эндонидл»

Вскрыть флакон с гипохлоритом натрия, надеть иглу на шприц и провести аспирацию.

Выпустить из шприца воздух. Слегка согнуть иглу под необходимым углом (рис.3), для того, чтобы введение в корневой канал было более легким. Ввести иглу в канал, не доводя до апекса 2-3мм, учитывая при этом, что вводимый раствор поступает в канал под определенным давлением. Приступить к обработке канала. Обработка не должна быть слишком быстрой, чтобы не создавать избыточного давления и обеспечивать более эффективное действие раствора. Рядом с обрабатываемым зубом следует помещать слюноотсос, который вместе с продуктами распада быстро удалит вытекаемый обратно раствор, сокращая нежелательный контакт гипохлорита со слизистой оболочкой. Для эффективности результатов количество используемой жидкости должно быть значительным для полного выведения из канала всех продуктов распада.

Комплект состоит из 20/100 игл калибра 27G/30G и длиной 35/38мм.

Хранить материал следует в сухом месте при $t^{\circ} +4 +24C^{\circ}$.

Срок годности - 5 лет.

«Эндошприц» представляет собой одноразовый шприц с коннектором луер-лок объемом 3мл, на который надета игла «Эндонидл».

Способ применения эндодонтического шприца «Эндошприц»

Вскрыть флакон с гипохлоритом натрия, вынуть шприц из упаковки и провести аспирацию.

Выпустить из шприца воздух. Слегка согнуть иглу под необходимым углом (рис.3), для того, чтобы введение в корневой канал было более легким. Ввести иглу в канал, не доводя до апекса 2-3мм, учитывая при этом, что вводимый раствор поступает в канал под определенным давлением. Приступить к обработке канала. Обработка не должна быть слишком быстрой, чтобы не создавать избыточного давления и обеспечивать более эффективное действие раствора. Рядом с обрабатываемым зубом следует помещать слюноотсос, который вместе с продуктами распада быстро удалит вытекаемый обратно раствор, сокращая нежелательный контакт гипохлорита со слизистой оболочкой.

Комплект состоит из 10 шприцев луер-лок объемом 3мл с иглами («Эндонидл») калибра 27G/30G и длиной 35/38мм.

Хранить материал следует в сухом месте при $t^{\circ} +4 +24C^{\circ}$.

Срок годности - 5 лет.

Произведено: ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ» г.Москва, ул.Угрешская, д.31

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листа(ов)

Генеральный директор

ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»

Г. Г. Ростиашвили Г.Г. Ростиашвили

