

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор**

**ООО «ДЕНТИС»**



**Новиков С.В.**

**«18» июля 2024 г.**

**Столик медицинский подкатной  
по  
ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ  
32.50.30-005-14967361-2023**

**в вариантах исполнения**

**Руководство по эксплуатации  
ДМ.14967361.РЭ**

**Дата последнего пересмотра: 18.07.2024 г.**

**2024**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                     | <b>6</b>  |
| 1.1 Основные параметры и характеристики                                                 | 6         |
| 1.2 Сведения о материалах и покупных изделиях                                           | 10        |
| 1.3 Комплектность                                                                       | 13        |
| 1.4 Маркировка                                                                          | 13        |
| 1.5. Упаковка                                                                           | 16        |
| <b>2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>                              | <b>18</b> |
| <b>3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ</b>                                                   | <b>19</b> |
| <b>4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>                                                       | <b>20</b> |
| <b>5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                                                       | <b>21</b> |
| <b>6 УТИЛИЗАЦИЯ</b>                                                                     | <b>22</b> |
| <b>7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ</b>                                                          | <b>23</b> |
| <b>8 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,<br/>КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ</b> | <b>24</b> |
| <b>9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ</b>                                                       | <b>27</b> |
| <b>10 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО<br/>ИЗДЕЛИЯ</b>                      | <b>28</b> |
| <b>11 ПРИЛОЖЕНИЕ А</b>                                                                  | <b>29</b> |
| <b>12 ПРИЛОЖЕНИЕ Б</b>                                                                  | <b>30</b> |
| <b>13 ПРИЛОЖЕНИЕ В</b>                                                                  | <b>31</b> |
| <b>14 ПРИЛОЖЕНИЕ Г</b>                                                                  | <b>34</b> |
| <b>15 ПРИЛОЖЕНИЕ Д</b>                                                                  | <b>35</b> |

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, в вариантах исполнения» (далее - столик), предназначенное для размещения лекарственных препаратов, медицинских инструментов, медицинского оборудования, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

**Назначение столика:** Столик предназначен для размещения и перемещения лекарственных средств, расходных материалов, медицинских инструментов, медицинского оборудования, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения.

**Область применения:** Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (помещение для ректороманоскопии (колоноскопии), процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии, перевязочный кабинет, малая операционная и операционной).

Столик предназначен для использования медицинским персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

**Показания к применению столика:**

Размещение и перемещение лекарственных средств, расходных материалов, медицинских инструментов, медицинского оборудования, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения.

**Противопоказания к применению столика:** отсутствуют.

**Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением столика по назначению:** Не выявлены.

Столик выпускается в ряде конструктивных вариантов, моделей СМП-В1ПЗ, СМП-В2П1, СМП-В3П1, СМП-ПЗ, СМП-В4П1, СМП-В4П1Л1, СМП-П4, СМП-В5П1, в зависимости от варианта исполнения и используемых материалов, и представляют собой жесткую конструкцию с ящиками выдвижными и/или с полками и/или с лотком выдвижным:

СМП-В1ПЗ – представляет собой цельносварной каркас, выполненный из листовой стали 08пс, окрашенного порошковой краской. Верхняя полка выполнена из листовой стали 08пс, по контуру имеются бортики-ограничители. Под верхней полкой располагается один выдвижной ящик с фасадом, выполненный из листовой стали 08пс. Окраска ящика выполнена порошковой краской. Ящик установлен на шариковых

направляющих из оцинкованной стали. Под ящиком располагаются две полки из листовой стали 08пс. Каждая полка по контуру имеет бортики-ограничители. Количество колес - 4 шт.;

СМП-В2П1 – представляет собой цельносварной каркас, выполненный из листовой стали 08пс, окрашенного порошковой краской. Верхняя полка выполнена из листовой стали 08пс, по контуру имеются бортики-ограничители. Под верхней полкой располагаются 2 выдвижных ящика. Каждый ящик и фасады к ним выполнены из листовой стали 08пс. Окраска ящика выполнена порошковой краской. Каждый ящик установлен на шариковых направляющих из оцинкованной стали. Слева и справа находятся ручки для передвижения. Количество колес - 4 шт.;

СМП-В3П1 – представляет собой цельносварной каркас, выполненный из листовой стали 08пс, окрашенного порошковой краской. Верхняя полка выполнена из листовой стали 08пс, по контуру имеются бортики-ограничители. Под верхней полкой располагаются 3 выдвижных ящика. Каждый ящик и фасады к ним выполнены из листовой стали 08пс. Окраска ящика выполнена порошковой краской. Каждый ящик установлен на шариковых направляющих из оцинкованной стали. Слева и справа находятся ручки для передвижения. Количество колес - 4 шт.;

СМП-П3 – представляет собой цельносварной каркас, выполненный из листовой стали 08пс, окрашенного порошковой краской. Каждая из 3-х полок выполнена из листовой стали 08пс, каждая полка имеет по контуру бортики-ограничители. Количество колес - 4 шт.;

СМП-В4П1 – представляет собой цельносварной каркас, выполненный из листовой стали 08пс, окрашенного порошковой краской. Верхняя полка из листовой стали 08пс, по контуру имеются бортики-ограничители. Под верхней полкой располагаются 4 выдвижных ящика. Каждый ящик и фасады выполнены из листовой стали 08пс. Окраска ящика выполнена порошковой краской. Каждый ящик установлен на шариковых направляющих из оцинкованной стали. Слева и справа находятся ручки для передвижения. Количество колес - 4 шт.;

СМП-В4П1Л1 – представляет собой цельносварной каркас, выполненный из листовой стали 08пс, окрашенного порошковой краской. Верхняя полка из листовой стали 08пс, по контуру имеются бортики-ограничители. Под верхней полкой располагаются 4 выдвижных ящика. Каждый ящик и фасады выполнены из листовой стали 08пс. Окраска ящика выполнена порошковой краской. Каждый ящик установлен на шариковых направляющих из оцинкованной стали. Сбоку справа имеется выдвижной лоток,

выполненный из листовой стали 08пс. Слева и справа находятся ручки для передвижения. Количество колес - 4 шт.;

СМП-П4 – представляет собой цельносварной каркас, выполненный из листовой стали 08пс, окрашенного порошковой краской. Каждая из 4-х полок выполнена из листовой стали 08пс. Каждая полка по контуру имеет бортики-ограничители. Количество колес - 4 шт.;

СМП-В5П1 – представляет собой цельносварной каркас, выполненный из листовой стали 08пс, окрашенного порошковой краской. Верхняя полка выполнена из листовой стали 08пс, по контуру имеются бортики-ограничители. Под верхней полкой располагаются 5 выдвижных ящиков. Каждый ящик и фасады выполнены из листовой стали 08пс. Окраска ящика выполнена порошковой краской. Каждый ящик установлен на шариковых направляющих из оцинкованной стали. Слева и справа находятся ручки для передвижения. Количество колес - 4 шт.

Столик является неинвазивным медицинским изделием и не контактирует с телом человека.

Перечень документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Для записи обозначения столика при заказе и/или в документации указывают название изделия, артикул, сформированный согласно приложению Б.

Материалы, используемые при изготовлении столика, приведены в Приложении В.

Внешний вид и список вариантов исполнения столика приведен в Приложении Г.

Пример записи обозначения столика при заказе и/или в документации: «Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023», вариант исполнения СМП-В5П1».

## 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 1.1 Основные параметры и характеристики

#### 1.1.1 Внешний вид столика приведен в Приложении Г.

Каркас столика представляет собой цельнометаллическую неразборную конструкцию, окрашенную порошковой краской.

1.1.2 Габаритные размеры, количество полок, ящиков выдвижных, лотков выдвижных в зависимости от варианта исполнения столика приведены в Таблице 1. Масса моделей столика в сборе приведены в таблице 2.

Таблица 1

| Модель      | Габаритные размеры, мм $\pm 10$ мм            | Полка, Габаритный размер, мм $\pm 5$ мм                                                          | Ящик выдвижной, внутренние размеры, мм $\pm 1$ мм                          |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. СМП-В1ПЗ | Ширина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота – 876 | Верхняя:<br>Ширина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота бортика – 15<br>Высота бортика по фасаду – 8 | Ширина – 411<br>Глубина – 405<br>Высота – 41<br>По панели - 70             |
|             |                                               | Средняя:<br>Ширина – 500<br>Глубина – 360                                                        |                                                                            |
|             |                                               | Нижняя:<br>Ширина – 500<br>Глубина – 435                                                         |                                                                            |
| 2. СМП-В2П1 | Ширина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота – 800 | Ширина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота бортика – 15<br>Высота бортика по фасаду – 8             | Верхний:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 41<br>По панели - 53 |
|             |                                               |                                                                                                  | Нижний:<br>Глубина – 387<br>Ширина – 412<br>Высота – 96<br>По панели – 125 |
| 3. СМП-В3П1 | Длина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота - 800  | Длина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота бортика – 15<br>Высота бортика по фасаду - 8              | Верхний:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96                   |

| Модель        | Габаритные размеры, мм $\pm 10$ мм            | Полка, Габаритный размер, мм $\pm 5$ мм                                              | Ящик выдвижной, внутренние размеры, мм $\pm 1$ мм                               |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                               |                                                                                      | По панели - 108                                                                 |
|               |                                               |                                                                                      | Средний:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96<br>По панели - 108     |
|               |                                               |                                                                                      | Нижний:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 108<br>По панели - 180     |
| 4. СМП-ПЗ     | Ширина – 400<br>Глубина – 460<br>Высота -930  | Верхняя:<br>Ширина – 400<br>Глубина – 300                                            |                                                                                 |
|               |                                               | Средняя:<br>Ширина – 400<br>Глубина – 300                                            |                                                                                 |
|               |                                               | Нижняя:<br>Ширина – 400<br>Глубина – 300                                             |                                                                                 |
| 5. СМП-В4П1   | Ширина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота - 800 | Ширина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота бортика – 15<br>Высота бортика по фасаду - 8 | 1-й, верхний:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 41<br>По панели - 53 |
|               |                                               |                                                                                      | 2-й:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96<br>По панели - 108         |
|               |                                               |                                                                                      | 3-й:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96<br>По панели - 108         |
|               |                                               |                                                                                      | 4-й, нижний:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота - 96<br>По панели – 125 |
| 6. СМП-В4П1Л1 | Ширина – 510<br>Глубина – 525                 | Ширина – 510<br>Глубина – 525                                                        | 1-й, верхний:<br>Ширина – 412                                                   |

| Модель      | Габаритные размеры, мм $\pm 10$ мм             | Полка,<br>Габаритный размер, мм $\pm 5$ мм                                                                                                                                          | Ящик выдвижной,<br>внутренние размеры,<br>мм $\pm 1$ мм                         |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             | Высота - 800                                   | Высота бортика – 15<br>Высота бортика по фасаду - 8                                                                                                                                 | Глубина – 387<br>Высота – 41<br>По панели - 53                                  |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                     | 2-й:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96<br>По панели – 108         |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                     | 3-й:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96<br>По панели – 108         |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                     | 4-й, нижний:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота - 96<br>По панели – 125 |
|             |                                                | Лоток выдвижной:<br>Ширина – 400<br>Ширина – 365<br>Высота - 22                                                                                                                     |                                                                                 |
| 7. СМП-П4   | Ширина – 600<br>Глубина – 600<br>Высота - 1030 | 1-я, верхняя:<br>Ширина - 600<br>Глубина – 280<br><br>2-я:<br>Ширина - 600<br>Глубина – 318<br><br>3-я:<br>Ширина 600<br>Глубина – 390<br><br>4-я:<br>Ширина - 600<br>Глубина – 440 | -                                                                               |
| 8. СМП-В5П1 | Ширина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота -800   | Ширина – 510<br>Глубина – 525<br>Высота бортика – 15<br>Высота бортика по фасаду                                                                                                    | 1-й, верхний:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 41                   |

| Модель | Габаритные размеры, мм $\pm 10$ мм | Полка, Габаритный размер, мм $\pm 5$ мм | Ящик выдвижной, внутренние размеры, мм $\pm 1$ мм                               |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                    | - 8                                     | По панели – 53                                                                  |
|        |                                    |                                         | 2-й,<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96<br>По панели – 53          |
|        |                                    |                                         | 3-й,<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96<br>По панели – 53          |
|        |                                    |                                         | 4-й:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96<br>По панели – 108         |
|        |                                    |                                         | 5-й, нижний:<br>Ширина – 412<br>Глубина – 387<br>Высота – 96<br>По панели – 125 |

Таблица 2

| Модель        | Масса, кг $\pm 10\%$ |
|---------------|----------------------|
| 1. СМП-В1П3   | 21,35                |
| 2. СМП-В2П1   | 32,5                 |
| 3. СМП-В3П1   | 41,15                |
| 4. СМП-П3     | 10,45                |
| 5. СМП-В4П1   | 43,65                |
| 6. СМП-В4П1Л1 | 47,3                 |
| 7. СМП-П4     | 16,5                 |
| 8. СМП-В5П1   | 45,6                 |

1.1.3 Полки и дно ящиков должны выдерживать двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

-на полку верхнюю ( $20 \pm 1$ ) кг;

-на полку ( $15 \pm 1$ ) кг;

-на дно ящика ( $5 \pm 1$ ) кг.

1.1.4 Ящики должны иметь устройство для предотвращения выпадения их из корпуса столика.

1.1.5 Ящик выдвижной должен иметь свободный ход без заеданий и перекосов. Усилие выдвижения ящика без нагрузки должно быть ( $4 \pm 2$ ) Н.

1.1.6 Максимальное допустимое усилие для выдвижения каждого ящика при равномерном распределении нагрузки массой ( $5 \pm 0,5$ ) кг на дно ящика – ( $6 \pm 1$ ) Н без фиксации, ( $15 \pm 1$ ) Н с фиксацией.

1.1.7 Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой ( $50 \pm 2$ ) Н ( $5 \pm 0,2$  кг), при этом колеса столика должны быть сориентированы в направлении движения.

1.1.8 Столик при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 50444 для исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

1.1.9 Столик должна быть устойчива к климатическим воздействиям при транспортировании по ГОСТ 15150 для условий хранения 5; при хранении - по ГОСТ 15150 для условий хранения 2.

1.1.10 Столик при эксплуатации должна быть устойчива к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

1.1.11 Столик по устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании должна соответствовать ГОСТ Р 50444 группа 3.

1.1.12 Наружные поверхности столика должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644-96.

1.1.13 Срок службы столика составляет 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления.

## **Тормозами оборудованы две колесные опоры из четырех.**

### **1.2 Сведения о материалах и покупных изделиях**

1.2.1 Материалы для изготовления столика должны соответствовать указанным в таблице 3. Сырье и материалы должны иметь сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Таблица 3

| №№ | Деталь | Наименование материала                         | Обозначение стандарта                              | Производитель/Поставщик                           |
|----|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Каркас | Лист стальной холоднокатаный, марка стали 08пс | ГОСТ 1050-2013;<br>ГОСТ 16523-97;<br>ГОСТ 19904-90 | ООО «ММК»<br>номер Сертификата качества 115-30517 |
| 2  | Полка  | Лист стальной холоднокатаный,                  | ГОСТ 1050-2013;<br>ГОСТ 16523-97;                  | ООО «ММК»<br>номер                                |

|    |                                             |                                                                               |                                                    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             | марка стали 08пс                                                              | ГОСТ 19904-90                                      | Сертификата<br>качества 115-<br>30517                                                                   |
| 3  | Лоток                                       | Лист стальной<br>холоднокатаный,<br>марка стали 08пс                          | ГОСТ 1050-2013;<br>ГОСТ 16523-97;<br>ГОСТ 19904-90 | ООО «ММК»<br>номер<br>Сертификата<br>качества 115-<br>30517                                             |
| 4  | Краска порош-<br>ковая                      | MICROPUL                                                                      | РОСС<br>RU.32001.04ИБФ1.ОСП18                      | MICROPUL<br>BOYA KIYIA<br>SAM.VE<br>TIC.LTD.STI<br>Сертификат<br>соответствия<br>РОСС<br>TR.HX37.H05769 |
| 5  | Ручка скоба S-<br>2242                      | Материал ЦАМ                                                                  |                                                    | KERRON<br>ОТКАЗНОЕ<br>ПИСЬМО                                                                            |
| 6  | Винт М4х20                                  | Без покрытия<br>оцинкованные из<br>коррозионно- и<br>кислотостойких<br>сталей | ГОСТ 53603-2020                                    | HAINING<br>HISENER<br>TRADE CO<br>РОСС<br>RU.32001.04ИБФ1                                               |
| 7  | Направляющие<br>Boyard DB 350<br>L400       | Сталь оцинко-<br>ванная                                                       | КОД ТН 8302 42 000 0                               | Boyard<br>ОТКАЗНОЕ<br>ПИСЬМО                                                                            |
| 8  | Заклепки вы-<br>тяжные 4,0х06<br>Ц          | Без покрытия<br>оцинкованные из<br>коррозионно- и<br>кислотостойких<br>сталей | ГОСТ 53603-2020                                    | HAINING<br>HISENER<br>TRADE CO<br>РОСС<br>RU.32001.04ИБФ1                                               |
| 9  | Винт М5                                     | Без покрытия<br>оцинкованные из<br>коррозионно- и<br>кислотостойких<br>сталей | ГОСТ 53603-2020                                    | HAINING<br>HISENER<br>TRADE CO<br>РОСС<br>RU.32001.04ИБФ1                                               |
| 10 | Втулка резьбо-<br>вая М8                    | Без покрытия<br>оцинкованные из<br>коррозионно- и<br>кислотостойких<br>сталей | ГОСТ 53603-2020                                    | HAINING<br>HISENER<br>TRADE CO<br>РОСС<br>RU.32001.04ИБФ1                                               |
| 11 | Опора колес-<br>ная, резьба М8<br>диам.50мм | Резина                                                                        |                                                    | ООО «ВДМ»<br>ОТКАЗНОЕ<br>ПИСЬМО                                                                         |

|    |                           |                                                      |                                                    |                                                             |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12 | Ящик вы-<br>движной       | Лист стальной<br>холоднокатаный,<br>марка стали 08пс | ГОСТ 1050-2013;<br>ГОСТ 16523-97;<br>ГОСТ 19904-90 | ООО «ММК»<br>номер<br>Сертификата<br>качества 115-<br>30517 |
| 13 | Фасад ящика<br>выдвижного | Лист стальной<br>холоднокатаный,<br>марка стали 08пс | ГОСТ 1050-2013;<br>ГОСТ 16523-97;<br>ГОСТ 19904-90 | ООО «ММК»<br>номер<br>Сертификата<br>качества 115-<br>30517 |

### 1.3 Комплектность

1.3.1 Столик поставляется в собранном виде.

1.3.2 Состав поставки должен соответствовать таблице 4.

Таблица 4

| Наименование                                                                                   | Обозначение документа | Количество шт. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>1. Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023 в вариантах исполнения</b> | -                     | 1              |
| <b>2. Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации)</b>                          | -                     | 1              |

### 1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка столика должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371 и настоящих ТУ. Каждое изделие должно иметь маркировку на русском языке.

1.4.2 Маркировка должна быть выполнена типографским, или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к столику. Маркировка должна наноситься:

- на верхний левый угол задней стенки столика.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, полок и т.п. деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

1.4.3 Маркировка каждого изделия должна быть четкой и содержать:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование варианта исполнения столика;
- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);
- серийный номер;
- код партии;
- вес брутто;
- цвет фасада ящика выдвижного (при наличии ящика выдвижного)
- назначение;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- дату изготовления;
- условия хранения;
- гарантийный срок эксплуатации;
- гарантийный срок хранения;
- срок службы, установленный изготовителем.

Макет маркировки изделия на примере «Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, в вариантах исполнения, Вариант исполнения СМП-В5П1»:

**Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023,**

**в вариантах исполнения**

**Вариант исполнения СМП-В5П1**

**Изготовитель: ООО «ДЕНТИС»**

**Страна-изготовитель: РФ**

**Тел.: +7 (473) 260-44-47, 260-44-48, 260-44-49, [www.dentis.ru](http://www.dentis.ru)**

**Юридический адрес: 394026, Россия, г. Воронеж, Краснодонская ул., д. 16е, помещение 5**

**Почтовый адрес: 394026, Россия, г. Воронеж, Краснодонская ул., д. 16е, помещение 5**

**наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица - отсутствуют**

**Серийный номер: 101 - 1123**

**Код партии: В5П1 - 98**

**Дата выпуска: НОЯБРЬ 2023**

**Масса брутто: 45,6 кг.**

**Цвет фасада: RAL 9016 (Транспортный белый)**

**Регистрационное удостоверение: \_\_\_\_\_**

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

**Для размещения и перемещения лекарственных средств, расходных материалов, медицинских инструментов, медицинского оборудования, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения**

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

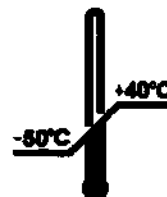
**Условия хранения должны соответствовать 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98% при плюс 25 °С**

### **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

**Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев с момента приобретения при соблюдении всех положений и ограничений эксплуатационной документации.**

**Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев.**

**Срок годности изделий 5 лет.**



1.4.4 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям разделов 4,5 ГОСТ 14192. На транспортной таре должны быть указаны:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя,
- количество изделий в транспортной таре;
- дата упаковывания (месяц, год);
- масса брутто, кг.

Эскиз транспортной маркировки на примере «Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, в вариантах исполнения, Вариант исполнения СМП-В5П1»:

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023,</b>                                   |  |
| <b>в вариантах исполнения</b>                                                                           |  |
| <b><u>Вариант исполнения СМП-В5П1</u></b>                                                               |  |
| <b>Изготовитель: ООО «ДЕНТИС»</b>                                                                       |  |
| <b>Страна-изготовитель: РФ</b>                                                                          |  |
| <b>Тел.: +7 (473) 260-44-47, 260-44-48, 260-44-49, <a href="http://www.dentis.ru">www.dentis.ru</a></b> |  |
| <b>Юридический адрес: 394026, Россия, г. Воронеж, Краснодонская ул., д. 16е, по-<br/>мещение 5</b>      |  |
| <b>Почтовый адрес: 394026, Россия, г. Воронеж, Краснодонская ул., д. 16е,<br/>помещение 5</b>           |  |
| <b>Серийный номер: <u>101 - 1123</u></b>                                                                |  |
| <b>Код партии: <u>В5П1 - 98</u></b>                                                                     |  |
| <b>Дата выпуска: <u>НОЯБРЬ 2023</u></b>                                                                 |  |
| <b>Регистрационное удостоверение: _____</b>                                                             |  |
| <b>Количество изделий: <u>1 (ОДНО)</u></b>                                                              |  |
| <b>Дата упаковывания: « _____ » <u>2023</u></b>                                                         |  |
| <b>Масса брутто: _____ , кг.</b>                                                                        |  |

В каждый ящик транспортной тары должен быть вложен упаковочный лист с указанием предприятия-изготовителя, количества и наименования упакованных изделий, условного номера контролера и упаковщика, даты упаковки.

Макет листа упаковочного на примере «Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, в вариантах исполнения, Вариант исполнения СМП-В5П1»:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023,</b></p> <p style="text-align: center;"><b>в вариантах исполнения</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Вариант исполнения СМП-В5П1</u></b></p> <p>Изготовитель: ООО «ДЕНТИС»</p> <p>Количество изделий: <b>10 (ДЕСЯТЬ)</b></p> <p>Упаковал: Упаковщик _____</p> <p>Проверил: Контролер № _____</p> <p>Дата упаковывания: НОЯБРЬ 2023</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Маркировку наносят на бумажный ярлык. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое», «Обращаться с осторожностью», «Верх», «Беречь от влаги».

Манипуляционные знаки должны наноситься по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской. Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.

Эскиз манипуляционных знаков на транспортной упаковке:



### 1.5. Упаковка

1.5.1 Упаковка столика должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444, по ГОСТ 16371.

1.5.2 Столик поставляется в упакованном виде с необходимой фурнитурой в коробке из картона по ГОСТ 16371. Упаковка обеспечивает сохранность столика от повреждений и загрязнений при транспортировке.

**1.5.3** Перед упаковкой все подвижные элементы столика должны быть закреплены способами и средствами, исключающими повреждение столика.

**1.5.4** Ящики столика для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть закреплены средствами, исключающими повреждение столика.

**1.5.5** Упаковывание, транспортирование и хранение столика должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799 и ГОСТ 17716.

**1.5.6** На упаковку столика должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение: «Хрупкое», «Обращаться с осторожностью», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

Допускается не наносить манипуляционный знак: «Верх» на упаковку столика, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их в любом положении, в том числе попарно.

**1.5.7** Эксплуатационная и товаросопроводительная документация должны быть помещены в полиэтиленовый пакет из пленки ГОСТ 10354, герметично заварены и уложены в один из ящиков или прикреплены к одной из деталей столика.

## **2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

2.1 Столик должен быть безопасной для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного к эксплуатации, а также для окружающих предметов.

2.2 Столик должен быть изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, он обеспечивала:

- механическую безопасность;
- химическую и санитарно-гигиеническую безопасность;
- пожарную безопасность.

2.3 Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение почв и вод населенных мест. Загрязнение может произойти из-за неорганизованной произвольной свалки изделий и отходов от их производства в не предназначенных для этой цели местах.

2.4 Отходы производства, образующиеся при изготовлении изделий, могут быть пригодны для повторной переработки; в противном случае должно быть организовано обезвреживание отходов в специальных, отведенных для этой цели местах, в соответствии с правилами и нормами по обезвреживанию промышленных отходов.

2.5 Охрана окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.01.

2.6 Выбросы вредных веществ в атмосферу по ГОСТ 17.2.3.01.

### **3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**3.1** Транспортирование и хранение изделий должно соответствовать ГОСТ Р 50444, ГОСТ 15150.

Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

В пределах одного населенного пункта столик допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировке и складировании столика необходимо обеспечить защиту от механических повреждений.

**3.2** При транспортировке тара изделия должна быть закреплена способами, исключающими перемещения и соударения, а также предохранять от прямого попадания атмосферных осадков.

**3.3** Условия транспортирования изделий крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

**3.4** Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

#### **4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**4.1 Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции по применению, устанавливающей правила и условия безопасной эксплуатации.**

**4.2 Использование столика должно осуществляться по назначению изделия, указанному в настоящем руководстве по эксплуатации;**

**4.3 Столик поставляется в собранном виде;**

**4.4 При установке столика в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов его поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°C.**

**4.5. При обращении со столом необходимо пользоваться защитными медицинскими перчатками.**

**4.6. Установка столика по месту эксплуатации должен осуществляться строго в соответствии с указаниями в эксплуатационной документации.**

## **5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **5.1 Очистка столика**

Перед применением столика его поверхности должны быть подвергнуты предварительной дезинфекции и высушены.

Уход за столиком заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5 % раствор моющего средства по ГОСТ 25644.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки столик следует насухо протереть.

### **5.2 Дезинфекция столика**

Дезинфекцию наружных поверхностей столика проводят путем однократного протирания поверхностей 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Дезинфекцию столика следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей столика биологическими жидкостями и потенциально загрязненными веществами.

Столик является нестерильным изделием и не предназначен для стерилизации.

## **6 УТИЛИЗАЦИЯ**

### **6.1 Требования по утилизации**

Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А. Упаковка нового изделия утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Стол подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

## **7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

**7.1** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

**7.2** Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев с момента приобретения при соблюдении всех положений и ограничений эксплуатационной документации.

Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев.

**7.4** Срок годности столика - 5 лет.

## 8 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ

- |                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   ГОСТ 15150-69           | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
| 2.   ГОСТ 31508-2012         | Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.                                                                                                                |
| 3.   Приказ Минздрава России | Об утверждении номенклатурной классификации МИ от 06.06.2012г. №4н                                                                                                                                                    |
| 4.   ГОСТ 50444-2020         | Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия.                                                                                                                                              |
| 5.   ГОСТ 2.114 -95          | Единая система конструкторской документации. Технические условия.                                                                                                                                                     |
| 6.   ГОСТ 16371-2014         | Мебель. Общие технические условия                                                                                                                                                                                     |
| 7.   ГОСТ 9.301-86           | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.                                                                                              |
| 8.   ГОСТ 9.410-88           | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы.                                                                                                       |
| 9.   ГОСТ 9.032-74           | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения                                                                                                    |
| 10.  МУ 287-113              | Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения                                                                                                     |
| 11.  ГОСТ 24297-2013         | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля                                                                                                                                           |
| 12.  Р 50.1.043-2003         | Общие требования к информации изготовителя, сопровождающей медицинские изделия                                                                                                                                        |
| 13.  ГОСТ 14192-96           | Маркировка грузов                                                                                                                                                                                                     |
| 14.  ТР ТС 005/2011          | Технический регламент «О безопасности упаковки»                                                                                                                                                                       |
| 15.  ГОСТ Р 27.003-2011      | Надежность в технике. Управление надежностью. Руководство по заданию технических требований к надежности.                                                                                                             |
| 16.  ГОСТ 7502-98            | Рулетки измерительные металлические. Технические условия                                                                                                                                                              |
| 17.  ГОСТ 53228-2008         | Весы неавтоматического действия                                                                                                                                                                                       |
| 18.  ГОСТ 13837-79           | Динамометры общего назначения. Технические условия                                                                                                                                                                    |

- |                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. ГОСТ 9.302-88      | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля         |
| 20. ГОСТ 9.104-2018    | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации.                     |
| 21. ГОСТ 12.1.004-2015 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования                                                 |
| 22. ГОСТ 12.1.005-88   | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны                         |
| 23. ГОСТ 12.3.002-2014 | Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности                                |
| 24. ГОСТ 12.4.028-76   | Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия                                        |
| 25. ГОСТ 12.4.253-2013 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования                       |
| 26. ГОСТ 17.1.3.13-86  | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения                                         |
| 27. ГОСТ 17.1.5.02-80  | Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов                                         |
| 28. ГОСТ 17.2.3.01-86  | Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых пунктов                                                |
| 29. ГОСТ 166-89        | Штангенциркули. Технические условия                                                                                            |
| 30. ГОСТ 427-75        | Линейки измерительные металлические. Технические требования                                                                    |
| 31. ГОСТ 14771-76      | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры                           |
| 32. ГОСТ 14776-79      | Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры                                  |
| 33. ГОСТ 15878-79      | Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры                                                       |
| 34. ГОСТ 20400-2013    | Продукция мебельного производства. Термины и определения                                                                       |
| 35. ГОСТ 28105-89      | Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвижных ящиков и полуящиков                                                       |
| 36. ГОСТ 28793-90      | Мебель. Столы. Определение устойчивости                                                                                        |
| 37. ГОСТ Р ИСО 15223-1 | Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования |

- |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. ГОСТ 30212-94      | Столы журнальные и письменные. Методы испытаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39. ГОСТ 30255-2014    | Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах                                                                                                                                                                                                   |
| 40. ГОСТ Р 58577-2019  | Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов                                                                                                                                                                                     |
| 41. ГОСТ 59123-2020    | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42. СанПиН 2.1.3684-21 | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| 43. СанПин 1.2.3685-21 | Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44. СП 1.1.1058-01     | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий                                                                                                                                                                                          |
| 45. СП 2.2.3670-20     | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## **9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

**Изготовитель: ООО «ДЕНТИС»**

**Юридический / почтовый адрес: 394026, Россия, г. Воронеж, Краснодонская ул., д. 16е, помещение 5**

### **Контактные данные:**

**Телефоны:**

**+7 (473) 260-44-47, 260-44-48, 260-44-49**

**Сайт:**

**[www.dentis.ru](http://www.dentis.ru)**

**Электронная почта:**

**[info@dentis.ru](mailto:info@dentis.ru)**

**Адрес производства:**

**394026, Россия, г. Воронеж, Краснодонская ул., д. 16е, помещение 5**

**Рекламации, касающиеся качества столика, отправлять по адресу: [info@dentis.ru](mailto:info@dentis.ru)**

## **10 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Сервисное обслуживание и ремонт стола осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТИС»  
(ООО «ДЕНТИС»)

**Изготовитель: ООО «ДЕНТИС»**

**Юридический / почтовый адрес:** 394026, Россия, г. Воронеж, Краснодонская ул., д. 16е, помещение 5

### **Контактные данные:**

**Телефоны:**

+7 (473) 260-44-47, 260-44-48, 260-44-49

**Сайт:**

[www.dentis.ru](http://www.dentis.ru)

**Электронная почта:**

[info@dentis.ru](mailto:info@dentis.ru)

## 11 ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки данным  
руководстве по эксплуатации

| Обозначение                                | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 9.014-78                              | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования                                                                                                                                                                                                                                              |
| ГОСТ 177-88                                | Водорода перекись. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 15150-69                              | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды                                                                                                                                      |
| ГОСТ 16371-2014                            | Мебель. Общие технические условия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ГОСТ 25644-96                              | Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ 31508-2012                            | Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ГОСТ Р 50444-2020                          | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года         | Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения                                                                                                                                                                                                                                         |
| СанПиН 2.1.3684-21                         | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| СП 2.1.3678-20                             | Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг                                                                                                               |
| Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н | Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 12 ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Правило формирования артикула изделий

СМП

-

ВХХ

ПХХ

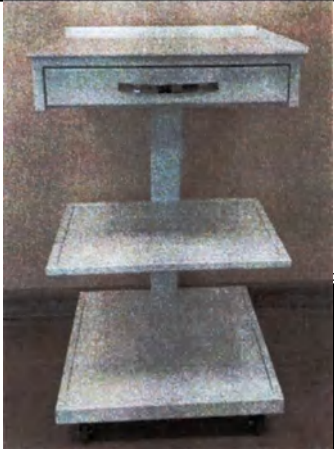
ЛХХ

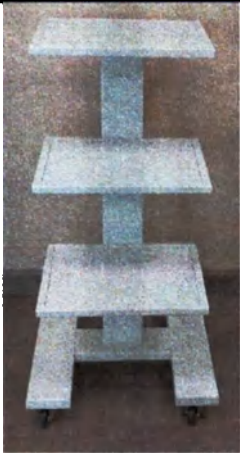
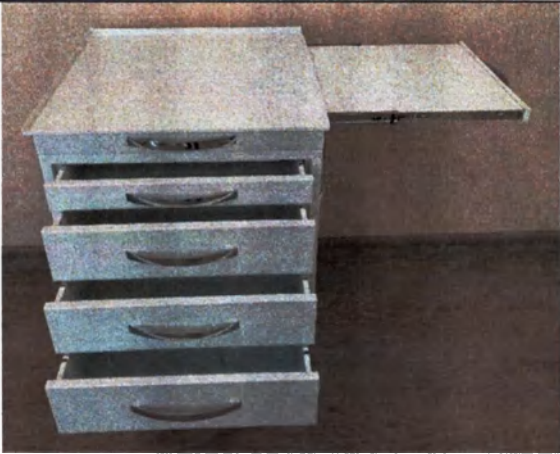
|                                    |                                                             |                                                |                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| СМП – Столик медицинский подкатной | В – наличие ящика выдвижного<br><br>ХХ – Количество ящичков | П – наличие полок<br><br>ХХ – Количество полок | Л – наличие лотка выдвижного<br><br>ХХ – Количество лотков |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

### 13 ПРИЛОЖЕНИЕ В

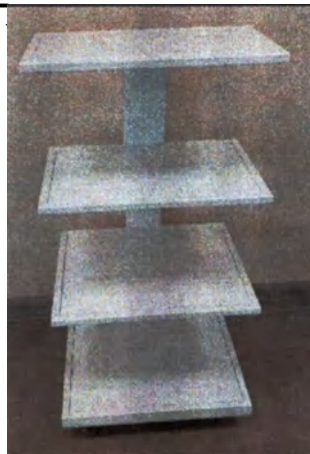
(обязательное)

Внешний вид вариантов исполнения медицинского изделия  
«Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, в  
вариантах исполнения»

| Вариант исполнения | Внешний вид                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| СМП-В1ПЗ           |    |
| СМП-В2П1           |  |
| СМП-В3П1           |  |

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>СМП-ПЗ</b></p>     |    |
| <p><b>СМП-В4П1</b></p>   |   |
| <p><b>СМП-В4П1Л1</b></p> |  |

**СМП-П4**



**СМП-В5П1**



## 14 ПРИЛОЖЕНИЕ Г

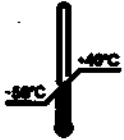
(обязательное)

Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023 в вариантах исполнения:

| №<br>п.п. | Вариант исполнения                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, вариант исполнения СМП-В1ПЗ   |
| 2.        | Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, вариант исполнения СМП-В2П1   |
| 3.        | Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, вариант исполнения СМП-В3П1   |
| 4.        | Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, вариант исполнения СМП-ПЗ     |
| 5.        | Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, вариант исполнения СМП-В4П1   |
| 6.        | Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, вариант исполнения СМП-В4П1Л1 |
| 7.        | Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, вариант исполнения СМП-П4     |
| 8.        | Столик медицинский подкатной по ТУ 32.50.30-005-14967361-2023, вариант исполнения СМП-В5П1   |

## 15 ПРИЛОЖЕНИЕ Д

### Символы, применяемые в маркировке

| Символ                                                                             | Обозначение                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | Хрупкое. Осторожно         |
|   | Обращаться с осторожностью |
|   | Верх                       |
|   | Беречь от влаги            |
|  | Температурный диапазон     |

## 16 ПРИЛОЖЕНИЕ Е

### Цвета фасадов ящиков выдвижных

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
|      | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1027 | 1028 | 1032 |
| 1033 | 1034 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2008 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 |
| 3004 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 |
| 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3020 | 3022 | 3027 | 3031 |
| 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
| 4009 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5007 |
| 5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 |
| 5017 | 5018 | 5019 | 5020 | 5021 | 5022 | 5023 | 5024 |
| 6000 | 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 |
| 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 |
| 6016 | 6017 | 6018 | 6019 | 6020 | 6021 | 6022 | 6024 |
| 6025 | 6026 | 6027 | 6028 | 6029 | 6032 | 6033 | 6034 |
| 7000 | 7001 | 7002 | 7003 |      |      | 7005 | 7006 |
| 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 |
| 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7026 |      | 7031 | 7032 |
| 7030 | 7034 | 7035 |      | 7037 | 7038 | 7039 |      |
|      | 7043 | 7044 | 8000 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 |
| 8007 | 8008 | 8011 | 8012 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 |
| 8019 | 8022 | 8023 | 8024 | 8025 | 8028 | 9001 | 9002 |
| 9003 | 9004 | 9005 | 9010 | 9011 | 9016 | 9017 | 9018 |

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью  
36 (тридцать шесть) листа(ов)  
Генеральный директор  
ООО «ДЕНТИС»  
Новиков С.В.

