

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
НПАО «АМИКО»

Н.Н.Блинов

«07» июля 2023 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система моечная медицинская «АМИКО»
по ТУ 32.50.30-036-34597883-2020 в вариантах исполнения

КЛУЖ 9402.012.000.00.00 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией и изучения правил эксплуатации на Система моечная медицинская «АМИКО» по ТУ 32.50.30-036-34597883-2020 в вариантах исполнения (далее – система моечная, изделия).

1. Назначение изделия:

Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами.

2. Область применения:

Система моечная используется для оснащения лабораторий, врачебных и смотровых кабинетов, больничных палат клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

3. Противопоказания:

При использовании в соответствии с инструкцией по применению противопоказания отсутствуют. Запрещено использовать не по назначению.

Показания:

Показания к применению медицинского изделия - согласно Приложению 1.

4 Меры предосторожности при применении изделия.

4.1 Петли на дверях и направляющие на ящиках оснащены автоматическими доводчиками дверей, во избежание защемления пальцев рук рекомендуется дать двери и ящику закрыться без применения механической силы до конца.

4.2 При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы. Убедитесь, что фасад из стекла не имеет повреждений.

4.3 Во избежание падения дверей: а) не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. б) Необходимо периодически (примерно 1 раз в год) подтягивать узлы резьбовых и эксцентриковых соединений.

4.4 Изделия не предназначены для выдерживания массы тела человека. Вставать ногами или садиться на изделия и их части (столешницы, полки, стенки и т.д.), нагружать их больше чем рассчитывалось при проектировании, запрещается.

4.5 Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками. Во избежание травмы со сломанными элементами изделия необходимо обращаться крайне осторожно.

4.6 При перемещении изделия следует освободить его от всего содержимого, держаться следует только за нижнюю несущую часть изделия. В противном случае есть риск отрыва столешницы от корпуса, что может привести к травме нижних конечностей пользователя.

4.7 При монтаже тумбы навесной необходимо использовать дюбель-гвоздь длиной не менее 60 мм и монтировать его в кирпичную или бетонную стену. При монтаже тумбы навесной на стену из гипскартона, следует использовать специальный крепеж для данного материала. Так же категорически запрещается вешать навесную тумбу на стену из гипс-картона в один лист. При высокой нагрузке тумбы монтируемой на такой стене, имеется высокая вероятность поломки данного листа, что может привести к падению тумбы и соответственно к серьезным травмам пользователей или посетителей учреждения.

4.8 Следует помнить, что изделие имеет квадратные формы, а соответственно имеет углы. Во избежание получения травмы в виде ушиба, при эксплуатации не рекомендуется совершать резкие хаотичные движения.

5. Классификация изделия:

Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

По воспринимаемым механическим воздействиям относится к группе 1 по ГОСТ Р 50444.

По последствиям отказа - к классу В по ГОСТ Р 50444.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508.

Код ОКПД 2 - 32.50.30.119.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 261500.

6. Варианты исполнения изделий:

Система моечная медицинская «АМИКО» по ТУ 32.50.30-036-34597883-2020 в вариантах исполнения:

1. Тумба стационарная с мойкой «АМИКО»:

1.1. АМ/М1-Т 01, АМ/М1-Т 04, АМ/М1-Т 05, АМ/М1-Т 09, АМ/М1-Т 10, АМ/М1-Т 11, АМ/М1-Т 12, АМ/М1-Т 13, АМ/М1-Т 14, АМ/М1-Т 18, АМ/М1-Т 19, АМ/М1-Т 27, АМ/М1-Т 28, АМ/М1-Т 29, АМ/М1-Т 31, АМ/М1-Т 32, АМ/М1-Т 33, АМ/М1-Т 34, АМ/М1-Т 35, АМ/М1-Т 36, АМ/М1-Т 40, АМ/М1-Т 41, в составе:

Тумба-1шт;

Мойка-1шт;

Смеситель-1шт;

Сифон-1шт;

Ручка-1шт;

Ножки-4шт;

Корзина для отходов - не более 1 (при необходимости);

1.2. АМ/М1-Т 02, АМ/М1-Т 03, АМ/М1-Т 23, АМ/М1-Т 24, АМ/М1-Т 25, в составе:

Тумба-1шт;

Мойка-1шт;

Смеситель-1шт;

Сифон-1шт;

Ручка-1шт.

Корзина для отходов - не более 1 (при необходимости);

1.3. АМ/М1-Т 06, АМ/М1-Т 15, АМ/М1-Т 20 АМ/М1-Т 37, в составе:

Тумба-1шт;

Мойка-2шт;

Смеситель-2шт;

Сифон-2шт;

Ручка-2шт;

Ножки -4шт.

Корзина для отходов - не более 1 (при необходимости);

1.4. АМ/М1-Т 07, АМ/М1-Т 08, АМ/М1-Т 16, АМ/М1-Т 17, АМ/М1-Т 21, АМ/М1-Т 22, АМ/М1-Т 30, АМ/М1-Т 38, АМ/М1-Т 39, , АМ/М1-Т 42, в составе:

Тумба-1шт;

Мойка-1шт;

Смеситель-1шт;

Сифон-1шт;

Ручка-2шт;

Ножки -4шт.

Корзина для отходов - не более 1 (при необходимости);

1.5. АМ/М1-Т 26, в составе:

Тумба-1шт;

Мойка-1шт;

Смеситель-1шт;

Сифон-1шт;

Ручка-2шт.

Корзина для отходов - не более 1 (при необходимости).

2. Стол с мойкой «АМИКО»:

2.1. АМ/М4-S 01, АМ/М4-S 02, АМ/М4-S 03, АМ/М4-S 04, АМ/М4-S 05, АМ/М4-S 06, АМ/М4-S 07, АМ/М4-S 08, АМ/М4-S 09, АМ/М4-S 10, АМ/М4-S 11, в составе:

Стол-1шт;

Мойка-1шт;
Смеситель-1шт;
Сифон-1шт;
Ножки -4шт.;

2.2. AM/M4-S 12, AM/M4-S 13, AM/M4-S 14, AM/M4-S 15, AM/M4-S 16, AM/M4-S 17, в составе:

Стол-1шт;
Мойка-2шт;
Смеситель-2шт;
Сифон-2шт;
Ножки -4шт.;

2.3. AM/M4-S 18, в составе:

Стол-1шт;
Мойка-2шт;
Смеситель-2шт;
Сифон-2шт;
Гипсоотстойник-не более 1шт (при необходимости);
Полка-1шт;
Ручка-5шт;
Ножки -4шт.

Корзина для отходов - не более 1 (при необходимости).

7. Технические характеристики изделия.

7.1 Внешний вид изделий – согласно Приложению 1.

7.2 Габаритные размеры, масса и основные функциональные характеристики изделий должны соответствовать таблицам 1-3.

Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать ± 5 мм.

Таблица 1. Тумба стационарная с мойкой «АМИКО»

№ п/п	Вариант исполнения	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, $\pm 10\%$	Функциональные характеристики					
				Полка	Дверь	Ящик выдвижной	Мойка	Опоры	Примечание
1	AM/M1-T 01	900x500x600	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель локтевой, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
2	AM/M1-T 02	900x845x845	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	подиум	1 смеситель локтевой, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
3	AM/M1-T 03	900x845x845	45	-	1 откидная дверь	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	подиум	1 смеситель локтевой, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
4	AM/M1-T 04	850x450x430	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель локтевой, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
5	AM/M1-T 05	850x500x650	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель локтевой, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
6	AM/M1-T 06	850 x 900 x 430	45	-	2 распашная	-	2 накладные мойки (глубина	Ножки 100 мм, регулируемые	2 смесителя, 2 сифона, 1

№ п/п	Вариант исполнения	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, ± 10%	Функциональные характеристики					
				Полка	Дверь	Ящик выдвижной	Мойка	Опоры	Примечание
							150 мм)	по высоте от 95 до 125 мм	корзина для отходов при необходимости
7	AM/M1-T 07	850 x 900 x 430	45	-	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
8	AM/M1-T 08	850 x 900 x 430	45	-	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
9	AM/M1-T 09	880 x 500 x 600	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
10	AM/M1-T 10	880 x 500 x 600	45	-	1 распашная	-	1 накладная двойная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
11	AM/M1-T 11	880 x 500 x 600	45	-	1 откидной дверью	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, локтевой, 1 сифон
12	AM/M1-T 12	900 x 500 x 600	45	-	-	1	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
13	AM/M1-T 13	880 x 845 x 845	45	1	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
14	AM/M1-T 14	880 x 845 x 845	45	-	1 откидная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, локтевой, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
15	AM/M1-T 15	880 x 1000 x 600	55	-	2 распашная	-	2 накладные мойки (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, возможна комплектация двумя смесителями по запросу, 2 сифона, 1 корзина для отходов при необходимости
16	AM/M1-T 16	880 x 1000 x 600	55	-	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
17	AM/M1-T 17	880 x 1000 x 600	55	-	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
18	AM/M1-T 18	850 x 450 x 430	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости

№ п/п	Вариант исполнения	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, ± 10%	Функциональные характеристики					
				Полка	Дверь	Ящик выдвижной	Мойка	Опоры	Примечание
19	AM/M1-T 19	850 x 650 x 650	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
20	AM/M1-T 20	850 x 900 x 430	45	-	2 распашная	-	2 накладные мойки (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	2 смесителя, 2 сифона, 1 корзина для отходов при необходимости
21	AM/M1-T 21	850 x 900 x 430	45	-	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
22	AM/M1-T 22	850 x 900 x 430	45	-	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
23	AM/M1-T 23	888x490x 600	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	подиум	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
24	AM/M1-T 24	888x910x91 0	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	подиум	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
25	AM/M1-T 25	888x490x60 0	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	подиум	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов, 1 люк для доступа к корзине для отходов
26	AM/M1-T 26	888x980x60 0	45	1	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	подиум	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
27	AM/M1-T 27	862x490x60 0	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
28	AM/M1-T 28	862x910x10	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
29	AM/M1-T 29	862x490x60 0	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов, 1 люк для доступа к корзине для отходов
30	AM/M1-T 30	862x980x60 0	45	1	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
31	AM/M1-T 31	880 x 500 x 600	45	1	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости

№ п/п	Вариант исполнения	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, ± 10%	Функциональные характеристики					
				Полка	Дверь	Ящик выдвижной	Мойка	Опоры	Примечание
32	AM/M1-T 32	880 x 500 x 600	45	1	1 распашная	-	1 накладная двойная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
33	AM/M1-T 33	880 x 500 x 600	45	-	1 откидная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
34	AM/M1-T 34	880 x 500 x 600	45	-	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
35	AM/M1-T 35	880 x 845 x 845	45	1	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
36	AM/M1-T 36	880 x 845 x 845	45	-	1 откидная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
37	AM/M1-T 37	880x1000x 600	45	1	2 распашная	-	2 накладные мойки (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, возможна комплектация двумя смесителями по запросу, 2 сифона, 1 корзина для отходов при необходимости
38	AM/M1-T 38	880 x 1000 x 600	55	-	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
39	AM/M1-T 39	880 x 1000 x 600	55	-	2 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
40	AM/M1-T 40	925x490x600	45	1	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
41	AM/M1-T 41	925x910x910	45	1	1 распашная	-	1 накладная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости
42	AM/M1-T 42	925x980x600	45	1	2 распашная	-	1 накладная двойная мойка (глубина 150 мм)	Ножки 100 мм, регулируемые по высоте от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон, 1 корзина для отходов при необходимости

Таблица 2. Стол с мойкой «АМИКО»

№ п/п	Вариант исполнения	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, ± 10%	Функциональные характеристики					
				Полка	Дверь	Ящик выдвиж ной	Мойка	Опоры	Примечание

№ п/п	Вариант исполнения	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, ± 10%	Функциональные характеристики					
				Полка	Дверь	Ящик выдвиж ной	Мойка	Опоры	Примечание
1	AM/M4-S 01	900x1000x600	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
2	AM/M4-S 02	900x600x600	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
3	AM/M4-S 03	900x1100x700	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
4	AM/M4-S 04	900x1200x800	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
5	AM/M4-S 05	900x700x600	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
6	AM/M4-S 06	900x800x600	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
7	AM/M4-S 07	900x600x900	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
8	AM/M4-S 08	900x1200x600	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
9	AM/M4-S 09	900x700x700	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
10	AM/M4-S 10	900x800x700	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
11	AM/M4-S 11	900x700x900	40	-	-	-	1 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 сифон
12	AM/M4-S 12	900x1200x600	40	-	-	-	2 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	2 смесителя, 2 сифона
13	AM/M4-S 13	900x1200x700	40	-	-	-	2 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	2 смесителя, 2 сифона
14	AM/M4-S 14	900x1500x600	40	-	-	-	2 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	2 смесителя, 2 сифона
15	AM/M4-S 15	900x1500x700	40	-	-	-	2 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулируемой высоты от 95 до 125 мм	2 смесителя, 2 сифона
16	AM/M4-S 16	900x1800x600	40	-	-	-	2 цельнотянутая накладная	пластиковые с регулируемой	2 смесителя, 2 сифона

№ п/п	Вариант исполнения	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, ± 10%	Функциональные характеристики					
				Полка	Дверь	Ящик выдвижной	Мойка	Опоры	Примечание
							(глубина 150 мм)	высоты от 95 до 125 мм	
17	AM/M4-S 17	900x1800x700	40	-	-	-	2 цельнотянутая накладная (глубина 150 мм)	пластиковые с регулировкой высоты от 95 до 125 мм	2 смесителя, 2 сифона
18	AM/M4-S 18	905x1980x568	60	1 выдвижная	2	3	1 мойка из нержавеющей стали (глубина 150 мм)	пластиковые с регулировкой высоты от 95 до 125 мм	1 смеситель, 1 встроенный гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой

Таблица 3. Корзина для отходов

№п/п	Наименование	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг, не более	Объем перенаполнения, л, макс	Примечание
1	Корзина для отходов	306x306x450	6	20	Внешний диаметр Ø 306 мм. Способ крепления: универсальный, на левую или правую боковину корпуса и к фасаду. Комплектация: внешний контейнер из стали, внутреннее съёмное пластиковое ведро Ø288 мм.
2	Корзина для отходов	240x320x350	3		Способ крепления: универсальный, напольный, подвесной. Представляет собой контейнер из стальной проволоки в полимере

7.4 Столешницы столов, тумб, полки и дно ящиков должны выдерживать предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку:

- на столешницу столов, тумб – 30±1,0 кг;
- на полку и дно ящика – 15±1,0 кг

7.5 Покоробленность дверей должна быть не более 1,2 мм.

7.6 Зазоры в проемах дверей на сторону должны составлять не более 2,0 мм.

7.7 Изделия должны устанавливаться на неподвижные опоры обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола.

7.8 Зазор между поверхностью пола и одной из опор должен быть не более 3 мм.

7.9 Тумбы и столы должны быть оснащены винтовыми опорами для выставления мебели на поверхности.

7.10 Двери без замков должны иметь устройство, предотвращающее их самопроизвольное открытие.

7.11 Петли дверей должны иметь амортизаторы, обеспечивающие их плавное, без перекосов открывание и закрывание с усилием не более 20 Н (2 кгс).

7.12 Ящики должны выдвигаться по направляющим и иметь устройство, предотвращающее их выпадение из корпуса при выдвижении.

Усилие выдвижения ящиков без нагрузки должно быть не более 15 Н.

7.13 Изделия, закрываемые дверцами и имеющие выдвижные ящики, не должны перемещаться при открывании дверей или выдвижении ящиков.

7.14 Вкладные и накладные элементы, включая декоративные (при их наличии), должны быть, закреплены неподвижно, ребра притуплены.

7.15 Крепление дверцы должно выдерживать нагрузку не менее 200 Н.

7.16 Долговечность крепления дверей, долговечность ящиков в соответствии с ГОСТ 16371.

7.17 Поверхности изделий не должны иметь вмятин, царапин, трещин, сколов, потертостей, отслоений, вздутий покрытий, клеевых пятен, следов коррозии и других дефектов.

7.18 Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены по ГОСТ 9.104 для группы условий эксплуатации 4. Наружные поверхности изделий должны иметь покрытия не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI по ГОСТ 9.032.

Покрытие не должно иметь отслоений от основного материала и должно быть стойким к истиранию и к воздействию удара.

Цвет лакокрасочных покрытий изделий, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда.

7.19 Металлические и неметаллические неорганические покрытия изделий медицинской мебели должны быть однотонными, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

7.20 Наружные поверхности изделий должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

7.21 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2

7.22 Изделия при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5, при хранении – для условий хранения 1 по ГОСТ 15150.

7.23 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 1 по ГОСТ Р 50444.

7.24 Изделия, упакованные в транспортную упаковку должны сохранять работоспособность после механических воздействий при транспортировании в соответствии с ГОСТ Р 50444.

7.25 Средний срок службы изделий до списания, не менее 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

8. Подготовка к работе и порядок работы.

8.1 После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

8.2 Полученное изделие распакуйте, произведите внешний осмотр. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

8.3 Ознакомьтесь с устройством изделия и порядком сборки, указанными в приложенной схеме сборки:

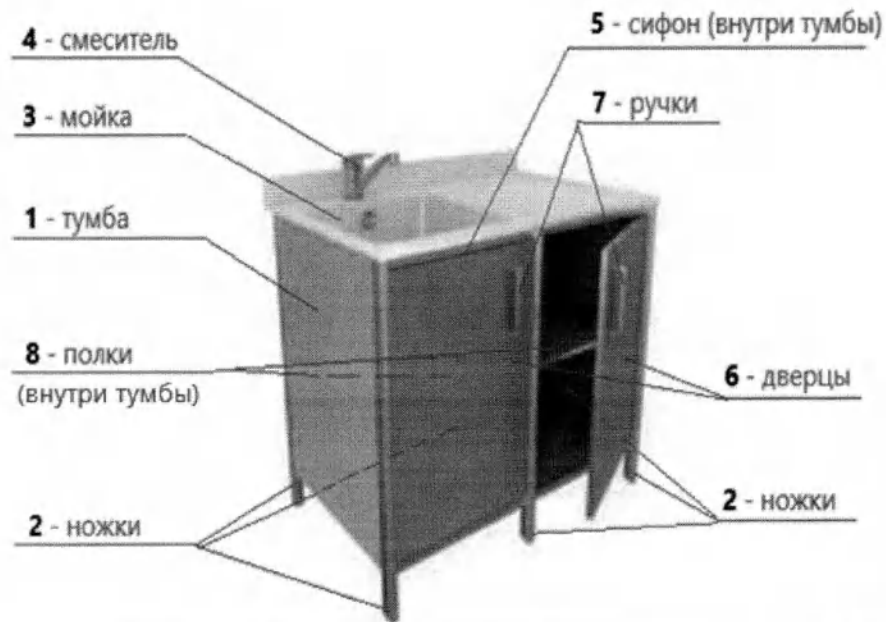
- при необходимости, соберите изделие согласно прилагаемой схемы сборки;
- установить оборудование в кабинете или палате в необходимом месте;
- если оборудование имеет регулируемые опоры, провести регулировку опор для придания изделию устойчивого состояния. Выставьте изделие по уровню. Раскачивания и перекосы не допускаются;

- произвести подключение к водопроводу и канализации. Подключение сантехники должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

- произвести дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно рекомендациям РЭ в разделе «Очистка и дезинфекция».

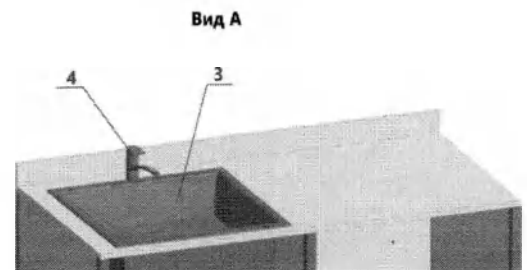
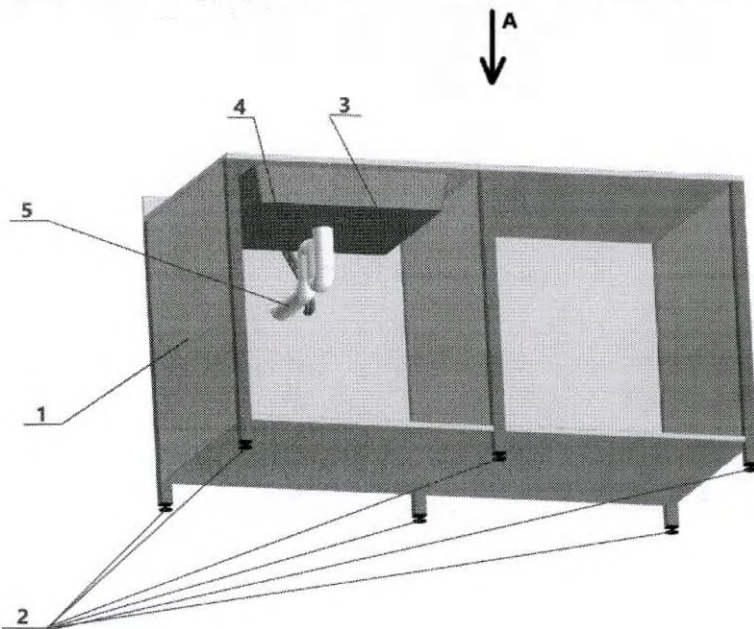
8.4 Схемы сборки

Схема сборки тумбы



- 1 – тумба
- 2 – ножки
- 3 – мойка
- 4 – смеситель
- 5 – сифон (внутри тумбы)
- 6 – дверцы
- 7 – ручки
- 8 – полки (внутри тумбы)

1. Крепить к основанию тумбы поз. 1 шесть ножек поз. 2 с помощью стандартного крепежа (винтов и гаек). Установить в соответствующие вырезы столешницы мойку поз. 3, кран-смеситель поз. 4 и закрепить сифон поз. 5.



2. Установить поочерёдно полки поз. 8 внутри тумбы поз. 1.

3. Установить дверцы поз. 6 и закрепить к ним ручки поз. 7.

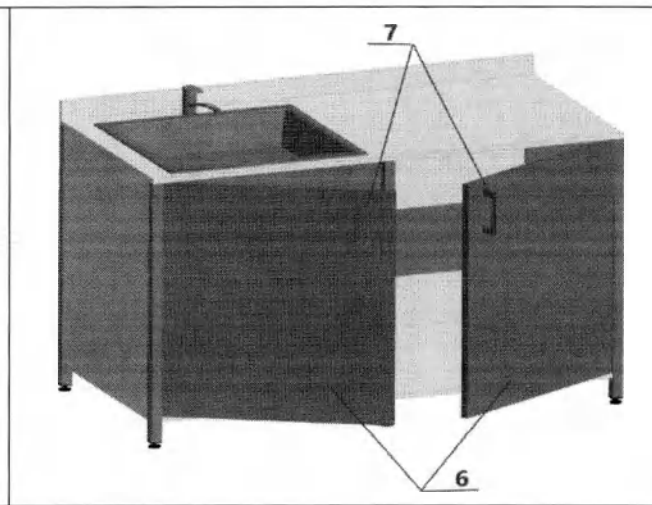
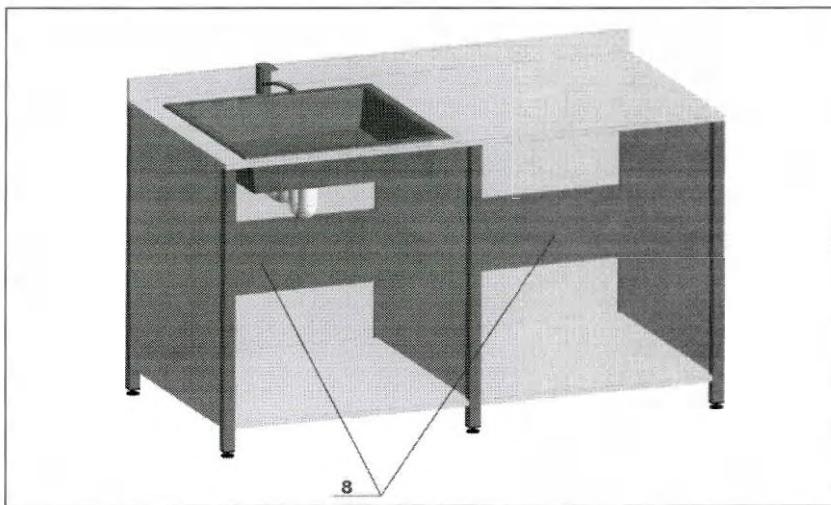
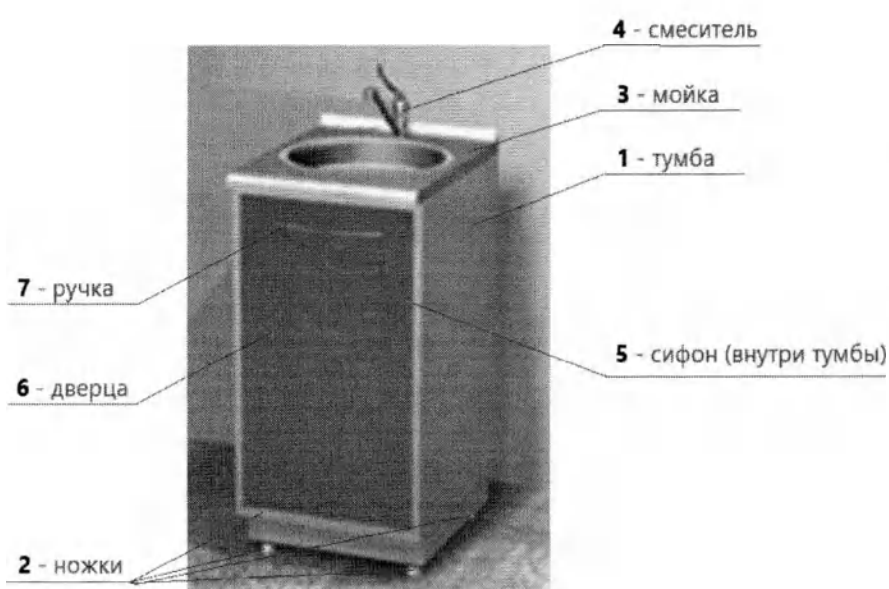
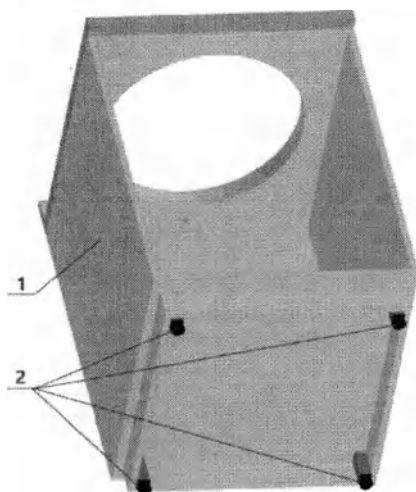


Схема сборки тумбы

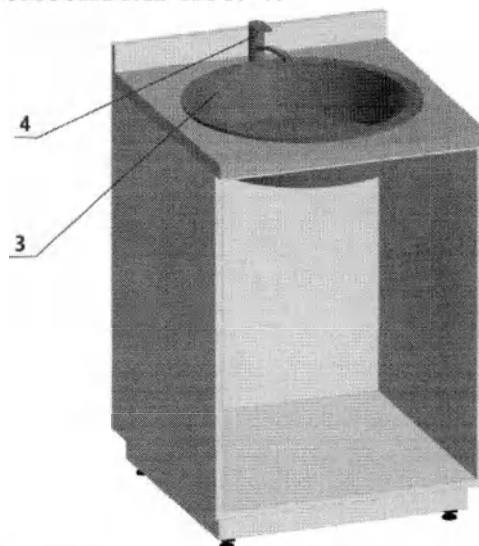


- 1 – тумба
- 2 – ножки
- 3 – мойка
- 4 – смеситель
- 5 – сифон (внутри тумбы)
- 6 – дверца
- 7 – ручка

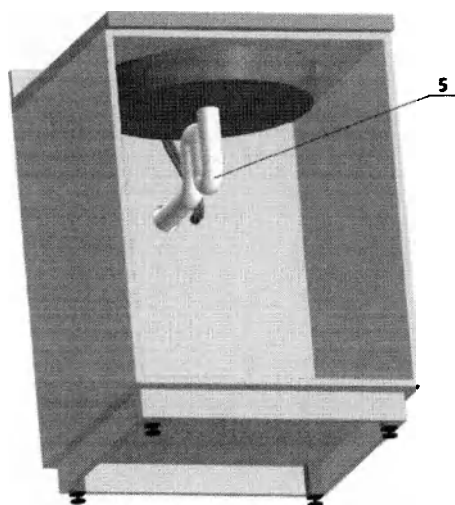
1. Крепить к основанию тумбы поз. 1 четыре ножки поз. 2 с помощью стандартного крепежа (винтов и гаек).



2. Установить в соответствующие вырезы столешницы мойку поз. 3 и кран-смеситель поз. 4.



3. Установить сифон поз. 5.



4. Установить дверцу поз. 6 и закрепить к ней ручку поз. 7.

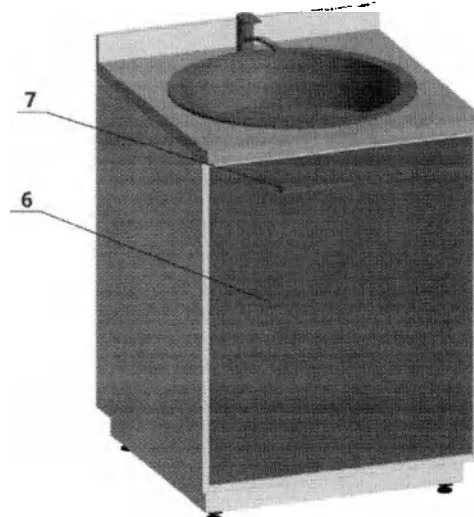


Схема сборки тумбы

4 - смеситель

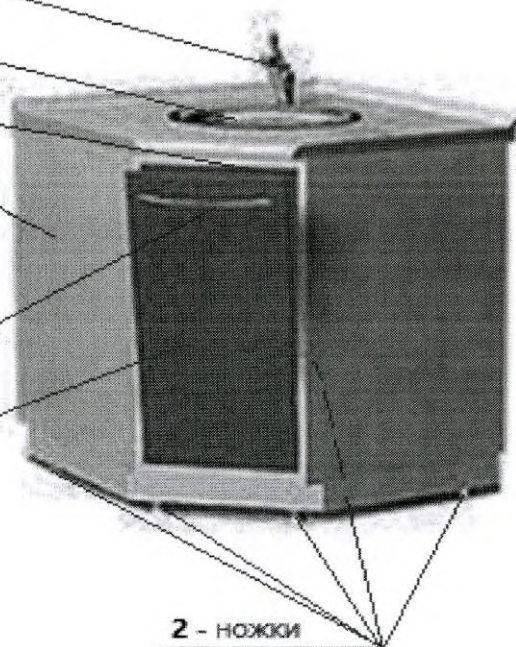
3 - мойка

5 - сифон
(внутри тумбы)

1 - тумба

7 - ручка

6 - дверца



2 - ножки

1 - тумба

2 - ножки

3 - мойка

4 - смеситель

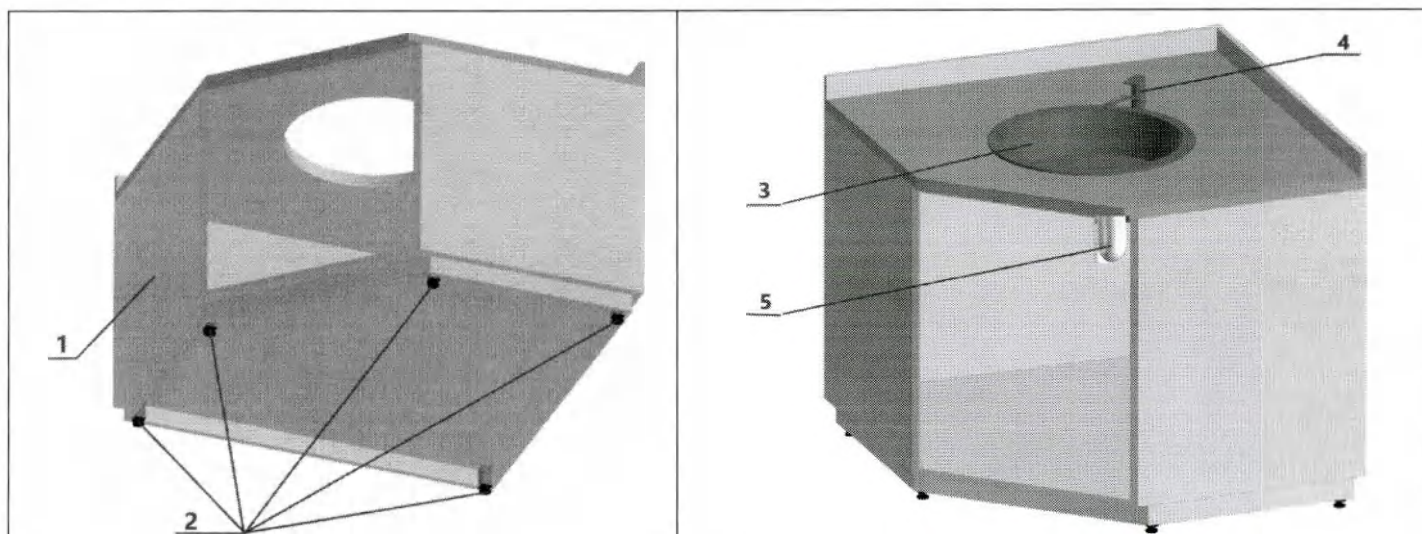
5 - сифон (внутри тумбы)

6 - дверца

7 - ручка

1. Крепить к основанию тумбы поз. 1 пять ножек поз. 2 с помощью стандартного крепежа (винтов и гаек).

2. Установить в соответствующие вырезы столешницы мойку поз. 3, кран-смеситель поз. 4 и закрепить сифон поз. 5.



3. Установить дверцу поз. 6 и закрепить к ней ручку поз. 7.

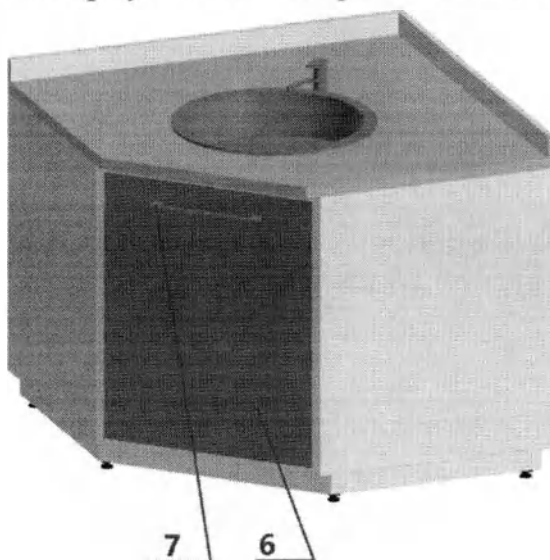
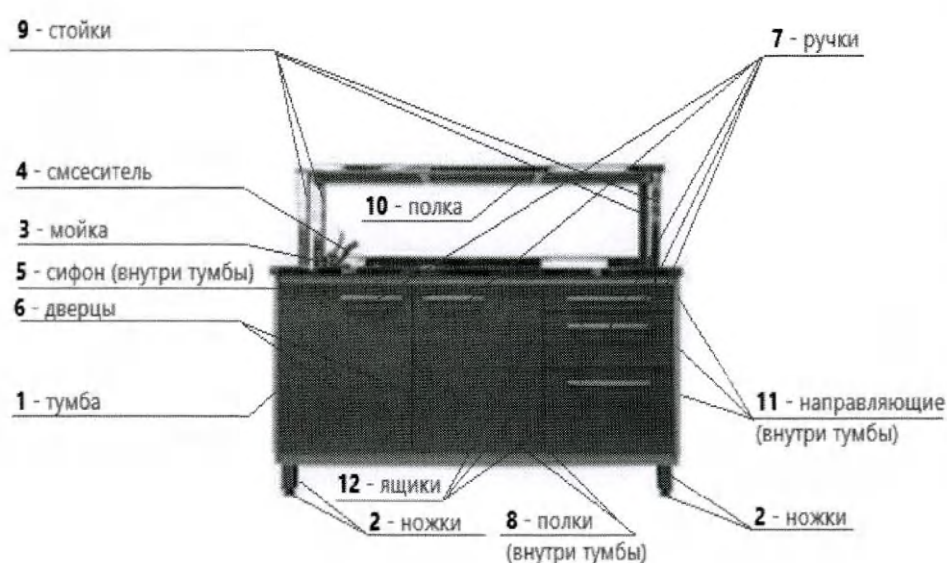


Схема сборки стола

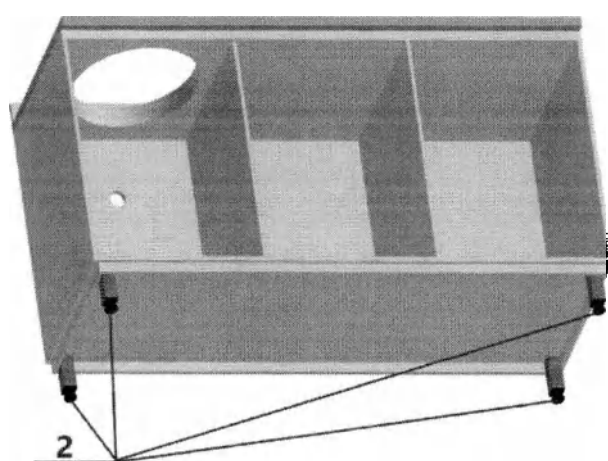


- 1 – тумба
- 2 – ножки
- 3 – мойка
- 4 – смеситель
- 5 – сифон (внутри тумбы)
- 6 – дверцы
- 7 – ручки
- 8 – полки (внутри тумбы)
- 9 – стойки
- 10 – полка
- 11 – направляющие ящиков (внутри тумбы)
- 12 – ящики

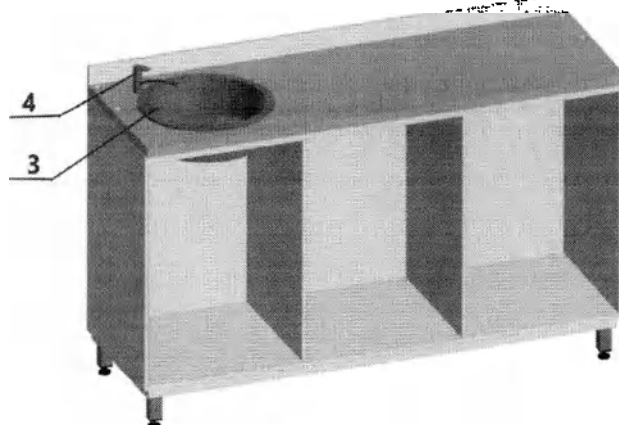
1. Крепить к основанию тумбы поз. 1 четыре ножки поз. 2 с помощью

2. Установить в соответствующие вырезы столешницы мойку поз. 3 и

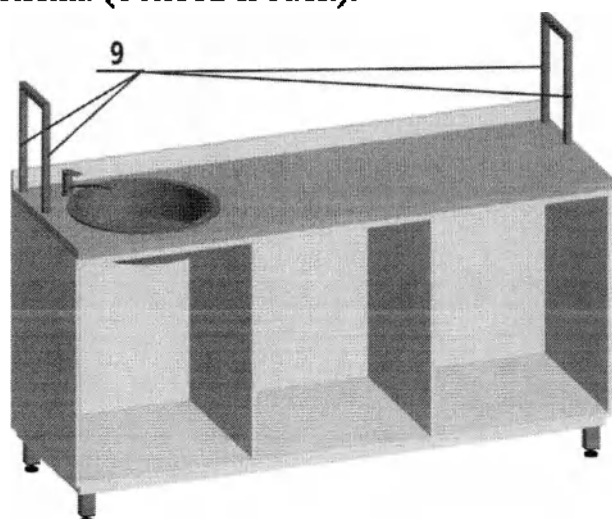
стандартного крепежа (винтов и гаек).



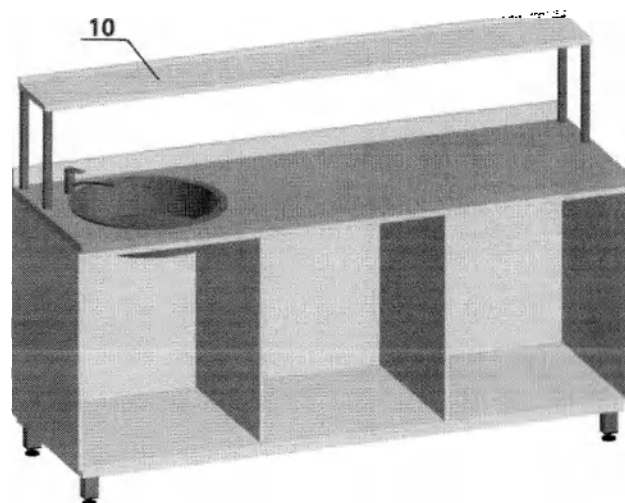
кран-смеситель поз. 4.



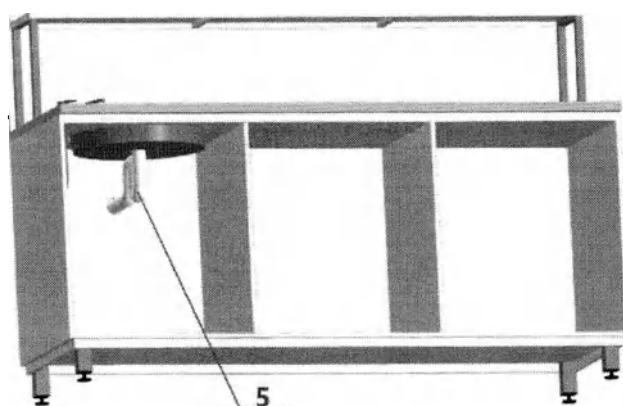
3. Крепить нижнюю часть стоек поз. 9 к столешнице с помощью стандартного крепежа (болтов и гаек).



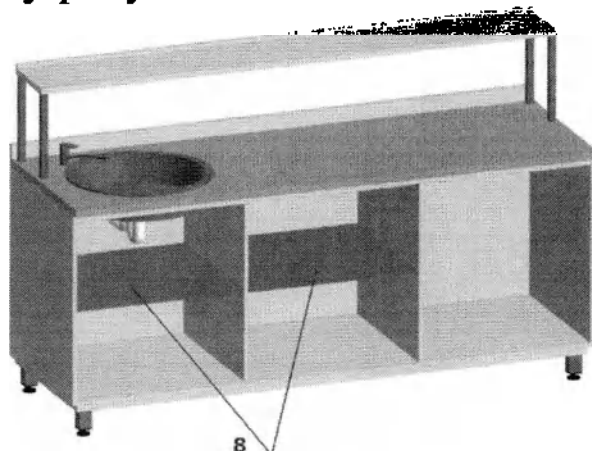
4. Установить на стойки полку поз. 10.



5. Установить сифон поз. 5.

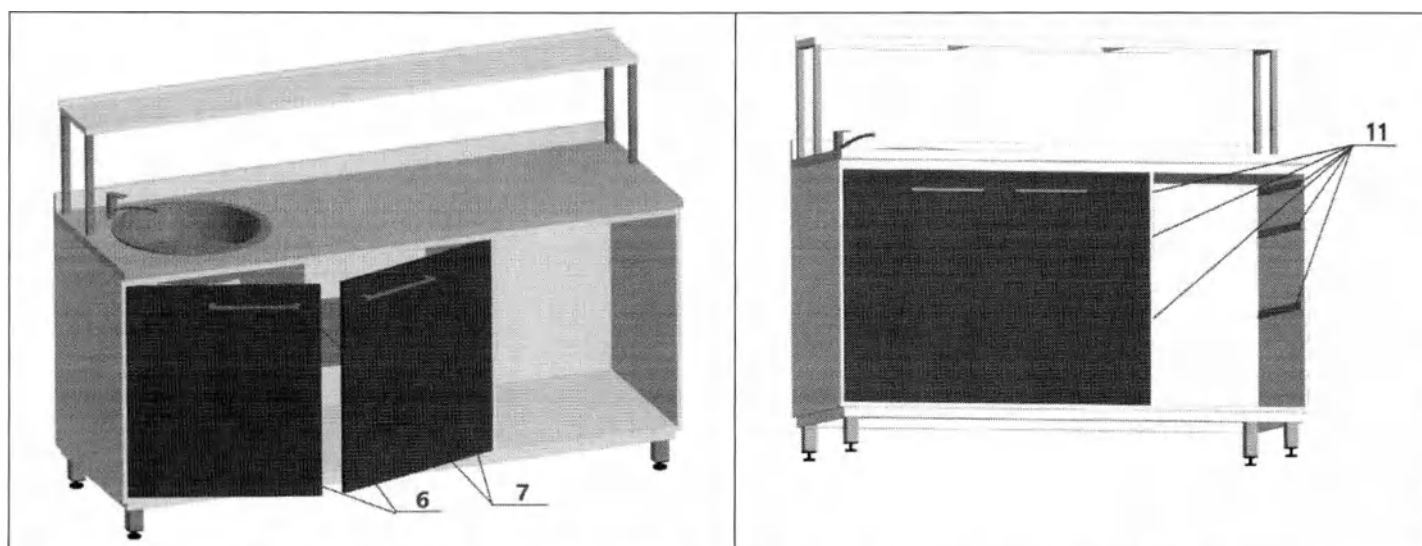


6. Установить поочерёдно полки поз. 8 внутри тумбы поз.1.

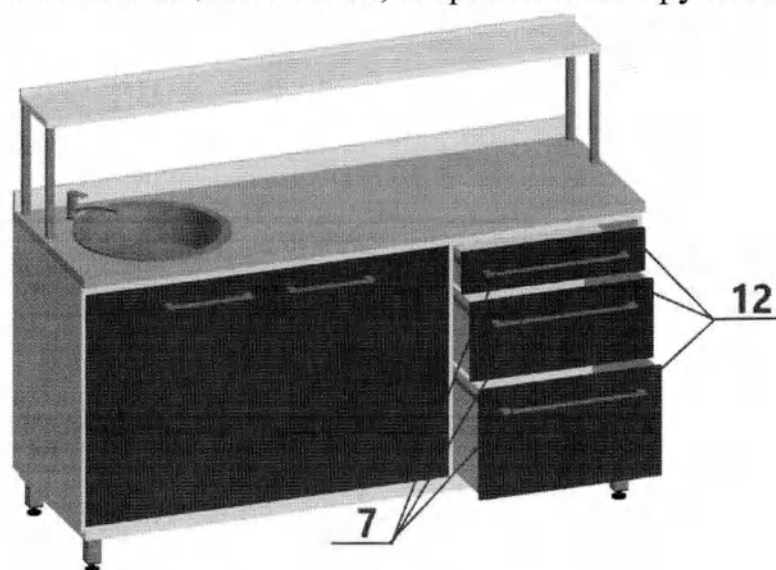


7. Установить дверцы поз. 6 и закрепить к ним ручки поз. 7.

8. Закрепить направляющие поз. 11.



9. Установить ящики поз. 12, закрепив к ним ручки поз. 7.



8.5 В течение всего срока пользования изделием обязательно производите периодическую дезинфекцию, сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

9. Указания по эксплуатации и назначение изделия

9.1. Мебель медицинская предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

9.1. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок.

9.2 Эксплуатация в климатических условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

9.3 Корзины для отходов предназначены для сбора отходов класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

10 Очистка и дезинфекция

10.1. Для удаления загрязнений использовать влажную губку, смоченную в мыльном растворе. Растворитель не применять!

10.2. Для дезинфекции использовать 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина, или аналогичным дезинфицирующим средством на водной основе, установленном для применения в конкретном лечебном учреждении, включенные в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.

10.3. Чистку и дезинфекцию следует проводить аккуратно с использованием влажной тряпки.

10.4. Избегайте применения твердых приспособлений при чистке таких как: скребки, губки с рабочим покрытием из твердого пластикового или металлического волокнообразного материала.

11. Техническое обслуживание.

11.1 Оборудование имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

11.2 Периодический осмотр включает в себя: осмотр на предмет видимых повреждений, при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

11.3 В случае ослабления резьбовых соединений необходимо их затянуть.

12. Расшифровка символов маркировки

Символ	Расшифровка
	Беречь от влаги
	Верх
	Хрупкое! Обращаться осторожно!

13. Транспортирование и хранение

13.1. Транспортирование мебели медицинской должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

13.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями мебели медицинской в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

13.3. Условия транспортирования мебели медицинской крытыми транспортными средствами должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре от -50 до +50 °С).

13.4. Мебель медицинская должна храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

13.5. Условия хранения мебели медицинской в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха при температуре от +5 до +40 °С).

13.6. Хранение мебели медицинской в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

14. Перечень стандартов и нормативных документов, которым соответствует медицинское изделие.

ТУ 32.50.30-036-34597883-2020

ГОСТ Р 50444,

ГОСТ 16371,

Серия ГОСТ ISO 10993

15 Утилизация

Утилизацию изделий проводить как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21 или как твердые бытовые отходы.

16. Гарантийные обязательства

16.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

16.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.

16.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений частей изделия вследствие небрежной эксплуатации.

16.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с датой продажи, подписью продавца и печатью торгующей организации.

16.4. Доставка производится покупателем.

16.5 При неполадках, в случае неисправности изделий, при возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией, а также для подачи рекламаций просим обращаться к изготовителю по адресу:

НПАО «АМИКО»

Адрес: 117556, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ул. Фруктовая, дом 8, корпус 3

Тел. +7 495 742-41-60

Сайт: amiko.ru

16.6. Места производства медицинского изделия:

1. 172840, РФ, Тверская обл., Торопецкий муниципальный район, городское поселение город Торопец, г. Торопец, ул. Полевая, д. 26В, помещение № 4, № 5.
2. 601657, Владимирская обл., г. Александров, Двориковское шоссе, помещение № 1.

17. Свидетельство о приемке.

Система мочечная медицинская «АМИКО»,

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 32.50.30-036-34597883-2020 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М. П.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

18. Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие

Система мочечная медицинская «АМИКО»

зав. № _____

(наименование и тип изделия, заводской №)

Соответствует техническим условиям ТУ 32.50.30-036-34597883-2020

Дата выпуска _____

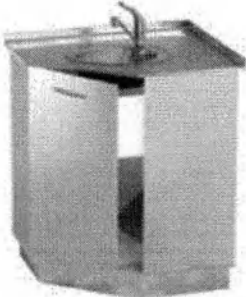
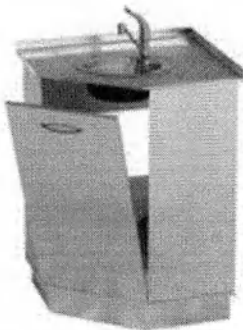
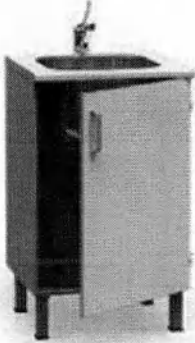
Приобретен _____

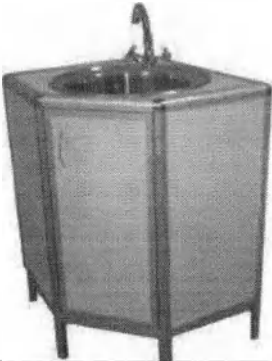
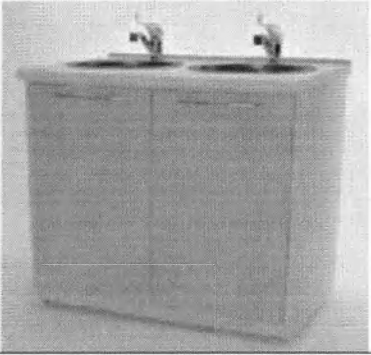
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

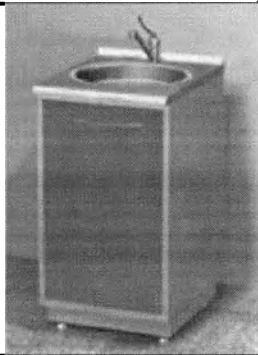
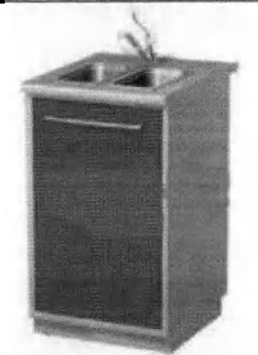
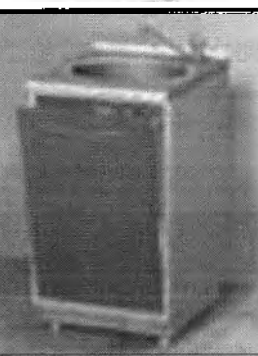
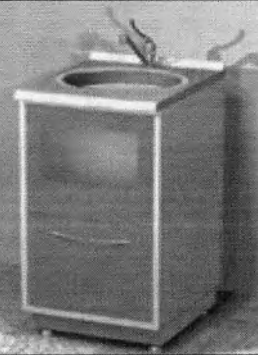
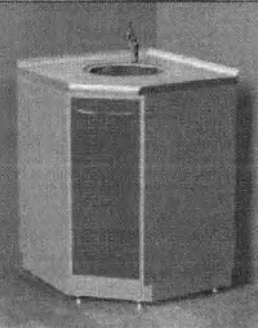
Принят на гарантийное обслуживание

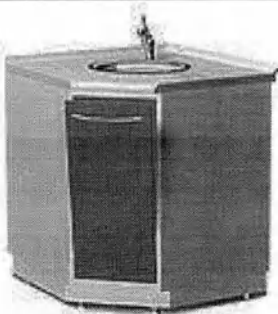
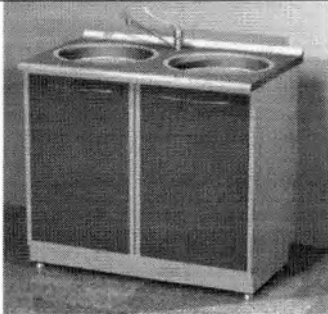
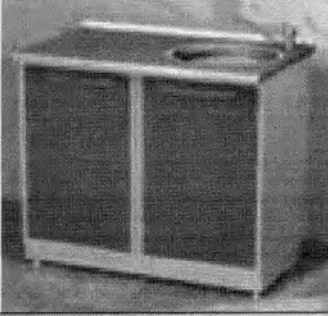
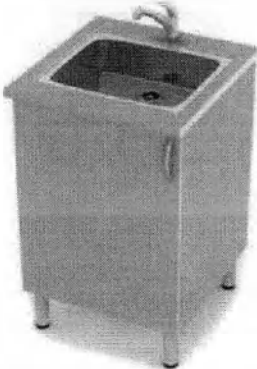
Внешний вид и показания к применению изделий
Тумба стационарная с мойкой «АМИКО»

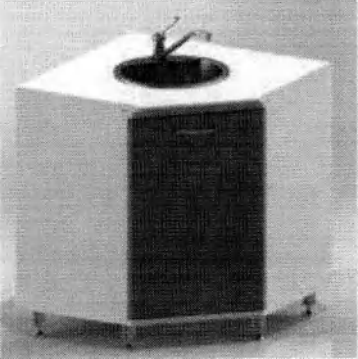
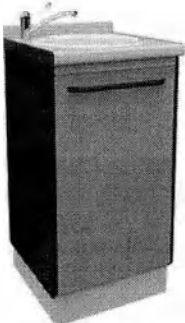
Таблица В1

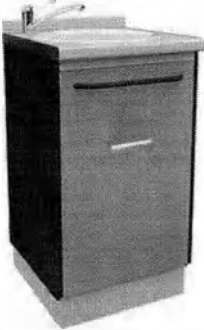
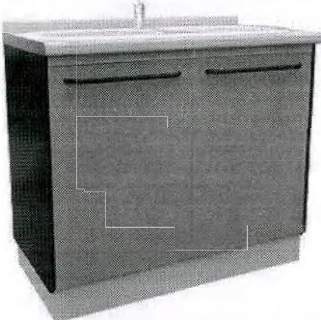
№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
1	АМ/М1-Т 01	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x500x600	45
2	АМ/М1-Т 02	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x845x845	45
3	АМ/М1-Т 03	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x845x845	45
4	АМ/М1-Т 04	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850x450x430	45

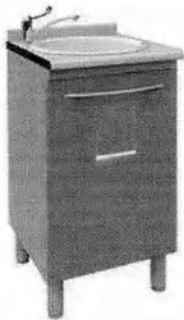
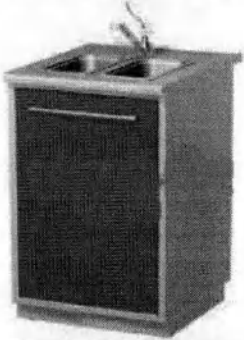
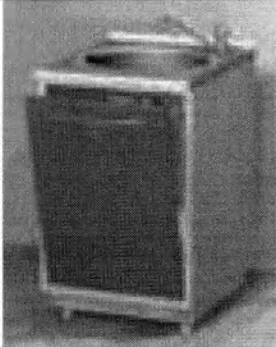
№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
5	АМ/М1-Т 05	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850x500x650	45
6	АМ/М1-Т 06	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850 x 900 x 430	45
7	АМ/М1-Т 07	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850 x 900 x 430	45
8	АМ/М1-Т 08	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850 x 900 x 430	45

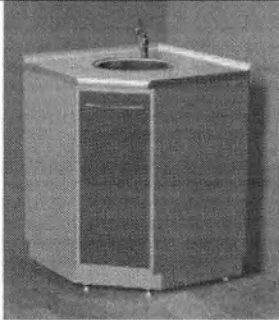
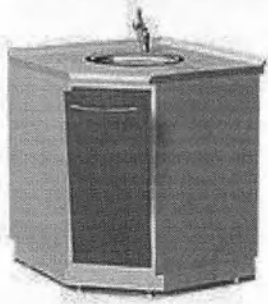
№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
9	АМ/М1-Т 09	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 500 x 600	45
10	АМ/М1-Т 10	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 500 x 600	45
11	АМ/М1-Т 11	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 500 x 600	45
12	АМ/М1-Т 12	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900 x 500 x 600	45
13	АМ/М1-Т 13	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 845 x 845	45

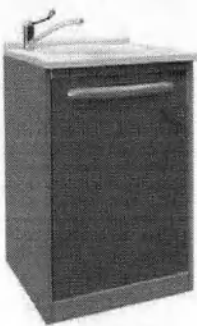
№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
14	АМ/М1-Т 14	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 845 x 845	45
15	АМ/М1-Т 15	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 1000 x 600	55
16	АМ/М1-Т 16	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 1000 x 600	55
17	АМ/М1-Т 17	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 1000 x 600	55
18	АМ/М1-Т 18	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850 x 450 x 430	45

№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
19	АМ/М1-Т 19	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850 x 650 x 650	45
20	АМ/М1-Т 20	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850 x 900 x 430	45
21	АМ/М1-Т 21	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850 x 900 x 430	45
22	АМ/М1-Т 22	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		850 x 900 x 430	45
23	АМ/М1-Т 23	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		888x490x 600	45

№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
24	АМ/М1-Т 24	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		888x910x910	45
25	АМ/М1-Т 25	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		888x490x600	45
26	АМ/М1-Т 26	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		888x980x600	45
27	АМ/М1-Т 27	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		862x490x600	45
28	АМ/М1-Т 28	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		862x910x910	45

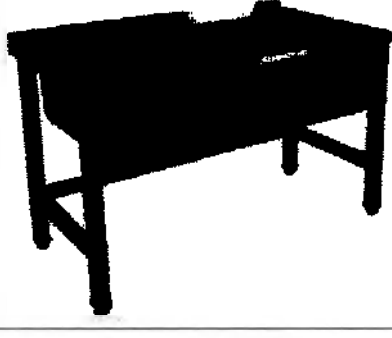
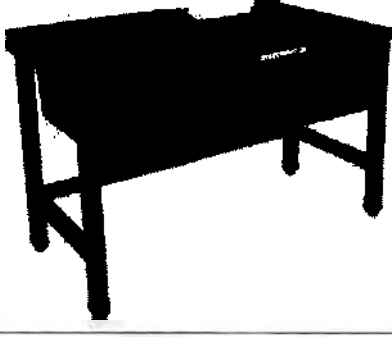
№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
29	АМ/М1-Т 29	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		862x490x600	45
30	АМ/М1-Т 30	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		862x980x600	45
31	АМ/М1-Т 31	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 500 x 600	45
32	АМ/М1-Т 32	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 500 x 600	45
33	АМ/М1-Т 33	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 500 x 600	45

№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
34	АМ/М1-Т 34	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 500 x 600	45
35	АМ/М1-Т 35	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 845 x 845	45
36	АМ/М1-Т 36	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 845 x 845	45
37	АМ/М1-Т 37	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880x1000x 600	45
38	АМ/М1-Т 38	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 1000 x 600	55

№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
39	АМ/М1-Т 39	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		880 x 1000 x 600	55
40	АМ/М1-Т 40	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		925x490x600	45
41	АМ/М1-Т 41	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		925x910x910	45
42	АМ/М1-Т 42	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		925x980x600	45

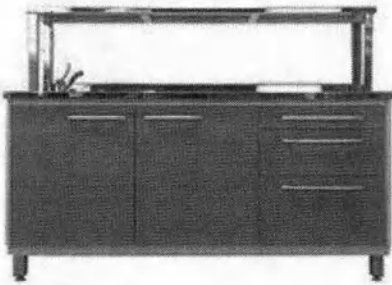
Стол с мойкой «АМИКО»

Таблица В2

№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
1	АМ/М4-S 01	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1000x600	40
2	АМ/М4-S 02	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x600x600	40
3	АМ/М4-S 03	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1100x700	40
4	АМ/М4-S 04	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1200x800	40
5	АМ/М4-S 05	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x700x600	40

№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
6	АМ/М4-S 06	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x800x600	40
7	АМ/М4-S 07	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x600x900	40
8	АМ/М4-S 08	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1200x600	40
9	АМ/М4-S 09	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x700x700	40
10	АМ/М4-S 10	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x800x700	40

№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
11	AM/M4-S 11	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x700x900	40
12	AM/M4-S 12	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1200x600	40
13	AM/M4-S 13	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1200x700	40
14	AM/M4-S 14	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1500x600	40
15	AM/M4-S 15	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1500x700	40

№ п/п	Вариант исполнения	Показания	Внешний вид	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более
16	АМ/М4-S 16	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1800x600	40
17	АМ/М4-S 17	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		900x1800x700	40
18	АМ/М4-S 18	Предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой и медицинскими инструментами		905x1980x568	60

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 32 листов
()
Директор ФНАО «АМНТО»



И.В. Блинов