



«УТВЕРЖДАЮ»



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения:

**«Катетеры одноразовые стерильные периферические
внутривенные с инъекционным портом и защитой иглы BD
Venflon Pro Safety»,**

**производства компании Becton Dickinson Infusion Therapy AB,
Швеция**

Назначение и характеристики изделия.

Катетеры одноразовые стерильные периферические внутривенные *VENFLON PRO SAFETY* предназначены для обеспечения периферического венозного доступа с целью проведения инфузионной терапии и внутривенных вливаний и введений.

Стерильный, одноразового применения.

Изготовлен из уникального рентгеноконтрастного биосовместимого материала BD Vialon.

– Катетер BD Venflon™ Pro Safety сочетает все преимущества катетера BD Venflon™ Pro с дополнительной защитой от ранения иглой.

– Порт с захлопывающейся крышкой предполагает бесконтактное закрытие.

– Особая технология заточки иглы обеспечивает легкость проникновения и больший комфорт для пациента.

– Эластичные крыльшки для фиксации стабилизируют положение катетера в вене и обеспечивают комфортную фиксацию катетера.

Защита от непреднамеренного ранения иглой:

– при извлечении острие иглы полностью закрывается защитным устройством, разработанным в целях минимизации риска ранения иглой

– уникальный дизайн позволяет безопасно минимизировать риск контакта с кровью пациента, разбрызгивания крови во время и после активации защитного механизма

– извлеченная игла безопасно заключается в гладкую пластиковую гофрированную ширму.

– BD Venflon™ Pro Safety обладает всеми необходимыми характеристиками для использования в большинстве клинических случаев, предназначен для использования во всех отделениях.

– Эргономический упор для захвата дает возможность использовать различные техники установки катетера.

– Обтуратор защищает внутренний просвет катетера от коагуляции и образования тромбов после прекращения инфузии.

– Цветовая маркировка обтуратора соответствует обозначению размера катетера.

Метод стерилизации: Облучением.

Не содержит латекса.

Показания к установке внутривенных периферических катетеров:

· введение лекарственных препаратов пациентам, которые не могут принимать препараты orally, либо в случае необходимости быстрого и точного введения препарата в эффективной концентрации (особенно когда препарат может изменить свои свойства при оральном приеме);

· осуществление частых курсов внутривенной терапии хроническим больным;

· струйное (болюсное) введение препаратов, например введение антибиотиков (согласно инструкции по применению от производителя препарата);

· инвазивный мониторинг кровяного давления;

· регулярный забор крови для клинических исследований;



· доступ в кровяное русло при неотложных состояниях (быстрый венозный доступ при необходимости одновременного проведения экстренных вливаний препаратов или большой скорости введения растворов);

· переливание препаратов крови;


- липиды);
- регидратация организма.

Использование.

1. вымойте руки;
2. проверьте целостность упаковки и сроки хранения внутривенного катетера
3. убедитесь, что перед Вами тот больной, которому назначена катетеризация вены;
4. обеспечьте хорошее освещение, помогите пациенту найти удобное положение;
5. наложите жгут на 10-15 см выше предполагаемой зоны катетеризации;
6. выберите вену путем пальпации, принимая во внимание характеристики инфузата;
7. подберите наименьший внутривенный катетер, учитывая: размер вены, необходимую скорость введения, график проведения внутривенной терапии, вязкость инфузата;
8. повторно обработайте руки, используя антисептик, и наденьте перчатки;
9. обработайте место катетеризации кожным антисептиком в течение 30-60 секунд и дайте высохнуть самостоятельно; **НЕ ПАЛЬПИРУЙТЕ ВЕНУ ПОВТОРНО**
10. зафиксируйте вену, прижав ее пальцем ниже предполагаемого места введения внутривенного катетера; перед венепункцией прокрутите катетер на 360°
11. введите внутривенный катетер на игле под углом к коже 15 градусов, наблюдая за появлением крови в индикаторной камере;
12. при появлении крови в индикаторной камере уменьшите угол наклона иглы и на несколько миллиметров введите иглу в вену;
13. зафиксируйте иглу, а канюлю медленно до конца сдвигайте с иглы в вену;
14. снимите жгут;
15. стабилизируйте канюлю катетера, нажмите на белую кнопку и удалите иглу;
16. закройте заглушкой внутривенный катетер или присоедините инфузионную систему;
17. зафиксируйте внутривенный катетер на конечности;
18. зарегистрируйте процедуру катетеризации вены согласно требований лечебного учреждения;
19. утилизируйте отходы в соответствии с правилами техники безопасности и Согласно существующим нормативам.

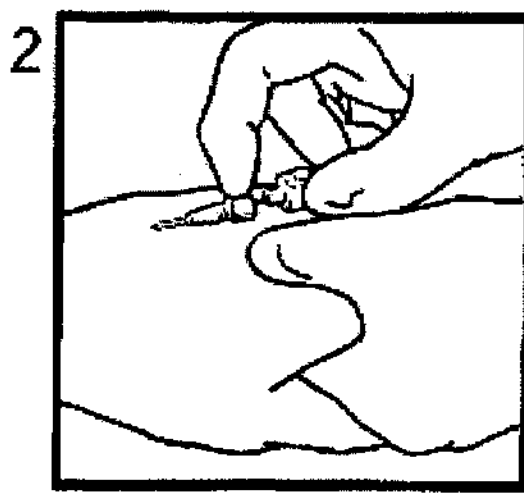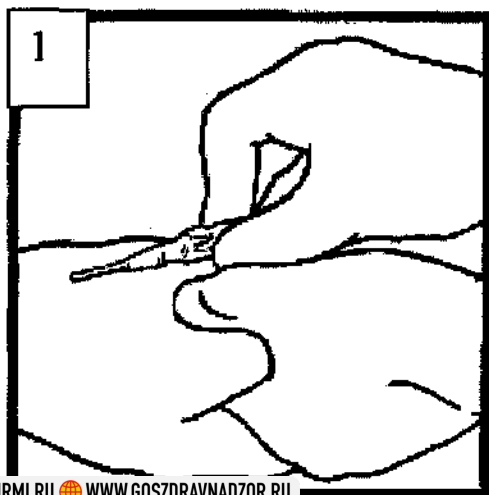

3

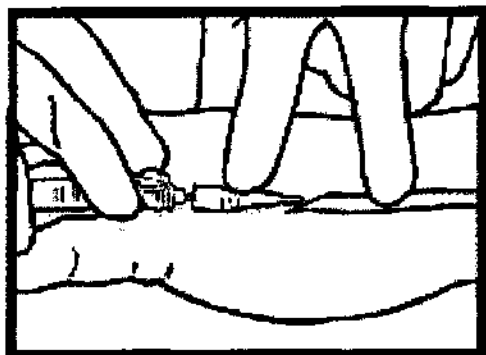

Меры предосторожности:

- Не вынимать иглу до момента установки катетера;
- Никогда не вставлять иглу в катетер повторно;
- Не пытаться вынуть иглу до нажатия на белую «кнопку»;
- Не использовать режущие инструменты вблизи места венепункции;
- Обязательная дезинфекция места венепункции;
- Уничтожить иглу и медицинский мусор, согласно принятому в клинике протоколу.


Упаковка изделия.

Катетеры поставляются в стерильной поштучной упаковке из полиэтилена и бумаги.
 Методы утилизации: согласно существующим нормативам. Катетеры утилизируются аналогично одноразовым шприцам.

Срок годности 3 года.

Внимание: Для снижения уровня риска заражением СПИДом или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с биологическими материалами со всеми пациентами.

Катетер стерильный одноразовый периферический внутривенный с инъекционным портом и защитой иглы BD Venflon Pro Safety, производства Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Швеция.

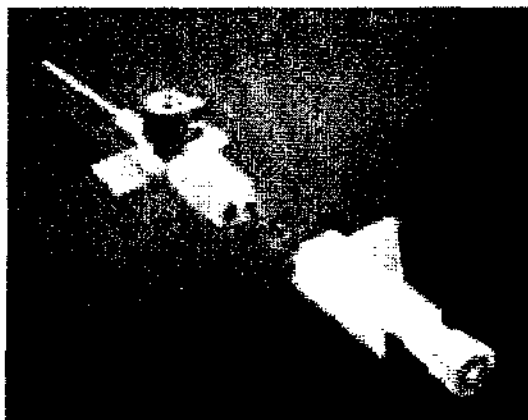

Преимущества катетеров:

- обладают высокой пропускной способностью;
- очень удобны для фиксации на коже пациента;
- подвижность катетеров идеально сочетается с подвижностью сосудов;
- окончания катетеров имеют атравматическую форму, что предотвращает риск повреждения сосудов;
- предотвращает образование тромбов;
- при рентгенологических исследованиях – идентифицируются;
- имеют инъекционный клапан, обеспечивающий быстрый и легкий доступ.