

**Таварыства з абмежаванай
адказнасцю
«ГАЛТЭЯФАРМ»**

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ГАЛТЕЯФАРМ»**

ул. Журжевская, 11, 210040, г. Витебск
Тел./факс (0212) 48 08 86, 48 08 87
Расчетный счет
№ BY61ALFA30122258950040270000
ЗАО «Альфа-Банк»
просп. Генерала Людникова 16А,
г. Витебск
БИК ALFABY2X, УНП 390287860
ОКПО 291962542000
E-mail: direction@galteyapharm.by

«09» сентября 2024 г.



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ДЛЯ КАТЕТЕРОВ

6 x 8 см

С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Назначение: применяется для фиксации медицинских устройств (катетеров, канюль, трубок).

Способ применения: наружно. Открыть пакет, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и приклеить к сухой, чистой коже так, чтобы подушечка частично закрывала медицинское устройство. Закрепить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру. Пластырь может находиться на коже до 2-х суток. Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости. Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов. Не использовать при повреждении упаковки.

Состав: микропористый нетканый материал, клей-расплав на основе синтетического каучука, подушечка из нетканого материала.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.


Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Не использовать по истечении срока годности.

Произведено: ТУ ВУ 390287860.005-2014; РУ Беларусь № ИМ - 7.108083 от 29.11.2019 г.

Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, 11. Тел./факс: (+375212) 48-08-87, 48-08-85.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

Уполномоченный представитель в РФ, адрес принятия претензий: ООО «МЕДОПТТОРГ», Россия, 198332, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Юго-Запад, пр-кт Ленинский, д. 88 Литера А, кв. 446, тел.: +7 911 267 37 87.

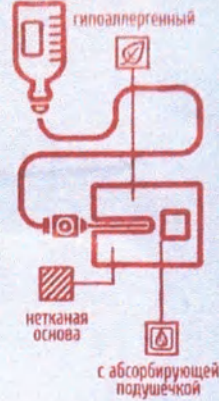


СТЕРИЛЬНО

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ



Стерилизация проводится радиационным методом. Серия и дата стерилизации указаны на упаковке.

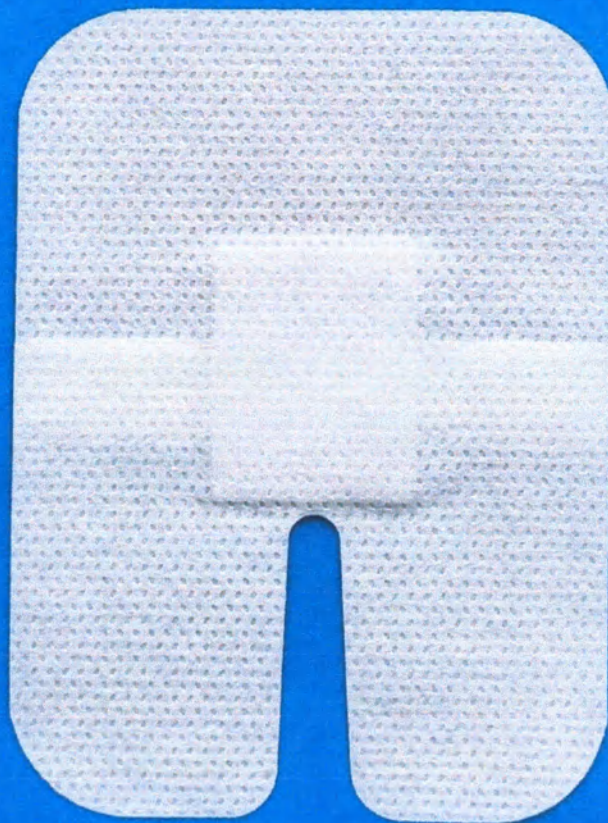

1. Пластырь-повязка для катетеров с абсорбирующей подушечкой стерильный гипоаллергенный на нетканой основе 6 × 8 см и его первичная упаковка (барьерная система для стерилизации)

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ДЛЯ КАТЕТЕРОВ

6 x 8 см

С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ НА ПЛЁНОЧНОЙ ОСНОВЕ

Назначение: применяется для фиксации медицинских устройств (катетеров, канюль, трубок).

Способ применения: наружно. Открыть пакет, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и приклеить к сухой, чистой коже так, чтобы подушечка частично закрывала медицинское устройство. Закрепить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру. Удалить защитную пленку с наружной стороны пластыря-повязки, потянув за специальные цветные края. Может находиться на коже до 2-х суток. Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости. Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов. Не использовать при повреждении упаковки.

Состав: пленочная основа, акриловый клей, подушечка из нетканого материала.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Не использовать по истечении срока годности.


Произведено: ТУ 390287860.005-2014; РУ Беларусь № ИМ - 7108083 от 29.11.2019; РУ РФ № РЗН 2023/21063 от 15.09.2023 г.

Изготовитель: ООО «ГЛАТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040,

г. Витебск, ул. Журавская, 11. Тел./факс: (+375202) 48-08-87, 48-08-85.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

Уполномоченный представитель в РФ, адрес принятия претензий: ООО «МЕДОПТОРГ», Россия, 198332, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Юго-Запад, пр-кт Ленинский, д. 88 Литера А, кв. 446, тел.: +7 911 267 37 87.

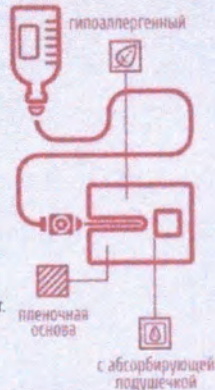

СТЕРИЛЬНО

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ




Стерилизация проводится радиационным методом.
Серия и дата стерилизации указаны на упаковке.



2. Пластырь-повязка для катетеров с абсорбирующей подушечкой стерильный гипоаллергенный на плёночной основе 6 × 8 см и его первичная упаковка (барьерная система для стерилизации)

6x8 ПЛЕН.ОСН. 50424
СТЕРИЛЬНО 04.2024

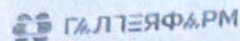

50 шт.

*Пластырь-повязка для катетеров с абсорбирующей подушечкой
стерильный гипоаллергенный на плёночной основе 6 × 8 см*

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

Назначение: применяется для фиксации медицинских устройств (катетеров, канюль, трубок).

Способ применения: наружно. Открыть пакет, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и приклеить к сухой, чистой коже так, чтобы подушечка частично закрывала медицинское устройство. Закрепить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру. Удалить защитную плёнку с наружной стороны пластыря-повязки, потянув за специальные цветные края. Может находиться на коже до 2-х суток. Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости. Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов. **Не использовать при повреждении упаковки.**

Состав: плёночная основа, акриловый клей, подушечка из нетканого материала.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. **Не использовать по истечении срока годности.** Серия и дата стерилизации указаны на первичной упаковке.

Стерилизация проводится радиационным методом.

Произведено: ТУ ВУ 390287860.005-2014;

РУ Беларусь № ИМ-7.108083 от 29.11.2019; РУ РФ № РЗН 2023/21063 от 15.09.2023 г.

Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, 11, тел. (+375212) 48-08-85, 48-08-87

Уполномоченный представитель в РФ, адрес принятия претензий:

ООО «МЕДОПТТОРГ», Россия, 198332, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Юго-Запад, пр-кт Ленинский, д. 88 Литера А, кв. 446 тел.: +7 911 267 37 87.

Серия: 50424

Дата стерилизации: 04.2024



Штриховой идентификационный код 1 шт.

3. Внешний вид медицинского изделия в групповой упаковке, представляющей собой пакеты из пленки полиэтиленовой, при размещении краткой информации на потребительской упаковке и полной информации на этикетке групповой упаковки

Пластырь-повязка для камеры с абсорбирующей подушечкой
стерильный гиподерматический на нетканой основе 6 × 8 см
250 шт.
Серия: 140523 Дата стерилизации: 05.2023

Пластырь-повязка для камеры с абсорбирующей подушечкой
стерильный гиподерматический на нетканой основе 6 × 8 см
250 шт.
Серия: 140523 Дата стерилизации: 05.2023

4. Внешний вид медицинского изделия в групповой упаковке, представляющей собой коробки/пачки из картона. В верхнем правом углу приведен пример маркировки такой групповой упаковки.

70524
05.2024

Г.Л. ЛЕЯФАРМ

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ДЛЯ КАТЕТЕРОВ

6 x 8 см

С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Назначение: применяется для фиксации медицинских устройств (катетеров, канюль, трубок).

Способ применения: наружно. Открыть пакет, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и приклеить к сухой, чистой коже так, чтобы подушечка частично закрывала медицинское устройство. Замочить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру. Пластырь может намокать не менее 2-х суток. Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости. Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не использовать при повреждении упаковки.

Система: микропористый нетканый материал, клеей-расплае на основе синтетического каучука, подушечка из нетканого материала.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Не использовать по истечении срока годности.

Производитель: ТУ ВУ 390287860.005-2014; РУ Беларусь № ИМ - 7.108083 от 29.11.2019 г.

РУ РО № РЭН 2023/21063 от 15.09.2023 г.

Изготовитель: ООО «ЛАТЕХФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журавская, 11.

Тел./факс (+375) 212 48-08-87, 48-08-85.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485. **Уполномоченный представитель в РБ, адрес принятия претензий:** ООО «МЕДОПТОРГ», Россия, 198332, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Юго-Запад, пр-кт Ленинский, д. 88, литера А, кв. 44б, тел.: +7 911 267 37 87.




Стерилизация производится радиационным методом.
Срок и дата стерилизации указаны на упаковке.





ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ


СТЕРИЛЬНО

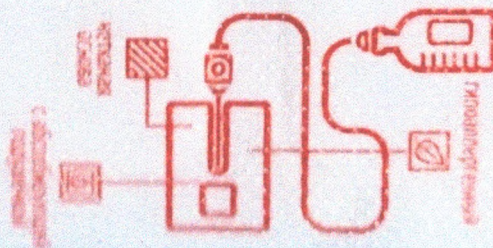


5. Внешний вид медицинского изделия в групповой упаковке, представляющей собой пакеты из пленки полиэтиленовой, при размещении полной информации только на потребительской упаковке

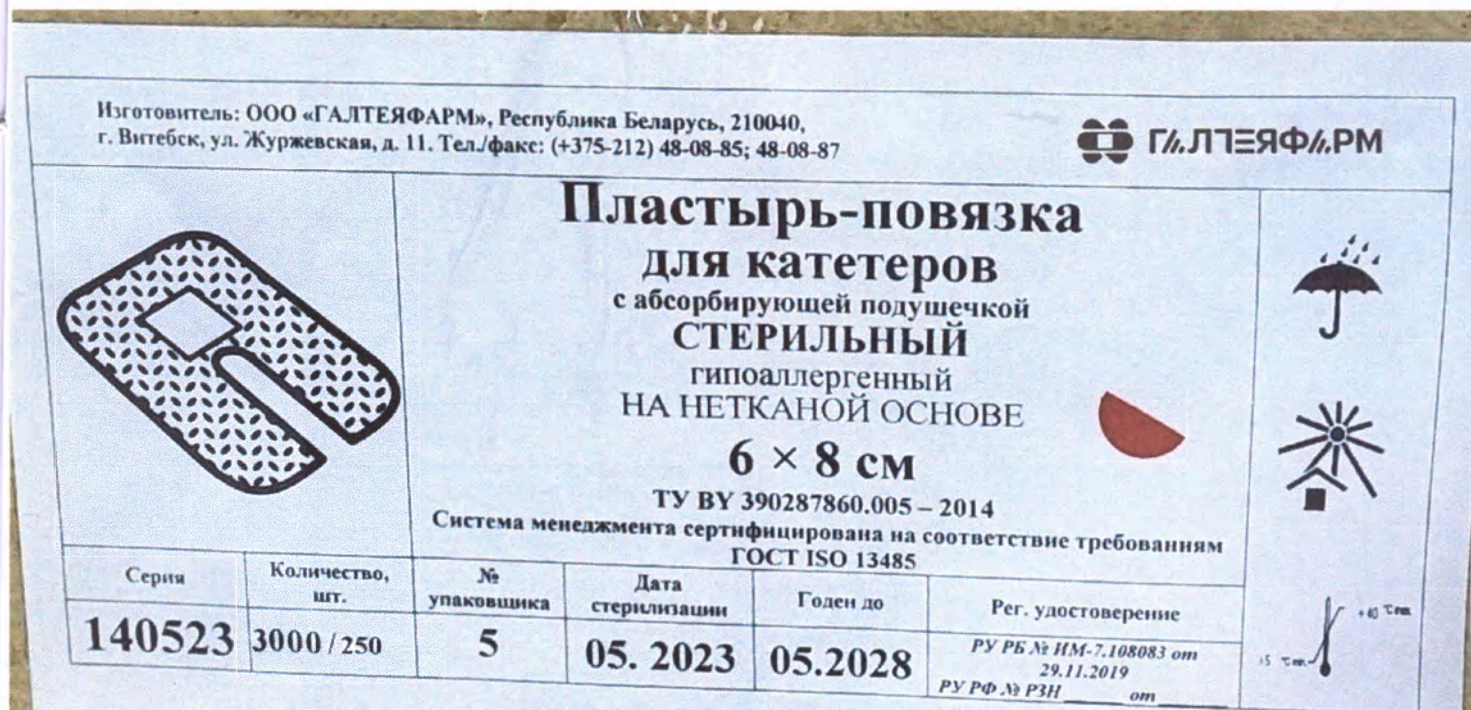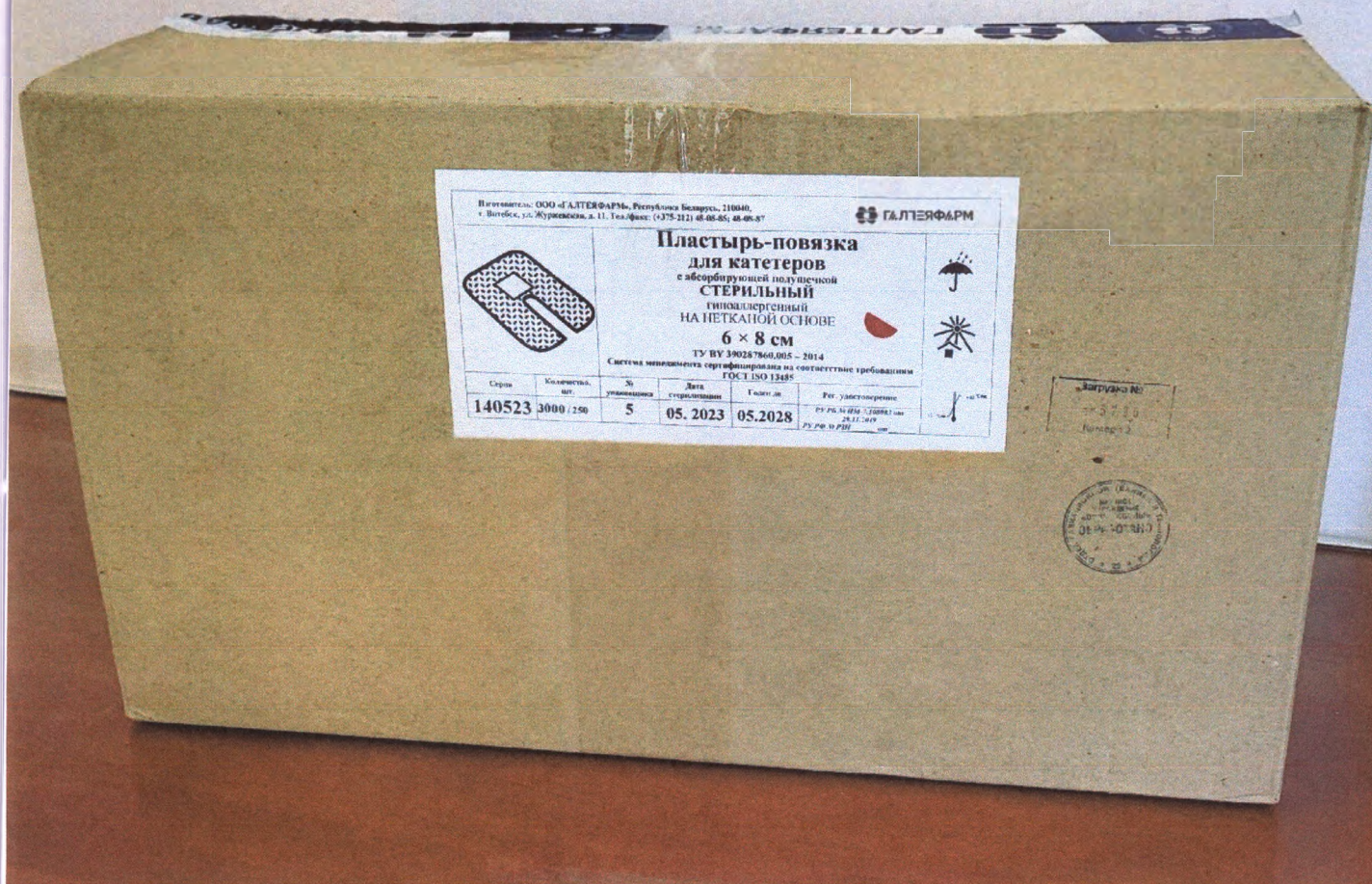

6. Внешний вид транспортной упаковки медицинского изделия при укладке групповых упаковок из картона в транспортную упаковку и пример маркировки транспортной упаковки при такой укладке

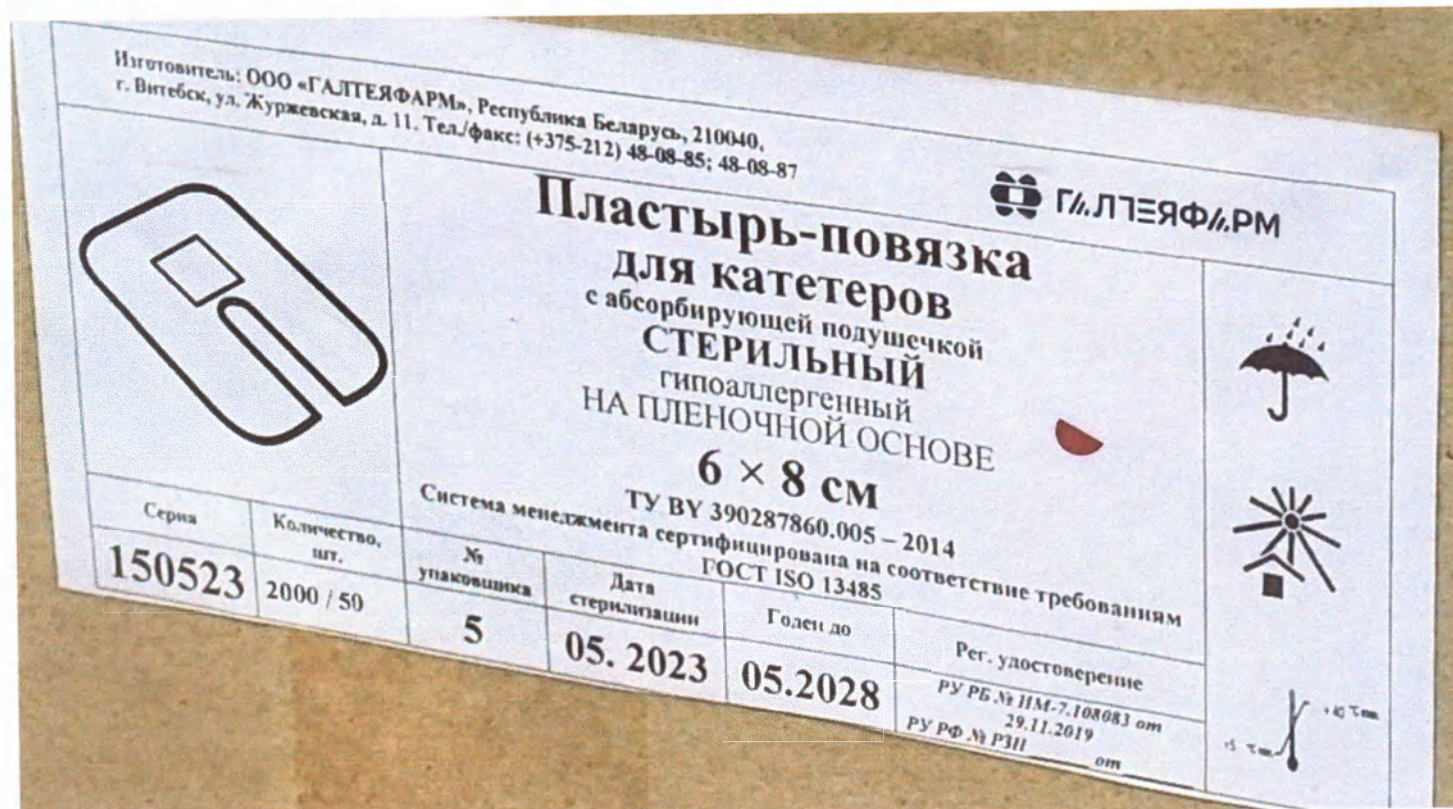

7. Внешний вид транспортной упаковки медицинского изделия при укладке групповых упаковок из пленки полиэтиленовой в транспортную упаковку и пример маркировки транспортной упаковки при такой укладке

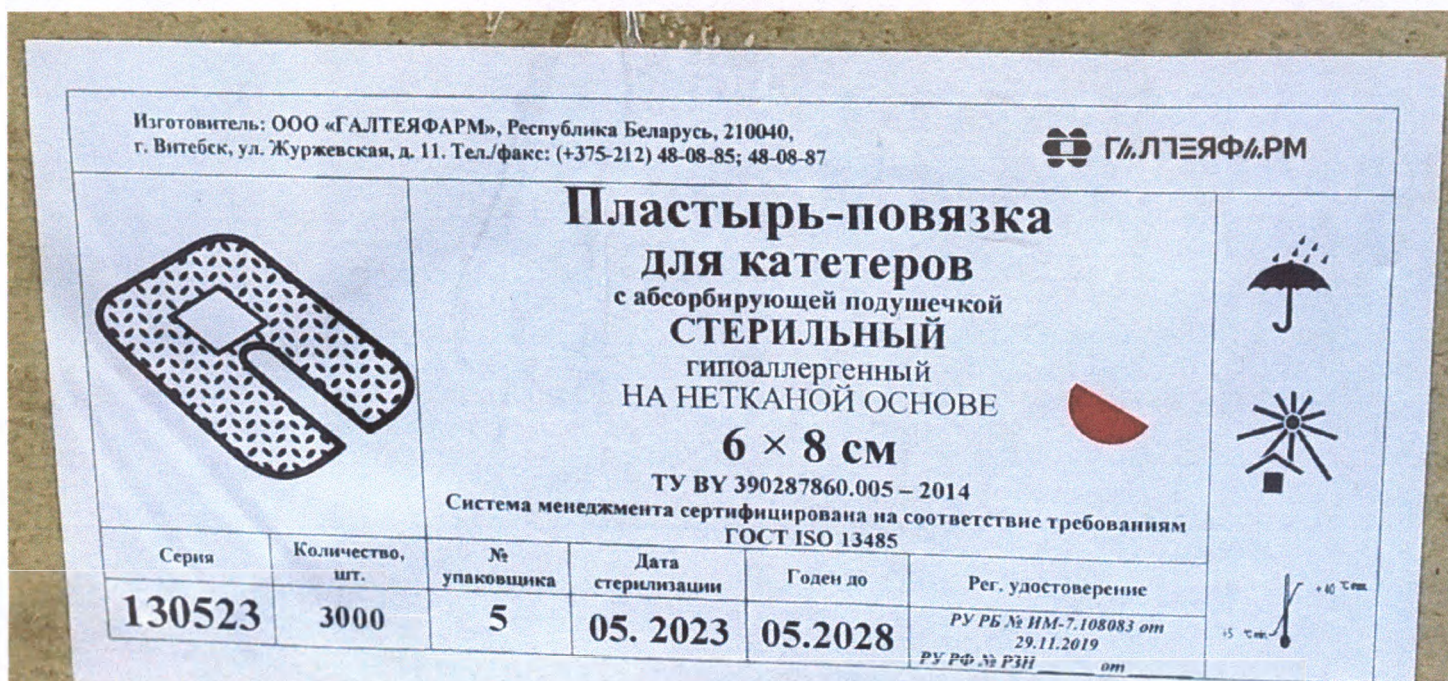

8. Внешний вид транспортной упаковки медицинского изделия при укладке в транспортную упаковку без групповой упаковки и пример маркировки транспортной упаковки при такой укладке

Директор

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ»



Евгений
Суровиков

Нотариус, свидетельствуя подлинность подписи на документе, не удостоверяет фактов, изложенных в настоящем документе.

Город Витебск, Витебская область, Республика Беларусь. Девятое сентября две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Каморник Оксана Анатольевна, нотариус Витебского нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятельности № 172, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 11 апреля 2014 г.) свидетельствую подлинность подписи директора Общества с ограниченной ответственностью "ГАЛТЕЯФАРМ" Юрченко Евгения Сергеевича, подписавшего документ в моем присутствии.

Личность Юрченко Е.С., подписавшего документ, установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2-147.

Взыскано нотариального тарифа 16 рублей.

Нотариус



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на 9
(девяти) листах.

Нотариус

