



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ФармИнформ»



Макарова О.Е.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения:

Изделия одноразовые для инфузионной терапии, производства Becton Dickinson Critical Care Systems Pte Ltd, Сингапур.

Назначение и характеристики изделия.

Изделия одноразовые для инфузионной терапии, производства Becton Dickinson Critical Care Systems Pte Ltd, Сингапур предназначены для построения линий инфузионной (трансфузионной терапии), безопасного запираания катеторов и вышеуказанных линий, представляют собой стерильное изделие однократного применения. Не содержат латекса.

Предназначены для забора и введения жидкостей (физраствора, раствора глюкозы, раствора антибиотика, лекарственных препаратов и пр.), поставляются в стерильных, апиrogenных поштучных упаковках, обеспечивают максимальное удобство работы персонала.

Такие изделия, как краники для вливаний, линии для мониторинга давления, переходник для множественных вливаний, клапан запирающий «Флосвич» служат для раздельного внутривенного вливания и инвазивного мониторинга. С помощью запирающего клапана «Флосвич» можно открывать и закрывать катетер одной рукой.

Область применения:

Общая клиническая медицина – для обеспечения процедуры инфузионной терапии.

Характеристики:

- обладают высокой пропускной способностью;
- очень удобны для фиксации на коже пациента;
- подвижность катетеров идеально сочетается с активностью пациента;
- предотвращает образование тромбов;
- при рентгенологических исследованиях – идентифицируются;
- имеют удобный клапан и запирающее устройство (типа «краник»), обеспечивающий быстрый и легкий доступ.

Предупреждение при использовании

Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена. Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции перед применением.

Неправильное применение может повлечь за собой травму пациента или его смерть.

Изделие предназначено для одноразового применения. Не использовать повторно.

Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия.

Это устройство должно использоваться и продаваться только как одноразовые принадлежности для осуществления процедуры инфузионно-трансфузионной терапии.

Процедуру должен проводить обученный персонал с ориентировкой на анатомию, технически грамотный и потенциально готовый к осложнениям.

Противопоказания:

Гиперчувствительность к компонентам изделия – является относительным противопоказанием.

Других противопоказаний нет.

Применение:

- Обработка рук персонала перед проведением инъекции – согласно принятому в клинике протоколу
- Обработка мест стыковки изделий – с применением дезинфицирующих растворов, применяющихся в клинике
- После применения – обязательная утилизация, аналогично шприцам однократного применения и катетерам внутривенным.

Упаковка: полиэтилен, бумага. Изделия поставляются в стерильных, апиrogenных поштучных упаковках.

Стерилизация: оксид этилена.

Утилизация: совместно с другими расходными материалами, контактировавшими с кровью, согласно принятого в клинике протокола.

Меры предосторожности:

- Не вынимать иглу до момента установки катетера;
- Никогда не вставлять иглу в катетер повторно;
- Не пытаться вынуть иглу до нажатия на белую «кнопку»;
- Не использовать режущие инструменты вблизи места венопункции;
- Обязательная дезинфекция места венопункции;
- Уничтожить иглу и медицинский мусор, согласно принятому в клинике протоколу.

Упаковка изделия.

Катетеры поставляются в стерильной поштучной упаковке из полиэтилена и бумаги.
Методы утилизации: согласно существующим нормативам. Катетеры утилизируются аналогично одноразовым шприцам.

Срок годности 3 года.

Внимание: Для снижения уровня риска заражением СПИДом или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с биологическими материалами со всеми пациентами.

Изделия одноразовые для инфузионной терапии, производства Becton Dickinson Critical Care Systems Pte Ltd, Сингапур.



Преимущества изделий:

- простота и удобство в использовании
- обладают высокой пропускной способностью;
- очень удобны для фиксации на коже пациента;
- подвижность катетеров идеально сочетается с подвижностью сосудов;
- предотвращает образование тромбов;
- имеют инъекционный клапан, обеспечивающий быстрый и легкий доступ.