


Ген.дир.
«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Центртехинформ»

Ген.дир. Болясова Н. Н.
« » 2010 г.

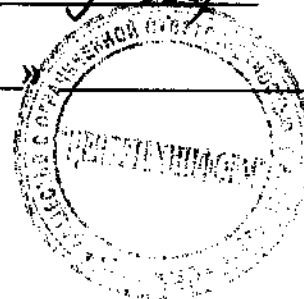

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия:

**«Зубы акриловые ACRY ROCK V, ACRY LUX V, ACRY PLUS
V» производства фирмы:**

«Dental Manufacturing S.p.A.», Италия

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральный директор
ООО «Центртехинформ»



Болясова Н. Н.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловые зубы используются для создания полностью съемных зубных протезов, съемных зубных протезов, мостовидных зубных протезов, лечебных протезов, устранения пустот в зубных рядах, улучшения лицевой формы и восстановления жевательной способности.

Внешний вид и форма соответствуют натуральным зубам.

Зубы изготавливаются путем горячего давления уникальными композитными металлическими литейными формами из полиметилметакрилата с взаимопроникающей сетевой структурой. Техника изготовления заключается в покрытии центра зуба слоями эмали.

Зубы изготовлены из одного и того же материала, а комплекты отличаются только количеством и геометрией форм, которые не влияют на функциональные свойства и номенклатуру показателей.

Зубы акриловые:

- ACRY ROCK V – двухслойные
- ACRY LUX V - трехслойные
- ACRY PLUS V - четырехслойные

Следующие ингредиенты входят в состав искусственных зубов различных форм, цветов и размеров:

Полиметилметакрилат	65 – 70 %
Метилметакрилат	30 – 32 %
Пигменты: окись железа и диоксид титана	< 0,25 %
Пероксид бензола	< 0,5 %

ACRU ROCK V.

Зубы для протезов из полиметилметакрилата с двумя цветовыми слоями. ACRY ROCK предлагаются в различных формах: овальные, треугольные, квадратные, имеют широкий диапазон размеров, соответствующий с большинству требований пациента.

Боковые зубы предлагаются в анатомически-геометрических вариантах исполнения (23 °-33 °) для быстрого и эстетичного изготовления протеза.

ACRY LUX V.

Зубы для протезов из полиметилметакрилата, трехслойные, имеют широкий диапазон цветов: 16 оттенков. Ассортимент: 25 форм верхних передних зубов, 12 форм нижних передних зубов и 16 форм боковых зубов. Передние зубы предлагаются в различных формах (а именно: овальные, треугольные,

квадратные) и имеют широкий диапазон размеров, соответствующий большинству требований пациентов. Боковые зубы предлагаются в анатомически-геометрических вариантах исполнения (20° - 33°) для быстрого и эстетичного изготовления протеза.

Используются для изготовления полных и частично съемных зубных протезов.

ACRY PLUS V.

Зубы для протезирования из полиметилметакрилата, четырехслойные.

ACRY PLUS V имеют четыре важные технологические особенности, которые определены продвинутыми системами производства при обработке измененных, высокомолекулярных полимеров:

- поднятая твердость
- превосходное сопротивление трению
- цветовая стабильность
- хорошее сопротивление прилипанию
- Acry PLUS выпускаются в следующих формах:
 - 22 верхних передних
 - 10 нижних передних
 - 5 верхних боковых
 - 5 нижних боковых

Зубы акриловые используются для создания полных и частично съемных зубных протезов, съемных зубных протезов, мостовидных зубных протезов, лечебных протезов, устранения пустот в зубных рядах, улучшения лицевой формы и восстановления жевательной способности.

2. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не обладают биологической активностью; могут безопасно находиться во рту долгое время; не имеют видимых трещин и любых других недостатков на срезе; обладают гладкой поверхностью с естественными буграми; отличаются хорошим соединением с зубной базисной пластмассой, не обесцвечиваются; не меняют форму и цвет; не трескаются под воздействием кипятка; при тестировании не меняют оттенок под воздействием облучения и ультрафиолета. Износостойкость и сопротивление коррозии отличные.

Использование высокомолекулярного полимера (полимера с высоким молекулярным весом) в купе с особыми поперечными молекулярными связями обеспечивает:

- дополнительную жесткость
- высокую абразивную устойчивость
- стабильность цвета
- высокую устойчивость к зубному налету

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Необходимо содержать зубы в чистоте, зачистить основу зуба для лучшего сцепления с зубной базисной пластмассой; использовать силикатный бор для полировки зубов после шлифовки для защиты от абсорбции; стоматолог обязан узнать у пациента, есть ли у него аллергия на РММА.

Необходимо выполнять ежедневные процедуры гигиены, не чистить щеткой с чрезмерным усилием для предотвращения износа в связи с истиранием, не погружать в щелочи, кислоты или другие вещества, которые являются агрессивными для акриловых материалов.

Изделие должно использоваться с соблюдением общепринятых в стоматологической практике процедур, и рекомендовано для конструкций, которые будут находиться во рту не менее 30 дней, т.е. когда рекомендованы фиксированные мостовидные протезы и восстановление зубного ряда искусственным способом.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Изделие должно использоваться с соблюдением общепринятых в стоматологической практике процедур, и рекомендовано для конструкций, которые будут находиться во рту не менее 30 дней, т.е. когда рекомендованы фиксированные мостовидные протезы и восстановление зубного ряда искусственным способом.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зубы акриловые упакованы в бумажные коробки. Могут поставляться наборами по 28 зубов, или отдельно верхние и нижние зубы.

Рекомендуется хранить при влажности воздуха менее 80% в хорошо вентилируемом месте, не допускать воздействия щелочей и газов. Хранить в чистоте, держать вдали от огня. Не допускается использование непрофессионалами и детьми.

Срок хранения 5 лет (зависит от точной даты производства).