



28th of May, 2024
«Approved»

Silvio Zilio
Director

Orthometric Industria e Comércio de
Produtos Médicos e Odontológicos LTDA.

ORTHOMETRIC
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDI:07740586000
170

Assinado de forma digital
por ORTHOMETRIC
INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS
MEDI:07740586000170
Dados: 2024.05.29
09:57:38 -03'00'

INSTRUCTION FOR USE OF MEDICAL DEVICE

Orthometric orthodontic archwires

Version 3

TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS

Reconheço P/ SEMELHANÇA SEM VL ECONOMICO a(s) firma(s) de:
SILVIO ZILIO,###

TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS

Ana Carolina Calixto
Escrevente

MARILIA-SP

126276

FIRMA 1

S10561AA0454564

Marília, 29 de Maio de 2024

R\$ 0,22 ANA CAROLINA CALIXTO(ESCREVENTE)

"VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE"

www.orthometric.com.br

Orthometric – indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda
CNPJ – 07.740.586/0001-70 | Inscrição Estadual – 438.227.414.110
Rua: Inneu Martins, 280 – Distrito do Lácio – Bairro: José Ferreira da Costa Junior
Município: Marília – SP CEP 17.539-059

1. Device name

Orthometric orthodontic archwires

i. Versions:

1. 51.10.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
2. 51.10.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
3. 51.10.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
4. 51.10.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
5. 51.10.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
6. 51.10.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, square section, size 0.016 * 0.016 - 10 pcs. per package;
7. 51.10.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016 * 0.022 - 10 pcs. per package;
8. 51.10.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
9. 51.10.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
10. 51.10.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
11. 51.10.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
12. 52.10.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 — 10 pcs. per package;
13. 52.10.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
14. 52.10.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
15. 52.10.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
16. 52.10.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
17. 52.10.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
18. 52.10.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
19. 52.10.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
20. 52.10.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
21. 52.10.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
22. 52.10.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
23. 51.11.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
24. 51.11.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
25. 51.11.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
26. 51.11.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
27. 51.11.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
28. 51.11.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;

29. 51.11.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
30. 51.11.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
31. 51.11.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
32. 51.11.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
33. 51.11.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
34. 52.11.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
35. 52.11.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
36. 52.11.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
37. 52.11.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
38. 52.11.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
39. 52.11.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
40. 52.11.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
41. 52.11.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
42. 52.11.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
43. 52.11.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
44. 52.11.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
45. 51.35.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
46. 51.35.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
47. 51.35.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
48. 51.35.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
49. 51.35.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
50. 51.35.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
51. 51.35.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
52. 51.35.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
53. 51.35.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
54. 51.35.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
55. 51.35.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
56. 52.35.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
57. 52.35.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
58. 52.35.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;

- 10 pcs. per package;
59. 52.35.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
 60. 52.35.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
 61. 52.35.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
 62. 52.35.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
 63. 52.35.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
 64. 52.35.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
 65. 52.35.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
 66. 52.35.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
 67. 51.36.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
 68. 51.36.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
 69. 51.36.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
 70. 51.36.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
 71. 51.36.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
 72. 51.36.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
 73. 51.36.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
 74. 51.36.2514 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 10 pcs. per package;
 75. 51.36.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
 76. 51.36.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
 77. 51.36.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
 78. 51.36.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
 79. 52.36.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
 80. 52.36.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
 81. 52.36.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
 82. 52.36.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
 83. 52.36.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
 84. 52.36.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
 85. 52.36.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
 86. 52.36.2514 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 10 pcs. per package;
 87. 52.36.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;

88. 52.36.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
89. 52.36.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
90. 52.36.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
91. 51.47.2012 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
92. 51.47.2014 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
93. 51.47.2016 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
94. 51.47.2018 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
95. 51.47.2216 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
96. 51.47.2514 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 10 pcs. per package;
97. 51.47.2516 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.025 - 10 pcs. per package;
98. 51.47.2517 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
99. 51.47.2518 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
100. 51.47.2519 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
101. 52.47.2012 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
102. 52.47.2014 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
103. 52.47.2016 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
104. 52.47.2018 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
105. 52.47.2216 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
106. 52.47.2514 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 10 pcs. per package;
107. 52.47.2516 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.025 - 10 pcs. per package;
108. 52.47.2517 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
109. 52.47.2518 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
110. 52.47.2519 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
111. 51.18.2012 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
112. 51.18.2014 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
113. 51.18.2016 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
114. 51.18.2018 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
115. 51.18.2020 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
116. 51.18.2116 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
117. 51.18.2216 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10

- pcs. per package;
118. 51.18.2517 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
 119. 51.18.2518 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
 120. 51.18.2519 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
 121. 51.18.2521 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
 122. 52.18.2012 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
 123. 52.18.2014 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
 124. 52.18.2016 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
 125. 52.18.2018 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
 126. 52.18.2020 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
 127. 52.18.2116 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
 128. 52.18.2216 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
 129. 52.18.2517 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
 130. 52.18.2518 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
 131. 52.18.2519 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
 132. 52.18.2521 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
 133. 51.15.1012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 1 pcs. per package;
 134. 51.15.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
 135. 51.15.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
 136. 51.15.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
 137. 51.15.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
 138. 51.15.1116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 1 pcs. per package;
 139. 51.15.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
 140. 51.15.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
 141. 51.15.1518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 1 pcs. per package;
 142. 51.15.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
 143. 51.15.1521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 1 pcs. per package;
 144. 52.15.1012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 1 pcs. per package;
 145. 52.15.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
 146. 52.15.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;

147. 52.15.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
148. 52.15.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
149. 52.15.1116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 1 pcs. per package;
150. 52.15.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
151. 52.15.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
152. 52.15.1518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 1 pcs. per package;
153. 52.15.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
154. 52.15.1521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 1 pcs. per package;
155. 51.19.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
156. 51.19.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
157. 51.19.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
158. 51.19.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
159. 51.19.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
160. 51.19.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
161. 51.19.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
162. 52.19.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
163. 52.19.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
164. 52.19.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
165. 52.19.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
166. 52.19.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
167. 52.19.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
168. 52.19.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
169. 51.48.1014 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
170. 51.48.1016 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
171. 51.48.1018 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
172. 51.48.1020 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
173. 51.48.1514 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 1 pcs. per package;
174. 51.48.1216 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
175. 51.48.1516 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.025 - 1 pcs. per package;
176. 51.48.1517 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size

- 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
177. 51.48.1519 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
 178. 52.48.1014 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
 179. 52.48.1016 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
 180. 52.48.1018 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
 181. 52.48.1020 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
 182. 52.48.1514 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 1 pcs. per package;
 183. 52.48.1216 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
 184. 52.48.1516 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.025 - 1 pcs. per package;
 185. 52.48.1517 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
 186. 52.48.1519 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
 187. 51.53.1018 SS RHODIUM arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
 188. 52.53.1018 SS RHODIUM arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
 189. 51.53.1517 SS RHODIUM arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
 190. 52.53.1517 SS RHODIUM arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
 191. 51.53.1519 SS RHODIUM arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
 192. 52.53.1519 SS RHODIUM arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
 193. 51.50.2012 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
 194. 51.50.2014 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
 195. 51.50.2016 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
 196. 51.50.2018 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
 197. 51.50.2020 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
 198. 51.50.2116 SS arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
 199. 51.50.2216 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
 200. 51.50.2517 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
 201. 51.50.2518 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
 202. 51.50.2519 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
 203. 51.50.2521 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
 204. 52.50.2012 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
 205. 52.50.2014 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
 206. 52.50.2016 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
 207. 52.50.2018 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
 208. 52.50.2020 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
 209. 52.50.2116 SS arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
 210. 52.50.2216 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
 211. 52.50.2517 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
 212. 52.50.2518 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
 213. 52.50.2519 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
 214. 52.50.2521 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
 215. 51.55.2216 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
 216. 51.55.2517 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
 217. 51.55.2518 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
 218. 51.55.2519 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
 219. 51.55.2521 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
 220. 52.55.2216 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
 221. 52.55.2517 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
 222. 52.55.2518 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
 223. 52.55.2519 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
 224. 52.55.2521 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;

225. 51.55.1518 SS RHODIUM BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 1 pcs. per package;
 226. 51.55.1519 SS RHODIUM BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
 227. 52.55.1518 SS RHODIUM BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 1 pcs. per package;
 228. 52.55.1519 SS RHODIUM BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package.

II. Instruction for use.

Hereinafter referred to as arch, orthodontic arch, FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch, FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch, FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch, FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch, FLEXY NITI COPPER ALX arch, FLEXY NITI REVERSE CURVE arch, FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch, FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch, SS RHODIUM arch, SS arch, SS BRAIDED arch, SS RHODIUM BRAIDED arch, device, medical device

2. Information about the manufacturer, developer and authorized representative of the manufacturer

Manufacturer:

Orthometric Industria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA
 Rua Irineu Martins, 280 – Bairro José Ferreira da Costa Junior (Lácio) – Marília, SP – Brazil-CEP: 17.539-059.
 Tel.: +55 14 3311-2741
 E-mail: sac@orthometric.com.br

Developer:

Orthometric Industria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA
 Rua Irineu Martins, 280 – Bairro José Ferreira da Costa Junior (Lácio) – Marília, SP – Brazil-CEP: 17.539-059.
 Tel.: +55 14 3311-2741
 E-mail: sac@orthometric.com.br

Authorized representative of manufacturer in the Russian Federation:

JSC PROTECO
 192102, St. Petersburg, Salova st. 57, build. 1, lit. I
 Tel./fax: +7 (812) 779-30-90
 E-mail: info@protecodent.ru

3. Classification

According to the Council of Europe Directive 93/42/EEC as reviewed and amended in accordance with Directive 2007/47/EC, Annex IX, Regulation 5, this device belongs to Class IIa.

4. Intended use of the medical device with indication of an intended user

4.1 Intended use of the medical device

The devices are used to fix brackets and buccal tubes during the treatment of malocclusion, and to align teeth horizontally and vertically.

4.2 User profile

Qualified specialists — orthodontists.

5. Indications, scope of use, contraindications, and potential adverse reactions

Indications: Orthodontic treatment required to correct malocclusion and misaligned teeth. The devices are used in the oral cavity together with brackets for the purpose of supportive orthodontic treatment in people by aligning the teeth in the dentition in order to achieve the correct position and bite.

Scope of use: dentistry (orthodontics).

Contraindications to use:

1. Do not use for patients with uncontrolled diabetes, systemic diseases or alcohol abuse;
2. Do not use for patients with bone or dental roots resorption;
3. Do not use for patients with allergies to metals (alloy components);
4. Do not use for patients with active periodontal disease;
5. Do not use for patients with inadequate oral hygiene;

Side effects: Discomfort, gum disease, bleeding gums, caries, staining of the tooth around the bracket, tooth root resorption, nerve degeneration within the tooth, ankylosis, trauma, otalgia, headaches, relapse of orthodontic disease, pain, pulp changes, gingivitis, loss of alveolar bone tissue, loss of attached gingival support, enamel decalcification, masticatory muscle pain, internal temporomandibular joint disk dysfunction, and degenerative temporomandibular joint diseases.

6. Precautions

1. Warning

- 1.1 The device is intended for use only by medical professionals and should not be used for purposes other than those specified in the intended purpose.
- 1.2 Prior to use, it is necessary to make sure that the patient is not allergic to metals (alloy components);
- 1.3 Do not use the device if its packaging is damaged.
- 1.4 The devices are recommended for use together with metal and ceramic brackets, and buccal tubes manufactured by Orthometric Industria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA (under registration).

2. General precautions

- 2.1. Do not apply excessive force when using.
- 2.2. Replace the disconnected device and fix a new one.
- 2.3. After re-fixation, install the device in the appropriate place for tooth correction in accordance with the judgments and instructions of a dentist.
- 2.4. Dispose of the replaced device.
- 2.5. Always observe the dentist's judgments and instructions when using the device.
- 2.6. Dispose of the device immediately after use.
- 2.7. Contact a specialist in case a biological compatibility reaction occurs after device use.

7. Description

- 7.2.1 Depending on the version, the FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch is available in round, square or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw. The arch is made of nickel-titanium alloy.
- 7.2.2 The FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch is available in round, square or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw and is made of nickel-titanium alloy.
- 7.2.3 The FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch is available in round, square or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw and is made of nickel-titanium alloy.
- 7.2.4 The FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch is available in round, square or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw. The arch is made of nickel-titanium alloy. This device uses the nickel-titanium alloy capability to restore its original shape when heated to a certain temperature.
- 7.2.5 The FLEXY NITI COPPER ALX arch is available in round or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw. The arch is made of nickel-titanium alloy with addition of copper.
- 7.2.6 The FLEXY NITI REVERSE CURVE arch is available in round, square or rectangular cross - section. The arch is installed on the upper or lower jaw and is made of nickel-titanium alloy.
- 7.2.7 The FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch is available in round, square or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw and is made of nickel-titanium alloy.
- 7.2.8 The FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch is available in round or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw and is made of nickel-titanium alloy.
- 7.2.9 The FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch is available in round or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw and is made of nickel-titanium alloy with addition of copper.
- 7.2.10 The SS arch is available in round, square or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw and is made of stainless steel.
- 7.2.11 The SS RHODIUM arch is available in round or rectangular cross-section. The arch is installed on the upper or lower jaw and is made of rhodium-plated stainless steel.
- 7.2.12 The SS BRAIDED arch is made of several braided stainless steel threads and has a rectangular cross-section. It is installed on the upper or lower jaw.
- 7.2.13 The SS RHODIUM BRAIDED arch is made of several braided rhodium-plated stainless steel threads. The arch has a rectangular cross-section. It is installed on the upper or lower jaw.

8. Application procedure

1. Open the product packaging immediately before use in a patient, not beforehand, and check the product for damage, impurities or foreign substances, and, if any, do not use the product.
2. The steps below should be performed only by a dental professional qualified in orthodontics.
3. Select an orthodontic arch to be used.
4. Insert the selected orthodontic arch.
5. Fix the arch with a wire.
6. Trim the remaining wire distal to the lock using cutting forceps in order to prevent injury to the patient's soft tissue.

9. Main technical specifications

FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.10.2012	52.10.2012	Round	0,31
51.10.2014	52.10.2014	Round	0,36
51.10.2016	52.10.2016	Round	0,41
51.10.2018	52.10.2018	Round	0,46
51.10.2020	52.10.2020	Round	0,51
51.10.2116	52.10.2116	Square	0,41×0,41
51.10.2216	52.10.2216	Rectangular	0,41×0,55
51.10.2517	52.10.2517	Rectangular	0,43×0,63
51.10.2518	52.10.2518	Rectangular	0,46×0,63
51.10.2519	52.10.2519	Rectangular	0,48×0,63
51.10.2521	52.10.2521	Rectangular	0,53×0,63

FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.11.2012	52.11.2012	Round	0,31
51.11.2014	52.11.2014	Round	0,36
51.11.2016	52.11.2016	Round	0,41
51.11.2018	52.11.2018	Round	0,46
51.11.2020	52.11.2020	Round	0,51
51.11.2116	52.11.2116	Square	0,41×0,41
51.11.2216	52.11.2216	Rectangular	0,41×0,55
51.11.2517	52.11.2517	Rectangular	0,43×0,63
51.11.2518	52.11.2518	Rectangular	0,46×0,63
51.11.2519	52.11.2519	Rectangular	0,48×0,63
51.11.2521	52.11.2521	Rectangular	0,53×0,63

FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.35.2012	52.35.2012	Round	0,31
51.35.2014	52.35.2014	Round	0,36
51.35.2016	52.35.2016	Round	0,41
51.35.2018	52.35.2018	Round	0,46
51.35.2020	52.35.2020	Round	0,51
51.35.2116	52.35.2116	Square	0,41×0,41
51.35.2216	52.35.2216	Rectangular	0,41×0,55
51.35.2517	52.35.2517	Rectangular	0,43×0,63
51.35.2518	52.35.2518	Rectangular	0,46×0,63
51.35.2519	52.35.2519	Rectangular	0,48×0,63
51.35.2521	52.35.2521	Rectangular	0,53×0,63

FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		

51.36.2012	52.36.2012	Round	0,31
51.36.2014	52.36.2014	Round	0,36
51.36.2016	52.36.2016	Round	0,41
51.36.2018	52.36.2018	Round	0,46
51.36.2020	52.36.2020	Round	0,51
51.36.2116	52.36.2116	Square	0,41×0,41
51.36.2216	52.36.2216	Rectangular	0,41×0,55
51.36.2514	52.36.2514	Rectangular	0,36×0,63
51.36.2517	52.36.2517	Rectangular	0,43×0,63
51.36.2518	52.36.2518	Rectangular	0,46×0,63
51.36.2519	52.36.2519	Rectangular	0,48×0,63
51.36.2521	52.36.2521	Rectangular	0,53×0,63

FLEXY NITI COPPER ALX arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.47.2012	52.47.2012	Round	0,31
51.47.2014	52.47.2014	Round	0,36
51.47.2016	52.47.2016	Round	0,41
51.47.2018	52.47.2018	Round	0,46
51.47.2216	52.47.2216	Rectangular	0,41×0,55
51.47.2514	52.47.2514	Rectangular	0,36×0,63
51.47.2516	52.47.2516	Rectangular	0,41×0,63
51.47.2517	52.47.2517	Rectangular	0,43×0,63
51.47.2518	52.47.2518	Rectangular	0,46×0,63
51.47.2519	52.47.2519	Rectangular	0,48×0,63

FLEXY NITI REVERSE CURVE arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.18.2012	52.18.2012	Round	0,31
51.18.2014	52.18.2014	Round	0,36
51.18.2016	52.18.2016	Round	0,41
51.18.2018	52.18.2018	Round	0,46
51.18.2020	52.18.2020	Round	0,51
51.18.2116	52.18.2116	Square	0,41×0,41
51.18.2216	52.18.2216	Rectangular	0,41×0,55
51.18.2517	52.18.2517	Rectangular	0,43×0,63
51.18.2518	52.18.2518	Rectangular	0,46×0,63
51.18.2519	52.18.2519	Rectangular	0,48×0,63
51.18.2521	52.18.2521	Rectangular	0,53×0,63

FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.15.1012	52.15.1012	Round	0,31
51.15.1014	52.15.1014	Round	0,36
51.15.1016	52.15.1016	Round	0,41
51.15.1018	52.15.1018	Round	0,46
51.15.1020	52.15.1020	Round	0,51
51.15.1116	52.15.1116	Square	0,41×0,41
51.15.1216	52.15.1216	Rectangular	0,41×0,55
51.15.1517	52.15.1517	Rectangular	0,43×0,63
51.15.1518	52.15.1518	Rectangular	0,46×0,63
51.15.1519	52.15.1519	Rectangular	0,48×0,63
51.15.1521	52.15.1521	Rectangular	0,53×0,63

FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		

51.19.1014	52.19.1014	Round	0,36
51.19.1016	52.19.1016	Round	0,41
51.19.1018	52.19.1018	Round	0,46
51.19.1020	52.19.1020	Round	0,51
51.19.1216	52.19.1216	Rectangular	0,41×0,55
51.19.1517	52.19.1517	Rectangular	0,43×0,63
51.19.1519	52.19.1519	Rectangular	0,48×0,63

Arch FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.48.1014	52.48.1014	Round	0,36
51.48.1016	52.48.1016	Round	0,41
51.48.1018	52.48.1018	Round	0,46
51.48.1020	52.48.1020	Round	0,51
51.48.1514	52.48.1514	Rectangular	0,36×0,63
51.48.1216	52.48.1216	Rectangular	0,41×0,55
51.48.1516	52.48.1516	Rectangular	0,41×0,63
51.48.1517	52.48.1517	Rectangular	0,43×0,63
51.48.1519	52.48.1519	Rectangular	0,48×0,63

SS RHODIUM arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.53.1018	52.53.1018	Round	0,46
51.53.1517	52.53.1517	Rectangular	0,43×0,63
51.53.1519	52.53.1519	Rectangular	0,48×0,63

SS arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.50.2012	52.50.2012	Round	0,31
51.50.2014	52.50.2014	Round	0,36
51.50.2016	52.50.2016	Round	0,41
51.50.2018	52.50.2018	Round	0,46
51.50.2020	52.50.2020	Round	0,51
51.50.2116	52.50.2116	Square	0,41×0,41
51.50.2216	52.50.2216	Rectangular	0,41×0,55
51.50.2517	52.50.2517	Rectangular	0,43×0,63
51.50.2518	52.50.2518	Rectangular	0,48×0,63
51.50.2519	52.50.2519	Rectangular	0,48×0,63
51.50.2521	52.50.2521	Rectangular	0,53×0,63

SS BRAIDED arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.55.2216	52.55.2216	Rectangular	0,41×0,55
51.55.2517	52.55.2517	Rectangular	0,43×0,63
51.55.2518	52.55.2518	Rectangular	0,46×0,63
51.55.2519	52.55.2519	Rectangular	0,48×0,63
51.55.2521	52.55.2521	Rectangular	0,53×0,63

SS RHODIUM BRAIDED arch

Item number		Cross-section type	Arch cross-section. mm
Upper	Lower		
51.55.1518	52.55.1518	Rectangular	0,46×0,63
51.55.1519	52.55.1519	Rectangular	0,48×0,63

10. Product materials

The Orthometric orthodontic arch is a disposable product. Long-term contact product (duration of contact is more than 30 days). Contact with the human body – Oral mucosa

FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch	Nitinol wire
FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch	
FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch	
FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch	
FLEXY NITI REVERSE CURVE arch	Plated Nitinol wire
FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch	
FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch	Nickel-titanium alloy with addition of copper
FLEXY NITI COPPER ALX arch	
FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch	Plated Nickel-titanium alloy with addition of copper
SS arch	Stainless steel wire
SS BRAIDED arch	
SS RHODIUM arch	Plated Stainless steel wire
SS RHODIUM BRAIDED arch	

11. Scope of Supply.

Orthometric orthodontic archwires

I. Versions:

- 51.10.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, square section, size 0.016 * 0.016 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016 * 0.022 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
- 51.10.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
- 52.10.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 — 10 pcs. per package;
- 52.10.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
- 52.10.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
- 52.10.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
- 52.10.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
- 52.10.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
- 52.10.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;

19. 52.10.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
20. 52.10.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
21. 52.10.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
22. 52.10.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
23. 51.11.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
24. 51.11.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
25. 51.11.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
26. 51.11.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
27. 51.11.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
28. 51.11.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
29. 51.11.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
30. 51.11.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
31. 51.11.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
32. 51.11.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
33. 51.11.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
34. 52.11.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
35. 52.11.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
36. 52.11.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
37. 52.11.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
38. 52.11.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
39. 52.11.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
40. 52.11.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
41. 52.11.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
42. 52.11.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
43. 52.11.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
44. 52.11.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
45. 51.35.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;

46. 51.35.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
47. 51.35.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
48. 51.35.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
49. 51.35.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
50. 51.35.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
51. 51.35.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
52. 51.35.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
53. 51.35.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
54. 51.35.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
55. 51.35.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
56. 52.35.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
57. 52.35.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
58. 52.35.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
59. 52.35.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
60. 52.35.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
61. 52.35.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
62. 52.35.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
63. 52.35.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
64. 52.35.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
65. 52.35.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
66. 52.35.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
67. 51.36.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
68. 51.36.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
69. 51.36.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
70. 51.36.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
71. 51.36.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
72. 51.36.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;

73. 51.36.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
74. 51.36.2514 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 10 pcs. per package;
75. 51.36.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
76. 51.36.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
77. 51.36.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
78. 51.36.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
79. 52.36.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
80. 52.36.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
81. 52.36.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
82. 52.36.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
83. 52.36.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
84. 52.36.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
85. 52.36.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
86. 52.36.2514 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 10 pcs. per package;
87. 52.36.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
88. 52.36.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
89. 52.36.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
90. 52.36.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
91. 51.47.2012 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
92. 51.47.2014 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
93. 51.47.2016 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
94. 51.47.2018 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
95. 51.47.2216 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
96. 51.47.2514 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 10 pcs. per package;
97. 51.47.2516 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.025 - 10 pcs. per package;
98. 51.47.2517 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
99. 51.47.2518 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;

100. 51.47.2519 FLEXY NITI COPPER ALX arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
101. 52.47.2012 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
102. 52.47.2014 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
103. 52.47.2016 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
104. 52.47.2018 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
105. 52.47.2216 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
106. 52.47.2514 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 10 pcs. per package;
107. 52.47.2516 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.025 - 10 pcs. per package;
108. 52.47.2517 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
109. 52.47.2518 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
110. 52.47.2519 FLEXY NITI COPPER ALX arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
111. 51.18.2012 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
112. 51.18.2014 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
113. 51.18.2016 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
114. 51.18.2018 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
115. 51.18.2020 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
116. 51.18.2116 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
117. 51.18.2216 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
118. 51.18.2517 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
119. 51.18.2518 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
120. 51.18.2519 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
121. 51.18.2521 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
122. 52.18.2012 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
123. 52.18.2014 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
124. 52.18.2016 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
125. 52.18.2018 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
126. 52.18.2020 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;

127. 52.18.2116 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
128. 52.18.2216 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
129. 52.18.2517 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
130. 52.18.2518 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
131. 52.18.2519 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
132. 52.18.2521 FLEXY NITI REVERSE CURVE arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
133. 51.15.1012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 1 pcs. per package;
134. 51.15.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
135. 51.15.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
136. 51.15.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
137. 51.15.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
138. 51.15.1116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 1 pcs. per package;
139. 51.15.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
140. 51.15.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
141. 51.15.1518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 1 pcs. per package;
142. 51.15.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
143. 51.15.1521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 1 pcs. per package;
144. 52.15.1012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 1 pcs. per package;
145. 52.15.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
146. 52.15.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
147. 52.15.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
148. 52.15.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
149. 52.15.1116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 1 pcs. per package;
150. 52.15.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
151. 52.15.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
152. 52.15.1518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 1 pcs. per package;
153. 52.15.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;

154. 52.15.1521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 1 pcs. per package;
155. 51.19.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
156. 51.19.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
157. 51.19.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
158. 51.19.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
159. 51.19.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
160. 51.19.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
161. 51.19.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
162. 52.19.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
163. 52.19.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
164. 52.19.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
165. 52.19.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
166. 52.19.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
167. 52.19.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
168. 52.19.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
169. 51.48.1014 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
170. 51.48.1016 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
171. 51.48.1018 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
172. 51.48.1020 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
173. 51.48.1514 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 1 pcs. per package;
174. 51.48.1216 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
175. 51.48.1516 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.025 - 1 pcs. per package;
176. 51.48.1517 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
177. 51.48.1519 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
178. 52.48.1014 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 1 pcs. per package;
179. 52.48.1016 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 1 pcs. per package;
180. 52.48.1018 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;

181. 52.48.1020 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 1 pcs. per package;
182. 52.48.1514 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.014*0.025 - 1 pcs. per package;
183. 52.48.1216 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 1 pcs. per package;
184. 52.48.1516 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.025 - 1 pcs. per package;
185. 52.48.1517 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
186. 52.48.1519 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
187. 51.53.1018 SS RHODIUM arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
188. 52.53.1018 SS RHODIUM arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 1 pcs. per package;
189. 51.53.1517 SS RHODIUM arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
190. 52.53.1517 SS RHODIUM arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 1 pcs. per package;
191. 51.53.1519 SS RHODIUM arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
192. 52.53.1519 SS RHODIUM arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
193. 51.50.2012 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
194. 51.50.2014 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
195. 51.50.2016 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
196. 51.50.2018 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
197. 51.50.2020 SS arch for upper teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
198. 51.50.2116 SS arch for upper teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
199. 51.50.2216 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
200. 51.50.2517 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
201. 51.50.2518 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
202. 51.50.2519 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
203. 51.50.2521 SS arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
204. 52.50.2012 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.012 - 10 pcs. per package;
205. 52.50.2014 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.014 - 10 pcs. per package;
206. 52.50.2016 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.016 - 10 pcs. per package;
207. 52.50.2018 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.018 - 10 pcs. per package;
208. 52.50.2020 SS arch for lower teeth, round cross-section, size 0.020 - 10 pcs. per package;
209. 52.50.2116 SS arch for lower teeth, square section, size 0.016*0.016 - 10 pcs. per package;
210. 52.50.2216 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
211. 52.50.2517 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
212. 52.50.2518 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
213. 52.50.2519 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
214. 52.50.2521 SS arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
215. 51.55.2216 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
216. 51.55.2517 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
217. 51.55.2518 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
218. 51.55.2519 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;

219. 51.55.2521 SS BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
220. 52.55.2216 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.016*0.022 - 10 pcs. per package;
221. 52.55.2517 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.017*0.025 - 10 pcs. per package;
222. 52.55.2518 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 10 pcs. per package;
223. 52.55.2519 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 10 pcs. per package;
224. 52.55.2521 SS BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.021*0.025 - 10 pcs. per package;
225. 51.55.1518 SS RHODIUM BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 1 pcs. per package;
226. 51.55.1519 SS RHODIUM BRAIDED arch for upper teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package;
227. 52.55.1518 SS RHODIUM BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.018*0.025 - 1 pcs. per package;
228. 52.55.1519 SS RHODIUM BRAIDED arch for lower teeth, rectangular section, size 0.019*0.025 - 1 pcs. per package.

II. Instruction for use.

12. The meaning of symbols used for package labeling

	Batch number		Reference number (article)
	Manufacturing date		Manufacturer
	Consult instructions for use		Non-sterile
	Keep dry		Keep away from sunlight
	Contains nickel		Do not use if the package is damaged
	Do not reuse		Use-by date

13. Conditions of storage, transportation and operation.

<u>Transportation conditions</u>	- temperature: from -60 °C to 60 °C, - relative humidity: from 20% to 95%, - atmospheric pressure: 800–1060 hPa
<u>Storage conditions</u>	- temperature: from 0 °C to 60 °C, - relative humidity: from 20% to 95%, - atmospheric pressure: 800–1060 hPa
<u>Operating conditions</u>	- temperature: from 15 °C to 30 °C, - relative humidity: from 20% to 95%, - atmospheric pressure: 800–1060 hPa.

14. Cleaning, disinfection and sterilization of the product

Medical devices are intended for single use and are delivered non-sterile.

Before installation, the medical device must be disinfected with 70% ethyl alcohol.

15. Disposal

Medical devices must be disposed of in compliance with medical procedures established at healthcare institutions and local, state or federal standards. The choice of safe disposal and destruction methods for the devices depends on healthcare organization capacity and profile, availability of waste disinfection/neutralization units, and waste neutralization/destruction methods established in the administrative area (burning, removal to landfills, recycling).

The medical device is classified as epidemiologically hazardous waste (products contaminated with blood and/or other biological fluids of patients, and products that come into contact with patients with infectious diseases). In this case, a medical organization performs only collection and temporary storage of the above waste. Waste is collected to single-use bags or containers with color marking adopted for hazardous medical waste in a room or in places for temporary storage of medical waste before further transportation to a destruction or disposal site. Accessories for products that come into contact with the patient must be pre-cleaned and disinfected in the prescribed manner before their disposal. Transportation of medical waste (used implants or components) from medical institutions, and their disposal is carried out by specialized organizations having a license to handle epidemiologically hazardous medical waste.

Consumer package and rejected devices belong to epidemiologically safe waste (non-hazardous waste not contacting with biological fluids of patients, infectious patients), close in composition to solid household waste (SHW). However, it is recommended to dispose of them separately as industrial waste through specialized organizations licensed for this type of activity.

16. Shelf life

The shelf life of devices is not limited.

17. Maintenance and repair

The device is disposable, does not require maintenance.

18. List of international standards that the medical device complies with

EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN ISO 10993-1; EN ISO 10993-3; EN ISO 10993-5; EN ISO 10993-10; EN ISO 10993-11; EN 16:2009; EN ISO 75; EN ISO 27020; EN ISO 10271; EN 62366:2008; EN ISO 15223-1; EN 10; MEDDEV 2.7/1 Pед. 4; MEDDEV 2.12/1 Pед. 8; MEDDEV 2.12/2 Pед. 2; ISTA 2017 2A; EN ISO 158.

Note: The latest versions of standards should be used: the organization should maintain and update the list of reference standards as a record of its own management system in compliance with ISO 13485.

[Перевод с английского и португальского языков на русский язык]

[Логотип: «ОРТОМЕТРИК®» (ORTHOMETRIC®) Помогая миру улыбаться]

28 мая 2024 г.

«Утверждено»

[Штамп: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА КАМАРИНЬЯ]

/подпись/ (подпись)

Сильвио Зилио (Silvio Zilio)

Директор

ООО «Ортометрик Индустрия е Комерсио

де Produtos Medicos e Odontologicos»

(Orthometric Industria e Comércio de

Produtos Médicos e Odontológicos LTDA.)

ООО «ОРТОМЕТРИК
ИНДУСТРИА Е КОМЕРСИО ДЕ
ПРОДУТОС»
ИНН: 07740586000170

Подписано электронной подписью
ООО «ОРТОМЕТРИК ИНДУСТРИА Е
КОМЕРСИО ДЕ ПРОДУТОС»
ИНН: 07740586000170
Дата: 29.05.2024 г. 10:07:44 – 03'00"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Дуги ортодонтические Orthometric

Версия 3

[Штамп: ТРЕТЬЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПО ЗАВЕРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ,
ОПРОТЕСТОВАНИЮ ВЕКСЕЛЕЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ]

Руа Баия, № 162 – Центр – Марилья, Сан-Паулу (Rua Bahia. nº 162 – Centro – Marília, SP), тел./факс (14)
3413-1000 – Нотариус Жозуэ Гимаранс Камаринья (Josue Guimaraes Camarinia)

Признаю ПО СХОДСТВУ на документе без экономической ценности подпись
СИЛЬВИО ЗИЛИО***

Марилья, 29 мая 2024 г.

8,22 реала АНА КАРОЛИНА КАЛИКСТО (ANA CAROLINA CALIXTO) (ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ)

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО С МАРКОЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПОДЛИННОСТЬ»]

/подпись/

[Штамп: ТРЕТЬЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА, Ана Каролина Каликсто, делопроизводитель, МАРИЛЬЯ
– САН-ПАУЛУ]

[Марка: Нотариальная палата Бразилии, Отделение Сан-Паулу, 126276, ПОДПИСЬ 1

[QR-код] S10561AA0454564]

www.orthometric.com.br

ООО «Ортометрик Индустрия е Комерсио де Produtos Medicos e Odontologicos»

Номер в Государственном реестре юридических лиц (CNPJ) – 07.740.586/0001-70 | Государственная регистрация – 438.227.414.110
Улица Иринеу Мартинс, 280, округ Ляшю, район Жосе Феррейра да Коста Жунior, муниципалитет Марилья, штат Сан-Паулу, индекс 17.539-059
(Rua: Irineu Martins, 280 – Distrito de Lácio – Bairro: José Ferreira da Costa Junior – Município: Marília – SP CEP: 17.539-059)

1. Наименование изделия

Дуги ортодонтические Orthometric

1. Вариант исполнения:

1. Дуга 51.10.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
2. Дуга 51.10.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
3. Дуга 51.10.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
4. Дуга 51.10.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
5. Дуга 51.10.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
6. Дуга 51.10.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
7. Дуга 51.10.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
8. Дуга 51.10.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
9. Дуга 51.10.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
10. Дуга 51.10.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
11. Дуга 51.10.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
12. Дуга 52.10.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
13. Дуга 52.10.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
14. Дуга 52.10.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
15. Дуга 52.10.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
16. Дуга 52.10.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
17. Дуга 52.10.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
18. Дуга 52.10.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
19. Дуга 52.10.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
20. Дуга 52.10.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
21. Дуга 52.10.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
22. Дуга 52.10.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
23. Дуга 51.11.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
24. Дуга 51.11.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
25. Дуга 51.11.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
26. Дуга 51.11.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
27. Дуга 51.11.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
28. Дуга 51.11.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;

29. Дуга 51.11.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
30. Дуга 51.11.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
31. Дуга 51.11.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
32. Дуга 51.11.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
33. Дуга 51.11.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
34. Дуга 52.11.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
35. Дуга 52.11.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
36. Дуга 52.11.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
37. Дуга 52.11.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
38. Дуга 52.11.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
39. Дуга 52.11.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
40. Дуга 52.11.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
41. Дуга 52.11.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
42. Дуга 52.11.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
43. Дуга 52.11.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
44. Дуга 52.11.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
45. Дуга 51.35.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
46. Дуга 51.35.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
47. Дуга 51.35.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
48. Дуга 51.35.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
49. Дуга 51.35.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
50. Дуга 51.35.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
51. Дуга 51.35.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
52. Дуга 51.35.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
53. Дуга 51.35.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
54. Дуга 51.35.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
55. Дуга 51.35.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
56. Дуга 52.35.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
57. Дуга 52.35.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
58. Дуга 52.35.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер

- 0,016 - 10 шт. в упаковке;
59. Дуга 52.35.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
60. Дуга 52.35.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
61. Дуга 52.35.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
62. Дуга 52.35.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
63. Дуга 52.35.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
64. Дуга 52.35.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
65. Дуга 52.35.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
66. Дуга 52.35.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
67. Дуга 51.36.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
68. Дуга 51.36.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
69. Дуга 51.36.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
70. Дуга 51.36.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
71. Дуга 51.36.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
72. Дуга 51.36.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
73. Дуга 51.36.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
74. Дуга 51.36.2514 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 10 шт. в упаковке;
75. Дуга 51.36.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
76. Дуга 51.36.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
77. Дуга 51.36.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
78. Дуга 51.36.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
79. Дуга 52.36.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
80. Дуга 52.36.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
81. Дуга 52.36.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
82. Дуга 52.36.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
83. Дуга 52.36.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
84. Дуга 52.36.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
85. Дуга 52.36.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
86. Дуга 52.36.2514 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 10 шт. в упаковке;
87. Дуга 52.36.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;

88. Дуга 52.36.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
89. Дуга 52.36.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
90. Дуга 52.36.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
91. Дуга 51.47.2012 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
92. Дуга 51.47.2014 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
93. Дуга 51.47.2016 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
94. Дуга 51.47.2018 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
95. Дуга 51.47.2216 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
96. Дуга 51.47.2514 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 10 шт. в упаковке;
97. Дуга 51.47.2516 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,025 - 10 шт. в упаковке;
98. Дуга 51.47.2517 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
99. Дуга 51.47.2518 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
100. Дуга 51.47.2519 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
101. Дуга 52.47.2012 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
102. Дуга 52.47.2014 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
103. Дуга 52.47.2016 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
104. Дуга 52.47.2018 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
105. Дуга 52.47.2216 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
106. Дуга 52.47.2514 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 10 шт. в упаковке;
107. Дуга 52.47.2516 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,025 - 10 шт. в упаковке;
108. Дуга 52.47.2517 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
109. Дуга 52.47.2518 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
110. Дуга 52.47.2519 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
111. Дуга 51.18.2012 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
112. Дуга 51.18.2014 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
113. Дуга 51.18.2016 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
114. Дуга 51.18.2018 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
115. Дуга 51.18.2020 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
116. Дуга 51.18.2116 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
117. Дуга 51.18.2216 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер

- 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
118. Дуга 51.18.2517 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
119. Дуга 51.18.2518 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
120. Дуга 51.18.2519 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
121. Дуга 51.18.2521 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
122. Дуга 52.18.2012 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
123. Дуга 52.18.2014 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
124. Дуга 52.18.2016 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
125. Дуга 52.18.2018 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
126. Дуга 52.18.2020 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
127. Дуга 52.18.2116 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
128. Дуга 52.18.2216 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
129. Дуга 52.18.2517 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
130. Дуга 52.18.2518 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
131. Дуга 52.18.2519 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
132. Дуга 52.18.2521 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
133. Дуга 51.15.1012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 1 шт. в упаковке;
134. Дуга 51.15.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
135. Дуга 51.15.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
136. Дуга 51.15.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
137. Дуга 51.15.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
138. Дуга 51.15.1116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 1 шт. в упаковке;
139. Дуга 51.15.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
140. Дуга 51.15.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
141. Дуга 51.15.1518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 1 шт. в упаковке;
142. Дуга 51.15.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
143. Дуга 51.15.1521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 1 шт. в упаковке;
144. Дуга 52.15.1012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 1 шт. в упаковке;
145. Дуга 52.15.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
146. Дуга 52.15.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;

147. Дуга 52.15.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
148. Дуга 52.15.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
149. Дуга 52.15.1116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 1 шт. в упаковке;
150. Дуга 52.15.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
151. Дуга 52.15.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
152. Дуга 52.15.1518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 1 шт. в упаковке;
153. Дуга 52.15.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
154. Дуга 52.15.1521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 1 шт. в упаковке;
155. Дуга 51.19.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
156. Дуга 51.19.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
157. Дуга 51.19.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
158. Дуга 51.19.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
159. Дуга 51.19.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
160. Дуга 51.19.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
161. Дуга 51.19.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
162. Дуга 52.19.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
163. Дуга 52.19.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
164. Дуга 52.19.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
165. Дуга 52.19.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
166. Дуга 52.19.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
167. Дуга 52.19.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
168. Дуга 52.19.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
169. Дуга 51.48.1014 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
170. Дуга 51.48.1016 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
171. Дуга 51.48.1018 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
172. Дуга 51.48.1020 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
173. Дуга 51.48.1514 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 1 шт. в упаковке;
174. Дуга 51.48.1216 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
175. Дуга 51.48.1516 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,025 - 1 шт. в упаковке;
176. Дуга 51.48.1517 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение,

- размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
177. Дуга 51.48.1519 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
 178. Дуга 52.48.1014 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
 179. Дуга 52.48.1016 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
 180. Дуга 52.48.1018 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
 181. Дуга 52.48.1020 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
 182. Дуга 52.48.1514 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 1 шт. в упаковке;
 183. Дуга 52.48.1216 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
 184. Дуга 52.48.1516 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,025 - 1 шт. в упаковке;
 185. Дуга 52.48.1517 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
 186. Дуга 52.48.1519 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
 187. Дуга 51.53.1018 SS RHODIUM для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
 188. Дуга 52.53.1018 SS RHODIUM для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
 189. Дуга 51.53.1517 SS RHODIUM для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
 190. Дуга 52.53.1517 SS RHODIUM для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
 191. Дуга 51.53.1519 SS RHODIUM для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
 192. Дуга 52.53.1519 SS RHODIUM для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
 193. Дуга 51.50.2012 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
 194. Дуга 51.50.2014 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
 195. Дуга 51.50.2016 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
 196. Дуга 51.50.2018 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
 197. Дуга 51.50.2020 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
 198. Дуга 51.50.2116 SS для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
 199. Дуга 51.50.2216 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
 200. Дуга 51.50.2517 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
 201. Дуга 51.50.2518 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
 202. Дуга 51.50.2519 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
 203. Дуга 51.50.2521 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
 204. Дуга 52.50.2012 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
 205. Дуга 52.50.2014 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
 206. Дуга 52.50.2016 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
 207. Дуга 52.50.2018 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
 208. Дуга 52.50.2020 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
 209. Дуга 52.50.2116 SS для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
 210. Дуга 52.50.2216 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
 211. Дуга 52.50.2517 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
 212. Дуга 52.50.2518 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
 213. Дуга 52.50.2519 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
 214. Дуга 52.50.2521 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
 215. Дуга 51.55.2216 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
 216. Дуга 51.55.2517 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
 217. Дуга 51.55.2518 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;

218. Дуга 51.55.2519 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
219. Дуга 51.55.2521 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
220. Дуга 52.55.2216 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
221. Дуга 52.55.2517 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
222. Дуга 52.55.2518 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
223. Дуга 52.55.2519 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
224. Дуга 52.55.2521 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
225. Дуга 51.55.1518 SS RHODIUM BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 1 шт. в упаковке;
226. Дуга 51.55.1519 SS RHODIUM BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
227. Дуга 52.55.1518 SS RHODIUM BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 1 шт. в упаковке;
228. Дуга 52.55.1519 SS RHODIUM BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке.

II. Инструкция по применению

Далее по тексту – дуга, дуга ортодонтическая, дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC, дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX, дуга FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED, дуга FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX, дуга FLEXY NITI COPPER ALX, дуга FLEXY NITI REVERSE CURVE, дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP, дуга FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP, дуга SS RHODIUM, дуга SS, дуга SS BRAIDED, дуга SS RHODIUM BRAIDED, изделие, медицинское изделие.

2. Сведения о производителе, разработчике и уполномоченном представителе производителя

Производитель:

Orthometric Industria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA

Rua Irineu Martins, 280 – Bairro José Ferreira da Costa Junior (Lácio) – Marília, SP – Brazil-CEP: 17.539-059.

Тел.: +55 14 3311-2741

E-mail: sac@orthometric.com.br

Разработчик:

Orthometric Industria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA

Rua Irineu Martins, 280 – Bairro José Ferreira da Costa Junior (Lácio) – Marília, SP – Brazil-CEP: 17.539-059.

Тел.: +55 14 3311-2741

E-mail: sac@orthometric.com.br

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Акционерное общество «ПРОТЕКО»

АО «ПРОТЕКО»

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.57, корп.1, лит. И

Тел. / факс: +7 (812) 779-30-90

E-mail: info@protecodent.ru

3. Классификация

Это изделие в соответствии с Директивой Совета Европы 93/42/ЕЕС с изменениями и дополнениями в соответствии с Директивой 2007/47/ЕС, Приложение IX, Положение 5 относится к классу IIa.

4. Назначение изделия с указанием потенциального

4.1 Назначение медицинского изделия

Используются для фиксации брекетов и щечных трубок в процессе лечения неправильного прикуса, а также

для выравнивания зубов по горизонтали и вертикали.

4.2 Потенциальный потребитель

Квалифицированные специалисты – стоматологи-ортодонты.

5. Показания, область применения, противопоказания и возможные побочные эффекты

Показания: Ортодонтическое лечение, необходимое для исправления прикуса и неправильного положения зубов. Изделия применяются в ротовой полости вместе с брекетами, с целью поддерживающего ортодонтического лечения у людей путем выравнивания зубов в зубных рядах для достижения правильного положения и прикуса.

Область применения: стоматология (ортодонтия).

Противопоказания к применению:

1. Не использовать в отношении пациентов с неконтролируемым диабетом, с системными заболеваниями или алкогольной зависимостью;
2. Не использовать в отношении пациентов с резорбцией костной ткани или корней зубов;
3. Не использовать в отношении пациентов с аллергией на металлы (компоненты сплавов);
4. Не использовать в отношении пациентов с активным пародонтальным заболеванием;
5. Не использовать в отношении пациентов с ненадлежащей гигиеной ротовой полости;

Побочные эффекты: Дискомфорт, заболевание десен, кровоточивость десен, кариес, пятна/окрашивание зуба вокруг брекета, резорбция корня зуба, дегенерация нерва внутри зуба, анкилоз, травмы, оталгия, головные боли, рецидив ортодонтического заболевания, боль, изменения пульпы, гингивит, утрата костной ткани альвеолярного гребня, утрата прикрепленной опорной десны, декальцификация эмали, боль в жевательных мышцах, внутренняя дисфункция диска височно-нижнечелюстного сустава и дегенеративные заболевания височно-нижнечелюстного сустава.

6. Меры предосторожности.

1. Предупреждение

- 1.1 Изделие предназначено для использования только медицинскими специалистами и не должно использоваться для других целей, кроме указанных в целевом назначении.
- 1.2 Перед использованием необходимо подтвердить, что пациент не страдает аллергией на металлы (компоненты сплавов);
- 1.3 Не использовать изделие, если его упаковка повреждена.
- 1.4 Изделия рекомендуется применять совместно с металлическими и керамическими брекетами, а также щечными трубками производства Orthometric Industria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA (находятся в процессе регистрации).

2. Общие меры предосторожности

- 2.1. Не применять избыточную силу при использовании.
- 2.2. Заменить отсоединившееся изделие и зафиксировать новое.
- 2.3. После повторной фиксации установить изделие в соответствующее место для коррекции зуба в соответствии с суждениями и указаниями стоматолога.
- 2.4. Утилизировать замененное изделие.
- 2.5. Всегда при использовании изделия соблюдать суждения и указания стоматолога.
- 2.6. Утилизировать изделие непосредственно после использования.
- 2.7. Обратиться к специалисту в случае возникновения реакции биологической совместимости после использования изделия.

7. Описание

7.2.1 Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC в зависимости от варианта исполнения бывает круглой, квадратной или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсть. Дуга изготовлена из никельтитанового сплава.

7.2.2 Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX бывает круглой, квадратной или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсть, изготовлена из никельтитанового сплава.

7.2.3 Дуга FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED бывает круглой, квадратной или прямоугольной

формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсть, изготовлена из никельтитанового сплава.

7.2.4 Дуга FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX бывает круглой, квадратной или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсть. Дуга изготовлена из никельтитанового сплава. Данное изделие использует способность никельтитанового сплава восстанавливать первоначальную форму при нагреве до определенной температуры.

7.2.5 Дуга FLEXY NITI COPPER ALX бывает круглой или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсть. Дуга изготовлена из никельтитанового сплава с добавлением меди.

7.2.6 Дуга FLEXY NITI REVERSE CURVE бывает круглой, квадратной или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсть, изготовлена из никельтитанового сплава.

7.2.7 Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP бывает круглой, квадратной или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсти. Дуга изготовлена из никельтитанового сплава с покрытием.

7.2.8 Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP бывает круглой или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсти. Дуга изготовлена из никельтитанового сплава с покрытием.

7.2.9 Дуга FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP бывает круглой или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсти, изготовлена из никельтитанового сплава с добавлением меди с покрытием.

7.2.10 Дуга SS бывает круглой, квадратной или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсти, изготовлена из нержавеющей стали.

7.2.11 Дуга SS RHODIUM бывает круглой или прямоугольной формы поперечного сечения. Дуга устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсть, изготовлена из нержавеющей стали с покрытием.

7.2.12 Дуга SS BRAIDED изготавливается из нескольких нитей из нержавеющей стали путём их сплетения между собой и имеет прямоугольное сечение. Устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсти.

7.2.13 Дуга SS RHODIUM BRAIDED изготавливается из нескольких нитей из нержавеющей стали с покрытием путём их сплетения между собой. Дуга имеет прямоугольное сечение. Устанавливается на верхнюю или нижнюю челюсти.

8. Порядок применения

1. Вскрыть упаковку изделия непосредственно перед использованием в отношении пациента, не заранее, и проверить изделие на повреждения, примеси или инородные вещества и, при наличии таковых, не использовать изделие.
2. Этапы ниже должны выполняться только стоматологическим специалистом с квалификацией в ортодонтии.
3. Выбрать ортодонтическую дугу для использования.
4. Вставить выбранную ортодонтическую дугу.
5. Зафиксировать дугу лигатурой.
6. Обрезать остаточную проволоку дистально по отношению к замку с использованием режущих щипцов для предотвращения травмирования мягких тканей пациента.

9. Основные технические характеристики

Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.10.2012	52.10.2012	Круглое	0,31
51.10.2014	52.10.2014	Круглое	0,36
51.10.2016	52.10.2016	Круглое	0,41
51.10.2018	52.10.2018	Круглое	0,46
51.10.2020	52.10.2020	Круглое	0,51
51.10.2116	52.10.2116	Квадратное	0,41×0,41
51.10.2216	52.10.2216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.10.2517	52.10.2517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.10.2518	52.10.2518	Прямоугольное	0,46×0,63

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.10.2519	52.10.2519	Прямоугольное	0,48×0,63
51.10.2521	52.10.2521	Прямоугольное	0,53×0,63

Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.11.2012	52.11.2012	Круглое	0,31
51.11.2014	52.11.2014	Круглое	0,36
51.11.2016	52.11.2016	Круглое	0,41
51.11.2018	52.11.2018	Круглое	0,46
51.11.2020	52.11.2020	Круглое	0,51
51.11.2116	52.11.2116	Квадратное	0,41×0,41
51.11.2216	52.11.2216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.11.2517	52.11.2517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.11.2518	52.11.2518	Прямоугольное	0,46×0,63
51.11.2519	52.11.2519	Прямоугольное	0,48×0,63
51.11.2521	52.11.2521	Прямоугольное	0,53×0,63

Дуга FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.35.2012	52.35.2012	Круглое	0,31
51.35.2014	52.35.2014	Круглое	0,36
51.35.2016	52.35.2016	Круглое	0,41
51.35.2018	52.35.2018	Круглое	0,46
51.35.2020	52.35.2020	Круглое	0,51
51.35.2116	52.35.2116	Квадратное	0,41×0,41
51.35.2216	52.35.2216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.35.2517	52.35.2517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.35.2518	52.35.2518	Прямоугольное	0,46×0,63
51.35.2519	52.35.2519	Прямоугольное	0,48×0,63
51.35.2521	52.35.2521	Прямоугольное	0,53×0,63

Дуга FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.36.2012	52.36.2012	Круглое	0,31
51.36.2014	52.36.2014	Круглое	0,36
51.36.2016	52.36.2016	Круглое	0,41
51.36.2018	52.36.2018	Круглое	0,46
51.36.2020	52.36.2020	Круглое	0,51
51.36.2116	52.36.2116	Квадратное	0,41×0,41
51.36.2216	52.36.2216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.36.2514	52.36.2514	Прямоугольное	0,36×0,63
51.36.2517	52.36.2517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.36.2518	52.36.2518	Прямоугольное	0,46×0,63
51.36.2519	52.36.2519	Прямоугольное	0,48×0,63
51.36.2521	52.36.2521	Прямоугольное	0,53×0,63

Дуга FLEXY NITI COPPER ALX

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.47.2012	52.47.2012	Круглое	0,31
51.47.2014	52.47.2014	Круглое	0,36
51.47.2016	52.47.2016	Круглое	0,41
51.47.2018	52.47.2018	Круглое	0,46
51.47.2216	52.47.2216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.47.2514	52.47.2514	Прямоугольное	0,36×0,63

51.47.2516	52.47.2516	Прямоугольное	0,41×0,63
51.47.2517	52.47.2517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.47.2518	52.47.2518	Прямоугольное	0,46×0,63
51.47.2519	52.47.2519	Прямоугольное	0,48×0,63

Дуга FLEXY NITI REVERSE CURVE

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.18.2012	52.18.2012	Круглое	0,31
51.18.2014	52.18.2014	Круглое	0,36
51.18.2016	52.18.2016	Круглое	0,41
51.18.2018	52.18.2018	Круглое	0,46
51.18.2020	52.18.2020	Круглое	0,51
51.18.2116	52.18.2116	Квадратное	0,41×0,41
51.18.2216	52.18.2216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.18.2517	52.18.2517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.18.2518	52.18.2518	Прямоугольное	0,46×0,63
51.18.2519	52.18.2519	Прямоугольное	0,48×0,63
51.18.2521	52.18.2521	Прямоугольное	0,53×0,63

Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.15.1012	52.15.1012	Круглое	0,31
51.15.1014	52.15.1014	Круглое	0,36
51.15.1016	52.15.1016	Круглое	0,41
51.15.1018	52.15.1018	Круглое	0,46
51.15.1020	52.15.1020	Круглое	0,51
51.15.1116	52.15.1116	Квадратное	0,41×0,41
51.15.1216	52.15.1216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.15.1517	52.15.1517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.15.1518	52.15.1518	Прямоугольное	0,46×0,63
51.15.1519	52.15.1519	Прямоугольное	0,48×0,63
51.15.1521	52.15.1521	Прямоугольное	0,53×0,63

Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.19.1014	52.19.1014	Круглое	0,36
51.19.1016	52.19.1016	Круглое	0,41
51.19.1018	52.19.1018	Круглое	0,46
51.19.1020	52.19.1020	Круглое	0,51
51.19.1216	52.19.1216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.19.1517	52.19.1517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.19.1519	52.19.1519	Прямоугольное	0,48×0,63

Дуга FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.48.1014	52.48.1014	Круглое	0,36
51.48.1016	52.48.1016	Круглое	0,41
51.48.1018	52.48.1018	Круглое	0,46
51.48.1020	52.48.1020	Круглое	0,51
51.48.1514	52.48.1514	Прямоугольное	0,36×0,63
51.48.1216	52.48.1216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.48.1516	52.48.1516	Прямоугольное	0,41×0,63
51.48.1517	52.48.1517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.48.1519	52.48.1519	Прямоугольное	0,48×0,63

Дуга SS RHODIUM

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.53.1018	52.53.1018	Круглое	0,46
51.53.1517	52.53.1517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.53.1519	52.53.1519	Прямоугольное	0,48×0,63

Дуга SS

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.50.2012	52.50.2012	Круглое	0,31
51.50.2014	52.50.2014	Круглое	0,36
51.50.2016	52.50.2016	Круглое	0,41
51.50.2018	52.50.2018	Круглое	0,46
51.50.2020	52.50.2020	Круглое	0,51
51.50.2116	52.50.2116	Квадратное	0,41×0,41
51.50.2216	52.50.2216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.50.2517	52.50.2517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.50.2518	52.50.2518	Прямоугольное	0,48×0,63
51.50.2519	52.50.2519	Прямоугольное	0,48×0,63
51.50.2521	52.50.2521	Прямоугольное	0,53×0,63

Дуга SS BRAIDED

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.55.2216	52.55.2216	Прямоугольное	0,41×0,55
51.55.2517	52.55.2517	Прямоугольное	0,43×0,63
51.55.2518	52.55.2518	Прямоугольное	0,46×0,63
51.55.2519	52.55.2519	Прямоугольное	0,48×0,63
51.55.2521	52.55.2521	Прямоугольное	0,53×0,63

Дуга SS RHODIUM BRAIDED

Артикул		Тип сечения	Сечение дуги, мм
Верхняя челюсть	Нижняя челюсть		
51.55.1518	52.55.1518	Прямоугольное	0,46×0,63
51.55.1519	52.55.1519	Прямоугольное	0,48×0,63

10. Материалы изделий

Дуга ортодонтическая Orthometric является изделием одноразового использования. Изделие долговременного контакта (продолжительность контакта составляет более 30 суток). Контакт с организмом человека – слизистые оболочки полости рта.

Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX Дуга FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED Дуга FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX Дуга FLEXY NITI REVERSE CURVE	Нитиноловая проволока
Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP Дуга FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP Дуга FLEXY NITI COPPER ALX	Нитиноловая проволока с покрытием Никель-титановый сплав с содержанием меди
Дуга FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP	Никель-титановый сплав с содержанием меди с покрытием
Дуга SS Дуга SS BRAIDED	Нержавеющая сталь
Дуга SS RHODIUM Дуга SS RHODIUM BRAIDED	Нержавеющая сталь с покрытием

11. Комплект поставки

Дуги ортодонтические Orthometric

1. Вариант исполнения:

1. Дуга 51.10.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;

2. Дуга 51.10.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
3. Дуга 51.10.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
4. Дуга 51.10.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
5. Дуга 51.10.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
6. Дуга 51.10.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
7. Дуга 51.10.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
8. Дуга 51.10.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
9. Дуга 51.10.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
10. Дуга 51.10.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
11. Дуга 51.10.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
12. Дуга 52.10.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
13. Дуга 52.10.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
14. Дуга 52.10.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
15. Дуга 52.10.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
16. Дуга 52.10.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
17. Дуга 52.10.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
18. Дуга 52.10.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
19. Дуга 52.10.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
20. Дуга 52.10.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
21. Дуга 52.10.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
22. Дуга 52.10.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
23. Дуга 51.11.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
24. Дуга 51.11.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
25. Дуга 51.11.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
26. Дуга 51.11.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;

27. Дуга 51.11.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
28. Дуга 51.11.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
29. Дуга 51.11.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
30. Дуга 51.11.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
31. Дуга 51.11.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
32. Дуга 51.11.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
33. Дуга 51.11.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
34. Дуга 52.11.2012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
35. Дуга 52.11.2014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
36. Дуга 52.11.2016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
37. Дуга 52.11.2018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
38. Дуга 52.11.2020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
39. Дуга 52.11.2116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
40. Дуга 52.11.2216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
41. Дуга 52.11.2517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
42. Дуга 52.11.2518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
43. Дуга 52.11.2519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
44. Дуга 52.11.2521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
45. Дуга 51.35.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
46. Дуга 51.35.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
47. Дуга 51.35.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
48. Дуга 51.35.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
49. Дуга 51.35.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
50. Дуга 51.35.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
51. Дуга 51.35.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;

52. Дуга 51.35.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
53. Дуга 51.35.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
54. Дуга 51.35.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
55. Дуга 51.35.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
56. Дуга 52.35.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
57. Дуга 52.35.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
58. Дуга 52.35.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
59. Дуга 52.35.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
60. Дуга 52.35.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
61. Дуга 52.35.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
62. Дуга 52.35.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
63. Дуга 52.35.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
64. Дуга 52.35.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
65. Дуга 52.35.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
66. Дуга 52.35.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
67. Дуга 51.36.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
68. Дуга 51.36.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
69. Дуга 51.36.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
70. Дуга 51.36.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
71. Дуга 51.36.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
72. Дуга 51.36.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
73. Дуга 51.36.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
74. Дуга 51.36.2514 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 10 шт. в упаковке;
75. Дуга 51.36.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
76. Дуга 51.36.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;

77. Дуга 51.36.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
78. Дуга 51.36.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
79. Дуга 52.36.2012 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
80. Дуга 52.36.2014 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
81. Дуга 52.36.2016 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
82. Дуга 52.36.2018 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
83. Дуга 52.36.2020 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
84. Дуга 52.36.2116 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
85. Дуга 52.36.2216 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
86. Дуга 52.36.2514 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 10 шт. в упаковке;
87. Дуга 52.36.2517 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
88. Дуга 52.36.2518 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
89. Дуга 52.36.2519 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
90. Дуга 52.36.2521 FLEXY NITI THERMALLY ACTIVATED ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
91. Дуга 51.47.2012 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
92. Дуга 51.47.2014 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
93. Дуга 51.47.2016 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
94. Дуга 51.47.2018 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
95. Дуга 51.47.2216 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
96. Дуга 51.47.2514 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 10 шт. в упаковке;
97. Дуга 51.47.2516 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,025 - 10 шт. в упаковке;
98. Дуга 51.47.2517 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
99. Дуга 51.47.2518 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
100. Дуга 51.47.2519 FLEXY NITI COPPER ALX для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
101. Дуга 52.47.2012 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;

102. Дуга 52.47.2014 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
103. Дуга 52.47.2016 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
104. Дуга 52.47.2018 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
105. Дуга 52.47.2216 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
106. Дуга 52.47.2514 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 10 шт. в упаковке;
107. Дуга 52.47.2516 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,025 - 10 шт. в упаковке;
108. Дуга 52.47.2517 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
109. Дуга 52.47.2518 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
110. Дуга 52.47.2519 FLEXY NITI COPPER ALX для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
111. Дуга 51.18.2012 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
112. Дуга 51.18.2014 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
113. Дуга 51.18.2016 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
114. Дуга 51.18.2018 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
115. Дуга 51.18.2020 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
116. Дуга 51.18.2116 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
117. Дуга 51.18.2216 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
118. Дуга 51.18.2517 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
119. Дуга 51.18.2518 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
120. Дуга 51.18.2519 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
121. Дуга 51.18.2521 FLEXY NITI REVERSE CURVE для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
122. Дуга 52.18.2012 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
123. Дуга 52.18.2014 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
124. Дуга 52.18.2016 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
125. Дуга 52.18.2018 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
126. Дуга 52.18.2020 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;

127. Дуга 52.18.2116 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
128. Дуга 52.18.2216 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
129. Дуга 52.18.2517 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
130. Дуга 52.18.2518 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
131. Дуга 52.18.2519 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
132. Дуга 52.18.2521 FLEXY NITI REVERSE CURVE для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
133. Дуга 51.15.1012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 1 шт. в упаковке;
134. Дуга 51.15.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
135. Дуга 51.15.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
136. Дуга 51.15.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
137. Дуга 51.15.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
138. Дуга 51.15.1116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 1 шт. в упаковке;
139. Дуга 51.15.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
140. Дуга 51.15.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
141. Дуга 51.15.1518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 1 шт. в упаковке;
142. Дуга 51.15.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
143. Дуга 51.15.1521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 1 шт. в упаковке;
144. Дуга 52.15.1012 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 1 шт. в упаковке;
145. Дуга 52.15.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
146. Дуга 52.15.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
147. Дуга 52.15.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
148. Дуга 52.15.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
149. Дуга 52.15.1116 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 1 шт. в упаковке;
150. Дуга 52.15.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
151. Дуга 52.15.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;

152. Дуга 52.15.1518 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 1 шт. в упаковке;
153. Дуга 52.15.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
154. Дуга 52.15.1521 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 1 шт. в упаковке;
155. Дуга 51.19.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
156. Дуга 51.19.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
157. Дуга 51.19.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
158. Дуга 51.19.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
159. Дуга 51.19.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
160. Дуга 51.19.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
161. Дуга 51.19.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
162. Дуга 52.19.1014 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
163. Дуга 52.19.1016 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
164. Дуга 52.19.1018 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
165. Дуга 52.19.1020 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
166. Дуга 52.19.1216 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
167. Дуга 52.19.1517 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
168. Дуга 52.19.1519 FLEXY NITI SUPER-ELASTIC ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
169. Дуга 51.48.1014 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
170. Дуга 51.48.1016 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
171. Дуга 51.48.1018 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
172. Дуга 51.48.1020 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
173. Дуга 51.48.1514 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 1 шт. в упаковке;
174. Дуга 51.48.1216 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
175. Дуга 51.48.1516 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,025 - 1 шт. в упаковке;
176. Дуга 51.48.1517 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;

177. Дуга 51.48.1519 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
178. Дуга 52.48.1014 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 1 шт. в упаковке;
179. Дуга 52.48.1016 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 1 шт. в упаковке;
180. Дуга 52.48.1018 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
181. Дуга 52.48.1020 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 1 шт. в упаковке;
182. Дуга 52.48.1514 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,014*0,025 - 1 шт. в упаковке;
183. Дуга 52.48.1216 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 1 шт. в упаковке;
184. Дуга 52.48.1516 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,025 - 1 шт. в упаковке;
185. Дуга 52.48.1517 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
186. Дуга 52.48.1519 FLEXY NITI COPPER ALX ESTHETIC RP для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
187. Дуга 51.53.1018 SS RHODIUM для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
188. Дуга 52.53.1018 SS RHODIUM для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 1 шт. в упаковке;
189. Дуга 51.53.1517 SS RHODIUM для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
190. Дуга 52.53.1517 SS RHODIUM для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 1 шт. в упаковке;
191. Дуга 51.53.1519 SS RHODIUM для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
192. Дуга 52.53.1519 SS RHODIUM для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
193. Дуга 51.50.2012 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
194. Дуга 51.50.2014 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
195. Дуга 51.50.2016 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
196. Дуга 51.50.2018 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;
197. Дуга 51.50.2020 SS для верхних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
198. Дуга 51.50.2116 SS для верхних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
199. Дуга 51.50.2216 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
200. Дуга 51.50.2517 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
201. Дуга 51.50.2518 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
202. Дуга 51.50.2519 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
203. Дуга 51.50.2521 SS для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
204. Дуга 52.50.2012 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,012 - 10 шт. в упаковке;
205. Дуга 52.50.2014 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,014 - 10 шт. в упаковке;
206. Дуга 52.50.2016 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,016 - 10 шт. в упаковке;
207. Дуга 52.50.2018 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,018 - 10 шт. в упаковке;

208. Дуга 52.50.2020 SS для нижних зубов, круглое сечение, размер 0,020 - 10 шт. в упаковке;
209. Дуга 52.50.2116 SS для нижних зубов, квадратное сечение, размер 0,016*0,016 - 10 шт. в упаковке;
210. Дуга 52.50.2216 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
211. Дуга 52.50.2517 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
212. Дуга 52.50.2518 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
213. Дуга 52.50.2519 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
214. Дуга 52.50.2521 SS для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
215. Дуга 51.55.2216 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
216. Дуга 51.55.2517 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
217. Дуга 51.55.2518 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
218. Дуга 51.55.2519 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
219. Дуга 51.55.2521 SS BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
220. Дуга 52.55.2216 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,016*0,022 - 10 шт. в упаковке;
221. Дуга 52.55.2517 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,017*0,025 - 10 шт. в упаковке;
222. Дуга 52.55.2518 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 10 шт. в упаковке;
223. Дуга 52.55.2519 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 10 шт. в упаковке;
224. Дуга 52.55.2521 SS BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,021*0,025 - 10 шт. в упаковке;
225. Дуга 51.55.1518 SS RHODIUM BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 1 шт. в упаковке;
226. Дуга 51.55.1519 SS RHODIUM BRAIDED для верхних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке;
227. Дуга 52.55.1518 SS RHODIUM BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,018*0,025 - 1 шт. в упаковке;
228. Дуга 52.55.1519 SS RHODIUM BRAIDED для нижних зубов, прямоугольное сечение, размер 0,019*0,025 - 1 шт. в упаковке.

II. Инструкция по применению

12. Расшифровка символов, применяемых в маркировке упаковки

	Код партии		Номер по каталогу
	Дата изготовления		Изготовитель
	Обратитесь к инструкции по применению		Не стерильно
	Беречь от влаги		Беречь от солнечных лучей
	Содержит никель		Не использовать при повреждении упаковки
	Не использовать повторно		Использовать до

13. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации.

<u>Условия транспортировки</u>	- температура: от -60°C до 60°C, - относительная влажность: от 20% до 95 %, - атмосферное давление: 800,00 – 1060,00 гПа.
<u>Условия хранения</u>	- температура: от 0°C до 60 °C, - относительная влажность: от 20% до 95 %, - атмосферное давление: 800,00 – 1060,00 гПа
<u>Условия эксплуатации</u>	- температура: от 15°C до 30°C, - относительная влажность: от 20% до 95 %, - атмосферное давление: 800,00 – 1060,00 гПа

14. Очистка, дезинфекция и стерилизация изделия

Медицинские изделия предназначены для одноразового использования и поставляются нестерильными.

Перед установкой медицинское изделие необходимо продезинфицировать 70% этиловым спиртом.

15. Утилизация

Медицинские изделия должны утилизироваться в соответствии с медицинскими процедурами, принятыми в медицинских учреждениях и местными, государственными или федеральными нормативами. Выбор методов безопасной утилизации и уничтожения изделий зависит от мощности и профиля медицинской организации, наличия установок по обеззараживанию/обезвреживанию отходов, способа обезвреживания/уничтожения отходов, принятого на административной территории (сжигание, вывоз на полигоны, утилизация).

Медицинское изделие относится к эпидемиологически опасным отходам (изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, а также изделия, контактирующие с пациентами с инфекционными болезнями). В данном случае медицинская организация осуществляет только сбор и временное хранение вышеуказанных отходов. Сбор осуществляют в пакеты или в контейнеры однократного применения с цветовой маркировкой, принятой для опасных медицинских отходов в помещении или в местах для временного хранения медицинских отходов до последующего транспортирования к месту уничтожения или утилизации. Принадлежности для изделий, имеющие контакт с пациентом, подлежат предварительной очистке и дезинфекции в установленном порядке перед их утилизацией. Транспортированием использованных медицинских отходов из медицинских учреждений, их утилизацией занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными в эпидемиологическом отношении медицинскими отходами.

Потребительская упаковка и неиспользованные бракованные изделия относятся к эпидемиологически безопасным отходам (неопасным отходам, не имеющим контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными), приближенным по составу к твердым бытовым отходам (ТБО). Однако, рекомендуется утилизировать их отдельно как промышленный отход через специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

16. Срок годности

Срок годности не ограничен.

17. Техническое обслуживание и ремонт

Изделие не требует технического обслуживания или калибровки.

18. Перечень международных стандартов, которым соответствует медицинское изделие

EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN ISO 10993-1; EN ISO 10993-3; EN ISO 10993-5; EN ISO 10993-10; EN ISO 10993-11; EN 16:2009; EN ISO 75; EN ISO 27020; EN ISO 10271; EN 62366:2008; EN ISO 15223-1; EN 10; MEDDEV 2.7/1 Ред. 4; MEDDEV 2.12/1 Ред. 8; MEDDEV 2.12/2 Ред. 2; ISTA 2017 2A; EN ISO 158.

Примечание: Стандарты используются в последней редакции: организация сохраняет и обновляет список справочных стандартов как запись собственной системы управления в соответствии с ISO 13485.

Перевод данного текста выполнен переводчиком Малошовой Анной Андреевной

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Тридцатого мая две тысячи двадцать четвертого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Малошовой Анны Андреевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-н/77-2024-8-1523

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Веремий Ю.И.

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Веремий Ю.И.

Ю.И. Веремий

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 47 лист(-а,-ов).

Нотариус:

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Тридцатого мая две тысячи двадцать четвертого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую о верности копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-н/77-2024-8-1524

Уплачено за совершение нотариального действия: 4800 руб. 00 коп.



Ю.И. Веремий

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 47 лист(-а,-ов).

Нотариус: