

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЭндоМедиум +»

В. А. Грачев

2001 г.



**КАМЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ С ТРЕМЯ ВЫДВИЖНЫМИ
ПОЛКАМИ КХЭ – «ЭНДОМЕДИУМ»**

**Этикетка
ИПГС.942819.001 ЭТ**

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Исх. № дубл.	Подп. и дата

2001

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Камера для хранения инструментов эндоскопических с тремя выдвижными полками КХЭ – «ЭНДОМЕДИУМ», ТУ 9452-002-47086606-01 (в дальнейшем – камера) предназначена для хранения эндоскопических инструментов в лечебных учреждениях.

1.1.2 Камера предназначена для эксплуатации в операционных отделениях лечебных учреждений при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 ° С, относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 °С и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа.

1.1.3 Область применения – эндоскопическая и общая хирургия.

1.2 Технические характеристики

635 406 366 / ②

1.2.1 Габаритные размеры камеры, мм, не более – 653 x 410 x 370.

Допустимое отклонение от габаритных размеров, мм – ± 2.

1.2.2 Масса камеры, кг, не более – 26,15

③ → 1.2.3 Материалы – детали камеры – органическое листовое стекло марки СО-133-К ГОСТ 10667-90; петли и ручка на дверце – сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72; уплотнитель на дверце – смесь резиновая медицинского назначения ИР-21 ТУ 38-10321-77. Детали камеры склеены клеем циакрин ЭО ТУ -6-09-30-86.

1.2.4 Угол раскрытия дверцы камеры, град., не менее – 90.

1.2.5 Средний срок службы камеры, лет, не менее – 5.

1.3 Маркировка

1.3.1 Маркировка – по ГОСТ Р 50444-92.

1.3.2 На задней стенке камеры прикреплена металлическая табличка, выполненная в соответствии с конструкторской документацией.

1.3.3 Маркировка на табличке содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска ;
- обозначение технических условий.

Изм. № подл.	Подпись и	Изм. № докум.	Взам. инв. №	Подп. и дата	2	-	ХННГ.075-05	2-й	18.11.05	ИПГС..942819.001 ЭТ	Камера для хранения инструментов эндоскопических с тремя выдвижными полками КХЭ – «ЭНДОМЕДИУМ» Этикетка	Литер. Ип А	Лист 2	Листов 10
					3	-	ХННГ.085-10	2-й	18.09.10					
					1	-	ХННГ.058-02	2-й	18.09.08					
					Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата					
Изм. № подл.	Подпись и	Изм. № докум.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Разраб.	Катков	2-й	18.01.08	Камера для хранения инструментов эндоскопических с тремя выдвижными полками КХЭ – «ЭНДОМЕДИУМ» Этикетка	Литер. Ип А	Лист 2	Листов 10		
					Провер.	Гусев	2-й	18.01.08						
					Н. контр.	Ситникова	2-й	18.01.08						
					Утв.									

1.3.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

1.3.5 На транспортный ящик нанесены манипуляционные знаки, соответствующие наименованиям «Хрупкое! Осторожно », «Беречь от влаги», «Верх».

1.4 Упаковка

1.4.1 Упаковка – по ГОСТ Р 50444-92.

1.4.2 Перед упаковыванием камера консервируется по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 1 : ВЗ-0, ВУ-1. Ⓢ

1.4.3 Камера, полки и ~~явота~~ завертываются в бумагу по ГОСТ 8273-75 или ГОСТ 2228-81, обвязываются шпагатом по ГОСТ 17308- Ⓢ

1.4.4 Для транспортирования камера, полки и ~~явота~~ укладываются в ящики из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959-80.

1.4.5 В каждый ящик с камерой вкладывается упаковочный лист по ГОСТ Р 50444-92.

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата
3				
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата
3	-	ЖНМГ. 085Т-10	Л	01.08.02
ИПГС.942819.001 ЭТ				Лист 3

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки камеры соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
1. Камера для хранения инструментов эндоскопических с тремя выдвижными полками КХЭ – «ЭНДОМЕДИУМ»	ИПГС.942819.001	1
2. Полка	ИПГС.301319.001	3
3. Кювета ↙ (3)	ИПГС.301319.002 ↙ (3)	4 ↙ (3)
<u>Эксплуатационная документация</u>		
3		
4. Этикетка	ИПГС.942819.001 ЭТ	1

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ина. № дубл.	Подл. и дата				
3								
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	ИПГС.942819.001 ЭТ			
3	—	ИПГС.085-10-2	З	01.08.10				
					Лист 4			

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Подготовка изделия к использованию

3.1.1 Перед использованием необходимо провести расконсервацию камеры.

3.1.2 Камеру необходимо установить на ровное место. МУ-287-113

3.1.3 Камеру следует дезинфицировать по ~~ОСТ 42-21-2-85~~ методом 2-кратного протирания салфеткой из марли по ГОСТ 9412-93 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Летос» по ГОСТ 25644-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89 с интервалом между протираниями 15 минут.

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата
2	—	ЖНИГ. 0721-05	12/11/05	ИПГС.942819.001 ЭТ
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата
5	5			

4 СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Срок службы, лет, не менее – 5.

4.2. Срок хранения без переконсервации по условиям хранения 1 (Л)
по ГОСТ Р 15150-69 – 5 лет.

4.3 Гарантии изготовителя

4.3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям технических условий ТУ 9452-002-47086606-01 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящей этикетке.

4.3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода камеры в эксплуатацию.

4.3.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

4.3.4 Адрес предприятия-изготовителя: 420044, г. Казань,
проспект Ямашева, д.36, для писем: 420044, г.Казань, а/я 1,000 «Эндомедиум +»,
тел./ факс (8432) ~~56-88-42-516-89-03~~

↖ ②

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата			
2					ИПГС.942819.001 ЭТ		Лист
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата			6

5 КОНСЕРВАЦИЯ

Таблица 2

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

Изм. №	Подпись и дата	Взам. изв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

ИПГС.942819.001 ЭТ

Лист
7

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Камера для хранения инструментов эндоскопических с тремя выдвижными полками КХЭ – «ЭНДОМЕДИУМ»

наименование изделия

ИПГС.942819.001

обозначение

заводской номер

Упакована

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Ина. №	Подпись и дата	Взам. ина. №	Ина. № дубл.	Подп. и дата	ИПГС.942819.001 ЭТ	Лист
						8
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

7СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера для хранения инструментов эндоскопических с тремя выдвижными полками КХЭ – «ЭНДОМЕДИУМ»

наименование изделия

ИПГС.942819.001

обозначение

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ИПГС.942819.001 ЭТ				
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата
Лист				9

Лист регистрации изменений

[illegible]

В данном документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью десять листов.

Директор ООО «Эндомедиум +»

В.А. Грачев

20.12.2010 г.

