

МАНЖЕТА

для измерителя артериального давления

ПАСПОРТ

1 Наименование

Манжета (далее по тексту – манжета, изделие) предназначена для использования в составе измерителей артериального давления в диапазоне от 0 до 300 мм рт. ст. (от 0 до 40 кПа).

2 Состав

1. Пневмокамера
2. Рукав с текстильной застежкой из нейлона

3 Исполнение

Идентификационный номер манжеты (артикул) см. на упаковке •

Артикул	Пневмо-камера	Размер пневмо-камеры, см	Кол-во трубок	Кольцо	Обхват, см	Размеры манжеты, см
СЕРИЯ STANDART						
AD2210	латекс	22±2 × 13±2	1	да	25 – 38	50±2×14±2
AD2211	ПВХ	22±2 × 13±2	1	да	22 – 32	50±2×14±2
AD2218	латекс	22±2 × 13±2	1	нет	25 – 38	50±2×14±2
AD2220	латекс	22±2 × 13±2	2	да	25 – 38	50±2×14±2
AD2221	латекс	22±2 × 13±2	2	нет	25 – 38	50±2×14±2
СЕРИЯ LARGE						
AD2212	латекс	30±2 × 15±2	1	нет	32 – 54	70±2×17±2
AD2213	латекс	30±2 × 15±2	1	да	36 – 54	70±2×17±2
AD2219	латекс	35±2 × 17±2	1	нет	36 – 60	79±2×21,5±2
AD2222	латекс	30±2 × 15±2	2	да	36 – 54	70±2×17±2
AD2223	латекс	35±2 × 17±2	2	нет	36 – 60	79±2×21,5±2
AD2224	латекс	30±2 × 15±2	2	нет	32 – 54	70±2×17±2
AD2230	ПВХ	30±2 × 15±2	1	да	30 – 45	62±2×17,5±2
СЕРИЯ KIDS						
AD2214	латекс	12±1×6±1	1	нет	11 – 19	26,5±1×8±1
AD2215	латекс	9±1×4±0,5	1	нет	7 – 12	19,5±1×6,5±0,5
AD2216	латекс	19±2×9±1	1	нет	18 – 26	35±2×10±1
AD2217	латекс	19±2×9±1	1	да	18 – 26	35±2×10±1
AD2225	латекс	9±1×4±0,5	2	нет	7 – 12	19,5±1×6,5±0,5
AD2226	латекс	12±2×6±1	2	нет	11 – 19	26,5±1×8±1
AD2227	латекс	19±2×9±1	2	нет	18 – 26	35±2×10±1
AD2228	латекс	19±2×9±1	2	да	18 – 26	35±2×10±1

Артикул	Пневмо-камера	Размер пневмо-камеры, см	Кол-во трубок	Кольцо	Обхват, см	Размеры манжеты, см
СЕРИЯ STANDART PLUS						
AD2229	латекс	22±2 × 12±1	2	нет	22 – 42	54±2×14±2
AD2231	латекс	22±2 × 12±1	1	нет	22 – 42	54±2×14±2
AD2232	латекс	22±2 × 12±1	1	да	24 – 42	54±2×14±2
AD2240	латекс	22±2 × 12±1	2	да	24 – 42	54±2×14±2
СЕРИЯ SELECT						
AD2233	латекс	22±2 × 12±1	1	да	24 – 42	55±2×14±2
AD2234	латекс	22±2 × 12±1	1	нет	22 – 42	55±2×14±2
AD2235	ПВХ	22±2 × 13±1	1	нет	22 – 42	55±2×14±2
AD2236	ПВХ	22±2 × 13±1	1	да	24 – 42	55±2×14±2
AD2241	латекс	22±2 × 12±1	2	да	24 – 42	55±2×14±2
AD2242	латекс	22±2 × 12±1	2	нет	22 – 42	55±2×14±2

4 Подготовка к работе

Выполните подготовку манжеты к работе в составе измерителя артериального давления: присоедините к одной из трубок манжеты манометр, а к другой – нагнетатель (при использовании манжеты с пневмокамерой с одной трубкой – присоедините к трубке манжеты манометр, совмещенный с нагнетателем).

Манжета может быть оснащена специальной петлей для удобства фиксации головки стетофонендоскопа.

Для закрепления головки стетофонендоскопа проденьте штуцер головки через петлю и затем соедините его с одинарным концом Y-образной трубки стетофонендоскопа.

5 Порядок работы

Перед измерением давления рекомендуется расслабиться и отдохнуть в течение 5 – 10 минут.

Разогните руку и расположите ее ладонью вверх. Не рекомендуется накладывать манжету на ткань одежды, закатывать рукава с образованием сдавливающих валиков из ткани. Артериальное давление (АД) может определяться в положении «сидя», «лежа» или «стоя». Для корректного измерения АД необходимо обеспечить положение руки, при котором середина манжеты находится на уровне сердца. Не допускается положение руки «на весу».

Наложите манжету на плечо таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2,5 см выше локтевой ямки, и закрепите с помощью текстильной застежки. Между манжетой и поверхностью плеча должно помещаться два пальца (для взрослых с маленьким объемом руки – один палец). Выполните измерение артериального давления как описано в руководстве по эксплуатации Вашего прибора.

6 Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений давления, кПа (мм рт. ст.)	от 0 до 40 (от 0 до 300)
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С	от 10 до 40
Длина трубок пневмокамеры на основе:	
- латекс	45 – 50 см
- ПВХ	50 – 65 см

7 Сведения об утилизации

Изделия уничтожаются и утилизируются вместе с бытовыми отходами.

Утилизацию изделий, использованных в инфекционных отделениях, осуществляют в действующем порядке, предусмотренном в медицинском учреждении.

8 Транспортирование, хранение и эксплуатация

Транспортирование должно осуществляться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 для температур минус 50°C до плюс 50°C по ГОСТ 15150.

Хранить изделие в чистом и сухом месте, недоступном для детей и домашних животных; оберегать от повышенной влажности, прямых солнечных лучей, ударов, загрязнения; не допускайте соприкосновения с агрессивными растворами; не хранить и не использовать в непосредственной близости нагревательных приборов и открытого огня. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 2 для температур от минус 50°C до плюс 40°C по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ Р 50444 для климатического исполнения УХЛ 4.2 для диапазона температур от плюс 10°C до плюс 40°C.

Не создавайте в манжете давление выше 300 мм рт. ст.

Изделия устойчивы к многократной дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствия изделия требованиям ГОСТ Р 50444, технической документации изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный ремонт изделия проводится при наличии гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи.

При выходе из строя изделия в результате механических повреждений или в результате несоблюдения ограничений, накладываемых на его эксплуатацию, безвозмездный ремонт или замена изделия предприятием-изготовителем не гарантируется.

10 Сведения о сертификации и государственной регистрации

Обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии или сертификата не подлежит.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № _____

11 Адреса гарантийного обслуживания

Россия, г. Санкт – Петербург, Новочеркасский пр-т, д. 1, лит. Р, ООО «Адьютор», тел.: (812) 325-02-54, 8 (800) 444-5-325.

12 Информация об изготовителе

Изготовитель: ООО «АДЬЮТОР». Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1, литер Р, пом. 21-н, ком. 2;

Сведения о производственных площадках:

1. «Вэньчжоу Фенжуй Медикал Инструмент Лимитед Компани», Рум 104, Билдинг 29, Вэньчжоу Венбо Сайнс энд Технолоджи Индастриал Парк № 706, дорога ЯнЮн , улица ЛинКунь, район Удзянькоу Индастриал кластер, 325026, Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китайская Народная республика;

2. Общество с ограниченной ответственностью «АДЬЮТОР» (ООО «АДЬЮТОР»), Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 1, лит. Р. Телефон: +7 (812) 325-02-54, +7 (800) 444-5-325. Адрес электронной почты: 3250254@adjutor.ru.

13 Свидетельство о приемке

Манжета соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ТУ 26.60.12-005-58286981-2022 признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

Место печати ОТК _____

Гарантийный талон

Наименование торгующей организации:

Печать организации:

мп

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____

Утверждено

Исполнительный директор
ООО "АДЪЮТОР"
Лузгин А.А.
по доверенности № 400
от 31.05.2024г.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 4

четыре листах

300724



ОКПД2 26.60.12.129

ОКС 11.040.60

УТВЕРЖДАЮ



Исполнительный директор

ООО «АДЬЮТОР»

А.А. Лузгин

«30» июля 2024 г.

**Манжеты для измерителей артериального давления
торговой марки «Адьютор»®**

по ТУ 26.60.12 – 005 – 58286981– 2022

Инструкция по применению

ИАД-01.000-0.001 ИП

Дата введения в действие: « 30 » июля 2024 г.

Санкт - Петербург

2022 г.

Настоящая инструкция по применению распространяется на манжеты для измерителей артериального давления торговой марки «Адютор»® (далее – изделие, манжета, продукция, медицинское изделие (МИ)) с пневмокамерой, предназначенные для использования в составе измерителей артериального давления в диапазоне от 0 до 300 мм рт. ст. (от 0 до 40,0 кПа).

Принцип действия манжеты основан на создании компрессионного усилия (сдавливания) конечности пациента путем нагнетания воздуха в пневмокамеру с последующим плавным стравливанием воздуха и индикацией измеряемого артериального давления измерителем, с которым соединено изделие.

Функциональное назначение ИАД: для диагностики в составе измерителей артериального давления.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АДЬЮТОР» (ООО «АДЬЮТОР»).

Юридический адрес: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1, литер Р, пом. 21-н, ком. 2;

Почтовый адрес: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1, литер Р, пом. 21-н, ком. 2;

Фактический адрес: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1, литер Р, пом. 21-н, ком. 2.

Сведения о производственных площадках:

1. «Вэньчжоу Фенжуй Медикал Инструмент Лимитед Компани», Рум 104, Билдинг 29, Вэньчжоу Венбо Сайнс энд Технолоджи Индастриал Парк № 706, дорога ЯнЮн , улица ЛинКунь, район Удзянькоу Индастриал кластер, 325026, Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китайская Народная республика;

2. Общество с ограниченной ответственностью «АДЬЮТОР» (ООО «АДЬЮТОР»), Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 1, лит. Р. Телефон: +7 (812) 325-02-54, +7 (800) 444-5-325. Адрес электронной почты: 3250254@adjutor.ru.

Имя, № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Интв. №	Интв. №	Подпись и дата

ИАД-01.000-0.001 ИП					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	2

Область применения: широкого применения в медицинских лечебно-профилактических учреждениях и индивидуальными потребителями в составе измерителей артериального давления.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, оценка состояния сердечно-сосудистой системы.

Противопоказания: нестабильная гемодинамика, нарушение кровоснабжения конечностей, перелом плечевой (бедренной) кости, нарушение целостности кожных покровов в месте наложения манжеты, нарушение свертываемости крови на стадии обострения.

Информация о пользователе: пациент, медицинский специалист, физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению, определенному производителем.

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению, определенному производителем: неприятные ощущения в конечности ниже места наложения манжеты во время проведения процедуры (сдавление, покалывание, онемение, похолодание, слабые болевые ощущения), которые исчезают сразу после окончания процедуры; образование гематомы на месте наложения манжеты при нарушении свертываемости крови и проницаемости сосудов; индивидуальная непереносимость материала изделия, повторная или перекрестная инфекция.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия (МИ) в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ Минздрава от 06 июня 2012 №4н): 1.

Код вида МИ в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ Минздрава от 06 июня 2012 №4н): 145180.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий по ГОСТ Р 50444 относится к группе 2 - носимые, переносные и передвижные, не предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах лечебного учреждения.

Инв. №	№ полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № публ.	Подпись и дата	ИД-01.000-0.001 ИП	Лист
							3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

Изделие нестерильные, многоразового применения.

При использовании проводится визуальный осмотр: проверка отсутствия механических повреждений.

Изделия подлежат ремонту. Информация о ремонте представлена в разделе 6.

Изделия безопасны при применении по назначению и при соблюдении условий эксплуатации, требований к показаниям и противопоказаниям, определенных изготовителем.

Изделия не содержат лекарственные средства, биологические и наноматериалы.

В общем виде (рисунок 1) манжета состоит из пневмокамеры (надувного компонента манжеты) и рукава или чехла (части манжеты, изготовленной из неэластичного материала, в которой размещена пневмокамера).

Манжеты выпускаются в номенклатурном ряде, представленном в таблице 1.

Внешний вид манжет представлен в приложении 1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ИАД-01.000-0.001 ИП					Лист
										4

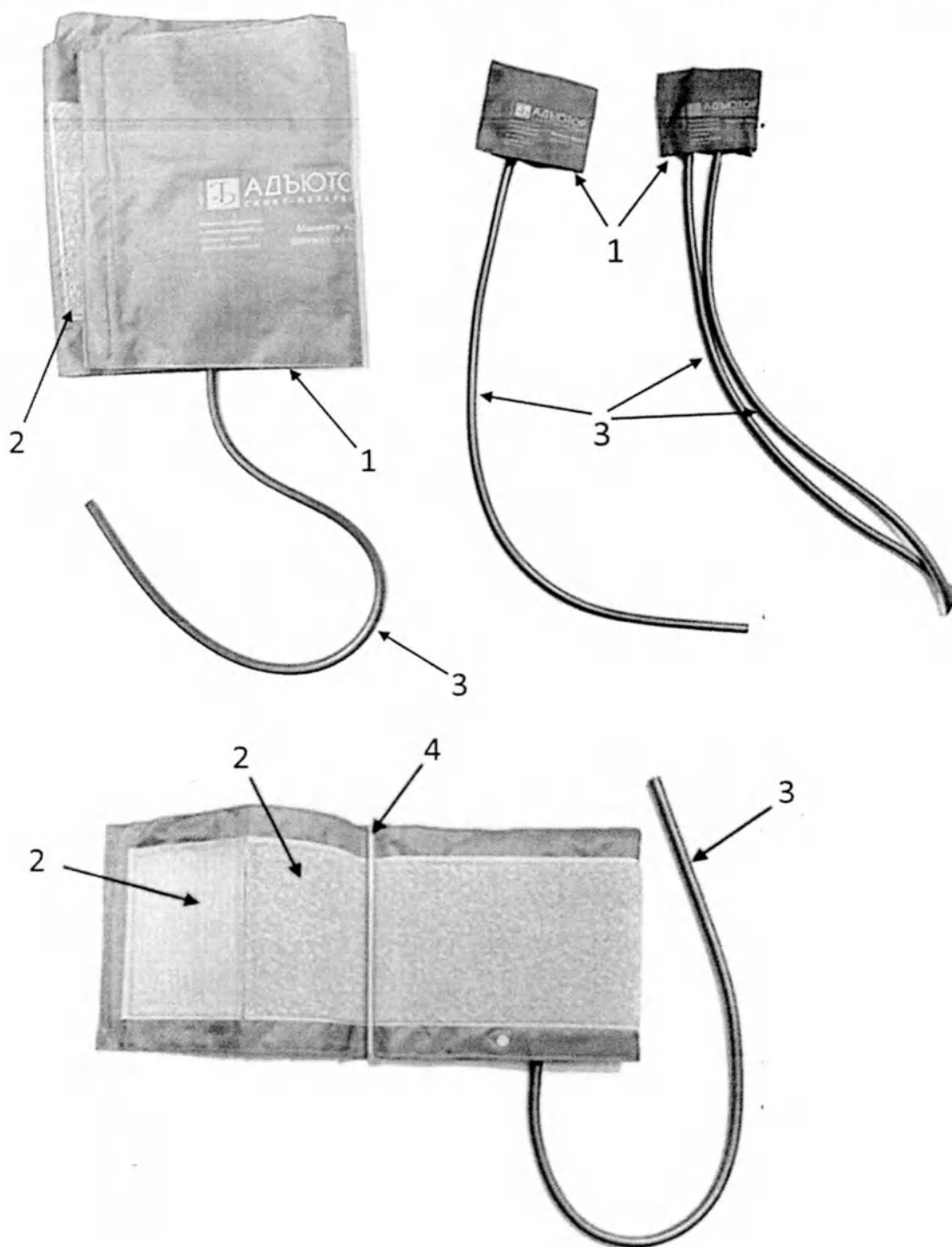


Рисунок 1 – Общий вид манжет

1 – рукав (чехол); 2 – текстильная застежка; 3 – пневматическая камера (пневмокамера) с одной или двумя трубками; 4 – металлическое кольцо

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
5

Таблица 1 – Номенклатура манжет

Обозначение (идентифика- ционный номер)	Описа- ние	Материал пневмока- меры	Размер пневмо- камеры, см (длина×ширина)	Кол-во трубок	Наличие кольца	Обхват, см	Размеры манжеты, см (длина×ширина)
AD2210	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×13±2	1	да	25 – 38	50±2×14±2
AD2211	взрослая, плечевая, средняя	ПВХ	22±2×13±2	1	да	22 – 32	50±2×14±2
AD2212	взрослая, плечевая, большая	латекс	30±2×15±2	1	нет	32 – 54	70±2×17±2
AD2213	взрослая, плечевая, большая	латекс	30±2×15±2	1	да	36 – 54	70±2×17±2
AD2214	детская, малая	латекс	12±1×6±1	1	нет	11 – 19	26,5±2×8±1
AD2215	детская, новорож- денная	латекс	9±1×3±0,5	1	нет	7 – 12	19,5±1×6,5±0,5
AD2216	детская, средняя	латекс	19±2×9±1	1	нет	18 – 26	35±2×10±1
AD2217	детская, средняя	латекс	19±2×9±1	1	да	18 – 26	35±2×10±1
AD2218	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×13±2	1	нет	25 – 38	50±2×14±2
AD2219	взрослая, бедрен- ная	латекс	35±2×17±2	1	нет	36 – 60	79±2×21,5±2
AD2220	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×13±2	2	да	25 – 38	50±2×14±2
AD2221	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×13±2	2	нет	25 – 38	50±2×14±2
AD2222	взрослая, плечевая, большая	латекс	30±2×15±2	2	да	36 – 54	70±2×17±2
AD2223	взрослая, бедрен- ная	латекс	35±2×17±2	2	нет	36 – 60	79±2×21,5±2
AD2224	взрослая, плечевая, большая	латекс	30±2×15±2	2	нет	32 – 54	70±2×17±2
AD2225	детская, новорож- денная	латекс	9±1×4±0,5	2	нет	7 – 12	19,5±1×6,5±0,5
AD2226	детская, малая	латекс	12±2×6±1	2	нет	11 – 19	26,5±2×8±1
AD2227	детская, средняя	латекс	19±2×9±1	2	нет	18 – 26	35±2×10±1
AD2228	детская, средняя	латекс	19±2×9±1	2	да	18 – 26	35±2×10±1
AD2229	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×12±2	2	нет	22 – 42	54±2×14±2
AD2230	взрослая, плечевая, большая	ПВХ	30±2×15±2	1	да	30 – 45	62±2×17,5±2
AD2231	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×12±2	1	нет	22 – 42	54±2×14±2
AD2232	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×12±2	1	да	24 – 42	54±2×14±2

Инв. № пол.	Подпись и дата	Инв. № публ.	Взам. инв. №	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
6

Обозначение (идентификационный номер)	Описание	Материал пневмокамеры	Размер пневмокамеры, см (длина×ширина)	Кол-во трубок	Наличие кольца	Обхват, см	Размеры манжеты, см (длина×ширина)
AD2233	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×12±2	1	да	24 – 42	55±2×13±2 (конус)
AD2234	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×12±2	1	нет	22 – 42	55±2×13±2 (конус)
AD2235	взрослая, плечевая, средняя	ПВХ	22±2×13±2	1	нет	22 – 42	55±2×13±2 (конус)
AD2236	взрослая, плечевая, средняя	ПВХ	22±2×13±2	1	да	24 – 42	55±2×13±2 (конус)
AD2240	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×12±2	2	да	24 – 42	54±2×14±2
AD2241	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×12±2	2	да	24 – 42	55±2×13±2 (конус)
AD2242	взрослая, плечевая, средняя	латекс	22±2×12±2	2	нет	22 – 42	55±2×13±2 (конус)

Примечание: оптимальный размер пневмокамеры: ширина - 40%, длина - от 80% до 100% окружности конечности пациента. Эти размеры необходимо соблюдать в центре диапазона окружностей конечностей, рекомендованных для каждого типоразмера манжеты – ГОСТ ISO 81060-1 п.7.2.4.

Функциональные и технические характеристики

1. Основные габаритный размеры манжет представлены в таблице 1. Длина трубок пневмокамеры на латексной основе должны быть от 45 до 50 см, на основе поливинилхлорида (ПВХ) – от 50 до 65 см; внешний диаметр трубок пневмокамеры должен составлять 7,5±0,5 мм, внутренний – 3,5±0,5 мм.

2. Масса изделий без упаковки и в индивидуальной упаковке представлена в таблице 2.

3. Габаритные размеры изделия в индивидуальной упаковке должны соответствовать указанным в таблице 3.

4. Манжета является изделием многократного использования, допускает повторение не менее 60 000 циклов работы.

Имя, № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. №	Полл. №	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ИАД-01.000-0.001 ИП	Лист
						7

Таблица 2 – Масса изделий

Наименование изделия (включая идентификационный номер)	Масса изделия, кг, не более	Масса изделия в полном комплекте поставки, кг, не более
Манжета AD2210 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (25-38), см	0,140	0,190
Манжета AD2211 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, с кольцом, обхват (22-32), см	0,130	0,200
Манжета AD2212 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (32-54), см	0,145	0,200
Манжета AD2213 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (36-54), см	0,220	0,290
Манжета AD2214 детская малая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (11-19), см	0,050	0,090
Манжета AD2215 детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (7-12), см	0,040	0,080
Манжета AD2216 детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (18-26), см	0,060	0,100
Манжета AD2217 детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (18-26), см	0,060	0,100
Манжета AD2218 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (25-38), см	0,1	0,160
Манжета AD2219 бедренная с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (36- 60), см	0,210	0,270
Манжета AD2220 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (25-38), см	0,155	0,200
Манжета AD2221 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (25-38), см	0,120	0,160
Манжета AD2222 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (36-54), см	0,210	0,270
Манжета AD2223 бедренная с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (36 -60), см	0,230	0,310
Манжета AD2224 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (32 -54), см	0,175	0,250
Манжета AD2225 детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (7-12), см	0,055	0,090
Манжета AD2226 детская малая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (11-19), см	0,060	0,100
Манжета AD2227 детская средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (18-26), см	0,080	0,120
Манжета AD2228 детская средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (18-26), см	0,115	0,150
Манжета AD2229 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (22-42), см	0,120	0,180
Манжета AD2230 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, с кольцом, обхват (30-45), см	0,180	0,250
Манжета AD2231 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (22-42), см	0,115	0,160
Манжета AD2232 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (24-42), см	0,145	0,200
Манжета AD2233 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (24-42), см	0,150	0,210
Манжета AD2234 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (22-42), см	0,115	0,170
Манжета AD2235 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, без кольца, обхват (22-42), см	0,100	0,140
Манжета AD2236 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, с кольцом, обхват (24-42), см	0,130	0,190
Манжета AD2240 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (24-42), см	0,160	0,210
Манжета AD2241 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (24-42), см	0,160	0,210
Манжета AD2242 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (22-42), см	0,125	0,180

Таблица 3 – Габаритные размеры изделия в индивидуальной упаковке

					ИАД-01.000-0.001 ИП	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

		Наименование изделия (включая идентификационный номер)	Габаритные размеры изделия в индивидуальной упаковке (длина × ширина × высота), мм (±10 мм)	
		Манжета AD2210 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (25-38), см	198×130×43	
		Манжета AD2211 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, с кольцом, обхват (22-32), см	198×130×43	
		Манжета AD2212 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (32-54), см	131×260×43	
		Манжета AD2213 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (36-54), см	131×260×43	
		Манжета AD2214 детская малая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (11-19), см	198×130×43	
		Манжета AD2215 детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (7-12), см	198×130×43	
		Манжета AD2216 детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (18-26), см	198×130×43	
		Манжета AD2217 детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (18-26), см	198×130×43	
		Манжета AD2218 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (25-38), см	198×130×43	
		Манжета AD2219 бедренная с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (36- 60), см	131×260×43	
		Манжета AD2220 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (25-38), см	198×130×43	
		Манжета AD2221 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (25-38), см	198×130×43	
		Манжета AD2222 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (36-54), см	131×260×43	
		Манжета AD2223 бедренная с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (36 -60), см	131×260×43	
		Манжета AD2224 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (32 -54), см	131×260×43	
		Манжета AD2225 детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (7-12), см	198×130×43	
Подпись и дата		Манжета AD2226 детская малая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (11-19), см	198×130×43	
		Манжета AD2227 детская средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (18-26), см	198×130×43	
		Манжета AD2228 детская средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (18-26), см	198×130×43	
		Манжета AD2229 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (22-42), см	198×130×43	
Изн. № публ.		Манжета AD2230 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, с кольцом, обхват (30-45), см	198×130×43	
		Манжета AD2231 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (22-42), см	198×130×43	
		Манжета AD2232 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (24-42), см	198×130×43	
		Манжета AD2233 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (24-42), см	198×130×43	
Взам. инв. №		Манжета AD2234 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (22-42), см	198×130×43	
		Манжета AD2235 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, без кольца, обхват (22-42), см	198×130×43	
		Манжета AD2236 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, с кольцом, обхват (24-42), см	198×130×43	
		Манжета AD2240 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (24-42), см	198×130×43	
Подпись и дата		Манжета AD2241 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (24-42), см	198×130×43	
		Манжета AD2242 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (22-42), см	198×130×43	
Изн. № подл.				
		Изд. Лист № докум. Подпись Дата	ИАД-01.000-0.001 ИП	Лист 9

Комплектность

1. Комплект поставки состоит из:
 - манжета – 1 шт.,
 - инструкция по применению – 1 экз.
2. Варианты комплектаций представлены в таблице 5.
3. Инструкция по применению вкладывается в транспортную тару.
4. Варианты комплектаций манжет представлены в таблице 4.

Таблица 5 – Варианты комплектаций манжет

Наименование изделия (включая идентификационный номер)					Обозначение документа	Количество, шт.
Манжета AD2210						
Манжета AD2210 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (25-38), см					ИАД-01.200-1.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2211						
Манжета AD2211 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, с кольцом, обхват (22-32), см					ИАД-01.300-1.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2212						
Манжета AD2212 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (32-54), см					ИАД-01.200-2.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2213						
Манжета AD2213 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (36-54), см					ИАД-01.200-3.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2214						
Манжета AD2214 детская малая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (11-19), см					ИАД-01.200-4.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2215						
Манжета AD2215 детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (7-12), см					ИАД-01.200-5.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2216						
Манжета AD2216 детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (18-26), см					ИАД-01.200-6.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2217						
Манжета AD2217 детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (18-26), см					ИАД-01.200-7.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2218						
Манжета AD2218 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (25-38), см					ИАД-01.200-8.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
ИАД-01.000-0.001 ИП						Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Наименование изделия (включая идентификационный номер)					Обозначение документа	Количество, шт.
Паспорт					-	1
Манжета AD2219						
Манжета AD2219 бедренная с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (36- 60), см					ИАД-01.200-9.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2220						
Манжета AD2220 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (25-38), см					ИАД-01.100-1.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2221						
Манжета AD2221 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (25-38), см					ИАД-01.100-2.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2222						
Манжета AD2222 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (36-54), см					ИАД-01.100-3.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2223						
Манжета AD2223 бедренная с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (36 -60), см					ИАД-01.100-4.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2224						
Манжета AD2224 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (32 -54), см					ИАД-01.100-5.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2225						
Манжета AD2225 детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (7-12), см					ИАД-01.100-6.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2226						
Манжета AD2226 детская малая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (11-19), см					ИАД-01.100-7.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2227						
Манжета AD2227 детская средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (18-26), см					ИАД-01.100-8.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2228						
Манжета AD2228 детская средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (18-26), см					ИАД-01.100-9.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2229						
Манжета AD2229 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (22-42), см					ИАД-01.100-2.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2230						
Манжета AD2230 взрослая плечевая большая с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, с кольцом, обхват (30-45), см					ИАД-01.300-2.002	1
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1
Паспорт					-	1
Манжета AD2231						
Манжета AD2231 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой					ИАД-01.200-8.002	1
Изм.					Лист	
Лист					11	
№ докум.						
Подпись						
Дата						

Наименование изделия (включая идентификационный номер)					Обозначение документа	Количество, шт.	
из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (22-42), см							
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1	
Паспорт					-	1	
Манжета AD2232							
Манжета AD2232 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (24-42), см					ИАД-01.200-1.002	1	
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1	
Паспорт					-	1	
Манжета AD2233							
Манжета AD2233 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, с кольцом, обхват (24-42), см					ИАД-01.200-1.002	1	
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1	
Паспорт					-	1	
Манжета AD2234							
Манжета AD2234 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой, без кольца, обхват (22-42), см					ИАД-01.200-8.002	1	
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1	
Паспорт					-	1	
Манжета AD2235							
Манжета AD2235 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, без кольца, обхват (22-42), см					ИАД-01.300-1.002	1	
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1	
Паспорт					-	1	
Манжета AD2236							
Манжета AD2236 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой, с кольцом, обхват (24-42), см					ИАД-01.300-1.002	1	
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1	
Паспорт					-	1	
Манжета AD2240							
Манжета AD2240 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (24-42), см					ИАД-01.100-1.002	1	
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1	
Паспорт					-	1	
Манжета AD2241							
Манжета AD2241 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, с кольцом, обхват (24-42), см					ИАД-01.100-1.002	1	
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1	
Паспорт					-	1	
Манжета AD2242							
Манжета AD2242 взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками, без кольца, обхват (22-42), см					ИАД-01.100-2.002	1	
Инструкция по применению					ИАД-01.000-0.001 ИП	1	
Паспорт					-	1	
Стерилизация и дезинфекция							
1. Изделие поставляется в нестерильном виде. Не подлежит стерилизации.							
2. Перед каждым применением, в том числе и после поставки, подлежит дезинфекции в соответствии с требованиями медицинского учреждения и МУ 287.							
3. Поверхности манжет, контактирующие с кожей человека, должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.							
Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата	ИАД-01.000-0.001 ИП		Лист
							12
					Изм.	Лист	№ докум.

Подготовка к применению и эксплуатация

1 Подготовка к применению

1.1 Присоедините к одной из трубок манжеты манометр, а к другой трубке – нагнетатель (при использовании манжеты с пневмокамерой с одной трубкой – присоедините к трубке манжеты манометр, совмещенный с нагнетателем).

1.2 Манжета может быть оснащена специальной петлей для удобства фиксации головки стетофонендоскопа. Для закрепления головки стетофонендоскопа проденьте штуцер головки через петлю и затем соедините его с одинарным концом Y-образной трубки стетофонендоскопа.

2 Порядок эксплуатации

2.1 Перед измерением давления рекомендуется расслабиться и отдохнуть в течение 5 – 10 минут.

2.2 Разогните руку и расположите ее ладонью вверх. Не рекомендуется накладывать манжету на ткань одежды, закатывать рукава с образованием сдавливающих валиков из ткани. Артериальное давление (АД) может определяться в положении «сидя», «лежа» и «стоя». Для корректного измерения АД необходимо обеспечить положение руки, при котором середина манжеты находится на уровне сердца. Не допускается положение руки на «весу».

2.3 Наложите манжету на плечо таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2,5 см выше локтевой ямки, и закрепите с помощью текстильной застежки. Между манжетой и поверхностью плеча должно помещаться два пальца (для детей и взрослых с маленьким объемом руки – один палец).

2.4 Выполните измерение артериального давления как описано в руководстве по эксплуатации Вашего прибора.

2.5 Не создавайте в манжете давление выше 300 мм рт. ст.

2.6 Измеритель артериального давления является ремонтпригодным изделием.

2.7 Изделие может применяться индивидуальными пользователями без консультации с медицинским персоналом, при условии ознакомления с устройством манжеты и соблюдении правила безопасной эксплуатации, рекомендованными изготовителем.

2.8 Критерии непригодности

2.8.1 Критериями непригодности манжет считают несоответствие прибора по следующим показателям:

– нарушение целостности манжеты при эксплуатации;

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист

13

Ина. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ина. № публ.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

- превышение значений максимальной погрешности индикации давления в условиях эксплуатации;
- превышение скорости падения давления (утечка в пневмосистеме).

Транспортирование и хранение

1. Транспортирование изделия может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

2. Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

3. Расстановка и крепление транспортировочных ящиков должно обеспечивать их устойчивое положение и отсутствие смещения во время транспортирования.

4. Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 для температур от минус 50°C до плюс 70°C.

6. Не допускается хранить изделия в помещении, где находятся испаряющиеся жидкости и вещества, которые могут вызвать коррозию и не менее чем 1 м от нагревательных приборов.

Техническое обслуживание и ремонт

1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора установленным требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. В течение установленных гарантийных сроков изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт или замену изделия, вышедшего из строя.

3. Гарантийный ремонт прибора проводится при наличии гарантийного талона с отметкой о дате реализации.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № публ.	Подпись и дата	Изд. №	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ИАД-01.000-0.001 ИП	14

4. Обо всех случаях отказа в работоспособности изделия, не указанных изготовителем, сообщить по адресу гарантийного обслуживания.

Утилизация

1. Упаковку утилизируют в местах сбора бытового мусора.
2. Утилизацию изделий осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).
3. Утилизацию изделий, использованных в инфекционных отделениях, осуществляют в действующем порядке, предусмотренном в медицинском учреждении.

Гарантии изготовителя

1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия установленным требованиям при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 6 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть, но не более 12 месяцев с даты изготовления.
3. В течение установленных гарантийных сроков предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт или замену изделия, вышедшего из строя.
4. При выходе из строя изделия в результате механических повреждений или в результате несоблюдения ограничений, накладываемых на его эксплуатацию, безвозмездный ремонт или замена изделия предприятием-изготовителем не гарантируется.
5. Адрес гарантийного обслуживания: Общество с ограниченной ответственностью «АДЬЮТОР» (ООО «АДЬЮТОР»), Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 1, лит. Р., тел. 8 (812) 325-02-54, 8 (800) 444-5-325.

Инв. №	полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	л/бл.	Подпись и дата

						ИАД-01.000-0.001 ИП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			15

Приложение 1
Общий вид изделий



Рисунок 1 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом AD2210 (лицевая и оборотная стороны)



Рисунок 2 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой с кольцом AD2211 (лицевая и оборотная стороны)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
16



Рисунок 3 – Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2212 (лицевая и оборотная стороны)

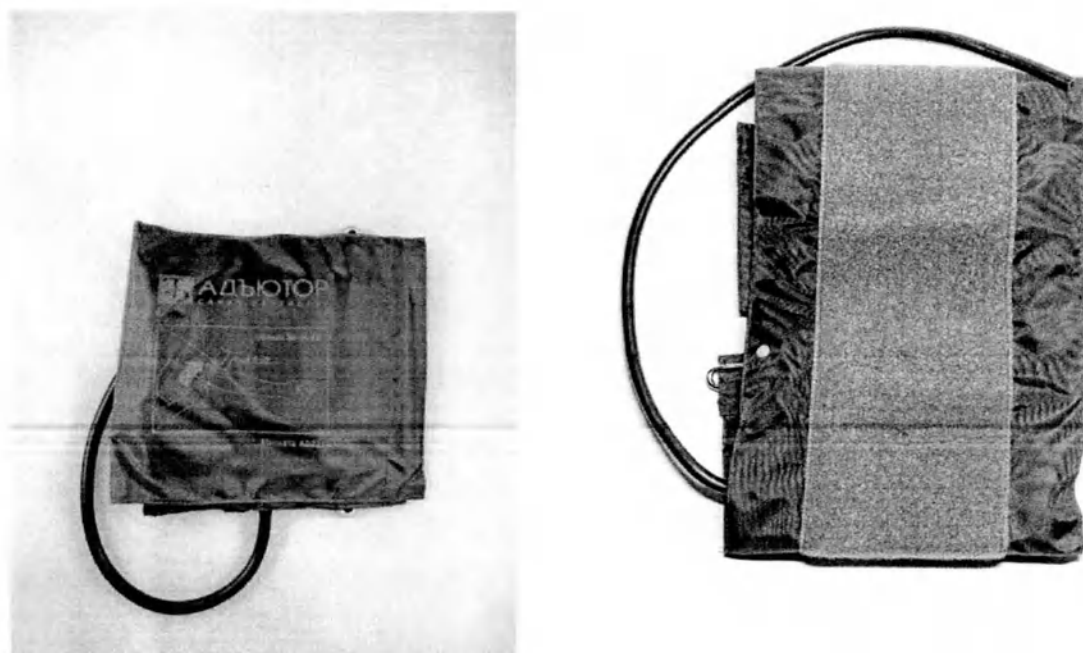


Рисунок 4 – Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом AD2213 (лицевая и оборотная стороны)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



Рисунок 4 – Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом AD2213 (лицевая и оборотная стороны)

Инв. № подл.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ИАД-01.000-0.001 ИП	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

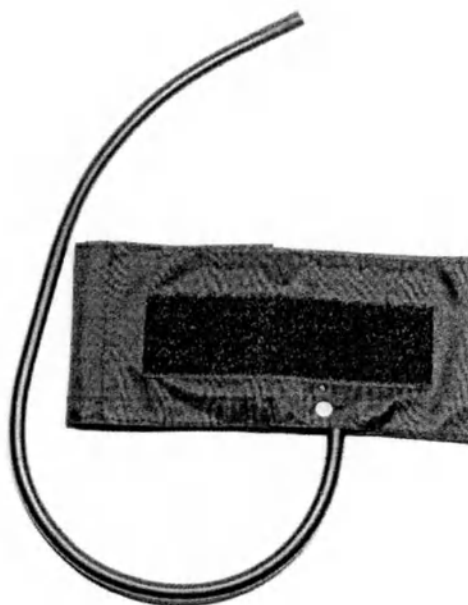
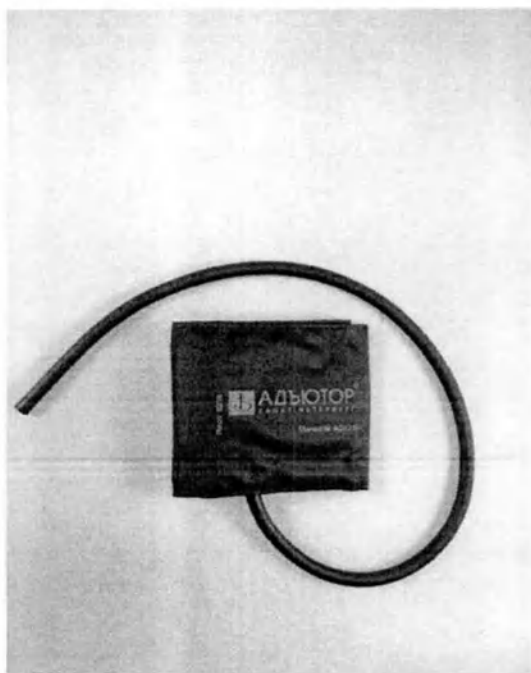


Рисунок 5 – Манжета детская малая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2214 (лицевая и обратная стороны)

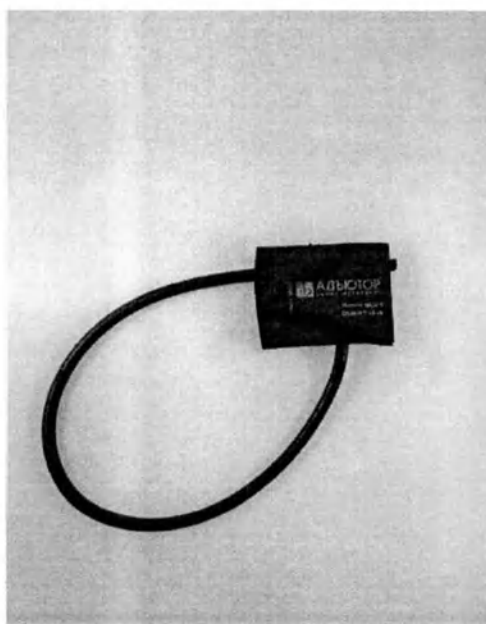


Рисунок 6 – Манжета детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2215 (лицевая и обратная стороны)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
18

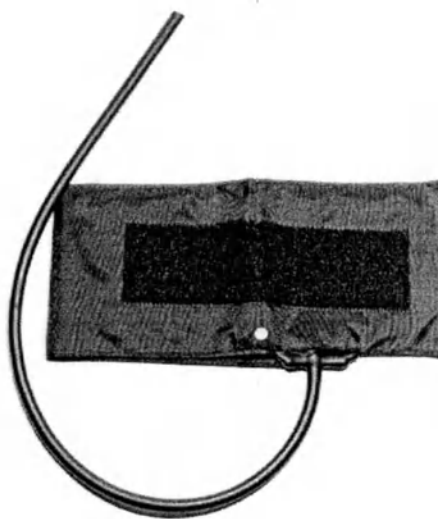


Рисунок 7 – Манжета детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2216 (лицевая и оборотная стороны)



Рисунок 8 – Манжета детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом AD2217 (лицевая и оборотная стороны)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
19



Рисунок 9 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2218 (лицевая и оборотная стороны)

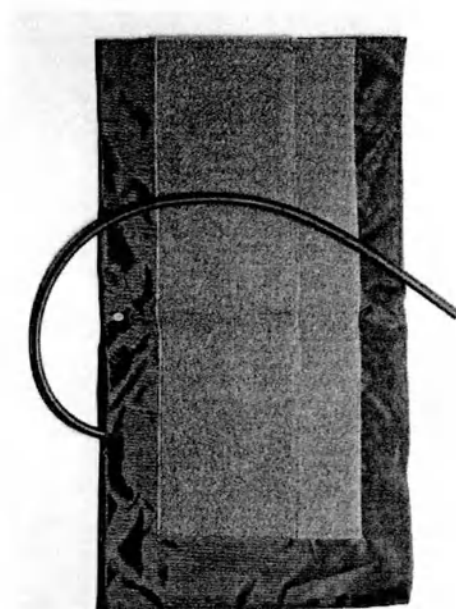


Рисунок 10 – Манжета бедренная с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2219 (лицевая и оборотная стороны)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
20

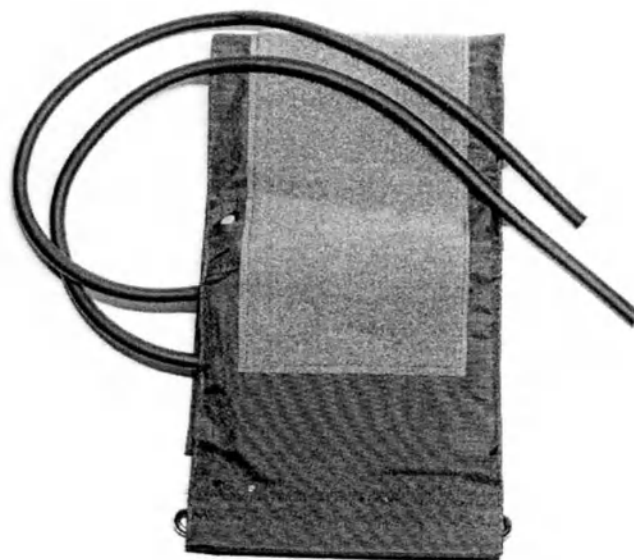


Рисунок 11 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом AD2220 (лицевая и оборотная сторона)

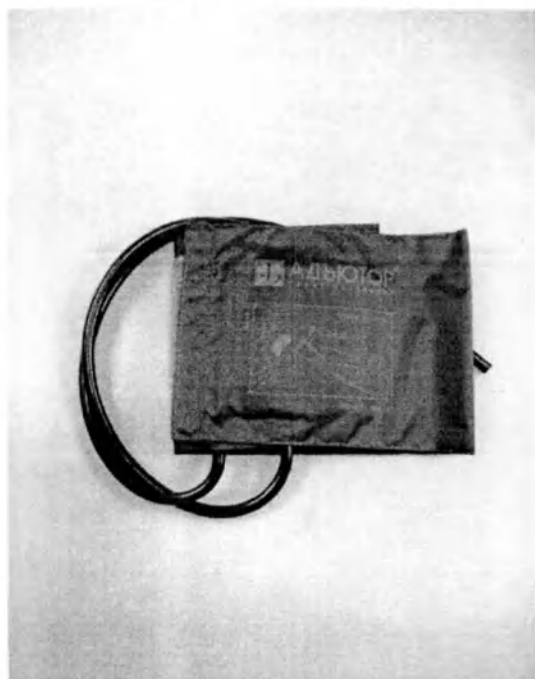


Рисунок 12 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2221 (лицевая и оборотная сторона)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
21



Рисунок 13 – Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом AD2222 (лицевая и обратная сторона)

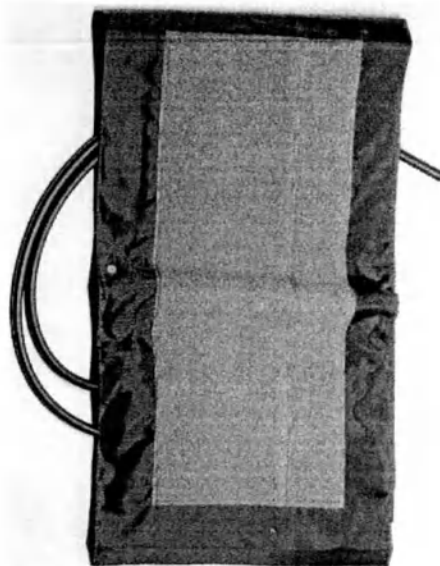


Рисунок 14 – Манжета бедренная с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2223 (лицевая и обратная стороны)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № публ.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
22

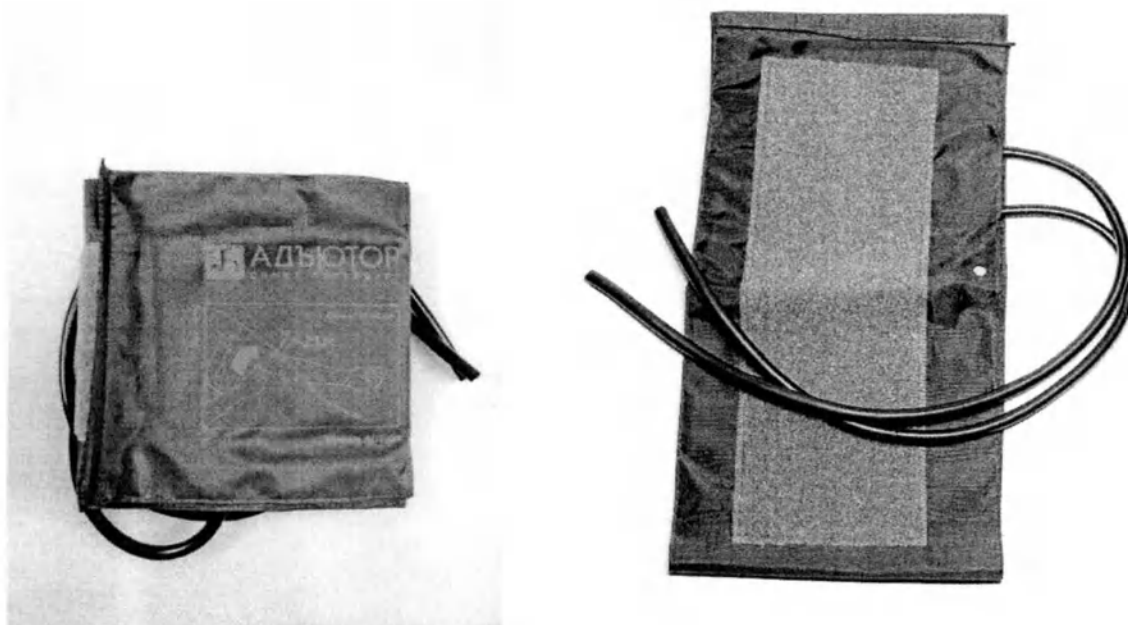


Рисунок 15 – Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2224 (лицевая и обратная стороны)

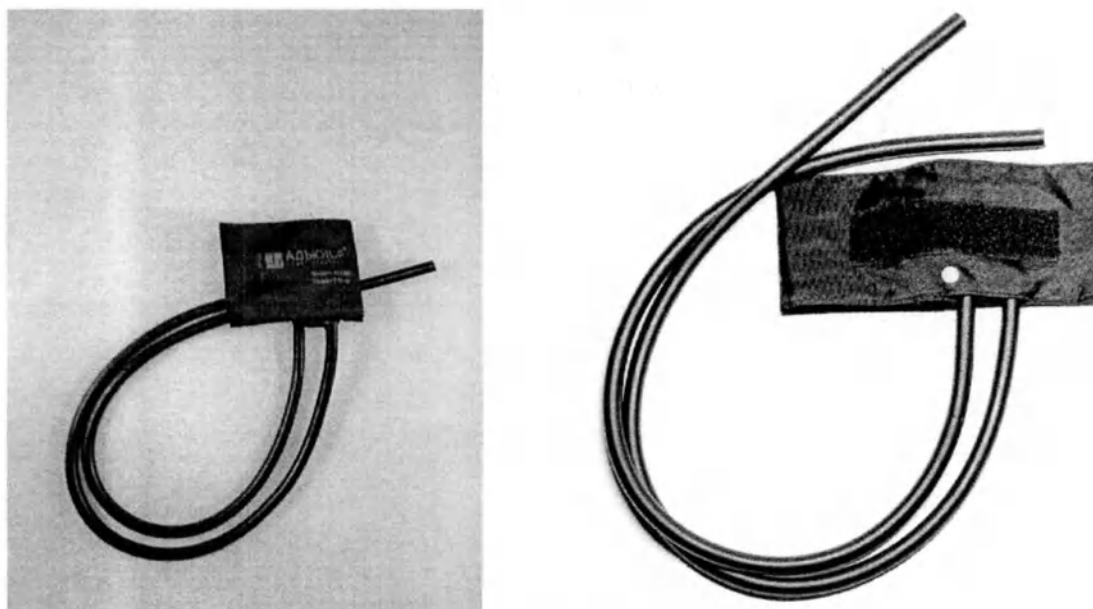


Рисунок 16 – Манжета детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2225 (лицевая и обратная сторона)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
23

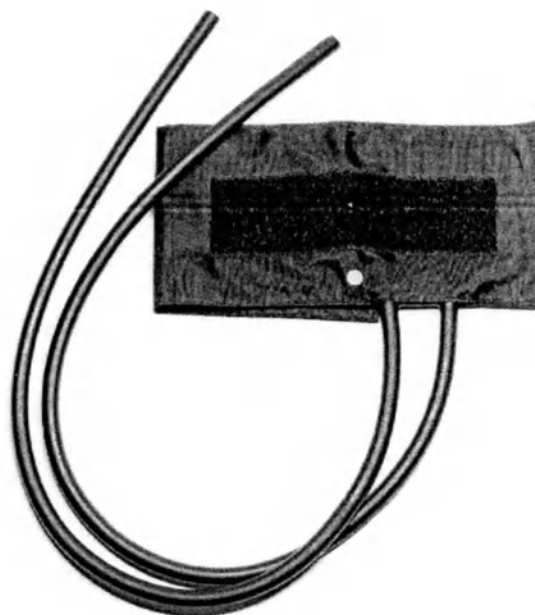


Рисунок 17 – Манжета детская малая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2226 (лицевая и оборотная стороны)

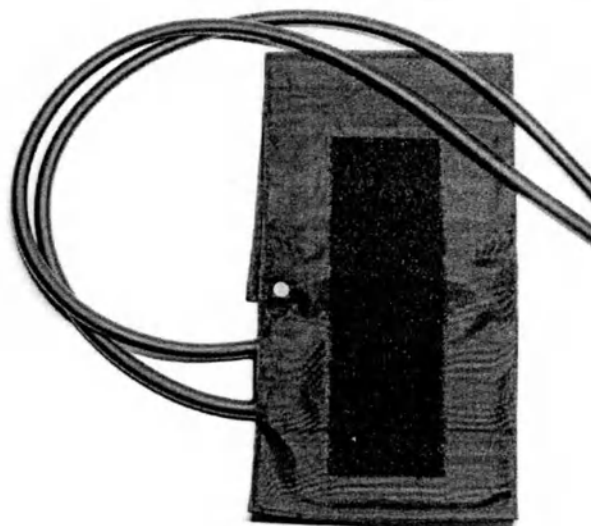


Рисунок 18 – Манжета детская средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2227 (лицевая и оборотная стороны)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
24



Рисунок 19 – Манжета детская средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом AD2228 (лицевая и оборотная стороны)



Рисунок 20 – Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой с кольцом AD2230 (лицевая и оборотная сторона)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № тубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
25

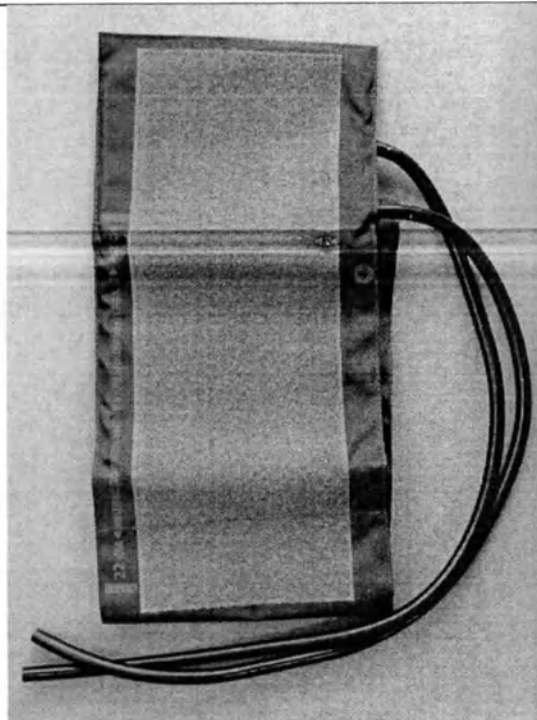
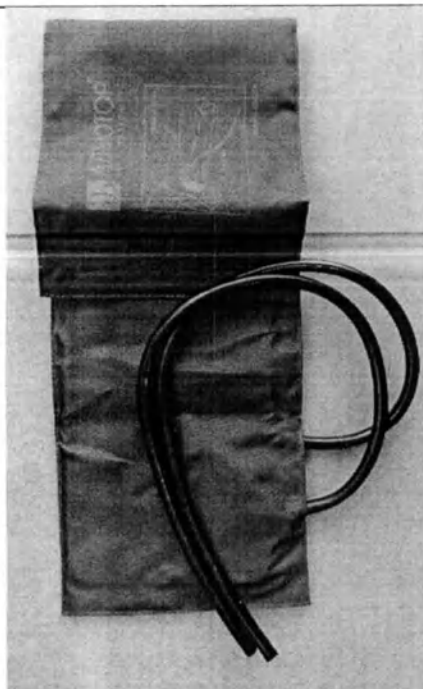


Рисунок 21 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2229 (лицевая и оборотная сторона)

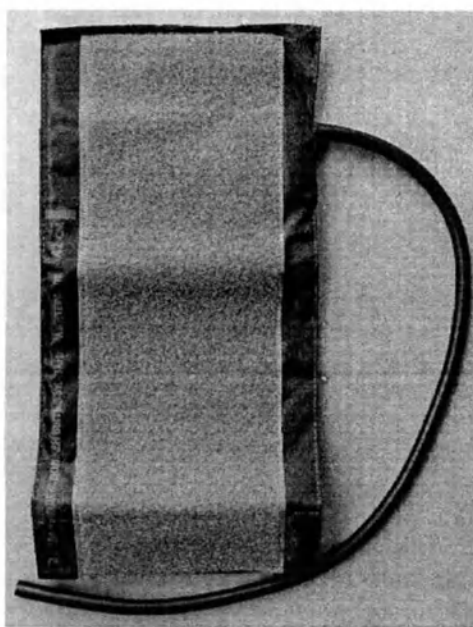
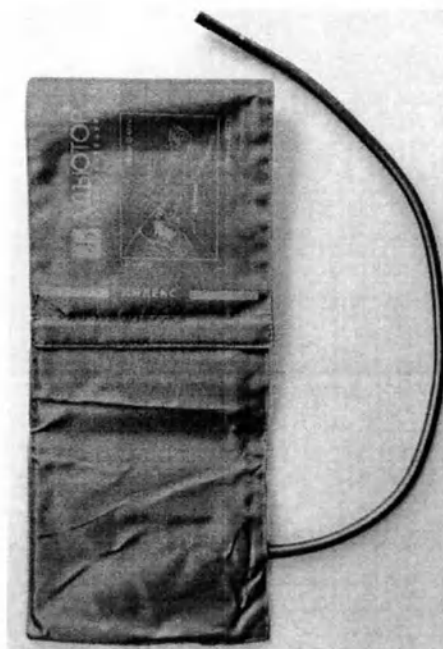


Рисунок 22 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2231 (лицевая и оборотная сторона)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
26

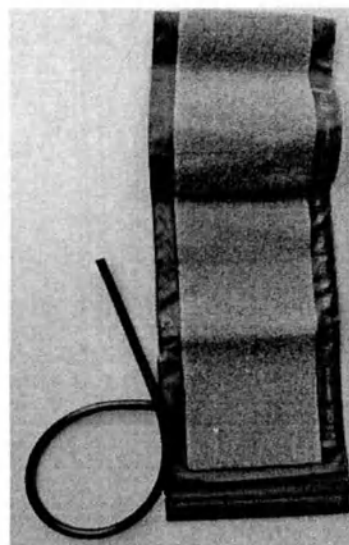
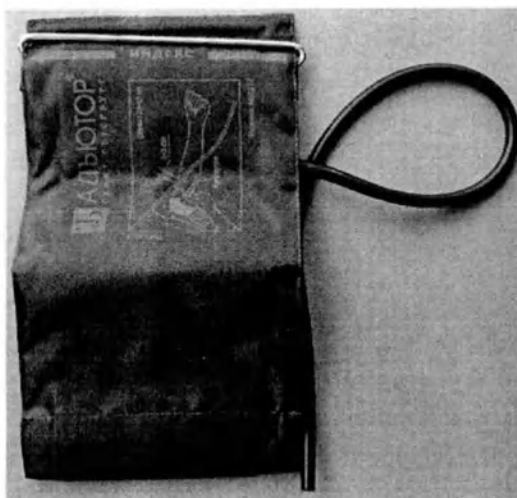


Рисунок 23 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом AD2232 (лицевая и оборотная сторона)

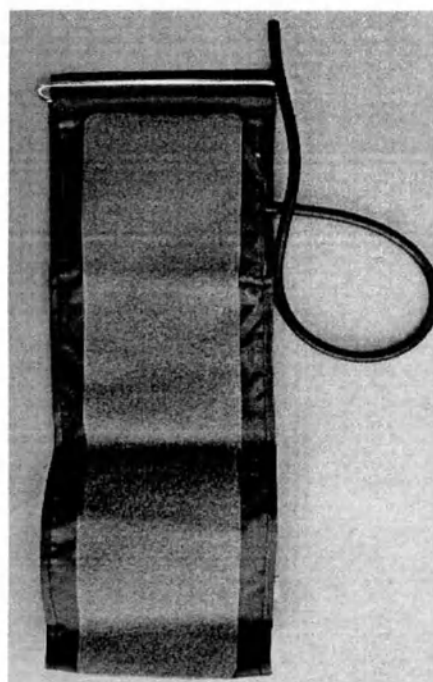


Рисунок 24 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом AD2233 (лицевая и оборотная сторона)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
27

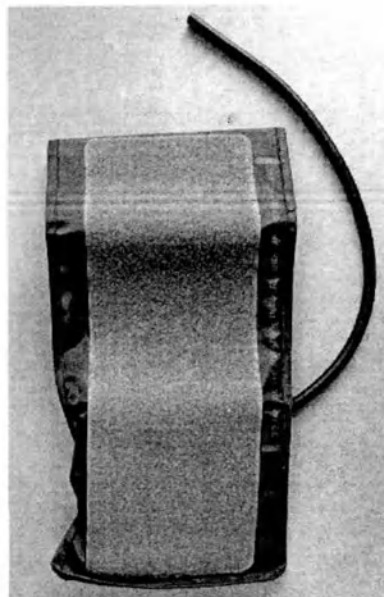


Рисунок 25 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2234 (лицевая и оборотная сторона)

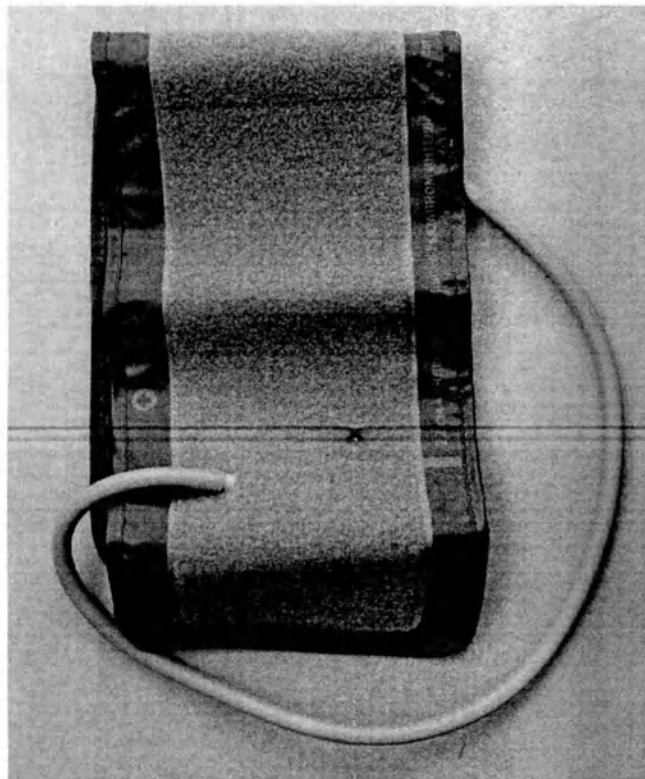
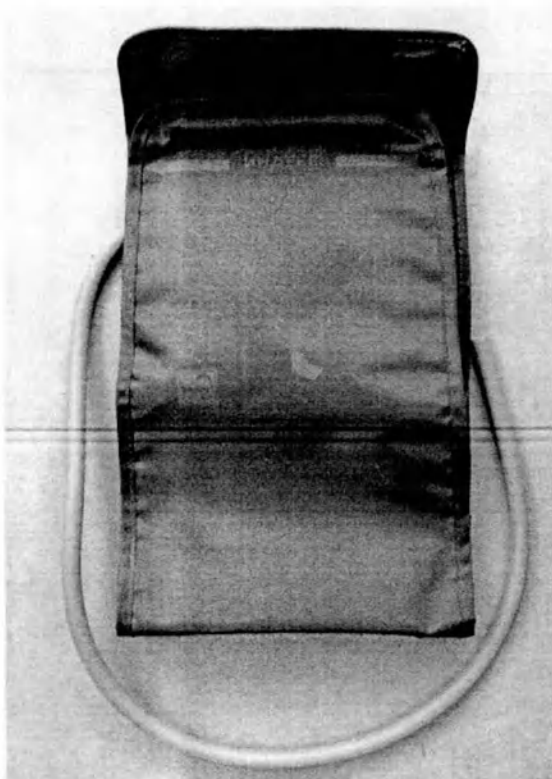


Рисунок 26 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой без кольца AD2235 (лицевая и оборотная сторона)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
28

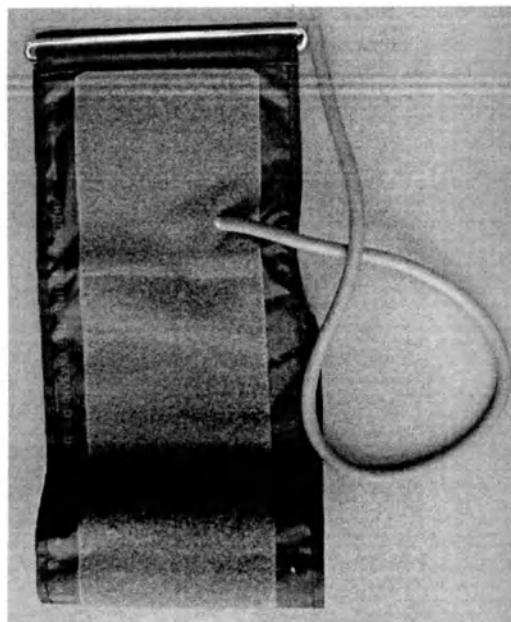
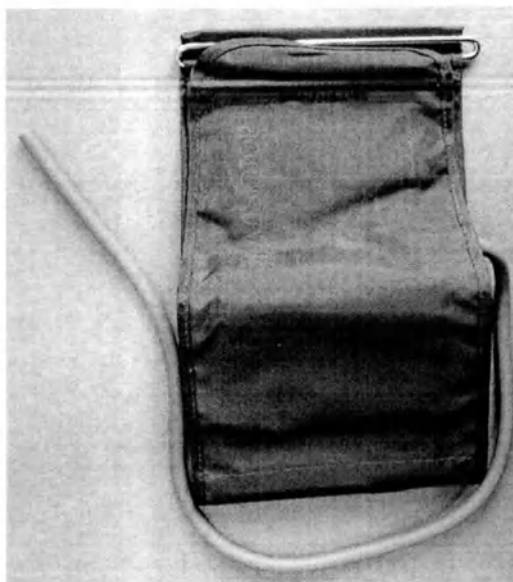


Рисунок 27 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой с кольцом AD2236 (лицевая и обратная сторона)

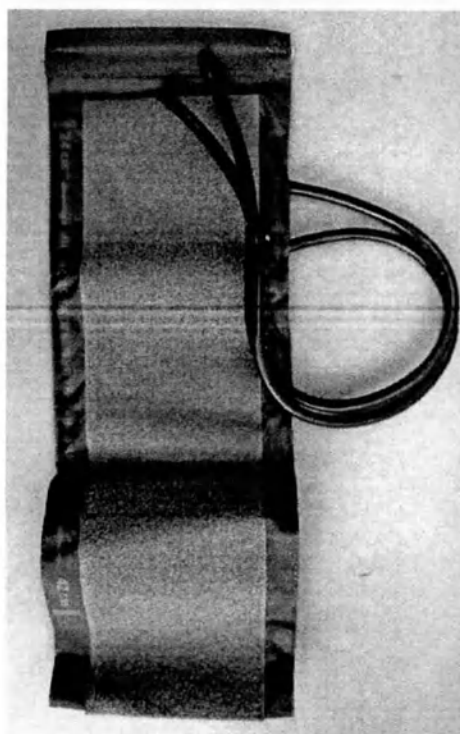
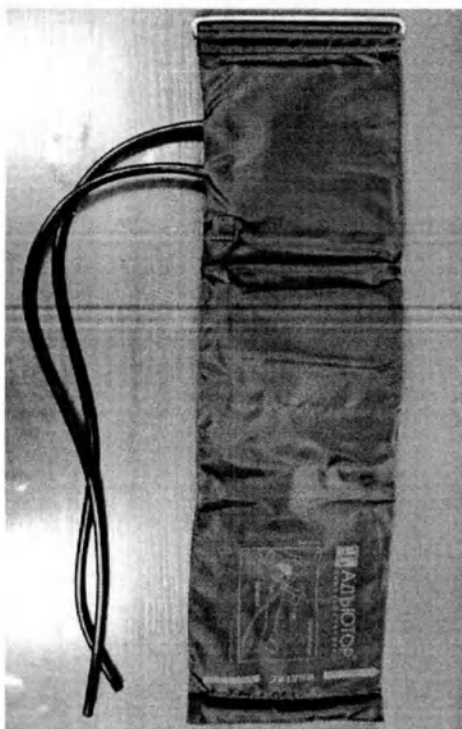


Рисунок 28 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом AD2240 (лицевая и обратная сторона)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
29

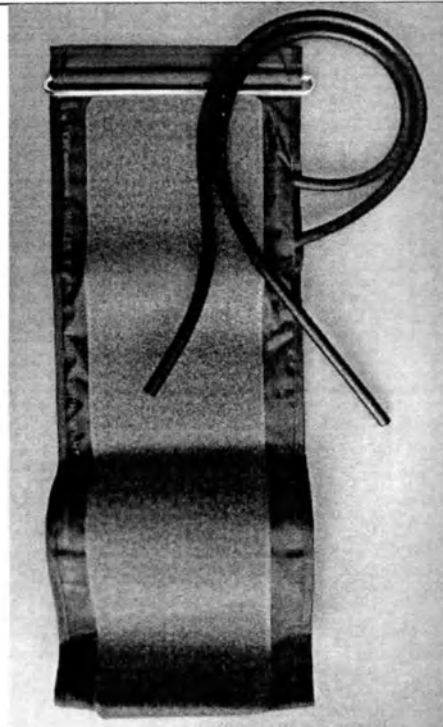


Рисунок 29 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом AD2241 (лицевая и оборотная сторона)

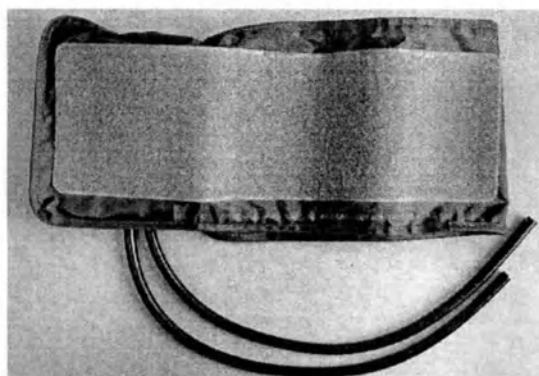
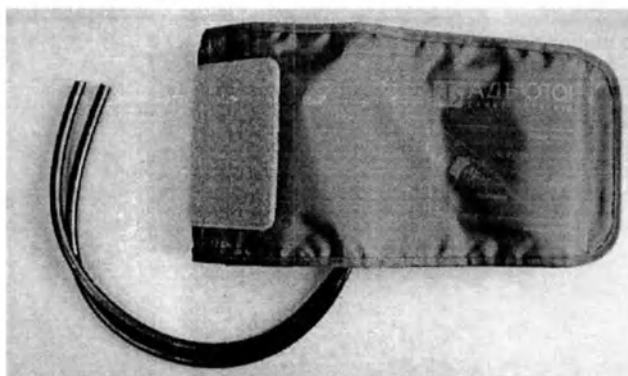


Рисунок 30 – Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2242 (лицевая и оборотная сторона)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИАД-01.000-0.001 ИП

Лист
30

Исполнительный директор
ООО "АДЪЮТОР"
Лузгин А.А.
по доверенности № 400
от 31.05.2024г.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 30

Лужгин

листах

300724

