



Инструкция по применению

Белье медицинское женское компрессионное VIAGGIO® по ТУ 32.50.22-001-79364538-2018

Производитель: ООО «Валенто»

**Россия, 125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, д.39, корп. 1,
этаж подвал пом. I, ком.63**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Валенто»

Россия, 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.39, корп. 1, этаж подвал пом. I, ком.63

Тел: 8-495-777-42-40

Место производства медицинского изделия:

Россия, 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д.7, стр. 6

НАЗНАЧЕНИЕ

Компрессионное белье предназначено для создания лечебного давления и проведения компрессионной терапии в послеоперационный период в целях профилактики и лечения осложнений.

ПОКАЗАНИЯ

Бандаж компрессионный в виде панталон с высоким поясом, выше колен, без усиления (арт. 3000)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области, в области ягодиц, бедер, галифе. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде панталон с высоким поясом, выше колен, с усилением (арт. 3010)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области, в области ягодиц, бедер, галифе. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде панталон с высоким поясом, выше колен, с двойным усилением (арт. 3020)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области, в области ягодиц, бедер, галифе. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде грации-панталон, выше колен, с формованной чашкой (арт. 3030)

Предназначен для использования в период реабилитации после одновременных операций маммопластики груди, абдоминопластики, липосакции в абдоминальной области, в области ягодиц, бедер, галифе. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде грации-панталон, выше колен, с рукавами (арт. 3040)

Предназначен для использования в период реабилитации после одновременных операций маммопластики груди, абдоминопластики, липосакции в абдоминальной области, в области ягодиц, бедер, галифе, рук. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде панталон с высокой спинкой, выше колен, с усилением (арт. 3050)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как глутеопластика, абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области, в области ягодиц, бедер, галифе. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде панталон с высоким поясом, ниже колен без усиления (арт. 3500)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как подтяжка ягодиц, голени, колен, абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области, в области ягодиц, бедер, галифе. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде панталон с высоким поясом, до щиколоток с двойным усилением (арт. 3510)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как подтяжка ягодиц, голени, колен, абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области, в области ягодиц, бедер, галифе. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде панталон с высокой спинкой, до щиколоток с двойным усилением (арт. 3520)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как подтяжка ягодиц, голени, колен, абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области, в области ягодиц, бедер, галифе. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде шорт без усиления (арт. 3200)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как липосакция нижней части живота, в области ягодиц, бедер и галифе. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде бридж без усиления (арт. 3300)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как липосакция нижней части живота, в области ягодиц, бедер, галифе, колен. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде лосин без усиления (арт. 3400)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как липосакция нижней части живота, в области ягодиц, бедер, галифе, колен, голени. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде боди с фронтальной застежкой с двойным усилением (арт. 3090)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде боди с фронтальной застежкой без усиления (арт. 3100)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде боди с боковой застежкой с двойным усилением (арт. 3110)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде боди с боковой застежкой с усилением (арт. 3120)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области. А также при лечении келоидных рубцов.

Маска компрессионная (арт. 2000)

Предназначена для использования в период реабилитации после подтяжки лица, шеи и подбородка, установки подбородочных и малярных имплантатов, после липосакции в районе подбородка и шеи для послеоперационного моделирования этих областей, после операционного удаления жировых тел Биша.

Маска компрессионная универсальная (арт. 2001)

Предназначена для использования в период реабилитации после подтяжки лица, шеи и подбородка, установки подбородочных и малярных имплантатов, после липосакции в районе подбородка и шеи для послеоперационного моделирования этих областей, после операционного удаления жировых тел Биша.

Полоска компрессионная, разъемная, на голову (арт. 2010)

Предназначена для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как отопластика.

Бюстгальтер компрессионный (арт. 1090)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций на молочных железах, таких как мастопексия, аугментационная маммопластика.

Бюстгальтер компрессионный с фиксирующей лентой (арт. 1100)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций на молочных железах, таких как мастопексия, аугментационная маммопластика.

Бюстгальтер компрессионный со съёмной лентой (арт. 1110)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций на молочных железах, таких как мастопексия, аугментационная маммопластика.

Бюстгальтер компрессионный с карманом (арт. 1200)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций на молочных железах, таких как мастопексия, редукционная маммопластика.

Бюстгальтер компрессионный с формованной чашкой и съёмной лентой (арт. 1300)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций на молочных железах, таких как мастопексия, аугментационная маммопластика.

Бюстгальтер компрессионный с формованной чашкой (арт. 1310)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций на молочных железах, таких как мастопексия, аугментационная маммопластика.

Бюстгальтер компрессионный с выточкой (арт. 2040)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций на молочных железах, таких как мастопексия, аугментационная маммопластика.

Бандаж на грудную клетку компрессионный однополосный, разъемный (арт. 4000)

Предназначен для использования в период реабилитации после мастэктомии.

Бандаж компрессионный в виде пояса с усилением универсальный 15 см (арт. 1500)

Предназначен для использования как до- и послеродовой бандаж.

Бандаж компрессионный в виде пояса с усилением универсальный 20 см (арт. 1510)

Предназначен для использования как до- и послеродовой бандаж.

Бандаж компрессионный в виде пояса без усиления полуприлегающий (арт. 1600)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде пояса без усиления прямой (арт. 1610)

Предназначен для использования в период реабилитации после пластических и реконструктивных операций, таких как абдоминопластика, липосакция в абдоминальной области. А также при лечении келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде полуграции с закрытым лифом, с усилением (арт. 2300)

Предназначен для использования в период реабилитации после липосакции спины, рук.

Бандаж компрессионный в виде полуграции с открытым лифом, с усилением (арт. 2310)

Предназначен для использования в период реабилитации после липосакции спины, рук.

Бандаж компрессионный в виде двух рукавов (арт. 2315)

Предназначен для использования в период реабилитации после липосакции спины, рук.

Бандаж компрессионный в виде полуграции с воротником, с усилением (арт. 2320)

Предназначен для использования в период реабилитации после липосакции заднего шейно-грудного отдела.

Бандаж на грудную клетку компрессионный с двумя застежками, с одним рукавом(арт. 2330)

Предназначен для использования в период реабилитации после мастэктомии.

Бандаж на грудную клетку компрессионный с одной застежкой, с одним рукавом (арт. 2340)

Предназначен для использования в период реабилитации после мастэктомии.

Бандаж компрессионный в виде рукава (арт. 1401)

Предназначен для использования в период реабилитации после мастэктомии, при лечении лимфостаза, в период лечения келоидных рубцов.

Бандаж компрессионный в виде рукава с пальцем (арт. 1402)

Предназначен для использования в период реабилитации после мастэктомии, при лечении лимфостаза, в период лечения келоидных рубцов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Хронические заболевания артерий нижних конечностей, нарушенное в высокой степени артериальное кровообращение, трофические язвы невензной этиологии, кардиальные отеки (декомпенсация сердечной недостаточности), острая инфекция мягких тканей. Тяжелые формы диабета, высокий риск развития венозных тромбозмболических осложнений, острое воспаление, обусловленное патогенной флорой.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Выбор неправильного размера и вида послеоперационного компрессионного белья может вызвать некроз тканей и гематомы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Компрессионное белье в медицинских целях следует носить по рекомендации специалиста круглосуточно, не снимая в течении 7 дней после операции. Длительность курса ношения согласовывается со специалистом или определяется назначением. Подбирать размер необходимо

после измерения согласно таблице, указанной на упаковке. Белье одевается непосредственно на тело. Изделия имеют удобные застежки спереди, которые дают возможность четкой фиксации на теле и регулирования размера. Привыкание к компрессии происходит через 2-3 дня, следует это учитывать.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- белье, применяемое в послеоперационный период, следует носить круглосуточно, снимать белье рекомендуется максимум на 30 минут, во время принятия ванны или смазывания кожи кремом.
- при одевании компрессионного белья не следует тянуть швы и резинку, нужно аккуратно расправить его на теле, если при неправильном обращении с бельем вдруг появились нитки из швов, их не нужно срезать, а следует аккуратно заправить.
- белье нужно стирать один раз в неделю для удаления выделений (кислот и солей) и загрязнений, чтобы избежать разрушения волокон, отвечающих за эластичность, рекомендуется покупать второй комплект на смену, т. к. после 7 дней послеоперационной реабилитации возможна более частая смена компрессионного белья: при ежедневной стирке производитель гарантирует сохранение эксплуатационных свойств медицинского изделия;
- ручная стирка при температуре 40 градусов в мыльном растворе;
- во время стирки следует использовать моющие средства без отбеливателя, не следует использовать средства, придающие мягкость белью;
- сушить белье рекомендуется на горизонтальной поверхности (без отжима), промокнув полотенцами. Не следует сушить белье вблизи открытого огня, батареи центрального отопления и др.;
- нельзя подвергать белье химической чистке;
- запрещается утюжить (отпаривать) белье.
- хранить белье при комнатной температуре, защищая от жары и влаги.

При определении необходимого размера белья следует пользоваться указанными ниже таблицами и рисунком «Места измерений размерных признаков по поверхности тела» и следующими рекомендациями:

- Все измерения приведены в сантиметрах и выполняются с помощью сантиметровой ленты, которая должна плотно прилегать к телу;
- Обхват головы для маски – сантиметровая лента проходит по замкнутой линии вокруг головы (через макушку, щеки и подбородок);
- Обхват головы для полоски – сантиметровая лента проходит вокруг головы через самую выдающуюся часть головы сзади, захватывает кончики ушей и сходится над бровями;
- Обхват груди – сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез;
- Обхват под грудью – сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища под основанием грудных желез;
- Обхват талии – сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии;
- Обхват бедер – сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек.
- Обхват плеча – сантиметровая лента проходит перпендикулярно оси плеча по наибольшей окружности.
- Обхват запястья – сантиметровая лента проходит перпендикулярно оси предплечья по наименьшей окружности.

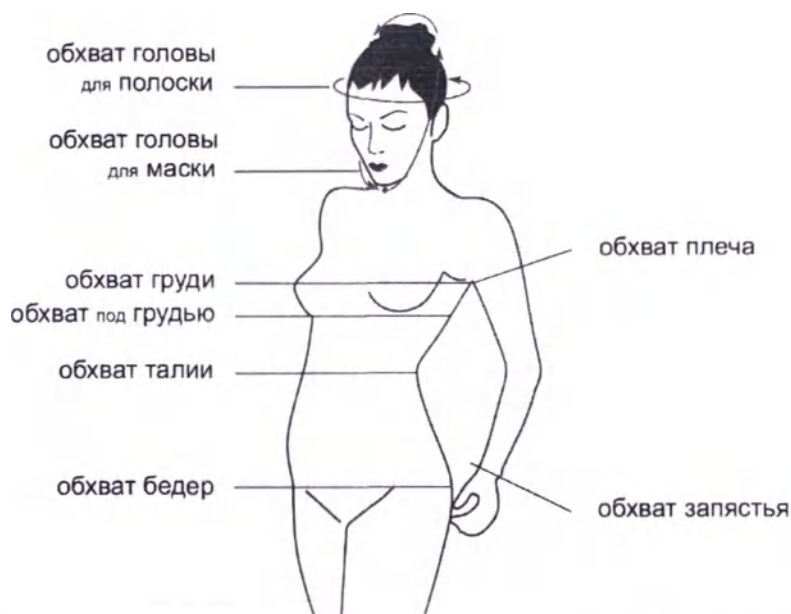


Рисунок: Места измерений размерных признаков по поверхности тела

Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин для выбора: арт. 3000, арт. 3010, арт. 3020, арт. 3030, арт. 3040, арт. 3050, арт. 3500, арт. 3510, арт. 3520, арт. 3090, арт. 3100, арт. 3110, арт. 3120, арт. 3200, арт. 3300, арт. 3400, арт. 2300, арт. 2310, арт. 2315, арт. 2320, арт. 2330, арт. 2340.

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Обхват груди, см	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-103	103-109	109-115	115-121	121-128	128-136	136-144
Обхват под грудью, см	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	89-95	95-101	101-107	107-113	114-122	122-130
Обхват талии, см	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	83-89	89-95	95-101	101-107	108-116	116-124
Обхват бедер, см	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-117	117-123	123-129	129-135	136-144	144-152

Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин для выбора: арт. 1090, арт. 1100, арт. 1110, арт. 1200, арт. 1300, арт. 1310, арт. 2040

Маркировка размеров	65	70	75	80	85	90	95
Обхват под грудью (см)	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97
Размер чашки	обхват груди (см)						
A	79-81	81-83	85-87	91-93	95-97	101-103	105-107
B	81-83	83-85	87-89	93-95	97-99	103-105	107-109
C	83-85	85-87	89-91	95-97	99-101	105-107	109-111
D		87-89	91-93	97-99	101-103	107-109	111-113

Абсолютные величины измерений типовых фигур для выбора: арт.2010

Размер	1	2	3	4
Обхват головы, см	50 - 52	52 - 54	54 - 56	56 - 58

Абсолютные величины измерений типовых фигур для выбора: арт.2000, арт.2001

Размер	1	2	3	4
Обхват головы от подбородка до затылка, см	63 - 65	65 - 67	67 - 69	69 - 71

Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин для выбора: арт. 4000

Размер	1	2	3	4	5
--------	---	---	---	---	---

Обхват под грудью, см	70 - 79	80 - 89	90 - 99	100 - 109	110 - 120
-----------------------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Абсолютные величины измерений типовых фигур для выбора: арт. 1500, арт. 1510, арт. 1600, арт. 1610

Размер	1	2	3	4	5
обхват талии (см)	58 - 70	70 - 82	82 - 96	96 - 110	110 - 124

Абсолютные величины измерений типовых фигур для выбора: арт. 1401, арт. 1402

Размер	1	2	3	4	5
Обхват плеча (см)	25-27	28-30	31-33	34-36	37-39
Обхват запястья (см)	15,3 - 15,9	15,9 - 16,5	16,5 - 17,1	17,1 - 17,7	17,7 - 18,3

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, чтобы компрессионное белье лучше скользило по коже. Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти или если Вы носите кольца.

Чтобы избежать повреждений при надевании компрессионного трикотажа, целесообразно использовать резиновые перчатки.

Шершавая и ороговевшая кожа на пятках может быть причиной повреждения трикотажа, так как в процессе надевания пятка должна скользить через узкую часть изделия.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Не применимо.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие белья медицинским требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными настоящими ТУ.
- Гарантийный срок хранения белья медицинского – 5 лет с момента его изготовления.
- Гарантийный срок эксплуатации белья медицинского – не менее 6 месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация белья и элементов его упаковки в медицинских организациях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизация белья и элементов его упаковки в домашних условиях (при использовании в быту) проводится совместно с твердыми бытовыми отходами.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления белья должна быть исключена возможность загрязнения окружающей среды отходами производства и выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Отходы, образующиеся при производстве, подлежат вторичной переработке. Отходы, не пригодные для вторичной переработки, подлежат утилизации в установленном порядке в соответствии с требованиями стандартов по ресурсосбережению и санитарных правил Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В условиях эксплуатации белье медицинское нетоксично.

Производство белья медицинского не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего сенсibilизирующего воздействия на организм человека.

При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Белье медицинское должно храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии и с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Белье медицинское может транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000, группой 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Белье изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре от 10°C до 42°C и относительной влажности до 80%.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Не применимо.

НАЛИЧИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

В составе изделия отсутствуют лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и (или) человеческого происхождения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

арт. 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050

Размер	Ширина изделия по верхнему срезу в сложенном пополам виде без застежки (измерять вдоль среза), см	Ширина изделия по шву притачивания кружева в сложенном пополам виде, см	Длина бокового шва изделия от верхнего среза до кружева, см	Длина шагового шва изделия от ластовицы до кружева, см	Длина застежки, см
2	30,0 ± 1,0	14,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	24,8 ± 0,5	32,6 ± 0,3
4	32,0 ± 1,0	15,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	24,5 ± 0,5	32,6 ± 0,3
6	34,0 ± 1,0	16,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	24,2 ± 0,5	32,6 ± 0,3
8	36,0 ± 1,0	17,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	23,9 ± 0,5	32,6 ± 0,3
10	38,0 ± 1,0	18,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	23,6 ± 0,5	32,6 ± 0,3
12	40,0 ± 1,0	19,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	23,3 ± 0,5	32,6 ± 0,3
14	42,0 ± 1,0	20,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	23,0 ± 0,5	32,6 ± 0,3
16	44,0 ± 1,0	21,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	22,7 ± 0,5	32,6 ± 0,3
18	46,0 ± 1,0	22,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	22,4 ± 0,5	32,6 ± 0,3
20	48,0 ± 1,0	23,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	22,1 ± 0,5	32,6 ± 0,3
22	50,0 ± 1,0	24,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	21,8 ± 0,5	32,6 ± 0,3
24	52,0 ± 1,0	25,2 ± 0,5	64,0 ± 0,5	21,5 ± 0,5	32,6 ± 0,3

арт. 3500, 3510, 3520

Размер	Ширина изделия по верхнему срезу в сложенном пополам виде без застежки (измерять вдоль среза), см	Ширина изделия по шву притачивания кружева в сложенном пополам виде, см	Длина бокового шва изделия от верхнего среза до кружева, см	Длина шагового шва изделия от ластовицы до кружева, см	Длина застежки, см
--------	---	---	---	--	--------------------

2	30,0 ± 1,0	9,6 ± 0,5	103,8 ± 1,0	64,5 ± 0,5	32,4 ± 0,3
4	32,0 ± 1,0	10,1 ± 0,5	103,8 ± 1,0	64,3 ± 0,5	32,6 ± 0,3
6	34,0 ± 1,0	10,6 ± 0,5	103,7 ± 1,0	64,1 ± 0,5	32,8 ± 0,3
8	36,0 ± 1,0	11,1 ± 0,5	103,7 ± 1,0	63,9 ± 0,5	32,9 ± 0,3
10	38,0 ± 1,0	11,6 ± 0,5	103,6 ± 1,0	63,7 ± 0,5	33,1 ± 0,3
12	40,0 ± 1,0	12,1 ± 0,5	103,6 ± 1,0	63,5 ± 0,5	33,3 ± 0,3
14	42,0 ± 1,0	12,6 ± 0,5	103,6 ± 1,0	63,3 ± 0,5	33,4 ± 0,3
16	44,0 ± 1,0	13,1 ± 0,5	103,6 ± 1,0	63,1 ± 0,5	33,6 ± 0,3
18	46,0 ± 1,0	13,6 ± 0,5	103,5 ± 1,0	62,9 ± 0,5	33,8 ± 0,3
20	48,0 ± 1,0	14,1 ± 0,5	103,5 ± 1,0	62,7 ± 0,5	33,9 ± 0,3
22	50,0 ± 1,0	14,6 ± 0,5	103,5 ± 1,0	62,5 ± 0,5	34,1 ± 0,3
24	52,0 ± 1,0	15,1 ± 0,5	103,5 ± 1,0	62,3 ± 0,5	34,3 ± 0,3

Линейные размеры арт. 3200

Размер	Ширина изделия по верхнему срезу в сложенном пополам виде без застежки (измерять вдоль среза), см	Ширина изделия по шву притачивания кружева в сложенном пополам виде, см	Длина шагового шва изделия от ластовицы до кружева, см	Длина застежки, см
2	25,8 ± 1,0	13,8 ± 0,5	24,9 ± 0,5	19,7 ± 0,3
4	27,8 ± 1,0	14,8 ± 0,5	24,8 ± 0,5	20,2 ± 0,3
6	29,8 ± 1,0	15,8 ± 0,5	24,7 ± 0,5	20,7 ± 0,3
8	31,8 ± 1,0	16,8 ± 0,5	24,6 ± 0,5	21,1 ± 0,3
10	33,8 ± 1,0	17,8 ± 0,5	24,5 ± 0,5	21,6 ± 0,3
12	35,8 ± 1,0	18,8 ± 0,5	24,4 ± 0,5	22,1 ± 0,3
14	37,8 ± 1,0	19,8 ± 0,5	24,3 ± 0,5	22,6 ± 0,3
16	39,8 ± 1,0	20,8 ± 0,5	24,2 ± 0,5	23,1 ± 0,3
18	41,8 ± 1,0	21,8 ± 0,5	24,1 ± 0,5	23,6 ± 0,3
20	43,8 ± 1,0	22,8 ± 0,5	24,0 ± 0,5	24,1 ± 0,3
22	45,8 ± 1,0	23,8 ± 0,5	23,9 ± 0,5	24,6 ± 0,3
24	47,8 ± 1,0	24,8 ± 0,5	23,9 ± 0,5	25,1 ± 0,3

Линейные размеры арт. 3300

Размер	Ширина изделия по верхнему срезу в сложенном пополам виде без застежки (измерять вдоль среза), см	Ширина изделия по шву притачивания кружева в сложенном пополам виде, см	Длина шагового шва изделия от ластовицы до кружева, см	Длина застежки, см
2	25,8 ± 1,0	11,8 ± 0,5	44,1 ± 0,5	19,7 ± 0,3
4	27,8 ± 1,0	12,5 ± 0,5	44,1 ± 0,5	20,2 ± 0,3
6	29,8 ± 1,0	13,2 ± 0,5	44,0 ± 0,5	20,7 ± 0,3
8	31,8 ± 1,0	13,9 ± 0,5	44,0 ± 0,5	21,1 ± 0,3
10	33,8 ± 1,0	14,6 ± 0,5	44,0 ± 0,5	21,6 ± 0,3
12	35,8 ± 1,0	15,3 ± 0,5	43,9 ± 0,5	22,1 ± 0,3
14	37,8 ± 1,0	16,0 ± 0,5	43,9 ± 0,5	22,6 ± 0,3
16	39,8 ± 1,0	16,7 ± 0,5	43,9 ± 0,5	23,1 ± 0,3
18	41,8 ± 1,0	17,4 ± 0,5	43,9 ± 0,5	23,6 ± 0,3
20	43,8 ± 1,0	18,1 ± 0,5	43,8 ± 0,5	24,1 ± 0,3
22	45,8 ± 1,0	18,8 ± 0,5	43,8 ± 0,5	24,6 ± 0,3
24	47,8 ± 1,0	19,5 ± 0,5	43,8 ± 0,5	25,1 ± 0,3

арт. 3400

Размер	Ширина изделия по верхнему срезу в сложенном пополам виде без застежки (измерять вдоль среза), см	Ширина изделия по шву притачивания кружева в сложенном пополам виде, см	Длина шагового шва изделия от ластовицы до кружева, см	Длина застежки, см
2	25,8 ± 1,0	9,5 ± 0,5	64,2 ± 0,5	19,7 ± 0,3
4	27,8 ± 1,0	10,0 ± 0,5	64,2 ± 0,5	20,2 ± 0,3
6	29,8 ± 1,0	10,5 ± 0,5	64,2 ± 0,5	20,7 ± 0,3
8	31,8 ± 1,0	11,0 ± 0,5	64,2 ± 0,5	21,1 ± 0,3
10	33,8 ± 1,0	11,5 ± 0,5	64,2 ± 0,5	21,6 ± 0,3
12	35,8 ± 1,0	12,0 ± 0,5	64,2 ± 0,5	22,1 ± 0,3
14	37,8 ± 1,0	12,5 ± 0,5	64,2 ± 0,5	22,6 ± 0,3
16	39,8 ± 1,0	13,0 ± 0,5	64,2 ± 0,5	23,1 ± 0,3
18	41,8 ± 1,0	13,5 ± 0,5	64,2 ± 0,5	23,6 ± 0,3
20	43,8 ± 1,0	14,0 ± 0,5	64,2 ± 0,5	24,1 ± 0,3
22	45,8 ± 1,0	14,5 ± 0,5	64,2 ± 0,5	24,6 ± 0,3
24	47,8 ± 1,0	15,0 ± 0,5	64,2 ± 0,5	25,1 ± 0,3

арт. 3090, 3100

Размер	Ширина изделия по верхнему срезу в сложенном пополам виде без застежки (измерять вдоль среза), см	Ширина изделия по нижним срезам – по ножкам без застежки (измерять по окантовке), см	Длина бокового шва изделия от верхнего среза до окантовки, см	Длина застежки, см
2	28,3 ± 1,0	38,4 ± 1,0	33,6 ± 0,5	22,4 ± 0,3
4	30,3 ± 1,0	40,4 ± 1,0	34,0 ± 0,5	22,9 ± 0,3
6	32,3 ± 1,0	42,6 ± 1,0	34,4 ± 0,5	23,4 ± 0,3
8	34,3 ± 1,0	44,6 ± 1,0	34,8 ± 0,5	23,9 ± 0,3
10	36,3 ± 1,0	46,8 ± 1,0	35,3 ± 0,5	24,4 ± 0,3
12	38,3 ± 1,0	48,8 ± 1,0	35,8 ± 0,5	24,9 ± 0,3
14	40,3 ± 1,0	51,0 ± 1,0	36,3 ± 0,5	25,4 ± 0,3
16	42,3 ± 1,0	53,0 ± 1,0	36,8 ± 0,5	25,9 ± 0,3
18	44,3 ± 1,0	55,2 ± 1,0	37,3 ± 0,5	26,4 ± 0,3
20	46,3 ± 1,0	57,4 ± 1,0	37,8 ± 0,5	26,9 ± 0,3
22	48,3 ± 1,0	59,6 ± 1,0	38,3 ± 0,5	27,4 ± 0,3
24	50,3 ± 1,0	61,8 ± 1,0	38,8 ± 0,5	27,9 ± 0,3

арт. 3110, 3120


Размер	Ширина изделия по верхнему срезу в сложенном пополам виде без застежки (измерять вдоль среза), см	Ширина изделия по нижним срезам – по ножкам без застежки (измерять по окантовке), см	Длина среднего шва спинки изделия от верхнего среза до ластовицы, см	Длина застежки, см
2	30,5 ± 1,0	42,2 ± 1,0	40,7 ± 0,5	29,0 ± 0,3
4	32,5 ± 1,0	44,2 ± 1,0	41,0 ± 0,5	29,2 ± 0,3
6	34,5 ± 1,0	46,2 ± 1,0	41,2 ± 0,5	29,5 ± 0,3
8	36,5 ± 1,0	48,2 ± 1,0	41,5 ± 0,5	29,7 ± 0,3
10	38,5 ± 1,0	50,2 ± 1,0	41,7 ± 0,5	30,0 ± 0,3
12	40,5 ± 1,0	52,2 ± 1,0	42,0 ± 0,5	30,2 ± 0,3
14	42,5 ± 1,0	54,2 ± 1,0	42,2 ± 0,5	30,5 ± 0,3

16	44,5 ± 1,0	56,2 ± 1,0	42,5 ± 0,5	30,7 ± 0,3
18	46,5 ± 1,0	58,2 ± 1,0	42,7 ± 0,5	31,0 ± 0,3
20	48,5 ± 1,0	60,2 ± 1,0	43,0 ± 0,5	31,2 ± 0,3
22	50,5 ± 1,0	62,2 ± 1,0	43,2 ± 0,5	31,5 ± 0,3
24	52,5 ± 1,0	64,2 ± 1,0	43,5 ± 0,5	31,7 ± 0,3

Артикулы 300, 301, 302, 303, 304, 305, 350, 351, 352, 320, 330, 340, 309, 310, 311, 312 - длина бретели составляет 65 : 5 см

арт. 2000, 2001

Размер	Длина шва, см	Расстояние от точки А до середины переднего лепестка (AB), см	Расстояние от точки А до середины среднего лепестка (AC), см	Расстояние от точки А до середины шейного лепестка (AD), см
1	11,1 ± 0,5	29,7 ± 0,8	31,1 ± 0,6	17,0 ± 0,3
2	12,1 ± 0,5	31,3 ± 0,8	32,4 ± 0,6	17,8 ± 0,3
3	13,1 ± 0,5	32,9 ± 0,8	33,7 ± 0,6	18,6 ± 0,3
4	14,1 ± 0,5	34,5 ± 0,8	35,0 ± 0,6	19,4 ± 0,3

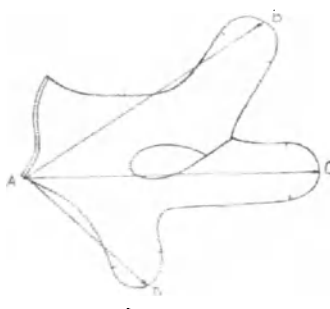

арт. 2010

Размер	Максимальная ширина центральной детали (AB), см	Минимальная ширина центральной детали (CD), см	Расстояние от точки В до середины края полосы (BE), см	Расстояние от точки D до середины края полосы (DE), см
1	8,2 ± 0,6	5,2 ± 0,6	21,7 ± 0,6	23,3 ± 0,6
2	9,4 ± 0,6	6,4 ± 0,6	22,9 ± 0,6	24,5 ± 0,6
3	10,6 ± 0,6	7,6 ± 0,6	24,1 ± 0,6	25,7 ± 0,6
4	11,8 ± 0,6	8,8 ± 0,6	25,3 ± 0,6	26,9 ± 0,6




арт. 1090, 1100, 1110, 1200, 1300, 1310, 2040

Размер	Полнота	Ширина изделия по горизонтали на уровне шва притачивания резинки без застежки, см	Ширина спинки изделия на уровне проймы, см	Длина шва чашки, см	Длина застежки до резинки, см	Количество крючков на фронтальной застежке при расстоянии между крючками 19 мм, шт
65	A	52,0 ± 2,4	32,4 ± 1,0	17,4 ± 0,3	8,9 ± 0,3	7

65	B	$52,0 \pm 2,4$	$32,4 \pm 1,0$	$17,8 \pm 0,3$	$8,9 \pm 0,3$	7
65	C	$52,0 \pm 2,4$	$32,4 \pm 1,0$	$18,3 \pm 0,3$	$8,9 \pm 0,3$	7
70	A	$57,0 \pm 2,4$	$34,4 \pm 1,0$	$17,8 \pm 0,3$	$9,4 \pm 0,3$	7
70	B	$57,0 \pm 2,4$	$34,4 \pm 1,0$	$18,3 \pm 0,3$	$9,4 \pm 0,3$	7
70	C	$57,0 \pm 2,4$	$34,4 \pm 1,0$	$18,8 \pm 0,3$	$9,4 \pm 0,3$	7
70	D	$57,0 \pm 2,4$	$34,4 \pm 1,0$	$19,4 \pm 0,3$	$9,4 \pm 0,3$	7
75	A	$62,0 \pm 2,4$	$36,4 \pm 1,0$	$18,3 \pm 0,3$	$9,9 \pm 0,3$	7
75	B	$62,0 \pm 2,4$	$36,4 \pm 1,0$	$18,8 \pm 0,3$	$9,9 \pm 0,3$	7
75	C	$62,0 \pm 2,4$	$36,4 \pm 1,0$	$19,3 \pm 0,3$	$9,9 \pm 0,3$	7
75	D	$62,0 \pm 2,4$	$36,4 \pm 1,0$	$19,9 \pm 0,3$	$9,9 \pm 0,3$	7
80	A	$66,0 \pm 2,4$	$38,4 \pm 1,0$	$18,8 \pm 0,3$	$10,4 \pm 0,3$	7
80	B	$66,0 \pm 2,4$	$38,4 \pm 1,0$	$19,3 \pm 0,3$	$10,4 \pm 0,3$	7
80	C	$66,0 \pm 2,4$	$38,4 \pm 1,0$	$19,8 \pm 0,3$	$10,4 \pm 0,3$	7
80	D	$66,0 \pm 2,4$	$38,4 \pm 1,0$	$20,4 \pm 0,3$	$10,4 \pm 0,3$	7
85	A	$71,0 \pm 2,4$	$40,4 \pm 1,0$	$19,3 \pm 0,3$	$10,9 \pm 0,3$	8
85	B	$71,0 \pm 2,4$	$40,4 \pm 1,0$	$19,8 \pm 0,3$	$10,9 \pm 0,3$	8
85	C	$71,0 \pm 2,4$	$40,4 \pm 1,0$	$20,4 \pm 0,3$	$10,9 \pm 0,3$	8
85	D	$71,0 \pm 2,4$	$40,4 \pm 1,0$	$21,0 \pm 0,3$	$10,9 \pm 0,3$	8
90	A	$76,0 \pm 2,4$	$42,4 \pm 1,0$	$19,9 \pm 0,3$	$11,4 \pm 0,3$	8
90	B	$76,0 \pm 2,4$	$42,4 \pm 1,0$	$20,4 \pm 0,3$	$11,4 \pm 0,3$	8
90	C	$76,0 \pm 2,4$	$42,4 \pm 1,0$	$21,0 \pm 0,3$	$11,4 \pm 0,3$	8
90	D	$76,0 \pm 2,4$	$42,4 \pm 1,0$	$21,6 \pm 0,3$	$11,4 \pm 0,3$	8
95	A	$81,0 \pm 2,4$	$44,4 \pm 1,0$	$20,4 \pm 0,3$	$11,9 \pm 0,3$	8
95	B	$81,0 \pm 2,4$	$44,4 \pm 1,0$	$21,0 \pm 0,3$	$11,9 \pm 0,3$	8
95	C	$81,0 \pm 2,4$	$44,4 \pm 1,0$	$21,6 \pm 0,3$	$11,9 \pm 0,3$	8
95	D	$81,0 \pm 2,4$	$44,4 \pm 1,0$	$22,2 \pm 0,3$	$11,9 \pm 0,3$	8

арт. 4000

Размер	Длина шва (AB), см	Расстояние от точки А до середины верхнего лепестка (AC), см	Расстояние от точки А до середины нижнего лепестка (AD), см
1	$17,8 \pm 0,2$	$52,6 \pm 0,8$	$45,4 \pm 1,0$
2	$18,2 \pm 0,2$	$54,2 \pm 0,8$	$47,4 \pm 1,0$
3	$18,6 \pm 0,2$	$55,8 \pm 0,8$	$49,4 \pm 1,0$
4	$19,0 \pm 0,2$	$57,4 \pm 0,8$	$51,4 \pm 1,0$
5	$19,4 \pm 0,2$	$59,0 \pm 0,8$	$53,4 \pm 1,0$

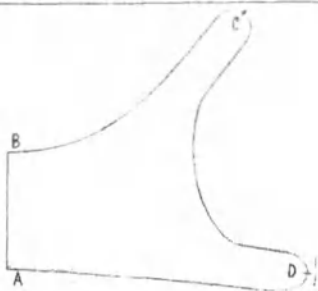

арт. 1500, 1510, 1600, 1610

Размер	Ширина изделия по верхнему срезу в сложенном пополам виде, см	Ширина изделия по нижнему срезу в сложенном пополам виде, см	Ширина спинки по верхнему срезу в сложенном пополам виде, см
1	$38,5 \pm 6,0$	$45,5 \pm 6,0$	$14,5 \pm 3,0$
2	$44,5 \pm 6,0$	$51,5 \pm 6,0$	$17,5 \pm 3,0$

3	50,5 ± 6,0	57,5 ± 6,0	20,5 ± 3,0
4	56,5 ± 6,0	63,5 ± 6,0	23,5 ± 3,0
5	62,5 ± 6,0	69,5 ± 6,0	26,5 ± 3,0

арт. 2300, 2310, 2315, 2320, 2330, 2340

Размер	Ширина изделия по горизонтали на уровне шва притачивания резинки без застежки, см	Ширина спинки изделия на уровне проймы, см	Ширина полочки изделия на уровне проймы, см	Длина рукава от плечевого шва до шва притачивания кружева, см	Ширина изделия по шву притачивания кружева в сложенном пополам виде, см
2	56,0 ± 1,5	33,0 ± 0,9	15,6 ± 0,5	36,4 ± 0,2	9,8 ± 0,1
4	59,0 ± 1,5	34,8 ± 0,9	16,6 ± 0,5	36,9 ± 0,2	10,0 ± 0,1
6	62,0 ± 1,5	36,6 ± 0,9	17,6 ± 0,5	37,4 ± 0,2	10,2 ± 0,1
8	65,0 ± 1,5	38,4 ± 0,9	18,6 ± 0,5	37,9 ± 0,2	10,4 ± 0,1
10	68,0 ± 1,5	40,2 ± 0,9	19,6 ± 0,5	38,4 ± 0,2	10,6 ± 0,1
12	71,0 ± 1,5	42,0 ± 0,9	20,6 ± 0,5	38,9 ± 0,2	10,8 ± 0,1
14	74,0 ± 1,5	43,8 ± 0,9	21,6 ± 0,5	39,4 ± 0,2	11,0 ± 0,1
16	77,0 ± 1,5	45,6 ± 0,9	22,6 ± 0,5	39,8 ± 0,2	11,2 ± 0,1
18	79,0 ± 1,5	47,4 ± 0,9	23,6 ± 0,5	40,2 ± 0,2	11,4 ± 0,1
20	82,0 ± 1,5	49,2 ± 0,9	24,6 ± 0,5	40,6 ± 0,2	11,6 ± 0,1
22	85,0 ± 1,5	51,0 ± 0,9	25,6 ± 0,5	41,0 ± 0,2	11,8 ± 0,1
24	88,0 ± 1,5	52,8 ± 0,9	26,6 ± 0,5	41,4 ± 0,2	12,0 ± 0,1

арт. 1401, 1402

Размер	Ширина изделия на уровне проймы в сложенном пополам виде, см	Ширина изделия по нижнему срезу в сложенном пополам виде, см	Ширина застежки, см	Длина рукава с открытой застежкой, см
1	10,3 ± 1,1	7,4 ± 0,2	6,4 ± 0,5	59,5 ± 0,3
2	11,4 ± 1,1	7,7 ± 0,2	7,4 ± 0,5	60,1 ± 0,3
3	12,5 ± 1,1	8,0 ± 0,2	8,4 ± 0,5	60,7 ± 0,3
4	13,6 ± 1,1	8,3 ± 0,2	9,4 ± 0,5	61,3 ± 0,3
5	14,7 ± 1,1	8,6 ± 0,2	10,4 ± 0,5	61,9 ± 0,3

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

арт. 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3500, 3510, 3520

	Сырье/состав	Артикул	Производитель
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	NYL LYC KORSELIK	ZİRVE, Турция
	Эластан – 15% Полиамид – 85%	B004 Tokyo	Carvico S.P.A, Италия
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 18% Полиамид – 82%	JS 054	Melide tekstil, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	FAT KORSELIK	Taskinteks Tekstil, Турция
Эластичное кружево	Эластан – 20% Полиамид – 80%	68.070.43	Rimteks Dis Ticaret LTD. STI, Турция
Эластичное кружево	Эластан – 20% Полиамид – 80%	20.507.	ACTIVE LIFE, Германия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 24% Полиамид – 76%	011195	ООО «ОПТО Импекс Групп», Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 33% Полиамид – 67%	15W1634	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 90% Полиамид – 10%	15ParKat	Taskinteks, Турция
Эластичная тесьма 20	Эластан – 20% Полиамид – 80%	123022	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Эластичная тесьма 20	Эластан – 11% Полиамид – 89%	21J5147	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма 20	Эластан – 30% Полиамид – 70%	20DogDis	Taskinteks, Турция

Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	F.2587	JSC «ARTA-F», Латвия
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	TK 607M	Pir_inci A.S., Турция
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из оцинкованной латунной проволоки	HB 3151/203 AB 5522/20703	WISSNER, Германия
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	3Metag	Taskinteks, Турция
Эластичная тесьма - бретель	Эластан – 20% Полиамид – 80%	000031	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Эластичная тесьма - бретель	Эластан – 18% Полиамид – 82%	20W011833	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - бретель	Эластан – 30% Полиамид – 70%	20SatAs	Taskinteks, Турция
Регуляторы металлические	Алюминий 3,5-4,3% Медь 0,7-1,2% Магний 0,03-0,06% Цинк основа	F.2829.020.402	JSC «ARTA-F», Латвия
Регуляторы металлические	Алюминий 3,5-4,3% Медь 0,7-1,2% Магний 0,03-0,06% Цинк основа	TK 710-20	Pir_inci A.S., Турция
Крючки металлические для бретелей	Алюминий 3,5-4,3% Медь 0,7-1,2% Магний 0,03-0,06% Цинк основа	F.2829.020.402	JSC «ARTA-F», Латвия
Крючки металлические для бретелей	Алюминий 3,5-4,3% Медь 0,7-1,2% Магний 0,03-0,06% Цинк основа	TK 750-20	Pir_inci A.S., Турция
Нитки армированные	Полиэстер – 100%	Saba №100	AMANN GROUP, Германия
Нитки текстурированные	Полиэстер – 100%	Sabatex №120	AMANN GROUP, Германия

арт. 3200, 3300, 3400

Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	NYL LYC KORSELİK	ZİRVE, Турция
	Эластан – 15% Полиамид – 85%	B004 Tokyo	Carvico S.P.A, Италия
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 18% Полиамид – 82%	JS 054	Melide tekstil, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	FAT KORSELİK	Taskinteks Tekstil, Турция
Эластичное кружево	Эластан – 20% Полиамид – 80%	070010	Rimteks Dis Ticaret LTD. STI, Турция
Эластичное кружево	Эластан – 20% Полиамид – 80%	20.507.	ACTIVE LIFE, Германия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 24% Полиамид – 76%	011195	ООО «ОПТО Импекс Групп», Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 33% Полиамид – 67%	15W1634	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 90% Полиамид – 10%	15ParKat	Taskinteks, Турция
Эластичная тесьма	Эластан – 20% Полиамид – 80%	123022	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Эластичная тесьма	Эластан – 11% Полиамид – 89%	21J5147	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма 20	Эластан – 30% Полиамид – 70%	20DogDis	Taskinteks, Турция
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	F.2587	JSC «ARTA-F», Латвия
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100%	TK 607M	Pir_inci A.S., Турция

	Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием		
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из оцинкованной латунной проволоки	HB 3151/203 AB 5522/20703	WISSNER, Германия
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	3Metag	Taskinteks, Турция

арт. 3090, 3100, 3110, 3120

	Сырье/состав	Артикул	Производитель
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	NYL LYC KORSELIK	ZIRVE, Турция
	Эластан – 15% Полиамид – 85%	B004 Tokyo	Carvico S.P.A, Италия
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 18% Полиамид – 82%	JS 054	Melide tekstil, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	FAT KORSELIK	Taskinteks Tekstil, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 24% Полиамид – 76%	011195	ООО «ОПТО Импекс Групп», Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 33% Полиамид – 67%	15W1634	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 90% Полиамид – 10%	15ParKat	Taskinteks, Турция
Эластичная тесьма 20	Эластан – 20% Полиамид – 80%	123022	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Эластичная тесьма 20	Эластан – 11% Полиамид – 89%	21J5147	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма 20	Эластан – 30% Полиамид – 70%	20DogDis	Taskinteks, Турция
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	F.2587	JSC «ARTA-F», Латвия
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	TK 607M	Pir_inci A.S., Турция
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из оцинкованной латунной проволоки	HB 3151/203 AB 5522/20703	WISSNER, Германия
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	3Metag	Taskinteks, Турция
Эластичная тесьма - бретель	Эластан – 20% Полиамид – 80%	000031	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Эластичная тесьма - бретель	Эластан – 18% Полиамид – 82%	20W011833	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - бретель	Эластан – 30% Полиамид – 70%	20SatAs	Taskinteks, Турция
Регуляторы металлические	Алюминий 3,5-4,3% Медь 0,7-1,2% Магний 0,03-0,06% Цинк основа	F.2829.020.402	JSC «ARTA-F», Латвия
Регуляторы металлические	Алюминий 3,5-4,3% Медь 0,7-1,2% Магний 0,03-0,06% Цинк основа	TK 710-20	Pir_inci A.S., Турция
Крючки металлические для бретелей	Алюминий 3,5-4,3% Медь 0,7-1,2% Магний 0,03-0,06% Цинк основа	F.2829.020.402	JSC «ARTA-F», Латвия
Крючки металлические для бретелей	Алюминий 3,5-4,3% Медь 0,7-1,2% Магний 0,03-0,06% Цинк основа	TK 750-20	Pir_inci A.S., Турция
Нитки армированные	Полиэстер – 100%	Saba №100	AMANN GROUP, Германия

Нитки текстурированные	Полиэстер - 100%	Sabatex №120	AMANN GROUP, Германия
---------------------------	------------------	--------------	--------------------------

арт. 2000, 2010, 2001

	Сырье/состав	Артикул	Производитель
Полотно эластичное трикотажное	Эластан - 41% Полиамид - 59%	NYL LYC KORSELIK	ZİRVE, Турция
	Эластан - 20% Полиамид - 80%	Atlanta	Carvico S.P.A. Италия
Полотно эластичное трикотажное	Эластан 18% Полиамид - 82%	JS 054	Melide tekstil, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан - 41% Полиамид - 59%	FAT KORSELIK	Taskinteks Tekstil, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан - 24% Полиамид - 76%	011195	ООО «ОПТО Импекс Групп», Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан - 33% Полиамид - 67%	15W1634	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан - 90% Полиамид - 10%	15ParKat	Taskinteks, Турция
Контактная лента Велькро	Нейлон 100%	20210	INTERNATIONAL BUTTONS TRADING S.A., Греция
Нитки армированные	Полиэстер 100%	Saba №100	AMAN GROUP, Германия
Нитки текстурированные	Полиэстер - 100%	Sabatex №120	AMAN GROUP, Германия

арт. 1090, 1100, 1110, 1200, 1300, 1310, 2040

	Сырье/состав	Артикул	Производитель
Полотно эластичное трикотажное	Эластан - 15% Полиамид - 85%	MLD-104- A MAT KORSELIK	Melide tekstil, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан - 41% Полиамид - 59%	NYL LYC KORSELIK	ZİRVE, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан - 41% Полиамид - 59%	FAT KORSELIK	Taskinteks Tekstil, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан - 20% Полиамид - 80%	Atlanta	Carvico S.P.A. Италия
Полотно эластичное трикотажное	Эластан 18% Полиамид 82%	JS 054	Melide tekstil, Турция
Хлопчатобумажный трикотаж	Лайкра - 10% Хлопок 90%	37018	Iskur Iplik Kumas Mensucat Tic. Ve San A.S., Турция
Тесьма неэластичная	Полиамид - 100%	10K13821	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан - 24% Полиамид - 76%	011195	ООО «ОПТО Импекс Групп», Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан - 33% Полиамид 67%	15W1634	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан - 90% Полиамид - 10%	15ParKat	Taskinteks, Турция
Эластичная тесьма 40	Полиэфир - 46% Полиамид 25% Латекс - 29%	120040	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Эластичная тесьма 40	Полиэстер - 25% Полиамид 66% Эластан - 9%	40J5051-1	DEVSEL, Турция
Застежка метражная	Полиамид - 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	F.2587EH	JSC «ARTA-F», Латвия

Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	TK 607M	Pir_inci A.S., Турция
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из оцинкованной латунной проволоки	HB 3151/203 AB 5522/20703	WISSNER, Германия
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	3Metag	Taskinteks, Турция
Застежка опаянная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	F.2587.000.2AE H	JSC «ARTA-F», Латвия
Застежка опаянная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	TK 605	Pir_inci A.S., Турция
Застежка опаянная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	3*3*50Ag	Taskinteks, Турция
Эластичная тесьма 80	Полиэфи́р – 54% Нейлон – 6% Латекс – 23% Леска – 7%	780	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Нитки армированные	Полиэстер – 100%	Saba №100	AMAN GROUP, Германия
Нитки текстурированные	Полиэстер – 100%	Sabatex №120	AMAN GROUP, Германия

арт. 4000

	Сырье/состав	Артикул	Производитель
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	NYL LYC KORSELİK	ZİRVE, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 18% Полиамид – 82%	JS 054	Melide tekstil, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	FAT KORSELİK	Taskinteks Tekstil, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 24% Полиамид – 76%	011195	ООО «ОПТО Импекс Групп», Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 33% Полиамид – 67%	15W1634	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 90% Полиамид – 10%	15ParKat	Taskinteks, Турция
Контактная лента Велькро	Нейлон – 100%	20210	INTERNATIONAL BUTTONS TRADING S.A., Греция
Нитки армированные	Полиэстер – 100%	Saba №100	AMAN GROUP, Германия
Нитки текстурированные	Полиэстер – 100%	Sabatex №120	AMAN GROUP, Германия

арт. 1500, 1510, 1600, 1610

	Сырье/состав	Артикул	Производитель
Эластичная тесьма 240	Полиэфи́р – 54% Нейлон – 6% Латекс – 23% Леска – 7%	7240	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 24% Полиамид – 76%	011195	ООО «ОПТО Импекс Групп», Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 33% Полиамид – 67%	15W1634	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма -	Эластан – 90% Полиамид – 10%	15ParKat	Taskinteks, Турция

окантовка			
Эластичная тесьма - бретель	Эластан – 20% Полиамид – 80%	000031	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Эластичная тесьма - бретель	Эластан – 18% Полиамид – 82%	20W011833	DEVSEL, Турция
Контактная лента Велькро	Нейлон – 100%	20210	INTERNATIONAL BUTTONS TRADING S.A., Греция
Нитки армированные	Полиэстер – 100%	Saba №100	AMAN GROUP, Германия
Нитки текстурированные	Полиэстер – 100%	Sabatex №120	AMAN GROUP, Германия

арт. 2300, 2310, 2315, 2320, 2330, 2340

	Сырье/состав	Артикул	Производитель
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	NYL LYC KORSELİK	ZİRVE, Турция
	Эластан – 15% Полиамид – 85%	B004 Tokyo	Carvico S.P.A, Италия
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 18% Полиамид – 82%	JS 054	Melide tekstil, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	FAT KORSELİK	Taskinteks Tekstil, Турция
Тесьма неэластичная	Полиамид – 100%	10K13821	DEVSEL Турция
Эластичное кружево	Эластан – 20% Полиамид – 80%	68.070.43	Rimteks Dis Ticaret LTD. STI, Турция
Эластичное кружево	Эластан – 20% Полиамид – 80%	20.507.	ACTIVE LIFE, Германия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 24% Полиамид – 76%	011195	ООО «ОПТО Импекс Групп», Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 33% Полиамид – 67%	15W1634	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 90% Полиамид – 10%	15ParKat	Taskinteks, Турция
Эластичная тесьма 40	Полиэфир – 46% Полиамид – 25% Латекс – 29%	120040	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия
Эластичная тесьма 40	Полиэстер – 25% Полиамид – 66% Эластан – 9%	40J5051-1	DEVSEL, Турция
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	F.2587	JSC «ARTA-F», Латвия
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	TK 607M	Pir_inci A.S., Турция
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из оцинкованной латунной проволоки	HB 3151/203 AB 5522/20703	WISSNER, Германия
Застежка метражная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	3Metag	Taskinteks, Турция
Застежка опаянная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	F.2587.000.2AE H	JSC «ARTA-F», Латвия
Застежка опаянная	Полиамид – 100% Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием	TK 605	Pir_inci A.S., Турция
Застежка опаянная	Полиамид – 100%	3*3*50Ag	Taskinteks, Турция

	Нитки из полиэфира 100% Крючки и петли из стальной проволоки с полиамидным покрытием		
Нитки армированные	Полиэстер – 100%	Saba №100	AMANN GROUP, Германия
Нитки текстурированные	Полиэстер – 100%	Sabatex №120	AMANN GROUP, Германия

арт. 1401, 1402

	Сырье/состав	Артикул	Производитель
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	NYL LYC KORSELIK	ZIRVE, Турция
	Эластан – 15% Полиамид – 85%	B004 Tokyo	Carvico S.P.A, Италия
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 18% Полиамид – 82%	JS 054	Melide tekstil, Турция
Полотно эластичное трикотажное	Эластан – 41% Полиамид – 59%	FAT KORSELIK	Taskinteks Tekstil, Турция
Тесьма неэластичная	Полиамид 100%	10K13821	DEVSEL Турция
Эластичное кружево	Эластан 20% Полиамид 80%	68.070.43	Rimteks Dis Ticaret LTD. STI, Турция
Эластичное кружево	Эластан 20% Полиамид 80%	20.507.	ACTIVE LIFE, Германия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 24% Полиамид – 76%	011195	ООО «ОПТО Импекс Групп», Россия
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 33% Полиамид – 67%	15W1634	DEVSEL, Турция
Эластичная тесьма - окантовка	Эластан – 90% Полиамид – 10%	15ParKat	Taskinteks, Турция
Эластичная тесьма 40	Полиэфир – 46% Полиамид – 25% Латекс – 29%	120040	ООО "ФИ-ТЕКС", Россия

РЕКЛАМАЦИЯ

При возникновении вопросов обращайтесь к производителю:

ООО «Валенто»

Россия, 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д.7, стр. 6

Телефон: 8-800-700-75-31

Прошито и скреплено
20 листа (ов)

Генеральный директор
ООО «ВАЛЕНТО»



Ковалев В.А.

Подпись