

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**«Жгут Михайлова кровоостанавливающий с храповым механизмом
по ТУ 32.50.50 – 281 – 10973749 – 2023», в составе:**

- Жгут Михайлова кровоостанавливающий с храповым механизмом –
1 шт./уп;**
- Руководство по эксплуатации – 1 шт./уп.**





Общий вид «Жгута Михайлова кровоостанавливающего с храповым механизмом по ТУ 32.50.50 – 281 – 10973749 – 2023»

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23


ФЭСТ®

**Жгут Михайлова кровоостанавливающий
с храповым механизмом**

ТУ 32.50.50-281-10973749-2023

РУ№

Артикул

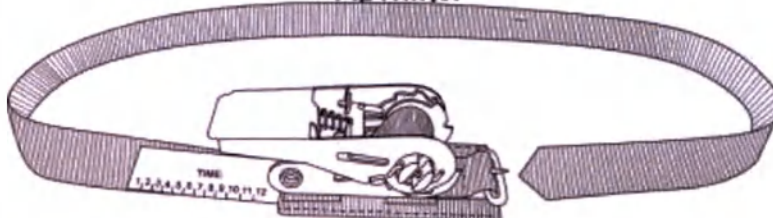

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 03.2023
Партия № 01

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5° до +40°С.
Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется
в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами.
Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется
в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

**Руководство по эксплуатации
Жгута Михайлова кровоостанавливающего
с храповым механизмом.**

Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Обернуть жгут вокруг конечности выше места кровотечения.

Продеть конец ленты жгута в пряжку со шпеньком. Шпеньком зафиксировать ленту.

С помощью рычага храпового механизма (далее - рычаг) затянуть жгут на конечности до остановки кровотечения или до прекращения прощупывания пульса.

На ярлыке жгута сделать отметку о времени наложения жгута.


Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды.

Ослабление/ снятие жгута.

Для того, чтобы временно ослабить или снять жгут, необходимо перевести рычаг в крайнее горизонтальное положение. Для этого:

- нажать на подпружиненную середину рычага и отогнуть его в крайнее горизонтальное положение;
- нажать на рычаг храпового механизма и принудительно ослабить ленту жгута;
- вернуть рычаг в исходное положение;
- отстегнуть ленту от шпенька;
- высвободить конечность.

Оборот

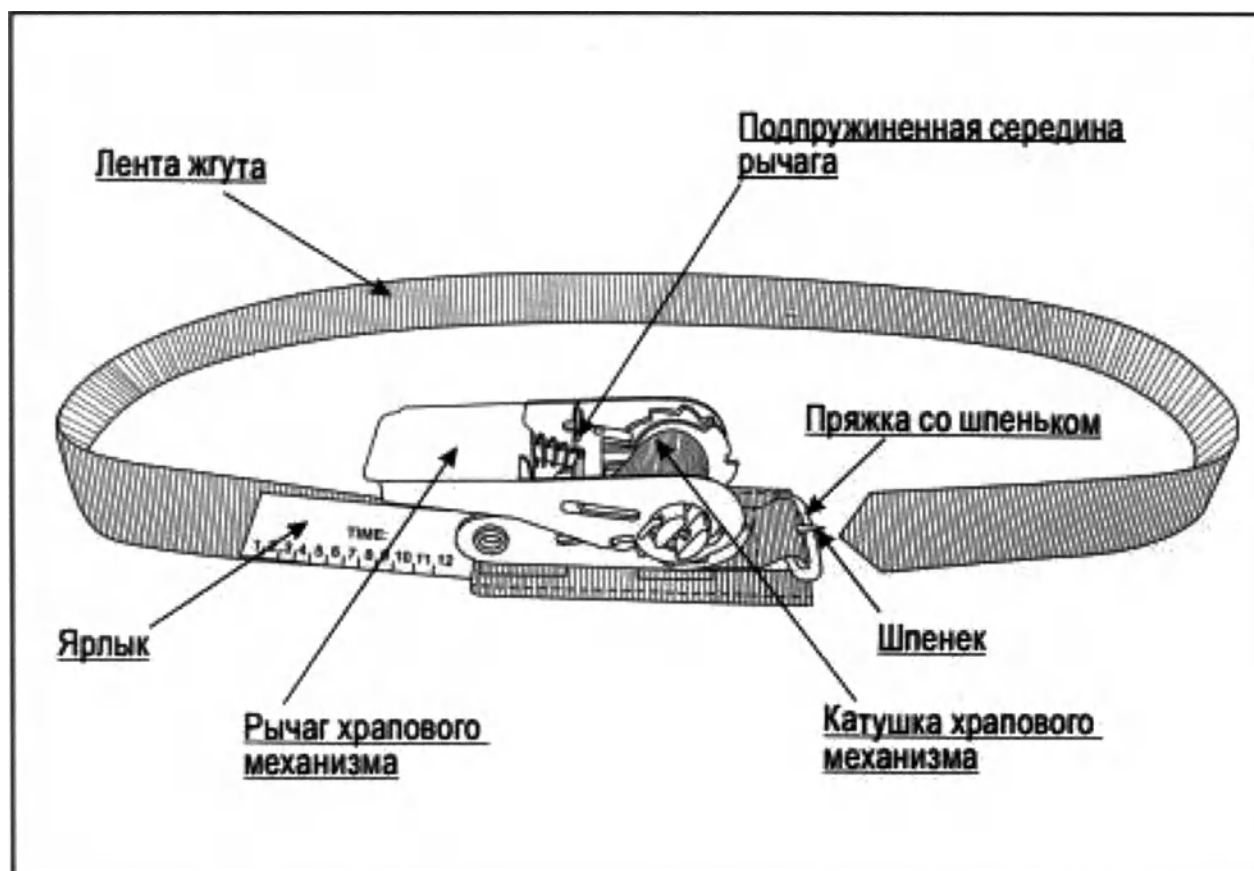

Общий вид маркировки медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с храповым механизмом по ТУ 32.50.50 – 281 – 10973749 – 2023»



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
 Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
 Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
 Место производства: Россия, 156019,
 г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23

ФЭСТ®

**Жгут Михайлова
 кровоостанавливающий
 с храповым механизмом
 ТУ 32.50.50-281-10973749-2023
 РУ №
 Артикул**

Количество 10 шт.
Партия №/ОКК 01/06
Изготовлено 03.2023
Масса брутто, кг
Срок годности - 5 лет с даты изготовления.
Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С.

Общий вид маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с храповым механизмом по ТУ 32.50.50 – 281 – 10973749 – 2023»



Общий вид транспортной тары медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с храповым механизмом по ТУ 32.50.50 – 281 – 10973749 – 2023»

Прошито, пронумеровано,
опечатано

6 (шесть) ЛИСТОВ



Директор Касаткина Э.В.