

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ
ПРОИЗВОДСТВА
BICON, США**

I. Предварительный этап

1. Осмотр пациента и проведение необходимых диагностических процедур (рентгенограмма, анализ крови, установление клинической картины полости рта, снятие оттисков и изготовление диагностических моделей верхней и нижней челюстей)
2. Определение показаний к использованию дентальных имплантов
3. Составление предварительного плана лечения:
 - определение будущей ортопедической конструкции
 - определение количества используемых имплантов
4. Проведение санации полости рта (профилактические и гигиенические мероприятия)

II. Хирургический этап

1. Формирование ложа для установки импланта с помощью последовательного использования контрольного дрельбора (Pilot Drills) и хирургических боров (Reamers) разных диаметров от меньшего до необходимого размера
2. Позиционирование импланта в подготовленное ложе инструментом ключ-позиционер
3. В зависимости от выбора врача:
 - установка в имплант заглушки (Healing Plug Inserter), удаление лишней части инструментом (Healing Plug Cutter), закрытие импланта и ушивание слизисто-надкостничного лоскута
 - или
 - установка абатмента (Stealth Abutments)
 - или
 - установка временного абатмента (Temporary Abutments)
4. При установлении абатмента (Stealth Abutments) возможно изготовление временной ортопедической конструкции с помощью колпачков для временных реставраций (Stealth One-Piece Acrylic Sleeves)

5. Назначение лекарственных препаратов в послеоперационный период, инструктаж пациента по уходу за полостью рта, запись пациента для повторных приемов. Наблюдение за пациентом в течение 2 месяцев
6. По истечении 2 месяцев производится вскрытие импланта и установление формирователя десны (Healing Abutments) если ранее в имплант была установлена заглушка (Healing Plug Inserter)
7. При благоприятной клинической картины полости рта (остеоинтеграция импланта на рентгеновском снимке, отсутствие воспалительных процессов, формирование десны вокруг абатмента) переход к ортопедическому этапу

III. Ортопедический этап

1. Установление в имплант оттисковой головки (Impression Post Plastic) и снятие оттиска
2. Установление в оттиск дублера импланта (Implant Analog Plastic) для получения слепка
3. Получение рабочей модели с дублиром импланта
4. Установление в рабочую модель необходимого типа абатмента (в зависимости от ортопедической конструкции)
5. Изготовление выбранной ортопедической конструкции зубным техником
6. Установление (припасовка) и фиксация готовой ортопедической конструкции в полости рта пациента
7. Инструктаж пациента по уходу за ортопедической конструкцией и гигиене полости рта