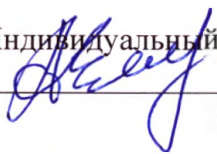


УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель

Ефимова А. А.
«17» июня 2024 г.

«Бахилы медицинские нестерильные по ТУ 32.50.50-001-2018347101-2024»
Инструкция по применению

Срок введения: с «17» июня 2024 г.
Срок действия: не ограничен

2024

Внимание ! Перед применение внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Настоящая инструкция распространяется на «Бахилы медицинские нестерильные по ТУ 32.50.50-001-2018347101-2024» (далее по тексту – Бахилы, Изделие), предназначенное для снижения риска распространения инфекции, соблюдения санитарно-гигиенических требований внутри медицинских помещений.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

1.Бахилы TerraPharm «ЛАЙТ» 16 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 2.Бахилы TerraPharm «ЭКОНОМ» 18 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 3.Бахилы TerraPharm «ЭКОНОМ» 20 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 4.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ ЛАЙТ» 25 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 5.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ ЛАЙТ» 29 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 6.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ» 30 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 7.Бахилы TerraPharm 35 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 8.Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА+» (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 9.Бахилы TerraPharm 41 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 10.Бахилы TerraPharm 43 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 11.Бахилы TerraPharm 45 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий); 12.Бахилы TerraPharm 16 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 13.Бахилы TerraPharm 18 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 14.Бахилы TerraPharm 20 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 15.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 16.Бахилы TerraPharm 29 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 17.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ+» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 18.Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 19.Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА XL» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 20.Бахилы TerraPharm 41(2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 21.Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА+» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 22.Бахилы TerraPharm «СУПЕР 50» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 23.Бахилы TerraPharm «СУПЕР 55» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 24. Бахилы TerraPharm «СУПЕР 60» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий); 25.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ» (2 резинка, двойная подошва. Цвет синий, бело-синий); 26.Бахилы TerraPharm 41(2 резинка, двойная подошва. Цвет синий, бело-синий); 27.Бахилы TerraPharm 50 (2 резинка, двойная подошва. Цвет синий, бело-синий).

Область применения: лечебно-профилактические учреждения широкого профиля.

Показания к применению: снижения риска распространения инфекции, соблюдения санитарно-гигиенических требований внутри медицинских помещений.

Противопоказания к применению: индивидуальная не переносимость материалов, из которых изготовлено изделие; использование в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами; использование изделие в помещениях с сильно действующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с полиэтиленом.

Побочные эффекты: нет

Потенциальные пользователи: медицинские работники, посетители, самостоятельное применения.

По потенциальному риску применения изделие относится к классу 1 по ГОСТ 31508.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444

Изделия в зависимости от возможных последствий отказа класс Б по ГОСТ Р 50444

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Вид медицинского изделия 269290

Изделие нестерильное. Изделие однократного применения. Изделие не подлежит ремонту. Изделие не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения. Изделие не содержит лекарственных средств, лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций.

Производитель/ Разработчик:

Индивидуальный предприниматель **Ефимова Алена Анатольевна**, 143 471,РФ, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Калининцев, дом 241 кв15

Место производства: Индивидуальный предприниматель **Ефимова Алена Анатольевна**, 105082., Город Москва, улица Почтовая Б., дом № 26В стр.2

Телефон: 89268042562

Электронная почта: atoyan2025@inbox.ru

1. Технические требования.

1. Технические характеристики.

1.1 Основные параметры и характеристики.

1.1.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий

, настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации.

1.1.2 Изделия должны иметь средства фиксации (резинки одинарная/двойная)

1.1.2.1 Количество средств фиксации (резинок) в соответствии с требованиями заказчика.

1.1.2.2 Изделия могут изготавливаться в однослойном или двухслойном исполнении.

1.1.2.3 Количество слоев должно быть в соответствии с требованиями Заказчика

1.1.3 Линейные размеры, готового изделия должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 для каждого варианта исполнения.


1.1.3.1 Толщины изделия должна соответствовать значениям в таблице 1

1.1.3.2 Цвет изделия должен соответствовать требованиям приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Вариант исполнения	Линейные размеры Длина x Высота (мм) (±15 %)	Толщина в мм. (±15 %)	Цвет
1.Бахилы TerraPharm «ЛАЙТ» 16 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)	400 X 140	16±15 %	Синий. бело-синий
2.Бахилы TerraPharm «ЭКОНОМ» 18 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)	390 X 120	18 ±15 %	
3.Бахилы TerraPharm «ЭКОНОМ» 20 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)	390 X 130	20±15 %	
4.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ ЛАЙТ» 25 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)	390 X 150	25±30 %	
5.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ ЛАЙТ» 29 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)	390 X 160		
	420 X 120		
6.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ» 30 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)	420 X 130	29±15 %	
7.Бахилы TerraPharm 35 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)	420 X 150	30±30 %	
8.Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА+» (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)	420 X 160	35±30 %	
9.Бахилы TerraPharm 41 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)		40±30 %	
10.Бахилы TerraPharm 43 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)		41±15 %	
11.Бахилы TerraPharm 45 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий)		43±15 %	
12.Бахилы TerraPharm 16 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		45±15 %	
13.Бахилы TerraPharm 18 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		16±15 %	
14.Бахилы TerraPharm 20 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		18 ±15 %	
15.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		20±15 %	
16.Бахилы TerraPharm 29 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		25±30 %	
17.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ+» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		29±15 %	
18.Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		30±30 %	
19.Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА XL» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		35±30 %	
20.Бахилы TerraPharm 41(2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		40±30 %	
21.Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА+» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		41±30 %	
22.Бахилы TerraPharm «СУПЕР 50» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		45±30 %	
23.Бахилы TerraPharm «СУПЕР 55» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		50±30 %	
24. Бахилы TerraPharm «СУПЕР 60» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий);		55±15 %	
25.Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ» (2 резинка, двойная подошва. Цвет синий, бело-синий);		60±30 %	
26.Бахилы TerraPharm 41(2 резинка, двойная подошва. Цвет синий, бело-синий);		35±30 %	
27.Бахилы TerraPharm 50 (2 резинка, двойная подошва. Цвет синий, бело-синий);		41±15 %	
		50±15 %	

1.1.4 Внешний вид изделия должен соответствовать рис. 1; рис. 2.

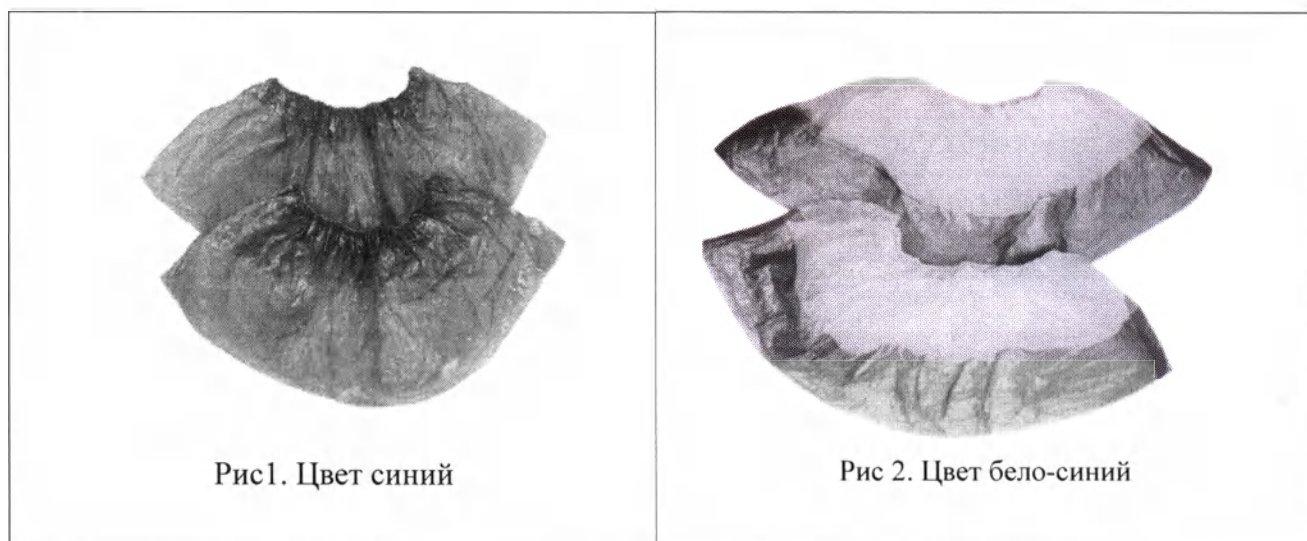

1.1.5 Материалы используемые при изготовлении изделия должны соответствовать таблице 2

Таблица 2

Часть изделия	Марка материала / производитель	Вид контакта с организмом
Материал изделия	1.Полиэтилен CAS № 9002-88-4 2., ООО «Фламинго Пак»; страна производства – Российская Федерация.	Кратковременный контакт с кожей
Краситель	Полиэфирный краситель (синий марки RAL 501, белый марки RAL 901 производства ООО «Фламинго Пак»; страна производства – Российская Федерация.	
Элемент фиксации	Резинка оплетенная: состав – нить латексная; толщина – от 1,0 до 1,2 мм; торговая марка – Эллегрин; производитель – АО «ЭЛС»; страна производства – Российская Федерация	Контакт с организмом человека отсутствует.
Групповая упаковка	Короб упаковочный (евроблок): состав – картон, целлюлоза 100 %; торговая марка – Московская картонная фабрика; производитель – ООО «Московская картонная фабрика»; страна производства – Российская Федерация. Пакет упаковочный (брикет): состав – полиэтилен 100 %, произведенный под низким давлением; торговая марка – Фламинго Пак; производитель – ООО «Фламинго Пак»; страна производства – Российская Федерация.	Не предусмотрен

1.1.6 Скрепление должно быть осуществлено термической сваркой

1.2 Комплект поставки.

«Бахилы медицинские нестерильные по ТУ 32.50.50-001-2018347101-2024»

I. Варианты исполнения:

1. Бахилы TerraPharm «ЛАЙТ» 16 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
2. Бахилы TerraPharm «ЭКОНОМ» 18 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
3. Бахилы TerraPharm «ЭКОНОМ» 20 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
4. Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ ЛАЙТ» 25 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
5. Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ ЛАЙТ» 29 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
6. Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ» 30 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
7. Бахилы TerraPharm 35 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
8. Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА+» (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
9. Бахилы TerraPharm 41 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
10. Бахилы TerraPharm 43 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
11. Бахилы TerraPharm 45 (1 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
12. Бахилы TerraPharm 16 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
13. Бахилы TerraPharm 18 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
14. Бахилы TerraPharm 20 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
15. Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
16. Бахилы TerraPharm 29 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
17. Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ+» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
18. Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
19. Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА XL» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
20. Бахилы TerraPharm 41 (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
21. Бахилы TerraPharm «ЭКСТРА+» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
22. Бахилы TerraPharm «СУПЕР 50» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
23. Бахилы TerraPharm «СУПЕР 55» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
24. Бахилы TerraPharm «СУПЕР 60» (2 резинка. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
25. Бахилы TerraPharm «СТАНДАРТ» (2 резинка, двойная подошва. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
26. Бахилы TerraPharm 41 (2 резинка, двойная подошва. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.
27. Бахилы TerraPharm 50 (2 резинка, двойная подошва. Цвет синий, бело-синий):
50/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1250/1500/1800/2000/2500/ 3000/3500/4000/4500/5000 пар/упак.

II. Инструкция по применению - 1 шт./упак.

1.3 Маркировка

1.3.1 Маркировка оформляется в виде этикетки вложенной в упаковку, либо в виде ярлыка, прикрепляемого к ней.

1.3.2 Применяемые символы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 15223-1.

1.3.3 Маркировка групповой упаковки оформляется на этикетке, которая должна содержать следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) обозначение изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- дата изготовления;
- срок хранения;
- номер партии (месяц и год изготовления);
- обозначение регистрационного удостоверения (номер и дата выдачи);
- количество пар в упаковке;
- надпись «Изделие нестерильное»
- надпись «Изделие однократного применения»
- надпись «Хранить в сухом месте»

Допускается дополнительно наносить:

- штрих-коды;
- особые условия хранения;
- инструкцию по применению;
- другую информацию по согласованию с заказчиком.

1.3.4 Потребительская упаковка должна иметь следующую маркировку:

- наименование и (или) товарный знак предприятия – изготовителя или поставщика;
- номер партии или дату изготовления;
- надпись гарантийный срок хранения;
- количество единиц в упаковке;
- обозначение регистрационного удостоверения (номер и дата выдачи);
- адрес предприятия-изготовителя.

1.3.5 Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

1.3.6 Транспортная маркировка должна быть нанесена на бумажный ярлык или непосредственно на потребительскую упаковку. ярлык прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки. Способы нанесения маркировки и материалы, применяемые при маркировке мешков и картонных ящиков, выбирают по ГОСТ 15223-1 и по ГОСТ 14192: «Беречь от влаги», «Температурный диапазон», «Не допускать воздействия солнечного света», «Предел по количеству ярусов в штабеле», «Использовать ДО», «Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации».

1.4 Упаковка должна соответствовать ГОСТ Р 50444

1.4.1 Упаковка должна обеспечивать герметичность защиту изделия от внешних воздействий в течение срока хранения, а так же невозможность повторного запечатывания вскрытой упаковки: факт вскрытия упаковки должен быть очевиден.

1.4.2 В качестве индивидуальной упаковки используется: полиэтиленовый пакет или картонный короб.

1.4.3 Групповая упаковка: в картонную коробку по ГОСТ 12301.

1.4.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192, с нанесением дополнительных информационных надписей и манипуляционных знаков: «Вверх», «Беречь от влаги», символ условий хранения.

2. Подготовка к применению.

2.1. Перед применением Изделия внимательно изучите настоящую инструкцию

2.2 Осмотрите упаковку на предмет целостности

2.3 Осмотрите медицинское изделие на предмет соответствия техническим требованиям

2.4 Применять изделие в строгом соответствии с настоящей инструкцией.

Внимание! Применение изделия не по назначению категорически воспрещается

3. Применение медицинского изделия.

3.1 Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.

3.2 Наденьте поверх обуви.

Меры предосторожности.

Внимание! Рекомендована для применения в течение нескольких часов (2-3 часа). Заменять следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время применения. После применения, утилизируйте изделие, в соответствии с пунктом 7 «Порядок утилизации»

Не допускается применять изделие, имеющие механические повреждения, нарушающие целостность изделия. Не допускается применять изделие в помещении с сильно действующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом изделия(спанбонд). Не является защитным средством от газов (кислых, органических и неорганических), паров ртути и других сильных химических веществ.

Не рекомендуется применение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами. Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

4.Транспортирование и хранение.

4.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и соблюдения мер предосторожности и правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

4.2 Размещение и крепление коробок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения коробок и ударов их друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.3 При транспортировании изделия должны быть устойчивы к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 15150 для условий хранения 5.

4.4 Изделия хранят в упакованном виде в помещениях, при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

5. Условия по применению.

5.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 12 часов.

5.2 Перед эксплуатацией изделия следует ознакомиться с принципом действия и правилами применения требованиями изготовителя предъявляемые к эксплуатации изделий.

5.3 Изделие, согласно ГОСТ Р 50444, пригодно к эксплуатации при температуре окружающей среды от +40° до - 25° С и номинальной относительной влажности воздуха от 70% (при +15°С) до 100% (при +25° С).

6. Гарантии изготовителя.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Изготовитель гарантирует соблюдение всех параметров и характеристик, заявленных в настоящем документе, в течение всего срока годности (5 лет) при условии сохранения

целостности индивидуальной упаковки и соблюдения условий хранения, транспортировки и использования в соответствии инструкцией по применению.

7. Порядок утилизации.

7.1 Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ.

7.2 Использованные изделия СанПин 2.1.3684-21 относится к классу Б, Не использованные изделия класс А.

8. Перечень Национальных стандартов

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 12301-2006	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1 общие требования
Санпин 2.1.3684-21	"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"
ГОСТ Р 52538-2006	Чистые помещения. Одежда технологическая. Общие требования

8 листов
А.Е.Еф.