

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т. Ю. Гашенко

2022 г.

НАБОР РЕАГЕНТОВ

«Краситель азур-эозин по Романовскому (концентрат)»
(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

Комплект № 1 серия 01/22

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)
Краситель азур-эозин по Романовскому
(концентрат)

Смешать краситель азур-эозин по Романовскому
(концентрат) с фосфатным буферным раствором
в соотношении 1:4 - 1:20, перемешать.

1 л

Серия: 01/22
Годен до: 2023.07.



ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)
Фосфатный буфер (1 x 400)

Разбавить водой очищенной
в соотношении 1:400, измерить к 2.5 мл,
добавить 1 л воды очищенной, перемешать.

Серия: 01/22

Годен до: 2023.07.

50 мл



ЭКОлаб

142530 Московская область
г. Электрогорск ул. Буденного, д 1-1а
тел: 8 (800) 333-33-47
(47643) 3-23-11, 3-30-03
тел/факс (49843) 3-30-85

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов

«Краситель азур-эозин по Романовскому
(концентрат)»

(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального использования

Комплект № 1

ТУ 9398-012-70423725-2022

ПУ № ФСР 2010/09419 от 25.07.2018

Состав набора:

Краситель азур-эозин по Романовскому - 1 фл (1л)


Фосфатный буфер - 1 фл (50 мл)

Дата изготовления: 2022.01.20

Серия: 01/22

Годен до: 2023.07.20

Кат: № 37.01

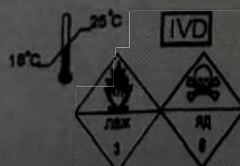

Начальник НПО «Биохимия»

СОГЛАСОВАНО

Директор по качеству ЗАО «ЭКОлаб»

Г. В. Филатова

Т. В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»



Т. Ю. Гашенко

2022 г.

НАБОР РЕАГЕНТОВ

«Краситель азур-эозин по Романовскому (концентрат)»
(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

Комплект № 2 серия 02/22

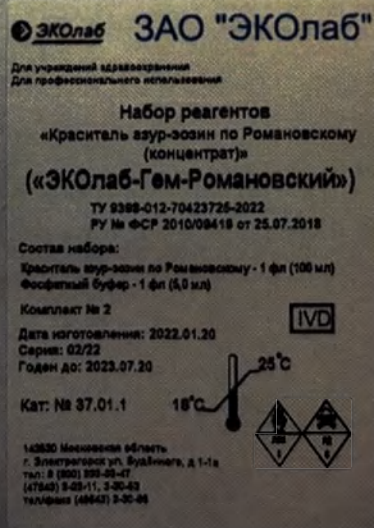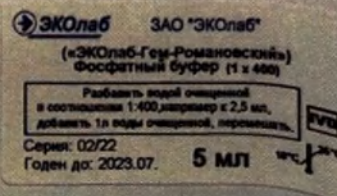

Начальник НПО «Биохимия»

СОГЛАСОВАНО

Директор по качеству ЗАО «ЭКОлаб»

Г. В. Филатова

Т. В. Юрина

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2022 г.



Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов «Краситель азур-эозин по Романовскому (концентрат)» («ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

Комплект № 1 серия 01/22 от 2022.01



ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Краситель азур-эозин по Романовскому (концентрат)» («ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

Набор реагентов «Краситель азур-эозин по Романовскому (концентрат)» («ЭКОлаб-Гем-Романовский») предназначен для окраски на предметных стеклах мазков крови, костного мозга и цитологических препаратов «ручным» способом и с использованием автоматических окрасочных мазков.

Функциональное назначение: скрининг и диагностика. Применение изделия не имеет популяционных и демографических ограничений.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Показания и противопоказания к применению изделия

Изделие предназначено для обследования здоровых и больных лиц.

Противопоказаний к применению не существует.

Область применения

Клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина, клиническая гематология и научно-исследовательской практика.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Набор предназначен для профессионального использования и должен быть применен специально обученным квалифицированным персоналом, таким как врач клинической лабораторной диагностики, медицинский, лабораторный техник и иной специалист, имеющий базовое образование медицинского или биологического профиля не ниже среднего специального и прошедший предварительное обучение.

Описание целевого аналита, сведения о его научной обоснованности

В клинико-диагностических лабораториях для оценки морфологии клеток микроскопия окрашенного мазка.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Краситель азур-эозин по Романовскому (концентрат)»
(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

Набор реагентов «Краситель азур-эозин по Романовскому (концентрат)» («ЭКОлаб-Гем-Романовский») предназначен для окраски на предметных стеклах мазков крови, костного мозга и цитологических препаратов «ручным» способом и с использованием автоматических окрасчиков мазков.

ЭКОлаб

142530 Московская область
г. Электросталь ул. Вудинского, д. 1-1а
тел: 8 (800) 335-33-47
(47643) 3-23-11, 3-30-63
телефакс (47643) 3-30-66

Для упрощенной идентификации
Для профессионального использования

Комплект № 1

Состав набора:
Краситель азур-эозин по Романовскому - 1 фл (1л)
Фосфатный буфер - 1 фл (50 мл)

Дата изготовления: 2022.01.20

Серия: 01/22

Годен до: 2023.07.20

Кат: № 37.01

ЗАО "ЭКОлаб"


Набор реагентов
«Краситель азур-эозин по Романовскому
(концентрат)»
(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

ТУ 9398-012-70423725-2022
ПУ № ФСР 2010/09419 от 25.07.2018



Серия: 01/22
Годен до: 2023.07.



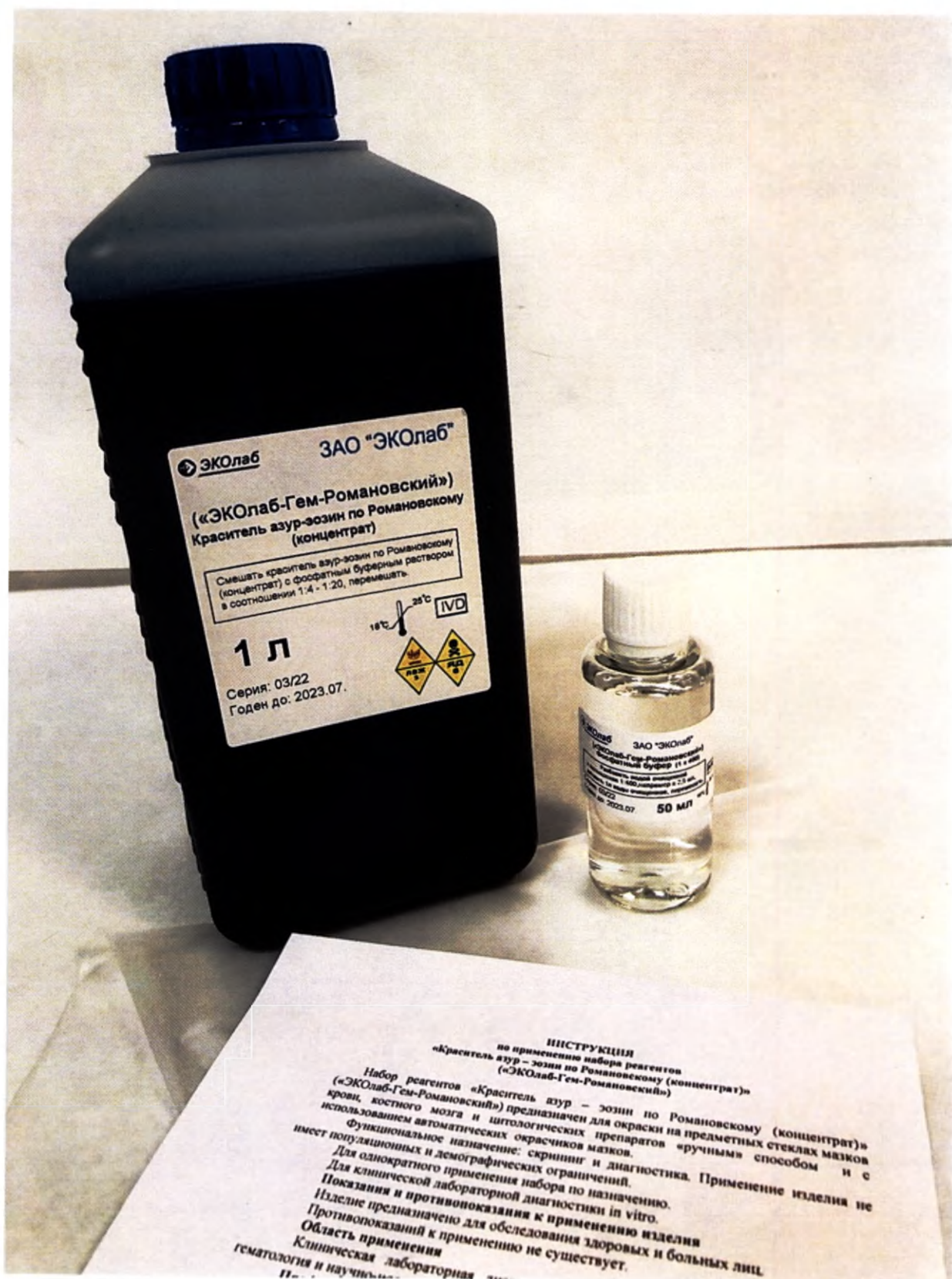



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Краситель азур – эозин по Романовскому (концентрат)»
(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

Набор реагентов «Краситель азур – эозин по Романовскому (концентрат)» («ЭКОлаб-Гем-Романовский») предназначен для окраски на предметных стеклах мазков крови, костного мозга и цитологических препаратов «ручным» способом и с использованием автоматических окрасчиков мазков.

Функциональное назначение: скрининг и диагностика. Применение изделия не имеет популяционных и демографических ограничений.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Показания и противопоказания к применению изделия

Изделие предназначено для обследования здоровых и больных лиц.

Противопоказаний к применению не существует.

Область применения

Клиническая лабораторная диагностика

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Краситель азур – эозин по Романовскому (концентрат)»
(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

Набор реагентов «Краситель азур – эозин по Романовскому (ЭКОлаб-Гем-Романовский)» предназначен для окраски на предметные стекла, костного мозга и цитологических препаратов «ручным» использованием автоматических окрасчиков мазков.

Функциональное назначение: окраска мазков и препаратов. Место

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального использования

Набор реагентов
«Краситель азур-эозин по Романовскому
(концентрат)»
(«ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

ТУ 9398-012-70423725-2022
РУ № ФСР 2010/09419 от 25.07.2018

Состав набора:
Краситель азур-эозин по Романовскому - 1 фл (100 мл)
Фосфатный буфер - 1 фл (5,0 мл)

Комплект № 2
Дата изготовления: 2022.01.20
Серия: 02/22
Годен до: 2023.07.20
Кат: № 37.01.1

142530 Московская область
г. Златоуст ул. Буденного, д. 1-1а
тел: 8 (800) 333-33-47
(47643) 3-33-11, 3-30-43
телефакс (47643) 3-30-46

18°C 25°C

IVD

1 2



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Краситель азур – эозин по Романовскому (концентрат)»
 («ЭКОлаб-Гем-Романовский»)

Набор реагентов «Краситель азур – эозин по Романовскому (конце («ЭКОлаб-Гем-Романовский»)) предназначен для окраски на предметных стеклах крови, костного мозга и цитологических препаратов «ручным» способом использованием автоматических окрасчиков мазков.

Функциональное назначение: скрининг и диагностика. Применение не имеет популяционных и демографических ограничений.

Для однократного применения набора по назначению.


Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Изделие предназначено для обследования здоровых и больных лиц.

Противопоказаний к применению не существует.

Область применения

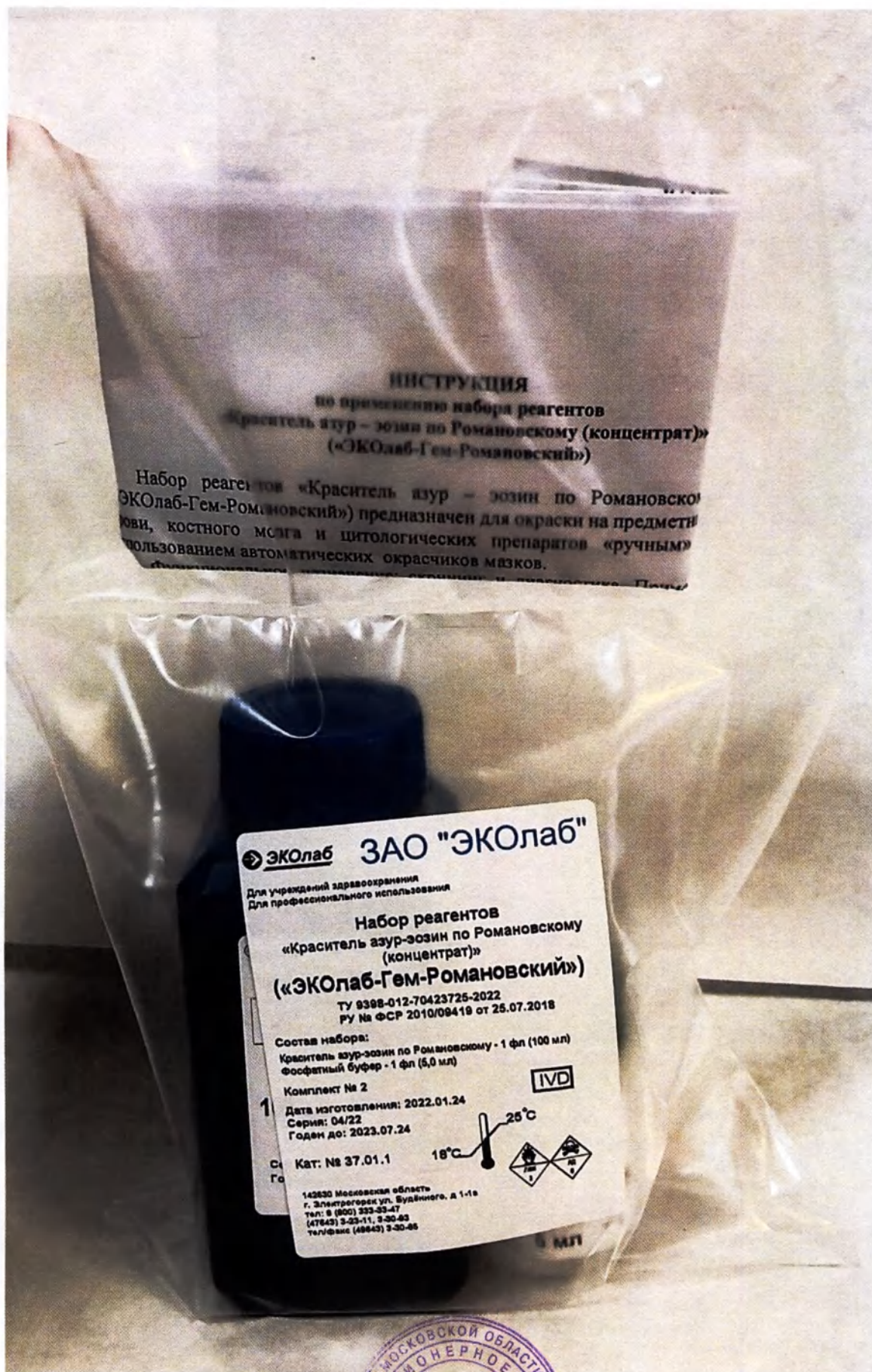

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т. Ю. Гашенко



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист 06

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.
2022 г.

