



«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «АЛЬФАМЕД»

Шестак В.Л.

01 февраля 2012 г.

## **Штативы ШДВП-2, ШДВ-1 для длительных вливаний РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Настоящее руководство по эксплуатации штативов для длительных вливаний ШДВП-2, ШДВ-1 предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с назначением, техническими характеристиками, устройством, условиями работы и правил эксплуатации мебели медицинской для оснащения операционных, функциональных и процедурных отделений лечебных учреждений.

Общий вид изделий приведен на рисунках в Приложении А.

### **1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

1.1 Штативы ШДВП-2, ШДВ-1 предназначены для размещения флаконов с растворами и аппаратуры при длительных вливаниях больным.

Штативы отличаются диаметром основания и высотой.

Держатели флаконов выполнены из нержавеющей проволоки и навешиваются на крючки внутренней трубы телескопа.

1.2 Штативы ШДВП-2 состоят из пятилучевого основания с колесами на поворотных кронштейнах, стойки и телескопической трубы, имеющей цанговый зажим.

1.3 Штатив ШДВ-1 состоит из пятилучевого основания с колесами на поворотных кронштейнах, опорной стойки, регулируемым по высоте столиком для размещения аппаратуры, двух телескопических стоек, имеющих цанговые зажимы.

### **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

2.1 Полученную мебель распакуйте, соберите согласно приложенной схеме сборки и ознакомьтесь с его устройством по руководству по эксплуатации.

Протрите наружные поверхности чистой ветошью.

2.2 Подъем вверх и фиксация внутренней трубы телескопа штативов производится вручную.

Поверните на 1/2 оборота против часовой стрелки пластмассовую втулку цангового зажима, придерживая при этом другой рукой внутреннюю трубу, затем поднимите трубу с держателями флаконов на требуемую высоту и зафиксируйте ее, поворачивая пластмассовую втулку по часовой стрелке.

### **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

3.1 Чистку и дезинфекцию мебели производите салфеткой, смоченной в 1% растворе хлорамина или другой жидкости аналогичного назначения.

После чистки внутренние и наружные поверхности изделия необходимо вытереть насухо.

#### 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

Транспортирование осуществляют по группе условий хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.2 Штативы должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40°C, при верхнем значении относительной влажности 80% при температуре 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

#### 5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Большинство металлических деталей сделано из черной и нержавеющей стали и не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, поэтому специальных методов утилизации после окончания срока службы тележек не требуют.

#### 6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

6.1 Средний срок службы до списания составляет 7 лет.

6.2 Гарантийный срок - 18 месяцев, при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода мебели в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня ее изготовления.