

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ООО «ГРАНИ»

В.А. Занин

«26» сентября 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
(краткая)

**Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая,
нестерильная по ТУ 21.20.24-014-35196086-2023
производства ООО «ГРАНИ» (РОССИЯ)
НЕСТЕРИЛЬНО.**

НЕТОКСИЧНО ВНУТРИ.

Номер партии - см. на упаковке. Размер салфетки - см. на упаковке. Дата производства – указана на упаковке.

Вариант исполнения - см. на упаковке.

Салфетка пропитана спиртом этиловым 70%

В зависимости от потенциального риска применения салфетка относится к классу 3 по ГОСТ 31508-2012

Регистрационное удостоверение № _____

Изделие нестерильное.

Изделие однократного применения.

Комплектность:

I) I. Салфетка в потребительской упаковке (пакете или коробке) по 5 шт., 7 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 50 шт., 60 шт., 80 шт., 100 шт., 120 шт., 150 шт., 200 шт., 250 шт., 300 шт., 350 шт., 400 шт., 500 шт., 600 шт., 720 шт., 750 шт., 800 шт.,

Варианты исполнения: Полный перечень выпускаемых изделий смотрите в инструкции (полная) - по QR-коду на потребительской упаковке.

II) Инструкция по применению (краткая) - 1 шт. на потребительскую упаковку.

III) Инструкция по применению (полная) - по QR-коду на потребительской упаковке.

1 НАЗНАЧЕНИЕ: Салфетка медицинская предназначена для наружного применения в качестве антисептического средства для обработки кожи пациента до инъекций, перед проведением какой-либо процедуры или использованием другого устройства, для подготовки операционного поля, дезинфекции рук медицинским персоналом.

Салфетка рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи.

Потенциальные пользователи: младший, средний, старший медицинский персонал, а также не медицинский персонал.

Показания к применению: Обработка кожи перед проведением какой-либо процедуры или использованием другого устройства.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость этилового спирта и нетканого материала.

Возможные побочные действия: Зуд, покраснение в месте применения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетка представляет собой основу из нетканого полотна, пропитанную этиловым 70% спиртовым раствором, в индивидуальной упаковке из комбинированного материала.

Индивидуальная упаковка салфетки – герметична.

Вскрытие индивидуальной упаковки не требует ножниц.

Прочность термосваренной упаковки на разрыв - не менее 8,0 Н

Материалы применяемые при изготовлении изделия:

Наименование составной части	Наименование материала	Обозначение нормативной документации или производитель
Нетканая основа	Полотно нетканое «Спанлейс» тип тиснения- гладкое. вискоза -30%, полиэфир-70% поверхностной плотности (40 ±7)г./ м ²	ТУ 13.95.10-020-45432139-2020, Производства ООО "Текстиль легпром"
	Материалы нетканые из химических (синтетических, искусственных) нитей. «Спанлейс» тип- гладкий, белый. вискоза -30%, полиэфир-70% поверхностной плотности (40 ±7)г./ м ²	ТУ 13.95.10.190-001-13866327-2017, Производства ООО "Котлин-Групп"
	Полотно нетканое гидросплетёное «Спанлейс» санитарно-гигиенического назначения на основе вискозных волокон . вискоза -30%, полиэфир-70%	ТУ 8392-001-55365591-2009 Производства ООО «БАЛ-ЭМ»

	поверхностной плотности (40 ± 7) г./м ²	
Пропиточный раствор	Этиловый спирт раствор для наружного применения 70% или Спирт этиловый раствор для наружного применения м 70% или Этиловый спирт, раствор для наружного применения 70%	Рег. №ЛСР -009320/08 от 29.03.2022г. ЗАО «РФК», Россия Рег. №ЛС-002101 от 03.04.2024 г. ООО «ВЛАДФАРМ», Россия Рег. №ЛСР-000282/10 от 08.09.2021г. АО "Кемеровская фармацевтическая фабрика", Россия

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Вручную вскрыть пакет, достать изделие, развернуть.

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Обработка кожи, например, инъекционного поля или операционного поля, дезинфекции рук медицинским персоналом: тщательно протереть салфеткой спиртовой кожу требующей обработки. Время выдержки – до полного высыхания (не менее 20 секунд).

5. УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания работ выбросить использованную салфетку спиртовую и вскрытую индивидуальную упаковку (пакет) в емкость для медицинских отходов категории Б. Утилизацию салфеток спиртовых необходимо проводить согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованная салфетка утилизируется как бытовые отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Упакованная продукция должна храниться вдали от солнечного света, огня.

Условия транспортирования и хранения – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69 но для температуры от 40°C до минус 40°C.

Гарантийный срок годности изделия в индивидуальной упаковке при соблюдении условий хранения составляет 5 лет.

Меры безопасности:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок годности изделия, который указан на этикетке.

При возникновении зуда, покраснения в месте применения потребитель должен проконсультироваться с медицинским работником

Не использовать повторно, только для одноразового применения.

Не использовать при поврежденной упаковке.

Не допускать контакта с открытым пламенем.

Салфетка спиртовая ремонту и техническому обслуживанию не подлежит

Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023

 - Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению

 - Запрет на повторное применение

 - Не допускать воздействия влаги

 - Не допускать воздействия солнечного света

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
СанПиН 2.1.3684-21.	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИ» (ООО «ГРАНИ»)

614097, Россия, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Песчаная, д. 1а, помещ. 1

Телефон: +7 (922) 368-11-42. сайт: www.ooograni.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации

Б. Засеев



«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ООО «ГРАНИ»

В.А. Занин

«26» сентября 2024 г.

по применению медицинского изделия
(полная)

**Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая,
нестерильная по ТУ 21.20.24-014-35196086-2023**

производства ООО «ГРАНИ» (РОССИЯ)
ТУ 21.20.24-014-35196086-2023
НЕСТЕРИЛЬНО.

НЕТОКСИЧНО ВНУТРИ.

Номер партии - см. на упаковке.

Размер салфетки - см. на упаковке.

Вариант исполнения - см. на упаковке.

Дата производства – указана на упаковке.

В зависимости от потенциального риска применения салфетка относится к классу 3 по ГОСТ 31508-2012

Салфетка пропитана спиртом этиловым 70%

Регистрационное удостоверение № _____

Изделие нестерильное.

Изделие одноразового применения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ: Салфетка медицинская предназначена для наружного применения в качестве антисептического средства для обработки кожи пациента до инъекций, перед проведением какой-либо процедуры или использованием другого устройства, для подготовки операционного поля, дезинфекции рук медицинским персоналом.

Салфетка рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи.

Потенциальные пользователи: младший, средний, старший медицинский персонал, а также не медицинский персонал.

Показания к применению: Обработка кожи перед проведением какой-либо процедуры или использованием другого устройства.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость этилового спирта и нетканого материала.

Возможные побочные действия: Зуд, покраснение в месте применения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетка представляет собой основу из нетканого полотна, пропитанную этиловым 70% спиртовым раствором, в индивидуальной упаковке из комбинированного материала.

Индивидуальная упаковка салфетки – герметична.

Вскрытие индивидуальной упаковки не требует ножниц.

Прочность термосваренной упаковки на разрыв - не менее 8,0 Н

Материалы применяемые при изготовлении изделия:

Наименование составной части	Наименование материала	Обозначение нормативной документации или производитель
Нетканая основа	Полотно нетканое «Спанлейс» тип тиснения- гладкое вискоза -30% полиэфир-70% поверхностной плотности (40 ±7)г./ м ²	ТУ 13.95.10-020-45432139-2020, Производства ООО "Текстиль легпром"
	Материалы нетканые из химических (синтетических, искусственных) нитей. «Спанлейс» тип- гладкий, белый. вискоза -30% полиэфир-70% поверхностной плотности (40 ±7)г./ м ²	ТУ 13.95.10.190-001-13866327-2017, Производства ООО "Котлин-Групп"

	Полотно нетканое гидросплетёное «Спанлейс» санитарно-гигиенического назначения на основе вискозных волокон . вискоза -30% полиэфир-70% поверхностной плотности (40 ±7)г./ м ²	ТУ 8392-001-55365591-2009 Производства ООО «БАЛ-ЭМ»
Пропиточный раствор	Этиловый спирт раствор для наружного применения 70% или Спирт этиловый раствор для наружного применения м 70% Этиловый спирт, раствор для наружного применения 70%	Рег. №ЛСР -009320/08 от 29.03.2022 г Производитель ЗАО «РФК», Россия Рег. № ЛС-002101 от 03.04.2024 г. ООО «ВЛАДФАРМ», Россия Рег. № ЛСР-000282/10 от 08.09.2021 АО "Кемеровская фармацевтическая фабрика", Россия
Упаковка	Бумага из алюминиевой фольги Состав: Бумага -48гсм ПЭ-12 гсм Ал. Фольга-18 гсм Нукрел-15 гсм • поверхностная плотность, г/м ² : - прочность при растяжении, не менее, Н: в поперечном направлении: в машинном направлении: • поверхностная плотность, не менее, г/м ² : - прочность при растяжении, не менее, кН/м: в поперечном направлении: в машинном направлении:	Производства фирмы «SHANDONG DEYU TIANHONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY» CO.,LTD, Китай "Шаньдун Дэюй Тяньхун Нью Материал Текнолоджи Ко., Лтд." (93 ± 2) 26 35 103 3,2 4,2
Упаковка	Материал упаковочный комбинированный на бумажной основе -поверхностная плотность- г/м ² Прочность при растяжении. не менее. кН/м: -в поперечном направлении - в машинном направлении Прочность на разрыв, не менее, кН/м: -в поперечном направлении - в машинном направлении	ТУ 5453-001-81659324-2010 Производства ООО «Орбита-Ф» 100 1,7 3,6 22 30

Салфетка выпускается размеров - указано в таблице 1.

Содержание спирта в салфетке, размер упаковки, количество сложений - указано в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия	Размеры салфетки	Обозначение	Масса спирта, г. не менее	Размер первичной упаковки, мм. (допуск ±4мм.)	Сложения, к-во
Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная по ТУ 21.20.24-014-35196086-2023 варианты исполнения:						
1	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (30x56)мм.	(30±2) мм х (56±4) мм	9394-001	0,30	40x42	4
2	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (30x60)мм	(30±2) мм х (60±4) мм	9394-002	0,30	40x42	4

3	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (30x65)мм	(30±2) мм х (65±5) мм	9394-003	0,35	40x42	5
4	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (30x80)мм	(30±2) мм х (80±6) мм	9394-004	0,4	40x45	4
5	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (35x65)мм	(35±2) мм х (65±5) мм	9394-005	0,4	40x42	5
6	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (35x75)мм,	(35±2) мм х (75±5) мм	9394-006	0,45	40x45	4
7	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (40x60)мм,	(40±3) мм х (60±4) мм	9394-007	0,4	40x42	4
8	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (40x70)мм,	(40±3) мм х (70±5) мм	9394-008	0,45	40x45	4
9	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (40x75)мм,	(40±3) мм х (75±5) мм	9394-009	0,5	40x45	4
10	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (45x55)мм	(45±3) мм х (55±5) мм	9394-010	0,4	40x42	4
11	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (45x65)мм	(45±3) мм х (65±5) мм	9394-011	0,4	40x42	5
12	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (45x80)мм	(45±3) мм х (80±6) мм	9394-211	0,6	45x45	4
13	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (45x90)мм,	(45±3) мм х (90±6) мм	9394-012	0,65	45x45	5
14	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (50x60)мм	(50±4) мм х (60±4) мм	9394-013	0,5	45x42	5
15	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (50x75)мм	(50±4) мм х (75±5) мм	9394-014	0,6	45x45	4
16	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (50x100)мм,	(50±4) мм х (100±7) мм	9394-015	0,8	45x45	5
17	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (55x65)мм,	(55±4) мм х (65±5) мм	9394-016	0,6	45x42	4
18	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (55x85)мм,	(55±4) мм х (85±6) мм	9394-017	0,7	45x45	4
19	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (56x60)мм,	(56±4) мм х (60±4) мм	9394-018	0,5	45x42	4
20	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (56x65)мм,	(56±4) мм х (65±5) мм	9394-019	0,55	45x42	4
21	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (60x60)мм,	(60±4) мм х (60±4) мм	9394-020	0,55	45x42	4
22	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (60x65)мм,	(60±4) мм х (65±5) мм	9394-021	0,6	45x42	4
23	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (60x90)мм,	(60±4) мм х (90±6) мм	9394-022	0,8	45x45	5
24	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (60x100)мм,	(60±4) мм х (100±7) мм	9394-023	0,9	45x45	5

25	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер 60x120)мм,	(60±4) мм х (120±8) мм	9394-024	1,05	45x50	5
26	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x65)мм,	(65±5) мм х (65±5) мм	9394-025	0,65	45x42	4
27	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x70)мм,	(65±5) мм х (70±5) мм	9394-026	0,65	45x45	4
28	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x75)мм,	(65±5) мм х (75±5) мм	9394-027	0,7	47,5x45	5
29	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x80)мм,	(65±5) мм х (80±6) мм	9394-028	0,75	47,5x45	5
30	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x85)мм,	(65±5) мм х (85±6) мм	9394-029	0,8	47,5x45	5
31	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x95)мм,	(65±5) мм х (95±7) мм	9394-030	0,9	47,5x45	5
32	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x100)мм,	(65±5) мм х (100±7) мм	9394-031	0,95	47,5x45	5
33	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x105)мм,	(65±5) мм х (105±7) мм	9394-032	1	47,5x47,5	5
34	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (70x110)мм,	(70±5) мм х (110±8) мм	9394-033	1,05	50x47,5	5
35	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (75x80)мм,	(75±5) мм х (80±6) мм	9394-034	0,9	54x42	5
36	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (75x100)мм,	(75±5) мм х (100±7) мм	9394-035	1,05	55x45	5
37	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (75x125)мм,	(75±5) мм х (125±9) мм	9394-036	1,1	55x47,5	6
38	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (80x80)мм,	(80±6) мм х (80±6) мм	9394-037	0,85	55x45	5
39	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (80x100)мм,	(80±6) мм х (100±7) мм	9394-038	1,05	55x45	5
40	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (80x125)мм,	(80±6) мм х (125±9) мм	9394-039	1,2	55x47,5	6
41	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (80x150)мм,	(80±6) мм х (150±11) мм	9394-040	1,45	55x50	6
42	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (85x110)мм,	(85±6) мм х (110±8) мм	9394-041	1,1	60x47,5	5
43	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (90x110)мм,	(90±6) мм х (110±8) мм	9394-042	1,15	60x47,5	5
44	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (90x200)мм,	(90±6) мм х (200±14) мм	9394-043	1,7	70x50	8
45	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x100)мм,	(100±7) мм х (100±7) мм	9394-044	1,1	70x45	4
46	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x110)мм,	(100±7) мм х (110±8) мм	9394-045	1,2	70x47,5	4

25	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер 60x120)мм,	(60±4) мм х (120±8) мм	9394-024	1,05	45x50	5
26	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x65)мм,	(65±5) мм х (65±5) мм	9394-025	0,65	45x42	4
27	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x70)мм,	(65±5) мм х (70±5) мм	9394-026	0,65	45x45	4
28	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x75)мм,	(65±5) мм х (75±5) мм	9394-027	0,7	47,5x45	5
29	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x80)мм,	(65±5) мм х (80±6) мм	9394-028	0,75	47,5x45	5
30	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x85)мм,	(65±5) мм х (85±6) мм	9394-029	0,8	47,5x45	5
31	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x95)мм,	(65±5) мм х (95±7) мм	9394-030	0,9	47,5x45	5
32	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x100)мм,	(65±5) мм х (100±7) мм	9394-031	0,95	47,5x45	5
33	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (65x105)мм,	(65±5) мм х (105±7) мм	9394-032	1	47,5x47,5	5
34	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (70x110)мм,	(70±5) мм х (110±8) мм	9394-033	1,05	50x47,5	5
35	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (75x80)мм,	(75±5) мм х (80±6) мм	9394-034	0,9	54x42	5
36	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (75x100)мм,	(75±5) мм х (100±7) мм	9394-035	1,05	55x45	5
37	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (75x125)мм,	(75±5) мм х (125±9) мм	9394-036	1,1	55x47,5	6
38	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (80x80)мм,	(80±6) мм х (80±6) мм	9394-037	0,85	55x45	5
39	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (80x100)мм,	(80±6) мм х (100±7) мм	9394-038	1,05	55x45	5
40	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (80x125)мм,	(80±6) мм х (125±9) мм	9394-039	1,2	55x47,5	6
41	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (80x150)мм,	(80±6) мм х (150±11) мм	9394-040	1,45	55x50	6
42	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (85x110)мм,	(85±6) мм х (110±8) мм	9394-041	1,1	60x47,5	5
43	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (90x110)мм,	(90±6) мм х (110±8) мм	9394-042	1,15	60x47,5	5
44	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (90x200)мм,	(90±6) мм х (200±14) мм	9394-043	1,7	70x50	8
45	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x100)мм,	(100±7) мм х (100±7) мм	9394-044	1,1	70x45	4
46	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x110)мм,	(100±7) мм х (110±8) мм	9394-045	1,2	70x47,5	4

47	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x120)мм,	(100±7) мм х (120±8) мм	9394-046	1,3	70x47,5	5
48	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x125)мм,	(100±7) мм х (125±9) мм	9394-047	1,4	70x47,5	5
49	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x135)мм,	(100±7) мм х (135±9) мм	9394-048	1,5	70x50	5
50	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x140)мм,	(100±7) мм х (140±10) мм	9394-049	1,55	70x50	6
51	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x145)мм,	(100±7) мм х (145±10) мм	9394-050	1,55	70x50	6
52	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (100x150)мм,	(100±7) мм х (150±11) мм	9394-051	1,6	80x50	6
53	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (110x110)мм,	(110±8) мм х (110±8) мм	9394-052	1,35	70x47,5	4
54	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (110x125)мм,	(110±8) мм х (125±9) мм	9394-053	1,55	70x47,5	5
55	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (110x150)мм,	(110±8) мм х (150±11) мм	9394-054	1,8	80x50	6
56	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (115x130)мм,	(115±8) мм х (130±9) мм	9394-055	1,6	80x50	6
57	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (115x200)мм,	(115±8) мм х (200±14) мм	9394-056	2,45	80x50	8
58	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (115x250)мм,	(115±8) мм х (250±18) мм	9394-057	2,6	80x60	8
59	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (120x150)мм,	(120±8) мм х (150±11) мм	9394-058	1,85	80x50	8
60	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (120x165)мм,	(120±8) мм х (165±12) мм	9394-059	2	80x50	7
61	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (120x175)мм,	(120±8) мм х (175±12) мм	9394-060	2,15	80x50	7
62	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (125x125)мм,	(125±9) мм х (125±9) мм	9394-061	1,6	80x50	5
63	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (125x145)мм,	(125±9) мм х (145±10) мм	9394-062	1,65	80x50	6
64	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (125x150)мм,	(125±9) мм х (150±11) мм	9394-063	1,75	80x50	6
65	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (125x165)мм,	(125±9) мм х (165±12) мм	9394-064	1,9	80x50	7
66	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (125x170)мм,	(125±9) мм х (170±12) мм	9394-065	1,95	80x50	7
67	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (125x175)мм,	(125±9) мм х (175±12) мм	9394-066	2	80x50	7
68	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (125x185)мм,	(125±9) мм х (185±13) мм	9394-067	2,1	80x50	7

69	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (130x150)мм,	(130±9) мм x (150±11) мм	9394-068	1,8	80x50	6
70	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (130x180)мм,	(130±9) мм x (180±13) мм	9394-069	2,4	80x50	7
71	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (130x200)мм,	(130±9) мм x (200±14) мм	9394-070	2,4	7	9
72	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (130x250)мм,	(130±9) мм x (250±18) мм	9394-071	3	80x60	9
73	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (135x145)мм,	(135±9) мм x (145±10) мм	9394-072	1,8	85x50	6
74	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (135x150)мм,	(135±9) мм x (150±11) мм	9394-073	1,9	82,5x50	6
75	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (125x165)мм,	(135±9) мм x (165±12) мм	9394-074	2,05	85x50	6
76	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (135x185)мм,	(135±9) мм x (185±13) мм	9394-075	2,3	85x50	7
77	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (135x200)мм,	(135±9) мм x (200±14) мм	9394-076	2,45	85x50	9
78	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (140x140)мм,	(140±10) мм x (140±10) мм	9394-077	1,7	85x50	6
79	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (140x165)мм,	(140±10) мм x (165±12) мм	9394-078	2,05	85x50	7
80	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (140x170)мм,	(140±10) мм x (170±12) мм	9394-079	2,05	85x50	7
81	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (140x180)мм,	(140±10) мм x (180±13) мм	9394-080	2,2	85x50	7
82	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (140x190)мм,	(140±10) мм x (190±13) мм	9394-081	2,35	85x50	8
83	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (140x200)мм,	(140±10) мм x (200±14) мм	9394-082	2,45	85x50	9
84	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (145x185)мм,	(145±10) мм x (185±13) мм	9394-083	2,4	90x500	8
85	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (145x190)мм,	(145±10) мм x (190±13) мм	9394-084	2,45	90x50	8
86	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (150x150)мм,	(150±11) мм x (150±11) мм	9394-085	2,3	90x50	7
87	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (150x180)мм,	(150±11) мм x (180±13) мм	9394-285	2,35	90x50	8
88	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (150x200)мм,	(150±11) мм x (200±14) мм	9394-086	2,65	90x50	9
89	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (160x160)мм,	(160±11) мм x (160±11) мм	9394-087	2,3	95x50	7
90	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (160x180)мм,	(160±11) мм x (180±13) мм	9394-088	2,5	95x50	8

91	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (160x185)мм,	(160±11) мм x (185±13) мм	9394-089	2,6	95x50	8
92	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (160x200)мм,	(160±11) мм x (200±14) мм	9394-090	2,85	95x50	9
93	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (160x220)мм,	(160±11) мм x (220±15) мм	9394-091	3,1	95x60	9
94	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (170x220)мм,	(170±12) мм x (220±15) мм	9394-092	2,3	100x60	8
95	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (175x175)мм,	(175±12) мм x (175±12) мм	9394-093	2,7	105x50	8
96	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (175x200)мм,	(175±12) мм x (200±14) мм	9394-094	3,1	105x50	8
97	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (180x180)мм,	(180±13) мм x (180±13) мм	9394-095	2,9	105x50	8
98	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (180x200)мм,	(180±13) мм x (200±14) мм	9394-096	3,2	105x50	8
99	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (180x250)мм,	(180±13) мм x (250±18) мм	9394-097	3,95	105x60	10
100	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (185x185)мм,	(185±13) мм x (185±13) мм	9394-098	3,1	110x60	8
101	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (185x200)мм,	(185±13) мм x (200±14) мм	9394-099	3,4	110x60	8
102	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (190x210)мм,	(190±13) мм x (210±15) мм	9394-100	3,5	115x60	8
103	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x200)мм,	(200±14) мм x (200±14) мм	9394-101	3,5	117,5x60	8
104	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x220)мм,	(200±14) мм x (220±15) мм	9394-102	3,9	117,5x60	9
105	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x240)мм,	(200±14) мм x (240±17) мм	9394-103	4,6	117,5x60	10
106	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x250)мм,	(200±14) мм x (250±18) мм	9394-104	5	117,5x60	10
107	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x300)мм,	(200±14) мм x (300±21) мм	9394-105	6	130x70	12
108	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x350)мм,	(200±14) мм x (350±25) мм	9394-106	7	130x80	12
109	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (220x220)мм,	(220±15) мм x (220±15) мм	9394-107	4,6	140x60	9
110	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (220x250)мм,	(220±15) мм x (250±18) мм	9394-108	5,2	140x60	10
111	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (220x300)мм,	(220±15) мм x (300±21) мм	9394-109	6,6	140x70	12
112	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (220x400)мм,	(220±15) мм x (400±28) мм	9394-110	7,3	140x80	15

113	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (230x250)мм,	(230±16) мм x (250±18) мм	9394-111	5,3	140x60	10
114	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (230x300)мм,	(230±16) мм x (300±21) мм	9394-112	6,9	140x70	12
115	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (240x240)мм,	(240±17) мм x (240±17) мм	9394-113	5,6	140x60	10
116	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (240x250)мм,	(240±17) мм x (250±18) мм	9394-114	5,7	140x60	10
117	Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (250x250)мм,	(250±18) мм x (250±18) мм	9394-115	5,8	140x60	10

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Вручную вскрыть пакет, достать изделие, развернуть.

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Обработка кожи, например, инъекционного поля или операционного поля, дезинфекции рук медицинским персоналом: тщательно протереть салфеткой спиртовой кожу требующей обработки. Время выдержки – до полного высыхания (не менее 20 секунд).

5. УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания работ выбросить использованную салфетку спиртовую и вскрытую индивидуальную упаковку (пакет) в емкость для медицинских отходов категории Б. Утилизацию салфеток спиртовых необходимо проводить согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованная салфетка утилизируется как бытовые отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Упакованная продукция должна храниться вдали от солнечного света, огня.

Условия транспортирования и хранения – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69 но для температуры от 40°C до минус 40°C.

Гарантийный срок годности изделия в индивидуальной упаковке при соблюдении условий хранения составляет 5 лет.

Меры безопасности:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок годности изделия, который указан на этикетке.

Не использовать повторно, только для одноразового применения.


При возникновении зуда, покраснения в месте применения потребитель должен проконсультироваться с медицинским работником

Не использовать при поврежденной упаковке.

Не допускать контакта с открытым пламенем.

Салфетка спиртовая ремонту и техническому обслуживанию не подлежит

Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023

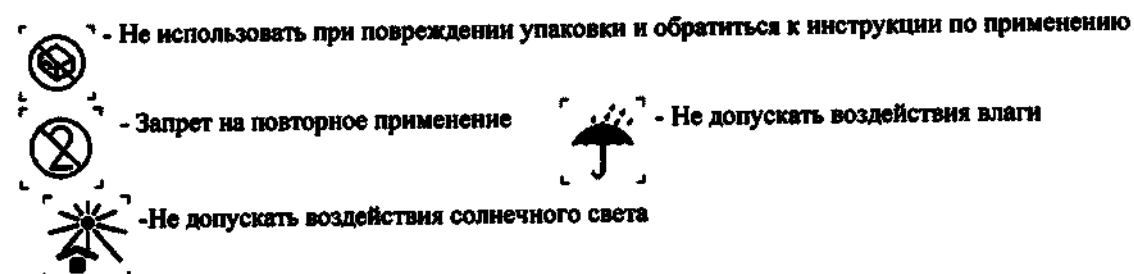

Комплектность.

Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная по ТУ 21.20.24-014-35196086-2023 в составе:

1. Салфетка в потребительской упаковке (пакете или коробке) по 5 шт., 7 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 50 шт., 60 шт., 80 шт., 100 шт., 120 шт., 150 шт., 200 шт., 250 шт., 300 шт., 350 шт., 400 шт., 500 шт., 600 шт., 720 шт., 750 шт., 800 шт.

Варианты исполнения:

1. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (30x56)мм.

2. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная

- ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

103. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x200)мм.
104. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x220)мм.
105. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x240)мм.
106. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x250)мм.
107. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x300)мм.
108. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (200x350)мм.
109. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (220x220)мм.
110. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (220x250)мм.
111. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (220x300)мм.
112. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (220x400)мм.
113. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (230x250)мм.
114. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (230x300)мм.
115. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (240x240)мм.
116. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (240x250)мм.
117. Салфетка медицинская спиртовая дезинфицирующая, антисептическая, одноразовая, нестерильная размер (250x250)мм.

II) Инструкция по применению (краткая)- 1 шт. на потребительскую упаковку.

III) - Инструкция по применению (полная)- по QR-коду на потребительской упаковке.

СВЕДЕНИЯ

о нормативной документации на медицинское изделие

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
СанПиН 2.1.3684-21.	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 12.1.004-91	Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 17.2.3.01-86	Охрана природы
ГОСТ 9142-90	ЯЩИКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА Общие технические условия.
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИ» (ООО «ГРАНИ»)

614097, Россия, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Песчаная, д. 1а, помещ. 1

Телефон: +7 (922) 368-11-42, сайт: www.ooograni.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12 лист(ов)

Руководитель организации

