



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ЭВТЕКС»

Бородин М.Е..

2014 г.

М.п.

Инструкция по применению

Бинты фиксирующие с неосыпающимися краями по ТУ 9393-003-14959781-2013 в исполнениях:

- «ФРИЛАСТ», размером 4,0см х 1,7м; 6,0см х 1,7м; 8,0 м х 1,7м; 10,0см х 1,7м;
12,0см х 1,7м;
- «БИЛАСТ», размером 4,0см х 1,7м; 6,0см х 1,7м; 8,0 м х 1,7м; 10,0см х 1,7м;
12,0см х 1,7м.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты фиксирующие с неосыпающимися краями по ТУ 9393-003-14959781-2013 в исполнениях:

- «ФРИЛАСТ», размером 4,0см x 1,7м; 6,0см x 1,7м; 8,0 м x 1,7м; 10,0см x 1,7м; 12,0см x 1,7м;
- «БИЛАСТ», размером 4,0см x 1,7м; 6,0см x 1,7м; 8,0 м x 1,7м; 10,0см x 1,7м; 12,0см x 1,7м. (далее по тексту - бинт).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений, в случаях, отсутствия прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью.

Область применения - десмургия.

Условия применения - Бинты могут быть использованы в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, общественных организациях, на транспорте, в машинах скорой медицинской помощи, в медицине катастроф в полевых условиях, а также в домашних условиях.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Быстрое оказание первой медицинской помощи - фиксация предметов и материалов медицинского назначения.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Во избежание риска удушья не давать детям играть с бинтами.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Нежелательные явления, которые могут произойти и (или) потребовать вмешательства, включают, в числе прочих:

- аллергическая реакция, ввиду непереносимости пациента.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Бинты сочетаются со всеми медицинскими изделиями, которые применяют в десмургии в случаях, отсутствия прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

8.1 Применение бинтов для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

8.2 Применение бинтов при беременности и кормлении грудью.

Специальных исследований применения при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

8.3 Применение у детей.

СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Возможна утилизация с бытовыми отходами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


Общество с ограниченной ответственностью «ЭВТЕКС» (ООО «Эвтекс»), Россия, 153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Тимирязева, д.1 Тел: 8(4932) 34-50-22; (499) 707-10-09; evers@evers.ru

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА 155040, г.Тейково Ивановской области, ул.Западная д.8.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ЭВТЕКС»

М.Е. Бородин
2014 г.

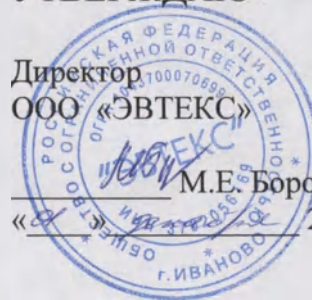

ЭТИКЕТКА

Бинты фиксирующие с неосыпающимися краями по ТУ 9393-003-14959781-2013.

Бинты фиксирующие с неосыпающимися краями «ФРИЛАСТ» по ТУ 9393-003-14959781- 2013.
или

Бинты фиксирующие с неосыпающимися краями «БИЛАСТ» по ТУ 9393-003-14959781-2013.

- размером 4,0см x 1,7м; 6,0см x 1,7м; 8,0 м x 1,7м; 10,0см x 1,7м; 12,0см x 1,7м;
- сырьевой состав бинта: для «ФРИЛАСТ»: полиамид 57 ±5 %; вискоза 43±5%.
для «БИЛАСТ»: полиамид 32 ±5 %; вискоза 68±5%.

- дата изготовления (квартал и год) _____;
- гарантийный срок годности 5 лет с даты изготовления;
- номер и дата регистрационного удостоверения _____;
- знак соответствия.

Хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Возможна утилизация с бытовыми отходами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВТЕКС» (ООО «Эвтекс»),
Россия, 153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Тимирязева, д.1
Тел: 8(4932) 34-50-22; (499) 707-10-09; evers@evers.ru; ИНН 3702056169;
ОГРН 1043700070699

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА 155040, г.Тейково Ивановской области, ул.Западная д.8.