

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Бриз Медикал»



Деулин Д.В.

2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

**«Катетер для периферических вен с принадлежностями»
(см. приложение)**

**производство фирмы «Дельта Мед С.Р.Л.»
Италия**

«СОГЛАСОВАНО»



Директор ФГУ
ГНЦ ЛМ Росздрава

Проф. А.В. Гейниц

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для пункции и катетеризации сосудов с последующим введением в них лекарственных средств.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса катетера не более 10 г.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- 3.1. Введение лекарственных средств, имеющих выраженное раздражающее действие (например, растворы с высокой осмолярностью);
- 3.2. Переливание больших объемов крови и ее компонентов;
- 3.3. Необходимость обеспечения высокой скорости инфузии (свыше 300 мл/мин.).

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

- 4.1. Убедиться, что упаковка катетера не имеет повреждений;
- 4.2. Извлечь катетер из упаковки, соблюдая стерильность;
- 4.3. Промыть катетер гепаринизированным физиологическим раствором через порт промывки, расположенный на рукоятке;
- 4.4. Перед началом применения смочить поверхность катетера или погрузить его в гепаринизированный физиологический раствор для обеспечения гидратации гидрофильного покрытия.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- 5.1. Ввести катетер в вену;
- 5.2. Появление крови в прозрачной камере свидетельствует о нахождении в вене;
- 5.3. Надавить на вену дистально от кончика катетера, зафиксировать катетер пальцем, удалить иглу;
- 5.4. Удалить иглу полностью, продолжая надавливать на вену, продолжать фиксировать канюлю пальцем, подсоединить инфузионную линию;
- 5.5. Игла с защитным механизмом может быть утилизирована.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие предназначено для использования квалифицированным медицинским персоналом.

Хранить в сухом чистом помещении.

Срок хранения 5 лет.

DELTA FIX

СТЕРИЛЬНЫЙ ФИКСАТОР
ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ КАТЕТЕРОВ



- ▲ **DELTA FIX** позволяет надежно зафиксировать внутривенный катетер и обеспечивает эффективную вентиляцию.
- ▲ Адсорбирующий слой предохраняет место инъекции и сохраняет кожные покровы сухими.
- ▲ Дополнительные прокладки под крылья катетера повышают комфорт для пациента.

НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

Фиксатор Delta Fix 58x80 см

50




DELTA MED
MEDICAL DEVICES

Эксклюзивное европейское качество

Катетер для периферических вен с герметичным защитным механизмом

Leo DELTA Self Safe® PUR


ЛУЧШИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

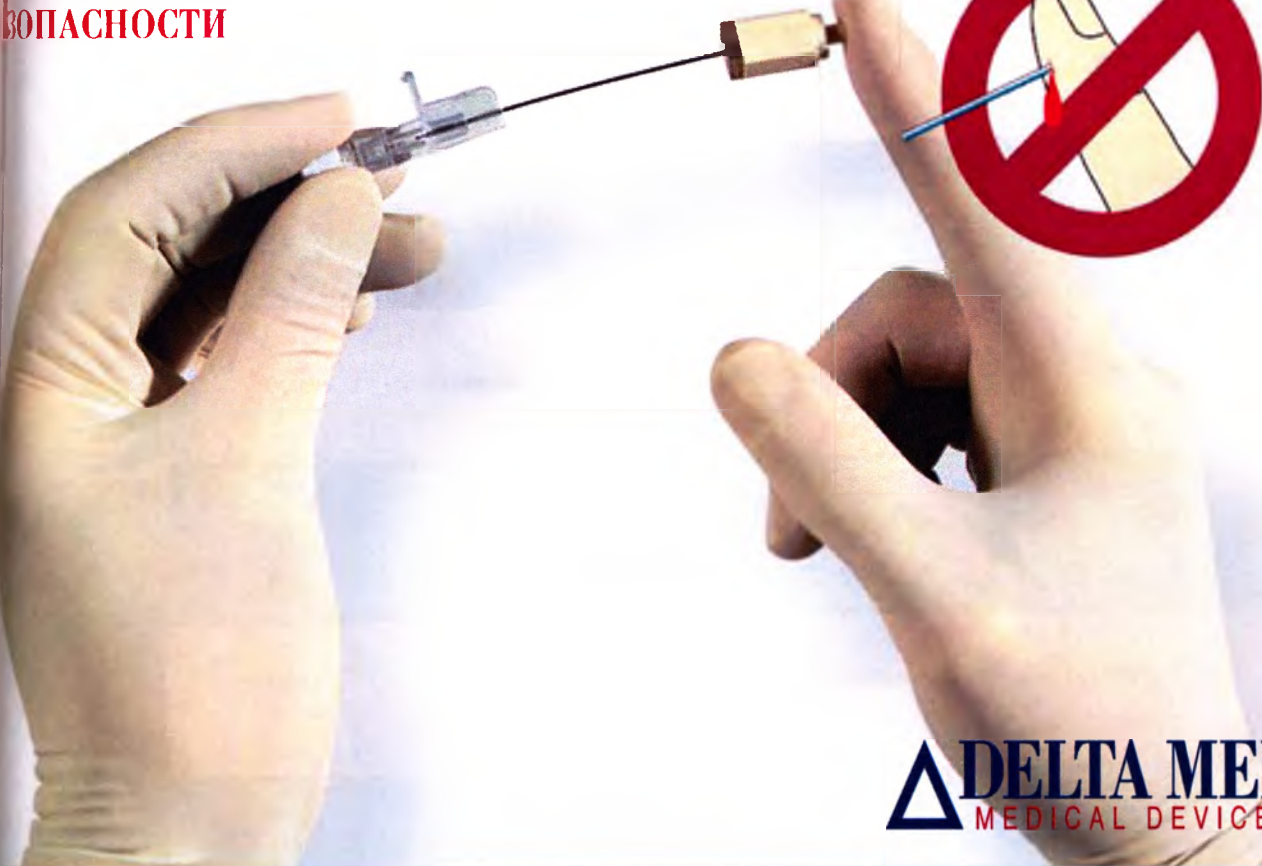

DELTA MED
MEDICAL DEVICES

Преимущества катюли

- Уникальная заточка иглы.
- Высококачественная сталь AISI 304.
- Тонкостенный полиуретановый катетер повышает время эксплуатации в 2 раза.
- Три полностью интегрированные R-контрастные полосы.
- Высокая скорость потока.
- Прозрачные материалы гарантируют полный контроль.
- Гидрофобный фильтр и заглушка.
- Крылья расположены под наклоном.
- Удобная форма позволяет проводить манипуляции одной рукой.
- Привычная техника выполнения катетеризации.

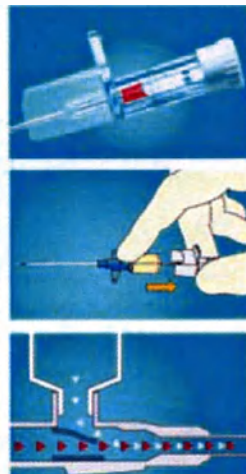

Защитный механизм

- Активируется автоматически в момент извлечения иглы.
- Полностью блокирует доступ к кончику иглы.
- Герметичен. Исключен контакт с кровью.

Эксклюзивное европейское качество

Венозный доступ

DELTA CONNECTOR

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА

	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
	0002	Заглушка Male LUER LOCK cap	200
	0007	Заглушка Female LUER LOCK cap	100
	0006	Заглушка Male / Female LUER LOCK cap	200
	0011	Заглушка Male LUER LOCK cap с инъекционным портом	100
	0017	Заглушка Male LUER LOCK cap с инъекционным портом (без латекса)	100
	0016	Заглушка Male LUER LOCK cap с инъекционным портом и Female протектором (без латекса)	100
	0030 0980 0990	Кран 3-ходовой, 360°, белый Кран 3-ходовой, 360°, синий Кран 3-ходовой, 360°, красный	50 50 50
	0095	Удлинительная линия, 150 см	50
	0045 0050 0052 0055	Удлинительная линия с 3-ходовым краном, 25 см Удлинительная линия с 3-ходовым краном, 50 см Удлинительная линия с 3-ходовым краном, 80 см Удлинительная линия с 3-ходовым краном, 100 см	50 50 50 50
	2043 2295 2290	Регулятор инфузии с линией DELTA DOSER 10 Регулятор инфузии с линией DELTA DOSER 20 Регулятор инфузии с линией DELTA DOSER 30	50 50 50

Эксклюзивное европейское качество