

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови
человека спектрофотометрическим методом на
биохимических анализаторах Alinity с «ЛДГ2 Реагенты для
Alinity с (Lactate Dehydrogenase2)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
ЛДГ2 Реагенты для Alinity c (Lactate Dehydrogenase2), Кат № 04T9920

**REF****04T99-20****IVD**

Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c «ЛДГ2 Реагенты для Alinity c (Lactate Dehydrogenase2)»,

Вариант исполнения:

4 картриджа по 150 тестов в составе:

1. Реагент 1 (Lactate Dehydrogenase2 R1) — 4 x 16,5 мл
2. Реагент 2 (Lactate Dehydrogenase2 R2) — 4 x 11,4 мл
3. Инструкция по применению— 1 шт.

Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland

Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия ЛДГ2 Реагенты для Alinity c (Lactate Dehydrogenase2), Кат № 04T9920

LDH2

Lactate Dehydrogenase2

LDH2

REP 04T9920

4 x 150

www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия

Двумерный штрих-код

Уникальный идентификатор изделия (код)

R1 4 x 16.5 mL

R2 4 x 11.4 mL

CONTAINS: AZIDE

PRODUCT OF IRELAND

INFORMATION FOR USA ONLY

RU ONLY

The Lactate Dehydrogenase2 assay is used for the quantitation of lactate dehydrogenase (LDH) in human serum or plasma on the Alinity c system.

• **(R1)** Active Ingredient: L-(+)-lithium-lactate (19,200 g/L).

• **(R2)** Active Ingredient: NAD⁺ (29,000 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Маркировка компонентов медицинского изделия ЛДГ2 Реагенты для Alinity c (Lactate Dehydrogenase2), Кат № 04T9920

 R1 16.5 mL CONTAINS: AZIDE 2°C — 8°C Двумерный штрих-код Двумерный штрих-код ABBOTT AIDC Longford, Ireland G93336R01 SN	LDH2 Lactate Dehydrogenase2 R2 11.4 mL 04T99 Двумерный штрих-код* IVD Exp. LOT G93337R01 Abbott	H06602R01 LDH2 ID
---	--	--

**REF****04T99-30****IVD**

Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c «ЛДГ2 Реагенты для Alinity c (Lactate Dehydrogenase2)»,

Вариант исполнения:

4 картриджа по 550 тестов в составе:

1. Реагент 1 (Lactate Dehydrogenase2 R1) — 4 x 44,7 мл
2. Реагент 2 (Lactate Dehydrogenase2 R2) — 4 x 29,3 мл
3. Инструкция по применению— 1 шт.

Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland

Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/ ____ от ____/ ____/ Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия ЛДГ2 Реагенты для Alinity c (Lactate Dehydrogenase2), Кат № 04T9930

LDH2**Lactate Dehydrogenase2****Abbott****LDH2****REF 04T9930****4 x 500****R1****4 x 44.7 mL****R2****4 x 29.3 mL****Alinity c**www.corelaboratory.abbott/IFU**Exp****LOT**

Версия

Двумерный штрих-код

Уникальный идентификатор изделия (код)

CONTAINS: AZIDE

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

**PRODUCT OF IRELAND**

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

The Lactate Dehydrogenase2 assay is used for the quantitation of lactate dehydrogenase (LDH) in human serum or plasma on the Alinity c system.

- **[R1]** Active Ingredient: L-(-)-lithium-lactate (19.200 g/L).
- **[R2]** Active Ingredient: NAD⁺ (28.000 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

 R1 44.7 mL 2°C — 8°C  CONTAINS: AZIDE Двумерный штрихкод* Двумерны й штрихкод ABBOTT AIDD Longford, Ireland G93334R01 	LDH2 Lactate Dehydrogenase2 R2 29.3 mL 04T99 Двумерны й штрихкод* IVD    Exp. LOT G93335R01 	H06602R01 LDH2 ID
---	--	---

Всего прошито и пронумеровано

5 листов

Подпись



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах
Alinity с «ЛДГ2 Реагенты для Alinity с (Lactate Dehydrogenase2)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)





Lactate Dehydrogenase2 FOR USE WITH Alinity c

Read Highlighted Changes: Revised February 2022.

Instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from these instructions.

For laboratory professional use only.

NAME

Lactate Dehydrogenase2 (also referred to as LDH2)

INTENDED USE

The Lactate Dehydrogenase2 assay is used for the quantitation of lactate dehydrogenase (LDH) in human serum or plasma on the Alinity c system.

The Lactate Dehydrogenase2 assay is to be used as an aid in the differential diagnosis and treatment of hemolytic anemia, liver diseases, cardiac diseases, and used as a tumor marker in some malignancies.

AND EXPLANATION OF THE TEST

Results of many body tissues, including

en
LDH2
04T99
G93338R02
B4T990

REF 04T9920
REF 04T9930

REF	04T9920	04T9930
Tests per cartridge	150	500
Number of cartridges per kit	4	4
Tests per kit	600	2000
R1	16.5 mL	44.7 mL
R2	11.4 mL	29.3 mL
R1	Active ingredient: L-(+)-lithium-lactate (19.200 g/L). Preservative: sodium azide.	
R2	Active ingredient: NAD ⁺ (28.600 g/L). Preservative: ProClin 300.	

Warnings and Precautions

- **ND**
- For In Vitro Diagnostic Use
- **Rx ONLY**

Safety Precautions

Фотографическое изображение картриджей реагентов, входящих в состав МИ ЛДГ2 Реагенты для Alinity c (Lactate Dehydrogenase2), 4 картриджа



Фотографическое изображение общего вида упаковки ЛДГ2 Реагенты для Alinity с (Lactate Dehydrogenase2), 4 картриджа по 500 тестов





Lactate Dehydrogenase2 FOR USE WITH **Alinity c**

Read Highlighted Changes: Revised February 2022.

Instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from these instructions.
For laboratory professional use only.

NAME
Lactate Dehydrogenase2 (also referred to as LDH2)

INTENDED USE
The Lactate Dehydrogenase2 assay is used for the quantitation of lactate dehydrogenase (LDH) in human serum or plasma on the Alinity c system.

The Lactate Dehydrogenase2 assay is to be used as an aid in the detection of hemolytic specimens.

REF	04T9920	04T9930
Tests per cartridge	150	500
Number of cartridges per kit	4	4
Tests per kit	600	2000
R1	18.5 mL	44.7 mL
R2	11.4 mL	29.3 mL

R1 Active ingredient: L-(+)-lithium-lactate (19,200 g/L). Preservative: sodium azide.

R2 Active ingredient: NAD⁺ (28,000 g/L). Preservative: ProClin 300

Фотографическое изображение общего вида упаковки ЛДГ2 Реагенты для Alinity c (Lactate Dehydrogenase2), 4 картриджа по 500 тестов



Всего прошито и пронумеровано

7 _____ листов

Подпись _____

