

Макет упаковки аспиратора назального «Отривин Бэби» с тремя сменными насадками



Макет упаковки аспиратора назального «Отривин Бэби» с тремя сменными насадками (Боковые стороны)

Назначение: Аспиратор назальный "Отривин Бэби" используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа.

Аспиратор прост и гигиеничен в применении. С его помощью можно облегчить носовое дыхание малыша, чтобы он вновь почувствовал себя комфортно.

Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора "Отривин Бэби" рекомендуется промыть нос физиологическим раствором, например, каплями "Отривин Бэби".

Способ применения:

1. Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.
3. Возьмите мундштук (С) в рот и вставьте конец насадки (А) в один из носовых ходов ребенка.
4. Медленно и аккуратно вытягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
5. Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.
6. Повторите процедуру для другого носового хода.
7. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А). Протрите внешнюю поверхность мундштука (С) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (В) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

Используйте аспиратор только с оригинальными насадками «Отривин Бэби».



Аспиратор назальный "Отривин Бэби" с тремя сменными насадками (жесткие насадки), в составе:

- Аспиратор назальный "Отривин Бэби" – 1 шт.
- Жесткая насадка – 3 шт.

Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия.

Не используйте сломанное или поврежденное изделие, поврежденную насадку или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа.

Используйте аспиратор у ребенка в положении лежа или полужеле, надежно удерживая мундштук между губами.

Состав: аспиратор – силиконовая трубка, полиэтилен, полипропилен; насадки – полипропилен, меламиновая пена.

Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке.

Храните при температуре от 0 °С до 30 °С.

Срок годности 5 лет.

Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01133 от XX.XX.XXXX.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО «Хелеон Рус»,
Российская Федерация, 123112,
г. Москва, наб. Пресненская,
д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6.
Тел.: +7 (495) 777-98-50;

Телефон бесплатной
«Горячей линии»:

☎ 8 (800) 333-46-94

Эл. почта: rus.info@haleon.com

Макет упаковки аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» с двумя
сменными насадками
(Передняя сторона)



Макет упаковки аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» с двумя сменными насадками

(Задняя сторона)

Аспиратор назальный "Отривин Бэби Комфорт" с двумя сменными насадками (мягкие насадки), в составе: Аспиратор назальный «Отривин Бэби Комфорт» – 1 шт. Мягкая насадка – 2 шт.

Медицинское изделие, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01133 от XX.XX.XXXX.

Назначение: Аспиратор назальный "Отривин Бэби Комфорт" используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа. Аспиратор прост и гигиеничен в применении. С его помощью можно облегчить носовое дыхание малыша, чтобы он вновь почувствовал себя комфортно. Удаление слизистых

выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель.

Для облегчения процедуры перед использованием аспиратора рекомендуется промыть нос физиологическим раствором, например, каплями "Отривин Бэби".

Способ применения:

1. Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (A) к центральной части корпуса (B) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.
3. Возьмите мундштук (C) в рот и вставьте конец насадки (A) в один из носовых ходов ребенка.
4. Медленно и аккуратно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (C).
5. Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.
6. Повторите процедуру для другого носового хода.
7. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (A). Протрите внешнюю поверхность мундштука (C) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (B) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

Используйте аспиратор только с оригинальными насадками «Отривин Бэби Комфорт». Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия. Не используйте сломанное или поврежденное изделие, поврежденную насадку или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром. Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа. Используйте аспиратор у ребенка в положении лежа или полулежа, надежно удерживая мундштук между губами.

Состав: аспиратор – силиконовая трубка, полипропилен; насадки – поливинилхлорид, меламиновая пена.

Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Храните при температуре от 0 °C и до 30 °C.

Срок годности 3 года.

Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Производитель: Хелеон КХ САРЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Legal Manufacturer: Haleon CH SARL, Route de l' Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

Место производства: Стипластикс, 62 Чемин дес Плантес, 38160

Сен-Марселлен, Франция.

Produced by Stiplastics, 62 Chemin des Plantees, 38160 Saint-Marcellin, France.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО «Хелеон Рус»,

Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб.


Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6.

Тел.: +7 (495) 777-98-50;

Телефон бесплатной "Горячей линии":

8 (800) 333-46-94

Эл. почта: rus.info@haleon.com

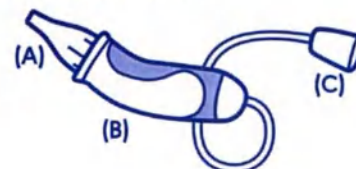

ШТРИХ-КОД

ПРОШИТО И ОПЕЧАТАНО 4
ЛИСТА (-ОВ)

Верность копий документов и подлинность
оригиналов удостоверяю.

Специалист по регистрации

АО «Халеон Рус»

М.Ю. Комарова /

м.п.


10 2024 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Аспиратор назальный «Отривин Бэби» с тремя сменными насадками
(жесткие насадки)



Фотографическое изображение медицинского изделия
Аспиратор назальный «Отривин Бэби» с тремя сменными насадками
(жесткие насадки) в упаковке

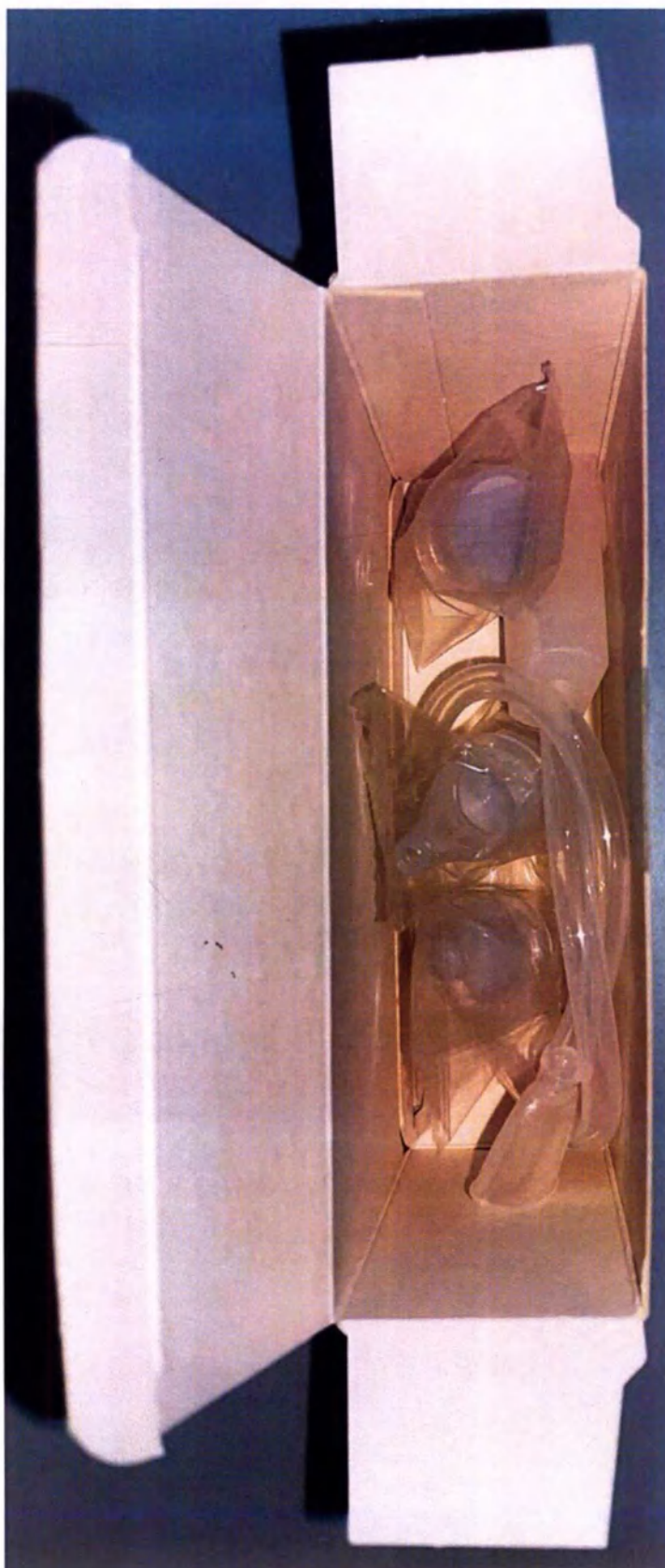

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Аспиратор назальный «Отривин Бэби Комфорт» с двумя сменными насадками
(мягкие насадки)



Фотографическое изображение медицинского изделия
Аспиратор назальный «Отривин Бэби Комфорт» с двумя сменными насадками
(мягкие насадки) в упаковке



ПРОШИТО И ОПЕЧАТАНО 4
ЛИСТА (-ОВ)

Верность копий документов и подлинность
оригиналов удостоверяю.

Специалист по регистрации

АО «Хелеон Рус»

/ М.Ю. Комарова /

21.10 2024 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Аспиратор назальный «Отривин Бэби» с тремя сменными насадками
(жесткие насадки)



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Аспиратор назальный «Отривин Бэби Комфорт» с двумя сменными насадками
(мягкие насадки)

